



Ascom mobiililaitteiden puhdistus ja desinfiointi



Toisin kuin kuluttajille tarkoitetut mobiililaitteet, Ascomin mobiililaitteet on suunniteltu erityisesti terveydenhuollon, teollisuuden ja kaupan vaativiin tarpeisiin.

Mobiililaitteidemme kestävyyttä testataan erilaisilla desinfiointiaineilla. Tästä ohjeesta löydät tietoa testeissä käytetyistä desinfiointiliuoksista ja puhdistusliinoista.

Näin puhdistat mobiililaitteen oikein

- 1.** Pese ja desinfioidi kädet hyvin.
- 2.** Puhdista näkyvä lika laitteesta neutraalilla pesuaineella ja kuivaa laite.
- 3.** Desinfioidi laite asiaankuuluvalla liuoksella tai liinalla. Katso lista testeissä käytetyistä desinfiointiliuoksista ja puhdistusliinoista.

Desinfiointi liuoksella

Levitä desinfiointiliuos huolellisesti hankaamattomalla liinalla.

Seuraavia liuoksia on käytetty testeissä:

DESINFIOINTILIUOS	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/162	Ascom d63/163	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
Etanoli 85 % *Satunnainen desinfiointi	X	X	X	X	X	X	X
Etanoli 85 % **Päivittäinen desinfiointi			X	X	X	X	X
Virkon S 1 % **Päivittäinen desinfiointi	X	X	X	X	X	X	X
Actichlor Plus 0,1% klooria **Päivittäinen desinfiointi				X	X	X	X
Aseptix (H ₂ O ₂) **Päivittäinen desinfiointi	X	X	X	X	X	X	X
Klooriheksidiini 0,5 mg/ml *Satunnainen desinfiointi	X	X	X	X	X	X	X
Klooriheksidiini 0,5 mg/ml **Päivittäinen desinfiointi				X			X
Isopropyyli/isopropanoli 85 % **Päivittäinen desinfiointi						X	X

*Satunnainen desinfiointi: kerran viikossa

**Päivittäinen desinfiointi: enintään 5 desinfiointia päivässä

Desinfiointi puhdistusliinoilla

Huom! Liiallinen hankaaminen laitetta puhdistettaessa tai desinfioidessa saattaa aiheuttaa pintavaurioita. Seuraavia puhdistusliinoja on käytetty testeissä:

PUHDISTUSLIINA	Ascom d41	Ascom d43	Ascom d62/i62	Ascom d63/i63	Ascom d81	Ascom Myco 1/2	Ascom Myco 3
PDI Super Sani-Cloth (purppuranpunainen)				X		X	
PDI Sani-Cloth Plus (punainen)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth Bleach (oranssi)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth HB (vihreä/sinertävä)			X	X		X	
PDI Sani-Cloth AF3 (harmaa)			X	X		X	X
PDI Sani-Cloth AF (valkoinen)			X	X		X	
Certol Prospray			X	X		X	
Clorox Hydrogen Peroxide (vihreä)				X		X	
Clorox Disinfecting Wipes			X	X		X	X
CaviWipes ja CaviWipes XL			X	X		X	X
Cal Tech Dispatch (sisältää valkaisuainetta)			X	X		X	
Tuffie 5 Universal Sanitising Wipes						X	X
Clinell Universal -liinat						X	X
ECOLAB Incidin OxyWipe-S (korvaa tuotteen Aseptix H ₂ O ₂)							X
Hartmann, Bacillol AF							X
Hartmann, Bacillol 30						X	X

Ascom Oy
Puutarhakatu 55–57
20100 Turku
02 415120
myynti@ascom.com
www.ascom.fi