

ascom

SNELSTARTGIDS

DIGISTAT® V4.2

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Inhoud

1. Opstartprocedure.....	3
1.1 DIGISTAT® installatie	3
1.2 Het uitvoeren van DIGISTAT®	3
1.3 Inloggen	4
1.3.1 Inloggen met Barcode	5
1.3.2 Automatisch uitloggen van de gebruiker uitschakelen	5
1.4 Uitloggen	5
2. Systeem niet beschikbaar	6
3. DIGISTAT® IFU.....	7
3.1 Online handleidingen	7
3.1.1 De handleidingen downloaden	8
3.1.2 Weergave van het DIGISTAT® informatievak.....	8
3.2 IFU afdrukken	9
4. Contacten.....	10

1. Opstartprocedure

1.1 DIGISTAT® installatie

Het DIGISTAT® systeem mag alleen door technici van ASCOM UMS of technici die daarvoor uitdrukkelijke toestemming van ASCOM UMS hebben gekregen, worden geïnstalleerd. Het systeem wordt op het werkstation van de eindgebruiker geïnstalleerd en correct geconfigureerd.

1.2 Het uitvoeren van DIGISTAT®

Om DIGISTAT® uit te voeren:

- Dubbelklik op de  icoon op het bureaublad van het werkstation.

Het volgende venster wordt weergegeven terwijl het systeem bezig is met opladen (Fig 1).



Fig 1

Na een paar seconden wordt het DIGISTAT® werkgebied weergegeven (Fig 2).

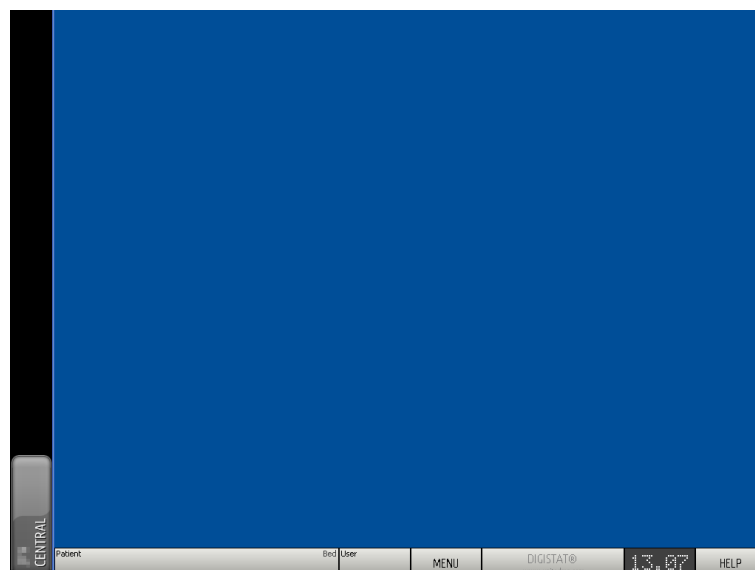


Fig 2

1.3 Inloggen

Om DIGISTAT® te kunnen gebruiken, moet u in het systeem inloggen. Dat betekent dat de gebruiker zijn/haar gebruikersgegevens moet invoeren (gebruikersnaam en wachtwoord). Om in te loggen bij het begin van iedere werksessie:

- Klik op de toets **Gebruiker** zoals afgebeeld in Fig 3 **A**. Het volgende scherm wordt weergegeven.



Fig 3

Verricht het volgende op het scherm:

- Voer uw gebruikersnaam in het veld "Gebruikersnaam" in (Fig 3 **B**).
- Voer uw wachtwoord in het veld "Wachtwoord" in (Fig 3 **C**).
- Klik op de toets **Ok** (Fig 3 **D**).

Nu is de gebruiker ingelogd. Een afkorting die aangeeft dat de gebruiker is ingelogd, wordt weergegeven op de toets **Gebruiker** op de werkbalk (de afkorting is "ADM" in Fig 4).



Fig 4

1.3.1 Inloggen met Barcode

In ziekenhuisstructuren die over deze technologie beschikken, is het mogelijk in te loggen door de barcode te scannen.

Om deze functionaliteit te gebruiken wanneer het systeem het inlogscherm weergeeft (Fig 3):

- Scan de persoonlijke barcode van de gebruiker.

Als de barcode wordt herkend, is de gebruiker automatisch ingelogd.

1.3.2 Automatisch uitloggen van de gebruiker uitschakelen

Als het systeem enige tijd (configureerbaar) niet-actief is, wordt de gebruiker automatisch uitgelogd.

Om deze functie uit te schakelen, na invoering van gebruikersnaam en wachtwoord en alvorens op **Ok** te klikken:

- Klik op de toets **Vergrendelen** op de werkbalk van het scherm "Inloggen" (Fig 5 A).



Fig 5

Wanneer de gebruiker is vergrendeld, is de afkorting van de gebruiker op de werkbalk rood (Fig 6).



Fig 6

1.4 Uitloggen

De gebruiker moet om een werksessie met DIGISTAT® af te sluiten, uit het systeem "uitloggen".

Om uit te loggen:

- Klik op de toets **Gebruiker** op de werkbalk (Fig 7 en Fig 3 A).



Fig 7

De afkorting van de gebruiker verdwijnt van de toets **Gebruiker**.

2. Systeem niet beschikbaar

Als er zich tijdens het opstarten problemen met de verbinding met de server voordoen, geeft het systeem een speciaal "Systeemherstel" venster weer (Fig 8).

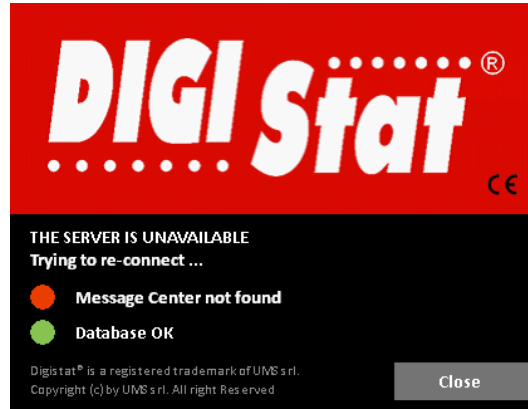


Fig 8

Soms lost het verbindingsprobleem zich automatisch na korte tijd op. Is dit niet het geval, wordt u verzocht contact op te nemen met de ASCOM UMS technische dienst. Zie paragraaf 4 voor ASCOM UMS contactgegevens.

Er zijn, zeldzame maar mogelijke, gevallen waarin het materieel onmogelijk is om het DIGISTAT® systeem te gebruiken (vanwege langdurige black-outs, rampen, enz.).

Ziekenhuisstructuren die DIGISTAT® gebruiken, moeten noodprocedures opstellen om het hoofd te kunnen bieden aan dit soort voorvallen en om:

- 1) de ziekenhuisafdelingen weer operationeel te maken;
- 2) het systeem zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te stellen.

ASCOM UMS kan ondersteuning verlenen bij deze noodprocedure, maar de structuur in kwestie blijft verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de procedure.

Zie paragraaf 4 voor ASCOM UMS contactgegevens.

3. DIGISTAT® IFU

De DIGISTAT® systeem gebruiksinstructies (IFU) worden bij het product meegeleverd. Deze kunnen in digitaal formaat in het DIGISTAT® systeem worden weergegeven (alleen deze snelstartgids is in gedrukte vorm beschikbaar). Voor toegang tot de gebruiksinstructies

- Klik op de toets **Help** op de werkbalk (Fig 9)



Fig 9

Er wordt een scherm geopend van waaruit u toegang heeft tot:

- 1) de DIGISTAT® gebruikshandleidingen;
- 2) eventuele beknopte handleidingen met betrekking tot speciale procedures.

De online documentatie is in PDF-formaat.

3.1 Online handleidingen

De DIGISTAT® gebruikshandleidingen kunnen ook vanaf een internetsite worden gedownload.

Iedere DIGISTAT® klant heeft toegang tot een beschermd gebied waar alle bestaande versies van de verschillende handleidingen beschikbaar zijn. Op deze wijze kan de gebruiker controleren of er een bijgewerkte versie van de handleiding in kwestie beschikbaar is. ASCOM UMS zal zijn klanten in ieder geval inlichten over bijwerkingen die een impact op de veiligheid kunnen hebben en verschaft in deze gevallen de bijgewerkte gebruikshandleidingen.

Het gebied is alleen toegankelijk na verificatie van de gebruiker. Iedere klant beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord dat hij/zij moet invoeren om naar het beschermde gebied te gaan. Deze gebruikersgegevens worden samen met de productetiketten verschaft op het moment van installatie van DIGISTAT®.

Iedere handleiding beschikt over een speciale code.

Er worden nieuwe versies van een document uitgegeven in geval van bijwerkingen van het vorige document (bijvoorbeeld, na het vinden en corrigeren van kleine foutjes, typfouten, weglatingen, enz., in zowel DIGISTAT® als in het document). In geval van nieuwe versies van het DIGISTAT® systeem, wordt een nieuwe handleiding uitgegeven (geen nieuwe versie van een bestaande handleiding). In dit geval verandert de code van het document.

De documentcode is duidelijk zichtbaar op het document.

Neem in geval van verlies van de gebruikersnaam en/of wachtwoord (telefonisch, via fax of via e-mail) contact op met de technische dienst van ASCOM UMS/de Distributeur om nieuwe gebruikersgegevens te ontvangen. Zie paragraaf 4 voor ASCOM UMS contactgegevens.

3.1.1 De handleidingen downloaden

De gebruikshandleidingen kunnen met iedere browser (bv. IExplorer, Chrome, Firefox) vanaf onze Cloud server worden gedownload. Voor het downloaden van de DIGISTAT® handleidingen, moet u het volgende adres in de adresbalk van uw webbrowser typen:

Host URL: <https://cloud.unitedms.it/>

Er wordt nu een welkomspagina geopend. Voor toegang tot de lijst Gebruikshandleidingen moet u uw gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren.

Gebruikersnaam – door ASCOM UMS verschafte Gebruikersnaam

Wachtwoord – door ASCOM UMS verschaft Wachtwoord

3.1.2 Weergave van het DIGISTAT® informatievak

Om het DIGISTAT® informatievak weer te geven:

- Klik op de toets **Menu** op de werkbalk (Fig 10 **A**)



Fig 10

Er verschijnt een meerkeuzemenu (Fig 11).



Fig 11

- Klik op het menu op de toets **Informatie** (Fig 11 **A**).

Het DIGISTAT® informatievak wordt geopend (Fig 12).



Fig 12

3.2 IFU afdrukken

De klant kan een geprinte versie van de gebruikshandleidingen van de aangeschafte producten aanvragen. ASCOM UMS zal de aangevraagde handleidingen zo snel mogelijk leveren.

De aanvraag moet naar de technische dienst worden gezonden. Zie paragraaf 4 voor ASCOM UMS contactgegevens.

4. Contacten

- **ASCOM UMS srl Unipersonale**

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italië
Tel. (+39) 055 0512161
Fax (+39) 055 8290392

- **Technische dienst**

support@unitedms.com
800999715 (gratis, alleen vanuit Italië)

- **Informatie verkoop en producten**

sales@unitedms.com

- **Algemene info**

info@unitedms.com