

ascom

DIGISTAT® V5.0

SNELSTARTGID

DIG UD IU 0006 NED V01

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Inhoud

1. Opstartprocedure	3
1.1 DIGISTAT® installatie	3
1.2 Het uitvoeren van DIGISTAT®	3
1.3 Inloggen	4
1.3.1 Inloggen met Barcode	5
1.3.2 Automatisch uitloggen van de gebruiker uitschakelen	6
1.4 Uitloggen	6
2. Systeem niet beschikbaar	7
3. DIGISTAT® IFU	8
3.1 Online handleidingen	8
3.1.1 De handleidingen downloaden	9
4. Weergave van het DIGISTAT® informatievak	10
4.1 IFU afdrukken	11
5. Contacten	12

1. Opstartprocedure

1.1 DIGISTAT® installatie

Het DIGISTAT® systeem mag alleen door technici van ASCOM UMS of technici die daarvoor uitdrukkelijke toestemming van ASCOM UMS hebben gekregen, worden geïnstalleerd. Het systeem wordt op het workstation van de eindgebruiker geïnstalleerd en correct geconfigureerd.

1.2 Het uitvoeren van DIGISTAT®

Om DIGISTAT® uit te voeren:

- Dubbelklik op de  icoon op het bureaublad van het workstation.

Het volgende venster wordt weergegeven terwijl het systeem bezig is met opladen (Fig 1).



Fig 1

Na een paar seconden wordt het DIGISTAT® werkgebied weergegeven (Fig 2).

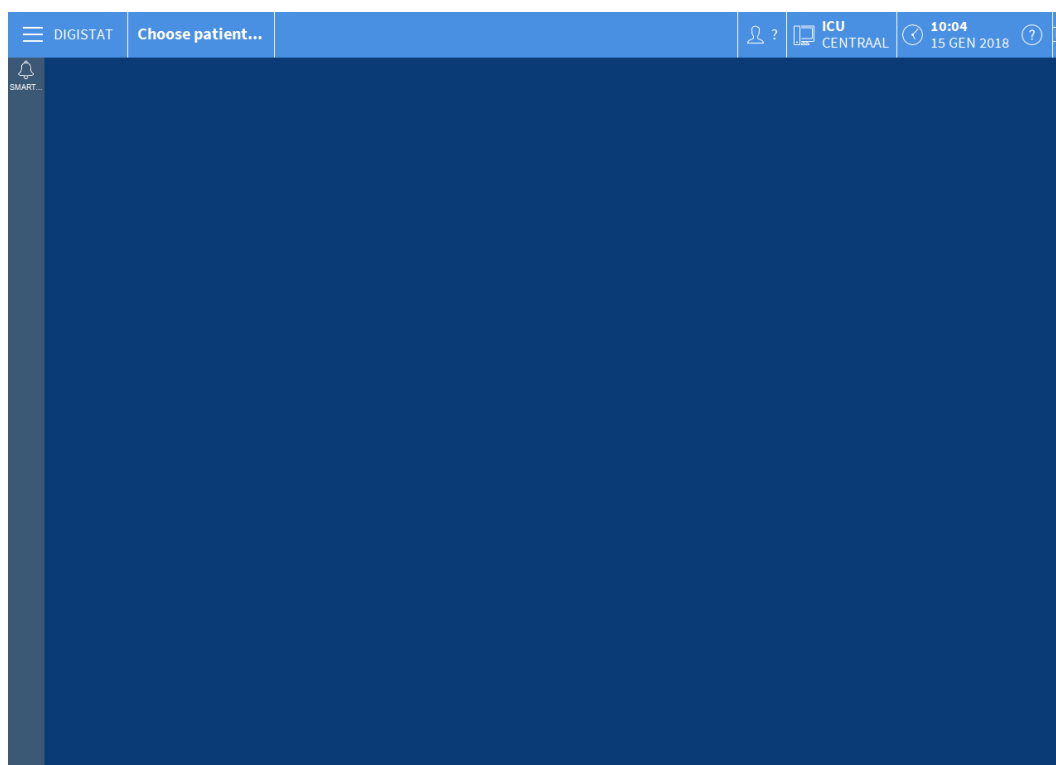


Fig 2

1.3 Inloggen

Om DIGISTAT® te kunnen gebruiken, moet u in het systeem inloggen. Dat betekent dat de gebruiker zijn/haar gebruikersgegevens moet invoeren (gebruikersnaam en wachtwoord). Om in te loggen bij het begin van iedere werksessie:

- Klik op de toets **Gebruiker** zoals afgebeeld in Fig 3 **A**. Het volgende scherm wordt weergegeven.

Fig 3

Verricht het volgende op het scherm:

- Voer uw gebruikersnaam in het veld "Gebruikersnaam" in (Fig 3 B).
- Voer uw wachtwoord in het veld "Wachtwoord" in (Fig 3 C).
- Klik op de toets **Ok** (Fig 3 D).

Nu is de gebruiker ingelogd. Een afkorting die aangeeft dat de gebruiker is ingelogd, wordt weergegeven op de toets **Gebruiker** op de werkbalk (de afkorting is "DDU" in Fig 4).



Fig 4

1.3.1 Inloggen met Barcode

In ziekenhuisstructuren die over deze technologie beschikken, is het mogelijk in te loggen door de barcode te scannen.

Om deze functionaliteit te gebruiken wanneer het systeem het inlogscherf weergeeft (Fig 3):

- Scan de persoonlijke barcode van de gebruiker.

Als de barcode wordt herkend, is de gebruiker automatisch ingelogd.

1.3.2 Automatisch uitloggen van de gebruiker uitschakelen

Als het systeem enige tijd (configureerbaar) niet-actief is, wordt de gebruiker automatisch uitgelogd.

Om deze functie uit te schakelen, na invoering van gebruikersnaam en wachtwoord en alvorens op **Ok** te klikken:

- Klik op de toets **Vergrendelen** op de werkbalk van het scherm "Inloggen" (Fig 5 **A**).

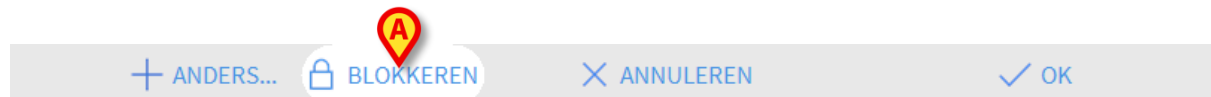


Fig 5

Wanneer de gebruiker is vergrendeld, een slot wordt weergegeven op de bedieningsbalk (Fig 6).



Fig 6

1.4 Uitloggen

De gebruiker moet om een werksessie met DIGISTAT® af te sluiten, uit het systeem "uitloggen".

Om uit te loggen:

- Klik op de toets **Gebruiker** op de werkbalk (Fig 7 en Fig 3 **A**).

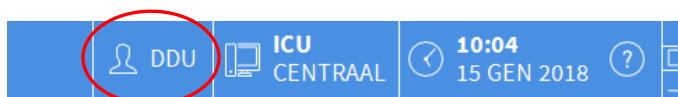


Fig 7

De afkorting van de gebruiker verdwijnt van de toets **Gebruiker**.

2. Systeem niet beschikbaar

Als er zich tijdens het opstarten problemen met de verbinding met de server voordoen, geeft het systeem een speciaal "Systeemherstel" venster weer (Fig 8).

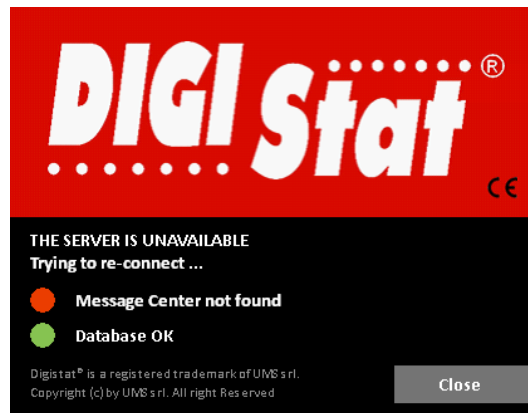


Fig 8

Soms lost het verbindingsprobleem zich automatisch na korte tijd op. Is dit niet het geval, wordt u verzocht contact op te nemen met de ASCOM UMS technische dienst. Zie paragraaf 5 voor ASCOM UMS contactgegevens.

Er zijn, zeldzame maar mogelijke, gevallen waarin het materieel onmogelijk is om het DIGISTAT® systeem te gebruiken (vanwege langdurige black-outs, rampen, enz.).

Ziekenhuisstructuren die DIGISTAT® gebruiken, moeten noodprocedures opstellen om het hoofd te kunnen bieden aan dit soort voorvallen en om:

- 1) de ziekenhuisafdelingen weer operationeel te maken;
- 2) het systeem zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te stellen.

ASCOM UMS kan ondersteuning verlenen bij deze noodprocedure, maar de structuur in kwestie blijft verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de procedure.

Zie paragraaf 5 voor ASCOM UMS contactgegevens.

3. DIGISTAT® IFU

De DIGISTAT® systeem gebruiksinstructies (IFU) worden bij het product meegeleverd. Deze kunnen in digitaal formaat in het DIGISTAT® systeem worden weergegeven (alleen deze snelstartgids is in gedrukte vorm beschikbaar). Voor toegang tot de gebruiksinstructies

- Klik op de toets **Help** op de werkbalk (Fig 9)



Fig 9

Er wordt een scherm geopend van waaruit u toegang heeft tot:

- 1) de DIGISTAT® gebruikshandleidingen;
- 2) eventuele beknopte handleidingen met betrekking tot speciale procedures.

De online documentatie is in PDF-formaat.

3.1 Online handleidingen

De aanwijzingen voor het gebruik van het "DIGISTAT" systeem kunnen ook van internet, van een speciaal hiervoor bestemde ftp-site, worden gedownload. Iedere klant van "Digistat" heeft een eigen gereserveerd gebied ter beschikking, waarin hij alle bestaande versies van de handleidingen vindt. Op die manier kan de klant controleren of er een bijgewerkte versie is ten opzichte van zijn eigen versie. ASCOM UMS (of de distributeurs) zullen de klant informeren over eventuele updates die van invloed zijn op de veiligheid, en de bijgewerkte handleiding tegelijkertijd verstrekken. Toegang tot dat gebied is onderhevig aan legitimatie. Iedere klant heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord ter beschikking waarmee hij toegang kan krijgen tot het gereserveerde gebied. Deze toegangsgegevens worden tijdens de eerste installatie samen met de etiketten van het product verstrekt. Iedere handleiding heeft een specifieke code in de volgende vorm:

"DIGUDIU.NNNNNED. **Versie MM**"

Bijvoorbeeld

"DIGUDIU.0001NED.**V01**"

Het laatste gedeelte van de code: "V01" is het gedeelte dat progressief toeneemt wanneer er nieuwe versies van dezelfde handleiding zijn.

De nieuwe versies van een document worden afgegeven indien er wijzigingen aan het vorige zijn aangebracht (bijvoorbeeld vanwege correcties van onnauwkeurigheden of weglatingen, zowel in de handleiding zelf als in "Digistat").

In geval van updates van het "Digistat" systeem naar volgende versies, wordt een nieuwe handleiding afgegeven (en geen nieuwe versie van de vorige). In dat geval wordt de code van het document veranderd (bijvoorbeeld "0001", het onderstreepte gedeelte hieronder)

"DIGUDIU.0001NED.V01"

Het nieuwe document wordt samen met de update van "Digistat" aan de klant gegeven.

De code van het document staat op elke eerste pagina en in elke voetnoot. Op de eerste pagina staat de versie van "Digistat" waar het document betrekking op heeft.

De versie van het "Digistat" systeem die momenteel is geïnstalleerd wordt in het dialoogvenster aangegeven.

De versie wordt in numerieke vorm uitgedrukt. Bijvoorbeeld "1.0.1". De eerste twee cijfers geven nieuwe uitgaven en fundamentele wijzigingen van het systeem weer. Het laatste cijfer geeft minder belangrijke wijzigingen of correcties van bestaande bugs weer. Een handleiding heeft betrekking op alle versies van het product "Digistat", die de eerste twee cijfers delen. Ze is geldig als het de laatste versie is, die op de ftp-site is gepubliceerd.

Wanneer u de gebruikersnaam en/of het wachtwoord kwijtraakt, wordt u verzocht contact op te nemen met de assistentie van ASCOM UMS of de distributeurs staan om nieuwe toegangsgegevens te krijgen.

3.1.1 De handleidingen downloaden

De gebruikshandleidingen kunnen met iedere browser (bv. IExplorer, Chrome, Firefox) vanaf onze Cloud server worden gedownload. Voor het downloaden van de DIGISTAT® handleidingen, moet u het volgende adres in de adresbalk van uw webbrowser typen:

Host URL: <https://confluence.ascom-ws.com>

Er wordt nu een welkomspagina geopend. Voor toegang tot de lijst Gebruikshandleidingen moet u uw gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren.

Gebruikersnaam – door ASCOM UMS verschafte Gebruikersnaam

Wachtwoord – door ASCOM UMS verschaft Wachtwoord

4. Weergave van het DIGISTAT® informatievak

Om het DIGISTAT® informatievak weer te geven:

- Klik op de toets **Menu** op de werkbalk (Fig 10 **A**)



Fig 10

Er verschijnt een meerkeuzemenu (Fig 11).

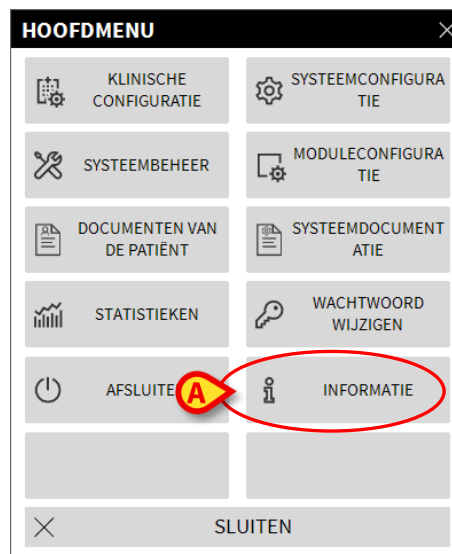


Fig 11

- Klik op het menu op de toets **Informatie** (Fig 11 **A**).

Het DIGISTAT® informatievak wordt geopend (Fig 12).



Fig 12

4.1 IFU afdrukken

De klant kan een geprinte versie van de gebruikshandleidingen van de aangeschafte producten aanvragen. ASCOM UMS zal de aangevraagde handleidingen zo snel mogelijk leveren.

De aanvraag moet naar de technische dienst worden gezonden. Zie paragraaf 5 voor ASCOM UMS contactgegevens.

5. Contacten

Bij vragen gelieve eerste de Distributeur te raadplegen die het Product heeft geïnstalleerd.

Dit zijn de gegevens om contact op te nemen met de fabrikant:

ASCOM UMS srl Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italië

Tel. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Technische dienst

support.it@ascom.com

800999715 (gratis, alleen vanuit Italië)

Informatie verkoop en producten

it.sales@ascom.com

Algemene info

it.info@ascom.com