



Digistat Suite

Vejledning Til Hurtig Start

Revision 4.0

2022-07-06

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Digistat® Suite version 8.0

Digistat-pakken er sammensat af følgende produkter:

Digistat Care 1.3

Digistat Docs 1.3

Digistat® Care og Digistat® Docs er fremstillet af Ascom UMS srl (<http://www.ascom.com>).



Digistat® Care er ⁰⁴⁷⁶ mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets EU-forordning 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr (MDR).

Ascom UMS er certificeret i henhold til EN ISO 13485:2016 med følgende rækkevidde: "Product and specification development, manufacturing management, marketing, sales, production, installation and servicing of information, communication and workflow software solutions for healthcare including integration with medical devices and patient related information systems".

Softwarelicens

Digistat® Care må kun anvendes efter at have indhentet en gyldig licens fra Ascom UMS eller distributøren

Licenser og registrerede varemærker

Digistat® er et varemærke hos Ascom UMS s.r.l. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere.

I dette dokument, hvor end det nævnes, anses Android™, Google™ og Google Play™ som varemærker tilhørende Google, LLC.

Ingen del af denne udgivelse må gengives, videresendes, kopieres, registreres eller oversættes uanset form, måde eller medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ascom UMS.

Indhold

1. Fremgangsmåde ved opstart.....	4
1.1 Installation af Digistat	4
1.2 Fremgangsmåde ved brug af Digistat.....	5
1.3 Fremgangsmåde for at logge på.....	5
1.3.1 Log på med stregkode	6
1.3.2 Fremgangsmåde ved deaktivering af automatisk log ud af bruger	7
1.4 Log ud.....	7
2. Manglende adgang til system.....	8
3. Brugermanual (IFU) vedrørende Digistat.....	9
3.1 Online-manualer	9
4. Fremgangsmåde ved visning af Om Digistat boksen	10
4.1 Trykte brugermanualer (IFU)	10
5. Kontaktoplysninger.....	11

1. Fremgangsmåde ved opstart

1.1 Installation af Digistat

Digistat systemet kan kun installeres af teknikere fra Ascom UMS eller teknikere med udtrykkelig autorisation fra Ascom UMS. Slutbrugeren vil opleve, at systemet allerede er installeret og konfigureret korrekt på vedkommendes arbejdsstation.

1.2 Fremgangsmåde ved brug af Digistat

Brug af Digistat:

- Dobbeltklik på  ikonet på arbejdsstationens desktop.

Det følgende vindue vises, mens systemet er i gang med indlæsningen.

Digistat arbejdsområdet vises efter et par sekunder (Fig. 1).

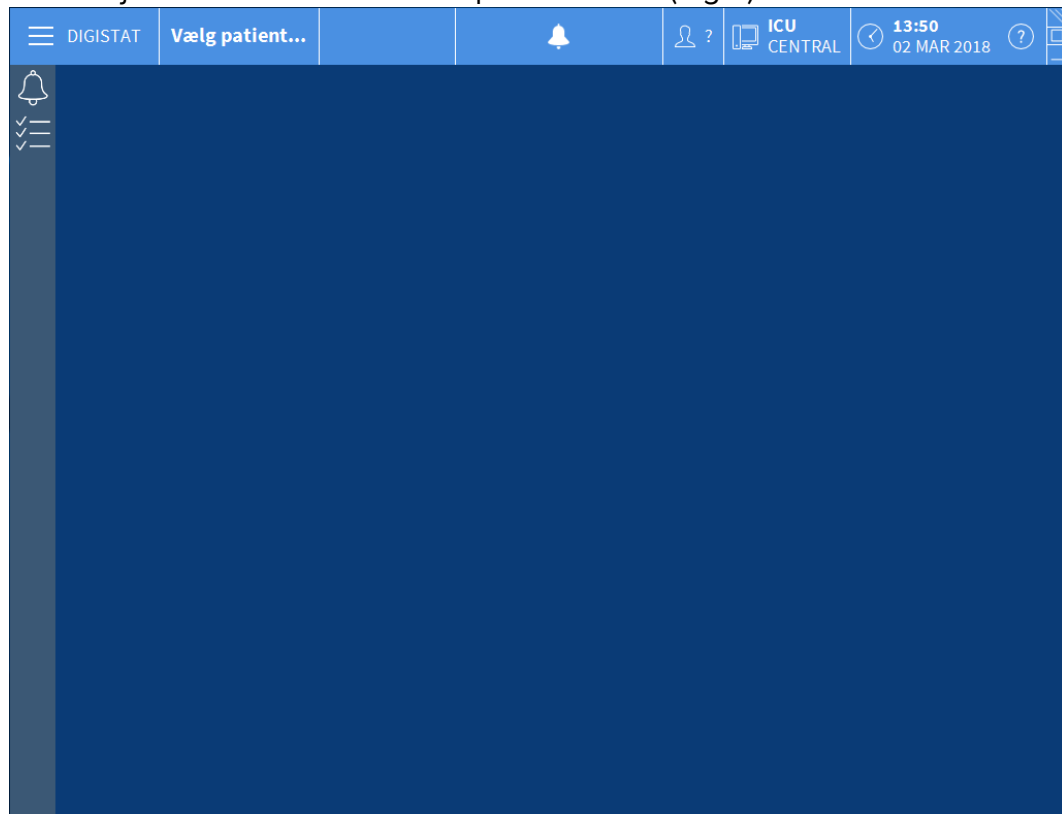


Fig. 1

1.3 Fremgangsmåde for at logge på

Brug af Digistat kræver, at der logges korrekt på systemet. Eksempelvis skal brugeren indtaste sine adgangsinformationer (brugernavn og password). For at logge på i starten af hver arbejds-session

- er det nødvendigt at klikke på **Bruger** knappen, der er vist i Fig. 2 **A**. Følgende skærbillede vises.

BRUGERNAVN

PASSWORD

Q W E R T Y U I O P " Backspace

A S D F G H J K L ()

Fane Z X C V B N M , : ? Enter

Lås - + - = Slet

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

SENESTE

1	ADMIN	2		3		4		5	
6		7		8		9			

+ MERE... LÅS X SLET ✓ OK

Fig. 2

Gør herefter følgende på skærmen:

- Indtast dit brugernavn i “Brugernavn” feltet (Fig. 2 **B**).
- Indtast dit password i “Password” feltet (Fig. 2 **C**).
- Klik på **Ok** knappen (Fig. 2 **D**).

Herefter er brugeren logget på. Der vises en forklortelse for den bruger, som aktuelt er logget på, i **Bruger** knappen på kontrolbjælken (i Fig. 3 er forklortelsen “DDA”).

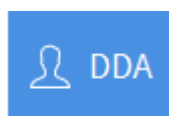


Fig. 3

1.3.1 Log på med stregkode

På de sundhedsinstitutioner, som benytter denne form for teknologi, er det muligt at logge på ved scanning af en stregkode.

For at bruge denne funktion, når systemet viser log på-skærmbilledet (Fig. 2),

- skal brugerens personlige stregkode scannes.

Hvis stregkoden genkendes, logges brugeren på med det samme.

1.3.2 Fremgangsmåde ved deaktivering af automatisk log ud af bruger

Hvis systemet ikke benyttes i et vist tidsrum (kan konfigureres), logges brugeren automatisk ud.

Deaktivering af denne funktion kan ske på følgende måde efter indtastning af brugernavn og password og inden klik på **Ok**:

- Klik på **Lås** knappen på styrebjelken i “Log på” skærbilledet (Fig. 4 **A**).

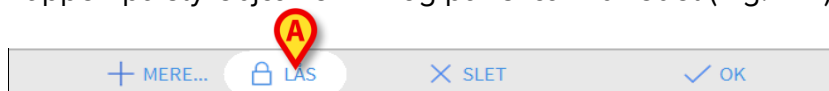


Fig. 4

Hvis brugeren er låst, en hængelås vises nederst på brugerikonet (Fig. 5).

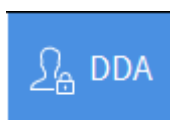


Fig. 5

1.4 Log ud

For at lukke en arbejds-session med Digistat skal brugeren logge ud af systemet.

Fremgangsmåde for at logge ud

- Klik på **Bruger** knappen på styrebjelken (Fig. 6 og Fig. 2 **A**).

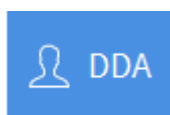


Fig. 6

Forkortelsen for brugeren forsvinder fra **Bruger** knappen.

2. Manglende adgang til system

Hvis der er problemer med serverforbindelsen i forbindelse med opstart, viser systemet et specifikt "Systemafhjælpning" vindue.

I nogle tilfælde løses problemet med forbindelse automatisk efter et kort tidsrum. Kontakt det tekniske servicecenter hos Ascom UMS, hvis dette ikke er tilfældet. Se afsnit 5 vedrørende Ascom UMS kontaktoplysninger.

I meget sjældne tilfælde er det ikke fysisk muligt at bruge Digistat systemet.

De sundhedsinstitutioner, som benytter Digistat, skal fastlægge en nødprocedure for at afhjælpe sådanne situationer og for at:

- 1) sikre genoprettelse af driften i hospitalsafdelingerne;
- 2) genetablere adgangen til systemet så hurtigt som muligt.

Ascom UMS tilbyder support og service vedrørende nødproceduren, men sundhedsinstitutionen er selv ansvarlig for fastlæggelse og implementering af proceduren.

Se afsnit 5 vedrørende Ascom UMS kontaktoplysninger.

3. Brugermanual (IFU) vedrørende Digistat

Brugermanualen (IFU) vedrørende Digistat systemet leveres sammen med produktet. Den kan vises digitalt i Digistat systemet (vejledningen til hurtig start findes kun på papir). Adgang til brugermanualen

- Klik på **Hjælp** knappen på styrebjælken (Fig. 7)



Fig. 7

Herefter åbnes en skærm, som giver adgang til følgende:

- 1) de relevante Digistat brugermanualer;
- 2) mulige vejledninger med hurtig reference vedrørende specifikke procedurer.

Online-dokumentationen er i pdf-format.

3.1 Online-manualer

Digistat brugermanualerne kan også downloades fra et websted.

Alle Digistat kunder har adgang til et beskyttet område, hvor alle de eksisterende versioner af relevante manualer findes. Herved kan brugeren kontrollere, om der findes en opdateret version af vedkommendes manual.

Brugermanualerne kan downloades ved hjælp af en hvilken som helst browser (eksempelvis Internet Explorer, Chrome, Firefox). Indtast følgende adresse i browserens adressefelt for at downloade Digistat manualerne:

<https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v7.2>

Herefter vises en velkomstsider. Det er nødvendigt at indtaste brugernavn og password for at få adgang til listen over brugermanualer.

Brugernavn – Brugernavn tildelt af Ascom UMS

Password – Password tildelt af Ascom UMS

De relevante manualer findes i PDF format.

4. Fremgangsmåde ved visning af Om Digistat boksen

Visning af Om Digistat boksen

- Klik på **Menu** knappen på kontrolbjælken (Fig. 8 **A**)



Fig. 8

Herefter åbnes en menu med forskellige funktioner (Fig. 9).



Fig. 9

- Klik på **Om** knappen i menuen (Fig. 9 **A**).

Herefter åbnes Om Digistat boksen.

4.1 Trykte brugermanualer (IFU)

Kunden kan bestille en trykt version af brugermanualerne vedrørende de erhvervede produkter. Ascom UMS sender de bestilte manualer så hurtigt som muligt.

Bestillingen skal sendes til det tekniske servicecenter. Se afsnit 5 vedrørende Ascom UMS kontaktoplysninger.

5. Kontaktoplysninger

Kontakt venligst først distributøren, som installerede produktet, ved enhver henvendelse.

Her er producentens kontaktoplysninger:

Ascom UMS srl

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018, Scandicci (FI), Italien

Tlf. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Teknisk service

support.it@ascom.com

800999715 (gratis, kun Italien)

Info om salg og produkter

it.sales@ascom.com

Generelle oplysninger

it.info@ascom.com