



Digistat Suite

Pikaopas

Tarkistus 4.0

2022-07-06

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Digistat® Suite version 8.0

Digistat-ohjelmistopaketti koostuu seuraavista tuotteista:

Digistat® Care 1.3

Digistat® Docs 1.3

Digistat® Care- ja Digistat® Docs -tuotteiden valmistaja on Ascom UMS srl (<http://www.ascom.com>).



Digistat® Care on ⁰⁴⁷⁶-merkitty lääkinnällisistä laitteista 5. huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 (MDR-asetus) mukaisesti.

ASCOM UMS on standardien UNI EN ISO 9001:2015 ja UNI CEI EN ISO 13485:2012 mukaisesti sertifioitu *“Product and specification development, manufacturing management, marketing, sales, production, installation and servicing of information, communication and workflow software solutions for healthcare including integration with medical devices and patient related information systems”*.

Ohjelmistolisenssi

Digistat® Care on käytettävä vain, kun Ascom UMS tai jälleenmyyjä on saanut voimassa olevan lisenssin.

Lisenssit ja rekisteröidyt tavaramerkit

Digistat® on ASCOM UMS s.r.l.:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kaikkia tässä asiakirjassa mainittuja Android™-, Google™- ja Google Play™ -nimiä tulee kohdella Google, LLC -yhtiön tavaramerkkeinä.

Kaikkien julkaisun osien jäljennös, siirto, kopiointi, tallennus tai käännös kaikissa muodoissa ja kaikilla välineillä on kiellettyä ilman ASCOM UMS -yhtiön kirjallista ennakkosuostumusta.

Sisällysluettelo

1. Käynnistys.....	4
1.1 Digistat-järjestelmän asennus	4
1.2 Digistat-järjestelmän käynnistys	5
1.3 Sisäänkirjautuminen.....	6
1.3.1 Viivakoodikirjautuminen	7
1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus -toiminto).....	7
1.4 Uloskirjautuminen.....	7
2. Järjestelmän käyttökatkot.....	8
3. Digistat-järjestelmän käyttöohjeet	9
3.1 Verkossa olevat käyttöohjeet	9
4. Digistat-järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö	10
4.1 Painettu käyttöohje	10
5. Yhteystiedot.....	11

1. Käynnistys

1.1 Digistat-järjestelmän asennus

Ainoastaan Ascom UMS -tekniikot tai Ascom UMS:n erityisesti valtuuttamat teknikot saavat asentaa Digistat-järjestelmän. Kun järjestelmä toimitetaan loppukäyttäjälle, se on jo asennettu ja määritetty asianmukaisesti työasemaan.


1.2 Digistat-järjestelmän käynnistys

Digistat-järjestelmän käynnistys:

- Kaksoisklikkaa  -kuvaketta työaseman työpöydällä.

Seuraava ikkuna näytetään järjestelmän latautuessa.

Muutaman sekunnin kuluttua DIGISTAT®-työalue näytetään (Kuva 1).

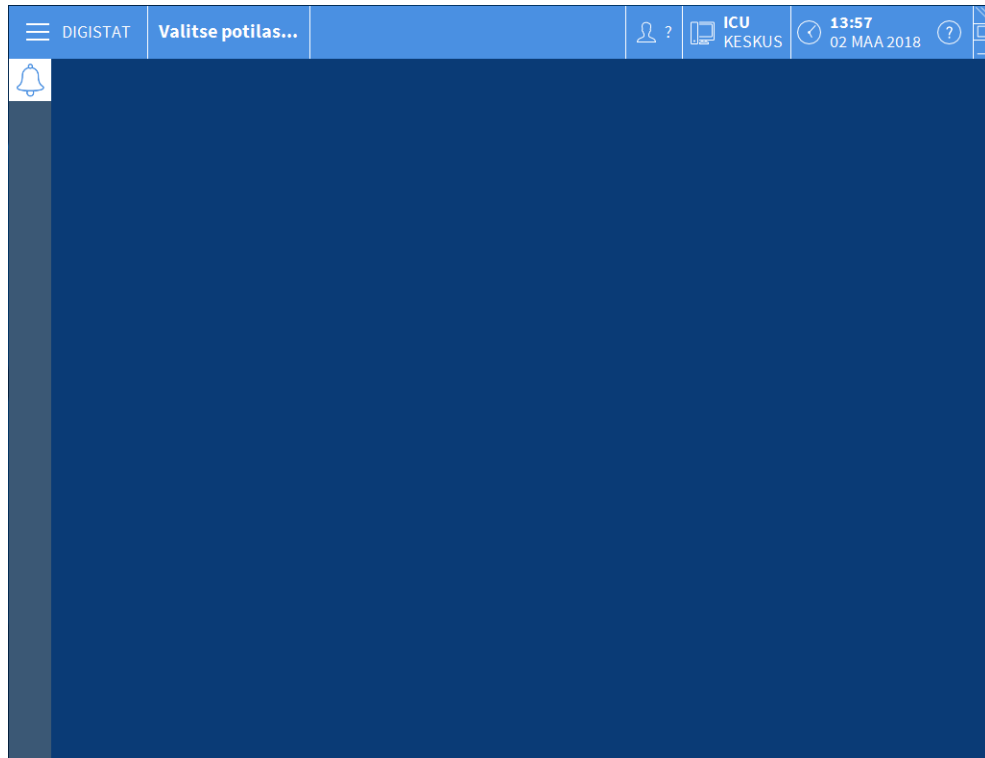

Kuva 1

1.3 Sisäänkirjautuminen

Digistat-järjestelmän käyttö vaatii sisäänkirjautumista. Toisin sanoen käyttäjän täytyy syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasansansa. Kirjaudu sisään työistunnon aluksi seuraavasti:

- Klikkaa **Käyttäjä**-painiketta kohdassa Kuva 2 **A**. Seuraava sivu näytetään.

Kuva 2

Tämän jälkeen:

- Kirjoita käyttäjätunnuksesi Käyttäjätunnus-kenttään (Kuva 2 **B**).
- Kirjoita salasansasi Salasana-kenttään (Kuva 2 **C**).
- Klikkaa **Ok**-painiketta (Kuva 2 **D**).

Olet kirjautunut sisään. Kirjautunutta käyttäjää osoittava lyhenne näytetään tehtäväpalkin **Käyttäjä**-painikkeessa (lyhenne on kuvassa 4 "FFI").



Kuva 3

1.3.1 Viivakoodikirjautuminen

Terveystieteiden tutkimuskeskus on mahdollista ottaa käyttöön sisäänkirjautuminen viivakoodinlukijan avulla.

Käytä toimintoa seuraavasti, kun järjestelmässä näkyy sisäänkirjautumissivu (Kuva 2):

- Lue käyttäjän henkilökohtainen viivakoodi.


Jos viivakoodi tunnustetaan, sinut kirjataan välittömästi sisään.

1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus -toiminto)

Jos järjestelmä on käyttämättömänä tietyn (määriteltävän) ajan, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos.

Poista toiminto käytöstä seuraavasti käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittamisen jälkeen mutta ennen kuin klikkaat **Ok**:

- Klikkaa **Lukitse**-painiketta sisäänkirjautumissivun komentopalkissa (Kuva 4 A).

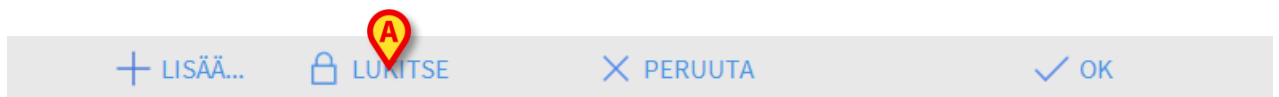

Kuva 4

Jos käyttäjä on lukittu, riippulukko näkyy käyttäjän kuvakkeen alareunassa (Kuva 5).



Kuva 5

1.4 Uloskirjautuminen

Sulkeakseen Digistat-työistunnon käyttäjän tulee kirjautua ulos järjestelmästä.

Uloskirjautuminen:

- Klikkaa komentopalkin **Käyttäjä**-painiketta (Kuva 6 ja Kuva 2 A).



Kuva 6

Käyttäjätunnuksen lyhenne katoaa **Käyttäjä**-painikkeesta.

2. Järjestelmän käyttökatkot

Jos käynnistyksen aikana esiintyy ongelmia yhteyden saamisessa palvelimeen, järjestelmä ilmoittaa siitä Järjestelmän palautus -ikkunalla.

Yhteysongelmat selviävät toisinaan itsekseen hetken kuluttua. Jos eivät, ota yhteyttä Ascom UMS:n tekniseen tukeen. Ascom UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

On olemassa harvinaisia joskin mahdollisia tapauksia, jolloin Digistat-järjestelmän käyttö on mahdotonta (esim. luonnonmullistukset, pitkät sähkökatkot tms.).

Digistat-järjestelmää käyttävien terveydenhoito-organisaatioiden tulee määritellä hätätilannemenettely tällaisten tilanteiden varalta

- 1) sairaalaosastojen toiminnan palauttamiseksi
- 2) järjestelmän palauttamiseksi käyttöön mahdollisimman pian.

Ascom UMS tukee ja auttaa mielellään hätätilannemenettelyn kehittämisessä, mutta sen määrittely ja toteutus on terveydenhoito-organisaation vastuulla.

Ascom UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

3. Digistat-järjestelmän käyttöohjeet

Digistat-järjestelmän käyttöohjeet toimitetaan tuotteen mukana. Ne ovat luettavissa sähköisessä muodossa Digistat-järjestelmässä (ainoastaan tämä pikaopas toimitetaan paperilla). Käyttöohjeiden lukeminen:

- Klikkaa **Ohje**-painiketta komentopalkissa (Kuva 7).



Kuva 7

Näytölle avautuvalta sivulta voidaan avata

- 1) aihekohtaiset Digistat-käyttöohjeet
- 2) mahdollisiin erityisiin toimenpiteisiin liittyvät pikaohjeet.

Sähköiset asiakirjat ovat PDF-muodossa.

3.1 Verkossa olevat käyttöohjeet

Digistat -käyttöohjeet voidaan myös ladata erityiseltä internetsivulta.

Digistat-asiakkaille on pääsy suojatulle alueelle, jolla säilytetään kaikkia käyttöohjeversioita. Käyttäjän on näin mahdollista tarkistaa, onko käyttöohjeista tullut päivitettyjä versioita.

Lataa käyttöohjeet kirjoittamalla seuraava osoite internetselaimesi osoitekenttään:

<https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v7.2>

Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana avataksesi käyttöohjelistan.

Käyttäjätunnus – paikallisen jälleenmyyjän toimittama käyttäjätunnus

Salasana – paikallisen jälleenmyyjän toimittama salasana

Aihekohtaiset käyttöohjeet ovat saatavilla PDF-muodossa.

4. Digistat -järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö

Digistat-järjestelmän Tietoja-ruutu asetetaan näytölle seuraavasti:

- Klikkaa tehtäväpalkin **Valikko**-painiketta (Kuva 8 A)



Kuva 8

Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 9).



Kuva 9

- Klikkaa valikon **Tietoja**-painiketta (Kuva 9 A). Digistat-järjestelmän Tietoja-ruutu avautuu.

4.1 Painettu käyttöohje

Asiakas voi pyytää ostamiensa tuotteiden käyttöohjeet painettuina. Ascom UMS toimittaa pyydetyt käyttöohjeet mahdollisimman pian.

Pyyntö tulee osoittaa tekniselle tuelle. Ascom UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

5. Yhteystiedot

Ota kaikissa tilanteissa ensin yhteyttä tuotteen asentaneeseen jälleenmyyjään.

Valmistajan yhteystiedot:

Ascom UMS srl

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Tekninen tuki

support@unitedms.com

800999715 (maksuton numero, vain Italia)

Myynti ja tuotetietoja

sales@unitedms.com

Yleisiä tietoja

info@unitedms.com