



Smart Monitor

Manual de Usuario

Versión 2.0

2023-05-12

Smart Monitor



Para obtener información general y detallada sobre el Producto, consulte los documentos específicos del Producto. La lectura y comprensión de estos documentos es obligatoria para un uso correcto y seguro del módulo Smart Monitor, descrito en este documento.

El módulo SMART MONITOR muestra en una única cuadrícula todos los dispositivos médicos que están configurados actualmente dentro de la instalación específica de la Digistat Suite. Si el dispositivo está asociado a un paciente, también se muestra la información del paciente (nombre del paciente, cama, etc.). Otra información se muestra de acuerdo con las opciones de configuración de la organización de atención médica que utiliza La Digistat Suite. Consulte Fig 1 para ver un ejemplo.

Para acceder a Smart Monitor:

- En la barra lateral, haga clic en el icono indicado en Fig 1 A.

Fig 1

Los dispositivos pueden agruparse por tipos: por ejemplo, un tipo por grupo; ahora bien, también son posibles dos o más tipos por grupo. Las páginas relacionadas con cada grupo se muestran en diferentes pestañas (Fig 1 B): en cada una de ellas, se pueden personalizar todos los detalles de la tabla que se muestra.

Cada fila corresponde a un dispositivo. En la configuración aquí descrita se proporciona la siguiente información (de izquierda a derecha):

- Ubicación (si el dispositivo está asociado a un paciente).
- Cama (si el dispositivo está asociado a un paciente).

- Paciente (si el dispositivo está asociado a un paciente).
- Condición de alarma de máxima prioridad en curso (si existe).
- Nombre del dispositivo.
- Número de serie del dispositivo.
- Nombre del medicamento infundido (si está disponible).
- Índice de volumen.
- Presión del circuito.
- Tiempo restante hasta el final de la infusión.
- Indicador de asociación.
- Si el icono  está presente, entonces la bomba es una bomba GuardRail.

Las columnas de ubicación, cama, paciente y alarma están siempre presentes. El resto de las columnas se muestran si están habilitadas en la configuración (en la opción del sistema *SmartMonitorConfig*).

Los dispositivos no asociados se muestran sin información de ubicación o paciente.

El encabezado de cada columna indica el tipo de información que se muestra.

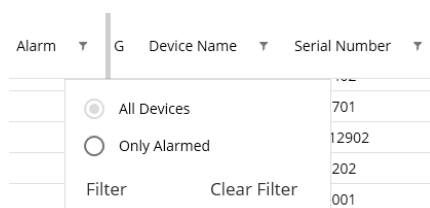


Fig 2

El icono  permite ordenar y filtrar el contenido de la cuadrícula.

La columna **Identidad** (última a la derecha - Fig 1 B) indica si el dispositivo ya está asociado con un paciente o no.

El icono  indica que el dispositivo no está asociado a un paciente. Si se selecciona la fila, se muestra un botón **Asignar** en la barra de comandos. Haga clic en el botón para asociar el dispositivo con un paciente.

El icono  indica que el dispositivo ya está asociado a un paciente. Si se selecciona la fila, se muestra un botón **Anular asignación** en la barra de comandos. Haga clic en el botón para disociar.



Los botones **Asignar/Desasignar** sirven para lanzar el módulo Identity.Net, en caso de que esté instalado. Dicho módulo es el encargado de activar o desactivar una asociación entre el dispositivo y el paciente en una estación de trabajo de escritorio. Si Identity.Net no está instalado en la estación de trabajo que hospeda Smart Monitor, los botones **Asignar/Desasignar** no tendrán ningún efecto.

Si se configuran más dispositivos que los que se pueden mostrar en una sola pantalla, se muestra una barra de desplazamiento a la derecha.

Los botones de desplazamiento que se muestran en Fig 3 **A** se pueden usar para desplazarse por la lista de dispositivos.

Si un dispositivo que no se muestra actualmente está alarmado, entonces se resalta el botón de desplazamiento correspondiente (arriba o abajo - Fig 3).



Fig 3

El botón **Eliminar filtros** borra todos los filtros posibles. Si un filtro está activo y no se muestra un dispositivo con alarma debido al filtro, entonces el botón **Eliminar filtros** se resalta (Fig 4 **A**).



Fig 4