

ascom

Smart Monitor

Manuel de l'Utilisateur

Version 3.0

2023-03-30

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Smart Monitor



Pour des informations générales et détaillées sur l'environnement du produit et les instructions d'utilisation de la barre de commande du logiciel, reportez-vous aux documents spécifiques du produit. La connaissance et la compréhension de ces documents sont obligatoires pour une utilisation appropriée et sûre de Smart Monitor, décrite dans ce document.

Smart Monitor affiche sur une seule grille tous les dispositifs médicaux actuellement configurés dans l'installation spécifique d'Alaris Infusion Central. Si l'appareil est associé à un patient, les informations relatives au patient sont également affichées (nom du patient, lit, etc.). D'autres informations sont affichées en fonction des choix de configuration de l'organisation de santé utilisant Alaris Infusion Central. Pour un exemple, consultez Fig 1.

Pour accéder au moniteur intelligent

- sur la barre latérale, cliquez sur l'icône indiquée par Fig 1 A.

Secteur	Lit	Patient	Alarme	NOM DISPOSITIF	Numéro de série	PAW max	PEEP	PI mean	T Plat Set	MVe	%O2	Identity
	1	Patient, 1		EvitaVentilator	IX35013	20cm H2O	47 cm H2O	83 cm H2O	26.27 cm H2O	3.93 L/min	55 %	
	2	Patient, 2		EvitaVentilator	IX65013	81cm H2O	7 cm H2O	92 cm H2O	24.31 cm H2O	3.85 L/min	55 %	
	3	Patient, 3		EvitaVentilator	IX95013	71cm H2O	42 cm H2O	99 cm H2O	25.02 cm H2O	4.43 L/min	61 %	
	4	Patient, 4		EvitaVentilator	IX125013	72cm H2O	48 cm H2O	89 cm H2O	24.43 cm H2O	4.17 L/min	3 %	
ICU	5	Patient, 5		EvitaVentilator	IX155013	81cm H2O	51 cm H2O	87 cm H2O	24.86 cm H2O	4.17 L/min	7 %	
	6	Patient, 6		EvitaVentilator	IX185013	73cm H2O	48 cm H2O	94 cm H2O	26.76 cm H2O	4.09 L/min	60 %	
	7											
	8											
	9											
	10											
				EvitaVentilator	IX3M5013	36cm H2O	85 cm H2O	26 cm H2O	26.08 cm H2O	4.01 L/min	13 %	
				EvitaVentilator	IX9M5013	44cm H2O	75 cm H2O	28 cm H2O	24 cm H2O	4.34 L/min	3 %	
				EvitaVentilator	IX12M5013	44cm H2O	17 cm H2O	26 cm H2O	24.28 cm H2O	4.34 L/min	25 %	
				EvitaVentilator	IX15M5013	38cm H2O	17 cm H2O	12 cm H2O	26.8 cm H2O	4.17 L/min	14 %	
				EvitaVentilator	IX18M5013	16cm H2O	23 cm H2O	27 cm H2O	24.79 cm H2O	4.34 L/min	3 %	
				EvitaVentilator	IX21M5013	38cm H2O	87 cm H2O	26 cm H2O	23.49 cm H2O	4.09 L/min	25 %	
				EvitaVentilator	IX24M5013	43cm H2O	87 cm H2O	27 cm H2O	28.16 cm H2O	3.93 L/min	24 %	
				EvitaVentilator	IX27M5013	40cm H2O	3 cm H2O	26 cm H2O	27.52 cm H2O	3.85 L/min	25 %	
				EvitaVentilator	IX30M5013	37cm H2O	83 cm H2O	25 cm H2O	28.39 cm H2O	3.93 L/min	22 %	
				EvitaVentilator	IX6M5013	38cm H2O	82 cm H2O	1 cm H2O	24.81 cm H2O	4.09 L/min	7 %	

Fig 1

Les appareils peuvent être regroupés par types, avec un type par groupe ou plus. Les différents groupes sont affichés sous forme d'onglets (Fig 1 B). La grille de chaque onglet peut être personnalisée.

Chaque ligne correspond à un appareil. Dans la configuration décrite ici, les informations suivantes sont fournies (de gauche à droite) :

- Lieu (si l'appareil est associé à un patient)
- Lit (si l'appareil est associé à un patient)

- Patient (si l'appareil est associé à un patient)
- Condition d'alarme prioritaire en cours (le cas échéant)
- Nom de l'appareil
- Numéro de série de l'appareil
- Nom du médicament perfusé (si disponible)
- Taux de volume
- Pression du circuit
- Temps restant jusqu'à la fin de la perfusion
- Bouton de raccourci d'association
- Si l'icône  est présente, alors la pompe est une pompe GuardRail.

Les colonnes Location (Emplacement), Bed (Lit), Patient et Alarm (Alarme) sont toujours présentes. Les autres colonnes sont affichées si elles sont activées dans la configuration.

Les appareils non attribués sont affichés sans information d'emplacement ou de patient.

L'en-tête de chaque colonne indique le type d'informations affichées.



L'icône  permet de trier et filtrer le contenu de la grille.

La colonne **Identity** (Identité - Fig 1 **C**) indique si l'appareil est déjà associé à un patient ou non.

L'icône  indique que l'appareil n'est pas associé à un patient. Si la ligne est sélectionnée, un bouton **Attribuer**  s'affiche dans la barre de commandes. Cliquez sur le bouton pour associer l'appareil à un patient.

L'icône  indique que l'appareil est déjà associé à un patient. Si la ligne est sélectionnée, un bouton **Détacher**  s'affiche dans la barre de commandes. Cliquez sur le bouton pour dissocier l'appareil et le patient.



Les boutons **Attribuer / Détacher** lancent le module Identity.Net, s'il est installé. Ce module, fonctionnant sur des postes de travail de bureau, permet d'associer/de dissocier les appareils et les patients. Si le module Identity.Net n'est pas installé sur le poste de travail sur lequel le module Smart Monitor est présent, les boutons **Attribuer / Détacher** ne servent pas. Consultez le manuel Identity.NET, USR FRA Identity Net, pour obtenir des informations sur les procédures d'association et de dissociation du dispositif au patient.

Si le nombre de périphériques configurés dépasse le nombre de périphériques pouvant être affichés sur un seul écran, une barre de défilement apparaît à droite.

Les boutons de défilement illustrés à la Fig 1 **D** peuvent être utilisés pour parcourir la liste des périphériques.

Si un périphérique non affiché est en alarme, le bouton de défilement correspondant (vers le haut ou vers le bas) est mis en surbrillance (Fig 2).



Fig 2

Le bouton **Effacer les filtres** efface tous les filtres possibles. Si un filtre est actif et qu'un périphérique en alarme ne s'affiche pas à cause de ce filtre, le bouton **Effacer les filtres** est mis en surbrillance.



Fig 3