



CDSS WEB konfigurátor

Használati utasítás

1.0 verzió

2025-01-20

Tartalom

CDSS WEB konfigurátor	3
1. Bevezetés	3
2. Beteg kiválasztása	3
3. A „CDSS Configurator Web” elindítása	4
4. A társított szabályok listája	5
5. Meglévő szabály engedélyezése/letiltása	6
6. Szabály engedélyezése/letiltása más páciensek számára.....	7
7. A szabálybeállítások alkalmazása más páciensekre.	9
8. A szabálybeállítások módosítása.....	11
9. A beállítások típusai	12
9.1. Tartomány	12
9.2. Képlet	15
9.2.1. Hogyan írjunk kifejezést	16
9.3. Táblázat	22
9.4. Egyéb beállítások	23

CDSS WEB konfigurátor



A termékkörnyezetről, az óvintézkedésekről, a figyelmeztetésekről és a tervezett használatról szóló további információkért lásd: *USR HUN Digistat Care* és/vagy *USR HUN Digistat Docs* (a telepített moduloktól függően – *Digistat Suite EU* esetén) vagy *USR ENG Digistat Suite NA* (*Digistat Suite NA* esetén). A megfelelő dokumentum ismerete és megértése kötelező a jelen dokumentumban leírt „CDSS Configurator Web” helyes és biztonságos használatához.

1. Bevezetés

Jelen kézikönyv a „Digistat CDSS Configurator Web” jellemzőit és funkcióit ismerteti. A „Digistat CDSS Configurator Web” egy kifejezetten képzett felhasználók számára elérhető eszköz, amely lehetővé teszi a Digistat CDSS (Clinical Decision Support System) rendszerben létrehozott szabályok beállításainak és a szabály/beteg kapcsolatának konfigurálását. A Digistat CDSS lehetővé teszi olyan szabályok létrehozását, amelyek értesítések sorozatát generálják a klinikai személyzet számára, amikor bizonyos betegállapotok lépnek fel. A Digistat CDSS használata a rendszergazdáknak van fenntartva (az utasításokat lásd a CFG ENG CDSS dokumentumban).

Az ebben a kézikönyvben leírt „CDSS Configurator Web” a megfelelő képzéssel és megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára érhető el. Lehetővé teszi az adott páciensre vonatkozó szabálybeállítások megadását, valamint egy meghatározott szabály engedélyezését/letiltását egy páciens számára.



A CDSS Configurator csak speciálisan képzett, megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára engedélyezett.




A CDSS Configurator Web a Control Bar Web egy almodulja, amely az adott egészségügyi szervezetben használt konfigurációtól függően engedélyezhető vagy sem. További információkért forduljon a rendszergazdához.

2. Beteg kiválasztása

A „CDSS Configurator Web” csak a páciens kiválasztása után indítható el. A páciens kiválasztásához

- Kattintson az Ábra 1 A jelű **Páciens kiválasztása** gombra.

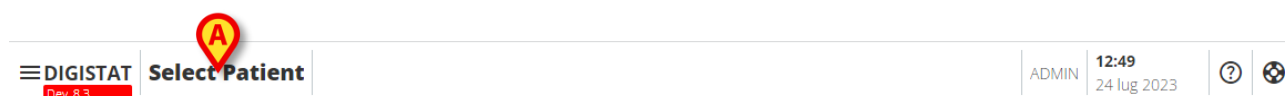

Ábra 1

Megnyílik a Patient Explorer webmodul. Tekintse meg a Digistat® Patient Explorer Web felhasználói kézikönyvét (*USR HUN Patient Explorer Web*) a betegkezelési funkciókkal kapcsolatos további információkért.



A Patient Explorer Web helyett más modulok is konfigurálhatók a páciensek kiválasztásához, a konfigurációtól függően. Ha ez a helyzet, tekintse meg az utasításokat az adott dokumentációban.

A páciens kiválasztásakor a beteg neve és főbb adatai jelennek meg a **Páciens** gombon (Ábra 2 A).



Ábra 2

3. A „CDSS Configurator Web” elindítása

Ha a „CDSS Configurator Web” elérhető, az  ikon megjelenik a páciensgombon (Ábra 3 A).




Ábra 3

A „CDSS Configurator Web” elindítása:

- Kattintson az  ikonra.

Megjelenik egy legördülő ablak, amely további páciensadatokat és a (Ábra 4) Control Bar-on elindítható almodulokat tartalmazza.

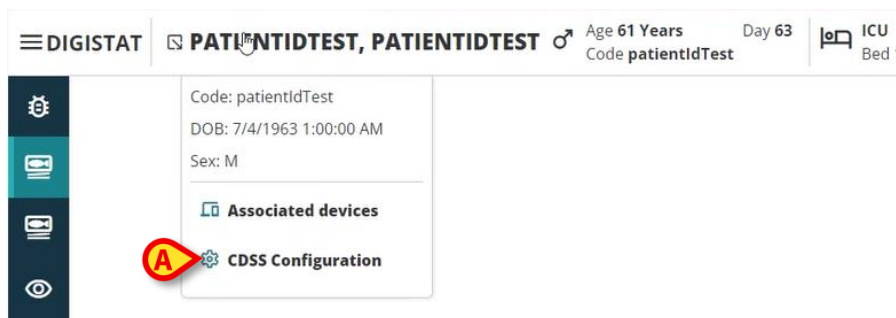

Ábra 4

- Kattintson a „CDSS Configuration” elemre (Ábra 4 A).

A következő ablak jelenik meg, amely felsorolja az aktuálisan kiválasztott pácienshez tartozó szabályokat (Ábra 5).

RULES		
✓	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
✓	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
✓	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  



Ábra 5

4. A társított szabályok listája

A „Szabályok listája” ablak (Ábra 5) felsorolja a kiválasztott helyen lévő páciensre vonatkozó meglévő szabályokat. Minden sor egy létező szabálynak felel meg. A sorban megjelenik a szabály neve és a szabály rövid leírása.



A konfigurációs beállításoktól függ, hogy mely szabályok jelennek meg. További információért forduljon a rendszergazdákhhoz.

	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

Ábra 6

A szabály engedélyezhető vagy nem a kiválasztott páciensre vonatkozóan. Az engedélyezett szabályokat az  ikon (Ábra 6 **A**) jelzi. A letiltott szabályokat az  ikon (Ábra 6 **B**) jelzi. Tekintse meg a 5szakaszt a szabály engedélyezéséhez/letiltásához egy páciens számára. A jobb oldalon három gomb teszi lehetővé a következő műveletek végrehajtását (Ábra 6 **C**):



- Ezzel a gombbal engedélyezheti/letilthatja a szabályt az aktuálisan kiválasztott páciensre vonatkozóan.



- Ezzel a gombbal engedélyezheti/letilthatja a szabályt más páciens számára.




- Ezzel a gombbal alkalmazhatja az adott szabálybeállításokat más páciensekre.



Ugyanaz a szabály különböző pácienseknél eltérő beállításokat tartalmazhat. Például: különböző küszöbértékek vagy különböző releváns paraméterek, amelyeket figyelni kell.

Ezen gombok mindegyike a konfigurációtól függően engedélyezhető vagy letiltható. A letiltott gombok a következőképpen jelennek meg: Ábra 7.

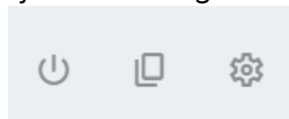

Ábra 7

- Kattintson a **Bezárás** gombra a „Szabályok listája” ablak bezárásához (Ábra 5C).

5. Meglévő szabály engedélyezése/letiltása

A letiltott szabályokat a bal oldali  ikon (Ábra 8 A) jellemzi.




Ábra 8

Letiltott szabály engedélyezése:

- Kattintson a Ábra 8B-ben jelzett  ikonra.

Felhasználói megerősítés szükséges. A következő felugró ablak jelenik meg (Ábra 9).

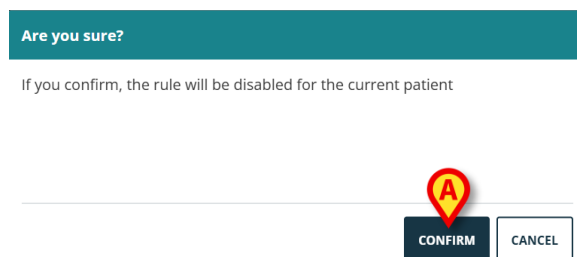

Ábra 9

- Kattintson a **Megerősítés gombra** (Ábra 9).

A szabály így engedélyezve van. A megfelelő sor a következő módon változik (Ábra 10).




Ábra 10

Ugyanez az eljárás használható egy engedélyezett szabály letiltására.


6. Szabály engedélyezése/letiltása más páciensek számára

Lehetőség van egy szabály engedélyezésére/letiltására olyan páciensek esetében, amelyek nem a jelenleg kiválasztottak. Ehhez:

- Kattintson az Ábra 11A-ban jelzett  ikonra.

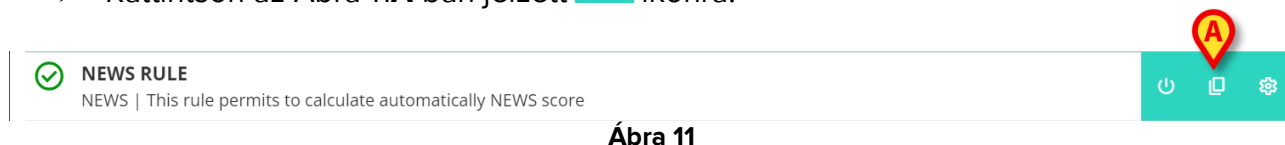

Megnyílik a következő ablak (Ábra 12).

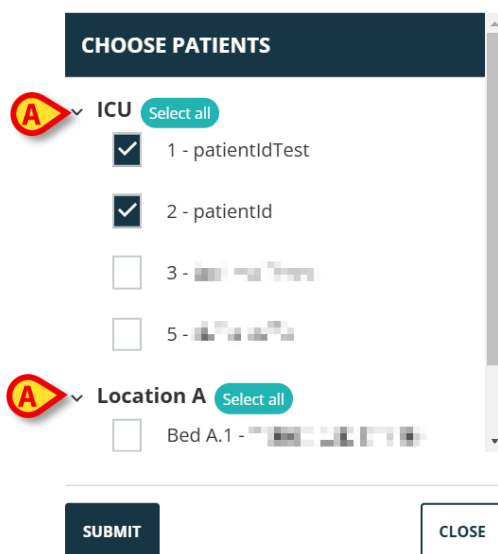

Az ablak felsorolja az aktuális munkaállomáson látható összes páciens, beleértve az aktuális páciens is. Az Ábra 12-ban bemutatott példa különböző osztályokhoz tartozó pácienseket sorol fel (ICU és A-Ábra 12 A hely), mert ugyanaz a szabály konfiguráció szerint különböző osztályokon is elérhető. A ▼ nyílra kattintva összezsukható vagy kibővíthető a páciensek listája egy adott helyen (lásd például: Ábra 13).

Ábra 13

Minden páciens az ágyához van rendelve (a név előtt feltüntetve - Ábra 13 A).

Minden páciens neve/ágya mellett balra található egy jelölőnégyzet (Ábra 13 B). A kiválasztott jelölőnégyzetek azoknak az ágyaknak felelnek meg, amelyeknél a szabály engedélyezve van. A kijelölt jelölőnégyzetek azoknak az ágyaknak felelnek meg, amelyeknél a szabály le van tiltva.

- Kattintson a jelölőnégyzetekre a szabály engedélyezéséhez/letiltásához a megfelelő páciensek esetében.
- Kattintson a **Küldés** gombra a módosítások alkalmazásához (Ábra 13 C).

Megnyílik egy ablak, amely összefoglalja a végrehajtott változtatásokat (Ábra 14).

Ábra 14

- Kattintson a **Megerősítés** gombra a módosítások alkalmazásához (Ábra 14 A).

7. A szabálybeállítások alkalmazása más páciensekre.

A kiválasztott páciensre vonatkozó szabály konfigurációja másolható és más páciensekre is alkalmazható.



Ugyanaz a szabály különböző pácienseknél eltérő beállításokat tartalmazhat. Például: különböző küszöbértékek vagy különböző releváns paraméterek, amelyeket figyelni kell.


A szabály beállításainak másolásához és exportálásához:

- Kattintson az Ábra 15 **A**-ban jelzett  ikonra.



Ábra 15

A következő ablak nyílik meg (Ábra 16)

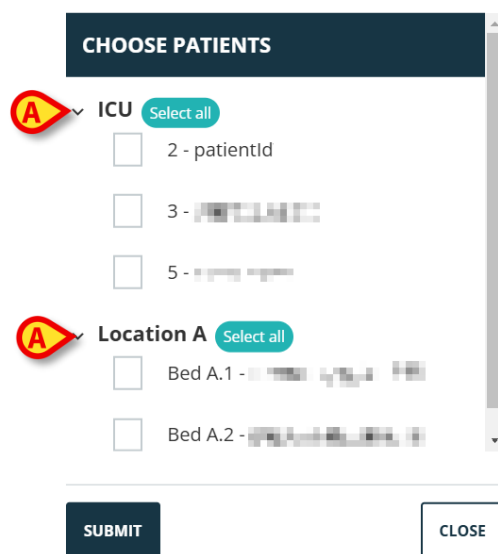

Ábra 16

Az ablak felsorolja az összes olyan, az aktuális munkaállomáson látható páciens, amelyre vonatkozóan a szabály elérhető. Az aktuálisan kiválasztott páciens nem jelenik meg az ablakban. Az Ábra 16-ban bemutatott példa különböző osztályokhoz tartozó pácienseket sorol fel (ICU és A-Ábra 16 **A** hely), mert ugyanaz a szabály konfiguráció szerint különböző osztályokon is elérhető. A ▼ nyílra kattintva összezsuktható vagy kibővíthető a páciensek listája egy adott helyen (lásd például: Ábra 17).

Ábra 17

Minden páciens az ágyához van rendelve (a név előtt feltüntetve -Ábra 17 **A**).

Minden páciens neve/ágya mellett balra található egy jelölőnégyzet (Ábra 17 **B**).

- Jelölje be a pácienseknek megfelelő jelölőnégyzeteket, amelyekre a szabály beállításait alkalmazni kell.
- Kattintson a **Küldés** gombra (Ábra 17 **C**).

Megnyílik egy ablak, amely felsorolja azokat az ágyakat, amelyekre a szabálybeállítások vonatkozni fognak (Ábra 18).

Ábra 18

- Kattintson a **Megerősítés** gombra a módosítások alkalmazásához (Ábra 18 **A**).

8. A szabálybeállítások módosítása

A CDSS-szabályok konfigurációs paraméterekkel rendelkeznek, amelyeket a CDSS-motor használ a szabály viselkedésének módosítására. Például: egy szabály értesítést generálhat, ha a „Hőmérséklet” paraméter magasabb, mint egy küszöbérték. A „küszöb” a szabályba beágyazott érték, amely testreszabható a páciens konkrét igényei szerint.

A szabály beállításainak módosításához:

- Kattintson a szabályra a „Szabálylista” ablakban (Ábra 19 A).

RULES		
	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

CLOSE

Ábra 19

Megjelennek a megfelelő beállítások (Ábra 20).

RULE RANGE CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

Ranges
Range definitions

 > Parameters >

0   1   1  

 > Early Warning Score Parameters >

1   2   3  



ADD PARAMETER +

SAVE RESTORE DEFAULT



CLOSE

Ábra 20

- Módosítsa az elérhető beállításokat a fejezetben leírtak szerint 9.
- Kattintson a **Mentés** gombra (Ábra 20 A). Ezután felhasználói megerősítés szükséges.

A mindig elérhető **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** (Restore default settings) gomb (Ábra 20 **B**) visszakeresi az eredeti értékeket. A gombra kattintás után ismét az eredeti értékek jelennek meg az ablakban. Újra szerkeszthetők, vagy elmenthetők és visszaállíthatók (ehhez kattintson a **Mentés** gombra).


- Kattintson a **Bezárás** (Ábra 20 **C**) gombra a szabálybeállítások konfigurációs ablakának bezárásához és a „Szabálylista” újra megjelenítéséhez.

9. A beállítások típusai

Különbőféle típusú beállításokat lehet szerkeszteni. Ez a rész a leggyakrabban használtakat ismerteti.

9.1. Tartomány

A „Tartomány” határozza meg azokat a küszöbértékeket, amelyek után a rendszer aktiválja a különböző értesítéseket. Az értesítések az itt meghatározott értékek szerint jönnek létre. Lásd Ábra 21.

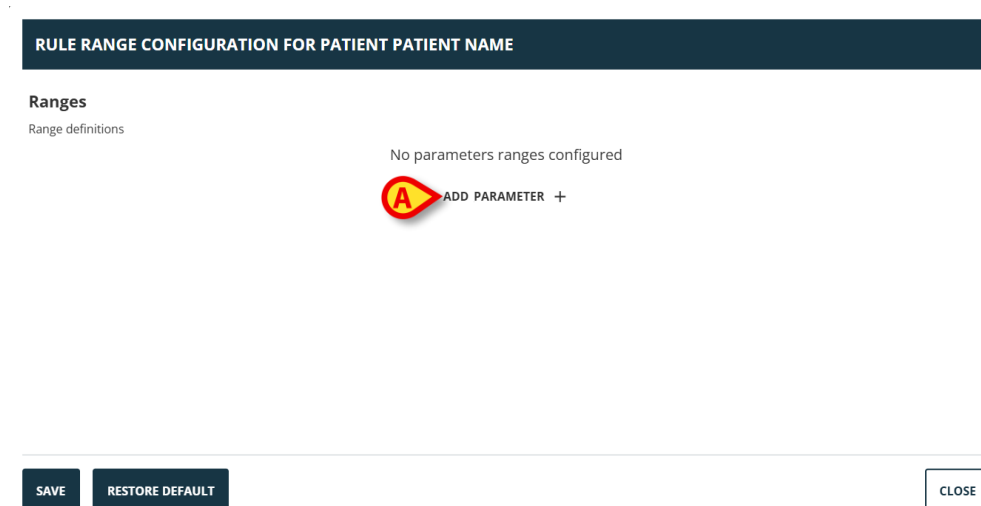

Ábra 21

Először is meg kell adni azokat a paramétereket, amelyekre a tartománybeállítás vonatkozik. Egy paraméter kiválasztásához:

- Kattintson a **Paraméter hozzáadása** (Ábra 21 **A**) gombra.

Megjelenik egy paraméterválasztó ablak (Ábra 22). Az ablak listázza a konfigurált eszközöket azok paramétereivel. A paraméterek eszköz szerint vannak csoportosítva (például: Evita, Carescape stb.).

SELECT PARAMETER

▼ Evita

ARTd (mm Hg)

ARTm (mm Hg)

ARTs (mm Hg)

SUBMIT

CLOSE

Ábra 22

- Görgesse a listát a megfelelő paraméter megkereséséhez.
- Kattintson a paraméterre a kiválasztásához (Ábra 23 A).

SELECT PARAMETER

RR (bpm)

SPO2 Art (%)

Target (mcg/kg)

Target Mode (?)

SUBMIT

CLOSE

Ábra 23

- Kattintson a **Küldés** (Ábra 23 B) gombra.

A paraméter megjelenik a „Szabály beállítása” ablakban (Ábra 24 A).

Ábra 24

The diagram illustrates the relationship between Range definitions, Parameters, and SPO2 Art (%) for two different scenarios, A and B.

Scenario A (Left):

- Range definitions:** Three icons representing range definitions: a diamond with three exclamation marks (!!!), a triangle with two exclamation marks (!!), and a circle with one exclamation mark (!).
- Parameters:** A single icon representing a parameter: a circle with one exclamation mark (!).
- SPO2 Art (%):** Three input fields, each with a plus (+) and minus (-) button, and a trash can icon.

Scenario B (Right):

- Range definitions:** Three icons representing range definitions: a diamond with three exclamation marks (!!!), a triangle with two exclamation marks (!!), and a circle with one exclamation mark (!).
- Parameters:** A single icon representing a parameter: a triangle with two exclamation marks (!!).
- SPO2 Art (%):** Three input fields, each with a plus (+) and minus (-) button, and a trash can icon.

The diagram shows that the range definitions and parameters are used to define the SPO2 Art (%) values for each scenario.

Ábra 25

Range definitions

Parameters

SPO2 Art (%)

Ábra 26

- alacsony prioritású értesítést vált ki, ha a figyelembe vett paraméter értéke 15 és 10 vagy 85 és 90 között van;
- 9 és 5, illetve 91 és 95 között közepes prioritású értesítésre kerül sor;
- 4 alatt és 96 fölött magas prioritású értesítést vált ki.

The diagram illustrates the data flow from Range definitions to Parameters to SPO2 Art (%). It consists of three main sections connected by arrows.

- Range definitions:** This section contains three warning icons (a diamond with three exclamation marks, a triangle with two exclamation marks, and a circle with one exclamation mark) followed by a greater-than arrow (>).
- Parameters:** This section contains the text "Parameters" followed by a greater-than arrow (>).
- SPO2 Art (%):** This section contains the text "SPO2 Art (%)" followed by a greater-than arrow (>).

Below the flow, there are three input fields, each with a red border and a plus/minus icon on the right. The first field contains the value "7". The second field contains the value "5". The third field contains the value "34".


Ábra 27

Paraméter eltávolításához

- Kattintson az eltávolítani kívánt paraméter jobb oldalán található  ikonra (pl.:Ábra 27 **A**).

9.2. Képlet

A „képlet” több kapcsolódó paramétert és/vagy eseményt magában foglaló kifejezés. Értésítés jelenik meg, ha a kifejezés igaz. Lásd pl. Ábra 28.

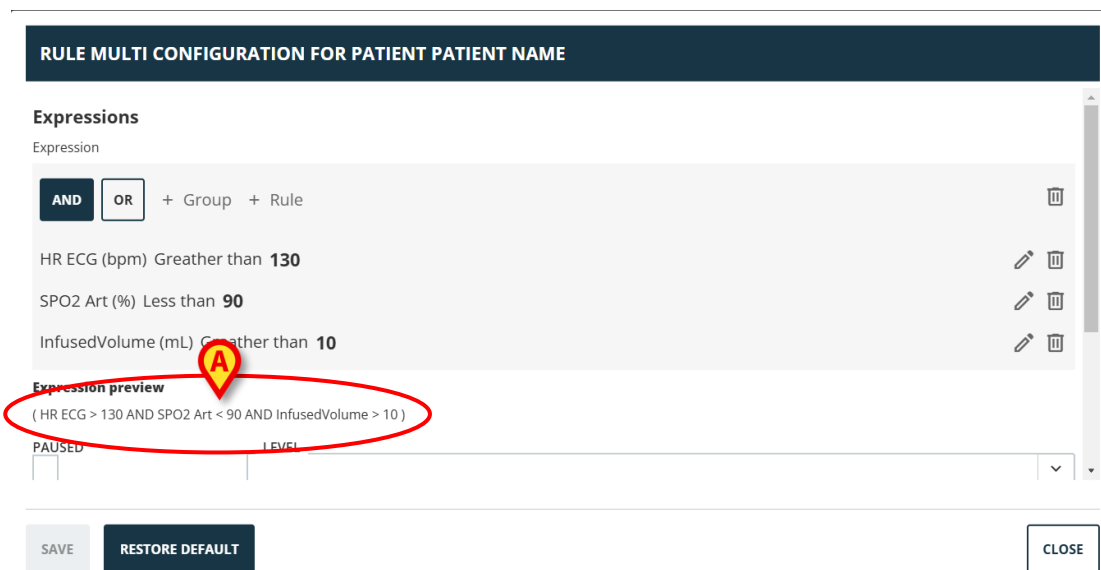


Ábra 28

Az Ábra 28ban szereplő kifejezés (az Ábra 28 **A**-ban jelzett területen előnézetben) a következő

HR > 130 ÉS SpO2 < 90 ÉS Infúziós térfogat > 10 ml

9.2.1. Hogyan írjunk kifejezést

Megjelenik egy üres „Képlet” típusú „Szabálybeállítás” ablak, ahogy az Ábra 29 ábrán látható.

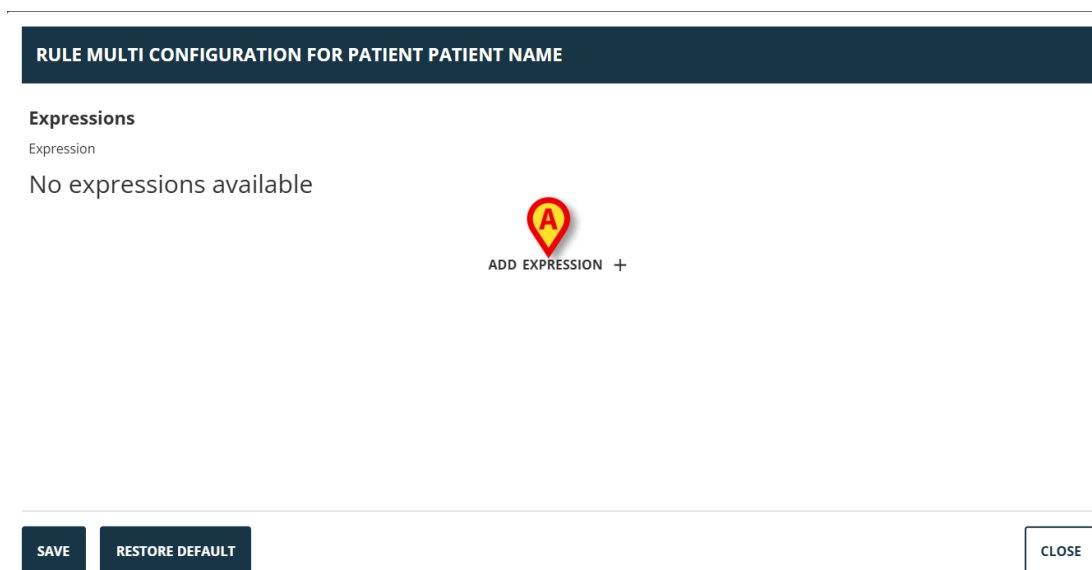


Ábra 29

Kifejezést írása

- Kattintson a **Kifejezés hozzáadása** gombra (Ábra 29 A).

Az ablak a következő módon változik: (Ábra 30).

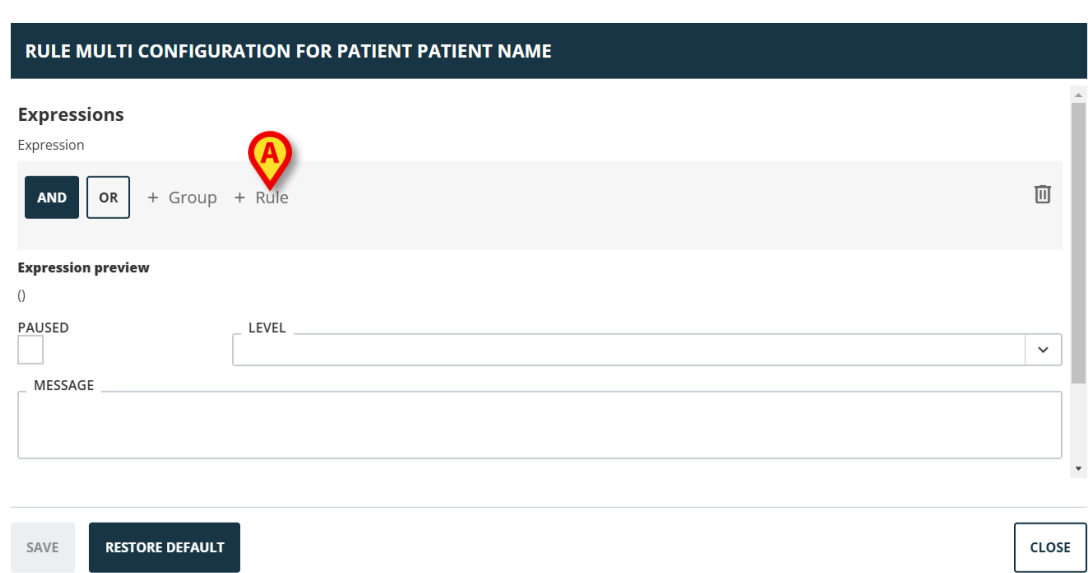

Ábra 30

- Kattintson a **Szabály** gombra (Ábra 30 A) egy szabály meghatározásához. Megnyílik a következő ablak (Ábra 31).

ADD RULE

▼ **Evita**

ARTd (mm Hg)

ARTm (mm Hg)

GT ▼

VALUE + -

SUBMIT CLOSE

Ábra 31

Az Ábra 31 **A-val** jelölt ablak felső része felsorolja az összes konfigurált paramétert, eszközök szerint csoportosítva.

Görgetse a listát a megfelelő paraméter (Ábra 32 **A**) megkereséséhez és kiválasztásához.

ADD RULE

Flow Peak (mL/s)

HR ECG (bpm)

GT ▼

VALUE + -

SUBMIT CLOSE

Ábra 32

- A Ábra 32 **B** pontban jelzett legördülő menüből válassza ki a szintaktikai operátort. A rendelkezésre álló lehetőségek:
 - GT - Nagyobb mint
 - GTE – nagyobb vagy egyenlő, mint
 - LT - Kevesebb, mint
 - LTE – Kisebb vagy egyenlő
 - EQ – egyenlő
 - DF - Különböző
- Adja meg az értéket az Ábra 33 **A-ban** jelzett mezőben.

ADD RULE

Flow Peak (mL/s)

HR ECG (bpm)

GT

VALUE
130

A

B

SUBMIT

CLOSE

Ábra 33

- Kattintson a **Küldés** (Ábra 33 **B**) gombra.

A kifejezés megjelenik a „Szabály beállítása” ablakban (Ábra 34 **A**).

RULE MULTI CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

Expressions

Expression

AND OR + Group + Rule

A

HR ECG (bpm) Greater than 130

B

Expression preview

(HR ECG > 130)

PAUSED

LEVEL

MESSAGE

SAVE

RESTORE DEFAULT

CLOSE

Ábra 34

Kifejezés hozzáadása ugyanazon a paramétercsoporton belül:

- Kattintson ismét a **Szabály** gombra (Ábra 34 **B**).

A kifejezések fokozatosan megjelennek az ablakban. Lásd például Ábra 35.

RULE MULTI CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

Expressions

Express

AND **OR** + Group + Rule

HR ECG (bpm) Greather than **130**

SPO2 Art (%) Less than **90**

InfusedVolume (mL) Greather than **10**

Expression preview

(HR ECG > 130 AND SPO2 Art < 90 AND InfusedVolume > 10)

PAUSED LEVEL

SAVE RESTORE DEFAULT CLOSE

Ábra 35

Az általános kifejezés előnézete az Ábra 35 **A-ban** jelzett területen jelenik meg.

Az azonos csoporton belüli összes kifejezést ugyanaz az operátor kapcsolja össze (ÉS vagy VAGY). Az ablakon a megfelelő gombra kattintva (Ábra 35 **B**) választhatja ki az operátort.

A mindkét operátort tartalmazó kifejezések definiálásához egy másik csoport beágyazására van szükség.

Ehhez:

- Kattintson a **Csoport** gombra (Ábra 35 **C**).

Az ablak a képen látható módon változik Ábra 36.

RULE MULTI CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

Expressions

AND **OR** + Group + Rule

HR ECG (bpm) Greather than **130**

SPO2 Art (%) Less than **90**

InfusedVolume (mL) Greather than **10**

AND **OR** + Group + Rule

Expression preview


(HR ECG > 130 AND SPO2 Art < 90 AND InfusedVolume > 10 AND ())

PAUSED LEVEL


SAVE RESTORE DEFAULT CLOSE

Ábra 36


Az új csoport a meglévő kifejezésbe van beágyazva, a jobb oldalon. Az Ábra 37 **A-ban** a pozíciót az üres zárójelek jelzik.

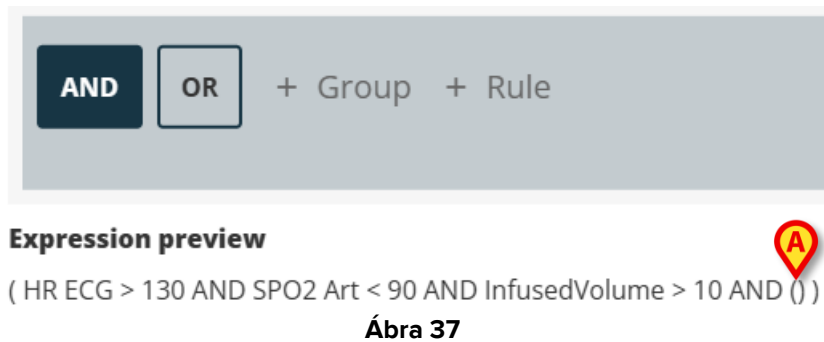

- Válassza ki az operátort az új csoporthoz (Ábra 38 **A**).

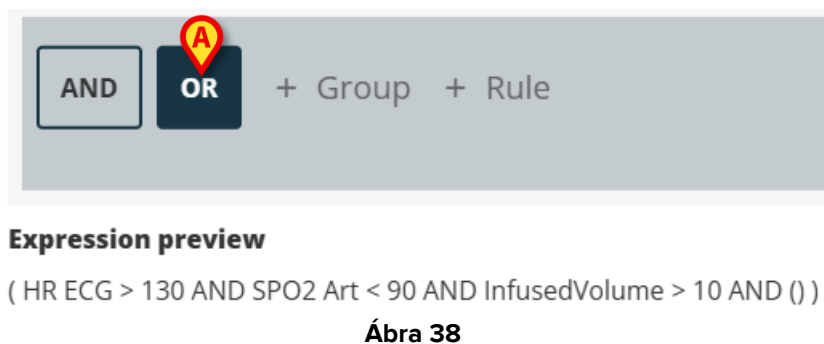

- Határozza meg az új csoportra vonatkozó szabályokat a fentiek szerint.

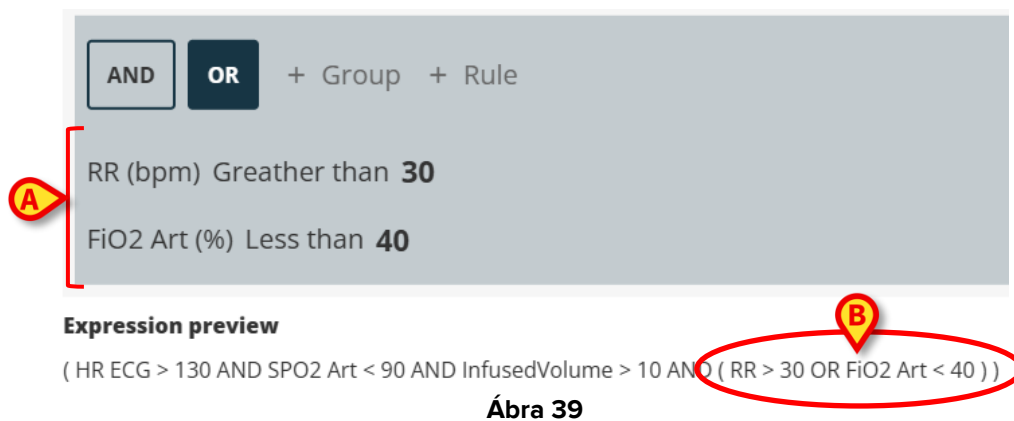

A szabálydefiníció befejezéséhez a kifejezés definiálása után a „Szabálybeállítás” ablakban (Ábra 40) a következőket kell tenni:

RULE MULTI CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

AND OR + Group + Rule

RR (bpm) Greater than 30

FiO2 Art (%) Less than 40

Expression preview
(HR ECG > 130 AND SPO2 Art < 90 AND InfusedVolume > 10 AND (RR > 30 OR FIO2 Art < 40))

PAUSED ☐ LEVEL MEDIUM

MESSAGE Type here the message...

SAVE RESTORE DEFAULT CLOSE

Ábra 40

- Határozza meg a szabály által kiváltott értesítés prioritási szintjét (magas/közepes/alacsony – Ábra 40 **A**).
- Írjon be egy szöveges üzenetet, amelyet az értesítéssel együtt szeretne megjeleníteni (Ábra 40 **B**).
- Kattintson a **Mentés** gombra a szabály mentéséhez (Ábra 40 **C**).

A szabály mentésre kerül.

A „Szüneteltetve” jelölőnégyzet a „Szabály beállítása” ablakban lehetővé teszi a szabály ideiglenes szüneteltetését a kiválasztott páciensnél (Ábra 41 **A**).

RULE MULTI CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

FiO2 Art (%) Less than 40

Expression preview
(HR ECG > 130 AND SPO2 Art < 90 AND InfusedVolume > 10 AND (RR > 30 OR FIO2 Art < 40))

PAUSED ☒ LEVEL MEDIUM

MESSAGE Type here the message...

ADD EXPRESSION +

SAVE RESTORE DEFAULT CLOSE

Ábra 41

A „Kifejezés hozzáadása” gombbal definiálhat több kifejezést ugyanahhoz a szabályhoz (Ábra 41 **B**).

9.3. Táblázat

A táblázat lehetővé teszi a szabályok táblázatos nézetben történő konfigurálását. Például: a pontszámok általában több paraméterrel járulnak hozzá a végső pontszámhoz, és minden paraméterhez küszöbértéket lehet meghatározni. A sok különböző szabálybeállítás helyett lehetséges, hogy az összes küszöböt táblázatnézetben összesítsük (lásd Ábra 42 például, itt láthatók a NEWS pontszám paraméterei és küszöbértékei).

RULE NEWS CONFIGURATION FOR PATIENT PATIENT NAME

NEWS Thresholds

NEWS Parameters

	3	2	1	0	1	2	3
Respir. Rate	8	9	11	12	20	21	25
Oxygen Saturation	91	92	94	96		24	
Temperature	35.0		35.1	36.1	38.0	38.1	39.1
Systolic BP	90	91	101	111	219		

SAVE
RESTORE DEFAULT
CLOSE

Ábra 42

A színek határozzák meg az értesítési szintet (fehértől pirosig).

Csak azokat a küszöbértékeket lehet beállítani, amelyek nincsenek letiltva (azaz a szürke mezők nem szerkeszthetők). A letiltott mezők értékei automatikusan ki lesznek számítva a többi értékből. A lehetséges inkonzisztens értékek ki vannak emelve (Ábra 43 **A**).

	3	2	1	0	1	2	3
Respir. Rate	8		9	12	20	21	25
Oxygen Saturation	91	92	94	96		24	
Temperature	35.0		35.1	35	38.0	38.1	39.1
Systolic BP	90	91	101	111	219		

Ábra 43

A szabály típusától függően lehetőség van arra, hogy egyetlen értesítést indítson el a teljes pontszám értékét figyelembe véve, vagy több értesítést az egyes paraméterek értékeit figyelembe véve.

9.4. Egyéb beállítások

Más adatbeviteli módok a „Szabály beállítása” ablakban konfigurálhatók.

Boolean

Érték: igaz/hamis. Kattintson az engedélyezéshez/letiltáshoz.

Numerikus (tizedes vagy egész szám)

Érték: numerikus (tizedes vagy egész). Írja be az értéket. Ha a decimális értékek nem engedélyezettek, akkor ezek le vannak tiltva. Az elfogadható tartomány a mező alatt adható meg.

Lista

Érték: többválasztós lista. Kattintson a nyílra a rendelkezésre álló lehetőségek legördülő menüben történő megjelenítéséhez. Kattintson a kívánt választásra. A kiválasztott választás megjelenik a mezőben.

Szöveg

Értéke: szabad szöveg. Írjon be egy szabad szöveget.