



Control Bar Web Manuale Utente

Versione 8.1

2025-01-09

Sommario

1. Control Bar Web e ambiente web	3
1.1 Come lanciare Control Bar Web.....	3
1.2 Accesso (Login).....	4
1.3 Area di lavoro	6
1.3.1 Come selezionare un modulo.....	7
1.4 Control Bar	7
1.5 Menu	8
1.5.1 Modifica password.....	8
1.5.2 Report di problemi tecnici.....	9
1.6 Sub-moduli aggiuntivi.....	10
1.6.1 CDSS Configurator	10
1.6.2 Identity	11

1. Control Bar Web e ambiente web



Per informazioni riguardanti l'ambiente del Prodotto, le precauzioni, gli avvertimenti e per l'uso previsto si vedano USR ITA Digistat Care e/o USR ITA Digistat Docs (a seconda dei moduli installati - per la Digistat Suite EU) oppure si veda USR ENG Digistat Suite NA (per la Digistat Suite NA). La conoscenza e comprensione dei documenti appropriati sono obbligatorie per un uso corretto e sicuro di Control Bar Web, descritto qui.

1.1 Come lanciare Control Bar Web

Per lanciare Control Bar Web,

- Digitare l'indirizzo nella barra degli indirizzi del browser (Fig 1).

Si aprirà la pagina seguente


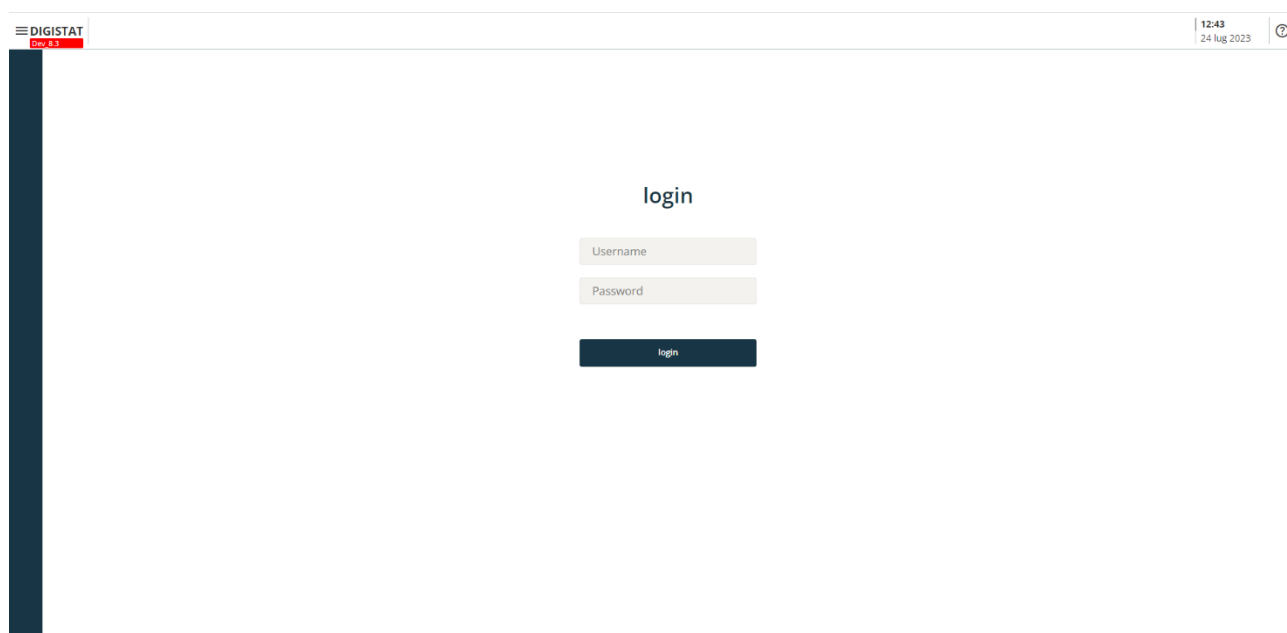


Fig 1

1.2 Accesso (Login)

Per accedere alle funzionalità del sistema è richiesto il login da parte dell'utente.

login

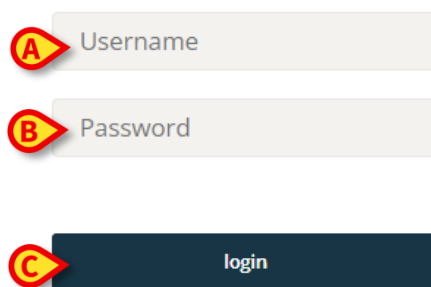

The login form consists of three elements: a text input field labeled 'Username' with a red circle 'A' next to it, a text input field labeled 'Password' with a red circle 'B' next to it, and a dark blue button labeled 'login' with a red circle 'C' next to it.

Fig 2

Per effettuare il login

- Inserire il proprio nome utente nel campo **Username** ("Nome utente" - Fig 2 **A**)
- Inserire la propria password nel campo **Password** ("Parola chiave" - Fig 2 **B**).
- Cliccare il pulsante **Login** (Fig 2 **C**).



Il nome utente e la password sono rilasciati dall'amministratore di sistema. Se non siete in possesso di un nome utente e di una password non siete autorizzati ad utilizzare il Prodotto.

Una volta effettuato l'accesso una sigla corrispondente all'utente connesso appare sul pulsante **Utente** (la sigla è "ADMIN" in Fig 3 **A**).

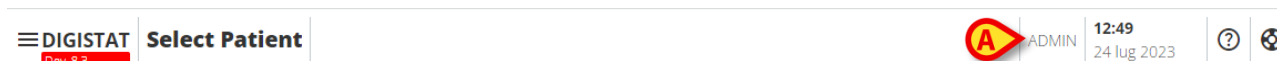


Fig 3



*L'utente le cui credenziali appaiono sul pulsante **Utente** è responsabile delle operazioni che vengono effettuate sul Prodotto. Si raccomanda pertanto di effettuare il log out dal sistema ogni volta che ci si allontana dalla postazione di lavoro. Ciò al fine di evitare un uso improprio del sistema.*



È possibile configurare il Prodotto in modo che il login possa essere eseguito tramite un sistema esterno (single sign on). In questi casi è presente un pulsante apposito sulla schermata di Login.

Per effettuare il log out dal sistema:

- Cliccare il pulsante **Utente** durante la sessione di lavoro. Si aprirà il menù seguente (Fig 4)

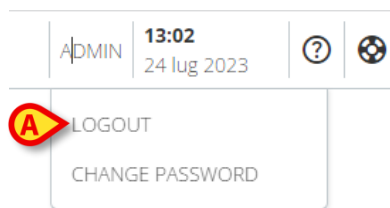


Fig 4

- Cliccare su **LOGOUT** (Fig 4 **A**).

È richiesta una conferma da parte dell'utente. Dopo la conferma l'utente è scollegato. Per connettersi di nuovo è sufficiente cliccare di nuovo sul pulsante **Utente**. Apparirà di nuovo la schermata mostrata in Fig 2.

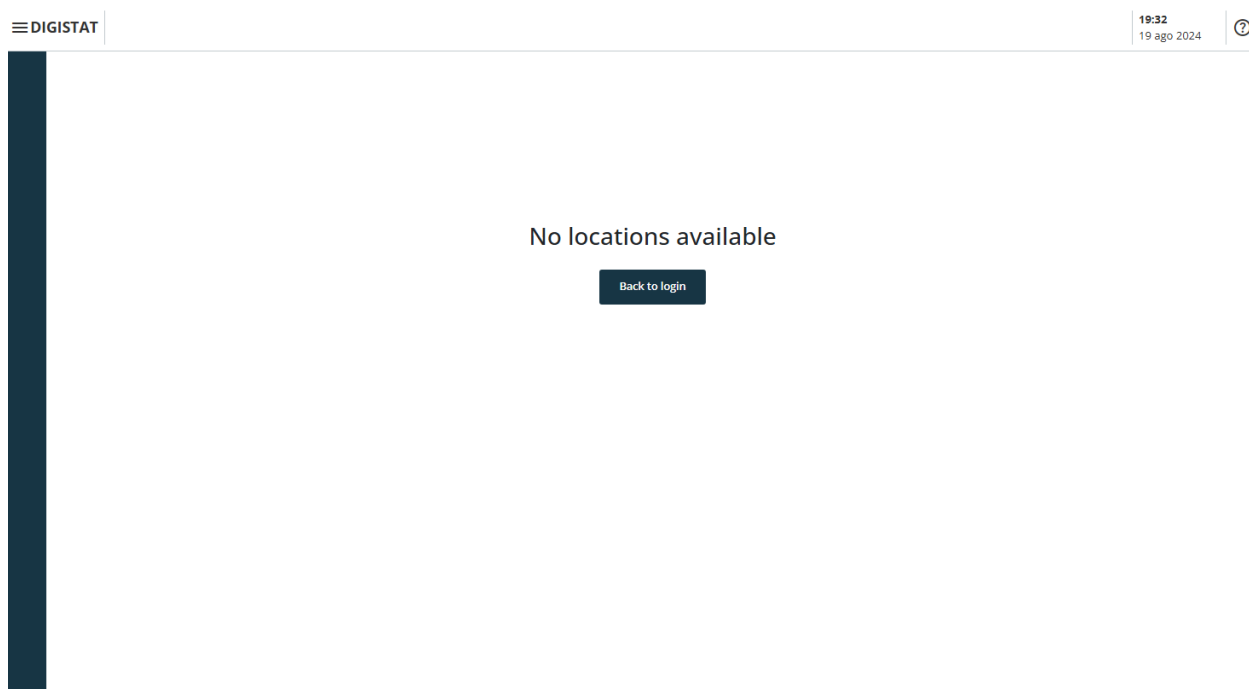


Fig 5

Se l'utente non è associato ad una "Location" non è possibile effettuare il login (si veda il documento *CGF ENG Digistat Suite MDR* per l'associazione fra utente e "Location"). In questo caso è visualizzato il messaggio "No location available/Location non disponibile" (Fig 5). Un pulsante **Back to Login** (Torna al login) è inoltre presente sulla schermata, per accedere direttamente al login e eventualmente ripetere la procedura con un altro utente, o con lo stesso dopo che sia stata effettuata l'associazione fra utente e "Location".



La "Location" è una entità di configurazione Digistat che corrisponde a una determinata area della struttura ospedaliera. Può trattarsi, ad esempio, di un reparto, di un blocco operatorio, di una corsia etc. a seconda delle esigenze della struttura. Si faccia riferimento agli amministratori del sistema per maggiori informazioni.

1.3 Area di lavoro

Dopo il login, le icone corrispondenti ai moduli disponibili sono visualizzate sulla barra laterale (Fig 6 **A**). L'area di lavoro (Fig 6 **B**) mostra le schermate e le funzionalità del modulo selezionato sulla barra laterale.



Fig 6

La barra comandi (Fig 6 **C**) sarà descritta nel paragrafo 1.4 (e seguenti). L'icona corrispondente al modulo correntemente selezionato è evidenziata.

1.3.1 Come selezionare un modulo

Per selezionare un modulo

- Cliccare l'icona corrispondente sulla barra laterale.

L'icona sarà evidenziata. Le funzionalità del modulo saranno visualizzate all'interno dell'area di lavoro.

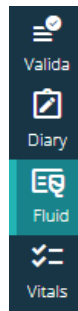


Fig 7

1.4 Control Bar

La barra comandi che appare nella parte superiore della schermata (detta Control Bar) è comune a tutti i moduli. Elenchiamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.



Fig 8

- Il pulsante **Menu** (Fig 8 **A**) permette di aprire il menu principale di Control Bar Web (Paragrafo 1.5).
- Il pulsante **Paziente** (Fig 8 **B**). Se nessun paziente è selezionato, questo pulsante può essere cliccato per lanciare la procedura di selezione del paziente. Dopo la selezione del paziente il pulsante riporta il nome del paziente selezionato ed alcuni dei dati principali. Per i pazienti ammessi sono indicati anche il letto e il reparto di ammissione. Se per il paziente selezionato sono disponibili funzionalità aggiuntive di Control Bar Web, il pulsante Paziente può essere cliccato per visualizzare un menù a discesa che permette di accedere a tali funzionalità (si veda il paragrafo 1.6 per maggiori informazioni). Se accanto al nome del paziente è visualizzata un'icona-lucchetto -  - significa che alcuni dati o funzionalità non sono disponibili per quel paziente.



La procedura di selezione del paziente si esegue di solito sul modulo Digistat Patient Explorer Web. Si veda il manuale utente di Patient Explorer Web (documento USR ENG Patient Explorer Web) per le istruzioni sulle funzionalità di gestione dei pazienti. Altri moduli possono essere configurati al posto di Patient Explorer per la selezione del paziente. Se questo è il caso, si veda, per le istruzioni, la documentazione specifica.

- L'area indicata in Fig 8 **C** può essere utilizzata per segnalare notifiche all'utente.
- Il pulsante **Utente** dà accesso alle funzionalità di Login/Logout e di cambio password (Fig 8 **D**).

- Indicazione di ora e data correnti (Fig 8 E).
- Il pulsante **Help** (Fig 8 F) permette di accedere alla documentazione online esistente (manuali utente, guide all'uso del sistema etc.).
- L'icona  (Fig 8 G) permette di creare una segnalazione da parte dell'utente diretta all'assistenza tecnica. Vedi paragrafo 1.5.2.

1.5 Menu

Il pulsante **Menu** (Fig 8 A) apre la finestra seguente (Fig 9).

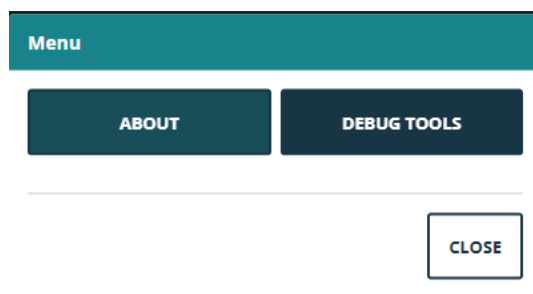


Fig 9

Il pulsante **About** ("Informazioni") permette di visualizzare una finestra contenente informazioni sulla versione del Prodotto installata e sulle relative licenze (About Box - si veda la documentazione relativa per maggiori informazioni). L'etichettatura del prodotto è l>About Box visualizzato sulle postazioni di lavoro client, sui dispositivi mobili e moduli web sui quali è installato il Prodotto.

Il pulsante **Debug Tools** ("Strumenti di debug") è riservato agli amministratori di sistema.

1.5.1 Modifica password

Per cambiare la password:

- Cliccare il pulsante Utente su Control Bar (Fig 10 A).

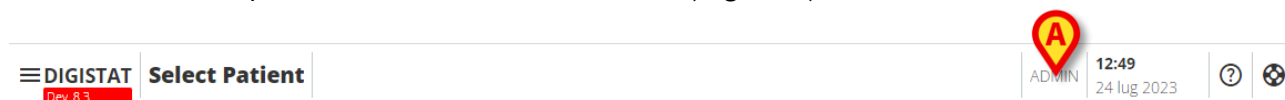


Fig 10

Si aprirà il seguente menù

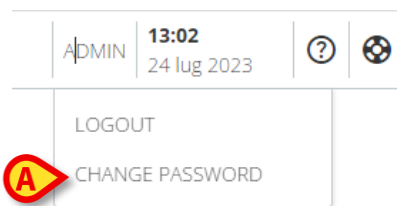


Fig 11

- Cliccare su **Change Password** (“Cambia password” - Fig 11 **A**). Si aprirà la schermata seguente (Fig 12).

CHANGE PASSWORD









Fig 12

- Inserire la password attuale nel campo **Old password** (“Password precedente” - Fig 12 **A**).
- Inserire la nuova password nel campo indicato in Fig 12 **B**.
- Digitare di nuovo per conferma la nuova password nel campo **Confirm new password** (“Conferma la nuova password” - Fig 10 **C**).
- Cliccare su **SAVE** (“Salva” - Fig 10 **D**).

1.5.2 Report di problemi tecnici

Se presente, l'icona  su Control Bar (Fig 13 **A**) permette di notificare un eventuale problema tecnico all'assistenza.



Fig 13



*La presenza dell'icona dipende dalla System Option “EnableUserIssueReporting”.
Si faccia riferimento agli amministratori del sistema per maggiori informazioni.*

Per fare ciò è necessario:

- Cliccare l'icona  (Fig 13 **A**). Si aprirà la finestra seguente (Fig 14).

Fig 14

- Descrivere brevemente il problema all'interno del campo **Description** ("Descrizione" - Fig 14 **A**).
- Cliccare su **Send** ("Spedisci" - Fig 14 **B**).

Sarà fornita una conferma e un numero identificativo della richiesta effettuata.

1.6 Sub-moduli aggiuntivi

I sub-moduli descritti in questo paragrafo possono essere presenti oppure no, a seconda della configurazione del Prodotto nella specifica Struttura Ospedaliera. Tali sub-moduli si aprono cliccando la voce corrispondente su un menu che è visualizzato sotto al pulsante **Paziente**. Le funzionalità di questi sub-moduli sono relative al paziente specifico. Ciò significa che sono disponibili solo se c'è un paziente selezionato.

1.6.1 CDSS Configurator

Il sub-modulo CDSS Configurator può essere abilitato da configurazione come sezione aggiuntiva di Control Bar Web. Per aprire tale sub-modulo:

- Selezionare il paziente.



Si veda il manuale utente di Patient Explorer Web per la procedura di selezione del paziente (documento USR ENG Patient Explorer Web).

Dopo la selezione del paziente, se sono disponibili sub-moduli di Control Bar, l'icona  è visualizzata sul pulsante **Paziente** (Fig 15 **A**).



Fig 15

- Cliccare l'icona .

Sarà visualizzata una finestra a discesa che elenca i sub-moduli disponibili (Fig 16).

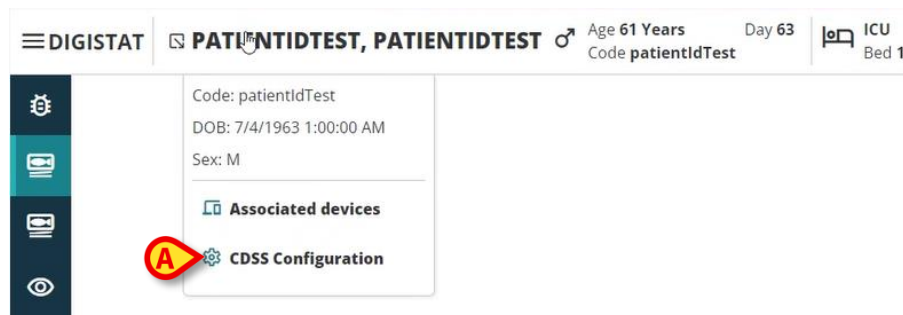


Fig 16

- Cliccare su “CDSS Configuration” (Fig 16 A).

Si aprirà la finestra seguente, che elenca le regole associate al paziente correntemente selezionato (Fig 17).

RULES		
✓	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
✓	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
✓	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

CLOSE

Fig 17

Si veda il manuale utente di CDSS Configurator per la descrizione completa e per le istruzioni d'uso di questo sub-modulo (documento USR ENG CDSS Web).

1.6.2 Identity

Il sub-modulo Identity può essere abilitato da configurazione come sezione aggiuntiva di Control Bar Web. Per aprire tale sub-modulo:

- Selezionare il paziente.



Si veda il manuale utente di Patient Explorer Web per la procedura di selezione del paziente (documento USR ENG Patient Explorer Web).

Dopo la selezione del paziente, se sono disponibili sub-moduli di Control Bar, l'icona  è visualizzata sul pulsante **Paziente** (Fig 18 A).



Fig 18

- Cliccare l'icona .

Sarà visualizzata una finestra a discesa che elenca tutti i sub-moduli disponibili (Fig 19).

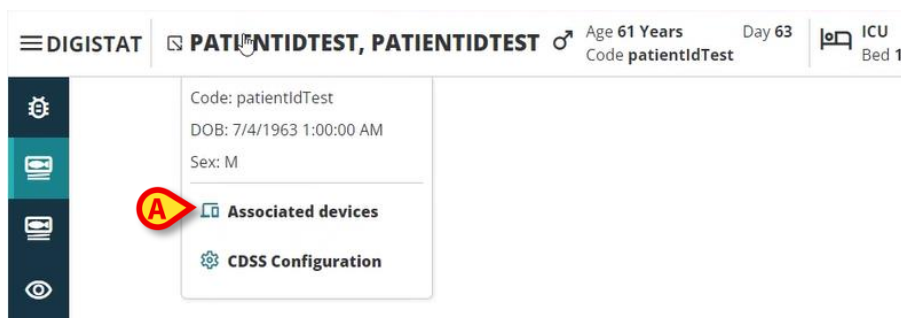


Fig 19

- Cliccare su “Associated devices” (Fig 19 **A**).

Si aprirà la finestra seguente, che elenca i dispositivi associati al paziente correntemente selezionato (Fig 20).

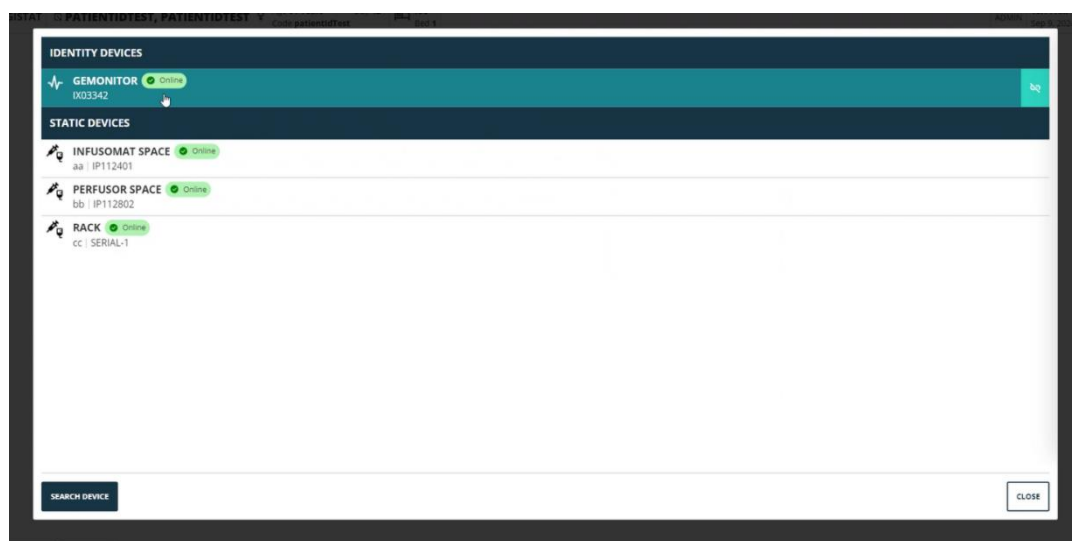


Fig 20

Si veda il manuale utente di Identity per la descrizione completa e per le istruzioni d'uso di questo sub-modulo (documento USR ENG Identity Web).