



Smart Central Manuale Utente

Versione 7.0

2020-12-07

Sommario

1. Smart Central	3
1.1 Selezione del modulo	3
1.2 Smart Central - Funzionalità	4
1.3 Aree letto	5
1.3.1 Descrizione dell'Area Letto	7
1.4 La barra comandi della Smart Central	11
1.4.1 Legenda.....	11
1.5 Lista degli eventi.....	13
1.5.1 Descrizione della lista di eventi.....	14
1.5.2 Eventi dell'utente	16
1.6 Configurazione "Dashboard"	19
1.6.1 Parametri Vitali.....	19
1.6.2 Grafici	21
1.6.3 Statistiche degli allarmi.....	22
1.7 Area notifiche.....	23
1.8 Notifica di allarmi	25
1.9 Procedura di verifica del suono.....	28
1.10 Silenziamento delle notifiche in Smart Central Mobile.....	30
1.10.1 Su postazioni di lavoro desktop	30
1.10.2 Su postazioni di lavoro mobili	31
1.10.3 Presenza infermiere	32
1.11 Smart Central Video	33
1.12 Waveforms.....	37
1.13 Ricerca, selezione e ammissione dei pazienti	38
1.14 Configurazione a posto letto	38
1.14.1 My Patients	39
1.15 Appendice – Esempi di procedure	42
1.15.1 Visualizzare gli eventi di un paziente.....	42
1.15.2 Inserimento di un evento da parte dell'utente	42
1.15.3 Modificare gli eventi inseriti dall'utente.....	43
1.15.4 Cancellare gli eventi inseriti dall'utente	43
1.15.5 Statistiche degli allarmi	44
1.15.6 Procedura di verifica del suono.....	45
1.15.7 Modalità "Privacy" su Smart Central video	45
1.15.8 Visualizzare i grafici dei parametri acquisiti ("Waveforms").....	46

1. Smart Central



Per informazioni generali e dettagliate sull'ambiente del Prodotto e le istruzioni d'uso del software Control Bar si veda la documentazione specifica. La conoscenza e la comprensione di questi documenti è obbligatoria per un uso sicuro e appropriato del modulo Smart Central, descritto in questo documento.

1.1 Selezione del modulo

Per selezionare il modulo Smart Central

- Cliccare l'icona corrispondente sulla barra laterale (Fig 1).



Fig 1

Si aprirà così la schermata Smart Central, mostrata in Fig 2.



In alcune configurazioni del Prodotto il modulo Smart Central è l'unico disponibile ed è selezionato automaticamente dopo il log in dell'utente.

1.2 Smart Central - Funzionalità

La schermata Smart Central mostra una rappresentazione schematica dello stato dei dispositivi collegati ai pazienti del reparto (Fig 2).



Fig 2

La schermata è suddivisa in aree rettangolari, chiamate “Area letto” (Fig 2 **A**). Ogni area si riferisce ad un letto e contiene informazioni sui dispositivi collegati al paziente ammesso a quel letto. Di default sono mostrati soltanto i dati che si riferiscono a dispositivi in stato di allarme (Fig 5), e sono visualizzati soltanto i dati relativi all’allarme. Un letto è in stato di allarme se almeno uno dei dispositivi collegati al letto è in allarme. Se due o più allarmi si verificano nello stesso momento nello stesso letto, è notificato l’allarme con più alta priorità.

È possibile visualizzare tutti i dati disponibili (sia che si riferiscano ai letti che non sono in stato di allarme, sia che si riferiscano ai dispositivi non in allarme sui letti visualizzati come “in allarme”) cliccando il pulsante **Valori** sulla barra comandi (Fig 2 **B**).

Per mostrare tali dati:

- Cliccare il pulsante **Valori** sulla barra comandi (Fig 2 **B**).

Il pulsante apparirà selezionato. L’informazione disponibile sarà mostrata come in Fig 3.

1 Patient 1, Jane 	2 Patient 2, Jim AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min CARESCAPE HR ECG: 61 bpm NBP: 110/63 (86) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 2: Next EOI: 0h13m	3 Patient 3, Joe AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min CARESCAPE HR ECG: 73 bpm NBP: 115/79 (97) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 3: Next EOI: 1h20m
4 Patient 4, Rose AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min Altri dispositivi Pump 1: Next EOI: 0h55m	5 Patient 5, Ellen AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min Altri dispositivi Pump 2: Next EOI: 2h01m	6 Patient 6, Bill AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min CARESCAPE HR ECG: 74 bpm NBP: 101/60 (80) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 3: Next EOI: 1h05m

SMART CENTRAL

 Legenda
 Valori

Fig 3

1.3 Aree letto

Ogni “Area letto” mostra alcuni dei dati inviati dai dispositivi collegati al paziente (Fig 5). Il tipo di dati visualizzati dipende dal tipo di dispositivo e dalla sua configurazione.

Se l’area letto è di colore celeste, come in Fig 4, significa che c’è almeno un allarme con bassa priorità e nessun allarme con media/alta priorità.

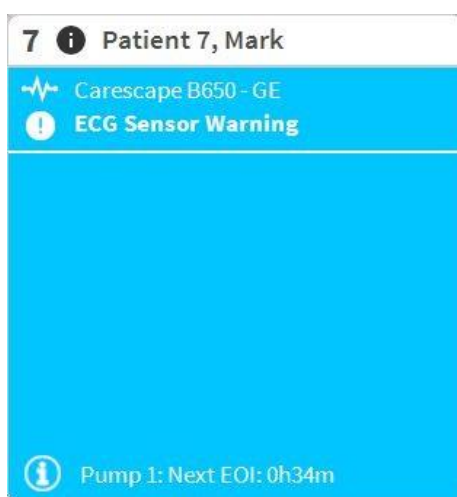


Fig 4

Se l’Area Letto è gialla, come in Fig 5, significa che c’è almeno un allarme con priorità media e nessun allarme con priorità alta, proveniente dai dispositivi collegati.

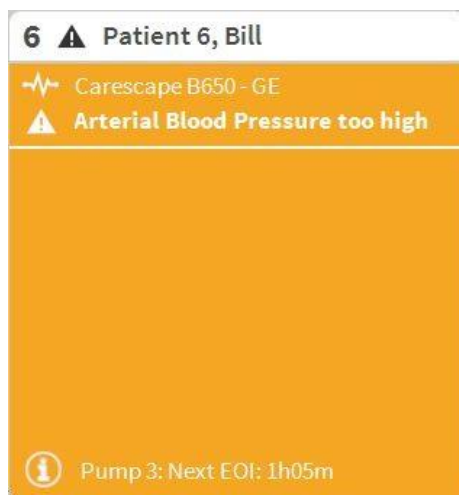


Fig 5

Se l'Area Letto è rossa, come in Fig 6, significa che c'è almeno un allarme con priorità alta sui dispositivi collegati.

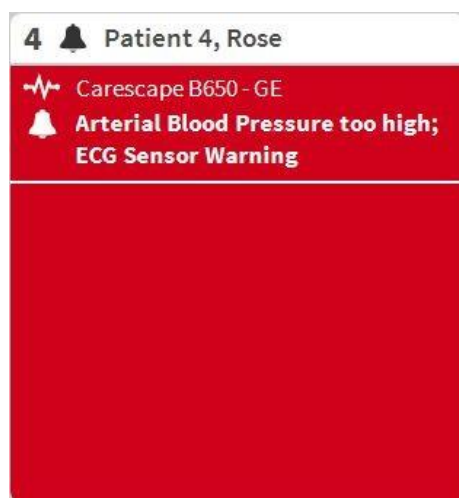


Fig 6

I letti dai quali non proviene alcun allarme appaiono come mostrato in Fig 7. Nessun dato è mostrato. Questo per non distrarre l'utente dalla lettura di eventuali allarmi sugli altri letti.

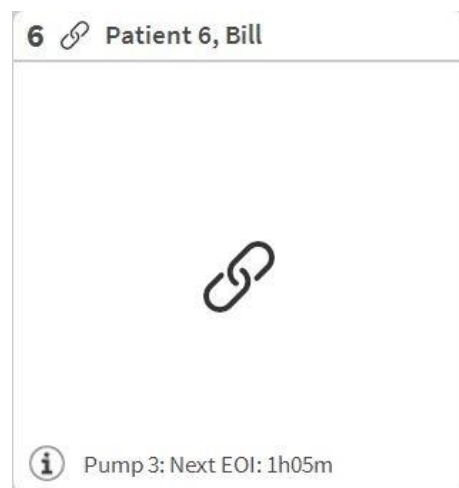


Fig 7

Per mostrare i dati dei dispositivi su questi letti, cliccare il pulsante **Valori** sulla barra comandi (Fig 2 **B**). L'area Letto apparirà come in Fig 8.

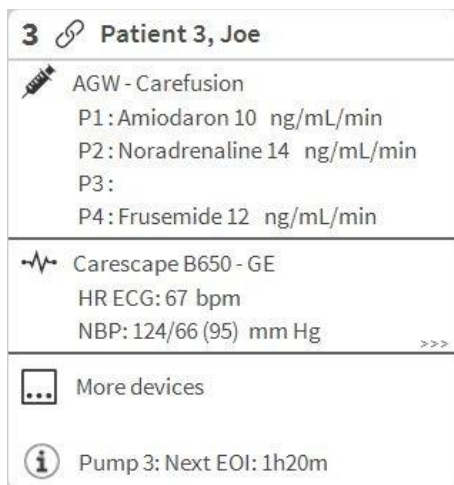


Fig 8

I letti disconnessi sono mostrati come in Fig 9.



Fig 9

1.3.1 Descrizione dell'Area Letto

Questo paragrafo fornisce una descrizione di come è visualizzata l'informazione sulle "Aree Letto".

In alto, sull'"Area Letto", sono visualizzati il numero di letto e il nome del paziente. L'icona  significa che il letto è collegato a Smart Central e che Smart Central sta attualmente ricevendo dati da questo letto. Se uno dei dispositivi collegati al letto fornisce un allarme con priorità bassa è mostrata l'icona . Se uno dei dispositivi collegati al letto fornisce un allarme con priorità media è invece visualizzata l'icona . Se uno dei dispositivi collegati a letto fornisce un allarme con priorità alta è invece mostrata l'icona .



Fig 10

L'informazione all'interno dell'Area Letto è suddivisa per "Tipo di Dispositivo". Ogni tipo è caratterizzato da un'icona specifica (Fig 11 **A**).

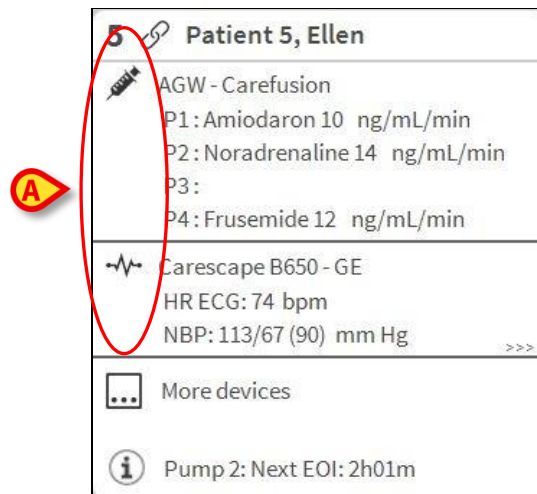


Fig 11

È disponibile una legenda che permette di sapere a quale tipo di dispositivo si riferisce una specifica icona.

Per visualizzare la legenda:

- Cliccare il pulsante **Legenda** sulla barra comandi. Si veda il paragrafo 1.4.1 per una descrizione dettagliata.

Dati provenienti da dispositivi dello stesso tipo sono raggruppati insieme. In Fig 12, per esempio, sono indicati due gruppi: pompe di infusione e monitor paziente.

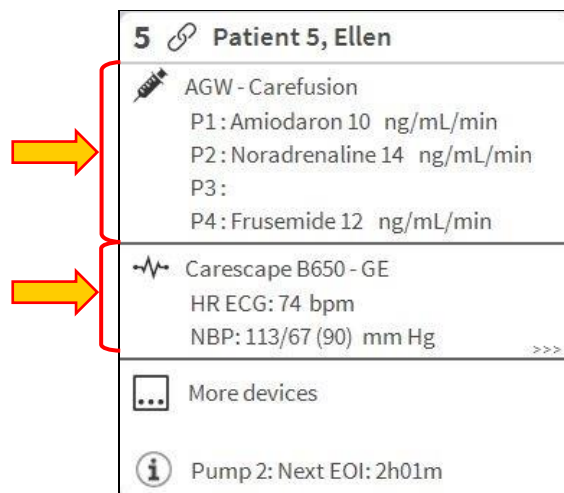


Fig 12

È possibile che non tutti i dati disponibili siano visualizzati, per ragioni di spazio. Se ci sono dati nascosti è mostrato il segnale >>> alla fine di ogni gruppo (si veda la Fig 13 **A**).



Patient 3, Joe Male 27 y MRN: 20000003	
	AGW - Carefusion P1: Amiodaron 10 ng/mL/min , 20 mL/h , 10 mcg/mL , 00:20:00 minutes P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min , 23 mL/h , 15 mcg/mL , 00:21:00 minutes P3: , 45 mL/h , , 00:21:00 minutes P4: Frusemide 12 ng/mL/min , 22 mL/h , 4 mcg/mL , 00:20:00 minutes
	Carescape B650 - GE HR ECG: 75 bpm NBP: 109/73 (91) mm Hg SPO2 Art: 90 %
	Evita XL - Draeger HR ECG: 64 bpm RR: 16 bpm PEEP: 7 mm Hg PSF: 6 mL/s PI mean: 6 mbar PLT: 7 mbar FiO2 Art: 26 % VTe: 438 mL MVe: 7008 L/min
	Pump 3: Next EOI: 1h20m

Fig 14

Informazioni aggiuntive sui dispositivi collegati, insieme alla lista dei possibili dispositivi non collegati, sono visualizzate in basso, all'interno dell'area (Fig 15 **A**). I dispositivi non collegati sono indicati dall'icona . Informazioni aggiuntive sono indicate dall'icona .

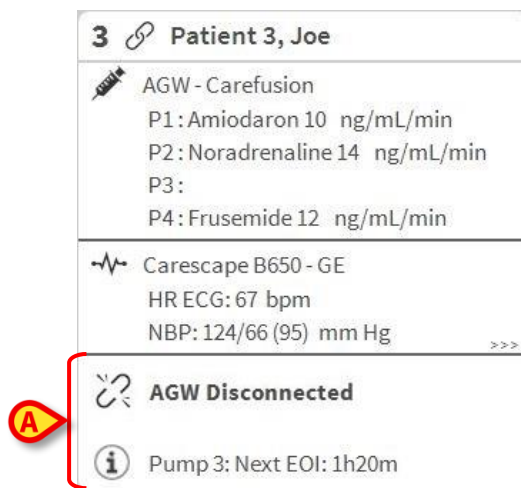


Fig 15

È possibile, da configurazione, associare un messaggio ai valori visualizzati. Ad esempio, è possibile definire un intervallo di valori da considerarsi “normale” e configurare Smart Central in modo che avverta l’utente quando i valori acquisiti sono al di fuori di questo intervallo. Si veda ad esempio la Fig 16 **A**, nella quali i valori sono definiti “Bassi”.

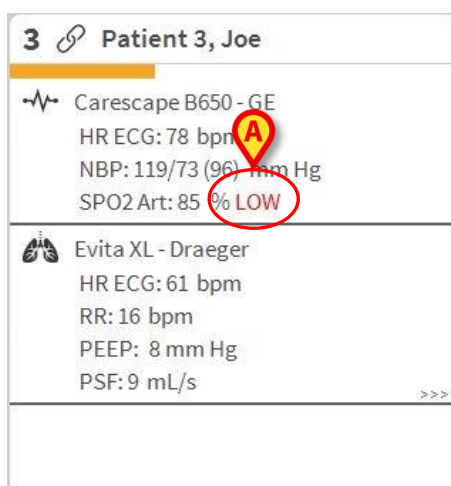


Fig 16

Un sistema visuale posto nella barra superiore dell’area letto tiene temporaneamente traccia dell’ultima notifica di allarme dopo che l’area letto è passata ad un livello di allarme di priorità diversa (o a nessun allarme). Questo permette di essere maggiormente consapevoli di allarmi che sono notificati per breve tempo e che passano rapidamente.

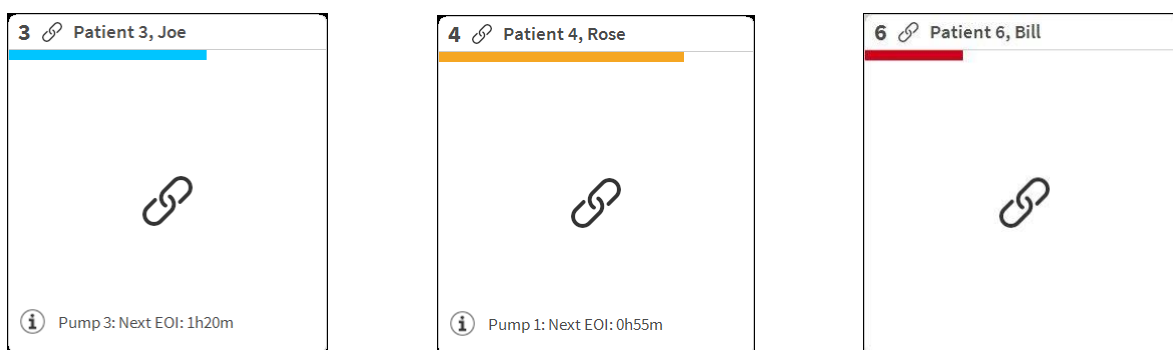


Fig 17

Quando lo stato di un'area letto cambia e passa a un allarme di livello inferiore (o nessun allarme), il colore relativo allo stato precedente rimane sulla barra superiore per un certo periodo di tempo configurabile.

1.4 La barra comandi della Smart Central

I pulsanti sulla barra comandi della Smart Central permettono di compiere azioni specifiche.

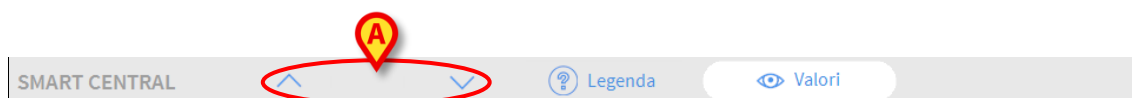


Fig 18

I pulsanti-freccia sulla sinistra (Fig 18 **A**) permettono di “scrollare” in alto e in basso i contenuti sulla schermata quando non è possibile visualizzare tutte insieme le aree letto configurate. Quando almeno una delle aree letto non visualizzate è in allarme, il pulsante-freccia corrispondente alla direzione in cui si trova l'area letto in allarme si colora in modo corrispondente al livello dell'allarme (rosso= alta priorità, giallo= media priorità, celeste= bassa priorità).

In caso di allarmi inviati contemporaneamente, sono visualizzati gli allarmi con priorità più alta.

Un'icona, che può essere visualizzata fra i pulsanti-freccia, indica che c'è un allarme su una delle aree-letto correntemente visualizzate.



Fig 19

Il pulsante **Legenda** apre una finestra che spiega il significato di tutte le icone che è possibile incontrare nell'uso dell'applicazione (Si veda il paragrafo 1.4.1).

Il pulsante **Valori** mostra tutti i dati disponibili (sia quelli riferiti ai letti che non sono in allarme, sia quelli riferiti ai dispositivi che non sono in allarme presenti sui letti in allarme).

Se Smart Central è configurato per coprire più di un reparto, è presente un pulsante che apre il menù contenente la sigla di tutti i reparti configurati.

- Cliccare una delle sigle sul menù per visualizzare le aree letto del reparto corrispondente.

1.4.1 Legenda

Il pulsante **Legenda** permette di aprire una finestra che spiega il significato di tutte le differenti icone che si possono incontrare nell'uso dell'applicazione.

Per visualizzare la “Legenda”:

- Cliccare il pulsante **Legenda**.

Si aprirà la seguente finestra (Fig 20).

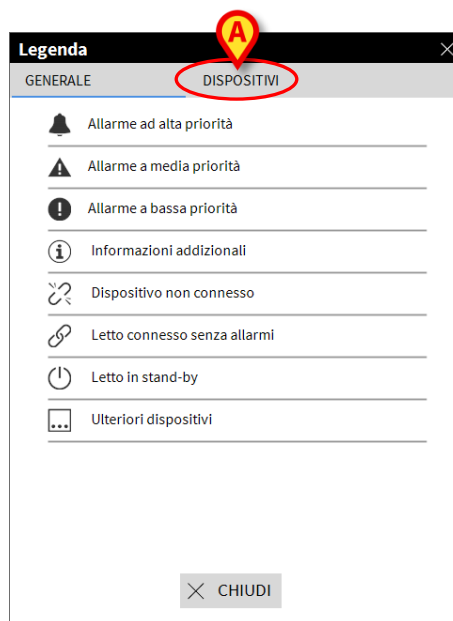


Fig 20

La finestra contiene una lista delle icone “Generali” che possono apparire in contesti differenti. Un’altra lista di icone, quelle che si riferiscono ai dispositivi, può essere visualizzata cliccando il pulsante **Dispositivi** indicato in Fig 20 **A**.

Per vedere le icone riferite ai dispositivi:

- Cliccare il pulsante **Dispositivi** indicato in Fig 20 **A**.

La legenda riferita ai dispositivi è così visualizzata (Fig 21).

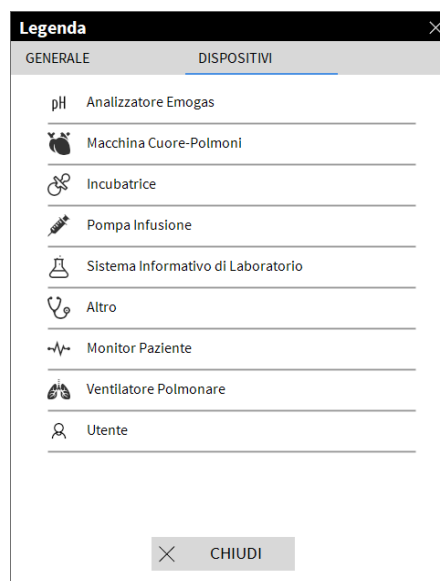


Fig 21

Su questa finestra sono elencate tutte le possibili icone. Accanto all'icona è specificato il nome del dispositivo, con l'abbreviazione corrispondente (INF, ad esempio, si riferisce alle pompe a infusione, MON ai monitor del paziente e così via).

1.5 Lista degli eventi

È possibile visualizzare una lista dettagliata di tutti gli eventi riferiti ad un letto.

Per visualizzare la lista degli eventi,

- Cliccare l'Area Letto che si riferisce al paziente/letto di cui si vogliono visualizzare tutti gli eventi (Fig 22).

5	🔗 Patient 5, Ellen
📌	AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min
📶	CARESCAPE HR ECG: 73 bpm AP: 119/62 (90) mm Hg >>>
...	Flere apparater
🔔	Pump 2: Next EOI: 2h01m

Fig 22

In seguito al click l'area letto è visualizzata a schermo intero. La lista degli eventi è visualizzata sulla destra (Fig 23).

3

Patient 3, Joe

Male 28 y MRN: 20000003

AGW
P1: Amiodaron 10 ng/mL/min , 20 mL/h , 10 mcg/mL , 00: ...
P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min , 23 mL/h , 15 mcg/mL , 00
P3: , 45 mL/h , , 00:20:00 minutes
P4: Frusemide 12 ng/mL/min , 22 mL/h , 4 mcg/mL , 00:20:...

CARESCAPE
HR ECG: 64 bpm
AP: 117/82 (99) mm Hg
SPO2 Art: 90 %

Evita
HR: 79 bpm
RR: 24 bpm **HIGH**
PEEP: 9 mm Hg
PSF: 9 mL/s
PI mean: 9 mbar
PLT: 6 mbar
FIO2: 56 %
VT: 316 mL
MVe: 7584 L/min

Pump 3: Next EOI: 1h20m

Allarmi ed eventi				Parametri vitali		Grafici	
Intervallo:				1 Ora	6 Ore	12 Ore	1 Giorno
				7 Giorni	tutti		
Evento:				tutti			
Dispositivi:				tutti			
Time	Device	#	Description				
10:20			End: Arterial Blood Pressure too high				
10:20			End: ECG Sensor Warning				
10:20			Arterial Blood Pressure too high				
10:20			ECG Sensor Warning				
10:20			End: Arterial Blood Pressure too high				
10:20			End: ECG Sensor Warning				
10:19			Arterial Blood Pressure too high				
10:19			ECG Sensor Warning				
10:19			End: Arterial Blood Pressure too high				
10:19			End: ECG Sensor Warning				
10:19		1		Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree; Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL			
10:19			ECG Sensor Warning				

Fig 23

1.5.1 Descrizione della lista di eventi

La tabella mostrata in Fig 24 contiene la lista di tutti gli eventi occorsi durante il ricovero del paziente selezionato su tutti i dispositivi collegati.

The interface shows the 'Allarmi ed eventi' tab selected. The 'Intervallo' filter is set to '1 Ora'. The 'Evento' filter is set to 'tutti'. The 'Dispositivi' filter is set to 'tutti'. The table below lists the following events:

Time	Device	#	Description
10:28	ECG Sensor		End: ECG Sensor Warning
10:27	ECG Sensor		ECG Sensor
10:27	Infusion Pump	1	Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree; Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL
10:26	ECG Sensor		End: ECG Sensor Warning
10:26	ECG Sensor		End: Arterial Blood Pressure too high

Fig 24

Il periodo temporale di riferimento può essere selezionato tramite il filtro **Intervallo** (Fig 24 **A**).

I pulsanti **Evento** indicati in Fig 24 **B** sono filtri che permettono di visualizzare solo certi tipi di evento. Il pulsante **Tutti**, selezionato di default, mostra tutti gli eventi verificatisi nel periodo temporale selezionato. Il pulsante mostra solo gli eventi classificati come “informazioni”; i pulsanti mostrano solo gli allarmi di priorità bassa e media; il pulsante mostra solo gli allarmi con priorità alta. È possibile la selezione multipla di più pulsanti, per visualizzare contemporaneamente allarmi con diversa priorità.

I pulsanti **Dispositivo** indicati in Fig 24 **C** sono filtri che permettono di visualizzare solo gli eventi che si riferiscono a un dispositivo specifico. Il pulsante **Tutti**, selezionato di default, visualizza tutti gli eventi occorsi nel periodo selezionato; il pulsante visualizza i soli eventi riferiti alle pompe di infusione; il pulsante visualizza i soli eventi riferiti ai monitor-paziente e così via gli altri pulsanti. La lista completa di icone con il loro significato si trova sulla finestra “Legenda” (si veda il paragrafo 1.4.1). È possibile la selezione multipla di più pulsanti che permette di visualizzare contemporaneamente gli eventi relativi a due o più dispositivi.

Il pulsante **Stampa** indicato in Fig 24 **D** permette di stampare la lista di eventi visualizzata (Fig 25).



Fig 25

La tabella degli eventi è mostrata qui sotto (Fig 26).

Ora	Disposit.		Descrizione
11:36			SpO2 Low
11:36			SpO2 Low
11:27			NIBP Sensor Fault
11:27			NIBP Sensor Fault
11:21			HR High
11:21			HR High
11:14			HR High

Fig 26

La tabella degli eventi fornisce le seguenti informazioni:

- Ora dell'evento (indicata in hh:mm).
- Tipo di dispositivo sul quale si è verificato l'evento.
- Numero (in caso di pompa di infusione è indicato il numero della pompa).
- Livello di priorità degli allarmi.
- Descrizione dell'evento.

La croce nera posta sul simbolo dell'allarme indica la fine dell'allarme corrispondente.

Snapshot (foto) dell'evento

- Fare doppio click sull'icona  (se presente - Fig 27) per visualizzare l'immagine delle forme d'onda relative all'evento corrispondente.

15:40			RR Low	
15:40			RR Low	
15:40			MVexp Low	
15:39			MVexp Low	

Fig 27

1.5.2 Eventi dell'utente

Una funzionalità presente in Smart Central permette all'utente di inserire manualmente degli eventi personalizzati.

Per abilitare questa funzionalità è necessario:

1. Indicare come “true” la system option *EventEditorEnabled*.
2. Possedere, come utente abilitato, il necessario livello di permessi.

Si veda il manuale utente del Configuratore della Digistat Suite di per maggiori informazioni (*CFG ENG Digistat Suite*).

Quando la system option *EventEditorEnabled* ha il valore “true”, compare una nuova barra comandi in fondo alla griglia degli eventi (Fig 28 **A**):

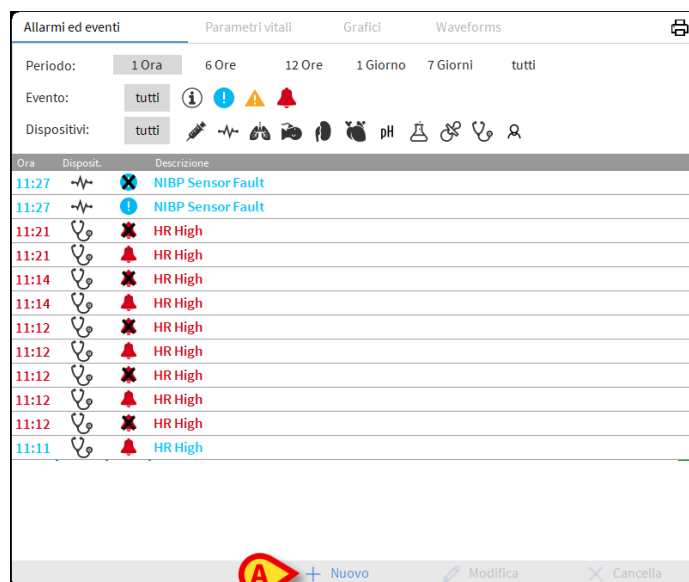


Fig 28

Questa nuova barra comandi permette di creare, modificare e cancellare gli eventi dell'utente.

Un evento inserito dall'utente è contrassegnato dall'icona: .

1.5.2.1 Creare un nuovo evento dell'utente

Per creare un nuovo evento dell'utente:

- Cliccare il pulsante **Nuovo** (Fig 28 **A**).

Si aprirà la finestra seguente (Fig 29):

Fig 29

Sulla finestra possono essere inseriti i dati seguenti:

- Orario: data e ora dell'evento (Fig 29 **A**).
 - Tipo di evento: un evento può avere diverse priorità, da informazione a bassa/medi/alta priorità (Fig 29 **B**).
 - Descrizione: il testo effettivo dell'evento (Fig 29 **C**).
- Cliccare su **Salva** per salvare la nota oppure **Chiudi senza salvare** per abbandonare la procedura (Fig 29 **D**).

Il pulsante **Assegna ora corrente** (Fig 29 **E**) può essere usato per assegnare all'evento l'orario e la data correnti.

L'evento così inserito compare all'interno della tabella degli eventi, contrassegnato dall'icona .

Per selezionare un evento esistente, sulla tabella degli eventi:

- Cliccare la riga corrispondente all'evento da selezionare.

Il comportamento della barra comandi cambia a seconda del tipo di evento selezionato:

- Se non c'è alcuna riga selezionata è solo possibile creare un nuovo evento dell'utente. I pulsanti **Modifica** e **Cancella** sono disabilitati.
- Se è selezionata una riga corrispondente a un evento dell'utente, allora è possibile modificarlo o cancellarlo. È ancora possibile creare un nuovo evento dell'utente.
- Se è selezionata una riga corrispondente a un evento dei dispositivi, è possibile creare un nuovo evento dell'utente. In questo caso:

- Cliccare il pulsante **Nuovo** per aprire la finestra “Nuovo Evento” (Fig 29) che ha lo stesso orario dell’evento selezionato. Questa caratteristica permette di inserire eventi dell’utente che abbiano lo stesso orario di un evento-dispositivo selezionato.

1.5.2.2 Modifica evento dell’utente

Per modificare un evento dell’utente, sulla tabella degli eventi:

- Cliccare la riga corrispondente all’evento-utente da modificare.
- Cliccare **Modifica** sulla barra comandi.

Si aprirà la finestra mostrata in Fig 29.

- Modificare l’evento (Data/ora, priorità, descrizione).
- Cliccare su **Salva**.

1.5.2.3 Cancellazione di un evento dell’utente

Per cancellare un evento dell’utente, sulla tabella degli eventi:

- Cliccare la riga corrispondente all’evento-utente da cancellare.
- Cliccare **Cancella** sulla barra comandi.

È richiesta conferma da parte dell’utente.

- Cliccare su **Sì** per cancellare l’evento.

La riga corrispondente scomparirà dalla tabella degli eventi.

1.6 Configurazione “Dashboard”

Se Smart Central è configurata come una “Dashboard” Smart Central, sono disponibili alcune funzionalità aggiuntive. Queste sono le funzionalità “Parametri vitali” e “Grafici”, descritte di seguito.

Entrambe le funzionalità possono essere attivate dall’area notifiche.

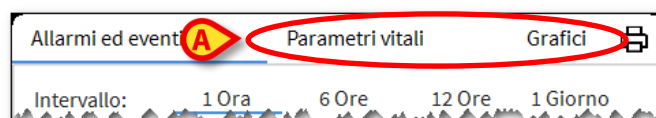


Fig 30

1.6.1 Parametri Vitali

Cliccare il pulsante **Parametri** per attivare la funzionalità “Parametri Vitali” (Fig 31).

PARAMETRI CONFIGURATI		11:35	11:36	11:37	
GEMonitor (X93342)					
HR	bpm	65	65	65	
ARTs	mm Hg	122	127	126	
ARTd	mm Hg	80	80	80	
ARTm	mm Hg	94	96	95	
SPO2	%	90	90	90	
EvitaVentilator (X95013)					
RR	bpm	6	19.83	21.04	21.85

Fig 31

Questa funzionalità permette di visualizzare in una tabella alcuni dei parametri del paziente, selezionati in fase di configurazione (Fig 32). Nella tabella sono raggruppati per dispositivo di acquisizione.

Fig 32

Si usi il filtro **Periodo** (Fig 32 **A**) per decidere l'arco temporale nel quale sono stati acquisiti i parametri. Per esempio: se è selezionato **1 ora**, la tabella mostra i parametri acquisiti da un'ora nel passato fino al momento presente; se è selezionato **6 ore**, la tabella mostra i parametri acquisiti da sei ore nel passato fino al momento presente

Si usi il filtro **Intervallo** (Fig 32 **B**) per definire l'intervallo di acquisizione dei parametri (ad esempio, a seconda dell'intervallo selezionato, i valori mostrati in tabella sono acquisiti ogni minuto, ogni 5 minuti, ogni 15 minuti e così via).

Si usi il filtro **Dispositivi** (Fig 32 **D**) per visualizzare solamente i valori acquisiti da determinati dispositivi selezionati.

Cliccare su **Parametri Configurati** (Fig 32 **D**) per visualizzare tutti i parametri acquisiti (l'intervallo in questo caso è di un minuto - Fig 33 **A**).

TUTTI I PARAMETRI		:41	11:42	11:43	11:44	11:45
AGW (AGWSERIAL-2)						
CH		0	10	10	10	10
Alaris CC (1252)						
VolumeRate	mL/h	5	45	45	45	45
InfusedVolume	mL	117.948	1118.708	1119.508	1120.308	1121.108
VTBI	mL	02	603	607	609	601
PumpPressure	mm Hg	06	104	107	108	116
PumpTimeRemain	s	0	21	20	21	21
PumpTimeRemain		0:20:00	00:20:00	00:20:00	00:21:00	00:21:00
DeltaInfusedVolume	mL	800	0.760	0.800	0.800	0.800
Alaris CC (1292)						
DrugConc	mcg/mL	0	10	10	10	10
DrugName		Vecuronium	Vecuronium	Vecuronium	Vecuronium	Vecuronium
DoseRate	ng/mL/min	2	12	12	12	12
VolumeRate	mL/h	0	30	30	30	30
InfusedVolume	mL	50.566	851.1361	851.7363	852.3365	852.9366

Fig 33

Cliccare l'icona di stampa per creare una stampa di tutti i parametri visualizzati.
Cliccare l'icona excel per esportare i dati ad un file XLS file (Fig 32 E).

1.6.2 Grafici

Cliccare il pulsante **Grafici** per attivare la funzionalità “Grafici” (Fig 34).

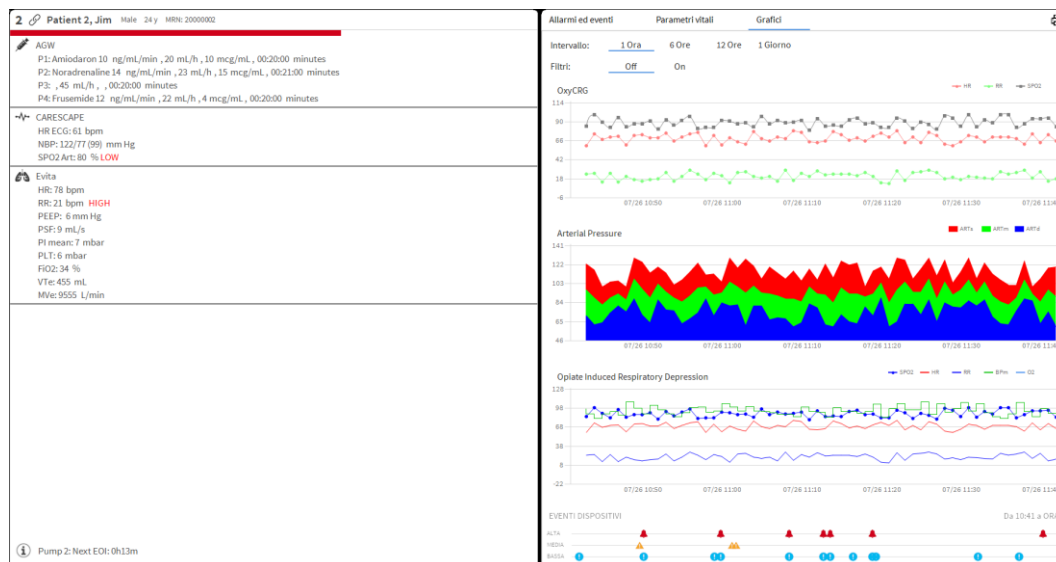


Fig 34

Questa funzionalità permette di visualizzare diversi grafici disegnati a partire dai parametri acquisiti (Fig 35). Il numero di grafici, i loro contenuti e i loro nomi sono definiti in fase di configurazione.



Fig 35

Si usi il filtro **Intervallo** (Fig 35 **A**) per decidere l'arco temporale cui si riferisce il grafico. Per esempio: se è selezionato **1 ora**, il grafico mostra l'andamento dei parametri acquisiti da un'ora nel passato fino al momento presente; se è selezionato **6 ore**, il grafico mostra l'andamento dei parametri acquisiti da sei ore nel passato fino al momento presente.

Si usi l'opzione **Filtro** (Fig 35 **B**) per attivare un algoritmo che approssima i valori del grafico in modo che sia possibile visualizzare e valutare più facilmente i diversi andamenti. Se questa opzione è attivata, i dati acquisiti sono raggruppati a insiemi di cinque. Ogni gruppo di cinque è poi messo in ordine crescente. Poi solo il valore mediano è considerato, mentre gli altri quattro sono scartati. Questa procedura elimina i valori più alti e più bassi (gli artefatti, ad esempio) e fornisce un grafico "normalizzato".

Il grafico indicato in fondo alla pagina (Fig 35 **C**) è sempre presente e, su tre righe, rappresenta gli eventi verificatisi sui dispositivi. Ogni evento è posizionato in corrispondenza del momento in cui si è verificato e del suo livello di priorità.

Si clicchi qualsiasi grafico per visualizzare un cursore verticale che mostra i valori di tutti i grafici in corrispondenza di un dato momento.

1.6.3 Statistiche degli allarmi

Una stampa dello storico delle statistiche degli allarmi può essere generata dal menù "Documenti di Sistema". Tale stampa mostra le statistiche in forma grafica, e comprende riepiloghi degli eventi e dettagli degli eventi.

Per ottenere questa stampa:

- Cliccare il pulsante **Menù** su Control Bar.
- Cliccare su **Documenti di Sistema**.
- Cliccare su **Smart Central Dashboard**.

Si aprirà una finestra che permette di selezionare l'origine dei dati (tutti i pazienti, solo il paziente selezionato, intervallo temporale).

- Cliccare il pulsante **Crea**.

Si aprirà un'anteprima di stampa.

1.7 Area notifiche

Sulla destra della schermata iniziale di Smart Central è possibile visualizzare un'area che elenca le notifiche provenienti dai dispositivi collegati (Fig 36 **A**, Fig 37).

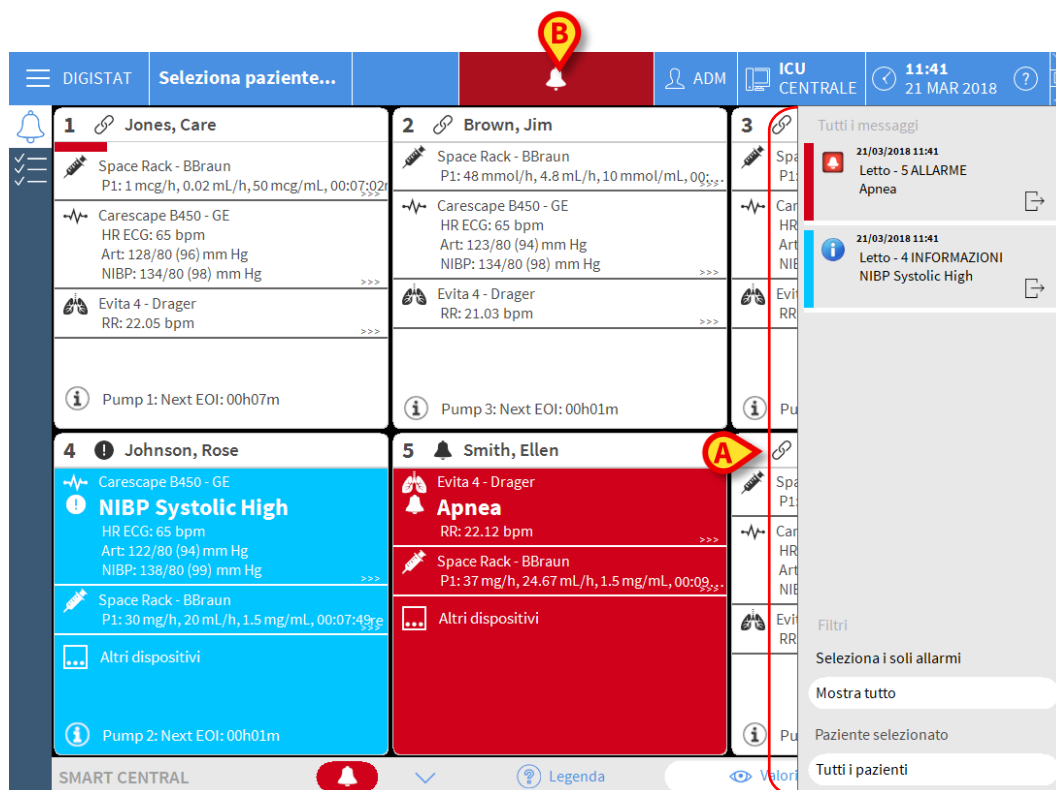


Fig 36

L'area notifiche, da configurazione, può:

- Essere sempre visibile.
- Comparire automaticamente quando c'è una nuova notifica.
- Essere visibile soltanto se l'utente clicca sul pulsante indicato in Fig 36 **B**.

Le notifiche sono mostrate in ordine cronologico, (la più recente in alto - Fig 37 **A**) e in ordine di criticità (In alto gli allarmi con priorità alta, poi quelli con priorità media, poi quelli con priorità bassa).

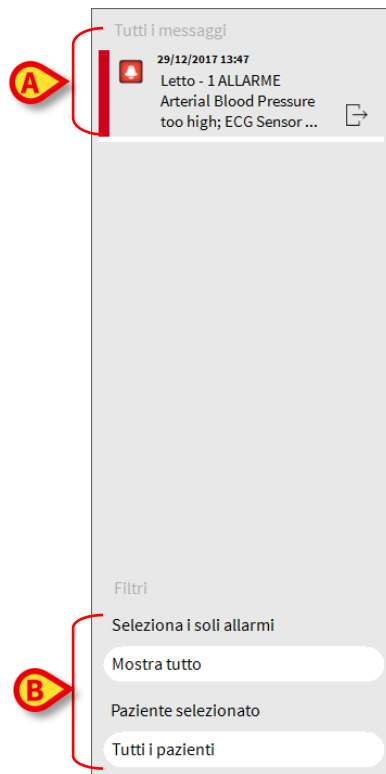


Fig 37

Ogni notifica è caratterizzata dal colore corrispondente al livello di priorità (rosso=alta, giallo=media, azzurro=bassa).

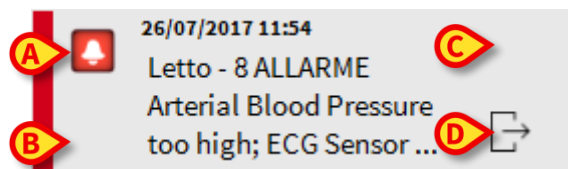


Fig 38

Ogni notifica riporta le seguenti informazioni (Fig 38):

- Data-ora in cui si è verificato l'allarme;
- Il numero del letto da cui proviene il messaggio;
- Il testo effettivo del messaggio;
- Un'icona che caratterizza il tipo di messaggio (Fig 38 **A**);
- Un'icona che caratterizza la categoria del messaggio (Fig 38 **B**);
- Un pulsante di "Acknowledge", che permette di indicare la presa in carico della notifica (Fig 38 **C**);
- Un pulsante che permette di accedere alla schermata di dettaglio del letto cui la notifica si riferisce (Fig 38 **D**).

In basso sono disponibili quattro diversi filtri. Tali filtri permettono di scegliere il tipo di messaggio da visualizzare (Fig 37 **B**). I filtri disponibili sono i seguenti:

- Visualizza solo gli allarmi.
- Visualizza tutte le notifiche.
- Visualizza solo le notifiche relative al paziente selezionato.
- Visualizza le notifiche relative a tutti i pazienti.

1.8 Notifica di allarmi

Di default, la schermata Smart Central mostra i dati di un letto solo se c'è almeno un messaggio di allarme proveniente da almeno uno dei dispositivi collegati a quel letto.

Se non ci sono notifiche la schermata appare come in Fig 39, nella quale cinque letti sono collegati e nessuno dei dispositivi è in allarme.



Fig 39

Quando un allarme si verifica su uno dei dispositivi, sono visualizzati i dati relativi al letto al quale il dispositivo è collegato. In Fig 40, ad esempio, il letto 5 è in allarme (priorità media). Un breve messaggio di testo è visualizzato all'interno dell'area letto, indicante il tipo di allarme.

1 Patient 1, Jane 	2 Patient 2, Jim AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min CARESCAPE HR ECG: 77 bpm NBP: 128/76 (102) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 2: Next EOI: 0h13m	3 Patient 3, Joe AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min CARESCAPE HR ECG: 70 bpm NBP: 119/61 (90) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 3: Next EOI: 1h20m
4 Patient 4, Rose AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min Altri dispositivi Pump 1: Next EOI: 0h55m	5 Patient 5, Ellen CARESCAPE Arterial Blood Pressure too high HR ECG: 73 bpm NBP: 104/78 (91) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 2: Next EOI: 2h01m	6 Patient 6, Bill AGW P1: Amiodaron 10 ng/mL/min P2: Noradrenaline 14 ng/mL/min P3: P4: Frusemide 12 ng/mL/min CARESCAPE HR ECG: 72 bpm NBP: 113/68 (90) mm Hg >>> Altri dispositivi Pump 3: Next EOI: 1h05m

SMART CENTRAL

 Legenda
 Valori

Fig 40

Allo stesso tempo è notificato un allarme sonoro. Le notifiche sonore sono di tre tipi distinti: una per ogni livello di allarme. In caso di allarmi concomitanti, sarà udibile il suono riferito all'allarme con priorità più alta.

L'occorrenza di allarmi/avvertimenti è notificata anche sulla barra comandi (Fig 41)



Fig 41

Questi pulsanti consentono lo scroll dei contenuti della schermata quando non è possibile visualizzare tutti i "letti" configurati sulla stessa schermata.

Quando almeno uno dei letti non visualizzati è in allarme, la freccia indicante la direzione in cui si trova il letto in allarme prende il colore corrispondente alla priorità dell'allarme (rosso=alta, giallo=media, azzurro=bassa).

In caso di allarmi contemporanei la freccia prende il colore dell'allarme con priorità più alta. Una icona può essere visualizzata fra le due frecce. Tale icona indica che c'è un allarme su una delle aree letto correntemente visualizzate.



Fig 42

Una ulteriore notifica visiva è posta sulla barra superiore di tutte le aree letto. Questa notifica tiene temporaneamente traccia dell'ultimo allarme che si è verificato su un letto dopo che questo è passato ad uno stato differente. Ciò permette di essere consapevoli degli allarmi che sono inviati e che rapidamente passano.

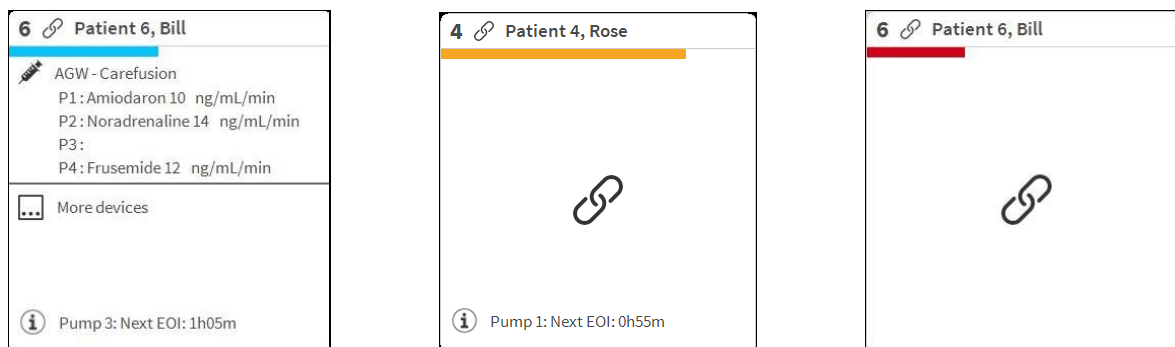


Fig 43

Quando lo stato di un area letto passa ad un livello inferiore di allarme (o a nessun allarme), il colore collegato allo stato precedente rimane sulla barra superiore per un certo periodo di tempo (configurabile).

Notifica di Allarmi su Control Bar

Gli allarmi sono notificati anche sulla Control Bar, in modo che siano sempre visibili in caso siano installati e correntemente selezionati altri moduli del Prodotto (Fig 44 **A**).



Fig 44

Il colore del pulsante dipende dal livello di priorità dell'allarme (rosso=alto, giallo=medio, azzurro=basso). Per allarmi di priorità media e alta, il pulsante lampeggia.

Se Smart Central non è configurato per mostrare sempre l'area notifiche sulla destra (si veda il paragrafo 1.7), è possibile

- Cliccare il pulsante per mostrare l'area notifiche.

La notifica sul pulsante scompare quando non sussistono più condizioni di allarme

1.9 Procedura di verifica del suono



La procedura di verifica del suono deve essere eseguita almeno una volta per turno.

All'avvio di Smart Central il Prodotto emette uno specifico suono. Ciò indica che la notifica Sonora di allarmi sta funzionando correttamente.

L'utente può comunque, in ogni momento, eseguire una procedura di verifica del sonoro. Per eseguire tale procedura è necessario

- Cliccare il pulsante **Menù** su Control Bar (Fig 45).



Fig 45

Si aprirà il menù seguente (Fig 46).



Fig 46

- Cliccare su **Configurazione dei Moduli** (Fig 46 A).

Si aprirà il menù seguente (Fig 47).

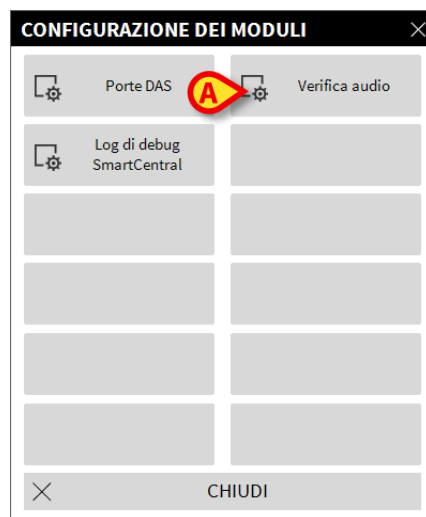


Fig 47

- Cliccare su **Prova dell'audio** (Fig 47 A).

Si aprirà la seguente finestra, che richiede se è possibile o no udire un suono proveniente dagli altoparlanti (Fig 48).

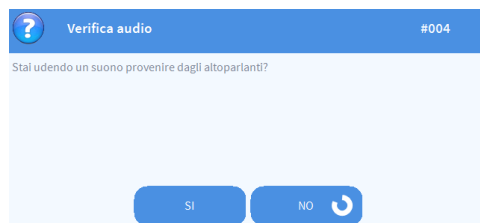


Fig 48

Se si sente il suono, allora cliccare su **Sì**. La finestra scompare. Niente altro accade. Ciò significa che Smart Central sta funzionando correttamente.

Se non si sente alcun suono, allora cliccare su **No**. La finestra scompare. Una notifica viene visualizzata su Control Bar e nell'area laterale di notifica. Ciò significa che si è verificata una anomalia nella procedura di verifica delle notifiche sonore (Fig 49 e Fig 50).



Fig 49

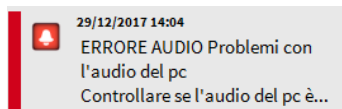


Fig 50

Tale notifica rimane durante il lavoro su Smart Central. Scompare solo quando è eseguita un'altra procedura di verifica del suono con esito positivo.

La notifica può essere cliccata per mostrare una spiegazione più dettagliata dell'errore che si è verificato, delle sue cause e delle possibili soluzioni.



Se la procedura di verifica del suono ha esito negativo, interrompere immediatamente l'utilizzo di Smart Central e contattare al più presto l'assistenza tecnica.

1.10 Silenziamento delle notifiche in Smart Central Mobile

Nell'applicazione Smart Central Mobile possono essere silenziate le notifiche per uno specifico periodo di tempo e per uno specifico letto. La funzionalità "Silenziamento" riguarda solo l'applicazione Smart Central Mobile: Smart Central Desktop continua infatti a fornire notifiche audio e non può essere silenziata.

Per attivare tale possibilità è necessario impostare opportunamente il parametro globale "ManageMobilityAlarms" mediante il Configuratore della Digistat Suite. Si veda a tal proposito il documento *CFG ENG Digistat Suite*.



La procedura di silenziamento può essere effettuata sia nelle postazioni di lavoro desktop che mobili, tuttavia essa ha effetto solo sui dispositivi mobili.

1.10.1 Su postazioni di lavoro desktop

Se il parametro "ManageMobilityAlarms" è impostato ad "abilitato" viene mostrata una nuova icona nella parte alta di ciascun riquadro letto (Fig 51 A):

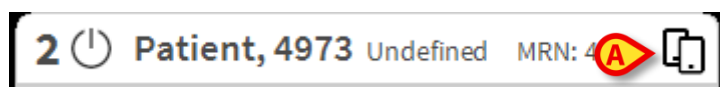


Fig 51

La presenza dell'icona segnala che le notifiche sono abilitate in Smart Central Mobile per quello specifico letto (il numero del letto è riportato nella parte sinistra).

- Cliccare l'icona per aprire una nuova schermata mediante cui è possibile selezionare una tra le seguenti possibili opzioni:
 - abilita le notifiche,
 - disabilita le notifiche per X,Y,Z minuti.

I valori dei parametri X,Y,Z sono specificati in configurazione nel parametro globale "SilenceMobilityAlarmsIntervals" mediante il Digistat Suite. Si veda il documento *CFG ENG Digistat Suite*.

- Cliccare **SALVA** o **CANCELLA** per chiudere la schermata.

Se le notifiche sono disabilitate, l'icona sul riquadro del letto diventa rossa ed un conto alla rovescia numerico (in minuti) viene mostrato accanto ad essa (Fig 52 A).

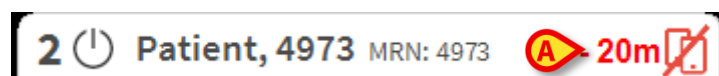


Fig 52

Quando il conto alla rovescia termina, l'icona torna di nuovo nera, il conto alla rovescia stessa viene rimosso e la riproduzione delle notifiche viene ripristinata. Nell'immagine sopra

riportata, ad esempio, le notifiche di Smart Central Mobile dal letto 2 sono disabilitate per 20 minuti.

- Cliccare l'icona rossa per riattivare l'audio o per riavviare il conto alla rovescia del silenziamento delle notifiche.

Quando le notifiche per un determinato letto sono disabilitate sui dispositivi mobile:

- Su Smart Central Desktop non si notano differenze nella comunicazione delle notifiche;
- Su Smart Central Mobile le notifiche collegate al letto silenziato sono ugualmente mostrate, ma l'audio e la vibrazione sono disabilitate per uno specifico periodo di tempo.

1.10.2 Su postazioni di lavoro mobili

Per abilitare/disabilitare le notifiche su postazioni di lavoro mobili (su smartphone, ad esempio):

- Toccare un riquadro-letto per navigare fino alla schermata dei dettagli del letto.

Se il parametro “ManageMobilityAlarms” è impostato ad “abilitato”, nella parte alta di questa schermata è mostrata una nuova icona accanto ai dati del paziente (Fig 53 **A**):

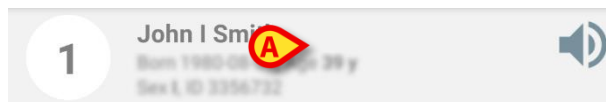


Fig 53

- Cliccare l'icona per aprire una nuova schermata mediante cui è possibile selezionare una tra le seguenti possibili opzioni:
 - abilita le notifiche,
 - disabilita le notifiche per X,Y,Z minuti.

I valori dei parametri X,Y,Z sono specificati in configurazione nel parametro globale “SilenceMobilityAlarmsIntervals” mediante il Configuratore della Digistat Suite. Si veda il documento *CFG ENG Digistat Suite*.

- Cliccare **SALVA** o **CANCELLA** per chiudere la schermata.

Se le notifiche sono disabilitate, allora viene mostrata la seguente icona (Fig 54). Sotto l'icona viene mostrato un conto alla rovescia che riporta il numero di minuti rimanenti del “periodo di silenziamento”:

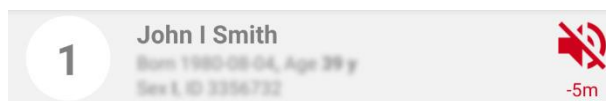


Fig 54

In Fig 54, ad esempio, le notifiche dal letto 1 sono silenziate per 5 minuti. Quando il conto alla rovescia termina, viene di nuovo mostrata l'icona originaria (Fig 53 **A**) e le notifiche audio tornano ad essere riprodotte.

Se le notifiche per uno specifico letto sono disabilitate, anche i corrispondenti riquadri / tile mostrano l'icona del silenziamento (Fig 55 **a** mostra l'icona quando tutti i pazienti del dominio sono assegnati all'utente corrente; Fig 55 **b** mostra l'icona quando non tutti i pazienti del dominio sono assegnati all'utente corrente):



Fig 55 a/b



La possibilità di silenziare le notifiche sui dispositivi mobili è disabilitata di default. Se si richiede che tale possibilità sia abilitata, è necessario che l'organizzazione sanitaria adotti una robusta procedura di *risk assessment* per mitigare tutti i possibili rischi. Se il silenziamento delle notifiche è temporaneo, si richiede che una workstation con Smart Central Desktop sia monitorata da un utente.

Integrazione con Unite

Se il Prodotto è integrato con Unite e le notifiche sono generate dall'applicazione Axess (o una applicazione equivalente sui dispositivi Myco2), il silenziamento delle notifiche in Smart Central ha effetto anche sulle notifiche generate da Unite.

1.10.3 Presenza infermiere

Quando il Sistema è configurato per funzionare con la gestione automatica, che usa gli infrarossi, il meccanismo di silenziamento è gestito in automatico.

Quando l'infermiere/a entra nella stanza del paziente, le notifiche sono automaticamente silenziate sui dispositivi portatili (stesso comportamento del silenziamento manuale) per quel letto specifico. Quando l'infermiere/a esce dalla stanza, le notifiche sono abilitate di nuovo. Se nella stanza sono presenti più infermieri, le notifiche sono silenziate (sui dispositivi portatili) finché almeno un infermiere rimane nella stanza.

Il meccanismo "presenza infermiere" utilizza la funzionalità infrarosso (presente sui dispositivi Myco 2 e Myco 3). L'utente deve mantenersi in una posizione nella quale il faro che emette gli infrarossi sia sempre visibile dallo smartphone. L'utente deve evitare di porre lo smartphone dentro una borsa o una tasca chiusa.

Se lo smartphone è rilevato all'interno di una stanza e, dopo un certo periodo di tempo configurato non è più rilevato, la funzione di silenziamento si disabilita automaticamente. Questa mitigazione riduce il rischio che l'infermiere lasci la stanza dimenticando lo smartphone all'interno.

Quando un infermiere è all'interno della stanza, sulla corrispondente area-letto è visualizzata un'icona "infermiere" accanto all'icona di silenziamento.

1.11 Smart Central Video

Il modulo Smart Central può essere configurato in modo da supportare lo streaming video di una o più webcam. Ciò permette il monitoraggio visivo dell'area paziente.

Se la funzionalità Smart Central Video è abilitata e configurata appropriatamente, la schermata principale di Smart Central appare come quella riportata sotto (Fig 56).


1 Occupied bed Space Rack - B Braun P1: 22 mcg/h, 0.44 mL/h, 50 mcg/mL, 00:03:03 remaining P2: Dobutamine 31 mL/h, 00:10:50 remaining ↳ CareScope B450 - GE HR ECG: 63 bpm Art: 129/75 (90) mm Hg NIBP: 127/79 (94) mm Hg SPO2 Art: 86% 	2 Occupied bed Space Rack - B Braun P1: Gabapentin mesylate 26 mmol/h, 2.6 mL/h, 10 mmol/mL, 00:10:07 remaining P2: 2 mg/h, 1.33 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:14:06 remaining P3: 18 mmol/h, 1.8 mL/h, 10 mmol/mL, 00:04:53 remaining P4: Dilazem 21 mg/h, 14 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:01:25 remaining P5: Remifentanyl 5 mL/h, 00:03:45 remaining ↳ CareScope B450 - GE HR ECG: 68 bpm Art: 119/83 (95) mm Hg NIBP: 123/79 (94) mm Hg SPO2 Art: 94%	3 Occupied bed Space Rack - B Braun P1: 47 mcg/h, 0.94 mL/h, 50 mcg/mL, 00:01:12 remaining P2: Dobutamine 43 mcg/h, 0.86 mL/h, 50 mcg/mL, 00:00:23 remaining ↳ CareScope B450 - GE HR ECG: 68 bpm Art: 125/74 (91) mm Hg NIBP: 126/85 (99) mm Hg SPO2 Art: 90%
4 Occupied bed Space Rack - B Braun P1: Gabapentin mesylate 2 mmol/h, 0.2 mL/h, 10 mmol/mL, 00:09:09 remaining P2: 18 mmol/h, 1.8 mL/h, 10 mmol/mL, 00:04:08 remaining P3: 10 mcg/h, 0.2 mL/h, 50 mcg/mL, 00:01:24 remaining P4: Dilazem 49 mL/h, 00:06:37 remaining P5: Remifentanyl 40 mcg/h, 0.86 mL/h, 50 mcg/mL, 00:00:52 remaining ↳ CareScope B450 - GE HR ECG: 65 bpm Art: 117/77 (90) mm Hg NIBP: 127/85 (102) mm Hg SPO2 Art: 92%	5 Occupied bed Space Rack - B Braun P1: 8 mcg/h, 0.16 mL/h, 50 mcg/mL, 00:17:34 remaining P2: 6 mL/h, 00:12:54 remaining P3: Remifentanyl 44 mmol/h, 4.4 mL/h, 10 mmol/mL, 00:17:05 remaining ↳ CareScope B450 - GE HR ECG: 66 bpm Art: 124/82 (99) mm Hg NIBP: 126/85 (99) mm Hg SPO2 Art: 92%	6 Occupied bed Space Rack - B Braun P1: 10 mcg/h, 0.2 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:05:38 remaining P2: 11 mL/h, 00:03:07 remaining P3: 19 mg/h, 12.67 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:13:01 remaining P4: Dobutamine 8 mg/h, 6 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:00:27 remaining P5: 37 mcg/h, 0.74 mL/h, 50 mcg/mL, 00:07:59 remaining P6: Dilazem 26 mcg/h, 0.52 mL/h, 50 mcg/mL, 00:03:37 remaining ↳ CareScope B450 - GE HR ECG: 64 bpm Art: 117/75 (89) mm Hg NIBP: 126/83 (98) mm Hg SPO2 Art: 99% 

SMART CENTRAL
Legenda
Valori
Camera

Fig 56

Una immagine ridotta (thumbnail) che mostra lo streaming dalla webcam è visualizzata all'interno dell'area-letto. La dimensione dell'icona è configurabile (Fig 56 A).

Sulla barra comandi è presente un pulsante aggiuntivo (Fig 56 B).

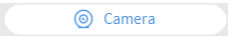- Toccare il pulsante  per mostrare o nascondere l'immagine proveniente dalla webcam (Fig 57).

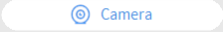
1 Patient 1, Care Space Rack - Bbraun P1: 19 mg/h, 12.67 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:12:36 remaining P2: Dobutamine 31 mL/h, 00:07:05 remaining Carescape B450 - GE HR ECG: 60 bpm Art: 123/81 (95) mm Hg NIBP: 121/77 (92) mm Hg SPO2 Art: 94% Pump 2: Next EOI: 00h07m	2 Patient 2, Jim Space Rack - Bbraun END OF INFUSION P1: Gabexate mesylate 26 mmol/h, 2.6 mL/h, 10 mmol/mL, 00:06:13 remaining P2: 2 mg/h, 1.33 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:10:11 remaining P3: 19 mmol/h, 1.9 mL/h, 10 mmol/mL, 00:00:08 remaining P4: Dilazem 43 mcg/h, 0.46 mL/h, 50 mcg/mL, 00:00:45 remaining P5: Remifentanyl 0 mL/h, 00:00:00 remaining Carescape B450 - GE HR ECG: 66 bpm Art: 137/73 (94) mm Hg NIBP: 145/77 (90) mm Hg SPO2 Art: 98% Pump 2: Next EOI: 00h08m	3 Patient 3, Joe Space Rack - Bbraun P1: 27 mL/h, 00:04:45 remaining P2: Dobutamine 36 mcg/h, 0.72 mL/h, 50 mcg/mL, 00:08:53 remaining Carescape B450 - GE HR ECG: 60 bpm Art: 134/75 (96) mm Hg NIBP: 121/83 (96) mm Hg SPO2 Art: 82% Pump 1: Next EOI: 00h04m
4 Patient 4, Rose Space Rack - Bbraun NEAR END OF INFUSION P1: Gabexate mesylate 2 mmol/h, 0.2 mL/h, 10 mmol/mL, 00:05:15 remaining P2: 19 mmol/h, 1.9 mL/h, 10 mmol/mL, 00:00:14 remaining P3: 44 mL/h, 00:12:35 remaining P4: Dilazem 49 mL/h, 00:02:42 remaining P5: Remifentanyl 29 mmol/h, 2.9 mL/h, 10 mmol/mL, 00:06:12 remaining Carescape B450 - GE HR ECG: 70 bpm Art: 137/81 (100) mm Hg NIBP: 117/63 (94) mm Hg SPO2 Art: 94% Pump 2: Next EOI: 00h00m	5 Patient 5, Ellen Space Rack - Bbraun P1: 8 mcg/h, 0.36 mL/h, 50 mcg/mL, 00:13:40 remaining P2: 6 mL/h, 00:08:09 remaining P3: Bonifentanyl 44 mmol/h, 4.4 mL/h, 10 mmol/mL, 00:13:11 remaining Carescape B450 - GE HR ECG: 69 bpm Art: 128/83 (96) mm Hg NIBP: 131/79 (96) mm Hg SPO2 Art: 92% Pump 2: Next EOI: 00h08m	6 Patient 6, Bill Space Rack - Bbraun P1: 10 mg/h, 6.67 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:01:44 remaining P2: 47 mL/h, 00:04:02 remaining P3: 19 mg/h, 12.67 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:09:07 remaining P4: Dobutamine 3 mg/h, 6 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:04:33 remaining P5: 37 mcg/h, 0.74 mL/h, 50 mcg/mL, 00:04:04 remaining P6: Dilazem 35 mg/h, 23.33 mL/h, 1.5 mg/mL, 00:00:00 remaining Carescape B450 - GE HR ECG: 65 bpm Art: 117/81 (93) mm Hg NIBP: 117/77 (90) mm Hg SPO2 Art: 90% Pump 1: Next EOI: 00h01m

Fig 57

- Toccare l'area letto di riferimento (Fig 56 A) per espandere l'area-video (Fig 58).

Fig 58

Il cruscotto (Dashboard) del paziente mostra un'etichetta aggiuntiva, nominata **Camera**, che corrisponde alla vista allargata.

- L'etichetta **Camera** è selezionata per prima se il pulsante  viene selezionato sulla schermata principale di Smart Central. Se non è già selezionata, è necessario:

- Toccare l'etichetta **Camera** sul cruscotto (dashboard) per selezionare la vista corrispondente.

La modalità "Privacy" permette di spegnere la webcam di un determinato paziente. Questo può essere fatto permanentemente o per un certo periodo di tempo. Quando è in modalità "Privacy", il video non è mostrato. Da impostazioni iniziali, la modalità "Privacy" è disabilitata.

La modalità "Privacy" è indicata dall'icona  sulla schermata Smart Central e all'interno dell'area-letto.

Il pulsante corrispondente alla modalità "Privacy" è rappresentato qui sotto.

Privacy: ☐ Off ☒ on 5 mins 15 mins 30 mins

- Toccare il pulsante **On** per attivare la modalità "Privacy".

Il pulsante selezionato appare evidenziato.

Privacy: Off ☒ on 5 mins 15 mins 30 mins

La Fig 59 mostra l'area letto in modalità "Privacy":

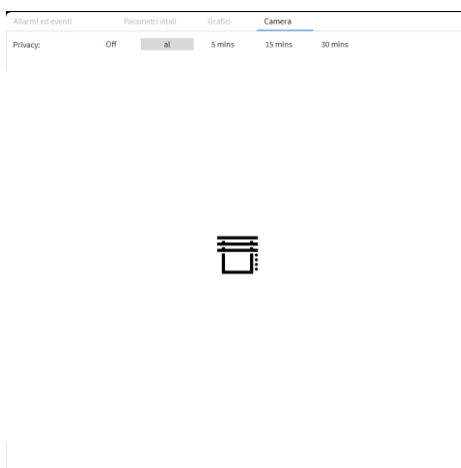


Fig 59

La Bed Card sulla schermata Smart Central in Modalità "Privacy" appare come mostrato in Fig 60:



Fig 60

- Toccare il pulsante **Off** per disabilitare la modalità “Privacy”.

Per attivare la modalità “Privacy” per un determinato periodo di tempo:

- Toccare i pulsanti **5 min**, **15 min** o **30 min** per attivare la modalità “Privacy” per 5, 15 o 30 minuti.

L'intervallo selezionato appare evidenziato sulla barra dei pulsanti.

Privacy: Off on 5 mins **15 mins** 30 mins

Alla fine del periodo selezionato la modalità “Privacy” si disattiva automaticamente.

1.12 Waveforms

Smart Central può visualizzare in tempo quasi reale forme d'onda acquisite dai dispositivi collegati. Per abilitare questa funzionalità è necessario abilitare almeno un parametro “waveform” nella configurazione del driver. Per accedere alla funzionalità

- Cliccare l'area letto specifica.
- Cliccare la tab “Waveforms” (Fig 61 A).

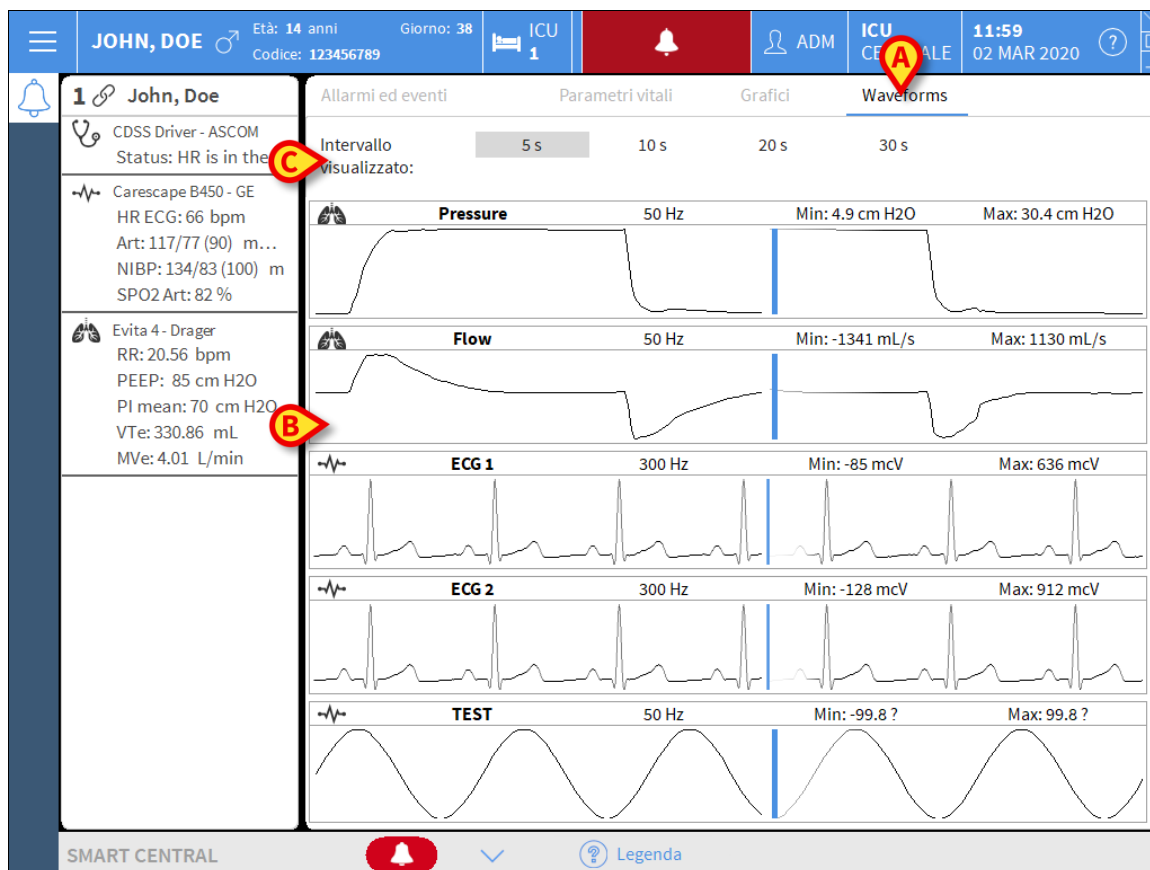


Fig 61

È visualizzata la schermata “Waveforms” (Fig 61 B).

Questa schermata contiene tutte le forme d'onda configurate, aggiornate in tempo quasi reale. Per ognuna di esse, sulla parte sinistra, sono visualizzati i valori seguenti:

- Nome della forma d'onda.
- Dispositivo di origine: il dispositivo che sta producendo quel grafico (ad esempio “Monitor paziente”).
- Valori massimo e minimo: i valori massimo e minimo calcolati dal momento in cui la forma d'onda è visualizzata al momento corrente.
- Unità di misura: unità di misura utilizzata nella visualizzazione della forma d'onda.

I pulsanti indicati in Fig 61 C permettono di cambiare l'intervallo di tempo visualizzato (ad esempio 5 secondi).

1.13 Ricerca, selezione e ammissione dei pazienti

Anche se Smart Central è comunemente usato solo come monitor all'interno del reparto per facilitare la gestione delle notifiche di allarme è possibile, in certe situazioni e per utenti aventi permessi specifici, utilizzare degli strumenti di ricerca, ammissione e selezione del paziente. Tali strumenti sono parte del modulo Patient Explorer. Si veda il manuale utente di Patient Explorer per le istruzioni d'uso (*USR ITA Patient Explorer*).



Altri moduli possono essere configurati per la selezione del paziente al posto di Patient Explorer, in tale caso si faccia riferimento alla documentazione specifica per le istruzioni d'uso.

1.14 Configurazione a posto letto

Smart Central può essere configurato per essere dedicato a un letto singolo. In questo caso la schermata mostra i dati del letto collegato in modalità a schermo intero. In Fig 62 la postazione è dedicata al letto 3.



Fig 62

L'area letto è uguale a quella descritta in precedenza. Sulla barra comandi sono presenti tre pulsanti.

Il pulsante **Legenda** permette di visualizzare la finestra che elenca le diverse icone e il loro significato (descritta nel paragrafo 1.4.1).

Il pulsante **Valori** permette di visualizzare i valori provenienti dai dispositivi collegati anche se non c'è alcun allarme in corso (si veda il paragrafo 1.3.1).

Il pulsante **MyPatients** permette di selezionare altri letti da visualizzare sulla schermata (si veda il paragrafo successivo).

1.14.1 My Patients

La funzionalità “My patients” permette di visualizzare fino a 4 aree letto aggiuntive su una postazione di lavoro dedicata al posto letto (massimo 5, in totale, a seconda della configurazione scelta).

Per usare questa funzionalità:

- Cliccare il pulsante **MyPatients** sulla barra comandi.

Si aprirà la finestra seguente (Fig 63).

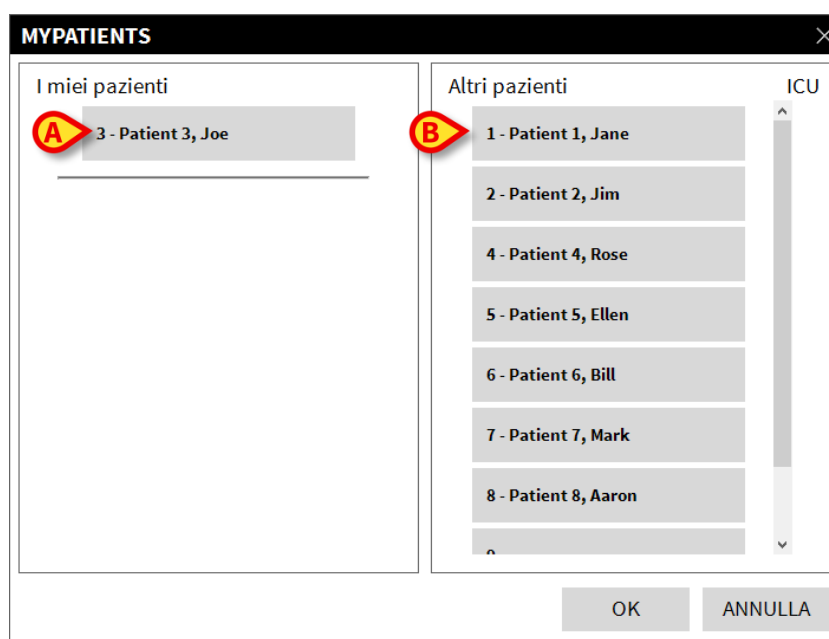


Fig 63

Sulla sinistra, nella colonna “I Miei Pazienti”, è presente la lista delle aree letto correntemente visualizzate (Fig 63 **A**). Ogni riquadro rappresenta un’area letto. Il riquadro posto in alto indica il paziente/letto al quale è associata la postazione.

Sulla destra, nella Colonna “Altri Pazienti”, sono elencate tutte le aree letto esistenti (Fig 63 **B**). Per selezionare un’area letto e fare sì che sia visualizzata è necessario,

- Cliccare, all’interno della Colonna “Altri Pazienti”, il riquadro corrispondente.

Il riquadro scomparirà dalla Colonna sulla destra (Altri pazienti) e sarà visualizzato nella Colonna a sinistra (I Miei Pazienti). Può essere selezionato un massimo di 4 aree letto aggiuntive (configurabile).

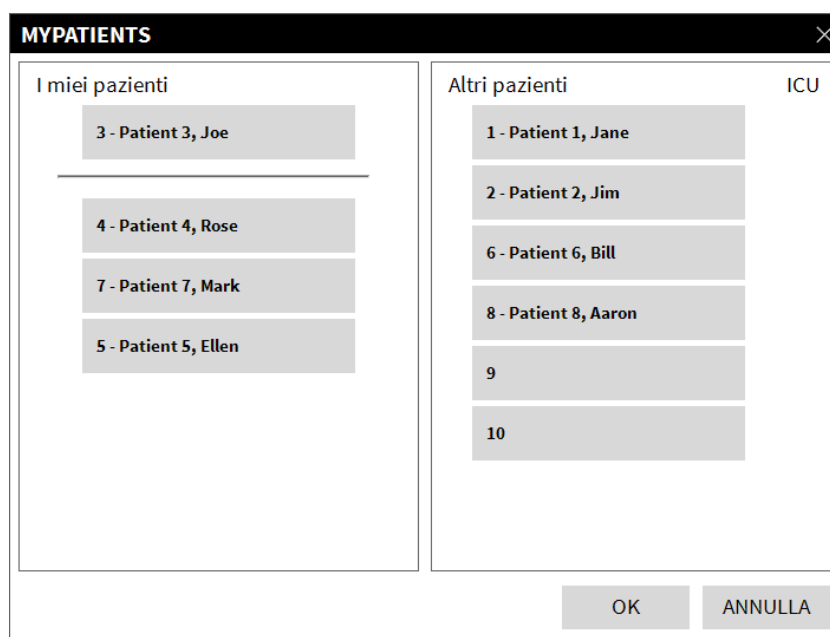


Fig 64

In Fig 64 sono selezionate le aree letto 4, 7, 5.

- Cliccare poi il pulsante **Ok**.

La schermata Smart Central apparirà come mostrato in Fig 65.

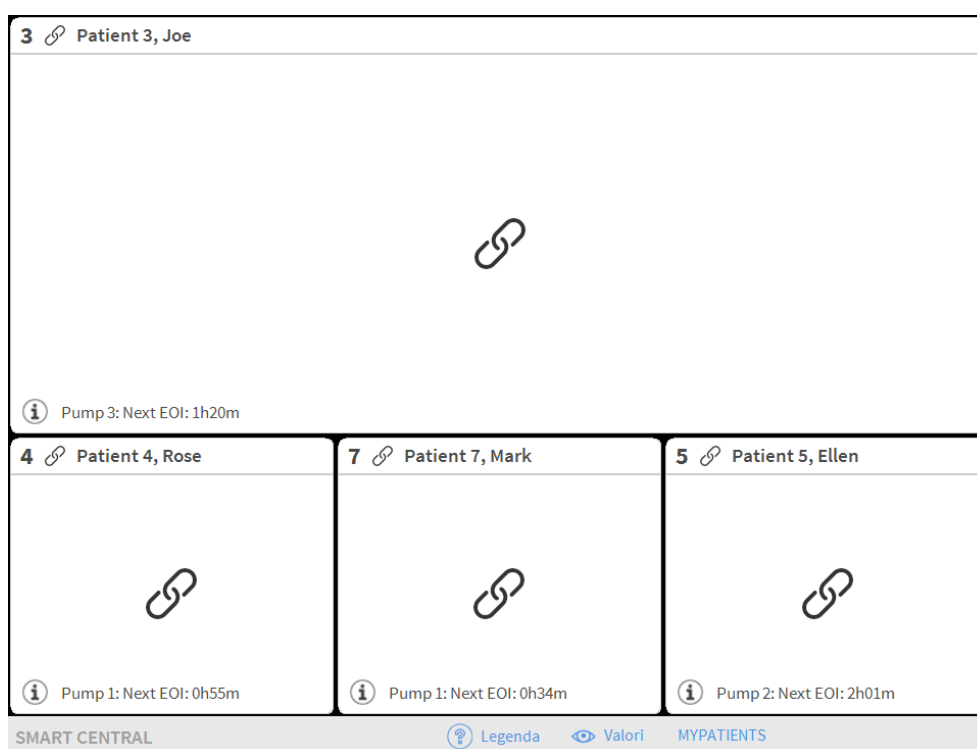


Fig 65

L'area letto cui è dedicata la postazione è la n. 3 (grande, in alto). Le aree letto 4, 7, 5 sono visualizzate sotto, più in piccolo. Le aree letto aggiuntive possono essere ingrandite.

- Per ingrandire una delle aree letto aggiuntive è sufficiente cliccare su di essa. Cliccare di nuovo su di essa per riportarla alle proporzioni originali.

Per non visualizzare più una o tutte le aree letto aggiuntive è necessario:

- Cliccare di nuovo il pulsante **MyPatients** sulla barra comandi.

Si aprirà la finestra “My Patients” (Fig 64). Per rimuovere l’area letto e non visualizzarla più:

- Cliccare, all’interno della Colonna “I Miei pazienti” sulla sinistra, il riquadro corrispondente all’area letto da deselezionare.

Il riquadro scomparirà dalla colonna “I Miei pazienti” a sinistra e sarà visualizzato all’interno della colonna “Altri Pazienti” (a destra). Le aree letto così deselezionate non saranno più visualizzate.

1.15 Appendice – Esempi di procedure

1.15.1 Visualizzare gli eventi di un paziente

1 – Cliccare l'area letto del paziente per visualizzarne gli eventi.

The screenshot shows the SMART CENTRAL interface for patient John Doe. On the left, patient information and vital signs are listed. On the right, the 'Alarms and events' tab is active, displaying a list of events. A red circle with the letter 'A' points to the 'Alarms and events' tab.

Time	Device	Description
14:13	NIBP	NIBP Sensor Fault
14:13	HR	HR High
14:13	HR	HR High
14:13	HR	HR High
14:13	HR	HR High
14:13	HR	HR High
14:11	HR	HR High
14:11	HR	HR High
14:11	HR	HR High
14:11	HR	HR High
14:06	EtCO2	EtCO2 Low
14:06	EtCO2	EtCO2 Low
14:02	SpO2	SpO2 Low
14:02	SpO2	SpO2 Low

Gli eventi sono visualizzati sulla destra (A).

1.15.2 Inserimento di un evento da parte dell'utente

1 – Cliccare il pulsante **Nuovo** (A)

The screenshot shows the SMART CENTRAL interface for patient John Doe. On the right, the 'Alarms and events' tab is active, displaying a list of events. A red circle with the letter 'A' points to the 'New' button at the bottom.

Time	Device	Description
09:23	Patients	Patients temporary disconnected
09:22	Amiodarone	Amiodarone 50 mg/mL
08:22	Anormal Values	Anormal Values
07:33	Patient reporting difficulties breathing	Patient reporting difficulties breathing
05:26	Changed patient monitor settings	Changed patient monitor settings

Si aprirà la finestra seguente.

CREATE A NEW NOTE

Time: 08/10/2019 09:28:23 Set event time to NOW

Event Type: [Info] [Warning] [Priority]

Note description:

[Text Area]

[Save] [Close and do not save]

2 – Scrivere la nota nel campo “Descrizione”(A).

3 – Cliccare su **Salva** (B).

1.15.3 Modificare gli eventi inseriti dall'utente

Per modificare uno degli eventi inseriti è necessario, sulla lista di eventi:

1 – Cliccare la riga corrispondente all'evento.

2 – Cliccare **Modifica** sulla barra comandi.

Sarà visualizzata la finestra mostrata sopra.

3 – Modificare l'evento (Data/ora, priorità, descrizione).

4 – Cliccare su **Salva**.

1.15.4 Cancellare gli eventi inseriti dall'utente

Per cancellare uno degli eventi inseriti è necessario, sulla lista di eventi:

1 – Cliccare la riga corrispondente all'evento.

2 – Cliccare su **Cancella** sulla barra comandi. Sarà richiesta conferma.

3 – Cliccare su **Sì** per cancellare l'evento.

La riga corrispondente scomparirà dalla lista.


1.15.5 Statistiche degli allarmi

Per stampare un resoconto delle statistiche degli allarmi:


1 – Cliccare il pulsante **Menù** su “Control Bar” (A).




Si aprirà il menu seguente:

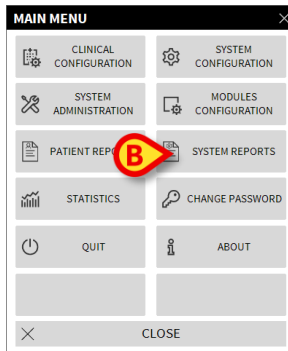

2 – Cliccare su **Documenti di sistema** (B). Si aprirà un altro menù.

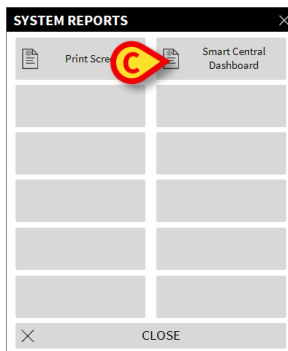

3 – Cliccare su **Pannello Smart Central** (C). Si aprirà la finestra seguente.

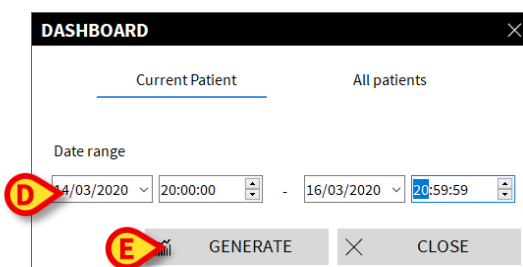

Selezionare l'intervallo temporale di riferimento per il paziente corrente o per tutti i pazienti (D).


4 – Cliccare su **Genera** (E). Sarà visualizzata un'anteprima di stampa.

1.15.6 Procedura di verifica del suono

Per eseguire la procedura di verifica del suono:



- 1 – Cliccare il pulsante **Menù** su “Control Bar” (**A**). Si aprirà il menù principale.
- 2 – Cliccare su **Configurazione dei Moduli**. Si aprirà un altro menù.

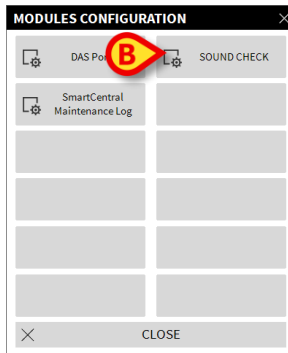

- 3 – Cliccare su **Verifica Suono (B)**.

Si aprirà una finestra che chiede se l'utente può sentire un suono oppure no.

Se l'utente sente un suono, cliccare su **Sì**. La finestra scompare e non succede nient'altro (ciò significa che il funzionamento è corretto).

Se non si sente alcun suono, allora cliccare su **No**. La finestra scompare ed è visualizzata una notifica su “Control Bar”. Ciò significa che si è verificato un errore durante la procedura di verifica. La notifica scompare solamente quando viene effettuata un'altra procedura di verifica del suono e questa ha esito positivo.



Se la procedura di verifica ha esito negativo, si deve interrompere l'utilizzo di Smart Central e contattare l'assistenza tecnica al più presto possibile.

1.15.7 Modalità “Privacy” su Smart Central video

Se per un paziente è attivata la funzionalità Smart Central video, la funzionalità “Privacy” permette all'utente di spegnere la webcam in modo permanente o per un certo intervallo di tempo. Se è attivata la modalità “Privacy” non è visualizzato il video. Di default tale modalità è disattivata. La modalità “Privacy” è indicata dall'icona . Per attivare permanentemente tale modalità:

- 1 – Cliccare l'area letto di riferimento per visualizzare la schermata di dettaglio del paziente.
- 2 – Selezionare **Acceso** sulla barra superiore (**A**).

Privacy blind: Off  on 5 mins 15 mins 30 mins

Per attivare la modalità “Privacy” per un periodo di tempo predefinito:

- 2 – Selezionare il periodo di riferimento sulla barra superiore (5, 15 o 30 minuti).

1.15.8 Visualizzare i grafici dei parametri acquisiti (“Waveforms”)

Per visualizzare la schermata “Waveforms”, contenente la rappresentazione grafica dell’andamento di alcuni dei parametri acquisiti:

- 1 – Cliccare l’area letto di riferimento per visualizzare la schermata di dettaglio del paziente.
- 2 – Cliccare su **Waveforms** sulla barra superiore.