



# **Control Bar**

# **Gebruikshandleiding**

**Versie 6.0**

**2021-06-16**

# Inhoud

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Control Bar.....</b>                                                     | <b>3</b> |
| 1.1 Overzicht van de Digistat-suite.....                                       | 3        |
| 1.2 Touchscreen.....                                                           | 4        |
| 1.3 Het opstarten van het Product.....                                         | 4        |
| 1.4 Werkgebied.....                                                            | 5        |
| 1.4.1 De module selecteren .....                                               | 5        |
| 1.5 Toegang tot het systeem .....                                              | 6        |
| 1.5.1 Het uitschakelen van automatisch uitloggen ("Gebruiker blokkeren") ..... | 7        |
| 1.5.2 "Recente" gebruikers .....                                               | 8        |
| 1.5.3 De lijst van gebruikers raadplegen .....                                 | 9        |
| 1.6 "Control Bar" .....                                                        | 10       |
| 1.6.1 Vlaggetje voor testomgeving .....                                        | 11       |
| 1.6.2 Aflezing van de toets "PATIËNT" .....                                    | 11       |
| 1.6.3 Multimonitor-functionaliteit.....                                        | 12       |
| 1.7 Help .....                                                                 | 15       |
| 1.8 Browser .....                                                              | 15       |
| 1.9 Hoofdmenu .....                                                            | 16       |
| 1.9.1 Documenten van de patiënt.....                                           | 17       |
| 1.9.2 Statistics.....                                                          | 24       |
| 1.9.3 Wachtwoord wijzigen.....                                                 | 24       |
| 1.9.4 Informatie .....                                                         | 25       |
| 1.9.5 Afsluiten.....                                                           | 25       |

# 1. Control Bar



---

*Zie de specifieke documenten van het Product voor algemene en gedetailleerde informatie over de productomgeving. De kennis en het begrijpen van deze documenten is verplicht voor een correct en veilig gebruik van de applicatie Control Bar, zoals beschreven in dit document.*

---

## 1.1 Overzicht van de Digistat-suite

De Digistat Suite is een modulaire PDMS bedoeld om oplossingen aan te bieden voor de behoeften met betrekking tot patiëntgegevensbeheer. De verschillende oplossingen worden aangeboden die de nodige modules mogelijk maken die deel uitmaken van de twee producten van de suite, die zijn:

- Digistat Docs (niet-medisch hulpmiddel);
- Digistat Care (medisch hulpmiddel klasse IIb).

Digistat Docs is een software die patiëntinformatie en patiëntgerelateerde gegevens registreert, overbrengt, opslaat, organiseert en weergeeft om zorgverleners te ondersteunen bij het opzetten van een elektronisch patiëntendossier.

Digistat Docs is geen medisch hulpmiddel.

Digistat Care is software die patiëntinformatie en patiëntgerelateerde gegevens, waaronder gegevens en gebeurtenissen van medische apparaten en systemen, beheert en informatie verstrekt ter ondersteuning van behandeling, diagnoses, preventie, monitoring, voorspelling, prognose en bestrijding van ziekten.

Digistat Care (medisch hulpmiddel klasse IIb).

Beide producten zijn modulair, daarom kan de specifieke zorgorganisatie kiezen of alle beschikbare modules of alleen een subset wordt ingeschakeld, afhankelijk van hun behoeften en doelen.

Een Digistat Suite-oplossing bestaat meestal uit modules die bij beide producten horen (Digistat Care en Digistat Docs). Control Bar onderdeel van Digistat Care, is een bijzondere module die een werkomgeving biedt voor andere modules en is vereist voor alle oplossingen van Digistat Suite.

## 1.2 Touchscreen

De Digistat Suite (het Product hierna) kan zowel op "touch" of "non touch" werkstations, of op een combinatie hiervan, worden geïnstalleerd. De procedures kunnen zowel met gebruik van de vingers als van een muis worden verricht. In deze handleiding wordt een standaardterminologie gebruikt die naar de "muis" verwijst (zo wordt bijvoorbeeld de term "klik" in plaats van "tik" gebruikt). Hieronder geven wij een vertaaltabel weer waarmee deze handleiding op ieder type werkstation en volgens ieder type gebruikersvoorkeur kan worden gebruikt.

Indien er bij een scherm of procedure specifieke en speciale bewegingen ("gestures") kunnen worden toegepast, worden deze in de context uitgelegd.

Over het algemeen worden de meest gebruikelijke handelingen zo vertaald:

| Muis                             | Aanraakscherm         |
|----------------------------------|-----------------------|
| Klik                             | Tik                   |
| Dubbelklik                       | Dubbeltik             |
| Slepen                           | Sleep met de vingers  |
| Gebruik de schuifbalk (Schuiven) | Schuif met de vingers |
| Klik om te vergroten (inzoomen)  | Tik met twee vingers  |

## 1.3 Het opstarten van het Product

Om het Product op te starten

- Dubbelklik op het icoon op het bureaublad (Fig 1).



Fig 1

Een splash-scherm wordt weergegeven terwijl het product wordt geladen.

## 1.4 Werkgebied

Het Werkgebied wordt vastgesteld en begrensd door de “Control Bar”, een tool die alle Product installaties gemeen hebben (Fig 2).

“Control Bar” bestaat uit een horizontale werkbalk (Fig 2 **A**), een verticale selectiebalk links (“Zijbalk” - Fig 2 **B**) en een centraal werkgebied. De verschillende schermen van de geïnstalleerde modules worden weergegeven binnen het werkgebied (Fig 2 **C**).



Fig 2

De werkbalk (Fig 2 **A**) zal worden beschreven in paragraaf 1.4.1 (en volgende).

De zijbalk geeft de iconen weer van de momenteel beschikbare modules. Zie bijvoorbeeld Fig 3.



Fig 3

De momenteel geselecteerde module is gemarkeerd (geel).

### 1.4.1 De module selecteren

Voor het selecteren en inschakelen van een module

- Klik op de bijbehorende icoon in de zijbalk.

Het icoon is nu gemarkeerd. De functies van de module worden in het gegevensgebied weergegeven. De module kan pas worden geselecteerd na in het systeem te zijn ingelogd (zie de volgende paragraaf).

## 1.5 Toegang tot het systeem

Om in het Product in te loggen, moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord worden ingevoerd (zie de "Inlogprocedure").

Daarom moet de gebruiker aan het begin van iedere werksessie op de toets **GEBRUIKER** (Fig 4 **A**) klikken.

Het volgende scherm wordt geopend.

The screenshot shows a login interface with a blue header bar. The header contains a menu icon, 'DIGISTAT', a patient selection dropdown 'Kies patiënt...', a user icon with a question mark, 'ICU CENTRAAL', and a clock showing '11:36 07 MAR 2018'. Below the header, there are two input fields: 'GEBRUIKERSNAAM' and 'WACHTWOORD'. Below these fields is a large keyboard layout with various keys including letters, numbers, and function keys like 'Blokken', '+', '-', '=', and 'Del'. At the bottom of the screen, there is a row of buttons: '+ ANDER...', 'BLOKK...', 'X ANNULEREN', and '✓ OK'. A 'RECENTE' section with a grid of user names is visible above the bottom buttons.

Fig 4

Voer voor toegang tot het systeem

- de gebruikersnaam in het veld **Gebruikersnaam** (Fig 4 **B**) in;
- voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** (Fig 4 **C**) in;
- klik op de toets **OK** (Fig 4 **D**).

De gebruiker kan het systeem nu gebruiken. Om de handeling te annuleren,

- drukt u op toets **Annuleren** (Fig 4 **E**).



De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door de systeembeheerder afgegeven. Als u niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, bent u niet bevoegd om het systeem te gebruiken.

Om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, gebruikt u het virtuele toetsenbord op het scherm (door met de muis op de letters te klikken of, indien een touchscreen wordt gebruikt, door deze aan te raken) of het toetsenbord van het workstation.

Na het inloggen, verschijnt op de toets **GEBRUIKER** op de "Control Bar" een afkorting die overeenstemt met de verbonden gebruiker (de afkorting is ADM in Fig 5 A).



Fig 5



De gebruiker van wie de gegevens op de toets GEBRUIKER verschijnen, is verantwoordelijk voor de handelingen die in het Product worden verricht. Daarom dient u iedere keer dat u het workstation verlaat uit het systeem uit te loggen. Zo kan een oneigenlijk gebruik van het systeem worden voorkomen.

U kunt op ieder moment tijdens een werksessie uit het systeem uitloggen door op de toets **GEBRUIKER** te klikken. Door op deze toets te drukken, wordt de gebruiker afgesloten en verdwijnt de afkorting van de gebruiker.

Klik om opnieuw een verbinding te maken opnieuw op de toets **GEBRUIKER**. Het scherm dat wordt getoond in Fig 4 verschijnt nogmaals.



De functie "gebruiker wijzigen" van Microsoft® Windows® wordt niet door het Product ondersteund. Dit betekent dat, in het geval waarin:

1. gebruiker 1 het Product opstart,
2. en een "gebruiker wijzigen" wordt verricht naar "Gebruiker 2" zonder dat "Gebruiker 1" uitlogt,
3. en u vervolgens probeert het Product opnieuw op te starten,

Het tweede verzoek aan het Product niet wordt uitgevoerd omdat het eerste door "Gebruiker 1" gestarte verzoek nog in uitvoering is. Het uitschakelen van automatisch uitloggen (functie "gebruiker blokkeren").

### 1.5.1 Het uitschakelen van automatisch uitloggen ("Gebruiker blokkeren")

Wanneer het systeem niet wordt gebruikt, of een bepaalde tijd niet-actief is, wordt de gebruiker automatisch van het systeem afgesloten (automatisch uitloggen). Deze tijdsduur hangt van een in te stellen configuratieparameter af.

Om het automatisch uitloggen uit te schakelen, moet u na gebruikersnaam en wachtwoord te hebben ingevoerd, en voor op **OK** te klikken, op de toets **BLOKKEREN** op de

- De werkbalk van het scherm "Inloggen" (
- Fig 6) klikken.



Fig 6

Wanneer de gebruiker is geblokkeerd, verschijnt een hangslot onder de naam van de gebruiker op de werkbalk (Fig 7).



Fig 7



Frequent gebruik van de functie "blokkeren" wordt sterk afgeraden. Het automatisch uitloggen bestaat namelijk om toegang van onbevoegde personen tot het systeem te vermijden.

## 1.5.2 "Recente" gebruikers

Het deel "**Recent**" van het inlogscherm van het systeem (Fig 8 **A**) geeft de namen van de gebruikers weer die recent hebben ingelogd.

Fig 8

Dit gebied is in hokjes verdeeld. De naam van de gebruikers die recent hebben ingelogd, verschijnen in de hokjes. Door op een van deze hokjes te klikken, verschijnt in het veld "**Gebruikersnaam**" onmiddellijk de naam die in het betreffende hokje is weergegeven.

### 1.5.3 De lijst van gebruikers raadplegen

Met de toets **ANDERS...** op de werkbalk (Fig 9 **A**) kunt u de volledige lijst van mogelijke gebruikers weergeven.

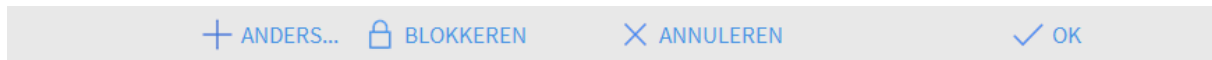


Fig 9

Om de volledige lijst van gebruikers van het systeem weer te geven

- Klik op toets **ANDERS...**

Het volgende venster wordt geopend (Fig 10).



Fig 10

Dit venster heeft de functie van een adresboek waarmee een gebruiker onder de geregistreerde gebruikers kan worden gezocht en geselecteerd. Het middelste deel van het venster toont in alfabetische volgorde de namen van de mogelijke gebruikers (Fig 10 **A**). Met behulp van de letters aan de linkerkant (Fig 10 **B**) kunnen alleen de gebruikers worden weergegeven, waarvan de naam met een bepaalde letter begint.

Door bijvoorbeeld op toets **C-D** te klikken, wordt alleen de lijst weergegeven van de gebruikers van wie de naam met een C of D begint. Met de toets **ALLE** (Fig 10 **C**) wordt de lijst met alle mogelijke gebruikers weergegeven. Met de toets **LOKAAL** (Fig 10 **D**) wordt de lijst weergegeven van de gebruikers die gebruik maken van het specifieke werkstation waarop wordt gewerkt. Met de pijlen aan de rechterkant van het venster (Fig 10 **E**) is het mogelijk om omhoog of omlaag door de lijst met gebruikers te bewegen.

Om een gebruiker te selecteren

- Klik op de naam van de gebruiker.

De naam is nu gemarkeerd.

- Klik op toets **OK** (Fig 10 **F**).

Het is ook mogelijk om te dubbelklikken op de regel die overeenstemt met de te selecteren gebruiker. Het venster "**Gebruikerslijst**" wordt gesloten. De naam van de geselecteerde gebruikers wordt weergegeven in het veld "**Gebruikersnaam**" van het inlogscherf van het systeem (Fig 4 **A**).

Met de toets **ANNULEREN** (Fig 10 **G**) wordt de handeling geannuleerd en het venster "**Gebruikerslijst**" gesloten zonder een gebruiker te hebben geselecteerd.

## 1.6 "Control Bar"

Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van de werkbalk van het Product weergegeven, met verwijzing naar de volgende paragrafen voor een gedetailleerde uitleg over de functies hiervan.



Fig 11

- Met de toets **PATIËNT** (Fig 11 **A**) kunt u toegang krijgen tot de functies voor selectie van de patiënt. Nadat de patiënt is geselecteerd, ziet u op deze knop de naam van de patiënt en indien beschikbaar diens leeftijd, de duur van het verblijf in het ziekenhuis tot nu toe en de ID. Als de patiënt is opgenomen in een afdeling, worden ook de naam van de afdeling en het nummer van het bed weergegeven.
- Op de toets **GEBRUIKER** (Fig 11 **B**) worden de initialen van de ingelogde gebruiker weergegeven. Klik op de knop **GEBRUIKER** om in of uit te loggen.
- De toets **MENU** (Fig 11 **C**) opent het hoofdmenu van het Product (Fig 12).



Fig 12

De functies waartoe dit venster toegang geeft, worden in de volgende paragrafen besproken.

- De in Fig 11 **D** weergegeven gebied wordt door het product gebruikt om de aanwezigheid van waarschuwingen of alarmen weer te geven.
- Het in Fig 11 **E** afgebeelde display toont de actuele tijd en datum.
- De toets **HELP** (Fig 11 **F**) geeft toegang tot de bestaande online documentatie.
- Met de in Fig 11 **G** aangegeven toetsen is het mogelijk:
  - het scherm van het Product te verkleinen;
  - de volledig scherm modus te kiezen;
  - de venstermodus te kiezen;



Deze drie toetsen zijn alleen aanwezig als ze tijdens de configuratie zijn vrijgegeven.

### 1.6.1 Vlaggetje voor testomgeving

Een rode vlag op de knop **Menu** (Fig 13 **A**) betekent dat de Digistat-omgeving die momenteel in gebruik is een virtuele omgeving betreft die is gemaakt voor test-/trainings-/validatiedoeleinden.



Iedere gebruikersactie binnen deze “testomgeving” is niet van invloed op de procedures van de werkelijke “productieomgeving”.



Fig 13



*De tekst die op de vlag wordt weergegeven wordt ingesteld wanneer de specifieke Digistat-licentie wordt aangemaakt. Neem contact op met Ascom UMS/de distributeur voor meer informatie.*

### 1.6.2 Aflezing van de toets "PATIËNT"



Het werkstation, de patiënt en het bed moeten voor elke kritieke operatie worden gecontroleerd, b.v. toediening van geneesmiddelen en, in het algemeen, gegevensinvoer van patiënten.

#### Geselecteerde patiënt

Als een patiënt is geselecteerd, wordt op de toets "**PATIËNT**" de naam van deze patiënt weergegeven en indien beschikbaar diens leeftijd, de duur van het verblijf in het ziekenhuis

en de ID (Fig 14 **A**). Zie het document *USR NLD Patient Explorer* voor de procedures voor de patiëntselectie.



Fig 14

## Opgenomen patiënt

Wanneer de patiënt is opgenomen, geeft de toets **PATIËNT**, behalve de naam van de patiënt, ook het nummer van het bed en de naam van de afdeling waar hij/zij zich bevindt weer (Fig 15).

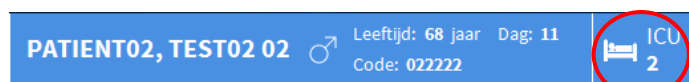


Fig 15

De naam van de afdeling en het bednummer zijn niet belicht als de patiënt tot het werkstationdomein behoort (zie Fig 15).

De naam van de afdeling en het bednummer zijn belicht als de patiënt zich in een domein bevindt dat niet tot het werkstationdomein behoort (Fig 16 - het werkstationdomein wordt bepaald door configuratie).

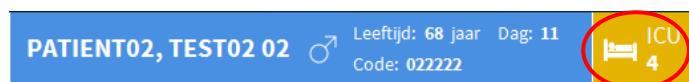


Fig 16



Tijdens de configuratiefase worden aan ieder werkstation "bijbehorende bedden" toegekend. Het is mogelijk bepaalde functies uit te voeren bij de patiënten die deze toegekende bedden bezetten. De kleur rood waarschuwt de gebruiker dat er met een patiënt wordt gewerkt die buiten de bevoegdheid valt.

Het signaal "Andere afdeling" (Fig 17) verschijnt wanneer de gebruiker tijdens de opname van de patiënt heeft aangegeven dat de patiënt zich niet op een van de geconfigureerde afdelingen bevindt.



Fig 17

## 1.6.3 Multimonitor-functionaliteit

De bedieningsbalk kan de modules weergeven op verschillende monitoren die zijn aangesloten op het werkstation waarop het product is geïnstalleerd. Deze functionaliteit is beschikbaar als het product correct is geconfigureerd: lees over dit onderwerp de productinstallatie- en configuratiehandleiding.

Om de multimonitor-functionaliteit in te schakelen:

- Krijg toegang tot het product via de inlogprocedure (zie betreffende paragraaf);
- Klik op de bedieningsbalk op de knop met de gezondheidszorg eenheid waartoe de gebruiker behoort (Fig. 18 **A**)



Fig. 18

Het volgende venster ("multimonitor-menu") wordt weergegeven:



Fig. 19

- Klik op de knop aangegeven in Fig. 19 **A** om een nieuwe bedieningsbalk toe te voegen die de gebruiker naar een ander scherm kan verplaatsen (Fig. 20):

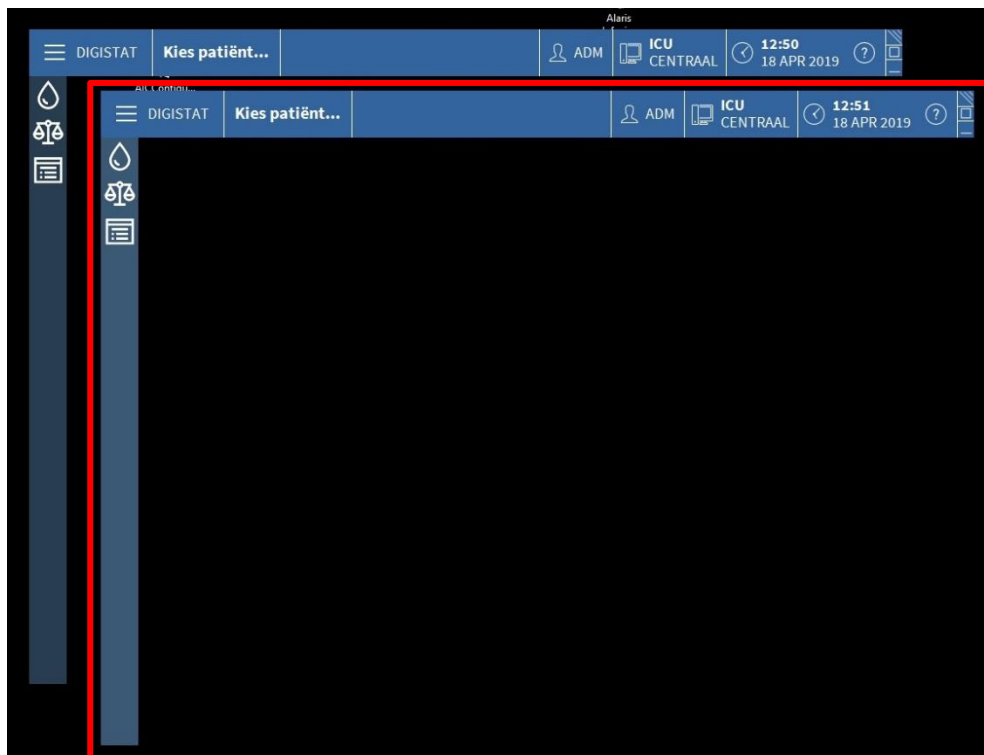


Fig. 20

Om de nieuw aangemaakte bedieningsbalk te sluiten:

- Klik op dezelfde knop die wordt gebruikt om het multimonitor-menu te openen zoals eerder uitgelegd. Omdat dit een "secundaire" bedieningsbalk is, wordt een ander menu weergegeven (Fig. 21):

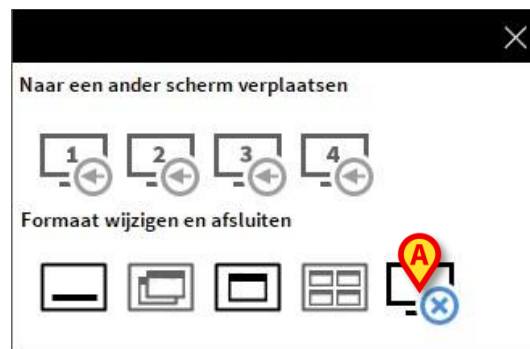


Fig. 21

- Klik op de knop in de afbeelding om de nieuw aangemaakte bedieningsbalk te sluiten.

## 1.7 Help

Klik op toets **HELP** op de "Control Bar" (Fig 11 E) om naar de online beschikbare documentatie te gaan. Het "Helpscherm" van het Product (een voorbeeld wordt getoond in Fig 22) wordt weergegeven in de Browser-module (zie paragraaf 1.8).

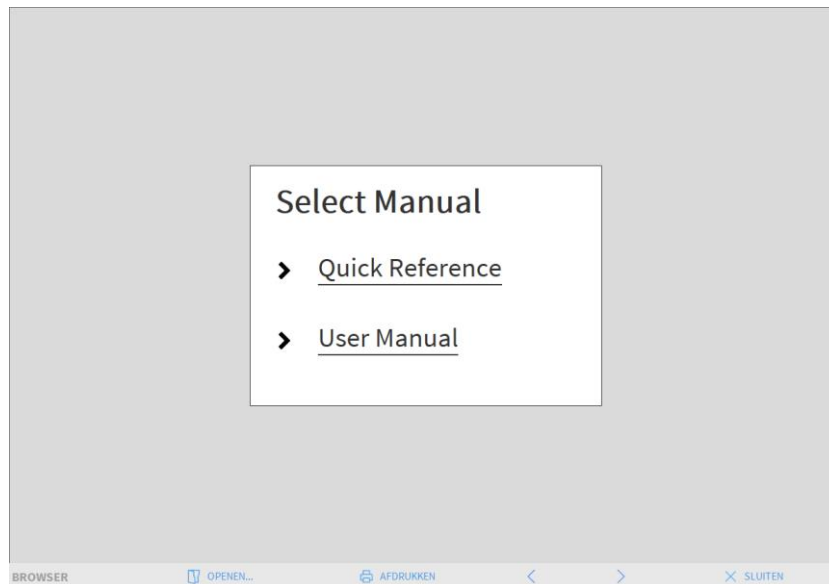


Fig 22

Op de werkbalk (Fig 23)



Fig 23

- kunnen met toets **OPENEN...** andere documenten worden geopend (als de gebruiker over de specifieke autorisaties beschikt);
- met toets **AFDRUKKEN** is het mogelijk de helppagina af te drukken;
- met toetsen < en > kunt u door het helpdocument bladeren door naar de volgende of vorige pagina te gaan;
- met toets **SLUITEN** wordt de helppagina afgesloten en gaat u terug naar het vorige scherm.

## 1.8 Browser

De Browser-module kan worden geactiveerd door de "Control Bar" voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de gebruikte configuratie. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt, zoals te zien in het vorige hoofdstuk, om het Product-hulpscherm weer te geven. In andere configuraties kan het worden gebruikt om de Product-webmodules weer te geven op desktopwerkstations. Raadpleeg de beschikbare Product-webdocumentatie voor meer informatie.

## 1.9 Hoofdmenu

Met de toets **MENU** in de “Control Bar” (Fig 24),



Fig 24

Kan een menu worden geopend met verschillende opties (Fig 25).

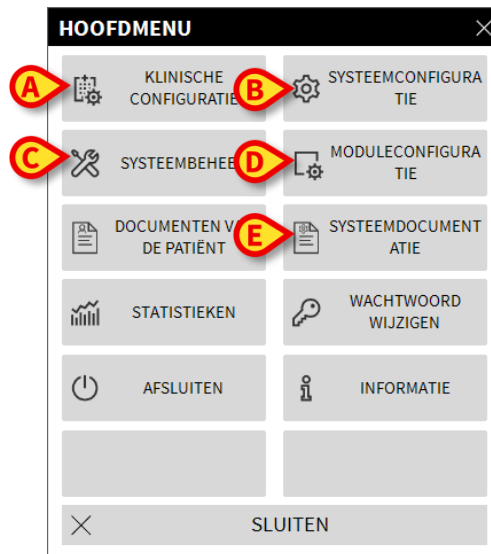


Fig 25

Iedere toets van dit menu geeft toegang tot een groep specifieke functies.

De functies die met de volgende toetsen zijn geassocieerd, zijn configuratiefuncties van het systeem en zijn daarom voorbehouden aan de systeembeheerders.

**Klinische configuratie** - (Fig 25 A)

**Systeemconfiguratie** - (Fig 25 B)

**Systeembeheer** - (Fig 25 C)

**Moduleconfiguratie** - (Fig 25 D)

**Systeemdokumentatie** - (Fig 25 E)

U dient zich tot de systeembeheerder te wenden met betrekking tot de aan deze toetsen geassocieerde procedures.

De resterende toetsen, weergegeven in Fig 26, geven toegang tot functies die ook voor de gebruikers van belang zijn (afhankelijk van hun autorisatieniveau) en die worden beschreven in de volgende paragrafen van deze handleiding.

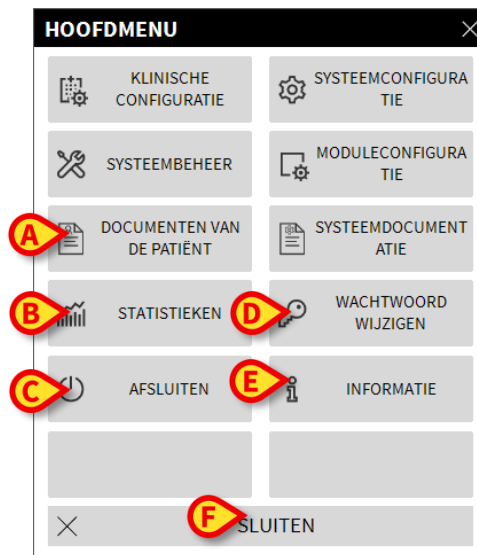


Fig 26

**Documenten van de patiënt** - (Fig 26 **A**).

**Statistieken** - (Fig 26 **B**).

**Afsluiten** - (Fig 26 **C**).

**Wachtwoord wijzigen** - (Fig 26 **D**).

**Informatie** - (Fig 26 **E**).

De toets **SLUITEN** (Fig 26 **F**) sluit het scherm "hoofdmenu" (Fig 26).

### 1.9.1 Documenten van de patiënt

De toets (Fig 26 **A**) "Documenten van de Patiënt" activeert de afdrukfuncties van het systeem. Deze paragraaf beschrijft de algemene afdrukfuncties van het Product. Wanneer de afdrukfunctie beschikbaar is, wordt dit aangegeven in het speciale deel/paragraaf van de handleiding. Raadpleeg deze paragraaf voor algemene instructies.

Voor het afdrukken van een document van de patiënt:

- Op de bijbehorende toets Afdrukken klikken.

Er wordt nu een afdrukvoorbeeld weergegeven van het gekozen document (Fig 27).

| <b>ascom</b>            |          | <b>APPARAATGEBEURTENISSEN</b>       |                             |                                                                           |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         |          | HOSPITAL<br>DEPARTMENT<br>CHIEF DR. |                             |                                                                           |
| PATIENT: Patient 4 Rose |          | CODE: 20000004                      | GEBORTE<br>ATUM: 03/05/1992 |                                                                           |
| DATUM/TIJD              | APPARAAT | #                                   | NIVEAU                      | BESCHRIJVING                                                              |
| 15/01/2018 10:10:53     | MON      |                                     | X                           | End: ECG Sensor Warning                                                   |
| 15/01/2018 10:10:53     | MON      |                                     | X                           | End: Arterial Blood Pressure too high                                     |
| 15/01/2018 10:10:30     | MON      |                                     | III                         | Arterial Blood Pressure too high                                          |
| 15/01/2018 10:10:30     | MON      |                                     | !                           | ECG Sensor Warning                                                        |
| 15/01/2018 10:08:39     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |
| 15/01/2018 10:07:36     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |
| 15/01/2018 10:07:33     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |
| 15/01/2018 10:06:55     | MON      |                                     | X                           | End: ECG Sensor Warning                                                   |
| 15/01/2018 10:06:41     | INF      | 2                                   | X                           | End: P2: Near End of Infusion                                             |
| 15/01/2018 10:06:32     | MON      |                                     | !                           | ECG Sensor                                                                |
| 15/01/2018 10:06:17     | INF      | 2                                   | II                          | Near End of Infusion                                                      |
| 15/01/2018 09:58:32     | MON      |                                     | X                           | End: Arterial Blood Pressure too high                                     |
| 15/01/2018 09:58:09     | MON      |                                     | II                          | Arterial Blood Pressure too high                                          |
| 15/01/2018 09:54:25     | INF      | 2                                   | X                           | End: P2: Syringe Clamp Open                                               |
| 15/01/2018 09:54:02     | INF      | 2                                   | III                         | Syringe Clamp Open                                                        |
| 15/01/2018 09:51:43     | MON      |                                     | X                           | End: Arterial Blood Pressure too high                                     |
| 15/01/2018 09:51:19     | MON      |                                     | II                          | Arterial Blood Pressure too high                                          |
| 15/01/2018 09:48:09     | MON      |                                     | X                           | End: ECG Sensor Warning                                                   |
| 15/01/2018 09:48:01     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |
| 15/01/2018 09:47:46     | MON      |                                     | !                           | ECG Sensor                                                                |
| 15/01/2018 09:46:45     | MON      |                                     | X                           | End: ECG Sensor Warning                                                   |
| 15/01/2018 09:46:21     | MON      |                                     | !                           | ECG Sensor                                                                |
| 15/01/2018 09:45:45     | MON      |                                     | X                           | End: Arterial Blood Pressure too high                                     |
| 15/01/2018 09:45:21     | MON      |                                     | II                          | Arterial Blood Pressure too high                                          |
| 15/01/2018 09:44:51     | MON      |                                     | X                           | End: ECG Sensor Warning                                                   |
| 15/01/2018 09:44:27     | MON      |                                     | !                           | ECG Sensor                                                                |
| 15/01/2018 09:42:29     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |
| 15/01/2018 09:39:47     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |
| 15/01/2018 09:38:36     | INF      | 1                                   |                             | Bolus; Duration= 5 sec; Type= HandFree;<br>Rate= 800 mL/h; Volume= 1.1 mL |

Fig 27

Met de toetsen op de werkbalk van het scherm kunnen de hieronder weergegeven handelingen worden verricht.

Toetsen **K** en **>** (Fig 27 **A**) maken het mogelijk naar het begin en het einde van het document te gaan.

Toetsen **<** en **>** (Fig 27 **B**) geven de vorige en de volgende pagina weer.

Display **1/1** (Fig 27 **C**) geeft het actuele schermnummer aan.

De toets **Anders** (Fig 27 **D**) activeert de mogelijke opties van het aanvullende afdrukbeheer (bij deze configuratie is de optie “Watermerken” beschikbaar - zie paragraaf 1.9.1.1 voor een beschrijving van deze opties).

De toets **Zoeken** (Fig 27 **E**) maakt het mogelijk om in het weergegeven document te zoeken. Zie paragraaf 1.9.1.2 voor meer instructies.

De toets die het **100%** percentage (Fig 27 **F**) weergeeft is een zoom, waardoor het mogelijk is om de weergavemodus te wijzigen. Zie paragraaf 1.9.1.3 voor meer instructies.

Gebruik de toets **Afdrukken** (Fig 27 **G**) om het rapport af te drukken.

Gebruik de toets **Afdrukken...** (Fig 27 **H**) om het venster met de afdrুকopties weer te geven (Fig 33). Zie paragraaf 1.9.1 voor een beschrijving van dit venster en de bijbehorende procedures.

Gebruik de toets **Exporteren** (Fig 27 **I**) om de inhoud van het document naar verschillende bestandsextensies te exporteren. Zie paragraaf 1.9.1.5 voor meer instructies.

De toets **SLUITEN** sluit het afdrুকvoorbeeld.

### 1.9.1.1 Andere – Aanvullende afdrুকopties

De toets **ANDERS** (Fig 27 **D**) geeft toegang tot eventuele aanvullende opties van afdrুকbeheer. Om de beschikbare opties weer te geven

- Klik op toets **ANDERS**.

Hierboven opent zich een menu.


- Klik op de gewenste toets die bij de gewenste beheerfunctie hoort.

#### **Andere – Watermerk**

Om een watermerk aan het afdrucken toe te voegen (tekst of afbeelding)

- Klik op toets **ANDERS - WATERMERK**.

Het volgende venster wordt nu geopend (Fig 28).

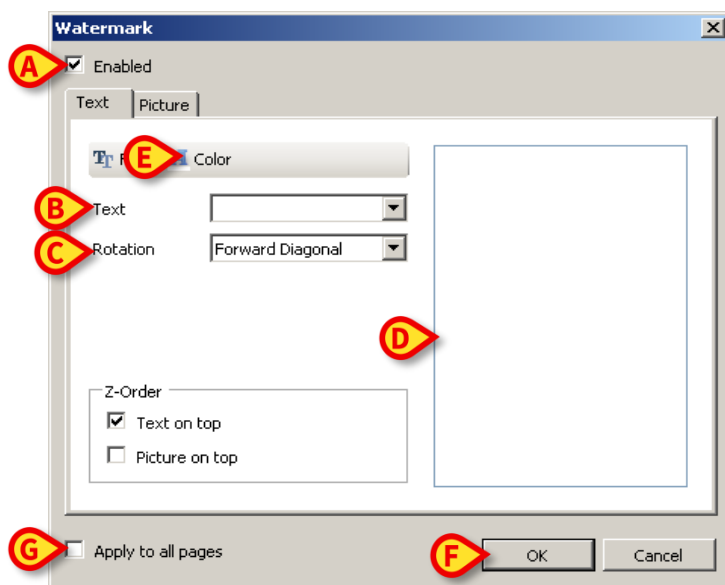

**Fig 28**

Om een tekst in watermerk toe te voegen,

- moet u ervoor zorgen dat de checkbox "**Vrijgeven**" is geselecteerd (Fig 28 **A**), omdat anders de inhoud van het venster niet kan worden gewijzigd.
- Voer de tekst in veld "**Tekst**" in (Fig 28 **B**).

- Geef de gewenste oriëntatie van het watermerk (diagonaal, horizontaal, verticaal) aan met menu "**Draaien**" (Fig 28 C).

Er wordt nu een voorbeeld weergegeven op de in Fig 28 D aangegeven plaats.

- Gebruik de in Fig 28 E aangegeven toetsen om het lettertype en de kleur van het watermerk te kiezen.
- Klik op toets "**OK**" (Fig 28 F).


Op deze manier wordt de tekst in watermerk weergegeven.

Als checkbox "**Op alle pagina's toepassen**" is aangevinkt (Fig 28 G), wordt het watermerk op alle pagina's van het document toegepast; is dit niet het geval, wordt het alleen op de huidige pagina toegepast.

Om een afbeelding in watermerk toe te voegen

- Klik op de tab "**Afbeelding**", zoals aangegeven in Fig 29 A.

Het volgende venster wordt nu geopend (Fig 29).

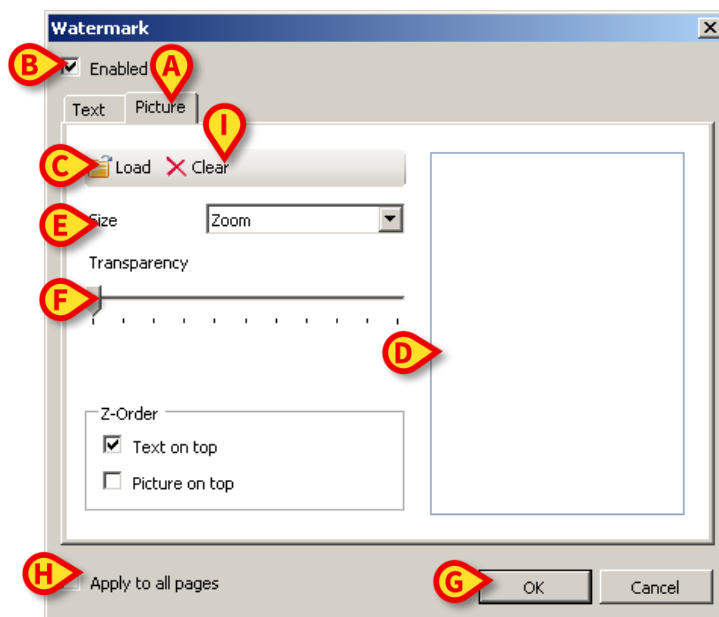

**Fig 29**

Volg de volgende stappen voor het invoeren van een afbeelding in watermerk:

- zorg ervoor dat de checkbox "**Vrijgeven**" is geselecteerd (Fig 29 B), omdat anders de inhoud van het venster niet kan worden gewijzigd.
- Klik op toets "**Laden**" weergegeven in afbeelding Fig 29 C.
- Het venster waar u kunt "bladeren" tussen de in het geheugen aanwezige bestanden wordt geopend.

- Zoek en selecteer de te laden afbeelding.

De afbeelding wordt weergegeven op de in Fig 29 **D** aangegeven plaats.

- Gebruik het dropdownmenu "**Afmeting**" om de grootte van de afbeelding te bepalen (Fig 29 **E**).
- Bepaal met cursor "**Doorzichtigheid**" de doorzichtigheid van de afbeelding in watermerk (Fig 29 **F** - de cursor links geeft maximale doorzichtigheid aan).
- Klik op toets "**OK**" (Fig 29).

Op deze manier wordt de tekst in watermerk weergegeven.

Als checkbox "**Op alle pagina's toepassen**" is aangevinkt (Fig 29 **G**), wordt het watermerk op alle pagina's van het document toegepast; is dit niet het geval, wordt het alleen op de huidige pagina toegepast.

Om een eerder geselecteerde afbeelding te wissen

- Klik op toets "**Wissen**" weergegeven in afbeelding Fig 29 **I**.

### 1.9.1.2 Zoeken

Gebruik toets **ZOEKEN** (Fig 27 **E**) om een zoekactie te verrichten binnen het weergegeven document.

Om de zoekfuncties in te schakelen,

- Klik op toets **ZOEKEN**.

Nu wordt het volgende venster geopend (Fig 30).



Fig 30

- Voer binnen het venster de te zoeken tekst in (Fig 31 **A**).

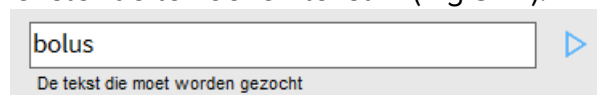


Fig 31

- Klik op toets  (Fig 31 **B**).

De gezochte tekst wordt in het weergegeven document gemarkeerd.

- Klik opnieuw op toets  om naar de volgende resultaten te gaan.

### 1.9.1.3 Zoom

De toets **ZOOMEN** (waarop standaard de proportie **100%** - Fig 27 **F** is geselecteerd) is een zoom waarmee de weergavemodus kan worden veranderd.

Om de weergavemodus te wijzigen

- Klik op toets **ZOOMEN**. Het volgende menu wordt geopend (Fig 32).

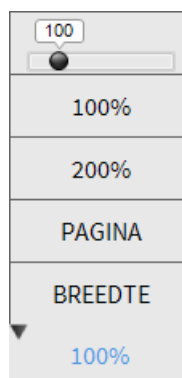


Fig 32

- Klik op de toets van de gewenste modus.

Nu wordt de pagina weergegeven. De geselecteerde modus is aangegeven op de toets.


De volgende opties zijn beschikbaar:


met toets "**Breedte**" wordt de pagina weergegeven met gebruik van de hele breedte van het scherm;

met toets "**Pagina**" wordt de huidige pagina in zijn geheel weergegeven;

met toets "**200%**" worden de afmetingen van de pagina verdubbeld (200% zoomen)

met toets "**100%**" ziet men de pagina met zijn feitelijke afmetingen (100% zoomen);

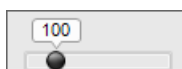

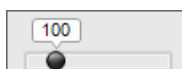Deze  cursor wordt gebruikt om op de inhoud van de pagina te zoomen (uitzoomen links, inzoomen rechts). Boven de cursor wordt het waardepercentage van de gebruikte zoom weergegeven; de waarden liggen tussen 100 en 200 %. De geselecteerde waarde wordt weergegeven op de zoomtoets op de werkbalk.

#### 1.9.1.4 Afdrukken...

Met toets **AFDRUKKEN...** opent zich het venster met verschillende afdrukopties.

- Klik op toets **AFDRUKKEN...** (Fig 27 **H**) om het venster met de afdrukopties te openen (Fig 33)

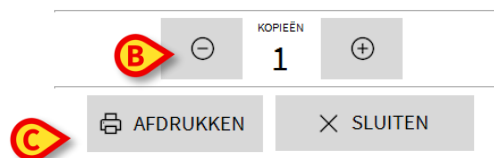
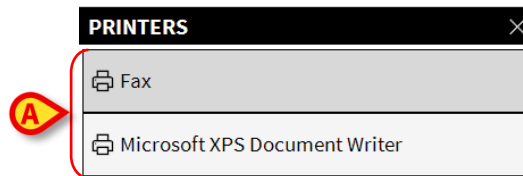


Fig 33

In dit venster kunnen de printer en het aantal exemplaren worden gekozen.

- Klik op de gewenste optie in het menu om de printer te selecteren (Fig 33 **A**).
- Stel het aantal af te drukken exemplaren in met de toetsen  (een exemplaar minder) en  (een exemplaar meer) - Fig 33 **B**.
- Klik op toets **AFDRUKKEN** (Fig 33 **C**) om het document af te drukken.

#### 1.9.1.5 Exporteren

Als toets **EXPORTEREN** (Fig 27 **I**) tijdens de configuratie is vrijgegeven, kan hiermee de inhoud van het document in verschillende formaten worden geëxporteerd.

- Druk op toets **EXPORTEREN** om het exportmenu weer te geven.

Het menu geeft alle bestandsformaten weer die momenteel door het gebruikte systeem worden ondersteund.

- Klik op de optie die overeenstemt met het benodigde bestandsformaat.

Het document wordt naar het bijbehorende bestandsformaat geëxporteerd.

## 1.9.2 Statistics

De toets **STATISTIEKEN** in het hoofdmenu (Fig 34) geeft toegang tot de statistische rekenfuncties die in het systeem zijn geïmplementeerd. Zie de configuratiehandleiding (CFG *ENG Digistat Suite* ) voor instructies.



Fig 34

## 1.9.3 Wachtwoord wijzigen

Door op toets **WACHTWOORD WIJZIGEN** van het hoofdmenu (Fig 35 **A**) te drukken, wordt een venster weergegeven waarmee het wachtwoord van de huidige ingelogde gebruiker kan worden gewijzigd.

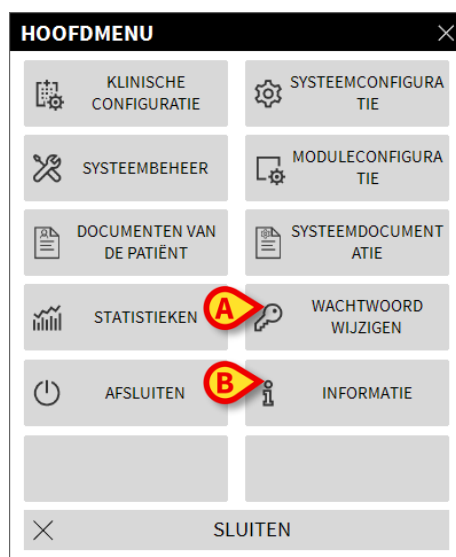


Fig 35

Om het wachtwoord te wijzigen

- Klik op toets **WACHTWOORD WIJZIGEN** (Fig 35 A).

Nu wordt het volgende venster geopend.



Fig 36

- Voer het huidige password (wachtwoord) in in veld "**Oud wachtwoord invoeren**" (Fig 36 **A**).
- Controleer of checkbox "**wachtwoord vrijgeven**" (Fig 36 **B**) is aangevinkt.
- Voer in het in Fig 36 **C** aangegeven veld het nieuwe wachtwoord in.
- Type ter bevestiging het nieuwe wachtwoord opnieuw in veld "**Wachtwoord opnieuw invoeren**" (Fig 36 **D**).
- Klik op toets **OK** (Fig 36 **E**).



De wachtwoorden zijn niet gevoelig voor hoofd- en kleine letters. De wachtwoorden kunnen alleen worden samengesteld door cijfers (van 0 tot 9) en letters (A-Z).

## 1.9.4 Informatie

De toets **INFORMATIE** van het hoofdmenu (Fig 35 **B**) geeft een venster weer met informatie over de geïnstalleerde versie van Product en over de bijbehorende licenties.

## 1.9.5 Afsluiten

Met toets **AFSLUITEN** van het hoofdmenu (Fig 38 **A**) wordt het Product afgesloten. Om het Product af te sluiten

- Klik op toets **MENU** op de "Control Bar" (Fig 37).



Fig 37

Het hoofdmenu (Fig 38) wordt nu geopend.



Fig 38

- Klik op toets **AFSLUITEN** (Fig 38 **A**). Er wordt een ander menu weergegeven (Fig 39).

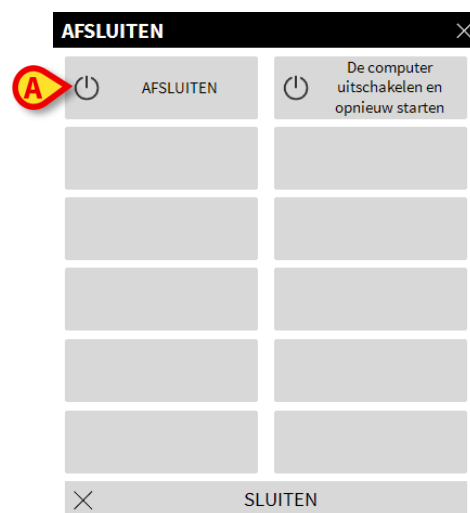


Fig 39

- Klik opnieuw op **AFSLUITEN** in dit nieuwe menu (Fig 39 **A**). Het systeem vraagt in het volgende venster om bevestiging van de handeling.

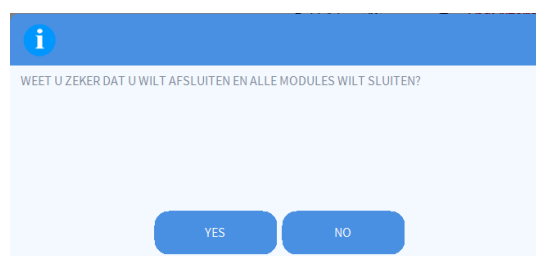


Fig 40

- Klik op **JA** om af te sluiten.



Om het Product af te sluiten, moet u over een geschikt autorisatieniveau beschikken.