



Control Bar Web Gebruikershandleiding

Versie 3.0

2024-10-31

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

Inhoud

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Web starten	3
1.2 Inloggen	4
1.3 Werkruimte	6
1.3.1 Een module kiezen	6
1.4 Control Bar.....	7
1.5 Hoofdmenu.....	8
1.5.1 Wachtwoord wijzigen.....	8
1.5.2 Rapportage van gebruikersproblemen.....	10
1.6 Aanvullende submodules.....	10
1.6.1 CDSS Configurator	11
1.6.2 Identity	12

1. Control Bar Web



Voor meer informatie over de productomgeving, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en het beoogde gebruik, raadpleegt u de *USR NLD Digistat Care* en/of de *USR NLD Digistat Docs* (afhankelijk van de geïnstalleerde modules - voor de *Digistat Suite EU*) of *USR ENG Digistat Suite NA* (voor *Digistat Suite NA*). Voor een correct en veilig gebruik van de *Control Bar Web* dient u bekend te zijn met het betreffende document.

1.1 Control Bar Web starten

De Control Bar Web starten doet u zo:

- Typ het specifieke adres in de adresbalk van de browser.

De volgende pagina wordt geopend:

DIGISTAT v10.8.5

12:43
24 Aug 2023

login

Username

Password

login

Fig 1

1.2 Inloggen

Om de functies van het systeem te activeren, moet de gebruiker inloggen.

login

Username

Password

login

Fig 2

Inloggen doet u zo:

- Voer uw gebruikersnaam in in het veld "Gebruikersnaam" (Fig 2 **A**).
- Voer uw wachtwoord in in het veld "Wachtwoord" (Fig 2 **B**).
- Klik op de knop **Inloggen** (Fig 2 **C**).

De gebruiker is nu ingelogd.



De gebruikersnaam en het wachtwoord worden toegekend door de systeembeheerder. Als u niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, bent u niet gemachtigd om het Product te gebruiken.

Nadat u toegang tot het systeem hebt verkregen, wordt op de knop Gebruiker in de besturingsbalk een lettercombinatie weergegeven dat overeenstemt met de aangemelde **gebruiker** (de lettercombinatie is ADMIN in Fig 3A).

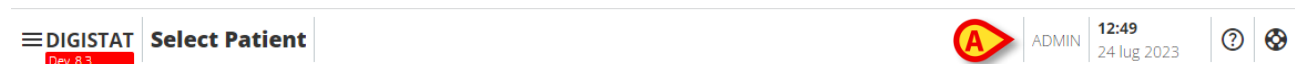


Fig 3



De gebruiker wiens gegevens worden weergegeven op de Gebruikersknop is verantwoordelijk voor alle acties die op het Product worden uitgevoerd. Om misbruik van het systeem te voorkomen, wordt nadrukkelijk aangeraden om uit te loggen voordat u het werkstation van het Product verlaat.



Het is mogelijk om het product zo te configureren dat inloggen via een extern systeem mogelijk is ("single sign on"). In deze gevallen wordt een speciale knop weergegeven op het aanmeldingsscherm.

Om uit te loggen, klikt u tijdens de werksessie op de knop **Gebruiker**. Het volgende menu wordt geopend (Fig 4).

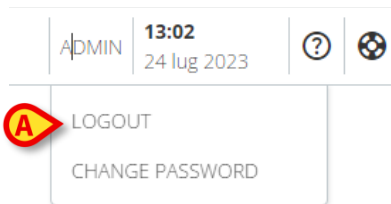


Fig 4

- Klik op **UITLOGGEN** (Fig 4 **A**).

Er wordt een bevestiging van de gebruiker gevraagd. Na bevestiging wordt de gebruiker uitgelogd. Klik opnieuw op de knop **Gebruiker** om terug in te loggen. Het in Fig 2 getoonde scherm wordt opnieuw opnieuw weergegeven.

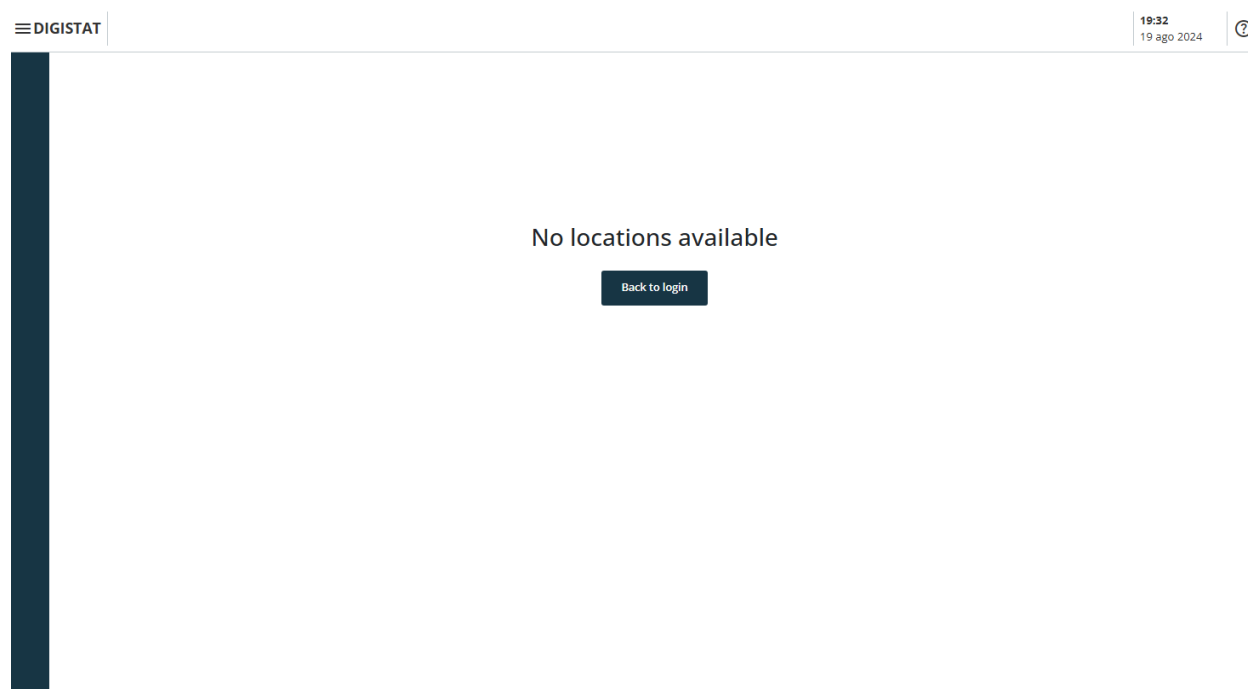


Fig 5

Als de gebruiker geen eerder gekoppelde locatie heeft (zie handleiding *CGF ENG Digistat Suite MDR* voor de configuratie van de koppeling tussen gebruiker en locatie), dan is het niet mogelijk om in te loggen op de module. In dit geval wordt het bericht "Geen locatie beschikbaar" weergegeven (Fig 5). Daarnaast is er een knop **Terug naar aanmelden** om terug te keren naar de aanmeldpagina en opnieuw proberen in te loggen met een nieuwe gebruiker of met dezelfde gebruiker na een gebruiker-locatieassociatie.



Een "Locatie" is een Digistat configuratie-entiteit die overeenkomt met een specifiek gebied van de gezondheidszorgstructuur. Het kan bijvoorbeeld een afdeling, een ziekenhuisafdeling, een operatiekamer enz. zijn, afhankelijk van de vereisten van de gezondheidszorgstructuur. Raadpleeg de systeembeheerders voor meer informatie.

1.3 Werkruimte

Nadat de gebruiker is ingelogd, worden de pictogrammen die overeenstemmen met de beschikbare Digistat Web-modules weergegeven op de zijbalk (Fig 6A). In de werkruimte (Fig 6B) worden de schermen en de functies van de in de zijbalk geselecteerde module weergegeven.

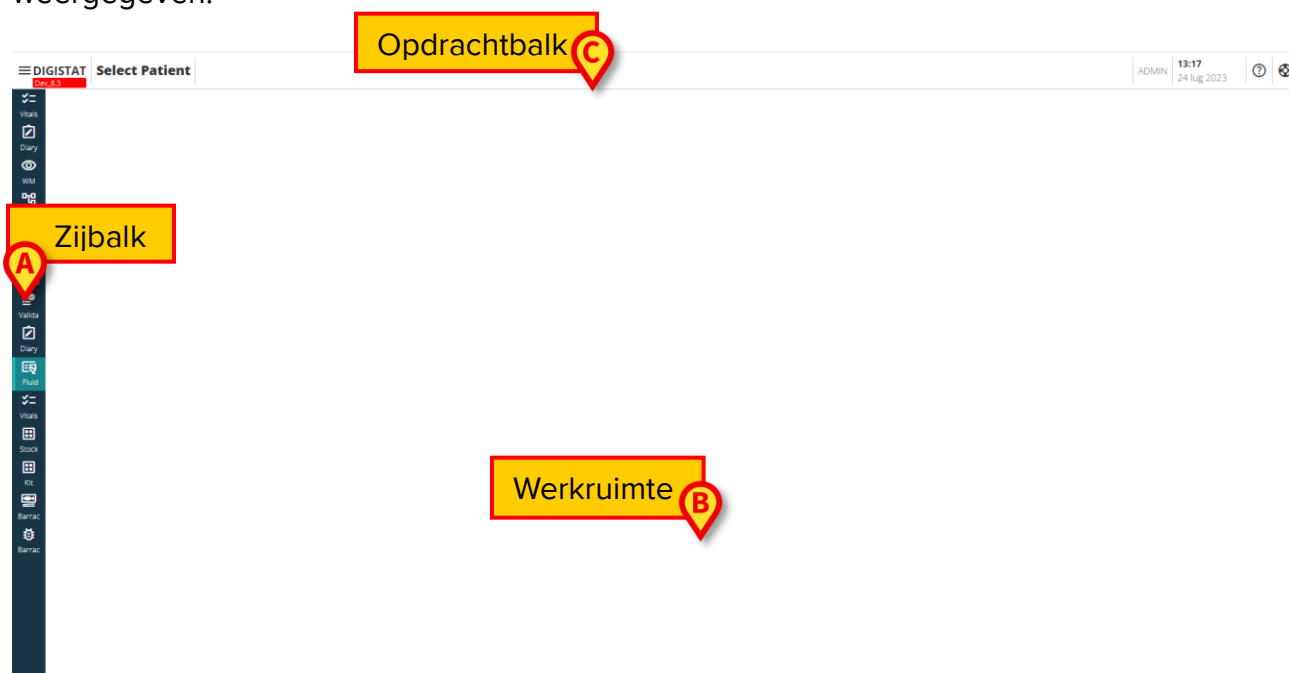


Fig 6

De Control Bar (Fig 6C) wordt beschreven in de hoofdstukken 1.4 en verder. De op dat moment geselecteerde module wordt gemarkeerd.

1.3.1 Een module kiezen

Een module kiezen:

- Klik in de zijbalk op het overeenstemmende pictogram.

Het pictogram wordt gemarkeerd en de functies van de module worden weergegeven in de werkruimte.

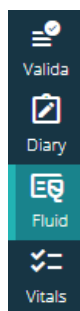


Fig 7

1.4 Control Bar

De Control Bar die in het bovenste gedeelte van het scherm verschijnt, is hetzelfde voor alle modules. De belangrijkste functies ervan worden hieronder opgesomd.



Fig 8

- Met de knop **Menu** (Fig 8 **A**) wordt het hoofdmenu van de Control Bar Web geopend. Zie hoofdstuk 1.5.
- De knop **Patiënt** (Fig 8 **B**). Als er geen patiënt is geselecteerd, kunt u op deze knop klikken om de procedure voor patiëntselectie te starten. Nadat de patiënt geselecteerd is, worden de naam en belangrijkste gegevens van de patiënt weergegeven. Bij opgenomen patiënten worden ook het bednummer en de naam van de afdeling weergegeven. Als er voor de geselecteerde patiënt bepaalde aanvullende functies van Control Bar Web beschikbaar zijn, klikt u op de patiëntknop om een keuzemenu te openen waarmee u toegang krijgt tot deze functies (zie sectie 1.6 voor meer informatie). Als er een hangslotpictogram -  - naast de naam van de patiënt wordt weergegeven, betekent dit dat sommige gegevens of functies van de patiënt zijn beveiligd.



De procedure voor patiëntselectie wordt gewoonlijk uitgevoerd op de module Digistat Patient Explorer Web. Raadpleeg de handleiding van USR NLD Patient Explorer Web (document: USR NLD Patient Explorer Web) voor instructies over de functies van het patiëntbeheer. Er kunnen andere modules worden geconfigureerd voor patiëntselectie in plaats van Patient Explorer Web. Als dit het geval is, raadpleeg dan de specifieke documentatie voor instructies.

- Het veld in Fig 8 **C** kan gebruikt worden om aan te geven dat er meldingen voor de gebruiker zijn.
- De gebruikersknop biedt toegang tot de functies inloggen/uitloggen en wachtwoord wijzigen (Fig 8 **D**).

- Datum- en tijdsaanduiding (Fig 8 E).
- Gebruik de **Help-knop** (Fig 8 F) om het online hulpcentrum te openen.
- Klik op het pictogram  (Fig 8 G) om een probleemrapport aan te maken dat naar de technische ondersteuning wordt gestuurd. Zie hoofdstuk 1.5.2.

1.5 Hoofdmenu

Met de knop **Menu** (Fig 8 A) opent u het volgende menu (Fig 9).

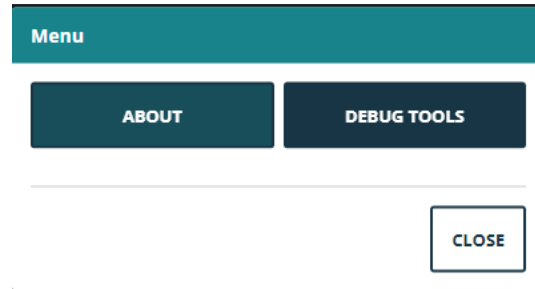


Fig 9

De knop **Info** opent een venster met informatie over de geïnstalleerde versie van Digistat Suite en de bijbehorende licenties (voor meer informatie, zie de specifieke documentatie). De feitelijke labeling van het product is de het veld Info dat weergegeven wordt op de werkstations, mobiele apparaten en webmodules waar de Digistat Suite is geïnstalleerd. De knop **Debuggereedschappen** is voorbehouden aan systeembeheerders.

1.5.1 Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord wijzigen doet u zo:

- Klik op de Control Bar op de knop **Gebruiker** (Fig 10 A).

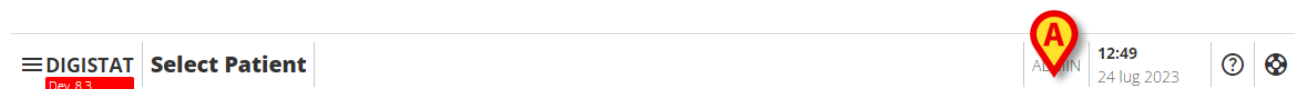


Fig 10

- Het volgende menu wordt geopend (Fig 11).


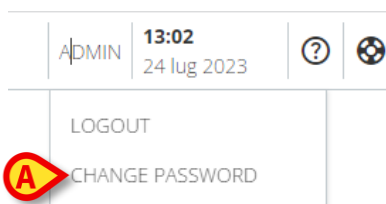


Fig 11

- Klik op **Wachtwoord wijzigen** (Fig 11 **A**). Het volgende scherm wordt geopend (Fig 12).

CHANGE PASSWORD

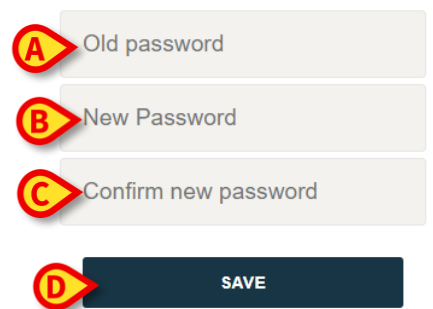

The screenshot shows a web form titled "CHANGE PASSWORD". It contains three text input fields and one button. The first field is labeled "Old password" and has a red callout bubble with the letter "A" pointing to it. The second field is labeled "New Password" and has a red callout bubble with the letter "B" pointing to it. The third field is labeled "Confirm new password" and has a red callout bubble with the letter "C" pointing to it. Below the fields is a dark blue button labeled "SAVE" with a red callout bubble with the letter "D" pointing to it.

Fig 12

- Typ het huidige wachtwoord in het veld "OUD wachtwoord" (Fig 12 **A**).
- Typ het nieuwe wachtwoord in het veld "Nieuw wachtwoord" (Fig 12 **B**).
- Typ het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld "Nieuw wachtwoord bevestigen" (Fig 12 **C**).
- Klik op **Opslaan** (Fig 12 **D**).

1.5.2 Rapportage van gebruikersproblemen

Indien aanwezig, kunt u met het pictogram  op de Control Bar (Fig 13 **A**) een "probleem" melden en, indien nodig, technische ondersteuning krijgen.

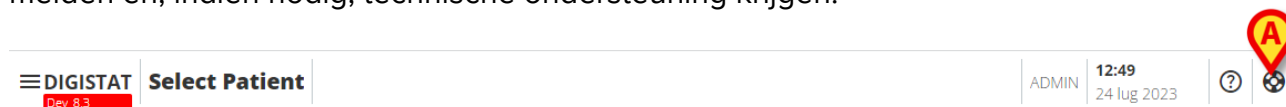


Fig 13



De aanwezigheid van het pictogram is gekoppeld aan de systeemoptie `EnableUserIssueReporting`. Meer informatie is verkrijgbaar bij de systeembeheerders.

Om dat te doen:

- Klikt u op het pictogram  (Fig 13 **A**). Het volgende venster wordt geopend (Fig 14).

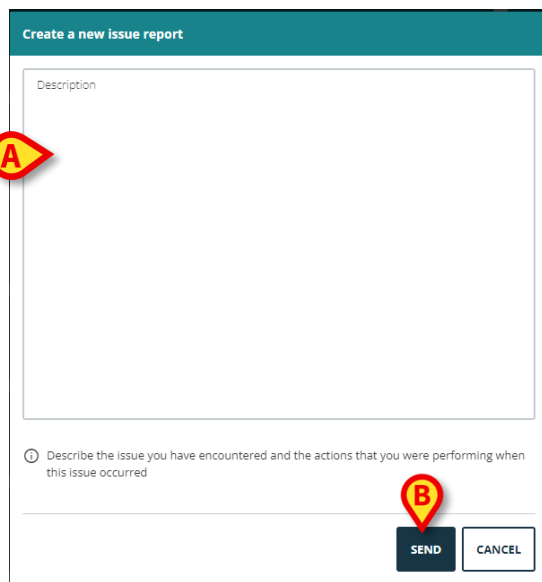


Fig 14

- Geef een beschrijving van het probleem op in het veld "Beschrijving" (Fig 14 **A**).
- Klik op **Verzenden** (Fig 14 **B**).

U krijgt een bevestiging en een identificatienummer.

1.6 Aanvullende submodules

De in deze sectie beschreven submodules kunnen, afhankelijk van de configuratie van het product in de zorginstelling, al dan niet aanwezig zijn. Elke submodule wordt geopend door op een specifiek menu-item te klikken in een keuzemenu dat naast de patiëntknop

wordt weergegeven. Deze zijn patiëntgebonden, d.w.z. dat ze alleen beschikbaar zijn als er al een patiënt is geselecteerd.

1.6.1 CDSS Configurator

De submodule CDSS Configurator kan worden ingeschakeld door deze te configureren als een aanvullende sectie van Control Bar Web. U opent de submodule CDSS-configurator als volgt:

- Selecteer de gewenste patiënt.



Raadpleeg de handleiding van Patient Explorer Web voor de procedure voor patiëntselectie (document: USR NLD Patient Explorer Web).

Nadat de patiënt is geselecteerd, wordt, indien er aanvullende submodules voor de Control Bar beschikbaar zijn, het  pictogram weergegeven op de patiëntknop (Afb. 15 A).



Afb. 15

- Klik op het pictogram .

Er wordt een keuzemenu weergegeven met de beschikbare aanvullende submodules (Afb. 16).



Afb. 16

- Klik op "CDSS Configuration" (Afb. 16 A).

Het volgende venster bevat een lijst met regels die aan de op dat moment geselecteerde patiënt (Afb. 17) zijn gekoppeld.

RULES		
✓ RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	⏻	⌄ ⚙
✓ NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	⏻	⌄ ⚙
✓ MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	⏻	⌄ ⚙

CLOSE

Afb. 17

Raadpleeg de handleiding van CDSS Configurator voor de volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing van deze submodule (document USR NLD CDSS Web).

1.6.2 Identity

De submodule Identity kan worden ingeschakeld door deze te configureren als een aanvullende sectie van Control Bar Web. De submodule Identity opent u als volgt:

- Selecteer de gewenste patiënt.



Raadpleeg de handleiding van USR NLD Patient Explorer Web voor de procedure voor patiëntselectie (document: USR NLD Patient Explorer Web).


Nadat de patiënt is geselecteerd, wordt, indien er aanvullende submodules voor de Control Bar beschikbaar zijn, het  pictogram weergegeven op de patiëntknop (Afb. 18 A).



Afb. 18

- Klik op het pictogram  .


Er wordt een keuzemenu weergegeven met de beschikbare aanvullende secties (Afb. 19).

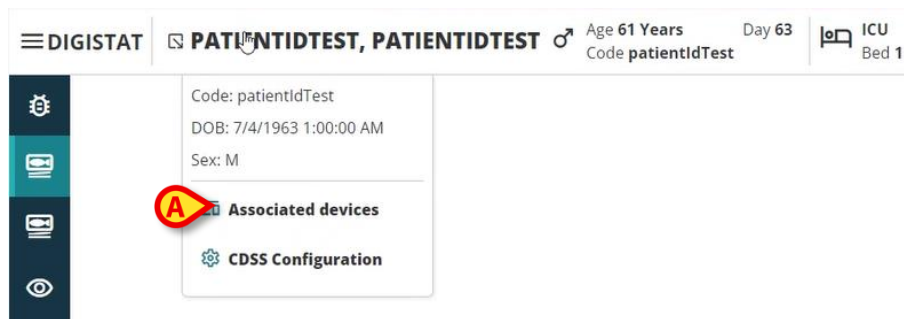

Afb. 19

- Klik op "Gekoppelde apparaten" (Afb. 19 **A**).

Het volgende venster bevat een lijst van apparaten die aan de op dat moment geselecteerde patiënt zijn gekoppeld (Afb. 20).

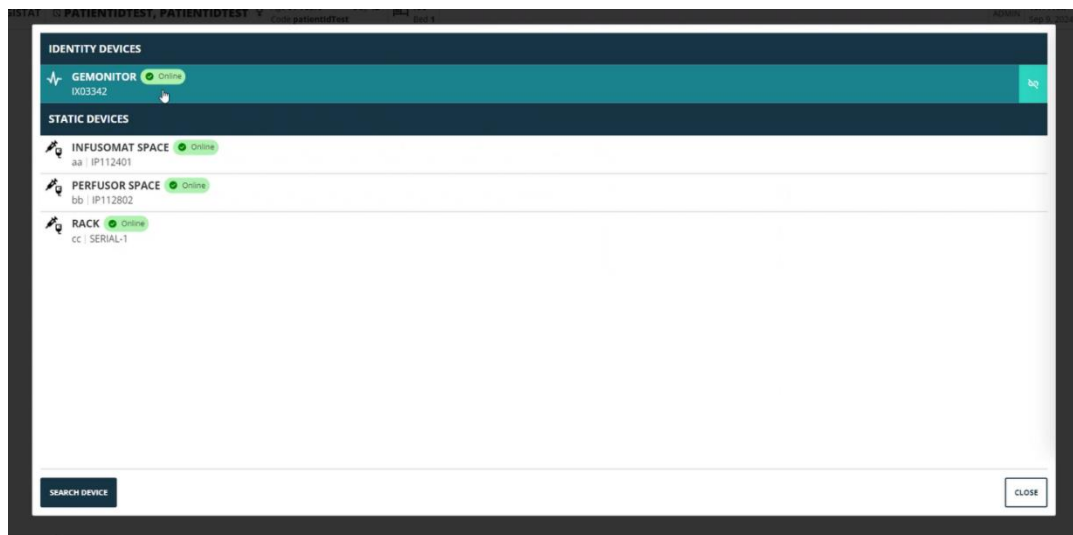

Afb. 20

Raadpleeg de handleiding van Identity voor de volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing van deze submodule (document: USR NLD Identity Web).