



Smart Central Mobile Gebruikshandleiding

Versie 4.0

31/12/2020

Inhoud

1. Smart Central Mobile.....	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Opstarten van de applicatie	3
1.3 "Central" scherm.....	4
1.4 Lijst medische apparatuur.....	7
1.4.1 Titel.....	8
1.4.2 Lijst apparaten.....	9
1.5 Alarmgeschiedenis	10
1.6 Smart Central Video	12
1.7 Wave Forms	14
1.8 Dempnen van meldingen op Smart Central Mobile	17
1.8.1 Op desktopwerkstations.	17
1.8.2 Op mobiele werkstations.....	18
1.8.3 Aanwezigheid van verpleegkundige	19
1.8.4 Alarmfiltering van NFC.....	20
1.9 Widgets	23
1.9.1 SmartCentral-widget	23

1. Smart Central Mobile



Zie de specifieke documenten van het product voor algemene en gedetailleerde informatie over de productomgeving en de instructies voor het gebruik van de Mobile Launcher-software. De kennis en het begrip van deze documenten is vereist voor een correct en veilig gebruik van de Smart Central Mobile, zoals beschreven in dit document

1.1 Inleiding

Smart Central Mobile ondersteunt het alarmbeheer door contextuele informatie afkomstig van meerdere bronnen te geven en het op duidelijke en beknopte wijze aan het personeel te tonen.

1.2 Opstarten van de applicatie

Om de Smart Central Mobile applicatie op te starten:

- op de bijbehorende rij op het scherm van het draagbare apparaat drukken (Afb. 1).




Afb. 1

Het scherm van Smart Central wordt geopend, zoals wordt weergegeven in Afb. 2. Als de rij van de toepassing wordt aangeraakt terwijl er een alarmtoestand is opgetreden (er is een rood getal rechts boven aan het applicatiesymbool), geeft het Smart Central-scherm de lijst met gealarmeerde patiënten weer.

1.3 "Central" scherm

Het "Central" scherm geeft een schematische samenvatting van de status van de medische apparaten die zijn aangesloten op ieder geconfigureerde bed.

Als alle patiënten van het domein aan de gebruiker zijn toegewezen (d.w.z. de huidige gebruiker heeft een of meer bedden uitgezonderd met behulp van de functie "Patiënten toewijzen"), toont het centrale scherm de patiënten als een reeks vierkanten (Afb. 2). De functie "Patiënten toewijzen" wordt beschreven in het document *USR NLD Mobile Launcher*.

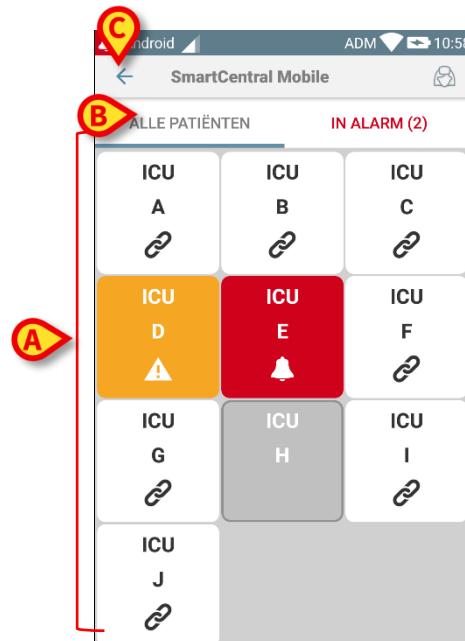

Afb. 2

Als NIET alle patiënten van het domein aan de gebruiker zijn toegewezen (D.w.z. de huidige gebruiker heeft een of meer bedden uitgezonderd met behulp van de functie "Patiënten toewijzen"), toont het centrale scherm de patiënten als een set tegels (Afb. 5). De functie "Patiënten toewijzen" wordt beschreven in het document *USR NLD Mobile Launcher*.




Afb. 3

De genummerde vierkantjes of tegels op het scherm geven de in het draagbare apparaat geconfigureerde bedden weer (Afb. 2 **A**). De vierkantjes/tegels die op een enkel scherm zichtbaar zijn vormen het "domein" bedden dat door het draagbare apparaat wordt gedekt. Het "domein" is geconfigureerd.

Het nummer of brief in ieder vierkantje/tegels geeft het bed nummer of brief weer. In ieder vierkantje of tegel wordt de status van het aangesloten medische hulpmiddel op grafische wijze aangegeven door de kleur van de achtergrond en de bijbehorende icoon:

ICU 10	Alle op het bed aangesloten medische apparaten zijn in de wacht
ICU 6 	Er is minstens een aangesloten medisch apparaat in bedrijf
3 	Minstens een van de aangesloten medische apparaten geeft een alarm met lage prioriteit af
ICU 2 	Minstens een van de aangesloten medische apparaten geeft een alarm met middelhoge prioriteit af
ICU 4 	Minstens een van de aangesloten medische apparaten geeft een alarm met hoge prioriteit af

Van bovenstaand overzicht worden in het 1e geval geen apparaat gegevens van het bed verzonden. In deze situatie zal de Smart Central-toepassing het volgende scherm weergeven als de gebruiker de betreffende tegel aanraakt:

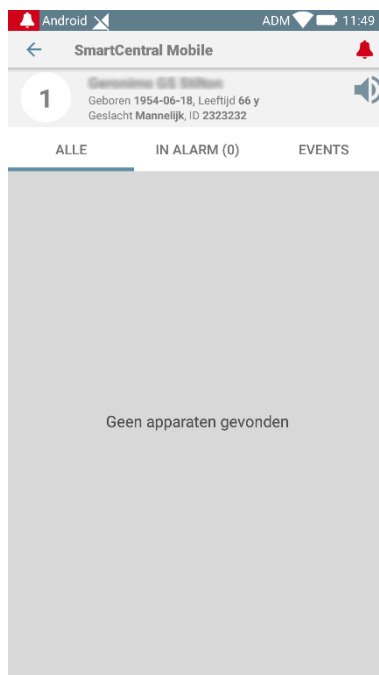

Afb. 4

U kunt de filters weergegeven in Afb. 2 **B** gebruiken om ofwel alle geconfigureerde bedden ofwel alleen de bedden die een alarm afgeven, weer te geven.


Het is mogelijk om de Smart Central-applicatie te configureren om het scherm te activeren als een alarm naar de gebruiker wordt gestuurd en het mobiele apparaat op een vlakke ondergrond staat (een bureaublad, een tafel...).

Afsluiten

Druk op de toets **Afsluiten** (Afb. 2 **C**) om de applicatie af te sluiten.


1.4 Lijst medische apparatuur

Druk op een van de vierkantjes van het "Central" scherm om de lijst met aan het bed gekoppelde medische apparaten weer te geven (Afb. 5).

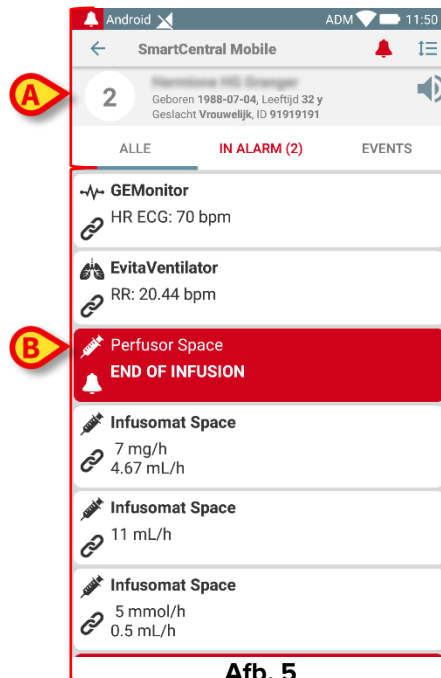


Dit scherm bestaat uit twee delen: een titelgedeelte (Afb. 5 **A**) en de lijst met medische apparaten (Afb. 5 **B**). Als er een alarmconditie is, dan is het opschrift "Alarmed" rood; bovendien ziet u een nummer tussen haakjes dat het aantal gealarmeerde apparaten weergeeft.

Op het tabblad "Events" (Voorvallen) ziet u een lijst van alle mededelingen met betrekking tot de betreffende patiënt (Afb. 6).

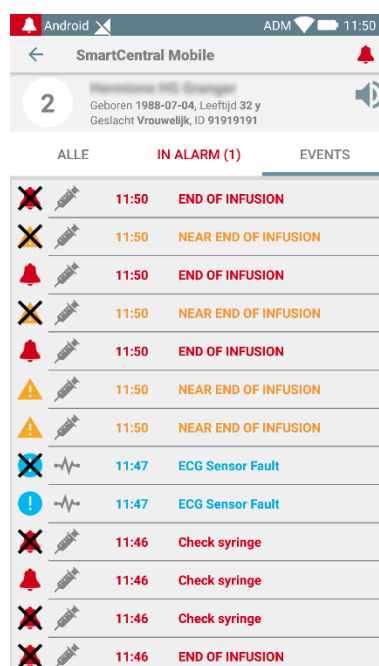

Afb. 6


1.4.1 Titel

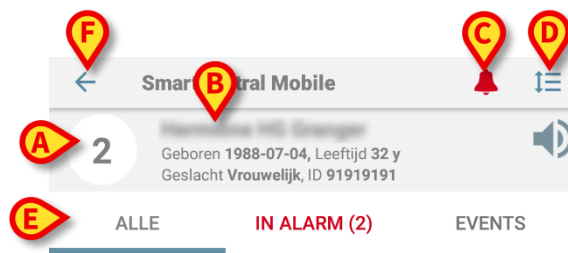

Afb. 7

In het titelgedeelte (Afb. 7) is de volgende informatie en tools beschikbaar:

- Bednummer (Afb. 7 **A**).
- Patiëntgegevens (Afb. 7 **B**).
- De rode bel-icoon (Afb. 7 **C**) geeft aan dat er minstens een medisch apparaat een alarm op een van de andere bedden is (dat hier momenteel niet is weergegeven).
- Gebruik de in Afb. 7 **D** weergegeven icoon om de gebieden van de apparaten te vergroten voor meer informatie over ieder aangesloten medisch apparaat (Afb. 8). Het type weergegeven informatie hangt af van de configuratie en het type apparaat.

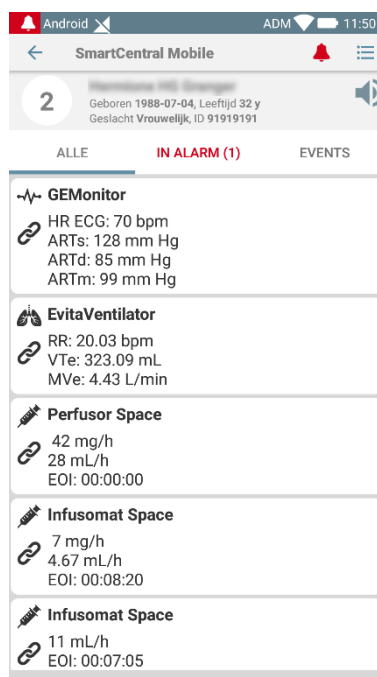

Afb. 8

- Druk opnieuw op de icoon (Afb. 7 **D**) om naar de compacte weergavemodus terug te keren.
- Gebruik de filters in Afb. 7 **E** om ofwel alle aangesloten medische hulpmiddelen of alleen de hulpmiddelen die meldingen afgeven weer te geven.
- Gebruik de terug-pijl (Afb. 7 **F**) om naar het "Central" scherm terug te gaan.

1.4.2 Lijst apparaten

In het onderste deel van het "Bed" scherm worden de afzonderlijke medische apparaten getoond als weergegeven in Afb. 9:



Afb. 9

Ieder medisch apparaat wordt binnen een "kaart" weergegeven. Iedere "kaart" bevat de volgende informatie:

- Een icoon die het type medisch apparaat weergeeft. De lijst van mogelijke iconen verandert afhankelijk van de behoeften van de zorginstelling. Hier volgen enkele veelgebruikte voorbeelden:

	Infuuspomp
	Beademingstoestel
	Machine hartminuutvolumemeting

- Een icoon die de status van het medische apparaat weergeeft. Dit zijn:


	In de wacht
	In bedrijf
	Er wordt een alarmmelding met lage prioriteit verzonden
	Er wordt een alarmmelding met middelhoge prioriteit verzonden
	Er wordt een alarmmelding met hoge prioriteit verzonden

Ook de achtergrond van de "kaart" geeft de status van het medische apparaat aan: grijs (in de wacht); wit (in bedrijf); blauw (alarm lage prioriteit); geel (alarm middelhoge prioriteit); rood (alarm hoge prioriteit).

Voor ieder medisch apparaat wordt binnen de "kaart" basisinformatie verschaft. Dit type informatie hangt van de configuratie af.
In geval van een alarm geeft de "kaart" het alarmbericht weer.

1.5 Alarmgeschiedenis

Door op iedere "kaart" te drukken, heeft u toegang tot een lijst van alle meldingen afkomstig van het medische apparaat (Afb. 10).

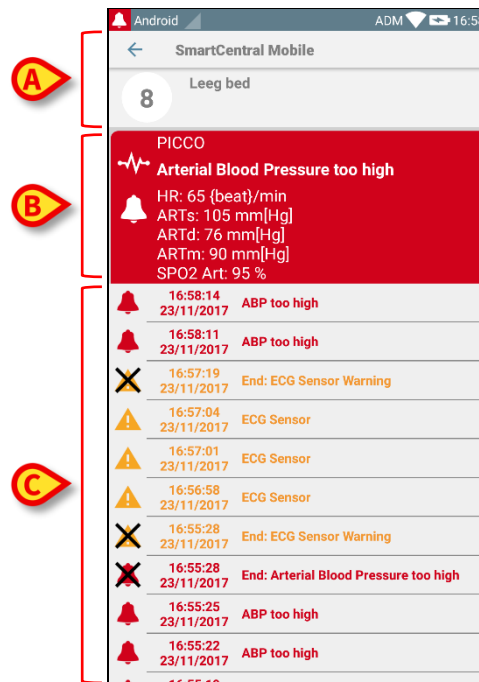

Afb. 10

Dit scherm bestaat uit drie delen.


Patiëntgegevens (Afb. 10 A).

Actuele gegevens medisch apparaat De in deze "kaart" getoonde gegevens zijn wederom afhankelijk van het type apparaat en de configuratie (Afb. 10 B).

Meldingsgeschiedenis Hier worden in chronologische volgorde alle alarmen weergegeven die zich op het apparaat hebben voorgedaan. Ieder alarm is voorzien van een korte beschrijving en het betreffende tijdstip (Afb. 10 C). Voor ieder alarm worden de begintijd en eindtijd weergegeven (zwart kruis op de icoon ✕).


“Waveforms” momentopname

- Tik op het -pictogram (indien beschikbaar - Afb. 11 **A**) om een snapshot van de betreffende curve op te roepen.

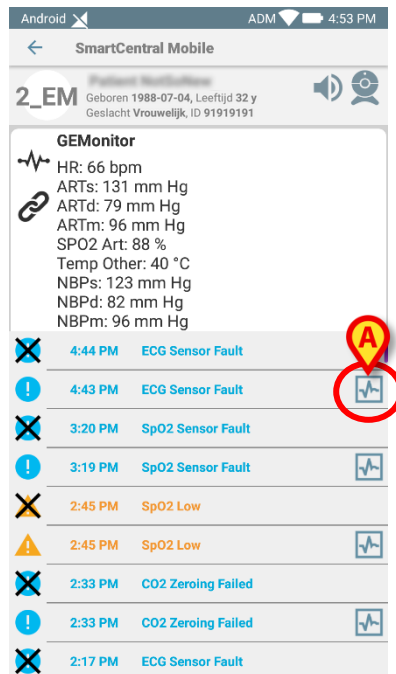

Afb. 11

Het volgende venster wordt weergegeven (Afb. 12):

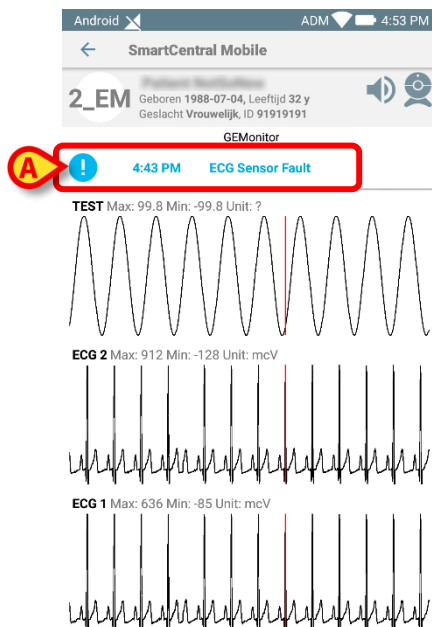


Afb. 12

Het voorval waaraan de Waveform Snapshot is gekoppeld wordt vermeld in Afb. 12 **A**.
Lees paragraaf 1.7 voor meer informatie over Waveforms.

1.6 Smart Central Video

De 'Smart Central Video'-applicatie kan worden geconfigureerd om de videostream van een webcam te ondersteunen. Deze functie maakt de visuele bewaking van het patiëntgedeelte mogelijk.

Als de 'Smart Central Video'-functie is ingeschakeld en correct is geconfigureerd voor een geselecteerde patiënt, is het scherm met de lijst met medische apparaten van een geselecteerde patiënt zoals het scherm dat hieronder wordt weergegeven (Afb. 13).

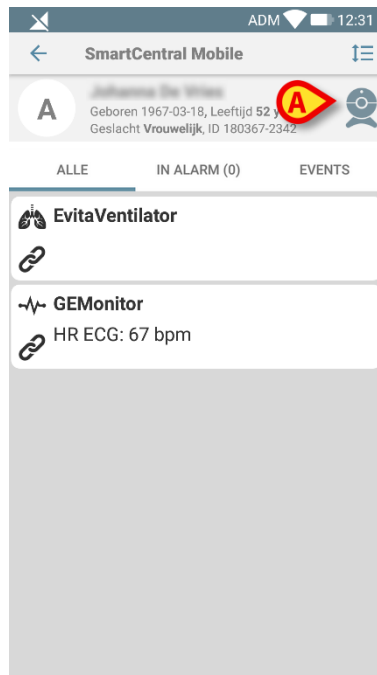

Afb. 13

Een extraknop is aanwezig in de lijst met medische apparaten.

- Tik op de knop  om de videostream van de webcam te bekijken (Afb. 14).




Afb. 14

- Tik op de terug-knop om terug te keren naar het vorige scherm.

Met de "privacy-blind"-functie kan de gebruiker de webcam van de betreffende patiënt uitschakelen: dit kan permanent of gedurende een bepaalde periode worden gedaan. Tijdens de privacy-blindmodus kan geen videostream worden bekeken. De privacy-blindmodus is standaard uitgeschakeld.


De privacy-blindknopbalk (Afb. 14 **A**) wordt hieronder weergegeven:

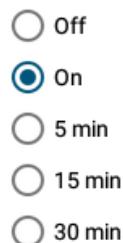

- Tik op de knop **Aan** om de privacy-blindmodus in te schakelen.

Wanneer deze optie geselecteerd, licht de knop **Aan** op.

In de privacy-blindmodus is het scherm van de webcam-videostream als volgt (Afb. 15):

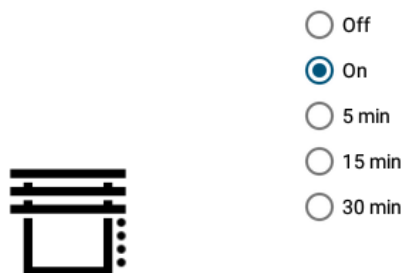

Afb. 15

- Tik op de knop **Uit** om de privacy-blindmodus uit te schakelen.

Om de privacymodus alleen voor een bepaald tijdsinterval te activeren:

- Tik op de knoppen voor **vijf minuten** of **vijftien minuten** of **dertig minuten** om de privacy-modus in te schakelen gedurende vijf, vijftien of dertig minuten.

De geselecteerde knop in de knoppenbalk licht op.

Na het geselecteerde tijdsinterval wordt de privacy-modus automatisch uitgeschakeld.


Als de webcam audiostream ondersteunt, is het bovendien mogelijk om deze te activeren  door op de knop (Afb. 14 **B**) te drukken.

1.7 Wave Forms

Smart Central Mobile kan bijna realtime Wave Forms weergeven die worden verzameld van medische apparaten. Om deze functionaliteit in te schakelen is het noodzakelijk om ten minste één golfvormparameter in het configuratiegedeelte van de stuurprogrammamogelijkheden in te schakelen.


Om toegang te ontvangen tot deze functionaliteit

- Tik op de relevante bedkaart.
- Tik dan op het pictogram aangegeven in Afb. 16 **A**.

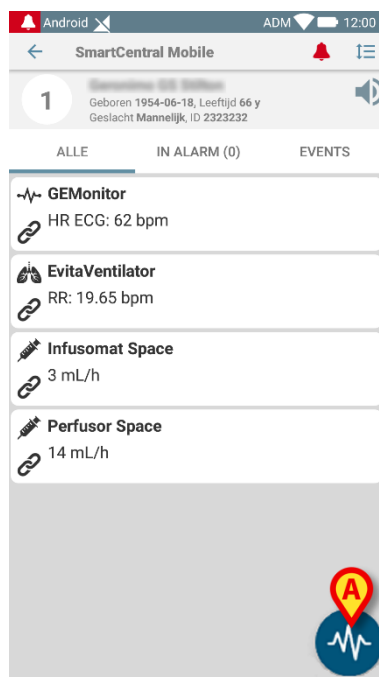


Afb. 16

Een scherm met bijna realtime Wave Forms wordt weergegeven (Afb. 17).

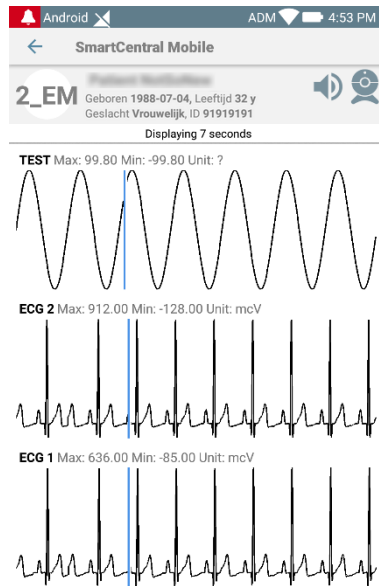


Afb. 17

U kunt de weergave van de Waveform (golfvormen) configureren zodanig dat de parameters die momenteel worden verkregen van medische apparaten worden weergegeven (Afb. 18 **A**):

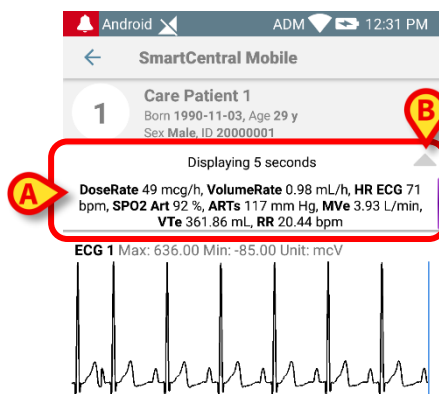

Afb. 18

Druk op het pictogram met de grijze pijl (Afb. 18 **B**) om de rij met momenteel verkregen parameters in te klappen (Afb. 19):

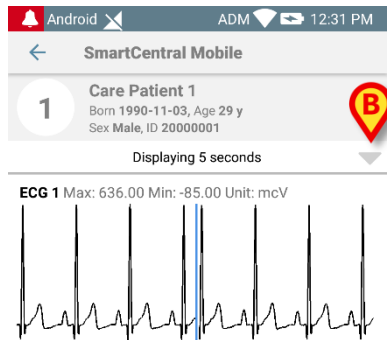

Afb. 19

Druk op het pictogram met de grijze pijl (Afb. 19 **B**) om de rij met momenteel verkregen parameters uit te breiden (Afb. 18 **A**).

U kunt dit doen met de juiste instelling van de optie WaveformFormatString System: zie het document *DSO ENG System Option* voor meer informatie.

U kunt de golfvormen die zijn verzameld via medische apparaten sorteren door de juiste instelling van de optie WaveformsSortingList System: zie het document *DSO ENG System Option* voor meer informatie.

1.8 Dempnen van meldingen op Smart Central Mobile

De meldingen kunnen in de Smart Central Mobile-instanties gedurende een bepaalde tijd en voor een specifiek bed worden gedempt. De functie "Dempnen" heeft **alléén** invloed op de Smart Central Mobile-applicatie. Smart Central-desktop blijft audiomeldingen geven en kan niet worden gedempt.


Om deze mogelijkheid in te schakelen, moet de globale parameter "ManageMobilityAlarms" op de Digistat SuiteConfigurator worden ingeschakeld. Zie document *CFG ENG Digistat Suite*.



De dempingsprocedure kan zowel op desktop- als op mobiele werkstations worden uitgevoerd, maar alleen mobiele telefoons worden beïnvloed.

1.8.1 Op desktopwerkstations.

Als de parameter "ManageMobilityAlarms" is ingeschakeld, wordt een nieuw pictogram weergegeven boven elk bedgedeelte (Afb. 20 **A**):

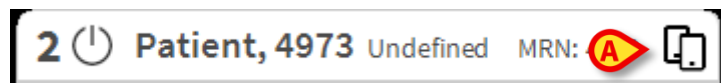

Afb. 20

Het pictogram betekent dat meldingen op Smart Central Mobile zijn ingeschakeld voor het opgegeven bed (het bednummer staat links).

- Klik op het pictogram om een nieuwe weergave te openen waarin u een keuze uit meerdere keuzes kunt selecteren. Die zijn:
 - meldingen inschakelen
 - meldingen uitschakelen voor X, Y, Z minuten.

De X-, Y-, Z-waarden worden in de configuratie gespecificeerd door de globale parameter "SilenceMobilityAlarmsIntervals" op de Digistat Suite Configurator. Zie document *CFG ENG Digistat Suite*.

- Klik op **OPSLAAN** of **ANNULEREN** om de weergave te sluiten.

Als de meldingen zijn uitgeschakeld, wordt het pictogram op de kaart van het bed rood en wordt er een aftelklok (minuten) ernaast weergegeven (Afb. 21 **A**).



Afb. 21

Wanneer het aftellen nul bereikt, wordt het pictogram weer zwart, wordt het aftellen verwijderd en worden de meldingen hersteld. In de bovenstaande afbeelding zijn

bijvoorbeeld de meldingen op Smart Central Mobile gedurende 20 minuten uitgeschakeld voor bed 2.

- Klik op het rode pictogram om de audio opnieuw in te schakelen of het aftellen van het dempen opnieuw te starten.

Wanneer de mobiele meldingen voor een bed zijn uitgeschakeld:


- Op Smart Central Desktop zijn er geen verschillen in de meldingencommunicatie.
- Op Smart Central Mobile worden de meldingen met betrekking tot het gedempte bed weergegeven, maar de audio en trillingen worden gedurende de opgegeven tijd uitgeschakeld.

1.8.2 Op mobiele werkstations

Om de meldingen op de mobiele werkstations in/uit te schakelen:

- klik op een bedkaart om naar het scherm met beddetails te navigeren.

Als de parameter **ManageMobilityAlarms** is ingeschakeld, wordt boven aan dit scherm een nieuw pictogram weergegeven naast de patiëntgegevens (Afb. 22 **A**):

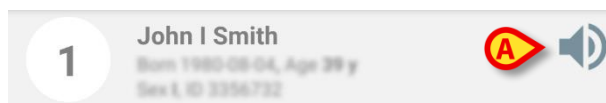


Afb. 22

- Klik op het pictogram om een nieuwe weergave te openen waarin u een keuze uit meerdere keuzes kunt selecteren. Die zijn:
 - meldingen inschakelen
 - meldingen uitschakelen voor X, Y, Z minuten.

De X-, Y-, Z-waarden worden in de configuratie gespecificeerd door de globale parameter "SilenceMobilityAlarmsIntervals" op de Digistat Suite Configurator. Zie document *CFG ENG Digistat Suite*.

- Klik op **OPSLAAN** of **ANNULEREN** om de weergave te sluiten.

Wanneer meldingen zijn uitgeschakeld, wordt het volgende pictogram weergegeven (Afb. 23). Onder het pictogram geeft een aftelklok de resterende "dempingstijd" aan:

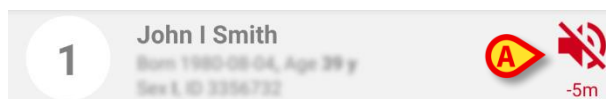

Afb. 23

In bijvoorbeeld Afb. 23 worden de meldingen 5 minuten uitgeschakeld op bed 1. Wanneer het aftellen nul bereikt, wordt het pictogram weer zwart en worden de meldingen hersteld.

Als meldingen voor een specifiek bed zijn uitgeschakeld, geeft de bijbehorende kaart ook een pictogram voor dempen weer (Afb. 24 a/b geeft het pictogram weer in de modus "Alle patiënten" - links - en de modus "Mijn patiënten" - rechts):



Afb. 24 a/b



De mogelijkheid om meldingen op mobiele apparaten te dempen is standaard uitgeschakeld. Als deze mogelijkheid is ingeschakeld, heeft de zorgorganisatie een sterke risicobeoordeling nodig om alle mogelijke risico's te beperken. Tijdens een tijdelijke demping van meldingen is het vereist dat Smart Central Desktop altijd door een gebruiker in de gaten wordt gehouden.

Unite-integratie

Wanneer Digistat is geïntegreerd met Unite en meldingen worden gegenereerd door de Axess-applicatie (of de equivalente app op Myco 2-apparaten), hebben dempingsmeldingen op Smart Central ook invloed op de Unite-integratie.

1.8.3 Aanwezigheid van verpleegkundige


Wanneer het systeem is geconfigureerd om te werken met automatische aanwezigheid van verpleegkundigen, met behulp van infrarood, wordt het geluidsdempingsmechanisme automatisch beheerd.

Wanneer de verpleegkundige een patiëntenkamer binnengaat, wordt het geluid van de waarschuwingen automatisch gedempt (hetzelfde gedrag als handmatige uitschakeling) voor dat specifieke bed. Wanneer de verpleegkundige de patiëntenkamer verlaat, worden de waarschuwingen weer ingeschakeld. Als er veel verpleegkundigen in de patiëntenkamer zijn, wordt het geluid van de waarschuwingen gedempt zolang een verpleegkundige in de patiëntenkamer is.

Het aanwezigheidsmechanisme voor verpleegkundigen is mogelijk dankzij de infraroodfunctionaliteit (aanwezig in de Myco 2- of Myco 3-apparaten). De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de smartphone zich altijd in een positie moet bevinden waar infraroodbakens zichtbaar zijn voor de smartphone zelf. De gebruiker moet vermijden om de smartphone in een tas of een gesloten zak te plaatsen.

Als de smartphone wordt gedetecteerd in een patiëntenkamer en na een geconfigureerde tijd niet meer wordt gedetecteerd, wordt de geluidsdemping automatisch uitgeschakeld. Deze beperking vermindert het risico voor verpleegkundigen om de patiëntenkamer te verlaten en de smartphone erin te vergeten.

Als de verpleegster zich in een patiëntenkamer bevindt, wordt een "verpleegster" -pictogram weergegeven naast de bednaam op de patiëntenkaart (Afb. 25 A).

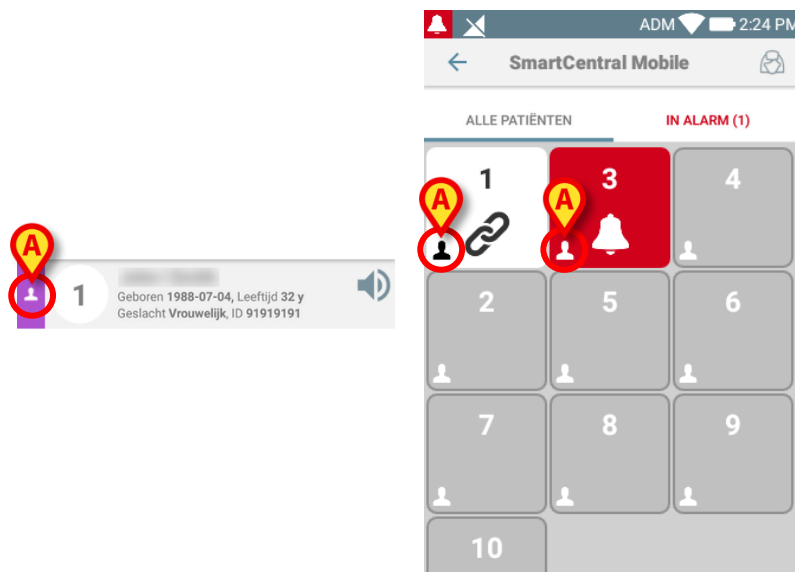

Afb. 25 a/b

1.8.4 Alarmfiltering van NFC


Het apparaat Myco 3 (of een ander Android-apparaat met NFC-sensor) ondersteunt de alarmfiltering van NFC, dat wil zeggen de mogelijkheid om de mededelingen van de Smart Central Mobile voor bepaalde tijd te onderdrukken door de detectie van een correct geconfigureerde en in de buurt van de patiënt / het bed geplaatste NFC-tag.

Mededelingen worden gedurende een geconfigureerde tijd onderdrukt, de tijd moet worden opgegeven in de NFC-tag samen met het bednummer. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, worden de mededelingen automatisch weer doorgegeven.

U kunt de mededelingen afkomstig van de betreffende patiënt of het betreffende bed als volgt onderdrukken op de Smart Central Mobile:


- Ontgrendel het mobiele apparaat en houd dit in de buurt van de NFC-tag.

Het volgende venster wordt weergegeven:

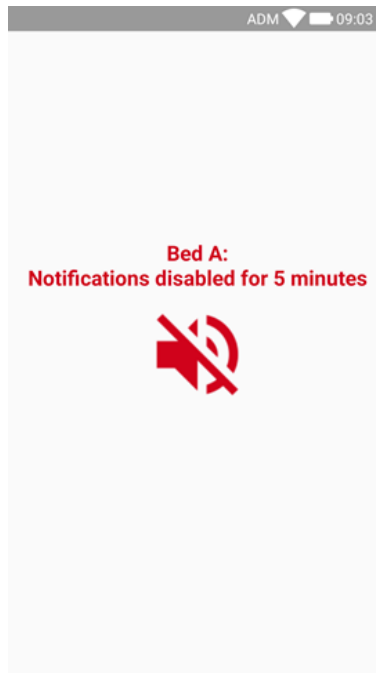

Afb. 26

Wanneer mededelingen zijn uitgeschakeld, wordt het volgende pictogram weergegeven (Afb. 27 **A**). Onder het pictogram ziet u een nummer dat de resterende “onderdrukkingstijd” aangeeft:

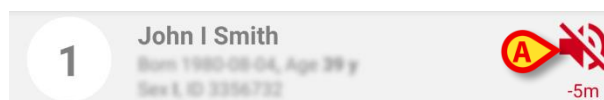

Afb. 27

Zo zijn in Afb. 23 mededelingen gedurende 5 minuten uitgeschakeld voor bed 1. Als de aflopende teller bij nul komt, wordt het pictogram weer zwart en worden de mededelingen weer doorgegeven.



Iedere keer dat het mobiele apparaat dicht bij de NFC-tag komt, wordt de resterende onderdrukkingstijd verlengd met de waarde die in de tag zelf is geconfigureerd.


Als u de doorgifte van mededelingen afkomstig van de betreffende patiënt of het betreffende bed op de Smart Central Mobile wilt herstellen (voordat de onderdrukkingstijd is verstreken),

- tik dan op het pictogram voor de onderdrukkingstijd (Afb. 27 **A**).

Alternatief:

- Ontgrendel het mobiele apparaat en houd het dicht in de buurt van een *andere* NFC-tag, waarin de ontwikkelingstijd is ingesteld op “0”.

In beide gevallen wordt het volgende venster weergegeven:

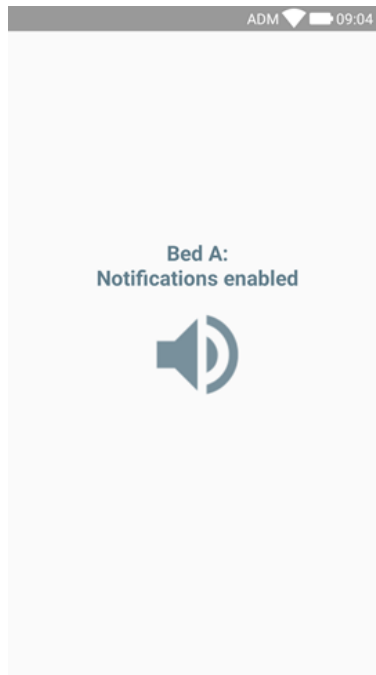


Afb. 28



De mogelijkheid om meldingen op mobiele apparaten te dempen is standaard uitgeschakeld. Als deze mogelijkheid is ingeschakeld, heeft de zorgorganisatie een sterke risicobeoordeling nodig om alle mogelijke risico's te beperken. Tijdens een tijdelijke demping van meldingen is het vereist dat Smart Central Desktop altijd door een gebruiker in de gaten wordt gehouden.

1.9 Widgets

Het product implementeert een set widgets, dwz grafische besturingselementen die bedoeld zijn om bepaalde specifieke acties van de gebruiker te vergemakkelijken.

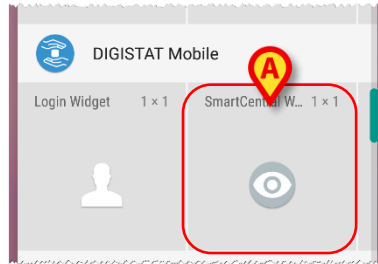

Afb. 29

In de huidige paragraaf wordt de widget met betrekking tot de Smart Central Mobile-applicatie worden getoond.

1.9.1 SmartCentral-widget

Met de SmartCentral-widget heeft de gebruiker toegang tot de Smart Central Mobile-applicatie. Om een dergelijke functie te gebruiken, moet de gebruiker de volgende acties uitvoeren:


- Druk op het pictogram in Afb. 29 **A** en laat het los op het scherm van het apparaat.

De SmartCentral-widget wordt als standaard op het scherm van het apparaat geplaatst met de grootte 1 x 1 (Afb. 30)



Afb. 30

- Druk op het pictogram in Afb. 30 **A** om naar het Smart Central Mobile-scherm te gaan (Afb. 31).

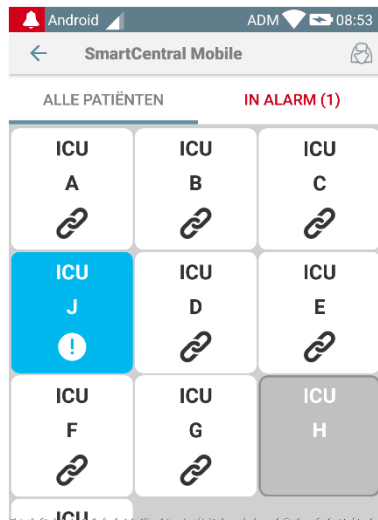


Afb. 31

In de grootte 1 x 1 wordt het aantal gealarmeerde bedden dat wordt weergegeven in de SmartCentral-widget weergegeven als een rood getal in de widget zelf (Afb. 32):




Afb. 32

- Tik in deze omstandigheden de SmartCentral-widget aan om toegang te krijgen tot het scherm van gealarmeerde bedden, als er meer dan één bed is gealarmeerd (Afb. 33) of tik het enkele gealarmeerde bed aan, als slechts één bed is gealarmeerd (Afb. 34):

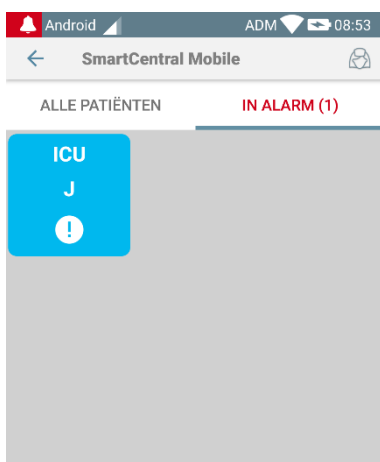


Afb. 33

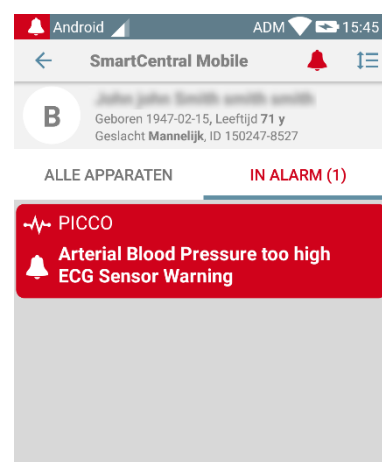

Afb. 34

- Houd het pictogram lang ingedrukt Afb. 30 en laat los om grijppunten weer te geven voor het wijzigen van de grootte van de widget (Afb. 35 - links als er geen bedden zijn gealarmeerd, rechts als sommige bedden zijn gealarmeerd):

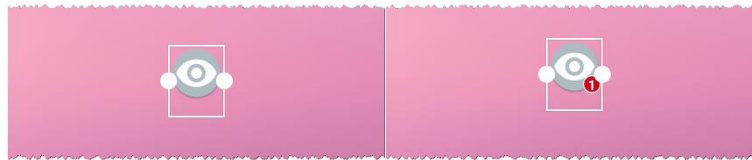

Afb. 35

- Tik op en verplaats een van de twee grijppunten en druk dan op de bureaubladachtergrond om de grootte van de widget te wijzigen in de grootte 2 x 1.

In dit geval kan de SmartCentral-widget een korte beschrijving van de oorzaak van het alarm weergeven, gedetailleerd zoals hieronder vermeld:




Afb. 36

Geen gealarmeerde bedden



Afb. 37

Eén gealarmeerd bed

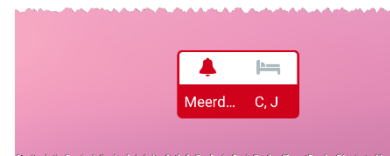

Afb. 38

Meer dan één gealarmeerd bed

Houd er rekening mee dat in de grootte 2 x 1 van de widget sommige beschrijvingen te lang kunnen zijn om correct te worden weergegeven. In dit geval wordt voorgesteld de grootte van de Widget opnieuw uit te breiden.

De SmartCentral-widget kan dan ook worden vergroot naar 3 x 1, 4 x 1 en 5 x 1:



Afb. 39