



Smart Monitor

Gebruikshandleiding

Versie 2.0

17/07/2020

Inhoud

1. Smart Monitor..... 3

1. Smart Monitor



Zie de specifieke documenten van het product voor algemene en gedetailleerde informatie over de productomgeving en de instructies voor het gebruik van de Control Bar-software. De kennis en het begrip van deze documenten is verplicht voor een correct en veilig gebruik van de Smart Monitor, zoals beschreven in dit document.

Smart Monitor toont op een enkel raster alle medische apparaten die momenteel zijn geconfigureerd binnen de specifieke Alaris Infusion Central-installatie, met de bijbehorende informatie. Als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld, wordt ook patiëntinformatie weergegeven (patiëntnaam, bed, enz ...). Andere informatie wordt weergegeven volgens de configuratiekeuzes van de zorgorganisatie die Alaris Infusion Central gebruikt. Zie Fig 1 voor een voorbeeld.

Om toegang te krijgen tot de Smart Monitor

- op de zijbalk, klik op het pictogram aangegeven in Fig 1 A.

Afdeling	Bed	Patiënt	Alarm	G	Apparaatnaam	Serienummer	Naam Medicijn	Volume Rate	Druk	Overgebleven Tijd	Identity
A		Austen, Jane JA			Infusomat Space	IP512601		0,14 mL/h	0,05 10 ³	00:14:01	
					Infusomat Space	IP1113203		2,6 mL/h	0,05 10 ³	00:10:11	
					Perfusor Space	IP1112802		0,26 mL/h	0,05 10 ³	00:09:34	
					Perfusor Space	IP1112301		0,38 mL/h	0,05 10 ³	00:07:08	
					Infusomat Space	IP1212606		3,1 mL/h	0,05 10 ³	00:13:31	
B		Dickens, Charles CD			Perfusor Space	IP1212305		16 mL/h	0,05 10 ³	00:09:28	
					Perfusor Space	IP1212904	Dobutamine	1 mL/h	0,05 10 ³	00:08:53	
					Infusomat Space	IP1212403		7,33 mL/h	0,05 10 ³	00:07:08	
					Infusomat Space	IP1212402		48 mL/h	0,05 10 ³	00:02:19	
					Infusomat Space	IP1212601		8 mL/h	0,05 10 ³	00:01:32	
C		Anderson, Poul PA			Perfusor Space	IP1312304		22 mL/h	0,05 10 ³	00:09:17	
					Infusomat Space	IP1312603		1,6 mL/h	0,05 10 ³	00:13:39	
					Infusomat Space	IP1313202		15,33 mL/h	0,05 10 ³	00:08:52	
					Perfusor Space	IP1312901		7,33 mL/h	0,05 10 ³	00:03:15	
					Infusomat Space	IP2M12402		31 mL/h	0,05 10 ³	00:02:45	
D		Heinlein, Robert RH			Infusomat Space	IP1413301	Remifentanyl	16,67 mL/h	0,05 10 ³	00:09:42	
					Infusomat Space	IP1513304		2,67 mL/h	0,05 10 ³	00:03:31	
					Perfusor Space	IP1513103		4 mL/h	0,05 10 ³	00:18:06	
					Perfusor Space	IP1512502		12 mL/h	0,05 10 ³	00:06:20	
					Perfusor Space	IP1512501		25,33 mL/h	0,05 10 ³	00:04:42	
E		Bradbury, Ray RB			Perfusor Space	IP1M12802		12 mL/h	0,05 10 ³	00:00:58	
					Perfusor Space	IP2M12701		35 mL/h	0,05 10 ³	00:00:42	
					Infusomat Space	IP2M13303		1,6 mL/h	0,05 10 ³	00:10:27	

Fig 1

Apparaten kunnen worden gegroepeerd op type, één type per groep of meer. De verschillende groepen worden weergegeven als tabbladen (Fig 1 B). Het raster in elk tabblad kan worden aangepast.

Elke rij komt overeen met een apparaat. In de hier beschreven configuratie wordt de volgende informatie verstrekt (van links naar rechts)

- Locatie (als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld)
- Bed (als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld)

- Patiënt (als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld)
- Lopende alarmsituatie met hoogste prioriteit (indien aanwezig)
- Naam apparaat
- Serienummer apparaat
- Naam infuusgeneesmiddel (indien beschikbaar)
- Volumehoeveelheid
- Circuitdruk
- Resterende tijd tot het einde van de infusie
- Sneltoets koppeling
- Als het pictogram  aanwezig is, dan is de pomp een GuardRail-pomp.

De kolommen Locatie, Bed, Patiënt en Alarm zijn altijd aanwezig. De andere kolommen worden weergegeven indien ingeschakeld in de configuratie.

Niet toegewezen apparaten worden weergegeven zonder locatie-/patiëntinformatie.

De kop van elke kolom geeft het soort informatie aan dat wordt weergegeven.



Afb. 2

Het  pictogram maakt het mogelijk om de rasterinhoud te sorteren en te filteren.

De kolom **Identity** (Identiteit - Fig 1 C) geeft aan of het apparaat al dan niet aan een patiënt is gekoppeld.

Het pictogram  geeft aan dat het apparaat niet aan een patiënt is gekoppeld. Als de rij is geselecteerd, wordt een knop **Toewijzen**  weergegeven op de opdrachtbalk. Klik op de knop om het apparaat aan een patiënt te koppelen.

Het pictogram  geeft aan dat het apparaat al aan een patiënt is gekoppeld. Als de rij is geselecteerd, wordt een knop **Associatie verwijderen**  weergegeven op de opdrachtbalk. Klik op de knop om het apparaat en de patiënt te scheiden.



De knoppen **Toewijzen** / **Associatie verwijderen** starten de Identity.Net-module, indien geïnstalleerd. Deze module, die op desktopwerkstations draait, maakt het mogelijk apparaten en patiënten te koppelen/ontkoppelen. Als de Identity.Net-module niet is geïnstalleerd op het workstation waarop de Smart Monitor-module is geïnstalleerd, hebben de knoppen **Toewijzen** / **Associatie verwijderen** geen effect.

Als er meer apparaten zijn geconfigureerd dan apparaten die op een enkel scherm kunnen worden weergegeven, wordt rechts een schuifbalk weergegeven.

De schuifknoppen weergegeven in Fig 1 **D** kunnen worden gebruikt om door de apparatenlijst te bladeren.

Als een apparaat dat momenteel niet wordt weergegeven, wordt gewaarschuwd, wordt de bijbehorende knop (omhoog of omlaag) gemarkeerd (Fig 3).



Fig 3

De knop **Filters wissen** wist alle mogelijke filters. Als een filter actief is en een gealarmeerd apparaat niet wordt weergegeven vanwege het filter, is de knop **Filters wissen** gemarkeerd (Fig 4).



Fig 4