



Smart Monitor

Gebruikshandleiding

Versie 3.0

2023-03-30

Smart Monitor



Zie de specifieke documenten van het product voor algemene en gedetailleerde informatie over de productomgeving en de instructies voor het gebruik van de Control Bar-software. De kennis en het begrip van deze documenten is verplicht voor een correct en veilig gebruik van de Smart Monitor, zoals beschreven in dit document.

Smart Monitor toont op een enkel raster alle medische apparaten die momenteel zijn geconfigureerd binnen de specifieke Alaris Infusion Central-installatie, met de bijbehorende informatie. Als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld, wordt ook patiëntinformatie weergegeven (patiëntnaam, bed, enz ...). Andere informatie wordt weergegeven volgens de configuratiekeuzes van de zorgorganisatie die Alaris Infusion Central gebruikt. Zie Fig 1 voor een voorbeeld.

Om toegang te krijgen tot de Smart Monitor

- op de zijbalk, klik op het pictogram aangegeven in Fig 1 A.

Afdeling	Bed	Patiënt	Alarm	G	Apparaatnaam	Serienummer	Naam Medicijn	Volume Rate	Druk	Overgebleven Tijd	Identity
ICU	1	Patient, 1			Infusomat Space	IP112401	Gabexate mesylate	27.33 mL/h	0.05 10^3	00:10:04	
					Perfusor Space	IP112802		0 mL/h	0.05 10^3	00:00:00	
					Infusomat Space	IP1M12401	Gabexate mesylate	0.7 mL/h	0.05 10^3	00:00:17	
	2	Patient, 2			Perfusor Space	IP212701	Diltiazem	0.4 mL/h	0.05 10^3	00:17:41	
					Infusomat Space	IP212402		3 mL/h	0.05 10^3	00:15:16	
					Infusomat Space	IP213303	Dobutamine	1.5 mL/h	0.05 10^3	00:05:57	
					Infusomat Space	IP212404		23 mL/h	0.05 10^3	00:17:58	
					Infusomat Space	IP212605	Gabexate mesylate	0.16 mL/h	0.05 10^3	00:13:06	
					Perfusor Space	IP4M12304		6 mL/h	0.05 10^3	00:04:47	
	3	Patient, 3			Infusomat Space	IP313001	Gabexate mesylate	4.8 mL/h	0.05 10^3	00:03:57	
					Infusomat Space	IP313202		16 mL/h	0.05 10^3	00:14:37	
					Infusomat Space	IP2M12605	Gabexate mesylate	32 mL/h	0.05 10^3	00:02:34	
	4	Patient, 4			Infusomat Space	IP413301	Diltiazem	31.33 mL/h	0.05 10^3	00:14:28	
					Perfusor Space	IP412902		4.3 mL/h	0.05 10^3	00:16:54	
					Perfusor Space	IP412703	Dobutamine	28.67 mL/h	0.05 10^3	00:05:21	
					Perfusor Space	IP412304		12.67 mL/h	0.05 10^3	00:03:39	
	5	Patient, 5			Perfusor Space	IP412305	Gabexate mesylate	44 mL/h	0.05 10^3	00:03:33	
					Infusomat Space	IP512601	Diltiazem	3.2 mL/h	0.05 10^3	00:08:54	
					Perfusor Space	IP512502		33.33 mL/h	0.05 10^3	00:07:29	
					Perfusor Space	IP512903	Dobutamine	24 mL/h	0.05 10^3	00:05:37	
	6	Patient, 6			Perfusor Space	IP612901	Gabexate mesylate	3.4 mL/h	0.05 10^3	00:02:11	

Fig 1

Apparaten kunnen worden gegroepeerd op type, één type per groep of meer. De verschillende groepen worden weergegeven als tabbladen (Fig 1 B). Het raster in elk tabblad kan worden aangepast.

Elke rij komt overeen met een apparaat. In de hier beschreven configuratie wordt de volgende informatie verstrekt (van links naar rechts)


- Locatie (als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld)
- Bed (als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld)
- Patiënt (als het apparaat aan een patiënt is gekoppeld)

- Lopende alarmsituatie met hoogste prioriteit (indien aanwezig)
- Naam apparaat
- Serienummer apparaat
- Naam infuusgeneesmiddel (indien beschikbaar)
- Volumehoeveelheid
- Circuitdruk
- Resterende tijd tot het einde van de infusie
- Sneltoets koppeling
- Als het pictogram  aanwezig is, dan is de pomp een GuardRail-pomp.

De kolommen Locatie, Bed, Patiënt en Alarm zijn altijd aanwezig. De andere kolommen worden weergegeven indien ingeschakeld in de configuratie.

Niet toegewezen apparaten worden weergegeven zonder locatie-/patiëntinformatie.

De kop van elke kolom geeft het soort informatie aan dat wordt weergegeven.

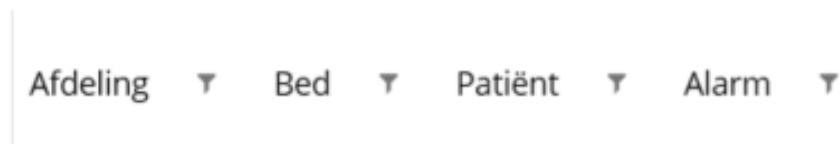

Afb. 2

Het  pictogram maakt het mogelijk om de rasterinhoud te sorteren en te filteren.

De kolom **Identity** (Identiteit - Fig 1 C) geeft aan of het apparaat al dan niet aan een patiënt is gekoppeld.

Het pictogram  geeft aan dat het apparaat niet aan een patiënt is gekoppeld. Als de rij is geselecteerd, wordt een knop **Toewijzen**  Toewijzen weergegeven op de opdrachtbalk. Klik op de knop om het apparaat aan een patiënt te koppelen.

Het pictogram  geeft aan dat het apparaat al aan een patiënt is gekoppeld. Als de rij is geselecteerd, wordt een knop **Associatie verwijderen**  Associatie verwijderen weergegeven op de opdrachtbalk. Klik op de knop om het apparaat en de patiënt te scheiden.



De knoppen **Toewijzen / Associatie verwijderen** starten de Identity.Net-module, indien geïnstalleerd. Deze module, die op desktopwerkstations draait, maakt het mogelijk apparaten en patiënten te koppelen/ontkoppelen. Als de Identity.Net-module niet is geïnstalleerd op het workstation waarop de Smart Monitor-module is geïnstalleerd, hebben de knoppen **Toewijzen / Associatie verwijderen** geen effect. Raadpleeg de handleiding van Identity.NET, *USR NLD Identity Net*, voor informatie over de procedures voor het koppelen en ontkoppelen van apparaten.

Als er meer apparaten zijn geconfigureerd dan apparaten die op een enkel scherm kunnen worden weergegeven, wordt rechts een schuifbalk weergegeven.

De schuifknoppen weergegeven in Fig 1 D kunnen worden gebruikt om door de apparatenlijst te bladeren.

Als een apparaat dat momenteel niet wordt weergegeven, wordt gewaarschuwd, wordt de bijbehorende knop (omhoog of omlaag) gemarkeerd (Fig 3).



Fig 3

De knop **Filters wissen** wist alle mogelijke filters. Als een filter actief is en een gealarmeerd apparaat niet wordt weergegeven vanwege het filter, is de knop **Filters wissen** gemarkeerd (Fig 4).



Fig 4