



Control Bar Web Brukermanual

Versjon 4.0

7/7/2025

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

Innhold

1. Control Bar Web	3
1.1 Lansering Control Bar Web	3
1.2 Brukerinnlogging.....	4
1.3 Arbeidsplass.....	6
1.3.1 Velge en modul.....	7
1.4 Control Bar	7
1.5 Hovedmeny	8
1.5.1 Bytt passord.....	8
1.5.2 Rapportering av brukerproblem.....	9
1.6 Ytterligere undermoduler	10
1.6.1 CDSS-konfigurator	10
1.6.2 Identity	12

1. Control Bar Web



For informasjon om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tiltenkt bruk, se USR NOR Digistat Care og/eller USR NOR Digistat Docs (avhengig av modulene som er installert - for Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (for Digistat Suite NA) . Kunnskapen og forståelsen av det aktuelle dokumentet er obligatorisk for en korrekt og sikker bruk av Control Bar Web, beskrevet i dette dokumentet.

1.1 Lansering Control Bar Web

Slik starter du Control Bar Web:

- Skriv inn den spesifikke adressen i nettleserens adresselinje.

Følgende side åpnes:

Fig 1

1.2 Brukerinnlogging

Brukerpålogging kreves for å aktivere systemfunksjonene.

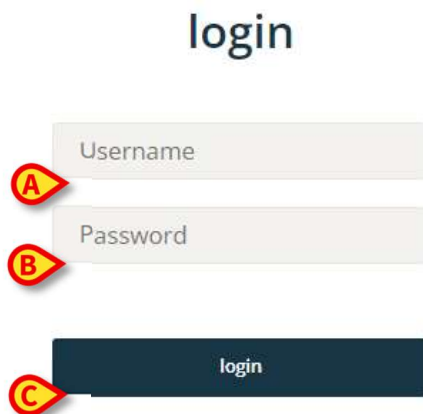


Fig 2

Å logge inn:

- Skriv inn brukernavnet ditt i «Brukernavn»-feltet (Fig 2 **A**).
- Skriv inn passordet ditt i "Passord"-feltet (Fig 2 **B**).
- Klikk på **Logg inn** -knappen (Fig 2 **C**).

Brukeren er på denne måten logget inn.



Brukernavnet og passordet utstedes av systemadministratoren. Hvis du ikke har brukernavn og passord, er du ikke autorisert til å bruke produktet.

Etter tilgang til systemet vises et akronym som tilsvarende den loggede brukeren på **brukerknappen** på kontrollinjen (akronymet er ADMIN i Fig 3 **A**).

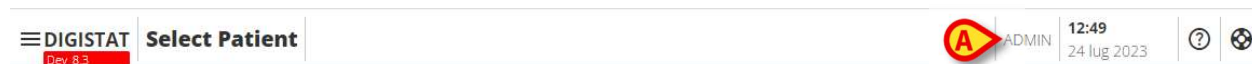


Fig 3



Brukeren hvis legitimasjon vises på brukerknappen er ansvarlig for alle handlingene som utføres på produktet. Det anbefales sterkt å logge ut før du forlater produktarbeidsstasjonen for å unngå feil bruk av systemet.



Det er mulig å konfigurere produktet til å tillate pålogging gjennom et eksternt system ("single sign on"). I disse tilfellene vises en dedikert knapp på påloggingsskjermen.

For å logge ut, klikk på **Bruker-** knappen under arbeidsøkten. Følgende meny åpnes (Fig 4).



Fig 4

- Klikk **LOGG AV** (Fig 4 **A**).

Brukerbekreftelse kreves. Etter bekreftelse logges brukeren av. For å logge på igjen, klikk på **Bruker**- knappen igjen. Skjermen vist i Fig 2 vil vises igjen.

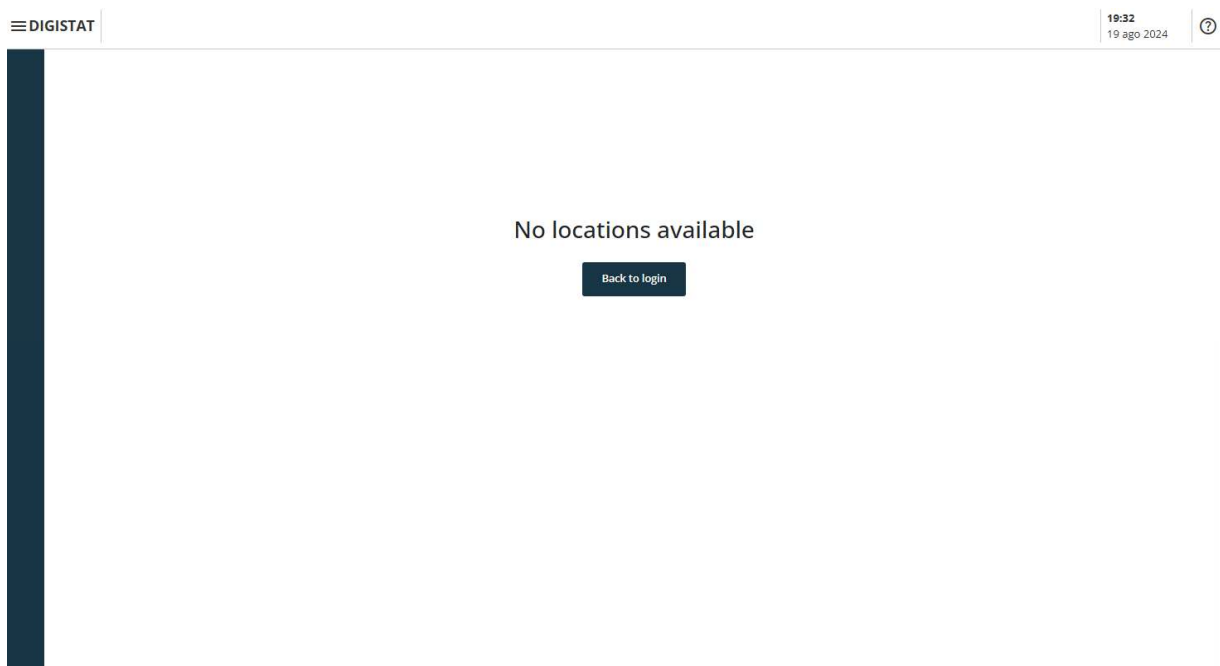


Fig. 5

Hvis brukeren ikke har en tidligere tilknyttet lokasjon (se *CGF ENG Digistat Suite MDR* håndbok for konfigurasjon av brukerens lokasjonstilknytning), er det ikke mulig å logge inn på modulen. I dette tilfellet vises meldingen "Ingen lokasjon tilgjengelig" (Fig. 5). I tillegg er det en **tilbake til pålogging** -knapp for å gå tilbake til påloggingssiden og prøve å logge inn på nytt med en ny bruker, eller med samme bruker etter lokasjonstilknytning.



En "Lokasjon" er en Digistat-konfigurasjonsenhet som tilsvarer et spesifikt område av helsevesenets struktur. Det kan for eksempel være en avdeling, en sengepost, en operasjonsblokk etc. avhengig av kravene i helsevesenets struktur. Se systemadministratorene for mer informasjon.

1.3 Arbeidsplass

Etter brukerinnlogging vises ikonene som tilsvarer de tilgjengelige Digistat Web-modulene på sidelinjen (Fig 6 **A**). Arbeidsområdet (Fig 6 **B**) viser skjermene og funksjonene til modulen som er valgt på sidelinjen.



Fig 6

Control Bar (Fig 6 **C**) er beskrevet i avsnitt 1.4 og påfølgende. Den valgte modulen er uthevet.

1.3.1 Velge en modul

Slik velger du en modul:

- Klikk på det tilsvarende ikonet i sidelinjen.

Ikonet vil bli uthevet og modulens funksjoner vil vises i arbeidsområdet.

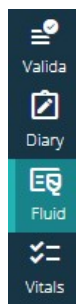


Fig 7

1.4 Control Bar

Control Bar som vises i øvre del av skjermen er felles for alle moduler. Hovedkarakteristikkene er oppført nedenfor.



Fig 8

- **Meny-** knappen (Fig 8 **A**) åpner Control Bar Web-hovedmeny. Se avsnitt 1.5 .
- **Pasient-knappen** (Fig 8 **B**). Hvis ingen pasient er valgt, kan denne knappen klikkes for å starte prosedyren for pasientvalg. Etter pasientvalg vises pasientens navn og hoveddata. For innlagte pasienter vises også sengenummer og navn på avdeling. Hvis spesifikke tilleggsfunksjoner for Control Bar Web er tilgjengelige for den valgte pasienten, kan pasientknappen klikkes for å vise en rullegardinmeny som gir tilgang til disse funksjonene (se avsnittet 1.6 for mer informasjon). Hvis et hengelåsikon  - vises ved siden av pasientens navn, betyr det at noen pasientdata/funksjoner er låst for den pasienten.
- Området angitt i Fig 8 **C** kan brukes til å signalisere at det er varsler for brukeren.
- Brukerknappen gir tilgang til pålogging/logg ut og endre passordfunksjoner (Fig 8 **D**).
- Dato - klokkeslett indikasjon (Fig 8 **E**).
- Bruk **Hjelp**-knappen (Fig 8 **F**) for å få tilgang til den elektroniske hjelpen.
- Klikk på  (Fig 8 **G**) ikon for å opprette en problemrapport som skal sendes til teknisk assistanse for støtte. Se avsnitt 1.5.2.

1.5 Hovedmeny

Meny- knappen (Fig 8 **A**) åpner følgende meny (Fig 9).

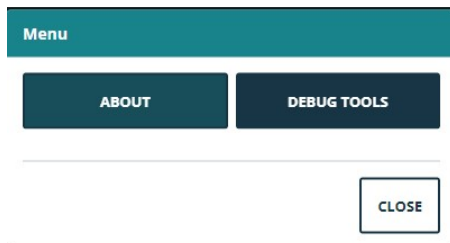


Fig 9

Om- knappen viser et vindu som inneholder informasjon om installert Digistat Suite-versjon og de relaterte lisensene (se den spesifikke dokumentasjonen for mer informasjon). Selve merkingen av produktet er About-boksen som vises på klientarbeidsstasjonene, mobile enheter og webmoduler der Digistat Suite er installert.

Feilsøkningsverktøy- knappen er reservert for systemadministratorer.

1.5.1 Bytt passord

Slik endrer du brukerpassordet:

- Klikk på **brukerknappen** på Control Bar (Fig 10 **A**).



Fig 10

- Følgende meny åpnes (Fig 11).

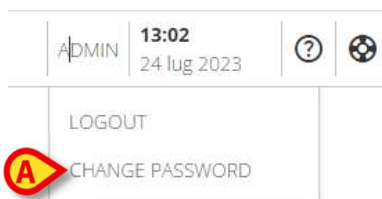


Fig 11

- Klikk på **Endre passord** (Fig 11 **A**). Følgende skjerm åpnes (Fig 12).

CHANGE PASSWORD



The form consists of three input fields and a button. The first field is labeled 'Old password' with a red circle 'A' pointing to it. The second field is labeled 'New Password' with a red circle 'B' pointing to it. The third field is labeled 'Confirm new password' with a red circle 'C' pointing to it. Below the fields is a dark blue button labeled 'SAVE' with a red circle 'D' pointing to it.

Fig 12

- Skriv inn gjeldende passord i "GAMMELT passord"-feltet (Fig 12 **A**)
- Skriv inn det nye passordet i "Nytt passord"-feltet (Fig 12 **B**).
- Skriv inn det nye passordet igjen i feltet "Bekreft nytt passord" (Fig 12 **C**).
- Klikk **Lagre** (Fig 12 **D**).

1.5.2 Rapportering av brukerproblem

Hvis tilstede, vil  ikonet på Control Bar (Fig 13 **A**) gjør det mulig å lage en "problem"-rapport og i tilfelle motta teknisk støtte.



Fig 13



Tilstedeværelsen av ikonet avhenger av systemalternativet `EnableUserIssueReporting`. Se systemadministratorene for mer informasjon.

Å gjøre det:

- Klikk på  ikon (Fig 13 **A**). Følgende vindu åpnes (Fig 14).

Fig 14

- Skriv inn en beskrivelse av problemet i "Beskrivelse"-feltet (Fig 14 **A**).
- Klikk **Send** (Fig 14 **B**).

En bekreftelse er gitt, inkludert et problem-ID-nummer.

1.6 Ytterligere undermoduler

Undermodulene beskrevet i denne delen kan være til stede eller ikke, avhengig av konfigurasjonen av produktet i helseorganisasjonen. Hver undermodul kan åpnes ved å klikke på et spesifikt meny punkt på en rullegardinmeny som vises ved siden av pasientknappen. De er pasientrelaterte, dvs. de er kun tilgjengelige hvis en pasient allerede er valgt.

1.6.1 CDSS-konfigurator

CDSS Configurator-undermodulen kan aktiveres ved konfigurasjon som en ekstra del av Control Bar Web. Slik åpner du CDSS-konfiguratorens undermodul:

- Velg den aktuelle pasienten.



Se brukerhåndboken for USR NOR Patient Explorer Web for prosedyren for valg av pasient (dokument USR NOR Patient Explorer Web).

Etter pasientvalg, hvis ytterligere Control Bar-undermoduler er tilgjengelige, vises ikonet på pasientknappen (Fig. 15 **A**).





Fig. 15

- Klikk på  -ikonet.

Et rullegardinwindu vises som viser de tilgjengelige ekstra undermodulene (Fig. 16).



Fig. 16

- Klikk på "CDSS Configuration (Fig. 16 A).

Følgende vindu vises som viser reglene knyttet til den valgte pasienten (Fig. 17).

RULES		
✓	RANGE RULE RANGE This rule permits to configure thresholds per parameter	  
✓	NEWS RULE NEWS This rule permits to calculate automatically NEWS score	  
✓	MULTI PARAMETER RULE MULTI This rule permits to configure one or more logical expressions	  

CLOSE

Fig. 17

Se CDSS Configurator brukerveiledning for fullstendig beskrivelsen og instruksjonene for bruk av denne undermodulen (dokument *USR NOR CDSS Web*).

1.6.2 Identity

Identity-undermodulen kan aktiveres ved konfigurasjon som en ekstra del av Control Bar Web. Slik åpner du undermodulen Identity:

- Velg den aktuelle pasienten.



Se brukerhåndboken for Patient Explorer Web for prosedyren for valg av pasient (dokument: USR NOR Patient Explorer Web).

Etter pasientvalg, hvis ytterligere Control Bar-undermoduler er tilgjengelige, vises ikonet på pasientknappen (Fig. 18 **A**). 



Fig. 18

- Klikk på  -ikonet.

Et rullegardinwindu vises som viser de tilgjengelige tilleggsseksjonene (Fig. 19).



Fig. 19

- Klikk på "Associated devices (Fig. 19 **A**).

Følgende vindu vises med en liste over enhetene som er knyttet til den valgte pasienten (Fig. 20).

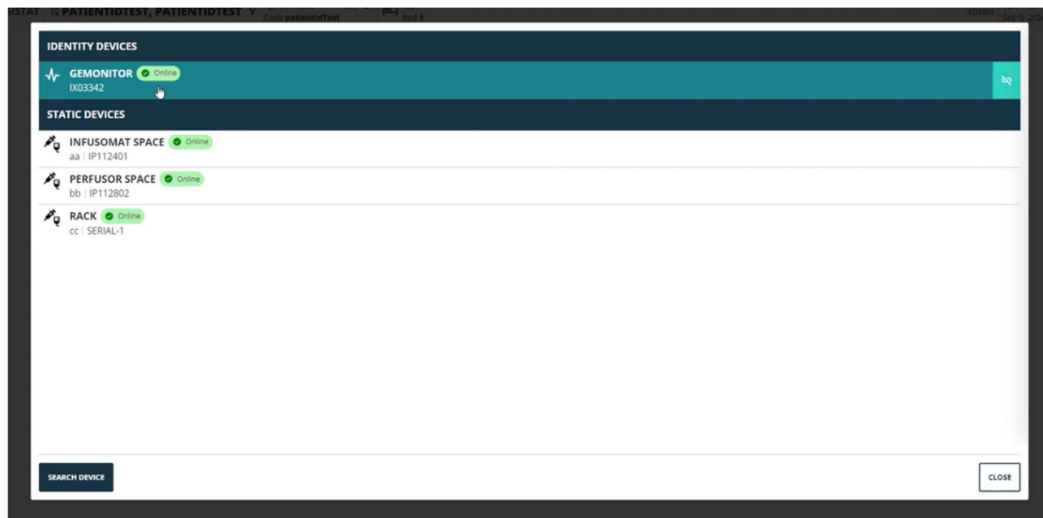


Fig. 20

Se Identity-brukerhåndboken for den fullstendige beskrivelsen og instruksjonene for bruk av denne undermodulen (dokument *USR NOR Identity Web*).