



Smart Monitor

Brukerhåndbok

Versjon 4.0

2024-12-02


Smart Monitor



For informasjon om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tiltenkt bruk, se *USR NOR Digistat Care* og/eller *USR NOR Digistat Docs* (avhengig av modulene som er installert - for *Digistat Suite EU*) eller *USR ENG Digistat Suite Na* (for *Digistat Suite Na*). Kunnskapen og forståelsen av det aktuelle dokumentet er obligatorisk for en riktig og sikker bruk av *Smart Monitor*, beskrevet i dette dokumentet.

Modulen SMART MONITOR viser alle de medisinske apparatene som for øyeblikket er konfigurert i den bestemte Digistat Suite-installasjonen på et enkelt rutenett. Hvis enheten er tilknyttet en pasient, vises pasientinformasjonen også (pasientnavn, seng osv.). Annen informasjon vises i henhold til konfigurasjonsvalgene til helseinstitusjonen som bruker Digistat Suite (Fig. 1). For å få tilgang til Smart Monitor:

- Klikk på ikonet som er angitt i sidefeltet Fig. 1 A.

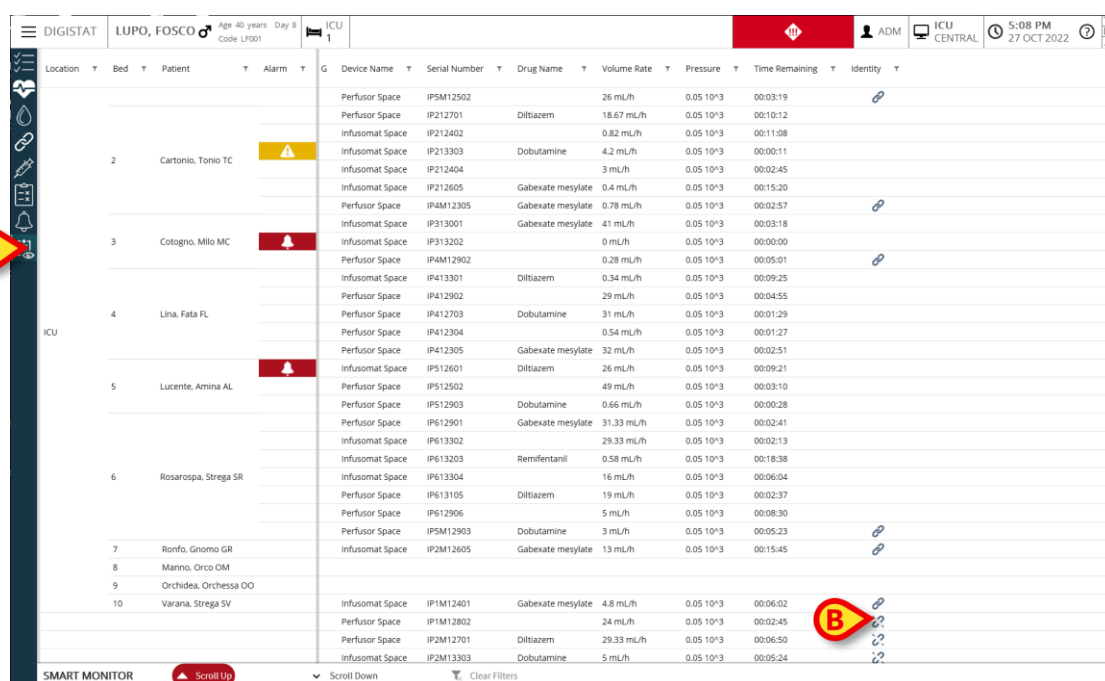

Location	Bed	Patient	Alarm	G	Device Name	Serial Number	Drug Name	Volume Rate	Pressure	Time Remaining	Identity
ICU	2	Cartonio, Tonio TC			Perfusor Space	IP5M12502		26 mL/h	0.05 10³	00:03:19	
					Perfusor Space	IP212701	Diltiazem	18.67 mL/h	0.05 10³	00:10:12	
					Infusomat Space	IP212402		0.82 mL/h	0.05 10³	00:11:08	
					Infusomat Space	IP213303	Dobutamine	4.2 mL/h	0.05 10³	00:00:11	
					Infusomat Space	IP212404		3 mL/h	0.05 10³	00:02:45	
	3	Cotogno, Milio MC			Infusomat Space	IP212605	Gabexate mesylate	0.4 mL/h	0.05 10³	00:15:20	
					Perfusor Space	IP4M12305	Gabexate mesylate	0.78 mL/h	0.05 10³	00:02:57	
					Infusomat Space	IP313001	Gabexate mesylate	41 mL/h	0.05 10³	00:03:18	
					Infusomat Space	IP313202		0 mL/h	0.05 10³	00:00:00	
					Perfusor Space	IP4M12902		0.28 mL/h	0.05 10³	00:05:01	
ICU	4	Lina, Fata FL			Infusomat Space	IP413301	Diltiazem	0.34 mL/h	0.05 10³	00:09:25	
					Perfusor Space	IP412902		29 mL/h	0.05 10³	00:04:55	
					Perfusor Space	IP412703	Dobutamine	31 mL/h	0.05 10³	00:01:29	
					Perfusor Space	IP412304		0.54 mL/h	0.05 10³	00:01:27	
					Perfusor Space	IP412305	Gabexate mesylate	32 mL/h	0.05 10³	00:02:51	
	5	Lucente, Amina AL			Infusomat Space	IP512601	Diltiazem	26 mL/h	0.05 10³	00:09:21	
					Perfusor Space	IP512502		49 mL/h	0.05 10³	00:03:10	
					Perfusor Space	IP512903	Dobutamine	0.66 mL/h	0.05 10³	00:00:28	
					Perfusor Space	IP612901	Gabexate mesylate	31.33 mL/h	0.05 10³	00:02:41	
					Infusomat Space	IP613302		29.33 mL/h	0.05 10³	00:02:13	
ICU	6	Rosarospa, Strega SR			Infusomat Space	IP613203	Remifentanyl	0.58 mL/h	0.05 10³	00:18:38	
					Infusomat Space	IP613304		16 mL/h	0.05 10³	00:06:04	
					Perfusor Space	IP613105	Diltiazem	19 mL/h	0.05 10³	00:02:37	
					Perfusor Space	IP612906		5 mL/h	0.05 10³	00:08:30	
					Perfusor Space	IP5M12903	Dobutamine	3 mL/h	0.05 10³	00:05:23	
	7	Ronfo, Gnomo GR			Infusomat Space	IP2M12605	Gabexate mesylate	13 mL/h	0.05 10³	00:15:45	
	8	Manno, Orco OM									
	9	Orchidea, Orchessa OO									
	10	Varana, Strega SV			Infusomat Space	IP1M12401	Gabexate mesylate	4.8 mL/h	0.05 10³	00:06:02	
					Perfusor Space	IP1M12802		24 mL/h	0.05 10³	00:02:45	
ICU					Perfusor Space	IP2M12701	Diltiazem	29.33 mL/h	0.05 10³	00:06:50	
					Infusomat Space	IP2M13303	Dobutamine	5 mL/h	0.05 10³	00:05:24	

Fig. 1

Enheter kan grupperes etter typer: Akkurat som eksempel er én type per gruppe, men to eller flere typer per gruppe også mulig. Siden relatert til hver gruppe vises i forskjellige faner (Fig. 1 B): for hver side kan detaljene for det viste rutenettet tilpasses fullstendig.

Hver rad tilsvarende en enhet. I konfigurasjonen som beskrives her, er følgende informasjon gitt (fra venstre til høyre)

- Lokasjon (hvis enheten er tilknyttet en pasient).
- Seng (hvis enheten er tilknyttet en pasient).
- Pasient (hvis enheten er tilknyttet en pasient).
- Alarmen med høyest prioritet som foreligger (hvis aktuelt).

- Enhetsnavn.
- Enhetens serienummer.
- Navn på infundert legemiddel (hvis kjent).
- Volumhastighet.
- Kretstrykk.
- Gjenværende tid til infusjonsslutt.
- Tilknyttingsindikator.
- Ikonet  vises når den myke grensen (konfigurert på infusjonspumpen) overskrides.

Kolonnene Sted, Seng, Pasient og Alarm er alltid til stede. De andre kolonnene vises hvis de er aktivert av konfigurasjon (via SmartMonitorConfig-systemalternativet).

Enheter som ikke er tilknyttet vises uten informasjon om lokasjon/pasient.

Overskriften til hver kolonne angir typen informasjon som vises.

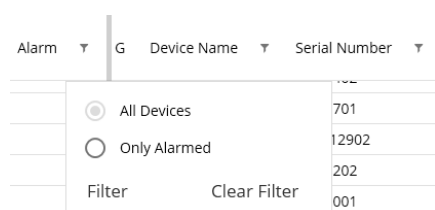


Fig. 2

Ikonet  gjør det mulig å sortere og filtrere rutenettinnholdet.

Identitet-kolonnen (siste til høyre – Fig. 1 B) indikerer om enheten allerede er tilknyttet en pasient eller ikke.

Ikonet  indikerer at enheten ikke er tilknyttet en pasient. Hvis raden er valgt, vises en **Tildel**-knapp på kommandolinjen. Klikk på knappen for å knytte enheten til en pasient.

Ikonet  indikerer at enheten allerede er tilknyttet en pasient. Hvis raden er valgt, vises en **Fjern tilknytning**-knapp på kommandolinjen. Klikk på knappen for å fjerne tilknytningen.



Knappene **Tilordne/Fjern** tilordning starter Identity.Net-modulen, hvis den er installert. En slik modul har ansvaret for å sette eller deaktivere på en stasjonær arbeidsstasjon en assosiasjon mellom enhet og pasient. Hvis Identity.Net ikke er installert på arbeidsstasjonen som er vert for Smart Monitor, har ikke knappene **Tildel/Fjern** tilordning noen effekt.

Hvis flere enheter er konfigurert enn de som kan vises på en enkelt skjerm, vises et rullefelt til høyre. Rulleknappene vist i Fig. 3 A kan brukes til å bla gjennom enhetslisten.

Hvis en alarm sendes til en enhet som for øyeblikket ikke vises, uthves den tilhørende rulleknappen (enten opp eller ned) (Fig. 3).



Fig. 3

Knappen **Fjern filtrene** tømmer alle mulige filtre. Hvis et filter er aktivt og en enhet med alarm ikke vises på grunn av filteret, uthves **Fjern filtrene**-knappen (Fig. 4 A).



Fig. 4