



Smart Monitor

Brukerhåndbok

Versjon 1.0

2023-03-30


Smart Monitor



For generell og detaljert informasjon om produktmiljøet og instruksjoner for bruk av Control Bar-programvaren, se spesifikke dokumenter for produktet. Kunnskap om og forståelse av disse dokumentene er obligatorisk for en korrekt og sikker bruk av module Infusion, beskrevet i dette dokumentet.

Modulen SMART MONITOR viser alle de medisinske apparatene som for øyeblikket er konfigurert i den bestemte Digistat Suite-installasjonen på et enkelt rutenett. Hvis enheten er tilknyttet en pasient, vises pasientinformasjonen også (pasientnavn, seng osv.). Annen informasjon vises i henhold til konfigurasjonsvalgene til helseinstitusjonen som bruker Digistat (Fig. 1). For å få tilgang til Smart Monitor:

- Klikk på ikonet som er angitt i sidefeltet Fig. 1 A.

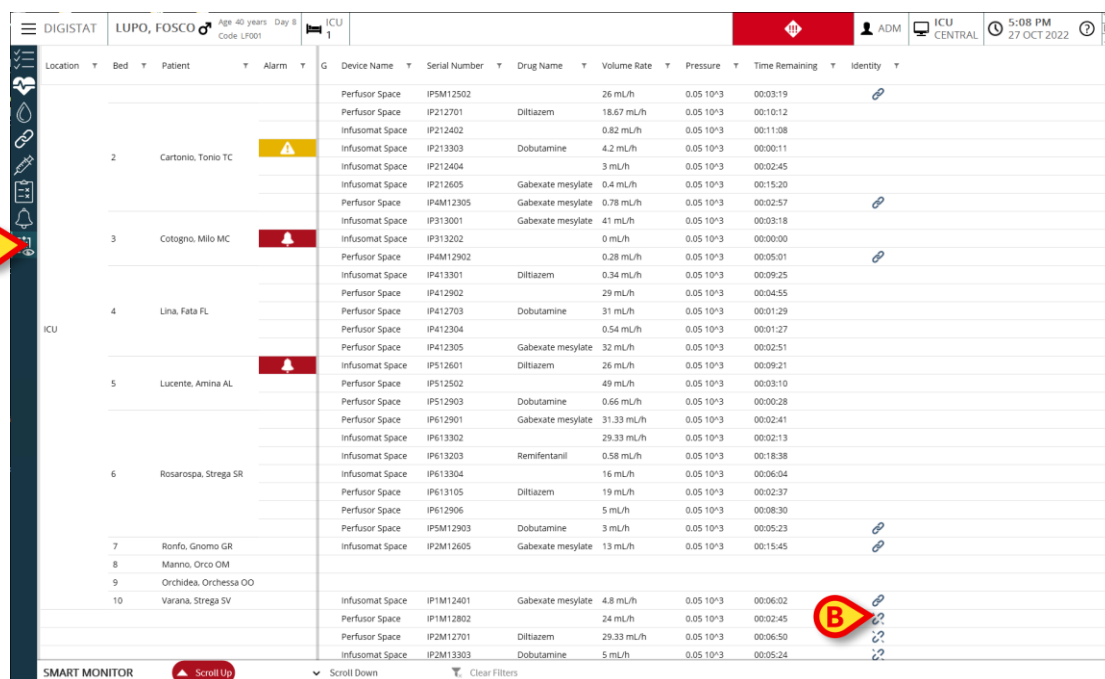

Location	Bed	Patient	Alarm	G	Device Name	Serial Number	Drug Name	Volume Rate	Pressure	Time Remaining	Identity
ICU	2	Cartonio, Tonio TC			Perfusor Space	IP5M12502		26 mL/h	0.05 10^3	00:03:19	
					Perfusor Space	IP212701	Diltiazem	18.67 mL/h	0.05 10^3	00:10:12	
					Infusomat Space	IP212402		0.82 mL/h	0.05 10^3	00:11:08	
					Infusomat Space	IP213303	Dobutamine	4.2 mL/h	0.05 10^3	00:00:11	
					Infusomat Space	IP212404		3 mL/h	0.05 10^3	00:02:45	
	3	Cotogno, Milo MC			Infusomat Space	IP212605	Gabexate mesylate	0.4 mL/h	0.05 10^3	00:15:20	
					Perfusor Space	IP4M12305	Gabexate mesylate	0.78 mL/h	0.05 10^3	00:02:57	
					Infusomat Space	IP313001	Gabexate mesylate	41 mL/h	0.05 10^3	00:03:18	
					Infusomat Space	IP313202		0 mL/h	0.05 10^3	00:00:00	
					Perfusor Space	IP4M12902		0.28 mL/h	0.05 10^3	00:05:01	
ICU	4	Lina, Fata FL			Infusomat Space	IP413301	Diltiazem	0.34 mL/h	0.05 10^3	00:09:25	
					Perfusor Space	IP412902		29 mL/h	0.05 10^3	00:04:55	
					Perfusor Space	IP412703	Dobutamine	31 mL/h	0.05 10^3	00:01:29	
					Perfusor Space	IP412304		0.54 mL/h	0.05 10^3	00:01:27	
					Perfusor Space	IP412305	Gabexate mesylate	32 mL/h	0.05 10^3	00:02:51	
	5	Lucente, Amina AL			Infusomat Space	IP512601	Diltiazem	26 mL/h	0.05 10^3	00:09:21	
					Perfusor Space	IP512502		49 mL/h	0.05 10^3	00:03:10	
					Perfusor Space	IP512903	Dobutamine	0.66 mL/h	0.05 10^3	00:00:28	
					Perfusor Space	IP612901	Gabexate mesylate	31.33 mL/h	0.05 10^3	00:02:41	
					Infusomat Space	IP613302		29.33 mL/h	0.05 10^3	00:02:13	
ICU	6	Rosarospa, Strega SR			Infusomat Space	IP613203	Remifentanyl	0.58 mL/h	0.05 10^3	00:18:38	
					Infusomat Space	IP613304		16 mL/h	0.05 10^3	00:06:04	
					Perfusor Space	IP613105	Diltiazem	19 mL/h	0.05 10^3	00:02:37	
					Perfusor Space	IP612906		5 mL/h	0.05 10^3	00:08:30	
					Perfusor Space	IP5M12903	Dobutamine	3 mL/h	0.05 10^3	00:05:23	
	7	Ronfo, Gnomo GR			Infusomat Space	IP2M12605	Gabexate mesylate	13 mL/h	0.05 10^3	00:15:45	
					Infusomat Space	IP1M12401	Gabexate mesylate	4.8 mL/h	0.05 10^3	00:06:02	
					Perfusor Space	IP1M12802		24 mL/h	0.05 10^3	00:02:45	
					Perfusor Space	IP2M12701	Diltiazem	29.33 mL/h	0.05 10^3	00:06:50	
					Infusomat Space	IP2M13303	Dobutamine	5 mL/h	0.05 10^3	00:05:24	

Fig. 1

Hver rad tilsvarer en enhet. I konfigurasjonen som beskrives her, er følgende informasjon gitt (fra venstre til høyre)

- Lokasjon (hvis enheten er tilknyttet en pasient).
- Seng (hvis enheten er tilknyttet en pasient).
- Pasient (hvis enheten er tilknyttet en pasient).
- Alarmen med høyest prioritet som foreligger (hvis aktuelt).
- Enhetsnavn.
- Enhetens serienummer.
- Navn på infundert legemiddel (hvis kjent).
- Volumhastighet.
- Kretstrykk.

- Gjenværende tid til infusjonsslutt.
- Tilknyttingsindikator.
- Ikonet  vises når den myke grensen (konfigurert på infusjonspumpen) overskrides.

Enheter som ikke er tilknyttet vises uten informasjon om lokasjon/pasient.

Overskriften til hver kolonne angir typen informasjon som vises.

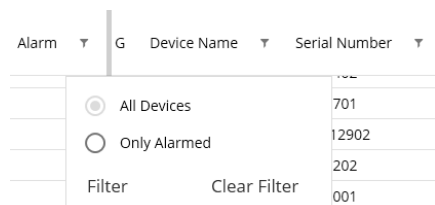


Fig. 2

Ikonet  gjør det mulig å sortere og filtrere rutenettinnholdet.

Identitet-kolonnen (siste til høyre – Fig. 1 **B**) indikerer om enheten allerede er tilknyttet en pasient eller ikke.

Ikonet  indikerer at enheten ikke er tilknyttet en pasient. Hvis raden er valgt, vises en **Tildel**-knapp på kommandolinjen. Klikk på knappen for å knytte enheten til en pasient.

Ikonet  indikerer at enheten allerede er tilknyttet en pasient. Hvis raden er valgt, vises en **Fjern tilknytning**-knapp på kommandolinjen. Klikk på knappen for å fjerne tilknytningen.

Hvis flere enheter er konfigurert enn de som kan vises på en enkelt skjerm, vises et rullefelt til høyre. Rulleknappene vist i Fig. 3 **A** kan brukes til å bla gjennom enhetslisten.

Hvis en alarm sendes til en enhet som for øyeblikket ikke vises, utheves den tilhørende rulleknappen (enten opp eller ned) (Fig. 3).



Fig. 3

Knappen **Fjern filtrene** tømmer alle mulige filtre. Hvis et filter er aktivt og en enhet med alarm ikke vises på grunn av filteret, utheves **Fjern filtrene**-knappen (Fig. 4 **A**).



Fig. 4