



Smart Central Mobile

Instrukcja obsługi

Wersja 2.0

2022-03-31

Spis treści

1. Smart Central Mobile.....	3
1.1 Wprowadzenie	3
1.2 Uruchomienie aplikacji.....	3
1.3 Ekran „centralny”	4
1.4 Lista wyrobów medycznych	7
1.4.1 Nagłówek	8
1.4.2 Lista wyrobów	10
1.4.3 Przycisk menu	11
1.5 Historia zdarzeń urządzenia.....	12
1.6 Wideo Smart Central	15
1.7 Przebiegi	17
1.8 Wyciszanie powiadomień pojawiających się w Smart Central Mobile	20
1.8.1 Na stacjonarnych stacjach roboczych.....	20
1.8.2 Na mobilnych stacjach roboczych.....	21
1.8.3 Obecność pielęgniarki.....	22
1.8.4 Filtrowanie alarmów NFC.....	23
1.9 Widżety.....	26
1.9.1 Widżet Smart Central	26
1.10 Załącznik – Przykłady procedur pracy użytkownika	29
1.10.1 Główne cechy aplikacji	29
1.10.2 Funkcja transmisji wideo	31
1.10.3 Przebiegi	31
1.10.4 Wyciszenie powiadomienia	32

1. Smart Central Mobile



Informacje na temat środowiska Produktu, środków ostrożności, ostrzeżeń i przeznaczenia znajdują się w dokumencie *USR POL Digistat Care (dla pakietu Digistat Suite EU)* lub *USR ENG Digistat Suite NA (dla pakietu Digistat Suite NA)*. Znajomość i zrozumienie odpowiedniego dokumentu są obowiązkowe, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z aplikacji inteligentnej centrali mobilnej Smart Central Mobile, opisanej w tym dokumencie.


1.1 Wprowadzenie

Smart Central Mobile wspomaga zarządzanie alarmami, dostarczając informacje kontekstowe z wielu źródeł i prezentując je personelowi w jasny i zwięzły sposób.

1.2 Uruchomienie aplikacji

W celu uruchomienia aplikacji Smart Central Mobile

- dotknij odpowiedniego wiersza na ekranie urządzenia podręcznego.

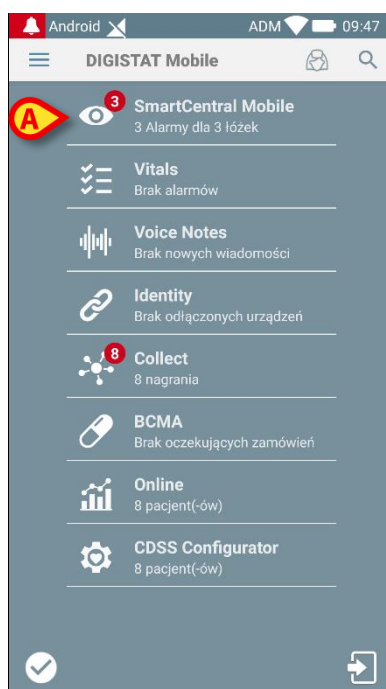


Rys. 1

Otworzy się ekran Smart Central pokazany na Rys. 2 lub Rys. 3. W przypadku dotknięcia wiersza aplikacji podczas wywołanego stanu alarmowego (wskazywanego za pomocą czerwonej cyfry na symbolu aplikacji) na ekranie Smart Central pojawi się lista łóżek z włączonym alarmem.


1.3 Ekran „centralny”

Ekran centralny wyświetla schematyczne podsumowanie stanu wyrobów medycznych podłączonych do każdego łóżka i skonfigurowanych w specyficznym urządzeniu podręcznym. Jeżeli wszystkie łóżka w domenie są przypisane do użytkownika, to ekran centralny przedstawia pacjentów jako zestaw kwadratów (Rys. 2).

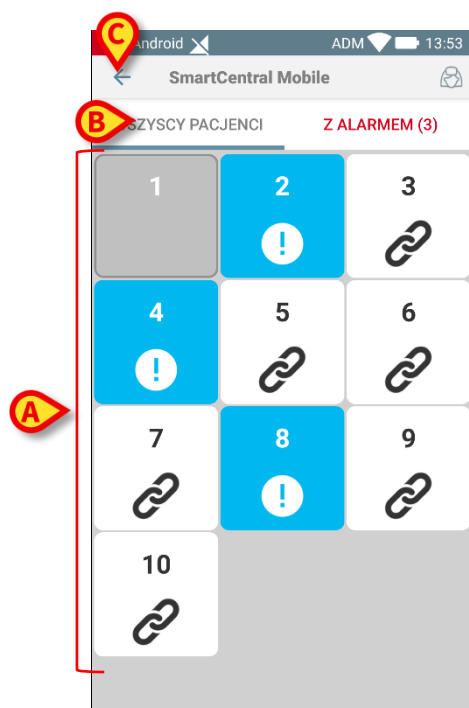

Rys. 2

Jeżeli NIE wszystkie łóżka w domenie są przypisane do użytkownika (tzn. bieżący użytkownik wykluczył jedno lub więcej łóżek przy użyciu „funkcji przypisywania pacjentów”), wówczas ekran centralny przedstawia łóżka jako zestaw prostokątów (Rys. 3). „Funkcję przypisywania pacjentów” opisano w dokumencie *USR POL Mobile Launcher*.

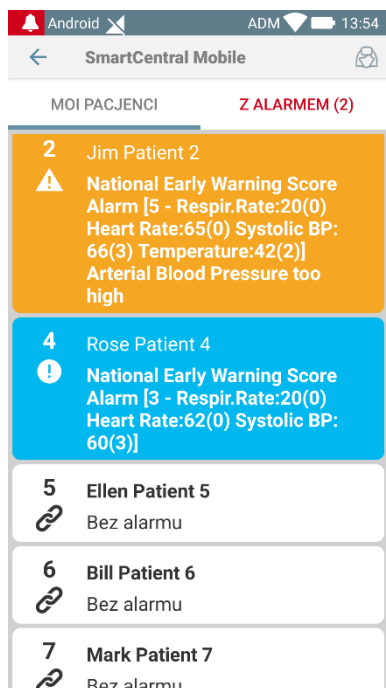


Rys. 3

Kwadraty lub prostokąty wyświetlane na ekranie reprezentują łóżka skonfigurowane w urządzeniu podręcznym (Rys. 2 **A**). Widoczne na pojedynczym ekranie kwadraty/prostokąty tworzą „domenę” łóżek podlegającą urządzeniu podręcznemu. „Domenę” można określić za pomocą konfiguracji.

Liczba lub litera widoczna wewnątrz kwadratu/prostokąta wskazuje numer lub literę łóżka. Na każdym kwadracie lub prostokącie stan podłączonych wyrobów medycznych jest podawany w formie graficznej za pomocą kolorowego tła i odpowiedniej ikony:

ICU 10	Wszystkie wyroby medyczne podłączone do łóżka są w trybie oczekiwania.
ICU 6 🔗	Działa przynajmniej jeden podłączony wyrób medyczny.
3 !	Przynajmniej jeden z podłączonych wyrobów medycznych wysyła alarm o niskim priorytecie.
ICU 2 ⚠️	Przynajmniej jeden z podłączonych wyrobów medycznych wysyła alarm o średnim priorytecie.
ICU 4 🔔	Przynajmniej jeden z podłączonych wyrobów medycznych wysyła alarm o wysokim priorytecie.

W pierwszym przypadku pokazanego powyżej schematu żadne urządzenie nie wysyła danych z łóżek. Jeżeli użytkownik dotknie danego prostokąta w tej sytuacji, aplikacja Smart Central wyświetli następujący ekran:

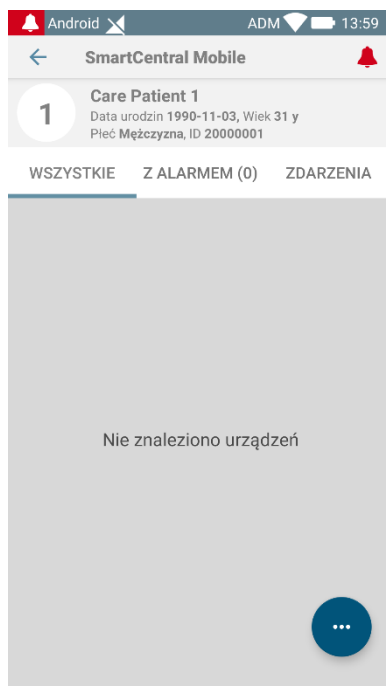

Rys. 4

Można użyć filtrów pokazanych na Rys. 2 **B**, aby wyświetlić wszystkie skonfigurowane łóżka lub tylko te, które wysyłają alarm.


Można skonfigurować aplikację Smart Central tak, aby wybudzała ekran w przypadku włączenia alarmu dotyczącego użytkownika, gdy urządzenie mobilne znajduje się na płaskim nośniku (biurko, stół itp.).

Wyjście

Dotknij przycisku **Wyjście** (Rys. 2 **C**), aby zamknąć aplikację.

1.4 Lista wyrobów medycznych

Dotknij jednego z kwadratów na ekranie centralnym, aby wyświetlić listę wyrobów medycznych podłączonych do danego łóżka (Rys. 5).

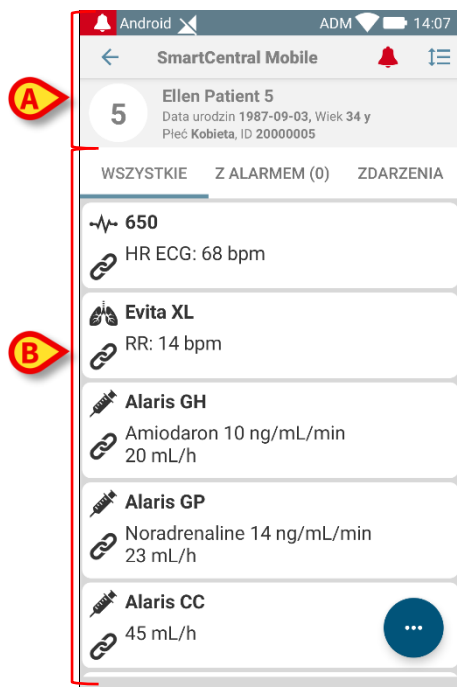


Rys. 5

Ekran ten składa się z dwóch obszarów: nagłówka (Rys. 5A) i listy wyrobów medycznych (Rys. 5B). W przypadku pojawienia się warunków alarmowych, etykieta „Z alarmem” jest czerwona, a liczba w nawiasie wskazuje liczbę urządzeń, których alarm dotyczy. Zakładka „Zdarzenia” pokazuje listę wszystkich zdarzeń związanych z rozpatrywanymi pacjentem (Rys. 6). W zależności od kontekstu w jakim używana jest aplikacja lista zdarzeń może zawierać alarmy, zdarzenia użytkownika, komunikaty o stanie urządzenia, zdarzenia pacjentów.



Rys. 6


1.4.1 Nagłówek

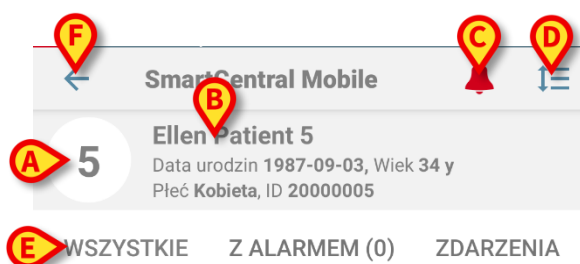

Rys. 7

W obszarze nagłówka (Rys. 7) można zobaczyć następujące informacje i narzędzia:

- Numer łóżka (Rys. 7 **A**).
- Dane pacjentów (Rys. 7 **B**).
- Ikona czerwonego dzwonka (Rys. 7 **C**) pokazuje, że na jednym z pozostałych łóżek (tych, które nie są aktualnie wyświetlane) znajduje się co najmniej jeden wyrób medyczny objęty alarmem. W przypadku dotknięcia ikony czerwonego dzwonka, na ekranie Smart Central pojawi się lista pacjentów, których dane alarmy dotyczą.
- Użyj ikony pokazanej na Rys. 7 **D** w celu powiększenia obszarów urządzenia i wyświetlić więcej informacji dla każdego podłączonego wyrobu medycznego (Rys. 8). Typ wyświetlanych informacji zależy od konfiguracji i konkretnego urządzenia.

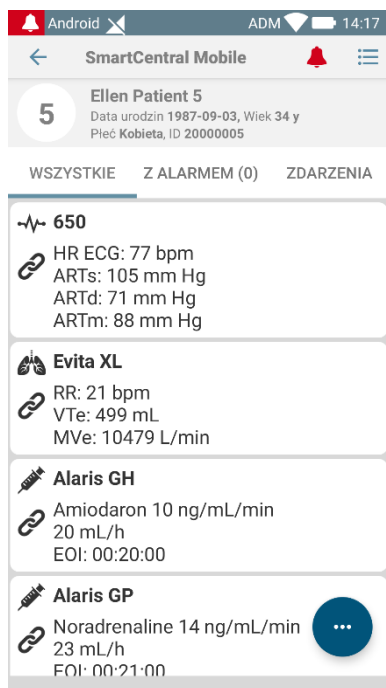


Rys. 8

- Ponownie dotknij ikony (Rys. 7 **D**), aby wrócić do trybu wyświetlania w zwężonej postaci.
- Skorzystaj z filtrów pokazanych na Rys. 7 **E**, aby zobaczyć wszystkie podłączone wyroby medyczne lub tylko te z powiadomieniami.
- Użyj przycisku ze strzałką wstecz (Rys. 7 **F**), aby powrócić do ekranu centralnego.

1.4.2 Lista wyrobów

W dolnej części ekranu „łóżka” przedstawiono poszczególne wyroby medyczne, jak widać na Rys. 9:

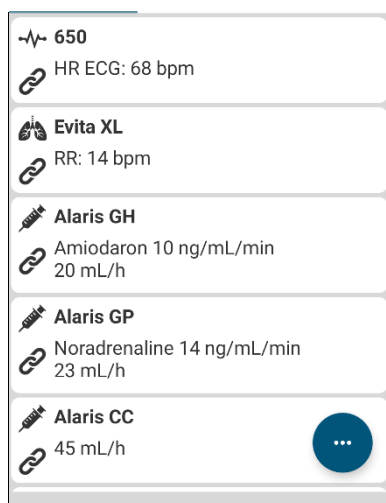

Rys. 9

Każdy wyrób medyczny jest reprezentowany w formie „karty”. Każda „karta” wyświetla następujące informacje:

- Ikona wskazująca rodzaj wyrobu medycznego. Lista możliwych ikon zmienia się w zależności od potrzeb placówki opieki zdrowotnej. Poniżej podano kilka typowych przykładów:

	Pompa infuzyjna
	Respirator
	Maszyna do pomiaru wydajności serca

- Ikona wskazująca stan wyrobu medycznego. Takie urządzenie może być:

	w trybie oczekiwania
	uruchomione
	w toku wysyłania alarmu o niskim priorytecie
	w toku wysyłania alarmu o średnim priorytecie
	w toku wysyłania alarmu o wysokim priorytecie


Kolor tła „karty” wskazuje również status wyrobu medycznego: szary (w trybie oczekiwania), biały (uruchomiony), niebiesko-zielony (alarm o niskim priorytecie), żółty (alarm o średnim priorytecie), czerwony (alarm o wysokim priorytecie).

„Karta” wyświetla podstawowe informacje dla każdego wyrobu medycznego. Rodzaj informacji zależy od konfiguracji.

W razie alarmu „karta” wyświetla komunikat alarmu.


1.4.3 Przycisk menu

Przycisk wskazany na Rys. 10 **A** otwiera menu umożliwiające bezpośredni dostęp do określonych funkcji.

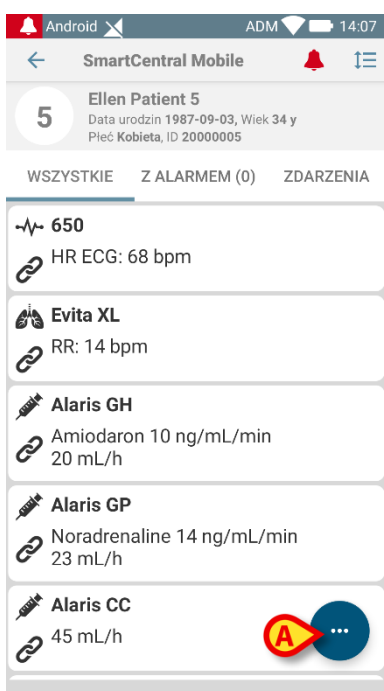

Rys. 10

- Stuknij przycisk , aby otworzyć menu (Rys. 11).

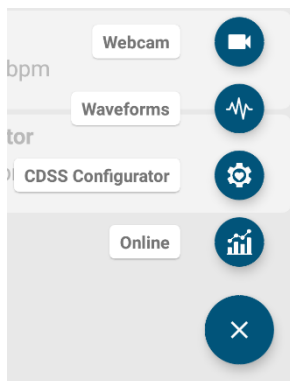

Rys. 11

Występowanie poszczególnych opcji w menu zależy od używanej konfiguracji i dostępności odpowiednich funkcji.

Dostępne opcje to:

- Webcam (Kamera internetowa) — wyświetlanie obrazu wideo ze skonfigurowanej kamery internetowej (patrz sekcja 1.6).
- Waveforms (Przebiegi) — wyświetlanie przebiegów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, gromadzonych przez wyroby medyczne (patrz sekcja 1.7).
- Otwiera różne moduły Digistat Mobile, w zależności od konfiguracji i dostępności. Na przykład CDSS Configurator Mobile lub Online Mobile, mające bezpośredni dostęp do danych aktualnie wybranego pacjenta. Dla każdego dostępnego modułu wyświetlana jest odpowiednia ikona. Instrukcje użytkowania znajdują się w instrukcjach obsługi odpowiednich modułów.


➤ Stuknij przycisk , aby ukryć menu.



Jeśli żadna z tych opcji nie jest dostępna, menu nie będzie widoczne. Jeśli dostępna jest tylko jedna opcja, wyświetlana będzie jedynie jej ikona.

1.5 Historia zdarzeń urządzenia

Każdą „kartę urządzenia” można dotknąć w celu uzyskania dostępu do listy wszystkich zdarzeń związanych z danym wyrobem medycznym (Rys. 12).

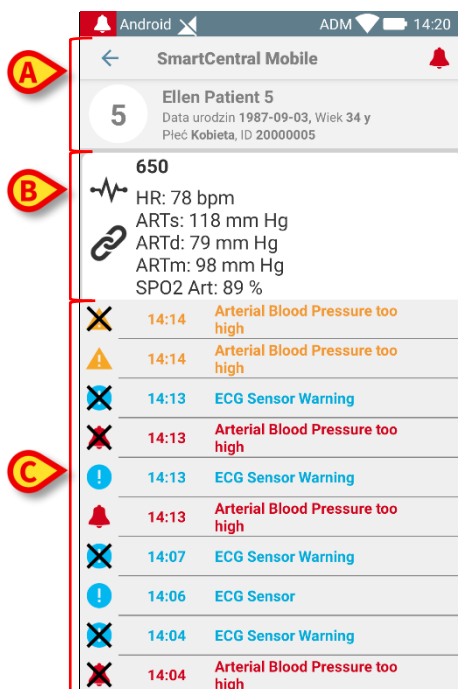

Rys. 12

Ten ekran składa się z trzech obszarów.


Dane pacjenta (Rys. 12 A).

Aktualne dane wyrobu medycznego. Dane wyświetlane na tej „karcie” również zależą od typu urządzenia i konfiguracji (Rys. 12 **B**).

Historia zdarzeń urządzenia. Wyświetlanie w porządku chronologicznym wszystkich zdarzeń związanych z danym urządzeniem. Dla każdego zdarzenia podany jest krótki opis i godzina jego wystąpienia (Rys. 12 **C**). W przypadku alarmów wyświetlana jest godzina rozpoczęcia i zakończenia (czarny „X” na ikonie ).


Zrzut przebiegów

- Stuknij ikonę  (jeśli jest widoczna – Rys. 13 **A**), aby wyświetlić zrzut przebiegu związanego z odpowiednim zdarzeniem.

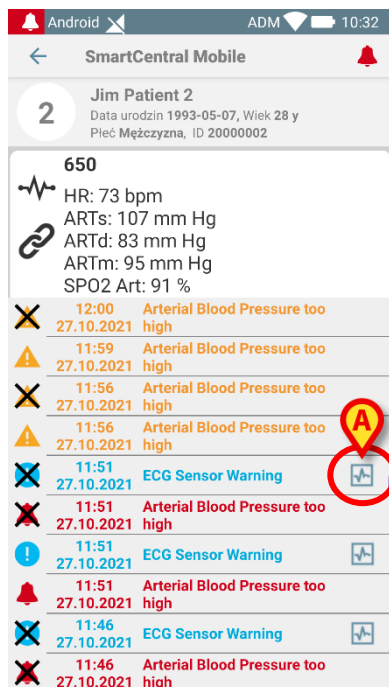

Rys. 13

Otworzy się następujące okno (Rys. 14):

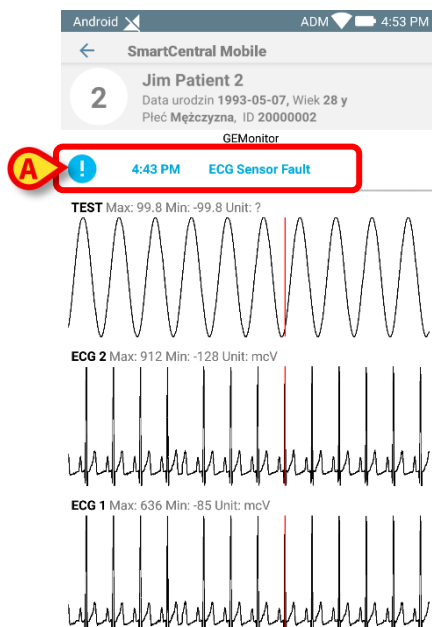


Rys. 14

Zdarzenie, z którym powiązany jest zrzut przebiegu, pokazano na Rys. 14 **A**.
Patrz punkt 1.7, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przebiegów.

1.6 Wideo Smart Central


Aplikację Smart Central można skonfigurować do obsługi transmisji wideo z kamery internetowej. Ta funkcja umożliwia wizualne monitorowanie obszaru pacjenta.

Jeśli funkcja wideo Smart Central jest włączona i prawidłowo skonfigurowana dla wybranego pacjenta, opcja kamery internetowej jest dostępna na przycisku menu pokazanym na Rys. 15.

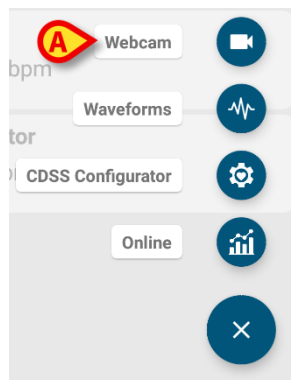

Rys. 15

- Stuknij opcję „Webcam” (Kamera internetowa) w menu, aby wyświetlić strumień wideo z kamery internetowej (Rys. 15 **A**).

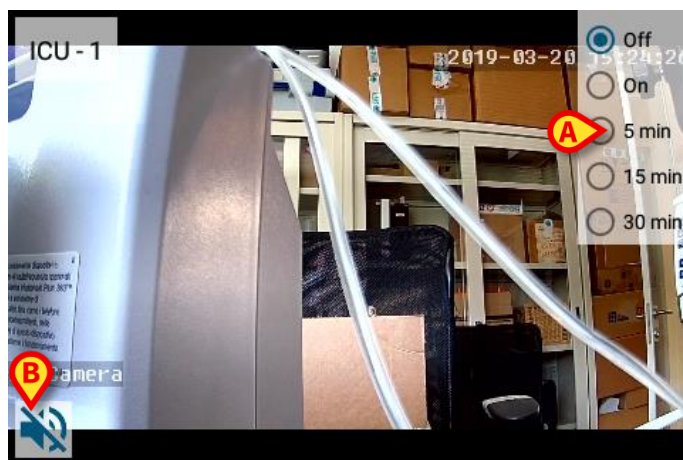

Rys. 16

- Dotknij przycisku systemowego Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Funkcja „Zasłona prywatności” pozwala wyłączyć kamerę internetową dla pacjenta na stałe lub na określony przedział czasowy. W trybie Zasłony prywatności nie można oglądać transmisji wideo. Tryb Zasłony prywatności jest domyślnie wyłączony.


Pasek przycisków funkcji Zasłony prywatności (Rys. 16 **A**) przedstawiono poniżej:

- ☐ Off
- ☒ On
- ☐ 5 min
- ☐ 15 min
- ☐ 30 min

- Dotknij przycisku **Włącz**, aby włączyć tryb Zasłony prywatności.

Po wybraniu tego trybu przycisk **Włącz** będzie podświetlony.

W trybie Zasłony prywatności transmisja wideo z kamery internetowej jest ukryta, jak pokazano na Rys. 16:

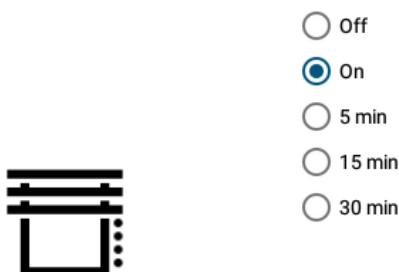

Rys. 17

- Dotknij przycisku **Wyłącz**, aby wyłączyć tryb Zasłony prywatności.

W celu aktywowania trybu Zasłony prywatności na określony przedział czasowy:

- Dotknij przycisku **5 minut**, **15 minut** lub **30 minut**, aby włączyć tryb prywatności na odpowiedni okres.

Wybrany przycisk zostanie podświetlony na pasku przycisków.


Po upływie wybranego przedziału czasowego tryb prywatności automatycznie się wyłączy.

Jeżeli kamera internetowa obsługuje transmisję dźwięku, można ją aktywować, naciskając przycisk  (Rys. 16 B).

1.7 Przebiegi

Smart Central Mobile może wyświetlać przebiegi zbliżone do czasu rzeczywistego zebrane z wyrobów medycznych. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest włączenie przynajmniej jednego parametru przebiegu w części konfiguracyjnej możliwości sterownika.

Jeśli ta funkcja jest włączona, opcja „Waveforms” (Przebiegi) jest dostępna na przycisku menu (Rys. 18 **A**).

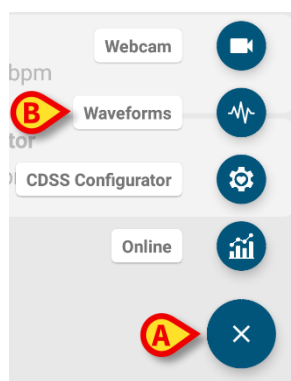


Rys. 18

W celu wyświetlenia ekranu Waveforms (Przebiegi) dla łóżka:


- Stuknij odpowiednią kartę łóżka.
- Stuknij przycisk menu (Rys. 18 **A**).
- Stuknij w menu w opcję „Waveforms” (Przebiegi) (Rys. 18 **B**).

Pojawi się ekran pokazujący trendy pozyskiwanych parametrów (Rys. 19).

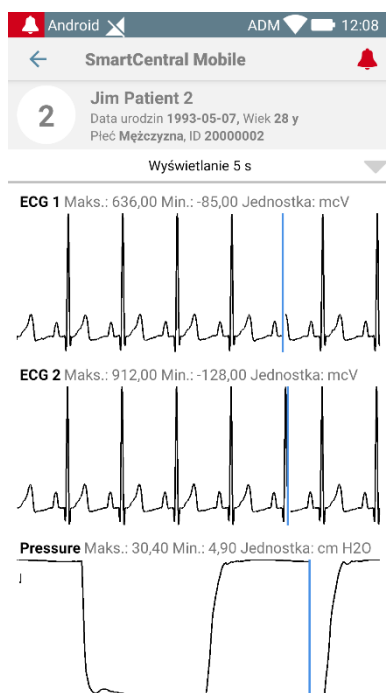


Rys. 19

Istnieje możliwość skonfigurowania widoku Przebiegu do wyświetlania parametrów aktualnie pozyskiwanych z wyrobów medycznych (Rys. 20 **A**):

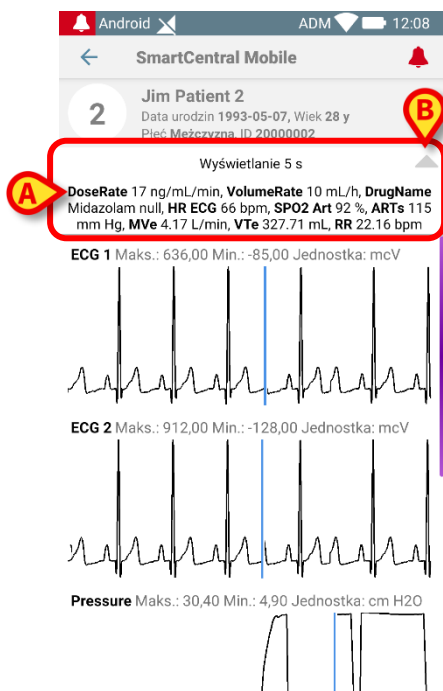

Rys. 20

Dotknij ikony szarej strzałki (Rys. 20 **B**), aby zwinąć wiersz reprezentujący aktualnie pozyskane parametry (Rys. 21)

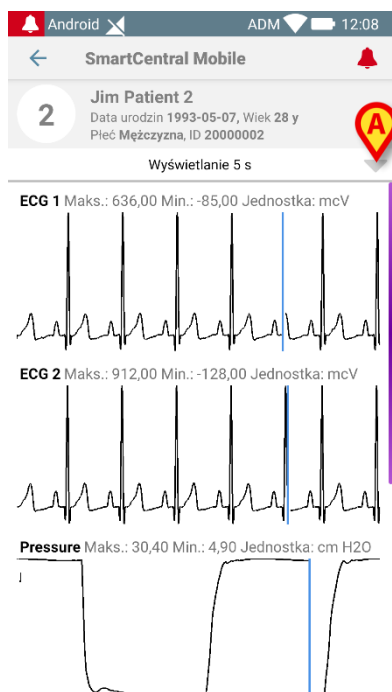

Rys. 21

Dotknij ikony szarej strzałki (Rys. 21 **A**), aby rozwinąć wiersz reprezentujący aktualnie pozyskane parametry (Rys. 20 **A**).

Można to zrobić dzięki odpowiedniemu ustawieniu opcji systemu WaveformFormatString: zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą opcji systemu Digistat Suite, aby uzyskać więcej informacji.

Można sortować przebiegi zebrane z wyrobów medycznych poprzez odpowiednie ustawienie opcji systemu WaveformsSortingList: zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą opcji systemu Digistat Suite, aby uzyskać więcej informacji.

Przebiegi są dodawane do widoku w miarę odbierania danych z wyrobów. Oznacza to, że niezależnie od ustawień sortowania przebieg nie będzie wyświetlany, dopóki nie zostaną odebrane odpowiednie dane. Następnie, zgodnie z ustawieniami sortowania, przebieg zostanie wyświetlony na właściwej pozycji. W przypadku braku sortowania, widoki przebiegu są dodawane na dole, w miarę nadchodzenia danych przebiegu.

1.8 Wyciszanie powiadomień pojawiających się w Smart Central Mobile

Powiadomienia można wyciszyć w sesjach Smart Central Mobile na określony czas i dla konkretnego łóżka. Funkcja „Wycisz” odnosi się tylko do aplikacji Smart Central Mobile. Stacjonarna stacja Smart Central będzie nadal zapewniać powiadomienia dźwiękowe i nie można go wyciszyć.


Aby włączyć tę możliwość, konieczne jest włączenie globalnego parametru o nazwie „ManageMobilityAlarms” w konfiguratorze pakietu Digistat Suite. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji konfiguracji pakietu Digistat Suite.



Procedurę wyciszania można wykonać zarówno na stacjonarnych, jak i mobilnych stacjach roboczych, ale będzie to dotyczyć tylko mobilnych.

1.8.1 Na stacjonarnych stacjach roboczych.

Jeżeli parametr „ManageMobilityAlarms” jest włączony, na górze każdej karty łóżka pojawi się nowa ikona (Rys. 22 **A**) :

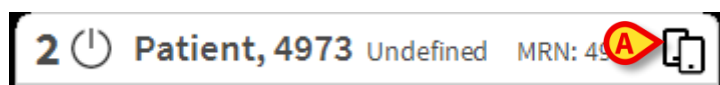

Rys. 22

Ta ikona oznacza, że powiadomienia są włączone w Smart Central Mobile dla określonego łóżka (nr łóżka znajduje się po lewej stronie).

- Kliknij ikonę, aby otworzyć nowy widok, w którym można wybrać jedną z wielu opcji. Są one następujące:
 - włącz powiadomienia,
 - wyłącz powiadomienia na X, Y, Z minut.

Wartości X, Y i Z są określone w konfiguracji przez parametr ogólny „SilenceMobilityAlarmsIntervals” w konfiguratorze pakietu Digistat Suite. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji konfiguracji pakietu Digistat Suite.

- Kliknij **ZAPISZ** lub **ANULUJ**, aby zamknąć widok.

Jeżeli powiadomienia są wyłączone, ikona na karcie łóżka zmienia kolor na czerwony, a obok niej pojawia się odliczanie (minuty) (Rys. 23 **A**).



Rys. 23

Gdy odliczanie osiągnie zero, ikona z powrotem zmieni kolor na czarny, odliczanie zniknie, a powiadomienia zostaną przywrócone. Np. na powyższym obrazku powiadomienia w Smart Central Mobile są wyłączone dla łóżka 2 na 20 minut.

- Kliknij czerwoną ikonę, aby ponownie włączyć dźwięk albo ponownie rozpocząć odliczanie wyciszenia.

Gdy powiadomienia mobilne są wyłączone dla danego łóżka:


- Na stacjonarnych Smart Central nie ma różnic w komunikacji powiadomień.
- W Smart Central Mobile pojawiają się powiadomienia związane z wyciszonym łóżkiem, ale dźwięk i wibracje są wyłączone na określony czas.

1.8.2 Na mobilnych stacjach roboczych

W celu włączenia/wyłączenia powiadomień na mobilnych stacjach roboczych

- kliknij kartę łóżka, aby przejść do ekranu zawierającego szczegóły łóżka.

Jeżeli parametr ManageMobilityAlarms jest włączony, nowa ikona pojawi się na górze tego ekranu, obok danych pacjenta (Rys. 24 A):

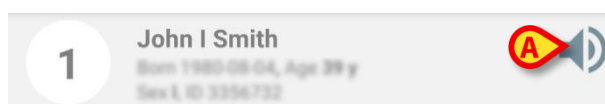


Rys. 24

- Stuknij ikonę, aby otworzyć nowy widok, w którym można wybrać jedną z wielu opcji. Są one następujące:
 - włącz powiadomienia,
 - wyłącz powiadomienia na X, Y, Z minut.

Wartości X, Y i Z są określone w konfiguracji przez parametr ogólny „SilenceMobilityAlarmsIntervals” w konfiguratorze pakietu Digistat Suite. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji konfiguracji pakietu Digistat Suite.

- Kliknij **ZAPISZ** lub **ANULUJ**, aby zamknąć widok.

Gdy powiadomienia są wyłączone, pojawia się następująca ikona (Rys. 25). Pod ikoną znajduje się liczba odliczania, która wskazuje pozostały „czas wyciszenia”:

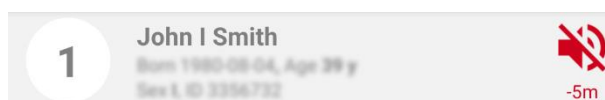

Rys. 25

Na przykład na Rys. 25 powiadomienia są wyłączone na 5 minut na łóżku 1. Gdy odliczanie osiągnie zero, ikona z powrotem zmieni kolor na czarny, a powiadomienia zostaną przywrócone.

Jeżeli powiadomienia są wyłączone dla określonego łóżka, to na odpowiedniej karcie łóżka pojawi się również ikona wyciszenia (Rys. 26 a/b pokazuje ikonę w trybie wszystkich pacjentów – po lewej – i w trybie Moi Pacjenci – po prawej):



Rys. 26 a/b



Wyciszanie powiadomień na urządzeniach mobilnych jest domyślnie wyłączone. Jeżeli ta opcja jest włączona, placówka opieki zdrowotnej powinna przeprowadzić staranną ocenę ryzyka, aby ograniczyć wszelkie możliwe zagrożenia. Podczas tymczasowego wyciszania powiadomień wymagane jest, aby stacjonarna stacja Smart Central była zawsze monitorowana przez użytkownika.

Integracja Produktu Unite

W przypadku zintegrowania Digistat z Unite i generowaniu powiadomień przez aplikację Axess (lub równoważną aplikację na urządzeniach Myco 2) wyciszenie powiadomień w Smart Central również wpływa na integrację Unite.

1.8.3 Obecność pielęgniarki


Gdy system skonfigurowano do pracy z automatyczną obecnością pielęgniarki z wykorzystaniem podczerwieni, mechanizm wyciszania jest zarządzany automatycznie.

Gdy pielęgniarka wchodzi do sali pacjenta, alarmy są automatycznie wyciszane (tak samo jak przy ręcznym wyciszaniu) dla tego konkretnego łóżka. Gdy pielęgniarka wychodzi z sali pacjenta, alarmy są ponownie włączane. Jeżeli w sali pacjenta znajduje się wiele pielęgniarek, alerty są wyciszane tak długo, jak pielęgniarka tam przebywa.

Mechanizm obecności pielęgniarki jest włączony dzięki funkcji podczerwieni (obecnej w urządzeniach Myco 2 lub Myco 3). Użytkownik musi pamiętać, aby smartfon zawsze znajdował się w pozycji, w której sygnały podczerwieni są widoczne dla samego smartfona. Użytkownik musi unikać umieszczania smartfona w torebce czy też zamkniętej kieszeni.

Jeżeli smartfon zostanie wykryty w sali pacjenta i po skonfigurowanym czasie przestanie być wykrywany, wyciszenie zostanie automatycznie wyłączone. To ograniczenie zmniejsza ryzyko, że pielęgniarka zapomni o pozostawionym smartfonie w sali pacjenta w chwili wychodzenia z tej sali.

Gdy pielęgniarka znajduje się w sali pacjenta, obok nazwy łóżka na karcie pacjenta (Rys. 27 A) pojawia się ikona „pielęgniarki”.

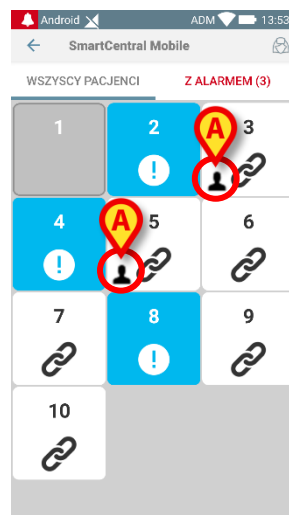

Rys. 27 a/b

1.8.4 Filtrowanie alarmów NFC


Urządzenie Myco 3 (lub dowolne urządzenie z systemem Android z czujnikiem NFC) obsługuje filtrowanie alarmów NFC, czyli możliwość wyciszenia powiadomień Smart Central Mobile na określony czas dzięki wykryciu odpowiednio skonfigurowanego tagu NFC umieszczonego w pobliżu pacjenta/łożka.

Powiadomienia są wyciszone na skonfigurowany czas, który należy określić w tagu NFC razem z numerem łóżka. Po upływie tego czasu powiadomienia będą automatycznie przywrócone.

W celu wyciszenia powiadomień na Smart Central Mobile, pochodzących od danego pacjenta/z danego łóżka


- odblokuj urządzenie mobilne i umieść je blisko tagu NFC.

Pojawi się poniższe okno:

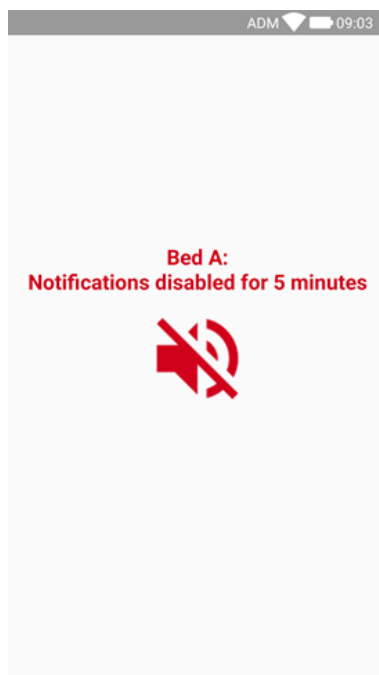

Rys. 28

Gdy powiadomienia są wyłączone, pojawia się następująca ikona (Rys. 29 **A**). Pod ikoną znajduje się liczba odliczania, która wskazuje pozostały „czas wyciszenia”:

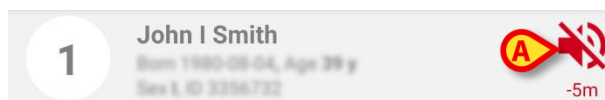

Rys. 29

Np. na Rys. 29 powiadomienia są wyłączone na 5 minut na łóżku 1. Gdy odliczanie osiągnie zero, ikona z powrotem zmieni kolor na czarny, a powiadomienia zostaną przywrócone.



Po każdym zbliżeniu się urządzenia mobilnego do tagu NFC pozostały czas wyciszenia wydłuża się o wartość skonfigurowaną w samym tagu.


W celu przywrócenia powiadomień na Smart Central Mobile pochodzących od danego pacjenta/z danego łóżka (przed upływem czasu wyciszenia)

- stuknij ikonę pokazującą czas wyciszenia (Rys. 29 **A**).

Albo:

- odblokuj urządzenie mobilne i umieść je w pobliżu *drugiego* tagu NFC, w którym czas wyciszenia jest ustawiony na „0”.

W obu przypadkach pojawi się następujące okno:

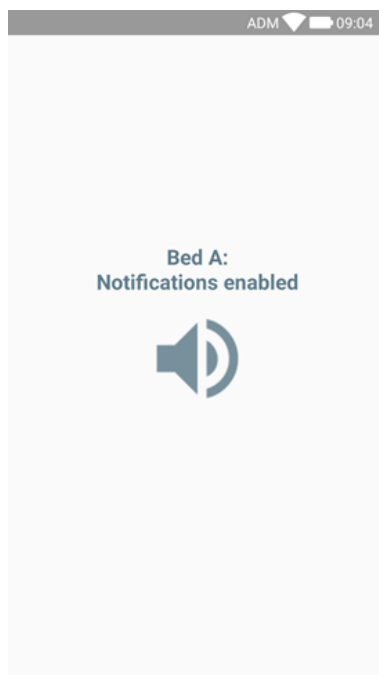


Rys. 30



Wyciszanie powiadomień na urządzeniach mobilnych jest domyślnie wyłączone. Jeżeli ta opcja jest włączona, placówka opieki zdrowotnej powinna przeprowadzić staranną ocenę ryzyka, aby ograniczyć wszelkie możliwe zagrożenia. Podczas tymczasowego wyciszania powiadomień wymagane jest, aby stacjonarna stacja Smart Central była zawsze monitorowana przez użytkownika.

1.9 Widżety

Produkt implementuje zestaw widżetów, czyli sterowników graficznych mających na celu ułatwienie użytkownikowi określonych czynności. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika Mobile Launcher w celu uzyskania ogólnego opisu widżetów (*USR ENG Mobile Launcher*).

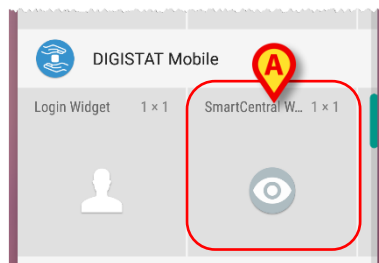

Rys. 31


W niniejszym punkcie opisano widżety aplikacji Smart Central Mobile.

1.9.1 Widżet Smart Central

Widżet Smart Central pozwala użytkownikowi na dostęp do aplikacji Smart Central Mobile. Aby skorzystać z tej funkcji,


- naciśnij ikonę pokazaną na Rys. 31 **A** i upuść ją na ekranie danego urządzenia.

Widżet Smart Central zostanie domyślnie umieszczony na ekranie urządzenia w rozmiarze 1 x 1 (Rys. 32).

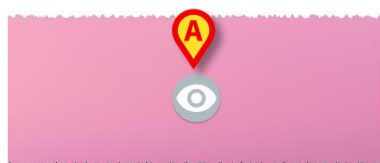

Rys. 32

- Naciśnij ikonę pokazaną na Rys. 32 **A**, aby uzyskać dostęp do ekranu Smart Central Mobile (Rys. 33).

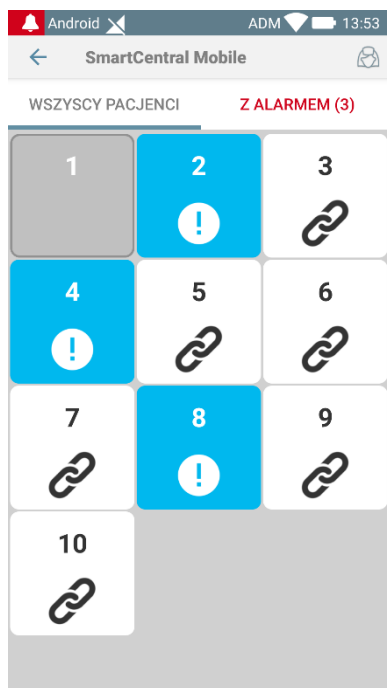

Rys. 33

Jeżeli rozmiar wynosi 1 x 1, liczba łóżek z alarmem wyświetlana w widżecie Smart Central jest reprezentowana w formie małej czerwonej liczby (Rys. 34):



Rys. 34


- W takim przypadku dotknij widżetu Smart Central, aby uzyskać dostęp do ekranu związanego z łózkami z alarmem, jeśli alarm dotyczy więcej niż jednego łóżka albo z jednym łóżkiem z alarmem, jeśli alarm dotyczy tylko jednego łóżka.
- Przytrzymaj ikonę pokazaną na Rys. 34, a następnie puść ją, aby wyświetlić punkty do uchwycenia w celu zmiany rozmiaru widżetu (Rys. 35 – po lewej, jeśli żadne łóżka nie mają alarmu, po prawej, jeśli niektóre łóżka są z alarmem):




Rys. 35

- Dotknij i przesunij jeden z dwóch punktów do uchwycenia, a następnie naciśnij tło pulpitu, aby zmienić rozmiar widżetu do rozmiaru 2 x 1.

W takim przypadku krótki opis przyczyny alarmu może pojawić się na Widżecie Smart Central, jak pokazano poniżej:

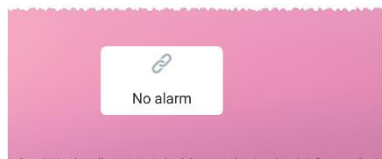

Rys. 36
Brak łóżek z alarmem


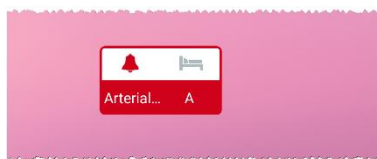


Rys. 37
Jedno łóżko z alarmem



Rys. 38
Więcej niż 1 łóżko z alarmem

W celu lepszej widoczności opisów alarmów widżet można dodatkowo powiększyć do rozmiarów 3 x 1, 4 x 1 i 5 x 1:

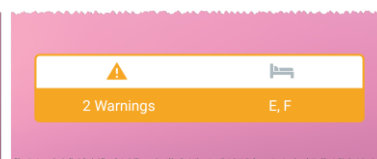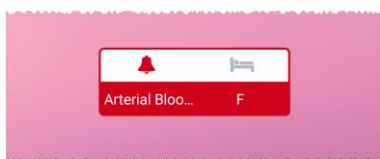

Rys. 39

1.10 Załącznik – Przykłady procedur pracy użytkownika

1.10.1 Główne cechy aplikacji

W celu wybrania aplikacji **Smart Central**, po zalogowaniu

- stuknij odpowiedni wiersz na ekranie Mobile Launcher (Rys. 40 **A**).

Otworzy się ekran centralny. Ekran centralny wyświetla schematyczne podsumowanie stanu wyrobów medycznych podłączonych do łóżek skonfigurowanych w konkretnym urządzeniu podręcznym.

Jeżeli wszyscy pacjenci w domenie są przypisani do użytkownika, to ekran centralny przedstawia łóżka jako zestaw kwadratów (Rys. 41).

Jeśli bieżący użytkownik wykluczył jedno lub więcej łóżek, wówczas na ekranie centralnym łóżka są przedstawiane jako zestaw prostokątów (Rys. 42).


Liczba lub litera widoczna wewnątrz kwadratu/prostokąta wskazuje numer lub literę łóżka. Na każdym kwadracie lub prostokącie stan podłączonych wyrobów medycznych jest podawany w formie graficznej za pomocą kolorowego tła i odpowiedniej ikony:

	Wszystkie wyroby medyczne podłączone do łóżka są w trybie oczekiwania.
	Działa przynajmniej jeden podłączony wyrób medyczny.
	Przynajmniej jeden z podłączonych wyrobów medycznych wysyła alarm o niskim priorytecie.
	Przynajmniej jeden z podłączonych wyrobów medycznych wysyła alarm o średnim priorytecie.
	Przynajmniej jeden z podłączonych wyrobów medycznych wysyła alarm o wysokim priorytecie.


- Stuknij jeden z kwadratów na ekranie centralnym, aby wyświetlić listę wyrobów medycznych podłączonych do łóżka (Rys. 43).
- Stuknij jeden z prostokątów należących do danego urządzenia, aby uzyskać dostęp do listy wszystkich alarmów pochodzących z wyrobu medycznego (Rys. 44).




Rys. 40

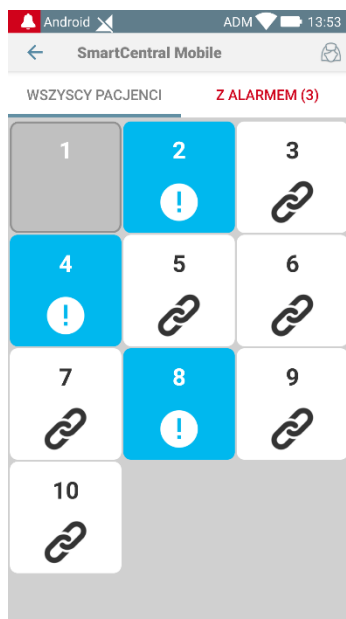


Rys. 41

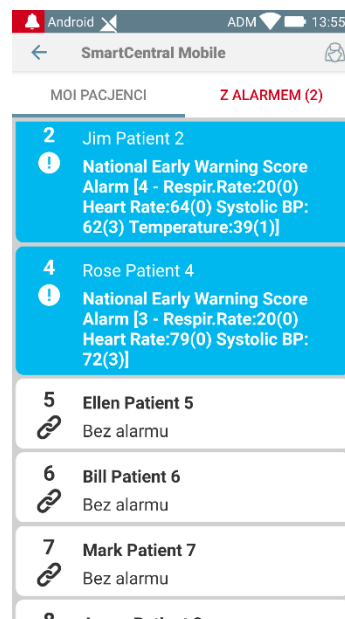

Rys. 42

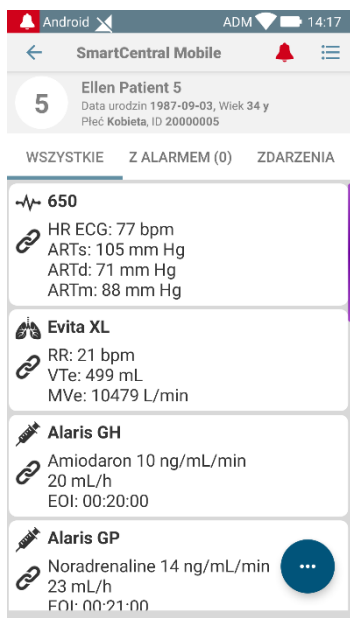

Rys. 43

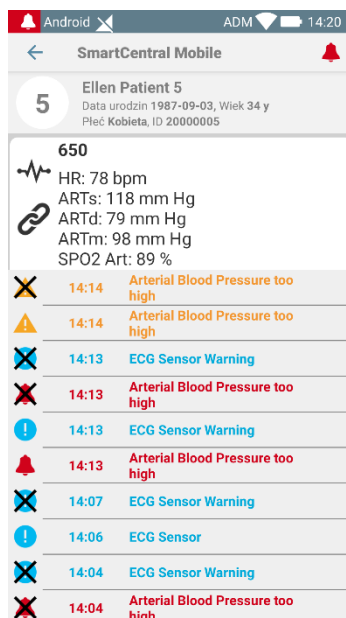

Rys. 44

1.10.2 Funkcja transmisji wideo

Aplikację Smart Central można skonfigurować do obsługi transmisji wideo z kamery internetowej. Ta funkcja umożliwia wizualne monitorowanie obszaru pacjenta. Jeżeli funkcja wideo aplikacji Smart Central jest włączona, na ekranie listy wyrobów medycznych dostępny jest dodatkowy przycisk (Rys 45).

- Stuknij opcję „Webcam” (Kamera internetowa) w menu, aby wyświetlić strumień wideo z kamery internetowej (Rys 45 **A**).

1.10.3 Przebiegi

Smart Central Mobile może wyświetlać przebiegi zbliżone do czasu rzeczywistego zebrane z wyrobów medycznych. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest włączenie przynajmniej jednego parametru przebiegu w części konfiguracyjnej możliwości sterownika. W celu uzyskania dostępu do tej funkcji

Jeśli ta funkcja jest włączona, opcja „Waveforms” (Przebiegi) jest dostępna na przycisku menu (Rys 45 **B**).

W celu wyświetlenia ekranu Waveforms (Przebiegi) dla łóżka:

1.10.4 Wyciszenie powiadomienia

Powiadomienia można wyciszyć w sesjach Smart Central Mobile na określony czas i dla konkretnego łóżka. Tę opcję można włączyć podczas konfiguracji. W celu włączenia/wyłączenia powiadomień na mobilnych stacjach roboczych


- Kliknij prostokąt łóżka, aby uzyskać dostęp do ekranu szczegółów łóżka.

Jeżeli opcja „Wyciszenie powiadomienia” jest włączona, na górze tego ekranu obok danych pacjenta pojawi się ikona (Rys 46 **A**):


- stuknij ikonę, aby otworzyć nowy widok, w którym można wybrać czas trwania opcji wyciszenia powiadomienia.
- Wybierz czas trwania i stuknij **Zapisz**.

Gdy powiadomienia są wyłączone, pojawia się ikona pokazana na Rys 47 **B**. Pod ikoną znajduje się liczba odliczania, która wskazuje pozostały „czas wyciszenia”.


Na przykład na rysunku powiadomienia są wyłączone na 5 minut na łóżku 1. Gdy odliczanie osiągnie zero, ikona z powrotem zmieni kolor na czarny, a powiadomienia zostaną przywrócone.

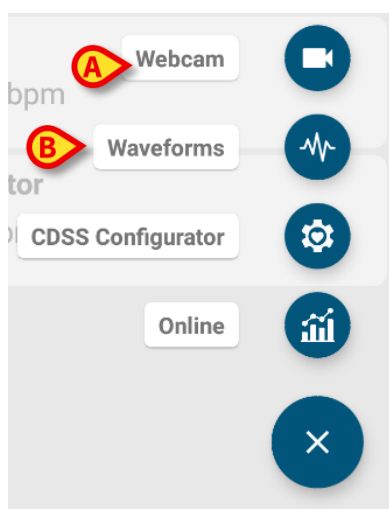

Rys 45

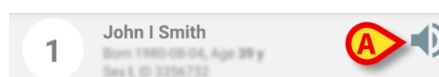

Rys 46

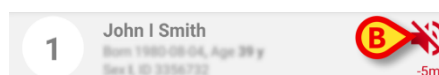

Rys 47