



Smart Monitor

Instrukcja użytkownika

Wersja 3.0

2024-12-02

Smart Monitor



Informacje na temat środowiska Produktu, środków ostrożności, ostrzeżeń i przeznaczenia znajdują się w dokumencie *USR POL Digistat Care i/lub w dokumencie USR POL Digistat Docs* (w zależności od zainstalowanych modułów w przypadku pakietu *Digistat Suite EU*) lub *USR ENG Digistat Suite NA* (w przypadku pakietu *Digistat Suite NA*). Znajomość i zrozumienie odpowiedniego dokumentu są obowiązkowe, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z *Smart Monitor* opisanego w tym dokumencie.

W module SMART MONITOR w jednej tabeli wyświetlane są wszystkie urządzenia medyczne, które są obecnie skonfigurowane w ramach konkretnej instalacji oprogramowania Digistat Suite. Jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem, wyświetlane są również informacje o pacjencie (imię i nazwisko pacjenta, łóżko itp.). Inne informacje są wyświetlane zgodnie z opcjami konfiguracji organizacji opieki zdrowotnej korzystającej z oprogramowania Digistat Suite. Zobacz przykład na Rys. 1. Aby przejść do modułu Smart Monitor:

➤ Na pasku bocznym kliknij ikonę wskazaną na Rys. 1 **A**.

</

Rys. 1


Urządzenia mogą być grupowane według typów: dla przykładu, jeden typ na grupę. Możliwe jest również przypisanie dwóch lub więcej typów do jednej grupy. Strony odpowiadające każdej z grup są wyświetlane w różnych zakładkach (Rys. 1 **B**): dla każdej strony można w pełni dostosować szczegóły wyświetlanej siatki.

Każdy wiersz odpowiada urządzeniu. W opisanej tutaj konfiguracji podano następujące informacje (od lewej do prawej).

- Lokalizacja (jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem).

- Łóżko (jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem).
- Pacjent (jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem).
- Trwający alarm o najwyższym priorytecie (jeśli występuje).
- Nazwa urządzenia.
- Numer seryjny urządzenia.
- Nazwa podawanego leku (jeśli jest dostępna).
- Objętościowe natężenie przepływu.
- Ciśnienie w obwodzie.
- Pozostały czas do końca infuzji.
- Przycisk wskaźnik.
- Ikona  pojawia się po przekroczeniu miękkiego limitu (ustawienie na pompie).

Kolumny Oddział, Łóżko, Pacjent i Alarm są zawsze widoczne. Pozostałe kolumny są wyświetlane, jeśli zostały włączone w konfiguracji (poprzez opcję systemową *SmartMonitorConfig*). Urządzenia niepowiązane są wyświetlane bez informacji o lokalizacji/pacjencie. Nagłówki każdej kolumny wskazują rodzaj wyświetlanych informacji.

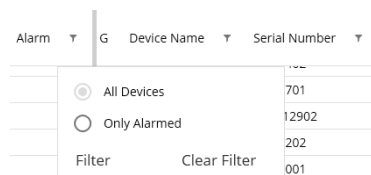

Rys. 2

Ikona  umożliwia sortowanie i filtrowanie zawartości tabeli.

Kolumna **Identity** (Tożsamość; ostatnia z prawej strony — Rys. 1 B) wskazuje, czy urządzenie jest już powiązane z pacjentem, czy nie.

Ikona  wskazuje, że urządzenie nie jest powiązane z pacjentem. Jeśli wiersz zostanie wybrany, na pasku poleceń pojawi się przycisk **Przypisz**. Kliknij przycisk, aby powiązać urządzenie z pacjentem.

Ikona  wskazuje, że urządzenie jest powiązane z pacjentem. Jeśli wiersz zostanie wybrany, na pasku poleceń pojawi się przycisk **Usuń przypisanie**. Kliknij przycisk, aby usunąć przypisanie urządzenia do pacjenta.



Przyciski **Przypisz/Anuluj przypisanie** uruchamiają moduł Identity.Net, jeśli został zainstalowany. Moduł ten odpowiada za ustawienie lub wyłączenie na stacji roboczej przypisania urządzenia do danego pacjenta. Jeśli moduł Identity.Net nie jest zainstalowany na stacji roboczej, na której znajduje się Smart Monitor, przyciski **Przypisz/Anuluj przypisanie** nie działają.

Jeśli skonfigurowano więcej urządzeń niż te, które można wyświetlić na jednym ekranie, po prawej stronie wyświetlany jest pasek przewijania.

Przyciski przewijania pokazane w punkcie Rys. 3 A mogą być używane do przewijania listy urządzeń. Jeśli na urządzeniu, które nie jest aktualnie wyświetlane, występuje alarm, odpowiedni przycisk przewijania (w górę lub w dół) jest podświetlony (Rys. 3).

SMART MONITOR



▼ Scroll Down

 Clear Filters

Rys. 3

Przycisk **Wyczyść filtry** usuwa wszystkie możliwe filtry. Jeśli filtr jest aktywny, a urządzenie, na którym występuje alarm, nie jest wyświetlane z powodu filtra, przycisk **Wyczyść filtry** jest podświetlony.