



Smart Monitor

Instrukcja użytkownika

Wersja 1.0

2023-03-30

Smart Monitor



Informacje na temat środowiska Produktu, środków ostrożności, ostrzeżeń i przeznaczenia znajdują się w dokumencie *USR POL Digistat Care (dla pakietu Digistat Suite EU)* lub *USR ENG Digistat Suite NA (dla pakietu Digistat Suite NA)*. Znajomość i zrozumienie odpowiedniego dokumentu są obowiązkowe, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z modułu Smart Monitor opisanego w tym dokumencie.

W module SMART MONITOR w jednej tabeli wyświetlane są wszystkie urządzenia medyczne, które są obecnie skonfigurowane w ramach konkretnej instalacji oprogramowania Digistat Suite. Jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem, wyświetlane są również informacje o pacjencie (imię i nazwisko pacjenta, łóżko itp.). Inne informacje są wyświetlane zgodnie z opcjami konfiguracji organizacji opieki zdrowotnej korzystającej z oprogramowania Digistat Suite. Zobacz przykład na Rys. 1. Aby przejść do modułu Smart Monitor:

- Na pasku bocznym kliknij ikonę wskazaną na Rys. 1 A.

<


Rys. 1

Każdy wiersz odpowiada urządzeniu. W opisanej tutaj konfiguracji podano następujące informacje (od lewej do prawej).

- Lokalizacja (jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem).
- Łóżko (jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem).
- Pacjent (jeśli urządzenie jest powiązane z pacjentem).
- Trwający alarm o najwyższym priorytecie (jeśli występuje).
- Nazwa urządzenia.
- Numer seryjny urządzenia.

- Nazwa podawanego leku (jeśli jest dostępna).
- Objętościowe natężenie przepływu.
- Ciśnienie w obwodzie.
- Pozostały czas do końca infuzji.
- Przycisk wskaźnik.
- Ikona  pojawia się po przekroczeniu miękkiego limitu (ustawienie na pompie).

Urządzenia niepowiązane są wyświetlane bez informacji o lokalizacji/pacjencie.
Nagłówek każdej kolumny wskazuje rodzaj wyświetlanych informacji.

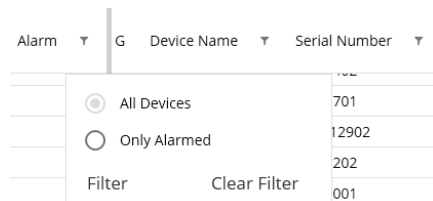

Rys. 2

Ikona  umożliwia sortowanie i filtrowanie zawartości tabeli.

Kolumna **Identity** (Tożsamość; ostatnia z prawej strony — Rys. 1 B) wskazuje, czy urządzenie jest już powiązane z pacjentem, czy nie.

Ikona  wskazuje, że urządzenie nie jest powiązane z pacjentem. Jeśli wiersz zostanie wybrany, na pasku poleceń pojawi się przycisk **Przypisz**. Kliknij przycisk, aby powiązać urządzenie z pacjentem.

Ikona  wskazuje, że urządzenie nie jest powiązane z pacjentem. Jeśli wiersz zostanie wybrany, na pasku poleceń pojawi się przycisk **Usuń przypisanie**. Kliknij przycisk, aby usunąć przypisanie urządzenia do pacjenta.

Jeśli skonfigurowano więcej urządzeń niż te, które można wyświetlić na jednym ekranie, po prawej stronie wyświetlany jest pasek przewijania.

Przyciski przewijania pokazane w punkcie Rys. 3 A mogą być używane do przewijania listy urządzeń.

Jeśli na urządzeniu, które nie jest aktualnie wyświetlane, występuje alarm, odpowiedni przycisk przewijania (w górę lub w dół) jest podświetlony (Rys. 3).



Rys. 3

Przycisk **Wyczyść filtry** usuwa wszystkie możliwe filtry. Jeśli filtr jest aktywny, a urządzenie, na którym występuje alarm, nie jest wyświetlane z powodu filtra, przycisk **Wyczyść filtry** jest podświetlony.