



Smart Monitor

Användarmanual

Version 2.0

2023-05-15

Smart Monitor




För allmän och detaljerad information om produktmiljön och bruksanvisningen för Control Bar mjukvaran, se specifik dokumentation för produkten. Kunskapen om och förståelsen av dessa dokument är obligatorisk för lämplig och säker användning av Smart Monitor -modulen som beskrivs i detta dokument.

SMART MONITOR visar, på ett enda rutnät, alla medicinska enheter som för närvarande är konfigurerade inom den specifika Digistat Suite-installationen. Om enheten är kopplad till en patient, visas även patientinformation (patientens namn, säng, etc.). Övrig information visas i enlighet med konfigurationsvalen för hälsovårdsorganisationen som använder Digistat Suite. Se Fig 1 för exempel.

För att komma åt Smart Monitor:

- I sidofältet, klicka på ikonen som indikeras i Fig 1 A.

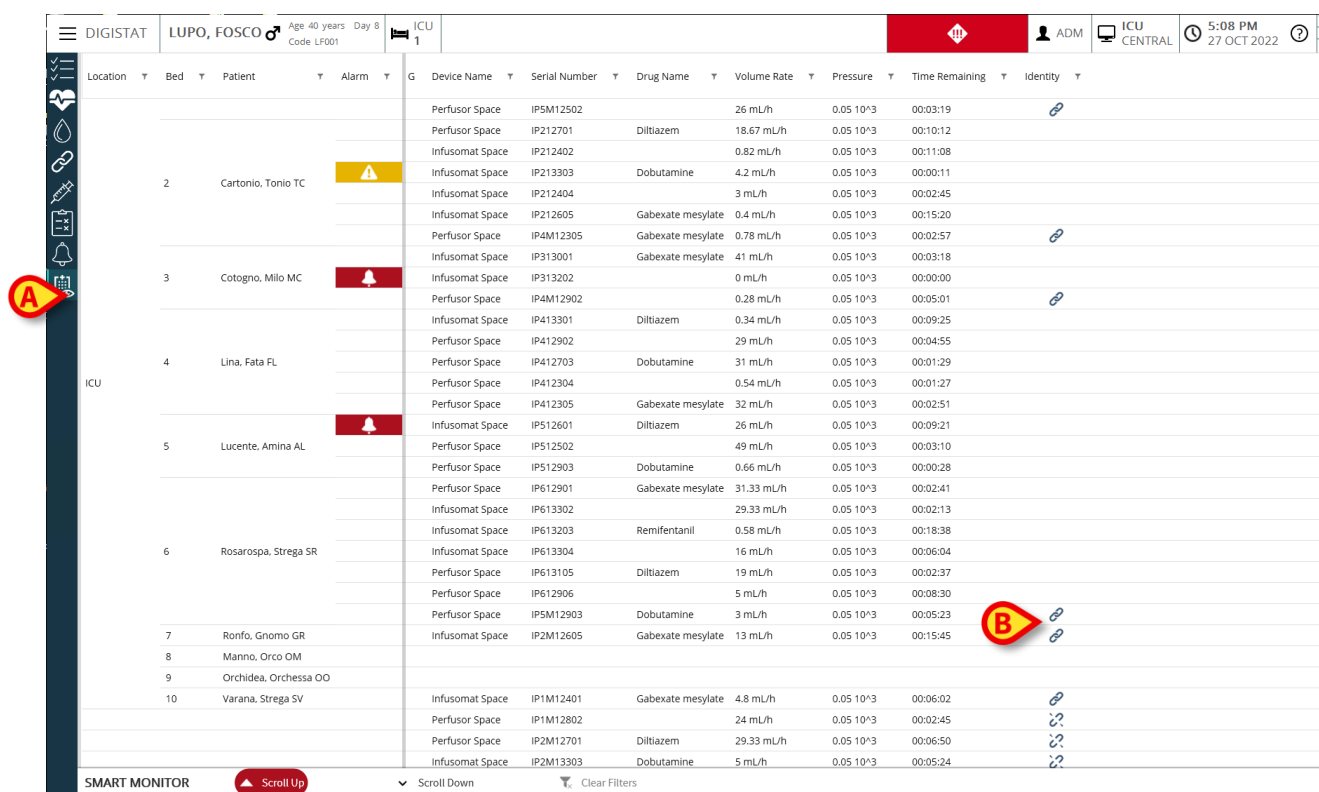

Location	Bed	Patient	Alarm	G	Device Name	Serial Number	Drug Name	Volume Rate	Pressure	Time Remaining	Identity
2	Cartonio, Tonio TC				Perfusor Space	IP5M12502		26 mL/h	0.05 10^3	00:03:19	
					Perfusor Space	IP212701	Diltiazem	18.67 mL/h	0.05 10^3	00:10:12	
					Infusomat Space	IP212402		0.82 mL/h	0.05 10^3	00:11:08	
					Infusomat Space	IP213303	Dobutamine	4.2 mL/h	0.05 10^3	00:00:11	
					Infusomat Space	IP212404		3 mL/h	0.05 10^3	00:02:45	
					Infusomat Space	IP212605	Gabexate mesylate	0.4 mL/h	0.05 10^3	00:15:20	
					Perfusor Space	IP4M12305	Gabexate mesylate	0.78 mL/h	0.05 10^3	00:02:57	
					Infusomat Space	IP313001	Gabexate mesylate	41 mL/h	0.05 10^3	00:03:18	
					Infusomat Space	IP313202		0 mL/h	0.05 10^3	00:00:00	
					Perfusor Space	IP4M12902		0.28 mL/h	0.05 10^3	00:05:01	
3	Cotogno, Milo MC				Infusomat Space	IP413301	Diltiazem	0.34 mL/h	0.05 10^3	00:09:25	
					Perfusor Space	IP412902		29 mL/h	0.05 10^3	00:04:55	
					Perfusor Space	IP412703	Dobutamine	31 mL/h	0.05 10^3	00:01:29	
					Perfusor Space	IP412304		0.54 mL/h	0.05 10^3	00:01:27	
4	Lina, Fata FL				Perfusor Space	IP412305	Gabexate mesylate	32 mL/h	0.05 10^3	00:02:51	
					Infusomat Space	IP512601	Diltiazem	26 mL/h	0.05 10^3	00:09:21	
					Perfusor Space	IP512502		49 mL/h	0.05 10^3	00:03:10	
					Perfusor Space	IP512903	Dobutamine	0.66 mL/h	0.05 10^3	00:00:28	
5	Lucente, Amina AL				Perfusor Space	IP612901	Gabexate mesylate	31.33 mL/h	0.05 10^3	00:02:41	
					Infusomat Space	IP613302		29.33 mL/h	0.05 10^3	00:02:13	
					Infusomat Space	IP613203	Remifentanyl	0.58 mL/h	0.05 10^3	00:18:38	
					Infusomat Space	IP613304		16 mL/h	0.05 10^3	00:06:04	
6	Rosarospa, Strega SR				Perfusor Space	IP613105	Diltiazem	19 mL/h	0.05 10^3	00:02:37	
					Perfusor Space	IP612906		5 mL/h	0.05 10^3	00:08:30	
					Perfusor Space	IP5M12903	Dobutamine	3 mL/h	0.05 10^3	00:05:23	
					Infusomat Space	IP2M12605	Gabexate mesylate	13 mL/h	0.05 10^3	00:15:45	
7	Ronfo, Gnomo GR				Infusomat Space	IP1M12401	Gabexate mesylate	4.8 mL/h	0.05 10^3	00:06:02	
					Perfusor Space	IP1M12802		24 mL/h	0.05 10^3	00:02:45	
					Perfusor Space	IP2M12701	Diltiazem	29.33 mL/h	0.05 10^3	00:06:50	
					Infusomat Space	IP2M13303	Dobutamine	5 mL/h	0.05 10^3	00:05:24	
8	Manino, Orco OM										
9	Orchidea, Orchesa OO										
10	Varana, Strega SV										

Fig 1

Enheterna kan grupperas efter typ: t.ex. en typ per grupp, eller också två eller fler typer per grupp. Sidorna motsvarande varje grupp visas i olika flikar (Bild 1 B): för varje sida kan det visade rastrets detaljer fullständigt anpassas.

Varje rad motsvarar en enhet. I configurationen, som här beskrivs, tillhandahålls följande information (vänster till höger)

- Plats (om enheten är kopplad till en patient)
- Säng (om enheten är kopplad till en patient)
- Patient (om enheten är kopplad till en patient)

- Larmtillstånd med högsta prioritet pågår (om sådant finns)
- Enhetens namn
- Enhetens serienummer
- Namn på infunderat läkemedel (om tillgängligt)
- Volym
- Cirkulationstryck
- Återstående tid till slutet av infusionen
- sammankopplingindikator
- Ikonen  visas när mjukgränsen (ställs in på pumpen) överskrids.

Spalterna med Plats, Säng, Patient och Larm finns alltid med. De andra spalterna visas om de aktiverats vid konfigurationen (med systemalternativ SmartMonitorConfig).

Enheter som inte är associerade visas utan information om plats / patient.

Rubriken i varje kolumn anger vilken typ av information som visas.

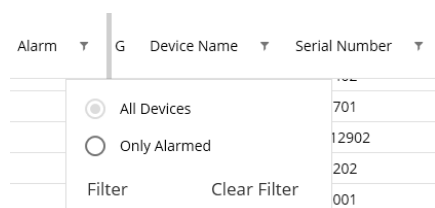


Fig 2

Ikonen  gör det möjligt att sortera och filtrera rutnät-innehållet.

Kolumnen **Identity** (sist till höger - Fig 1 **B**) indikerar om enheten redan är associerad med en patient eller inte.

Ikonen  indikerar att enheten inte är kopplad till en patient. Om raden är vald, visas knappen **Tilldela** på kommandoraden. Klicka på knappen för att koppla enheten till en patient.

Ikonen  indikerar att enheten redan är kopplad till en patient. Om raden är vald visas knappen **Ta bort tilldelning** på kommandoraden. Klicka på knappen för att ta bort.



Knapparna **Tilldela/Avbryt** startar modul Identity.Net, om denna installerats. På fasta arbetsstationer har denna modul till uppgift att förbinda eller lossa på förbindelsen mellan enhet och patient. Om Identity.Net inte installerats på arbetsstationen med Smart Monitor, så verkar knapparna **Tilldela/Avbryt** inte.

Om fler enheter är konfigurerade än det antal som kan visas på en enda skärm, visas en rullmeny till höger.

Scroll-knapparna som visas i Fig 3 **A** kan användas för att bläddra i enhetslistan.

Om en enhet, som för närvarande inte visas, larmas, markeras motsvarande scroll-knapp (antingen upp eller ner) (Fig 3).



Fig 3

Knappen **Ta bort filtren** rensar alla möjliga filter. Om ett filter är aktivt och en larmad enhet inte visas på grund av filtret, markeras knappen **Ta bort filtren**.