



Smart Monitor

Användarmanual

Version 3.0

2024-12-02

Smart Monitor



För information om produktens miljö, försiktighetsåtgärder, varningar och avsedd användning se USR SWE Digistat Care och/eller USR SWE Digistat Docs (beroende på installerade moduler - för Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (för Digistat Suite NA). Du måste läsa de lämpliga underlagen noga och förstå dem för att kunna använda Smart Monitor säkert och på rätt sätt, enligt denna bruksanvisning.

SMART MONITOR visar, på ett enda rutnät, alla medicinska enheter som för närvarande är konfigurerade inom den specifika Digistat Suite-installationen. Om enheten är kopplad till en patient, visas även patientinformation (patientens namn, säng, etc.). Övrig information visas i enlighet med konfigurationsvalen för hälsovårdsorganisationen som använder Digistat Suite. Se Fig 1 för exempel.

För att komma åt Smart Monitor:

- I sidofältet, klicka på ikonen som indikeras i Fig 1 A.

</

Fig 1

Enheterna kan grupperas efter typ: t.ex. en typ per grupp, eller också två eller fler typer per grupp. Sidorna motsvarande varje grupp visas i olika flikar (Bild 1 B): för varje sida kan det visade rastrets detaljer fullständigt anpassas.

Varje rad motsvarar en enhet. I konfigurationen, som här beskrivs, tillhandahålls följande information (vänster till höger)

- Plats (om enheten är kopplad till en patient)
- Säng (om enheten är kopplad till en patient)

- Patient (om enheten är kopplad till en patient)
- Larmtillstånd med högsta prioritet pågår (om sådant finns)
- Enhetens namn
- Enhetens serienummer
- Namn på infunderat läkemedel (om tillgängligt)
- Volym
- Cirkulationstryck
- Återstående tid till slutet av infusionen
- sammankopplingindikator
- Ikonen  visas när mjukgränsen (ställs in på pumpen) överskrids.

Spalterna med Plats, Säng, Patient och Larm finns alltid med. De andra spalterna visas om de aktiverats vid konfigurationen (med systemalternativ SmartMonitorConfig).

Enheter som inte är associerade visas utan information om plats / patient.

Rubriken i varje kolumn anger vilken typ av information som visas.

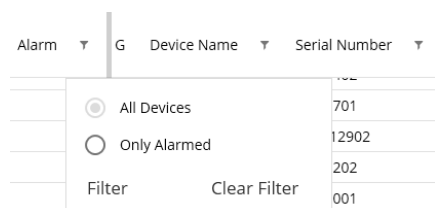


Fig 2

Ikonen  gör det möjligt att sortera och filtrera rutnät-innehållet.

Kolumnen **Identity** (sist till höger - Fig 1 **B**) indikerar om enheten redan är associerad med en patient eller inte.

Ikonen  indikerar att enheten inte är kopplad till en patient. Om raden är vald, visas knappen **Tilldela** på kommandoraden. Klicka på knappen för att koppla enheten till en patient.

Ikonen  indikerar att enheten redan är kopplad till en patient. Om raden är vald visas knappen **Ta bort tilldelning** på kommandoraden. Klicka på knappen för att ta bort.



Knapparna **Tilldela/Avbryt** startar modul Identity.Net, om denna installerats. På fasta arbetsstationer har denna modul till uppgift att förbinda eller lossa på förbindelsen mellan enhet och patient. Om Identity.Net inte installerats på arbetsstationen med Smart Monitor, så verkar knapparna **Tilldela/Avbryt** inte.

Om fler enheter är konfigurerade än det antal som kan visas på en enda skärm, visas en rullmeny till höger.

Scroll-knapparna som visas i Fig 3 **A** kan användas för att bläddra i enhetslistan.

Om en enhet, som för närvarande inte visas, larmas, markeras motsvarande scroll-knapp (antingen upp eller ner) (Fig 3).



Fig 3

Knappen **Ta bort filtren** rensar alla möjliga filter. Om ett filter är aktivt och en larmad enhet inte visas på grund av filtret, markeras knappen **Ta bort filtren**.