



Control Bar Web Käyttöopas

Versio 5.0

10/3/2025

Sisältö

1. Control Bar Web	3
1.1 Control Bar Webin käynnistäminen	3
1.2 Käyttäjän sisäänkirjautuminen.....	4
1.2.1 Automaattinen kirjautuminen.....	6
1.2.2 Kirjaudu ulos ja pysy	7
1.3 Työalue	8
1.3.1 Moduulin valitseminen	8
1.4 Control Bar.....	9
1.5 Päävalikko.....	10
1.5.1 Vaihda salasana	11
1.5.2 Käyttäjäongelmien raportointi	12
1.6 Ylimääräiset alimoduulit.....	13
1.6.1 CDSS Configurator	13
1.6.2 Identity	15

1. Control Bar Web



Lisätietoja tuoteympäristöstä, varotoimista, varoituksista ja käyttötarkoituksesta on osoitteessa *USR FIN Digistat Care ja/tai USR FIN Digistat Docs* (asennetuista moduuleista riippuen - *Digistat Suite EU*) tai *USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA)*. Asianmukaisen asiakirjan tuntemus ja ymmärtäminen ovat pakollisia tässä asiakirjassa kuvatun Control Bar Webin oikean ja turvallisen käytön kannalta.

1.1 Control Bar Webin käynnistäminen

Control Bar Webin käynnistäminen:

- Kirjoita tarkka osoite selaimen osoitepalkkiin.

Seuraava sivu avautuu:

Kuva 1

1.2 Käyttäjän sisäänkirjautuminen

Käyttäjän sisäänkirjautuminen on pakollista, jotta järjestelmän toiminnot voidaan ottaa käyttöön.

login

A

B

C

Kuva 2

Sisäänkirjautuminen:

- Kirjoita käyttäjänimesi "Käyttäjänimi" -kenttään (Kuva 2 **A**).
- Syötä salasanasi "Salasana" -kenttään (Kuva 2 **B**).
- Napsauta **Kirjaudu** -painiketta (Kuva 2 **C**).

Käyttäjä on tällä tavalla kirjautunut sisään.



Käyttäjätunnuksen ja salasanan antaa järjestelmänvalvoja. Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta ja salasanaa, sinulla ei ole oikeutta käyttää tuotetta.

Kun järjestelmään on päästy, kirjautunutta käyttäjää vastaava lyhenne näkyy ohjauspalkin **Käyttäjä**-painikkeessa (lyhenne on ADMIN Kuva 3 **A**-kohdassa).



Kuva 3

Käyttäjä, jonka kirjautumistiedot näkyvät Käyttäjä-painikkeessa, on vastuussa kaikista tuotteelle suoritetuista toimista.




Huomautus: Joktin poikkeukset ovat mahdollisia asennuksesi konfiguraatiosta riippuen (esim. automaattinen sisäänkirjautuminen tai "Kirjaudu ulos ja pysy" -toiminnallisuudet – kohdat 1.2.1 e 1.2.2).

On erittäin suositeltavaa kirjautua ulos ennen tuotteen työasemalta poistumista järjestelmän virheellisen käytön välttämiseksi.



On mahdollista määrittää tuote sallimaan sisäänkirjautuminen ulkoisen järjestelmän kautta ("single sign on"). Näissä tapauksissa sisäänkirjautumisnäytöllä näkyy oma painike.


Kirjaudu ulos napsauttamalla **Käyttäjä** -painiketta työistunnon aikana. Seuraava valikko avautuu (Kuva 4).

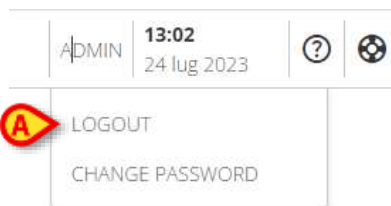

Kuva 4

- Napsauta **KIRJAUDU ULOS** (Kuva 4 A).

Käyttäjän vahvistus vaaditaan. Vahvistuksen jälkeen käyttäjä kirjataan ulos. Kirjaudu uudelleen sisään napsauttamalla **Käyttäjä**-painiketta uudelleen. Kuvassa näkyvä näyttö Kuva 2 tulee uudelleen näkyviin.

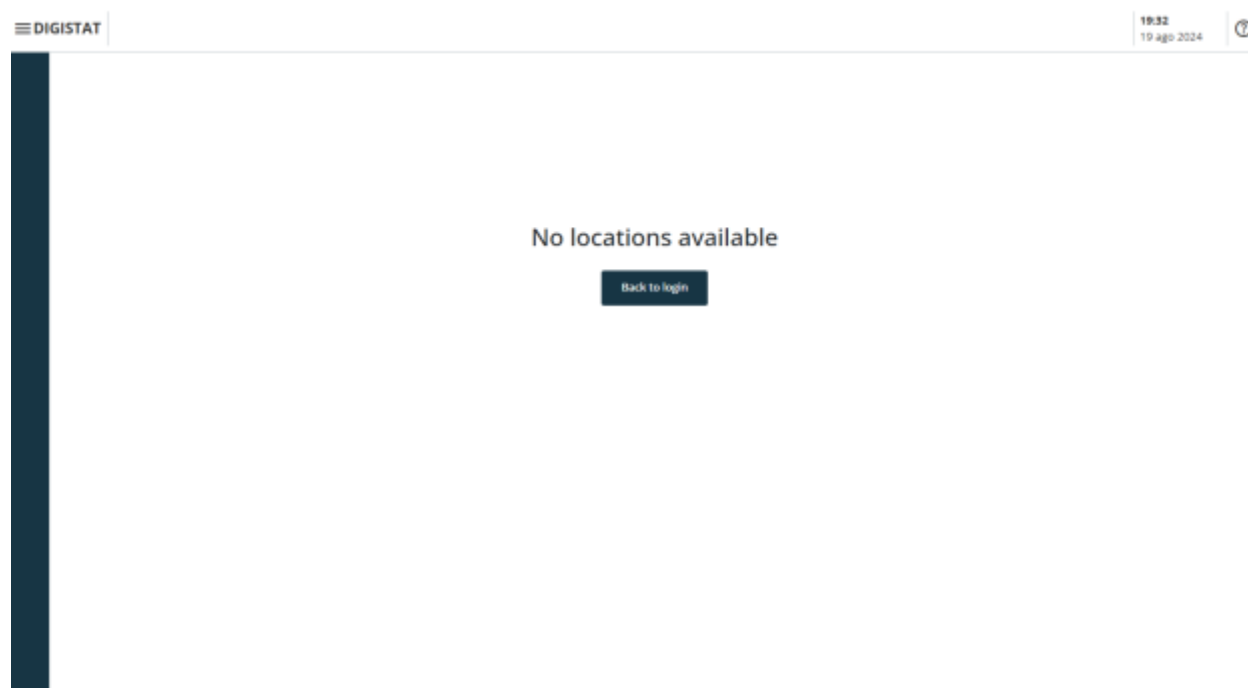

Kuva 5

Jos käyttäjällä ei ole aiemmin liitettyä sijaintia (katso *CGF ENG Digistat Suite MDR* -oppaasta käyttäjän sijainnin yhdistämisen konfigurointi), moduuliin ei ole mahdollista kirjautua. Tässä tapauksessa viesti "No location available" tulee näkyviin (Kuva 5). Lisäksi tarjotaan **Takaisin sisäänkirjautumiseen** -painike, jolla voit palata sisäänkirjautumissivulle

ja yrittää kirjautua uudelleen sisään uudella käyttäjällä tai samalla käyttäjällä käyttäjän sijainnin yhdistämisen jälkeen.



"Location" on Digistatin konfigurointikokonaisuus, joka vastaa terveydenhuollon rakenteen tiettyä aluetta. Se voi olla esimerkiksi osasto, vuodeosasto, leikkausosasto jne. terveydenhuoltorakenteen vaatimusten mukaan. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojilta.

1.2.1 Automaattinen kirjautuminen

On mahdollista konfiguroida Digistat Web sallimaan automaattinen käyttäjän sisäänkirjautuminen. Tämä tarkoittaa, että kun Digistat Web käynnistetään, määritetty käyttäjä on jo kirjautunut sisään. Kun näin on, jotkin määritellyt toiminnallisuudet ovat välittömästi käytettävissä ennen minkään sisäänkirjautumismenettelyn suorittamista.

Auto Login -toiminnon käyttöönottamiseksi on tarpeen määrittää "AutoLoginUsername" system option. Katso lisätietoja asiakirjasta DSO ENG System Options.

Kun automaattinen kirjautuminen on aktiivinen, käyttäjä voi silti kirjautua sisään henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tee se näin.

- Napsauta **Käyttäjä**-painiketta (Kuva 6 **A**).

DIGISTAT Select Patient



John Doe 12:40 PM
Sep 4, 2025



Kuva 6

Seuraava valikko avautuu (Kuva 7).



Kuva 7

- Napsauta **KIRJAUDU SISÄÄN NIMELLÄ...** (Kuva 7 **A**).

Kirjautumisruutu näytetään (Kuva 2). Kirjaudu sisään kappaleessa 1.2 kuvatualla tavalla.



Kun System Option "AutoLoginUsername" on määritetty, "Logout current user" -toiminnallisuus (kuvattu kappaleessa 1.2.2) on poistettu käytöstä.



"Auto Login" ja "Logout and remain" -toiminnot ovat käytettävissä vain, kun sovellus on käynnissä "Digistat Web Browser" -selaimessa. Katso Digistat Suite -asennusoppaasta lisätietoja (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Kirjaudu ulos ja pysy

Tämä toiminnallisuus mahdollistaa käyttäjän uloskirjautumisen pysyen samalla kirjautuneena käyttäjätunnuksella, joka on määritetty konfiguroinnin aikana. Tämä tarkoittaa, että tavallinen käyttäjä pysyy kirjautuneena sisään käyttäjän uloskirjautumisen jälkeen. Tämän toiminnallisuuden aktivoimiseksi on tarpeen konfiguroida "LogoutAndRemainUsername" system option. Katso lisätietoja asiakirjasta DSO ENG System Options. Kun tämä toiminnallisuus on käytettävissä, **Kirjaa nykyinen käyttäjä ulos** -vaihtoehto on käytettävissä "Käyttäjä"-valikossa (Kuva 9 A).

"Kirjaudu ulos ja pysy" näin

- Napsauta **Käyttäjä**-painiketta (Kuva 8 A).

DIGISTAT Select Patient



John Doe 12:48 PM
Sep 4, 2025



Kuva 8

Seuraava valikko avautuu (Kuva 9).




Kuva 9

- Napsauta **LOGOUT CURRENT USER** (Kirjaa nykyinen käyttäjä ulos - Kuva 9 A).

Nykyisen käyttäjän tunnistetiedot katoavat **Käyttäjä**-painikkeesta, kun taas perinteisesti määritetyn käyttäjän tunnistetiedot näytetään.

1.3 Työalue

Käyttäjän sisäänkirjautumisen jälkeen käytettävissä olevia Digistat Web -moduuleja vastaavat kuvakkeet näkyvät sivupalkissa (Kuva 10 **A**). Työalue (Kuva 10 **B**) näyttää sivupalkista valitun moduulin näytöt ja toiminnot.

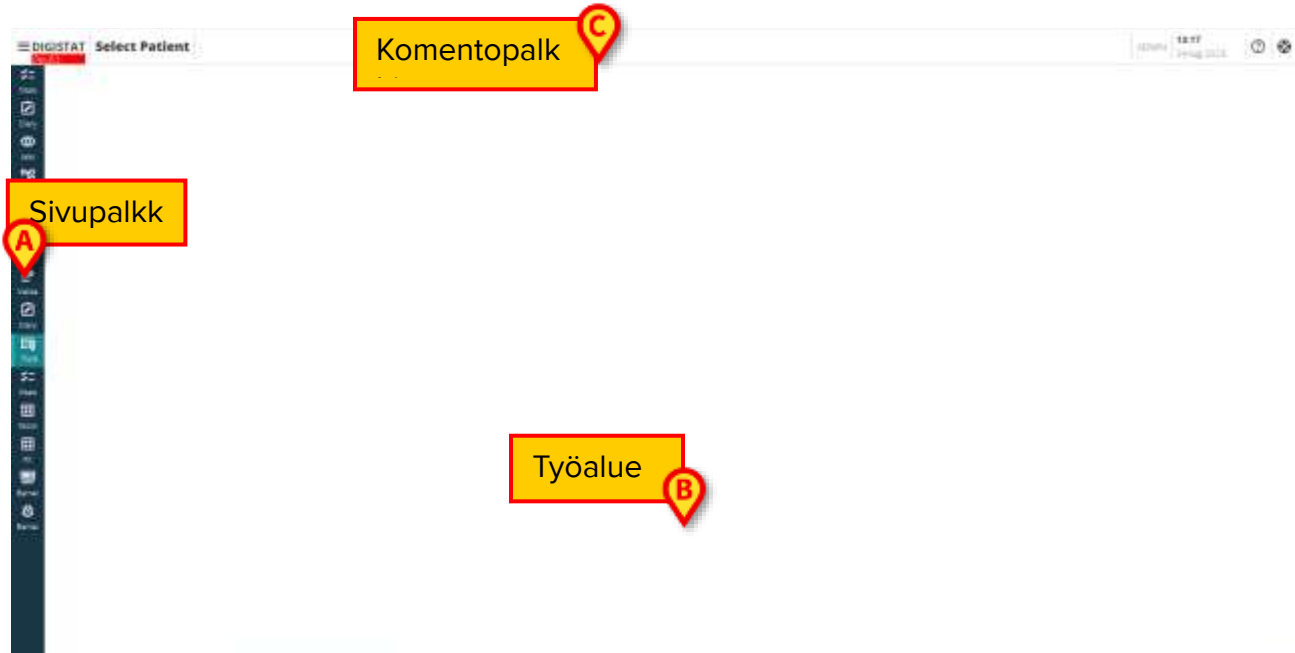

Kuva 10


Control Bar (Kuva 10 **C**) kuvataan osioissa 1.4 ja sitä seuraavissa. Tällä hetkellä valittu moduuli on korostettu.

1.3.1 Moduulin valitseminen

Moduulin valitseminen:

- Napsauta vastaavaa kuvaketta sivupalkissa.

Kuvake korostuu ja moduulin toiminnot näkyvät työalueella.

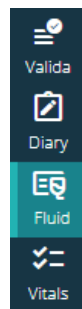

Kuva 11

1.4 Control Bar

Näytön yläosassa näkyvä Control Bar on yhteinen kaikille moduuleille. Sen pääominaisuudet on lueteltu alla.



Kuva 12

- **Valikkopainike** (Kuva 12 **A**) avaa Control Bar Web -päävalikon. Katso kohta 1.5.
- **Potilas-painike** (Kuva 12 **B**). Jos potilasta ei ole valittu, tätä painiketta voidaan napsauttaa potilaan valintamenettelyn käynnistämiseksi. Potilaan valinnan jälkeen näytetään potilaan nimi ja päätiedot. Hyväksytyille potilaille näytetään myös sängyn numero ja osaston nimi. Jos valitulle potilaalle on saatavilla erityisiä Control Bar Web -toimintoja, potilas-painiketta voidaan napsauttaa, jolloin avautuu pudotusvalikko, josta voit käyttää näitä toimintoja (katso lisätietoja osiosta 1.6). Jos potilaan nimen vieressä näkyy riippulukkokuvake , se tarkoittaa, että jotkin potilastiedot/-toiminnot on lukittu kyseiselle potilaalle.




Potilaan valintamenettely suoritetaan yleensä Digistat Patient Explorer Web -moduulissa. Katso potilaan hallintatoimintoja koskevat ohjeet USR FIN Patient Explorer Web -käyttöoppaasta (asiakirja USR FIN Patient Explorer Web). Potilaan valintaan voidaan määrittää muita moduuleja Patient Explorer Webin sijaan. Jos näin on, katso ohjeet erityisistä asiakirjoista.

- Kohdassa Kuva 12 **C** ilmoitettua aluetta voidaan käyttää ilmaisemaan, että käyttäjälle on tehty ilmoituksia.
- Käyttäjä-painike tarjoaa pääsyn sisään-/uloskirjautumis- ja salasananvaihtotoimintoihin (Kuva 12 **D**).
- Päivämäärä - kellonaika (Kuva 12 **E**).
- Käytä **Ohje**-painiketta (Kuva 12 **F**) päästäksesi online-ohjeeseen.
- Napsauta  (Kuva 12 **G**) -kuvaketta luodaksesi ongelmaraportin, joka lähetetään tekniselle tuelle tukea varten. Katso kohta 1.5.2.

1.5 Päävalikko

Valikkopainike (Kuva 12 **A**) avaa seuraavan valikon (Kuva 13).

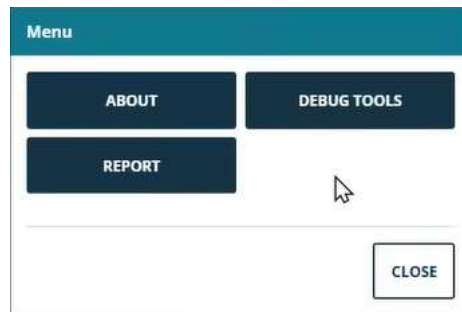

Kuva 13

Tietoja-painike näyttää ikkunan, joka sisältää tiedot asennetusta Digistat Suite -versiosta ja siihen liittyvistä lisensseistä (katso lisätietoja erityisestä dokumentaatiosta).

Tuotteen todellinen merkintä on asiakastyöasemilla, mobiililaitteissa ja verkkomoduuleissa näkyvä Tietoja-ruutu, johon Digistat Suite on asennettu.


Vianmäärittästyökalut -painike on varattu järjestelmänvalvojille.

Raportit-painike avaa ikkunan, jossa luetellaan käytettävissä olevat raportit (Kuva 14).

Raportti-painike on näkyvissä sekä potilaan ollessa valittuna että ilman valittua potilasta. Jos potilas on valittu, saatavilla olevat raportit ovat ne, jotka liittyvät potilaan sairaalan yksikköön (merkitty "Patient"). Jos potilasta ei ole valittu, saatavilla olevat raportit ovat kirjautuneen käyttäjän sairaalan yksikköön liittyviä (merkitty "Generic").



Jokainen käyttäjä liitetään konfiguroinnin aikana yhteen tai useampaan sairaalan yksikköön.

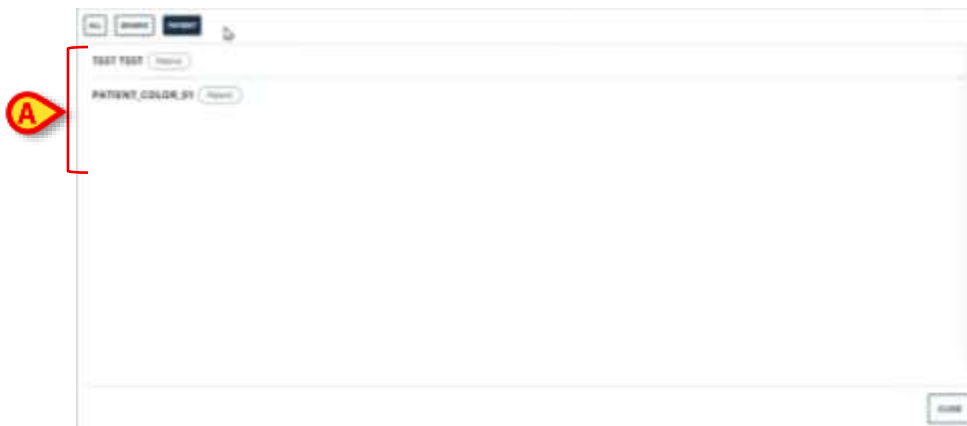

Kuva 14

Jokainen rivi ikkunassa viittaa tulostusraporttiin.

- Napsauta riviä näyttääksesi tulostusesikatselun.

Jokainen raportti voidaan merkitä joko "Potilasraportiksi" tai "Yleisraportiksi" (Kuva 15 **A**).



Kuva 15

Kohdassa Kuva 15 **B** osoitetut painikkeet mahdollistavat ikkunassa näytettävien raporttien suodattamisen (vain "Yleiset raportit", vain "Potilasraportit" tai kaikki saatavilla olevat raportit).

1.5.1 Vaihda salasana

Käyttäjän salasanan vaihtaminen:

- Napsauta **Käyttäjä**-painiketta Control Barissa (Kuva 16 **A**).



Kuva 16

- Seuraava valikko avautuu (Kuva 17).



Kuva 17

- Napsauta **Vaihda salasana** (Kuva 17 **A**). Seuraava näyttö avautuu (Kuva 18).

CHANGE PASSWORD



A Old password

B New Password

C Confirm new password

D SAVE

Kuva 18

- Kirjoita nykyinen salasana "VANHA salasana" -kenttään (Kuva 18 **A**)
- Kirjoita uusi salasana "Uusi salasana" -kenttään (Kuva 18 **B**).
- Kirjoita uusi salasana uudelleen kenttään "Vahvista uusi salasana" (Kuva 18 **C**).
- Napsauta **Tallenna** (Kuva 18 **D**).

1.5.2 Käyttäjäongelmien raportointi

Jos  kuvake on näkyvissä Control Barissa (Kuva 19 **A**), voit luoda ongelmaraportin ja saada tarvittaessa teknistä tukea.



Kuva 19

	<i>Kuvakkeen</i>	<i>läsnäolo</i>	<i>riippuu</i>	<i>järjestelmävaihtoehdosta</i>
	<i>EnableUserIssueReporting. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojilta.</i>			

Toimi näin:

- Napsauta  kuvaketta (Kuva 19 **A**). Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 20).

Kuva 20

- Kirjoita ongelman kuvaus "Kuvaus" -kenttään (Kuva 20 **A**).
- Napsauta **Lähetä** (Kuva 20 **B**).

Vahvistus annetaan, mukaan lukien myöntäjän tunnusnumero.

1.6 Ylimääräiset alimoduulit

Tässä jaksossa kuvatut alimoduulit voivat olla läsnä tai puuttua, riippuen tuotteen kokoonpanosta terveydenhuolto-organisaatiossa. Kukin alimoduuli voidaan avata napsauttamalla tiettyä valikkokohtaa avattavasta valikosta, joka näkyy potilaan painikkeen vieressä. Ne liittyvät potilaaseen, eli ne ovat käytettävissä vain, jos potilas on jo valittu.

1.6.1 CDSS Configurator

CDSS Configurator -alimoduuli voidaan ottaa käyttöön konfiguroinnin avulla Control Bar Web -lisäosana. CDSS Configurator -alimoduulin avaaminen:

- Valitse asianomainen potilas.



Katso USR FIN Patient Explorer Web -käyttöoppaasta potilaan valintamenettely (dokumentoi USR FIN Patient Explorer Web).

Jos potilasvalinnan jälkeen käytettävissä on muita Control Barin alimoduuleja,  kuvake näkyy potilaspainikkeessa (Kuva 21 **A**).



Kuva 21

- Napsauta  kuvaketta.


Näyttöön tulee avattava ikkuna, jossa luetellaan käytettävissä olevat lisäalimoduulit (Kuva 22).



Kuva 22

- Napsauta "CDSS CONFIGURATION" (Kuva 22 **A**).

Näyttöön tulee seuraava ikkuna, jossa luetellaan tällä hetkellä valittuun potilaaseen liittyvät säännöt (Kuva 23).

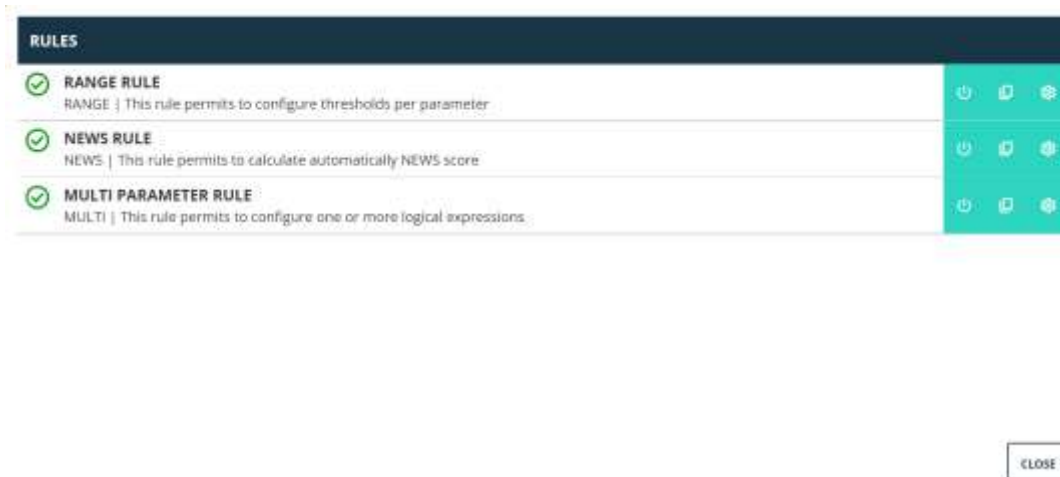

Kuva 23

Katso täydellinen kuvaus ja tämän alimoduulin käyttöohjeet CDSS Configuratorin käyttöoppaasta (dokumentoi USR FIN CDSS Web).

1.6.2 Identity

Identityn alimoduuli voidaan ottaa käyttöön konfiguroinnilla Control Bar Webin lisäosana. Identity-alamoduulin avaaminen:

- Valitse asianomainen potilas.



Katso USR FIN Patient Explorer Web -käyttöoppaasta potilaan valintamenettely (asiakirja: USR FIN Patient Explorer Web).


Jos potilasvalinnan jälkeen käytettävissä on muita Control Barin alimoduuleja, kuvake näkyy potilaspainikkeessa Kuva 24 (**A**).



Kuva 24

- Napsauta  kuvaketta.


Näyttöön tulee avattava ikkuna, jossa luetellaan käytettävissä olevat lisäosiot (Kuva 25).

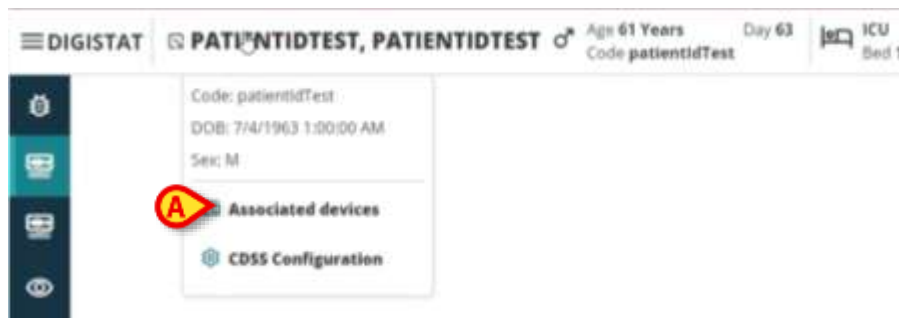

Kuva 25

- Napsauta "Associated Devices" (Kuva 25 **A**).

Näyttöön tulee seuraava ikkuna, jossa luetellaan tällä hetkellä valittuun potilaaseen liittyvät laitteet (Kuva 26).

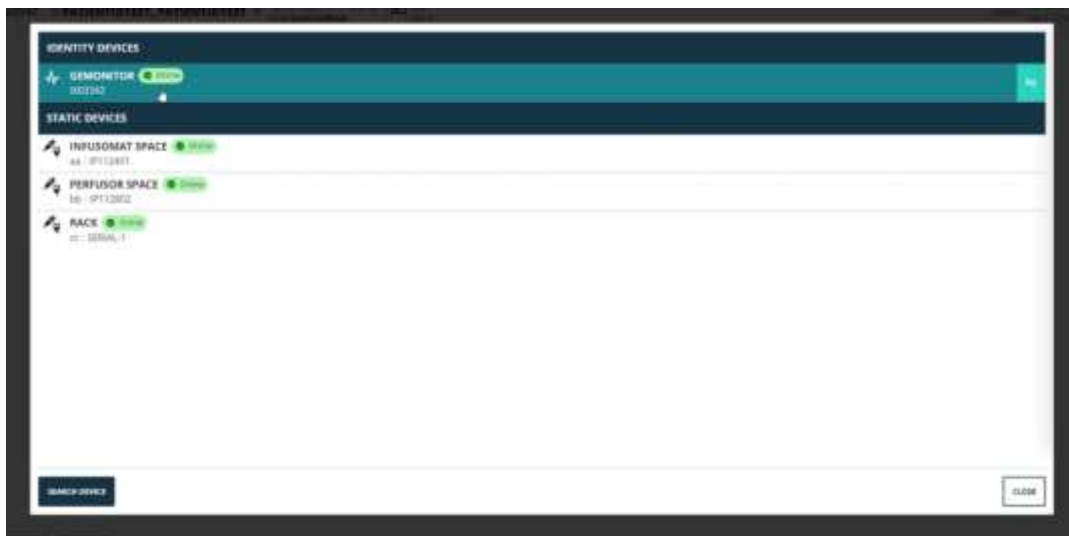

Kuva 26

Katso Identityn käyttöoppaasta täydellinen kuvaus ja tämän alimoduulin käyttöohjeet (asiakirja USR FIN Identity Web).