

Identity Web Käyttöopas

Versio 0.1

2024-10-22

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italia Puh. (+39) 055 0512161 – Faksi (+39) 055 829030 www.ascom.com

Sisältö

Identity Web	3
1. Johdanto	3
2. Potilaan valinta	3
3. "Identity Web" valinta	4
4. Luettelo liitetyistä laitteista	5
5. Irrottamismenettely	6
6. Haku- ja assosiaatiomenettely	8
6.1. Irrottaminen haun jälkeen	10
6.2. Jo pariliitetyt laitteet	11
7. Viivakoodin haku ja valinta	12

Identity Web



Lisätietoja tuoteympäristöstä, varotoimista, varoituksista ja käyttötarkoituksesta on asiakirjoissa USR FIN Digistat Care ja/tai USR FIN Digistat Docs (asennetuista moduuleista riippuen - Digistat Suite EU) tai USR ENG Digistat Suite NA (Digistat Suite NA). Asianmukaisen asiakirjan tuntemus ja ymmärtäminen ovat pakollisia tässä asiakirjassa kuvatun "Identity Webin" oikean ja turvallisen käytön kannalta.

1. Johdanto



Identity Web on Control Bar Webin alimoduuli, joka voidaan ottaa käyttöön tai ottaa pois käytöstä tietyssä terveydenhuollon organisaatiossa käytössä olevan konfiguraation mukaan. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojilta.

"Identity Web" mahdollistaa lääkinnällisten laitteiden nopean yhdistämisen/irrottamisen potilaisiin Digistat Web -ympäristön yhteydessä.



Vain konfiguroitujen laitteiden alisarja on kelvollinen nopeaan yhdistämis-/ irrottamismenettelyyn. Toimenpidettä sovelletaan yleensä Wi-Fi-laitteisiin, joita siirretään usein potilaalta toiselle. Kaikissa tapauksissa laitteen ominaisuudet, käyttötapa ja konfiguraatio tekevät siitä tässä kuvatun menettelyn mukaisen tai ei.

2. Potilaan valinta

"Identity Web" voidaan käynnistää vasta potilaan valinnan jälkeen. Potilaan valitseminen

> Napsauta kohdassa Kuva 1 A näkyvää Valitse Potilas -painiketta.

EDIGISTAT	Select Patient	ADMIN	12:49 24 lug 2023	?	Ø

Kuva 1

Patient Explorer Web (Potilaan verkkoselain) -moduuli avautuu. Katso Digistat[®] Patient Explorer Web -käyttöoppaasta (*USR FIN Patient Explorer Web*) lisäohjeita potilaan hoitotoiminnoista.

Potilaan valintaan voidaan konfiguroida muita moduuleja Patient Explorer Webin sijaan konfiguroinnista riippuen. Jos näin on, katso ohjeet erityisistä asiakirjoista.

Kun potilas valitaan, potilaan nimi ja tärkeimmät tiedot näkyvät **Potilas**-painikkeessa (Kuva 2 **A**).



3. "Identity Web" valinta



Napsauta Napsauta

Näyttöön tulee avattava ikkuna, joka sisältää lisää potilastietoja ja käytettävissä olevat sovellukset, jotka voidaan käynnistää ohjauspalkissa (Kuva 4).



> Napsauta "Associated Devices" (Kuva 4 A).

Näyttöön tulee seuraava ikkuna, jossa luetellaan tällä hetkellä valittuun potilaaseen liittyvät laitteet (Kuva 5).



4. Luettelo liitetyistä laitteista

"Associated Devices list" -ikkuna (Kuva 5) on jaettu kahteen osaan:

Identity Devices -osiossa (Kuva 5 **A**) luetellaan siirrettävät laitteet, jotka on tällä hetkellä liitetty valittuun potilaaseen.

Staattiset laitteet -osiossa (Kuva 5 **B**) luetellaan laitteet, jotka on linkitetty valittuun sänkyyn ja joita ei voi siirtää.

"Identity Web" toimii vain Identity Devices -laitteissa.

Jokainen ikkunan rivi vastaa laitetta (ks. Kuva 6esimerkki).

PERFUSOR SPACE O online bb IP112802	
	Kuva 6
Jokaisesta laitteesta näytetään seuraav	at tiedot:
	B C
	IP112802
	E Kuva 7

- Laitetyyppiä kuvaava kuvake (Kuva 7 A)
- Laitteen nimi (Kuva 7 **B**).
- Laitteen tilan ilmaisu (Kuva 7 C joko online- tai offline-tilassa).
- Merkintä, joka voidaan liittää laitteeseen konfiguroinnin aikana lisätietojen antamiseksi (Kuva 7 D)
- Laitteen sarjanumero, joka yksilöi laitteen (Kuva 7 E).

Liittyvien laitteiden luettelon sulkeminen:

> Napsauta kohdassa CKuva 5 näkyvää Sulje-painiketta.

Jokaiselle liitetylle laitteelle on mahdollista näyttää ikkuna, jossa luetellaan tietyn laitteen hankkimat parametrit, niiden arvot ja mittayksikkö. Toimi näin:

Napsauta laitetta vastaavaa riviä (Kuva 8 A).

Näyttöön tulee kohdassa Kuva 8 B ilmoitettu ikkuna.

Tässä ikkunassa luetellaan laitteen hankkimat parametrit ja ilmoitetaan niiden nimi, viimeisin arvo ja mittayksikkö.

		Parameters		×
	Name	Value	Unit of measure	1
IAU3342	11 C7041	5	5	
STATIC DEVICES	C IH+L	58	mL/cm H2O	
INFUSOMAT SPACE Online	RAW	34	cm H2O/L/s	
aa IP112401	EtO2	65		
PERFUSOR SPACE Online	RR CO2	71	bpm	
bb IP112802	Alarm Silenced	Audio On	La .	
RACK O Online	Temp Other	45	°C	
	Temp Other #2	37	°C	
	Temp Other #3	68	°C	
	Temp Other #4	15	°C	
	Temp Blood	91	°C	
	Temp Blood #2	17	°C	
	Temp Blood CO	37	°C	
	Temp Blood PA	46	°C	
	Temp Blood PA #2	43	°C	
	L			
SEARCH DEVICE			Ľ	LOS

Kuva 8

5. Irrottamismenettely

"Identity Web" sallii toiminnan vain "Identity Devices" -laitteissa (siirrettävissä laitteissa, potilaaseen liittyvissä laitteissa, joita ei ole liitetty sänkyyn).

Irrottamispainike näkyy "Identity Devices" -laitteita (Kuva 9 A) vastaavien rivien oikealla puolella.



Napsauta painiketta (Kuva 9 A).

Käyttäjän vahvistus vaaditaan, kuten kohdassa Kuva 10 A on esitetty.



Vahvistuksen jälkeen laite irrotetaan, mutta kehityssyistä, jotka edellyttävät asteittaista irrottamista, irrotettua laitetta vastaava rivi on:

a) näytetään ensin "static devices" -alueella "Online" -tilassa (Kuva 11 A);

No	identity devices
STA	TIC DEVICES
Ø.	aa IP112401
Ø.	bb IP112802
₽ _Q	RACK Online cc SERIAL-1
₩	GEMONITOR Online

b) sitten konfiguroitavan ajan kuluttua näytetään "Offline" (Kuva 12 A);

(

No	identity devices
ST	ATIC DEVICES
×ę.	aa IP112401
Ø.	bb IP112802
×.	RACK Online cc SERIAL-1
M	GEMONITOR () Offline

c) sitten konfiguroitavan ajan kuluttua, poistetaan luettelosta (Kuva 13).



Kuva 13



Katso myös 6.1 osio irrottamismenettelystä haun jälkeen.

6. Haku- ja assosiaatiomenettely

Voit etsiä laitetta ja liittää sen tällä hetkellä valittuun potilaaseen seuraavasti:

> Napsauta Etsi laite -painiketta "Liitettyjen laitteiden luettelo" -ikkunassa (Kuva 14 A).



Kuva 14

Oikealla näkyy hakutyökalu (Kuva 15 A).

IDENTITY DEVICES	SEARCH DEVICE
No identity devices	Search
STATIC DEVICES	You must insert atleast 3 characters to search for devices.
aa IP112401	Bralick here to scan barcode.
b IP112802	Found devices
C SERIAL-1	No devices
GEMONITOR O Online	
SEARCH DEVICE	CLOSE

Kuva 15

Kirjoita kyseisen laitteen nimi tai sarjanumero kohdassa Kuva 16 A ilmoitettuun kenttään.

Tulosten näyttämiseksi on määritettävä vähintään kolme merkkiä. Määritettyä merkkijonoa vastaavien laitteiden luettelo näkyy "Associated Devices List" -alueella (Kuva 16 **B**).

Viivakoodihaku on myös käytössä (katso 7 ohjeet osiosta).

You mus	I insert atleast 3 characters to search for devices.
[]]	Click here to scan barcode.
Found	d devices
~ ~	EVITAVENTILATOR
≁	GEMONITOR IX03342

Napsauta liitettävän laitteen oikealla puolella olevaa painiketta.

Vastaava rivi muuttuu kohdassa Kuva 17 A esitetyllä tavalla.

Search	
ix0	
ou must insert atleast 3 characters to search for	devices.
Click her	to scan barcode.
	e to scan barcode.
Click her	e to scan barcode.
Click her ound devices EVITAVENTILATOR IX05013	Confirm connection
Click her ound devices EVITAVENTILATOR IX05013	Confirm connection



Yhdistämisen vahvistaminen

Napsauta OK-painiketta (Kuva 17 B).

Laite näkyy sitten siihen liittyvien laitteiden luettelossa "Identity device" -alueella (Kuva 18 A).

A	EVITAVENTILATOR Online IX05013	
STA	TIC DEVICES	
P _Q	INFUSOMAT SPACE Online aa IP112401	
×.	bb IP112802	
Ρų	RACK © Onine cc SERIAL-1	
SEAR	RCH DEVICE	

6.1. Irrottaminen haun jälkeen

Jo määritetyt laitteet näkyvät myös hakutuloksina, mutta oikealla näkyy irrottamispainikkeen

(Kuva 19 **A**) sijaan irrotuspainike.

IDENTITY DEVICES	SEARCH DEVICE
GEMONITOR Online	Searchix0
STATIC DEVICES	You must insert alleast 5 characters to search for devices.
aa i IP112401	Click here to scan barcode.
PERFUSOR SPACE Online bb IP112802	Found devices EVITAVENTILATOR Already paired
cc SERIAL-1	



Irrota laitteen yhteys napsauttamalla painiketta.

Käyttäjän vahvistus vaaditaan.

> Vahvista irrottaminen (AKuva 20) napsauttamalla **OK-painiketta**.

SEARCH	H DEVICE	
Sear	rch	
ix0		
You mus	st insert atleast 3 characters to search for devices.	
p == == [Click here to scan barcode	
[Click here to scan barcode.	
Found	Click here to scan barcode.	
Found	Click here to scan barcode. d devices EVITAVENTILATOR @ Already paired	_
Found	Click here to scan barcode. d devices EVITAVENTILATOR (C Already paired IX05013	<u>A</u>
Found	Click here to scan barcode. d devices EVITAVENTILATOR @ Already paired IX05013 GEMONITOR	

Kuva 20

Irrotettu laite katoaa "Identity Devices" -alueelta liitettyjen laitteiden luettelossa. Se näkyy edelleen hakutuloksissa yhdistettävänä laitteena.

6.2. Jo pariliitetyt laitteet

Muihin potilaisiin liitetyt laitteet näkyvät hakutuloksissa nimellä "Already paired" (Kuva 21 A).

SEARCH	H DEVICE	>
- Sear	ch	
ixd		
You mus	t insert atleast 3 characters to search for devices.	
[***	Click here to scan barcod	
l		-
Found	d devices	
643	EVITAVENTILATOR O Already paired IX05013	0
৵	GEMONITOR IX03342	
	Kuva 21	

"Already paired" -laitteet voidaan liittää tällä hetkellä valittuun potilaaseen kohdassa kuvatulla vakiomenettelyllä6. Näissä tapauksissa vaaditaan erityinen käyttäjän vahvistus (Kuva 22).



> Napsauta OK liittääksesi laitteen tällä hetkellä valittuun potilaaseen (Kuva 22 A).

Laite irrotetaan näin edellisestä potilaasta ja liitetään tällä hetkellä valittuun potilaaseen.

7. Viivakoodin haku ja valinta

Laite voidaan valita viivakoodihakujen jälkeen. Viivakoodin valinnan ottamiseksi käyttöön Etsi laite -ikkunassa:

> Napsauta kohdassa Kuva 23 A ilmoitettua aluetta.

SEARCH DEVICE		
Search		
You must insert atleast 3 cha	aracters to search for devices.	
	Inclick here to scan barcode.	
Found devices		
No devices		
		_
		c
	Kuwa 23	

Työaseman kamera aktivoituu (Kuva 24 A).



Skannaa kyseisen laitteen viivakoodi.

Laitteen tiedot näkyvät "Found devices" -alueella "Search Device" -ikkunassa (Kuva 25 A).

Search		
ix0	I	
You must insert atleast 3 characters to see	arch for devices.	
Found devices		
Found devices		
Found devices EVITAVENTILATOR IX05013		
Found devices EVITAVENTILATOR IX05013		
Found devices EVITAVENTILATOR IX05013		
Found devices EVITAVENTILATOR IX05013		
Found devices EVITAVENTILATOR IX05013		
Found devices EVITAVENTILATOR IX05013		

> Jatka liitettämismenettelyä kohdassa kuvatulla tavalla6.

Oletusarvoisesti aktivoitu kamera on takakamera. "Identity Web" voidaan konfiguroida sallimaan kameran vaihto. Siinä tapauksessa erityinen painike -- näkyy "Barcode reader" -alueella "Search Device" -ikkunassa (Kuva 26 **A**). Ota yhteyttä järjestelmänvalvojiin saadaksesi lisätietoja tästä toiminnosta.





Järjestelmävaihtoehto voidaan määrittää jäljittämään valitut laitteet viivakoodin avulla lisäämällä etuliite ja jälkiliite laitteen sarjanumeroon. Etuliite ja jälkiliite eivät näy käyttöliittymässä.