



On Line Mobile Käyttöopas

Versio 3.0

2023-03-29

Sisältö

On Line Mobile	3
1. Johdanto	3
2. Tietojen näyttäminen	3
3. Tietojen kerääminen	3
4. On Line Mobile -moduulin käynnistäminen	4
5. Potilasluettelosivu	5
6. Sivuluettelonäyttö	6
7. On Line -sivut	7
7.1. Kaaviot	7
7.1.1. Kaavioiden kuvaus	8
7.1.2. Komentopalkki	10
7.2. Mikrobiologia.....	11
7.2.1. Otsikko.....	11
7.2.2. Suodattimet	12
7.2.3. Tietoruudukko	13
7.3. Laboratorio	14
7.3.1. Laboratorio – tietoruudukko.....	15

On Line Mobile



Katso tämän tuotteen käyttöympäristöä koskevat yleiset ja tarkemmat tiedot ja Mobile Launcher -ohjelmiston käyttöohjeet niitä käsittelevistä tuotteen asiakirjoista. Näiden asiakirjojen sisältämien tietojen tunteminen ja ymmärtäminen on ehdottoman välttämätöntä, jotta On Line Mobile -moduulia on mahdollista käyttää asianmukaisesti ja turvallisesti tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.



Kaikki On Line Mobile -moduulin ominaisuudet ja toiminnot ovat käytettävissä vasta, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Käyttäjälle näytetään ponnahdusviesti, jos käyttöön vaaditaan sisäänkirjautuminen.

1. Johdanto

On Line Mobile on sovellus, joka näyttää potilaaseen liitetystä lääkinnällisistä laitteista (esim. monitori, hengityslaitte ja laboratorio) saapuvat tiedot. Käyttäjä voi integroida ja vahvistaa kerätyt raakatiedot ja luoda niistä tarkkaa ja lukukelpoista tietoa.

Sovellus voidaan myös määrittää muodostamaan yhteys muihin Digistat®-moduuleihin ja näyttämään niiden tiedot (esimerkiksi Digistat® Diary ja Digistat® Connect).

2. Tietojen näyttäminen

Tiedot voidaan näyttää kaavioina. Tietojen näyttötapa on mukautettavissa monipuolisesti. Pyydä mukauttamista koskevat tiedot järjestelmänvalvojiltasi. Tämän oppaan kuvat näyttävät esimerkin tavasta, jolla tiedot voidaan näyttää.

3. Tietojen kerääminen

Tiedot voidaan kerätä automaattisesti, tai käyttäjät voivat syöttää ne manuaalisesti.


Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla yhteensopivien lääkinnällisten laitteiden (esim. hengityslaitteet ja potilasmonitorit) lähettämät parametrit tai laboratorion lähettämät tiedot (esim. tutkimusten tulokset).

Manuaalinen muokkaaminen mahdollistaa tietojen tarkistamisen ja vahvistamisen, artefaktien ja tarpeettomien tietojen poistamisen sekä arvojen syöttämisen milloin tahansa, jos tietoja ei ole mistä tahansa syystä mahdollista kerätä automaattisesti.

4. On Line Mobile -moduulin käynnistäminen


On Line Mobile -moduulin käynnistäminen:

- Paina sovelluksen riviä mobiililaitteen näytössä (Kuva 1).

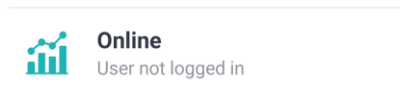

Kuva 1

On Line Mobile -sovelluksen potilasluettelosivu avautuu (Kuva 2):

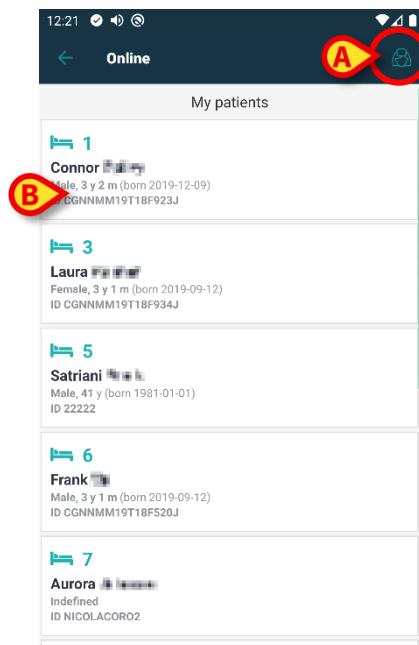

Kuva 2

On Line Mobile -sovelluksen käyttö vaatii, että sinun on valittava jokin potilas. Jos mitään potilasta ei ole valittuna, näkyviin tulee tyhjä näyttö, jossa näkyy muistutus "Tämä moduuli vaatii potilaan". Katso kohta 5.

5. Potilasluettelosivu

On Line Mobile -sovelluksen potilasluettelosivu (Kuva 2) näyttää luettelon ”Omat potilaat” -luetteloon sisältyvistä potilasta. Katso ”Omat potilaat” -luetteloa koskevat lisätiedot asiakirjasta *USR FIN Mobile Launcher*.

- Hallitse ”Omat potilaat” -luetteloa painamalla ”Omat potilaat” -painiketta (Kuva 2 **A**).

Jokainen potilas näytetään omalla rivillään (Kuva 3).



Kuva 3

Rivi sisältää seuraavat tiedot (mukautettavissa):

- Vuodepaikan numero (jos saatavilla – Kuva 3 **A**).
 - Potilastiedot (sukupuoli, ikä, syntymäaika, potilastunnus – Kuva 3 **B**).
 - Vuodepaikan potilaan nimi (Kuva 3 **C**).
- Avaa sivuluettelonäyttö ja hallitse siihen sisältyviä On Line -sivuja painamalla haluamasi potilaan riviä (esim. Kuva 2 **B**). Katso kohta 6.

6. Sivuluettelonäyttö


Sivuluettelonäyttö näyttää luettelon kaikista valitulle potilaalle saatavilla olevista On Line Mobile -sivuista. Nämä sivut näyttävät potilaan tiedot kaavioina.

Samalle potilaalle voidaan määrittää erilaisia On Line Mobile -sivuja, joista jokainen keskittyy johonkin tiettyyn parametrien alajoukkoon. Sivulla näytettäville tiedoille voidaan valita asetuksia määrittäessä omat symbolit.



Pyydä käytettävissä olevia asetusvaihtoehtoja koskevat tiedot järjestelmänvalvojilta.

Sivuluettelonäyttö muodostuu kahdesta alueesta: tärkeimmät potilastiedot näyttävästä otsikkoalueesta (Kuva 4 **A**) ja potilaalle määritettyjen On Line -sivujen luettelosta (Kuva 4 **B**).

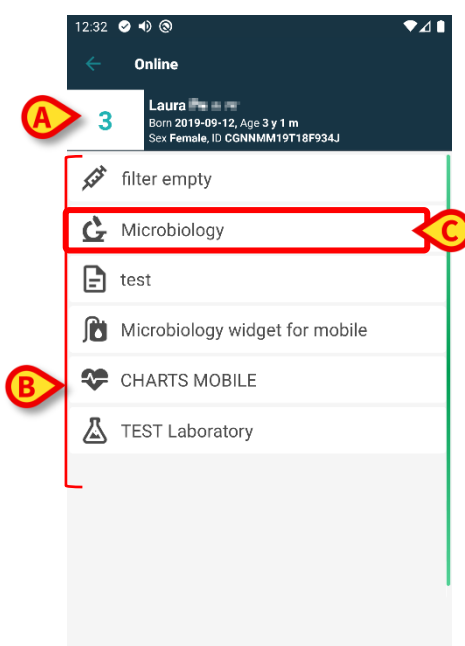

Kuva 4

Otsikkoalue (Kuva 4 **A**) näyttää samat tiedot kuin potilasluettelonäytön potilasrivi (kuvattu kohdassa 5).

- Avaa haluamasi On Line -sivu (esim. Kuva 4 **C**) napauttamalla sen riviä (Kuva 5). Katso kohta 7.


7. On Line -sivut

Sivuja on kolmea mahdollista tyyppiä:

- 1 – kaavio, joka näyttää potilaan määritetyistä laitteista saapuvat tiedot kaaviomuodossa.
- 2 – mikrobiologia, joka näyttää mikrobiologian laboratorion saapuvat tiedot ruudukkomuodossa.
- 3 – laboratorio, joka näyttää laboratoriotiedot ruudukkomuodossa.

7.1. Kaaviot

”Kaavio”-sivu (Kuva 5) näyttää valitulle potilaalle saatavilla olevat tiedot kaavioina.

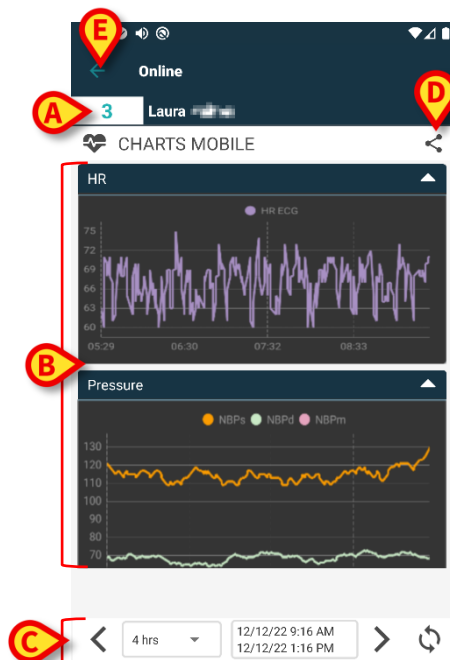


Kuva 5

- Vuodepaikan numero ja potilaan nimi näkyvät sivun yläosassa (Kuva 5 A).
- Kaaviot näytetään sivun keskiosassa (Kuva 5 B). Kaaviot on kuvattu kohdassa Kaavioiden kuvaus.
- Alalaidan navigointipalkki (Kuva 5 C) mahdollistaa kaavioiden navigoinnin ajassa taaksepäin ja eteenpäin. Navigointipalkki on kuvattu kohdassa 7.1.2.
- -kuvake (Kuva 5 E) mahdollistaa saatavilla olevien tietojen jakamisen.

Tämä tapahtuu seuraavasti:

- Napauta -kuvaketta. Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 6):

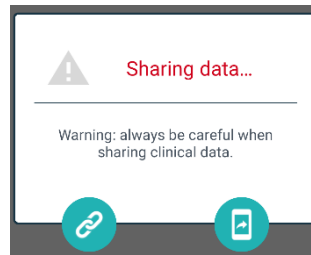

Kuva 6

-painike kopioi nykyisen sivun Digistat Mobile -linkin leikepöydälle ja mahdollistaa sen jakamisen mobiililaitteessa käytettävissä olevia sovelluksia käyttämällä.

-painike mahdollistaa nykyisen sivun kuvankaappauksen jakamisen.



"Jaa"-toiminto voi olla käytössä tai poissa käytöstä määritetyistä asetuksista riippuen. Pyydä asetuksia koskevat lisätiedot järjestelmänvalvojilta.

Käyttäjälle näytetään viesti, jos valittuna olevalle potilaalle ei ole määritetty kaavioita.

Käyttäjälle näytetään viesti, kun sovellus siirtyy talviajasta kesäaikaan tai päinvastoin.

7.1.1. Kaavioiden kuvaus

Määritettyjen parametrien trendit näytetään kaavioina (Kuva 7).



Kuva 7


Kaavion nimi (Kuva 7 E) näkyy kaavion yläpuolella.

Vaaka-akseli (Kuva 7 A) esittää aikaa.

Pystyakselit (Kuva 7 B) osoittavat näytettyjen parametrien arvon. Käytettävissä on kaksi arvoasteikkoa, joista toinen on vasemmalla ja toinen oikealla.

Näytettyjen parametrien nimet (Kuva 7 C) näkyvät kaavion yläosassa. Fontin väri vastaa kaaviossa parametrin trendin piirtämiseen käytettyä väriä.

- Näytä haluamasi kohdan arvot dynaamisesti napauttamalla kaaviota. Näkyviin tulee alla oleva ponnahdusikkuna (Kuva 8).

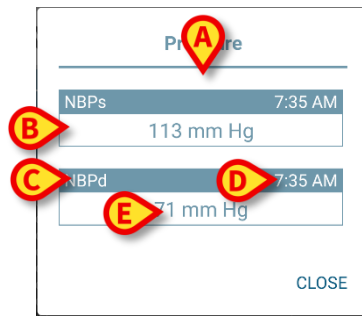

Kuva 8

Ponnahdusikkunan otsikko (Kuva 8 **A**) on sama kuin kaavion otsikko.

Jokainen parametri näytetään erillisessä laatikossa (Kuva 8 **B**), joka sisältää parametrin nimen (Kuva 8 **C**), mittauksen aikaleiman (Kuva 8 **D**) ja parametrin arvon (Kuva 8 **E**). Jokaisen parametrin mittayksikkö näytetään parametrin arvon vieressä.

- Sulje tämä ponnahdusikkuna painamalla **Sulje**-painiketta.
- Piirrä pystysuuntainen kohdistinpalkki (Kuva 9 **A**) painamalla kaaviota ja vetämällä sitä vasemmalle tai oikealle.

Samaan aikaan kerätyt arvot näytetään korostettuina sivun muissa kaavioissa. Näytön alalaidassa näkyvä ilmoitusikkuna (Kuva 9 **B**) näyttää lähinnä valittua aikaa olevat arvot määritetyn alueen mukaan.

- Sulje ilmoitusikkuna painamalla **Sulje**-painiketta (Kuva 9 **C**).
- Avaa parametrin tarkemmat tiedot näyttävä ponnahdusikkuna (Kuva 8) painamalla **Tiedot**-painiketta (Kuva 9 **D**).



Kuva 9


- Kutista kaavio painamalla ylänuolipainiketta (Kuva 7 **D**).



Katso On Line Mobile -moduulin kaavioiden fonttien ja värien mukauttamista koskevat tiedot asiakirjasta CFG FIN On Line Validation.

Vaihtoehtoinen teema


On Line Mobile -kaavioille voidaan valita asetusten määrittämisen yhteydessä vaihtoehtoinen teema (valkoinen tausta) (katso alla oleva Kuva 10). Pyydä lisätiedot järjestelmänvalvojalta.

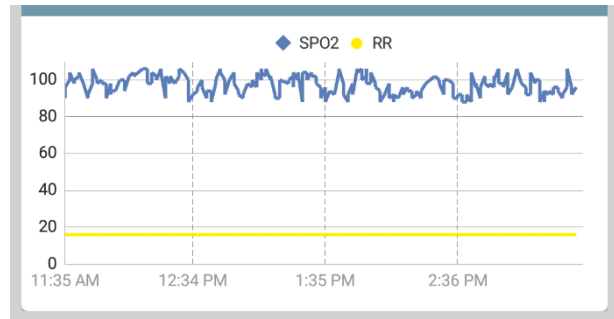

Kuva 10


7.1.2. Komentopalkki

On Line Mobile -komentopalkki (Kuva 11) sisältää työkalut, jotka mahdollistavat kaavioiden navigoinnin.

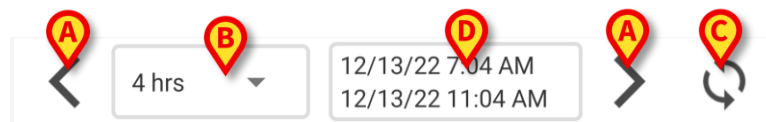

Kuva 11

- Vieritä näytön sisältöä vasemmalle tai oikealle käyttämällä nuolipainikkeita (Kuva 11 A).
- Valitse aikavälivalikosta (Kuva 11 B) aika, jolta tiedot näytetään. Aikavälivalikko on esitetty alla:

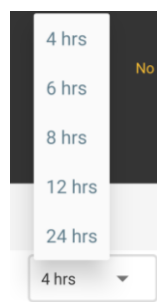


Kuva 12

- Lataa näytön sisältö uudelleen painamalla **Lataa nyt** -painiketta (Kuva 11 C).

Aikavälilaatikko (Kuva 11 D) osoittaa kaavion kyseisellä hetkellä näyttämän aikavälin.

7.2. Mikrobiologia

Mikrobiologiset tiedot näytetään niille tarkoitettua sivutyyppiä käyttäen. Kuvassa 13 on esitetty esimerkki.

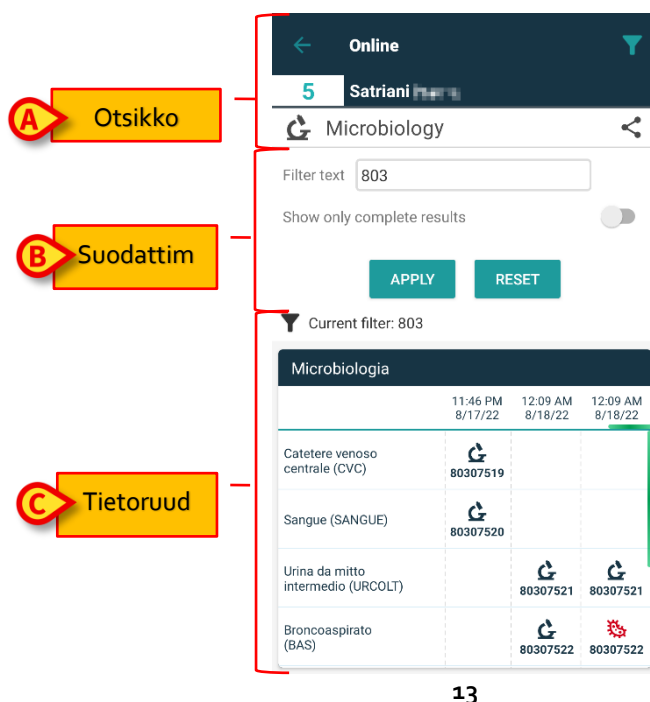


13

Sivu on jaettu kolmeen alueeseen:

- Otsikko, joka on kuvattu kohdassa 7.2.1.
- Suodattimet, jotka on kuvattu kohdassa 7.2.2. Näytä suodatinalue käyttämällä -kuvaketta (Kuva 14 D). Piilota tämä alue käyttämällä **Nollaa**-painiketta (16 D).
- Tietoruudukko, joka on kuvattu kohdassa 7.2.3.

7.2.1. Otsikko

Otsikkoalue on esitetty Kuva [kuvassa 14](#).

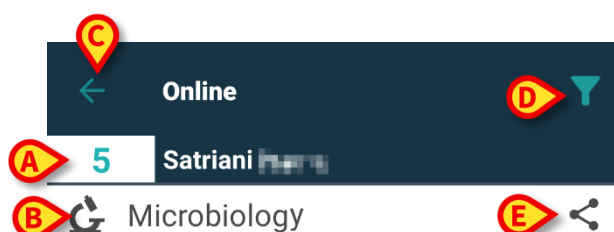

14

Vuodepaikan numero ja potilaan nimi näkyvät sivun ylälaudassa (Kuva 14 A).

Sivun nimi näkyy näiden tietojen alapuolella (Kuva 14 B).

Takaisin-painike (Kuva 14 C) mahdollistaa palaamisen takaisin sivuluettelonäyttöön (Kuva Kuva 4).

-kuvake (Kuva 14 D) mahdollistaa suodatinalueen näyttämisen.

-kuvake (Kuva 14 E) mahdollistaa saatavilla olevien tietojen jakamisen.

Tämä tapahtuu seuraavasti:

- Napauta -kuvaketta. Seuraava ikkuna avautuu (Kuva 15):



Kuva 15

-painike kopioi nykyisen sivun Digistat Mobile -linkin leikepöydälle ja mahdollistaa sen jakamisen mobiililaitteessa käytettävissä olevia sovelluksia käyttämällä.


-painike mahdollistaa nykyisen sivun kuvankaappauksen jakamisen.



"Jaa"-toiminto voi olla käytössä tai poissa käytöstä määritetyistä asetuksista riippuen. Pyydä asetuksia koskevat lisätiedot järjestelmänvalvojilta.

7.2.2. Suodattimet

Näytä suodatinalue käyttämällä -kuvaketta (Kuva 14 D). Piilota tämä alue käyttämällä **Nollaa**-painiketta (Kuva 16 D). Suodatinalue on esitetty Kuvassa 16.

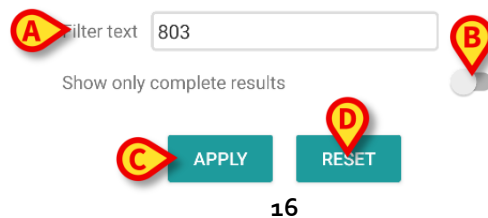

16

Käytettävissä on tekstisuodatin (Kuva 16 A). Näytä ainoastaan kohteet, joiden nimi sisältää tietyn merkkijonon, syöttämällä haluamasi merkkijono tähän kenttään (kuvassa "803").

Näytä ruudukossa ainoastaan loppuun suoritetuiksi merkityt tutkimukset käyttämällä "Näytä ainoastaan lopulliset tulokset" -valintakytkintä (Kuva 16 B).



Tietoruudukko näyttää myös käynnissä olevien tutkimusten tulokset, jotka sisältävät osittaisia tietoja. Joidenkin tutkimusten suorittaminen loppuun vie pidempään: näiden tutkimusten tulokset lisätään vähitellen niiden tullessa saataville. "Näytä ainoastaan lopulliset tulokset" -valintakytkin mahdollistaa ainoastaan loppuun suoritettujen tutkimusten näyttämisen ruudukossa.

Sovella suodatinta ruudukon tietoihin napauttamalla **Sovella**-painiketta. Tyhjennä suodattimet ja piilota suodatinalue napauttamalla **Nollaa**-painiketta (Kuva 16 C–D).

7.2.3. Tietoruudukko

Tietoalue on esitetty kuvassa 17.

 Current filter: 803

Microbiologia			
	11:46 PM 8/17/22	12:09 AM 8/18/22	12:09 AM 8/18/22
Catetere venoso centrale (CVC)	 80307519		
Sangue (SANGUE)	 80307520		
Urina da mitto intermedio (URCOLT)		 80307521	 80307521
Broncoaspirato (BAS)		 80307522	 80307522

17

Mikrobiologiset tiedot näytetään ruudukossa. Sarakkeet osoittavat päivämäärän/kellonajan, jolloin näyte on otettu. Erityyppiset tutkimukset näytetään omilla riveillään. Esimerkiksi kuvaan 17 **A**-kirjaimella merkitty solu viittaa 17.8.2022 klo 23.46 suoritettulle veritutkimukselle saatavilla oleviin tuloksiin.


Jos kahden eri sarakkeen päivämäärä ja kellonaika ovat samat, ne viittaavat samaa tutkimusta koskeviin päivityksiin. Viimeisin päivitys näkyy oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa.

Näytä ruudukossa ainoastaan loppuun suoritettut tutkimukset käyttämällä suodatinalueen "Näytä ainoastaan lopulliset tulokset" -valintakytkintä (kuva 16 **B**).

 -kuvake viittaa tuloksiin, jotka eivät viittaa mikrobien läsnäoloon.  -kuvake viittaa tuloksiin, jotka viittaavat mikrobien läsnäoloon. Kuvakkeen alapuolella näkyvä numero on tutkimuksen tunnus.

"Nykyinen suodatin" -kohta (kuva 17 **B**) osoittaa, että näytetyt tulokset on suodatettu (tämä tarkoittaa, että näkyvissä on vain osa saatavilla olevista tuloksista).


- Avaa tarkemmat tulokset sisältävä ikkuna napauttamalla haluamaasi kuvaketta (Kuva 18).

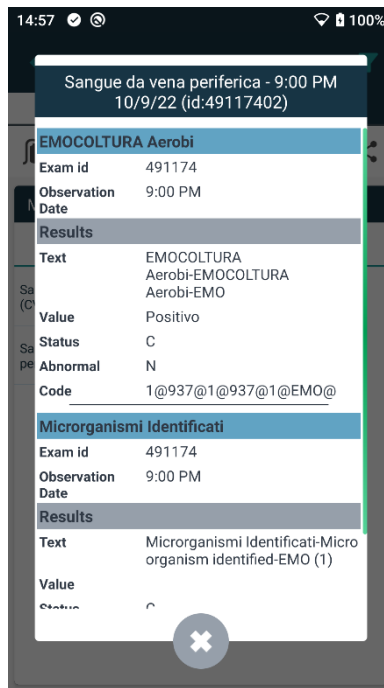

Kuva 18

7.3. Laboratorio

Laboratoriotiedot näytetään niille tarkoitettua sivutyyppiä käyttäen. Kuvassa 19 on esitetty esimerkki.

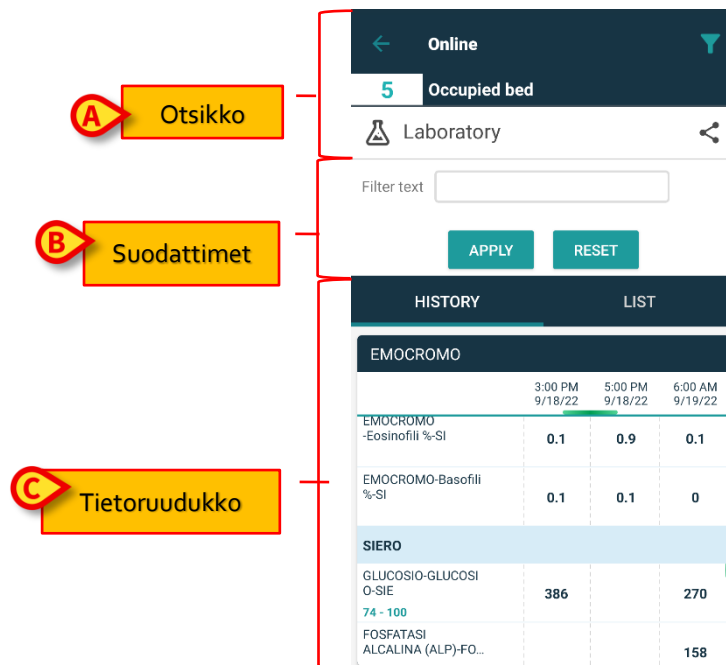

19

Sivu on jaettu kolmeen alueeseen:

- Otsikko, joka on kuvattu kohdassa 7.2.1.

- Suodattimet, jotka on kuvattu kohdassa 7.2.2. Näytä suodatinalue käyttämällä -kuvaketta (kuva 14 D). Piilota tämä alue käyttämällä **Nollaa**-painiketta (kuva 16 D).
- Tietoruudukko, joka on kuvattu kohdassa 7.3.1.

7.3.1. Laboratorio – tietoruudukko

Laboratoriotietojen näyttämiseen on käytettävissä kaksi eri näyttötilaa (Kuva 20 **A–B**):

- Historia (vasemmalla), joka on kuvattu kohdassa 7.3.1.1.
- Luettelo (oikealla), joka on kuvattu kohdassa 7.3.1.2.

”Historia”-välilehti tulee näkyviin oletuksena, kun jokin Laboratorio-tyyppinen sivu avataan.

- Vaihda käyttämään haluamaasi näyttötilaa napauttamalla Historia- tai Luettelo-välilehteä.

HISTORY

LIST

EMOCROMO

6:00 AM
9/19/22

6:00 AM
9/19/22

6:00 AM
9/19/22

Sangue intero

EMOCROMO-Neutrofilii-SI	8.37	10.24	15.07
2 - 8			
EMOCROMO-Linfociti-SI	1.75	0.8	0.76
1.5 - 4			
EMOCROMO-Monociti-SI	1.28	1.04	1.14
0.1 - 1			
EMOCROMO-Eosinofilii-SI	0.01	0.25	0.24
0.1 - 0.5			
EMOCROMO-Basofili-SI	0	0.05	0.02
0 - 0.2			
EMOCROMO-Mielociti-SI	?	N V	N V

HISTORY

LIST

0 EMOCROMO
8/19/22 6:00 AM

PL.Citrato * T. Celeste*

PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG	0.91	?
0.8 - 1.2		
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG	621	
150 - 400		
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9	
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG	63	
70 - 120		
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38	?
Sangue intero		
EMOCROMO-Neutrofili-SI	23.97	
2 - 8		
EMOCROMO-Linfociti-SI		

Kuva 20

7.3.1.1. Tietoruudukko – historia

”Historia”-tila on esitetty kuvassa 21.

HISTORY		LIST		
EMOCROMO				
	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	
E	Sangue intero			
	EMOCROMO-Neutrofi li-SI 2 - 8	8.37	10.24	15.07
B	EMOCROMO-Linfociti -SI 1.5 - 4	1.75	0.8	0.76
	EMOCROMO-Monocit i-SI 0.1 - 1	1.28	1.04	1.14
C	EMOCROMO-Eosinofi li-SI 0.1 - 0.5	0.01	0.25	0.24
	EMOCROMO-Basofili- SI 0 - 0.2	0	0.05	0.02
	EMOCROMO-Mielocit i-SI	N V	N V	N V

21

21

"Historia"-tila tarjoaa aikajärjestyksessä esitetyn yleiskatsauksen kaikista valittuna olevalle potilaalle määritetyllä aikavälillä saatavilla olevista tuloksista.

Kunkin tutkimuksen tulokset näytetään omassa sarakkeessaan. Esimerkiksi kuvaan 21 **A**-kirjaimella merkitty sarake sisältää 19.9.2022 klo 6.00 saadut tulokset.

Kukin tutkimuskohde näytetään omalla rivillään. Esimerkiksi kuvaan 21 **B**-kirjaimella merkitty rivi sisältää kaikki "Emocromo-Linfociti"-nimisen tutkimuskohteen ("Verenkuva – lymfosyytit") tulokset. Arvoalue näytetään kunkin tutkimuskohteen nimen alla, jos nämä tiedot ovat saatavilla ([kuva 21 C](#)).

Kukin solu sisältää siten tietyn tutkimuskohteen tuloksen arvon, joka on saatu ilmoitettuna päivämääränä ja kellonaikana. Esimerkiksi kuvaan 21 **D**-kirjaimella merkitty arvo 0,8 on 19.9.2022 klo 6.00 saatuihin tuloksiin sisältyvä "Verenkuva – lymfosyytit" -tutkimuskohteen arvo.


Vaaleansiniset rivit ovat ryhmien otsikkoja; ryhmät ovat toisiinsa liittyvistä kohteista muodostuvia kokonaisuuksia. Esimerkki: kuvaan 21 **E**-kirjaimella merkitty ryhmän otsikko on "Sangue intero" ("Kokoveri"). Kaikki vaaleansinisen rivin alapuolella näkyvät valkoiset rivit kuuluvat samaan ryhmään, jonka nimi näkyy vaaleansinisellä rivillä.



Ryhmät ja niihin sisältyvät kohteet voidaan määrittää Online Web -asetustyökalua käyttämällä. Pyydä asetuksia koskevat lisätiedot järjestelmänvalvojilta. Katso lisätiedot CFG ENG Online Validation -asiakirjasta.

"Historia"-näkymä sisältää kaikki mahdolliset kohteet. Jos jokin kohde ei ole tutkimuksen kannalta olennainen, siihen liittyvä solu on tyhjä.

- Näytä arvojen tarkemmat tiedot napauttamalla haluamaasi solua (katso [kuvan 22](#) esimerkki):

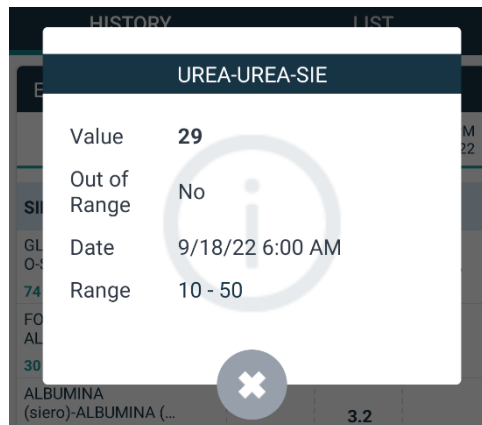

22

7.3.1.2. Tietoruudukko – luettelo

”Luettelo”-tila on esitetty kuvassa 23.

HISTORY	LIST
EMOCROMO 8/19/22 6:00 AM	
PL.Citrato * T. Celeste*	
PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG 0.8 - 1.2	0.91
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG 150 - 400	621
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG 70 - 120	63
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38
Sangue intero	
EMOCROMO-Neutrofili-SI 2 - 8	23.97
EMOCROMO-I. infociti-SI	

23

”Luettelo”-tila näyttää tutkimukset yksi kerrallaan.

Tutkimuksen nimi ja kellonaika näkyvät sivun yläosassa (kuva 23 **A**).

Kukin tutkimuskohde näytetään omalla rivillään (kuva 23 **B**).

Arvoalue näytetään kunkin tutkimuskohteen nimen alla, jos nämä tiedot ovat saatavilla (kuva 23 **C**).

Vaaleansiniset rivit ovat ryhmien otsikkoja; ryhmät ovat toisiinsa liittyvistä kohteista muodostuvia kokonaisuuksia. Esimerkki: kuvaan 23 **D**-kirjaimella merkitty ryhmän otsikko on ”Sangue intero” (”Kokoveri”). Kaikki vaaleansinisen rivin alapuolella näkyvät valkoiset rivit kuuluvat samaan ryhmään, jonka nimi näkyy vaaleansinisellä rivillä.




Ryhmät ja niihin sisältyvät kohteet voidaan määrittää Online Web -asetustyökalua käyttämällä. Pyydä asetuksia koskevat lisätiedot järjestelmänvalvojilta. Katso lisätiedot CFG ENG Online Validation -asiakirjasta.

Tutkimuskohteiden tulosten arvot näkyvät kuvaan 23 E-kirjaimella merkityssä vaaleansinisessä sarakkeessa. Kukaan arvo viittaa kyseisen rivin kohteeseen.

Mittayksiköt näkyvät kuvaan 23 F-kirjaimella merkityssä sarakkeessa, jos ne ovat saatavilla.

Kun sivu valitaan, näkyviin tulee oletuksena viimeisin tulos.

- Voit näyttää edelliset tai seuraavat tutkimukset vierittämällä "Luettelo"-sivua vasemmalle tai oikealle.
- Näytä arvojen tarkemmat tiedot napauttamalla haluamaasi solua (katso kuvan 24 esimerkki):

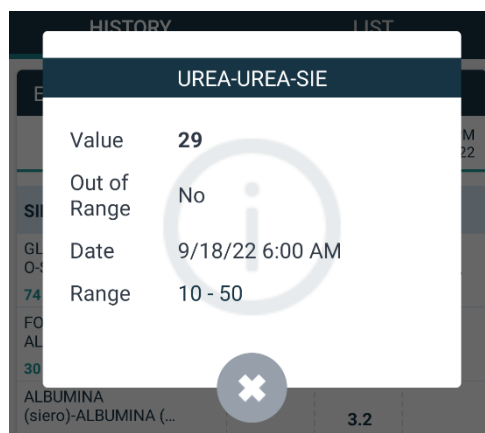

24