



Identity Web Manuale d'uso

Versione 0.2

2025-01-16

Contenuti

Identity Web	3
1. Introduzione.....	3
2. Selezione del paziente	3
3. Selezione del sub-modulo Identity Web	4
4. Elenco di dispositivi associati	5
5. Procedura di disassociazione.....	6
6. Procedura di ricerca e associazione.....	8
6.1. Disassociazione dopo la ricerca	10
6.2. Dispositivi già associati.....	11
7. Selezione tramite codice a barre	12

Identity Web



Per informazioni sull'ambiente del prodotto, sulle precauzioni, sulle avvertenze e sull'uso previsto, consultare i documenti *USR ITA Digistat Care* e/o *USR ITA Digistat Docs* (a seconda dei moduli installati - per la *Digistat Suite EU*) o *USR ENG Digistat Suite NA* (per la *Digistat Suite NA*). La conoscenza e la comprensione del documento appropriato sono obbligatorie per un uso corretto e sicuro di "Identity Web", descritto in questo documento.

1. Introduzione



"Identity Web" è un sub-modulo di *Control Bar Web*, e può essere abilitato o meno in base alla configurazione scelta dalla struttura ospedaliera. Contattare gli amministratori del sistema per maggiori informazioni.

"Identity Web" consente di associare/disassociare rapidamente dispositivi medici ai pazienti nel contesto dell'ambiente Digistat Web.



Solo un sottoinsieme dei dispositivi configurati è idoneo per la procedura di associazione / disassociazione rapida. La procedura si applica solitamente ai dispositivi wi-fi che vengono spesso spostati da un paziente all'altro. In ogni caso, sono le caratteristiche, il modo d'uso e la configurazione del dispositivo che lo rendono o meno idoneo per la procedura qui descritta.

2. Selezione del paziente

"Identity Web" può essere avviato solo dopo la selezione del paziente. Per selezionare un paziente,

- Fai clic sul pulsante **Seleziona Paziente** indicato in Fig 1 A.



Fig 1

Si aprirà il modulo Patient Explorer Web. Si veda il manuale utente di Digistat® Patient Explorer Web (*USR ITA Patient Explorer Web*) per ulteriori istruzioni sulle funzionalità di gestione del paziente.



Altri moduli possono essere configurati per la selezione del paziente al posto di Patient Explorer Web, a seconda della configurazione. In tali casi, consultare per le istruzioni d'uso la documentazione specifica.

Quando un paziente è selezionato, il nome e i dati principali del paziente vengono visualizzati sul pulsante **Paziente** (Fig 2 **A**).



Fig 2

3. Selezione del sub-modulo Identity Web

Se "Identity Web" è disponibile, l'icona  è visualizzata sul pulsante del paziente (Fig 3 **A**).



Fig 3

Per lanciare Identity Web:

- Fai clic sull'icona .

Verrà visualizzato un menu a discesa, contenente ulteriori dati del paziente e la lista di applicazioni disponibili che possono essere avviate su Control Bar (Fig 4).

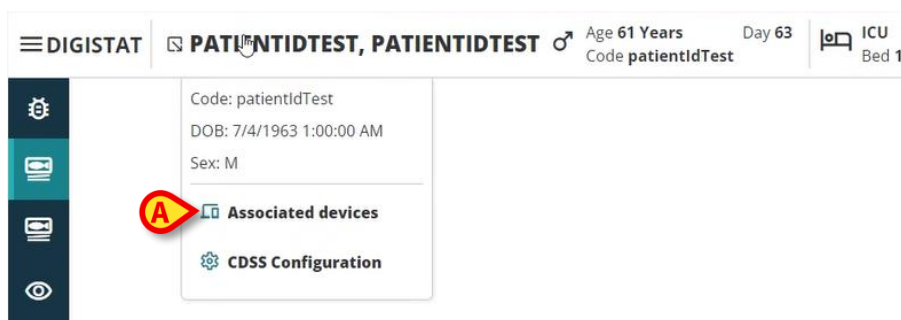


Fig 4

- Fai clic su "Dispositivi associati" (Fig 4 **A**).

Sarà visualizzata la seguente finestra, che elenca i dispositivi associati al paziente attualmente selezionato (Fig 5).

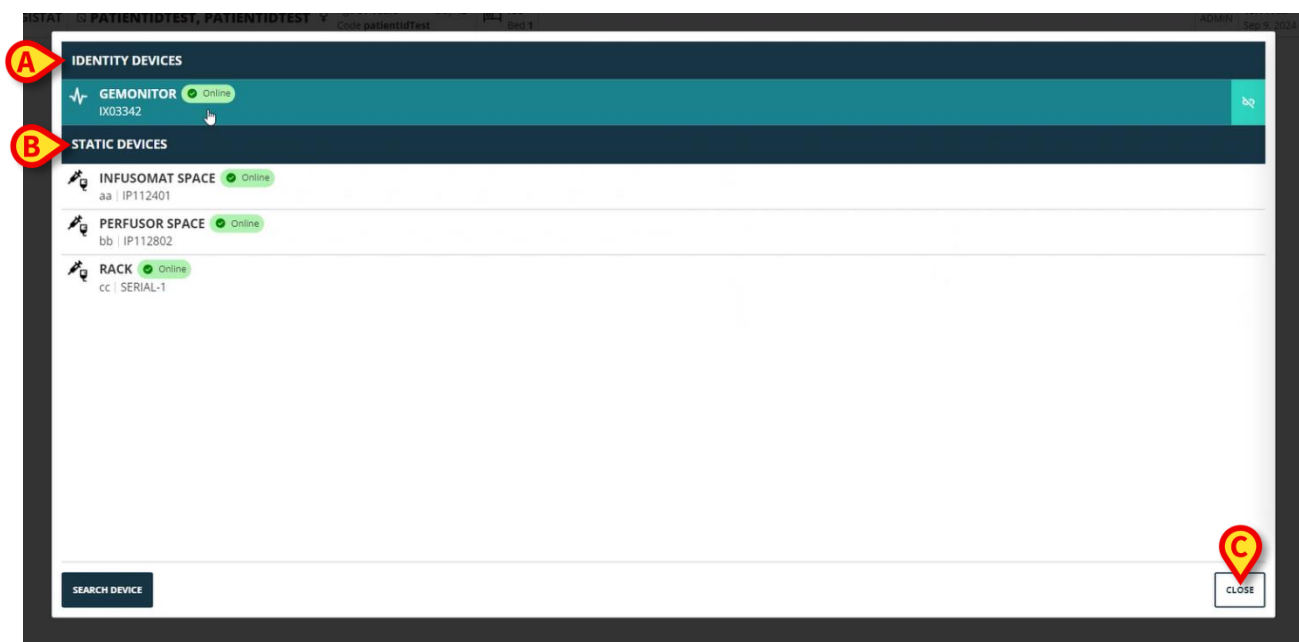


Fig 5

4. Elenco di dispositivi associati

La finestra "Elenco dei dispositivi associati" (Fig 5) è divisa in due sezioni:

La sezione **Dispositivi di Identity** (Fig 5 **A**) elenca i dispositivi mobili attualmente associati al paziente selezionato.

La sezione **Dispositivi Statici** (Fig 5 **B**) elenca i dispositivi che sono collegati al letto selezionato e che non possono essere spostati.

"Identity Web" funziona solo per i **Dispositivi Identity**.

Ogni riga nella finestra corrisponde a un dispositivo (vedi Fig 6, per esempio).



Fig 6

Per ogni dispositivo vengono visualizzate le seguenti informazioni:

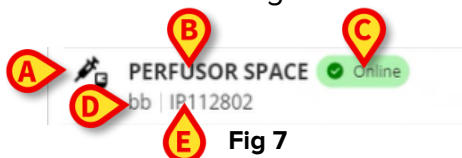


Fig 7

- Un'icona che caratterizza il tipo di dispositivo (Fig 7 **A**)
- Il nome del dispositivo (Fig 7 **B**).
- L'indicazione dello stato del dispositivo (Fig 7 **C** - Online o Offline).
- Un'etichetta, che può essere associata al dispositivo durante la configurazione per fornire ulteriori informazioni (Fig 7 **D**).
- Il numero di serie del dispositivo, che identifica univocamente il dispositivo (Fig 7 **E**).

Per chiudere l'elenco dei dispositivi associati:

- Fai clic sul pulsante **Chiudi** indicato in Fig 5 **C**.

È possibile visualizzare una finestra, per ogni dispositivo connesso, che elenca i parametri acquisiti dal dispositivo specifico, con i loro valori e unità di misura. Per farlo:

- Fai clic sulla riga corrispondente al dispositivo (Fig 8 **A**).

La finestra indicata in Fig 8 **B** sarà visualizzata.

Questa finestra elenca i parametri acquisiti dal dispositivo, indicando il loro nome, il valore più recente e l'unità di misura.

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red callout 'A' points to the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of parameters for the selected device. A red callout 'B' points to the 'Parameters' window.

Name	Value	Unit of measure
CI TH+L	58	mL/cm H2O
RAW	34	cm H2O/L/s
EtO2	65	
RR CO2	71	bpm
Alarm Silenced	Audio On	
Temp Other	45	°C
Temp Other #2	37	°C
Temp Other #3	68	°C
Temp Other #4	15	°C
Temp Blood	91	°C
Temp Blood #2	17	°C
Temp Blood CO	37	°C
Temp Blood PA	46	°C
Temp Blood PA #2	43	°C

Fig 8

5. Procedura di disassociazione

"Identity Web" consente solo di operare su "Dispositivi di Identity" (i dispositivi mobili, quelli associati al paziente, non collegati al letto).

Un pulsante di disassociazione è visualizzato sulla destra delle righe corrispondenti a tali "Dispositivi di Identity" (Fig 9 **A**).

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red callout 'A' points to the disassociation button (a small icon) located to the right of the GEMONITOR device.

Fig 9

Per dissociare un dispositivo

- Fai clic sul pulsante  (Fig 9 **A**).

È richiesta una conferma da parte dell'utente, come mostrato in Fig 10 **A**.

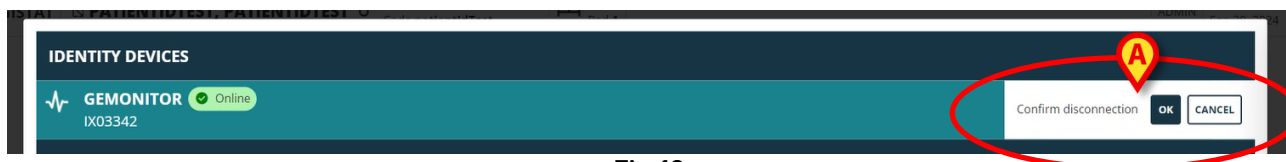


Fig 10

Dopo la conferma, il dispositivo viene dissociato ma, per motivi di elaborazione, richiedendo una disconnessione progressiva, la riga corrispondente al dispositivo dissociato è:

- a) prima visualizzato nell'area "dispositivi statici", in stato "Online" (Fig 11 A);



Fig 11

- b) quindi, dopo un tempo configurabile, viene visualizzato come "Offline" (Fig 12 A);



Fig 12

- c) quindi, dopo un tempo configurabile, rimosso dalla lista (Fig 13).



Fig 13



Vedi anche la sezione 6.1 per la procedura di disassociazione dopo la ricerca.

6. Procedura di ricerca e associazione

Per cercare un dispositivo e associarlo al paziente attualmente selezionato:

- Fai clic sul pulsante **Cerca dispositivo** nella finestra "Elenco dispositivi associati" (Fig 14 **A**).

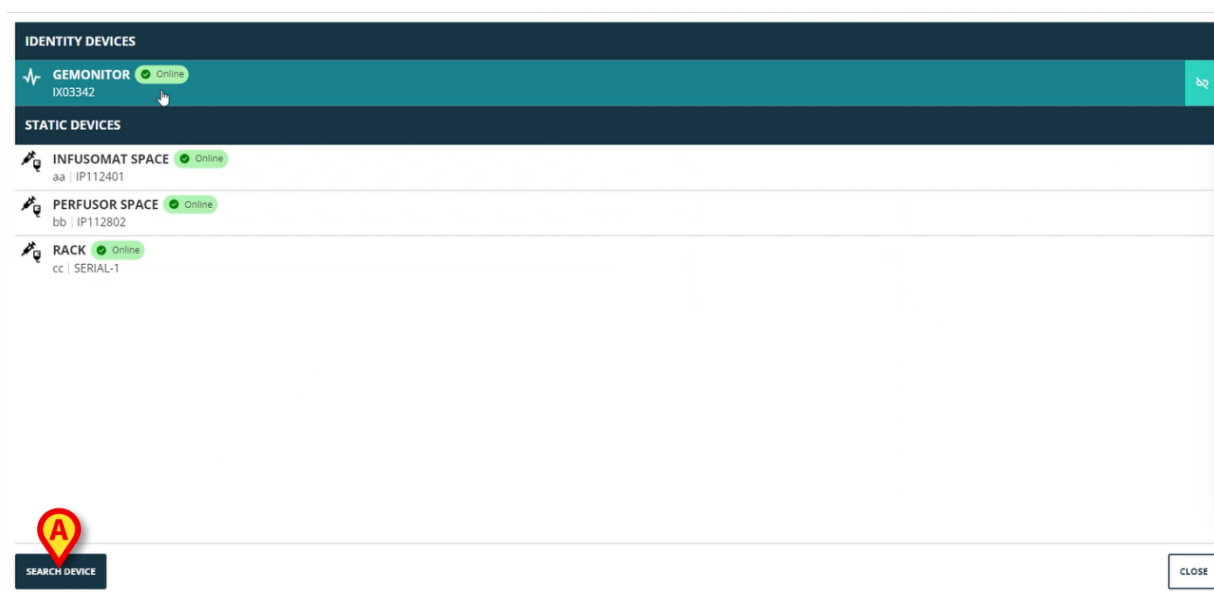


Fig 14

Uno strumento di ricerca sarà visualizzato sulla destra (Fig 15 **A**).

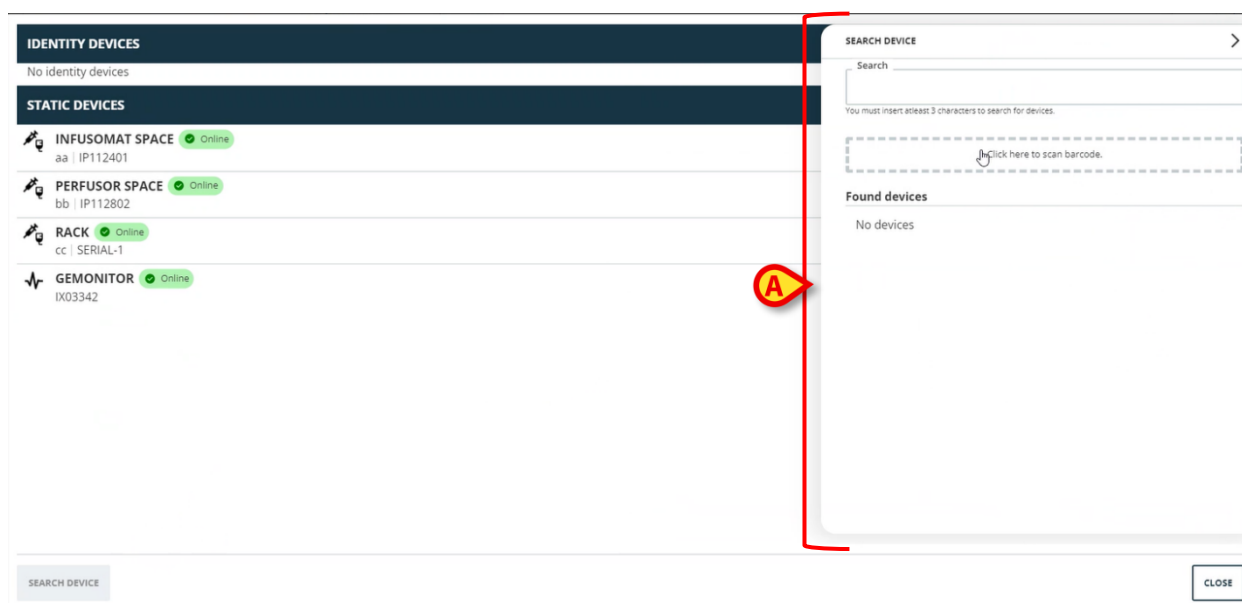


Fig 15

- Inserisci il nome o il numero di serie del dispositivo pertinente nel campo indicato in Fig 16 **A**.

Almeno tre caratteri devono essere specificati per visualizzare i risultati. L'elenco dei dispositivi corrispondenti alla stringa specificata viene visualizzato nell'area "Dispositivi trovati" (Fig 16 **B**).

È possibile effettuare la ricerca anche tramite codice a barre (si veda la sezione 7 per le istruzioni).

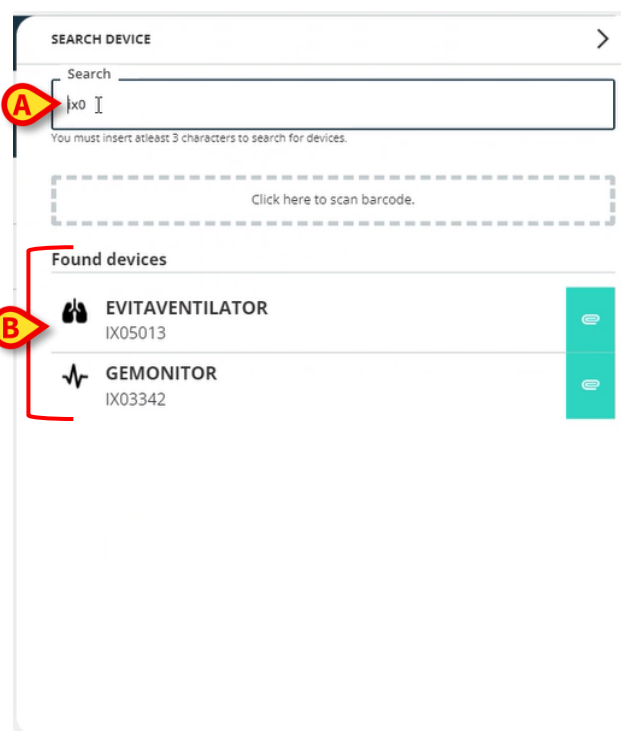


Fig 16

- Fai clic sul pulsante , posizionato a destra del dispositivo da associare.

La riga corrispondente cambierà come mostrato in Fig 17 **A**.

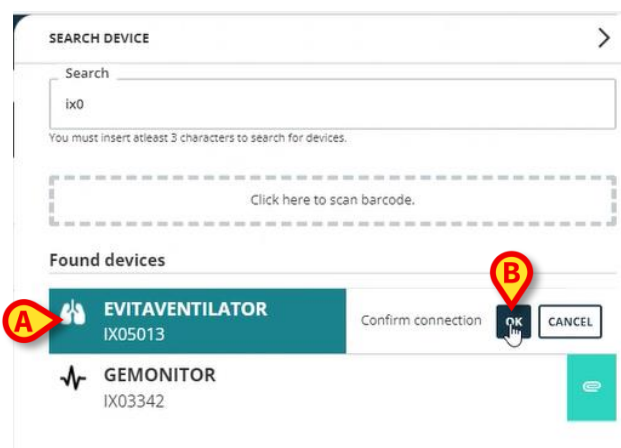


Fig 17

Per confermare l'associazione

- Fai clic sul pulsante **Ok** (Fig 17 **B**).

Il dispositivo sarà quindi visualizzato nell'elenco dei dispositivi associati, nell'area "Dispositivi di Identity" (Fig 18 **A**).

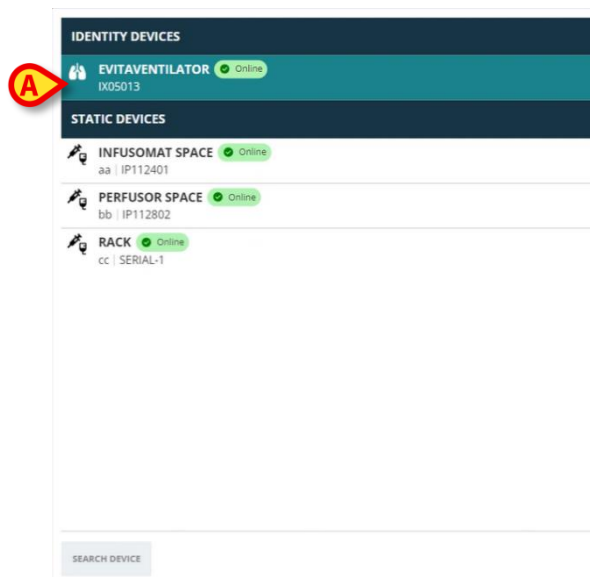


Fig 18

6.1. Disassociazione dopo la ricerca

I dispositivi già assegnati vengono visualizzati anche fra i risultati di una ricerca. In tale caso, alla loro destra, viene visualizzato un pulsante di disassociazione  invece che il pulsante di associazione  (Fig 19 **A**).

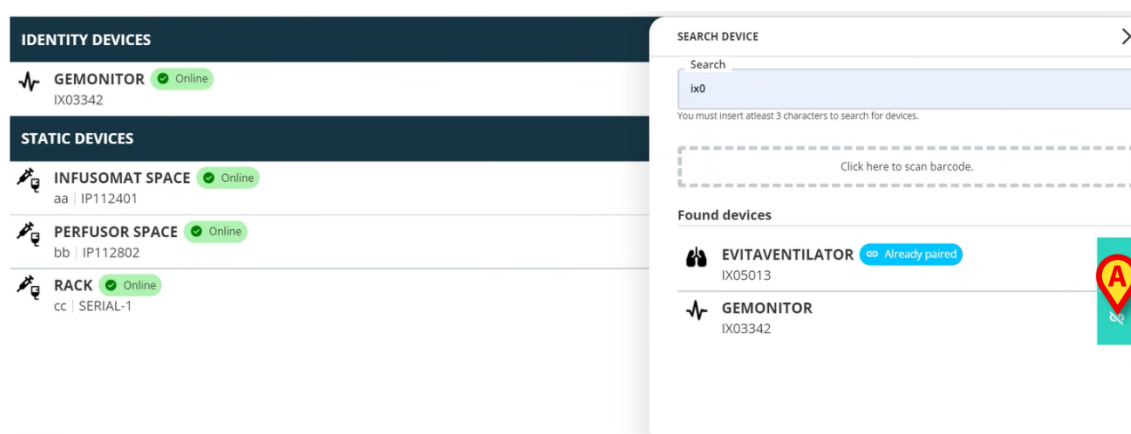


Fig 19

- Fai clic sul pulsante  per disassociare il dispositivo.

È richiesta una conferma da parte dell'utente.

- Fai clic sul pulsante **Ok** per confermare la disassociazione (Fig 20 **A**).

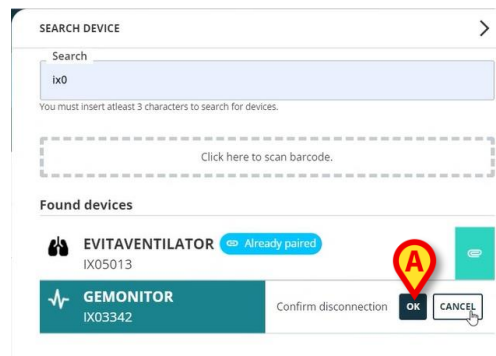


Fig 20

Il dispositivo disassociato scomparirà dall'area "Identity Devices" nell'elenco dei dispositivi associati. Sarà ancora visualizzato fra i risultati della ricerca come dispositivo "associabile".

6.2. Dispositivi già associati

I dispositivi associati ad altri pazienti vengono visualizzati nei risultati di una ricerca come "Già associati" (Fig 21 A).



Fig 21

I dispositivi "Già associati" ad altri pazienti possono essere associati al paziente attualmente selezionato utilizzando la procedura standard descritta nella sezione 6. In questi casi è richiesta una specifica conferma dell'utente (Fig 22).

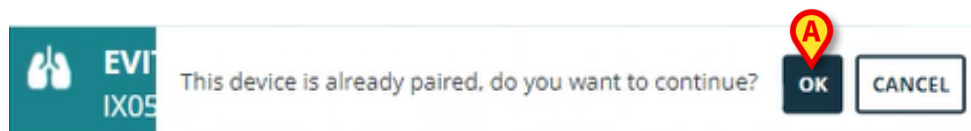


Fig 22

- Fai clic su **Ok** per associare il dispositivo al paziente attualmente selezionato (Fig 22 A).

Il dispositivo sarà così disconnesso dal paziente precedente e associato a quello attualmente selezionato.

7. Selezione tramite codice a barre

È possibile selezionare un dispositivo tramite lettura del codice a barre. Per abilitare la lettura del codice a barre, nella finestra "Cerca dispositivo":

- Fai clic sull'area indicata in Fig 23 **A**.



Fig 23

La telecamera della postazione di lavoro si attiverà (Fig 24 **A**).

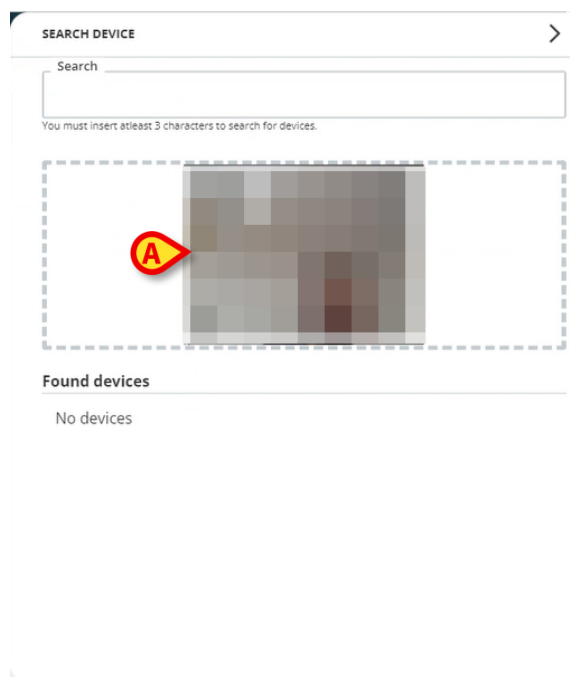


Fig 24

- Scansiona il codice a barre del dispositivo da associare.

I dati del dispositivo saranno visualizzati nell'area "Dispositivi trovati" nella finestra "Cerca dispositivo" (Fig 25 **A**).

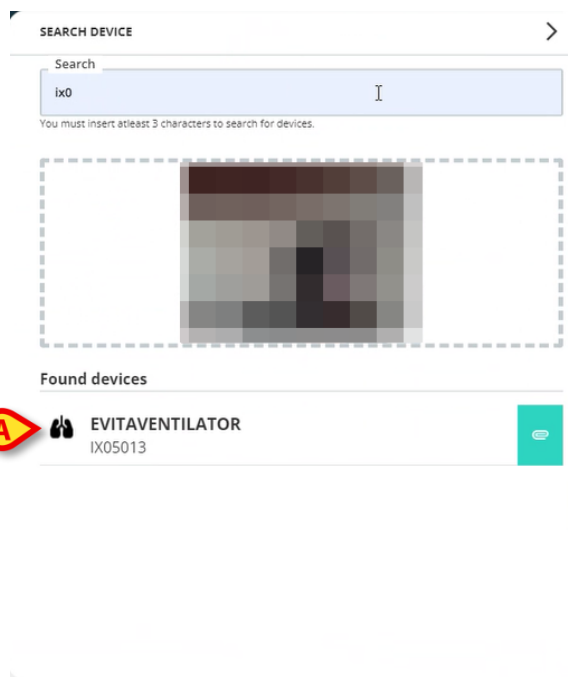


Fig 25

- Procedere con la procedura di associazione come descritto nella sezione 6.

La telecamera che viene attivata di default è la telecamera posteriore. "Identity Web" può essere configurato per consentire il cambio della telecamera. In tal caso, un pulsante dedicato -  - viene visualizzato nell'area "Lettore di codici a barre" nella finestra "Cerca dispositivo" (Fig 26 **A**). Contatta gli amministratori di sistema per ulteriori informazioni su questa funzionalità.

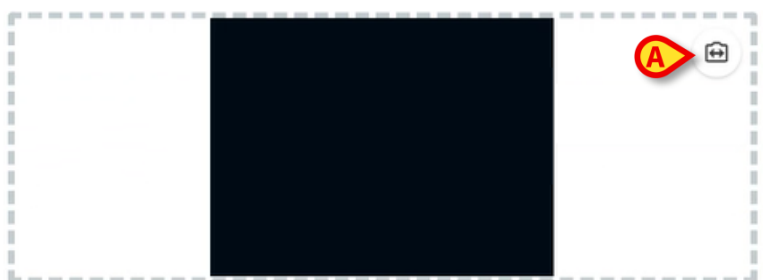


Fig 26



Un'opzione di sistema può essere configurata per tracciare i dispositivi selezionati tramite codice a barre aggiungendo un prefisso e un suffisso al numero di serie del dispositivo. Il prefisso e il suffisso non vengono visualizzati sull'interfaccia utente.