



On Line Mobile Gebruikershandleiding

Versie 4.0

2023-10-17

Inhoud

On Line Mobile	3
1. Introductie.....	3
2. Gegevensweergave.....	3
3. Gegevensverwerving	3
4. On Line Mobile starten.....	4
5. Pagina met de patiëntenlijst	5
6. Scherm Paginalijst.....	6
7. On Line-pagina's	7
7.1. Grafieken	7
7.1.1. Grafieken beschrijving.....	8
7.1.2. De commandobalk	10
7.2. Raster.....	11
7.2.1. Beschrijving raster	12
7.2.2. De commandobalk	13
7.3. Microbiologie	14
7.3.1. Kop.....	15
7.3.2. Filters.....	16
7.3.3. Gegevenstabel	16
7.4. Laboratorium.....	18
7.4.1. Laboratorium - gegevenstabel	18

On Line Mobile



Voor informatie over de productomgeving, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en het gebruik zoals bedoeld zie *USR NLD Digistat Care* en/of *USR NLD Digistat Docs* (afhankelijk van de modules die zijn geïnstalleerd voor de *Digistat Suite EU*) of *USR ENG Digistat Suite NA* (voor *Digistat Suite NA*). Kennis en begrip na lezing van het juiste document zijn vereist voor het veilige en correcte gebruik van de *On Line Mobile*, dat in dit document wordt beschreven.



De toepassingen en functies van de module *On Line Mobile* zijn volledig beschikbaar nadat de gebruiker is ingelogd. Iemand die de applicatie wil gebruiken krijgt een mededeling te zien indien er moet worden ingelogd.

1. Introductie

On Line Mobile is een applicatie waarmee gegevens afkomstig van laboratoria of medische apparaten die op de patiënt zijn aangesloten worden weergegeven (bijvoorbeeld: monitor, ventilator etc.). De ruwe, onbewerkte verzamelde gegevens kunnen worden geïntegreerd en gevalideerd door de gebruiker om nauwkeurige en leesbare gebruikersdocumentatie samen te stellen.

De applicatie kan ook worden geconfigureerd voor een verbinding met andere modules van *Digistat®* en om de gegevens daarvan weer te geven (bijvoorbeeld *Digistat® Diary*, *Digistat® Connect*).

2. Gegevensweergave

Gegevens kunnen worden gepresenteerd in grafieken. De manier waarop gegevens worden weergegeven kan in vele opzichten worden aangepast. Neem contact op met de systeembeheerders voor de mogelijkheden van aanpassing. De afbeeldingen in deze handleiding betreffen een voorbeeld van configuratie.

3. Gegevensverwerving

Gegevens kunnen automatisch worden verkregen of handmatig worden ingevoerd door gebruikers.


Automatische verwerving is voor parameters die worden verzonden door medische apparatuur met een interface (zoals ventilators, patiëntmonitors) of door een laboratorium (bijvoorbeeld de resultaten van een onderzoek).

Handmatige bewerking maakt het gebruikers mogelijk gegevens te controleren en valideren, fouten/tekortkomingen en overbodige gegevens te verwijderen of waarden in te voeren indien automatische verwerving om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is.

4. On Line Mobile starten


Zo start u de module On Line Mobile:

- Raak het bijbehorende scherm van het draagbare apparaat aan (Afb. 1).

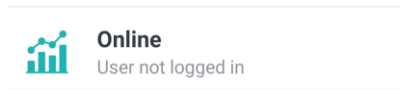

Afb. 1

De Pagina met de patiëntenlijst van On Line Mobile wordt geopend (Afb. 2):

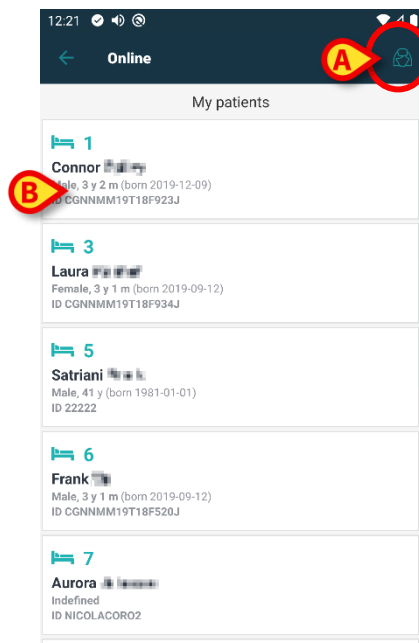

Afb. 2


Voor het gebruik van On Line Mobile moet een patiënt worden geselecteerd. Als er geen patiënt is geselecteerd, wordt een leeg scherm weergegeven en de mededeling “Voor deze module is een patiënt vereist”. Zie Deel 5.

5. Pagina met de patiëntenlijst

De pagina met de patiëntenlijst van On Line Mobile (Afb. 2 is een lijst van patiënten die zijn opgenomen in de lijst “MyPatients” (Mijn patiënten). Lees het Engelstalige document *USR NLD Mobile Launcher* voor meer informatie over de lijst “MyPatients”.

- Druk op de knop “MyPatients” (Afb. 2 **A**) om de lijst “MyPatients” te beheren.

Iedere patiënt wordt voorgesteld door een tegel (Afb. 3).

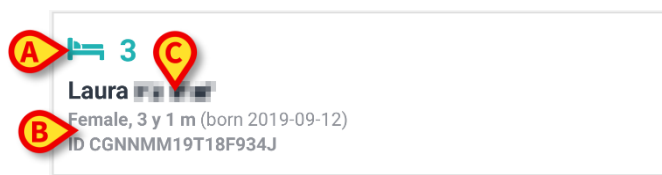

Afb. 3

In de tegel wordt de volgende informatie weergegeven (deze kan worden aangepast):

- Bednummer (indien beschikbaar - Afb. 3 **A**);
 - Patiëntgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, patiëntnummer/-ID - Afb. 3 **B**);
 - Naam van patiënt in dat bed (Afb. 3 **C**).
- Druk op de patiëntentegel (bijv. Afb. 2 **B**) voor toegang tot het scherm Paginalijst en voor het beheren van de bijbehorende On Line-pagina's. Zie Deel 6.

6. Scherm Paginalijst


Op het scherm Paginalijst worden alle pagina's van On Line Mobile vermeld en op iedere pagina worden de beschikbare gegevens voor de geselecteerde patiënt in grafieken weergegeven.

Er kunnen verschillende pagina's van On Line Mobile worden geconfigureerd voor dezelfde patiënt, waarbij iedere pagina is gewijd aan een subset van parameters. Er kunnen verschillende pictogrammen worden toegekend tijdens de configuratie om de soort gegevens op de pagina symbolisch weer te geven.



Neem contact op met de systeembeheerders voor de huidige configuratieopties.

Het scherm Paginalijst bestaat uit twee gebieden: in de kop worden de belangrijkste patiëntgegevens weergegeven (Afb. 4 **A**), daaronder ziet u de lijst van On Line-pagina's die zijn geconfigureerd voor die patiënt (Afb. 4 **B**).

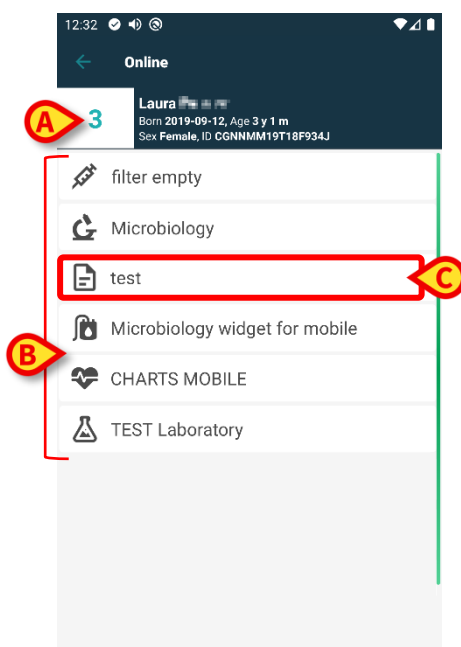

Afb. 4

In de kop (Afb. 4 **A**) wordt dezelfde informatie weergegeven als op de patiëntentegel in het scherm met de patiëntenlijst (beschreven in Deel 5).

- Druk op de rij die hoort bij de vereiste On Line-pagina (bijv. Afb. 4 **C**) om deze te openen (Afb. 5). Lees Deel 7.


7. On Line-pagina's

Er zijn vier mogelijke paginatypes:

- 1 - "Grafiek" geeft de gegevens van de geconfigureerde patiëntenapparaten weer in grafieken.
- 2 - "Raster" geeft de gegevens van de geconfigureerde patiëntenapparaten weer in rasters.
- 3 – "Microbiologie", geeft de gegevens afkomstig van het microbiologielabo weer in tabellen.
- 4 – "Laboratorium", geeft laboratoriumgegevens weer in tabellen.

7.1. Grafieken

Op de grafiekpagina (Afb. 5) ziet u in grafieken de beschikbare gegevens voor de geselecteerde patiënt.

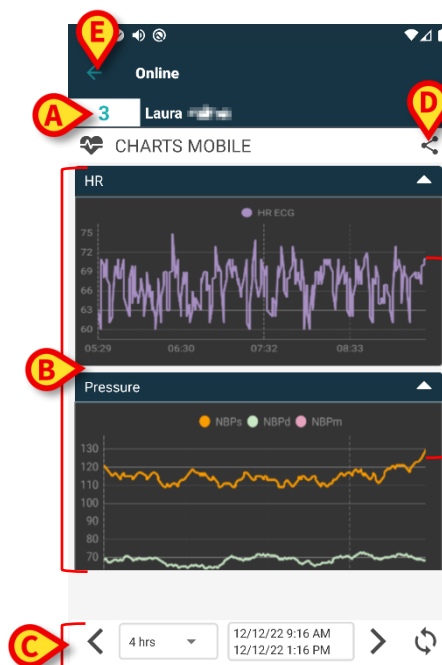


Afb. 5

- Bednummer en naam patiënt worden bovenaan weergegeven (Afb. 5 **A**).
- De grafieken worden weergegeven in het midden van de pagina (Afb. 5 **B**). Grafieken worden beschreven in hoofdstuk 7.1.1.
- Een navigatiebalk onderaan (Afb. 5 **C**) maakt het mogelijk om voor- en achterwaarts (in de tijd) te navigeren tussen de grafieken. De navigatiebalk wordt beschreven in hoofdstuk 7.1.2.
- Met het pictogram , aangeduid in Afb. 5 **D**, kunnen de beschikbare gegevens worden gedeeld.

U doet dit als volgt:

- Klik op het pictogram . Het volgende venster wordt geopend (Afb. 6):

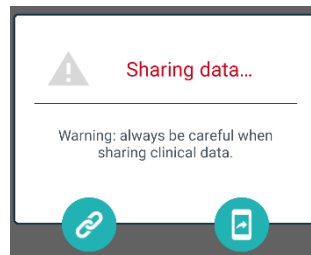

Afb. 6

Met de knop  wordt de Digistat Mobile-link naar de huidige pagina opgeslagen op het klembord en kan deze worden gedeeld via de beschikbare apps op het gebruikte apparaat. Met de knop  kan een screenshot van de huidige pagina worden gedeeld.



De deelfunctie kan al dan niet worden ingeschakeld afhankelijk van de configuratie. Neem contact op met de systeembeheerders voor de beschikbare configuratieopties.


- Druk op de knop **Back** (Terug) (Afb. 5 **E**) om terug te keren naar het scherm Paginalijst (Afb. 4).

Met een bericht wordt het de gebruiker meegedeeld als er geen grafieken zijn geconfigureerd voor de betreffende patiënt.

Met een bericht wordt de gebruiker meegedeeld wanneer de tijd verandert van wintertijd in zomertijd of omgekeerd.

7.1.1. Grafieken beschrijving

De trends van de geconfigureerde parameters worden weergegeven in grafieken (Afb. 7).

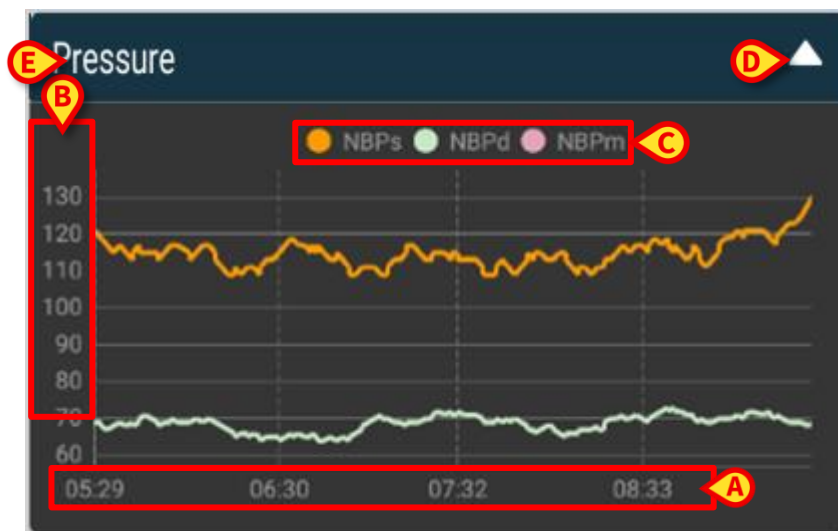

Afb. 7


De naam van de grafiek wordt bovenaan weergegeven (Afb. 7 **E**).

Op de horizontale as (Afb. 7 **A**) wordt de tijd uitgezet.

Op de verticale assen (Afb. 7 **B**) worden de waarden van de weergegeven parameters uitgezet. Er worden twee schalen voor de waarden gebruikt: een aan de linkerkant; een aan de rechterkant. De namen van de voorgestelde parameters ziet u bovenaan de grafiek (Afb.

7 **C**). De kleur van het font correspondeert met de kleur die wordt gebruikt in de grafiek voor de weergave van de trend van de parameter.

- Tik op een positie in de grafiek om dynamisch de waarden weer te geven die horen bij de betreffende positie. Het volgende venster wordt geopend (Afb. 8):

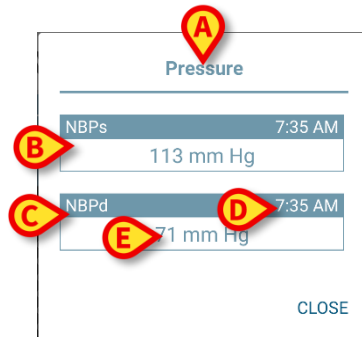

Afb. 8

De titel van het venster (Afb. 8 **A**) is hetzelfde als die van de grafiek.

Voor iedere parameter wordt er een vak weergegeven (Afb. 8 **B**), met daarin de naam van de parameter (Afb. 8 **C**), het tijdstip van de meting (Afb. 8 **D**) en de parameterwaarde (Afb. 8 **E**). De maateenheid van iedere parameter wordt weergegeven naast de parameterwaarde.

- Druk op de knop **Sluiten** om dit venster te sluiten.
- Raak de grafiek aan en versleep deze naar links of naar rechts om een verticale cursorbalk te tekenen (Afb. 9 **A**).

De waarden die op hetzelfde moment zijn verkregen worden geaccentueerd in de andere grafieken op de pagina.

In een berichtvenster aan de onderkant (Afb. 9 **B**) waarin de dichtstbijzijnde waarden worden weergegeven die bij een geselecteerde tijd horen overeenkomstig een geconfigureerd bereik.

- Druk op de knop **Close** (Afb. 9 **C**) om dit venster te sluiten.
- Druk op de knop **Info** (Afb. 9 **D**) om het venster met de parametergegevens te openen (Afb. 8).



Afb. 9


- Druk op de knop Pijl omhoog (Afb. 7 **D**) om de grafiek in te klappen.



Zie het document *CFG NLD On Line Validation* voor informatie over het aanpassen van fonts en kleuren van de grafieken in de module *On Line Mobile*.

Alternatief thema


Voor On Line Mobile-grafieken kan een ander thema (witte achtergrond) worden gekozen tijdens de configuratie (zie Afb. 10 hieronder). Raadpleeg de systeembeheerders voor de inschakeling van deze optie.

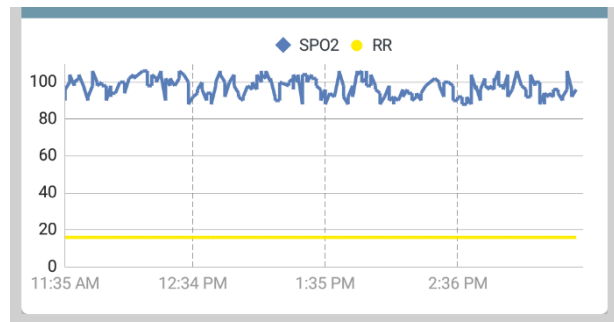

Afb. 10


7.1.2. De commandobalk

Op de commandobalk van On Line Mobile (Afb. 11) vindt u hulpmiddelen voor het navigeren in de grafieken.

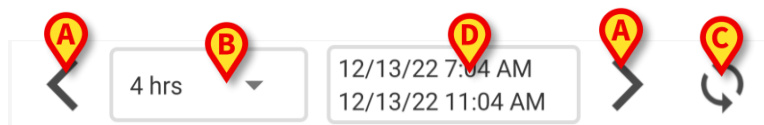

Afb. 11

- Gebruik de pijlknoppen (Afb. 11 **A**) om van links naar rechts of omgekeerd door de scherminhoud te bladeren.
- Selecteer in het intervalmenu (Afb. 11 **B**) de periode waarvoor gegevens moeten worden weergegeven.
Hieronder ziet u het intervalmenu:

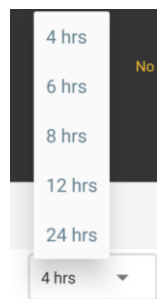


Afb. 12

- Met de knop **Nu opnieuw laden** (Afb. 11 **C**) werkt u de scherminhoud bij.

Het tijdsbereikvak (Afb. 11 **D**) geeft het tijdsbereik aan dat momenteel op de grafiek wordt weergegeven.

7.2. Raster


Een "Raster"-pagina (Afb. 13) geeft de beschikbare gegevens voor de geselecteerde patiënt weer in rasters.

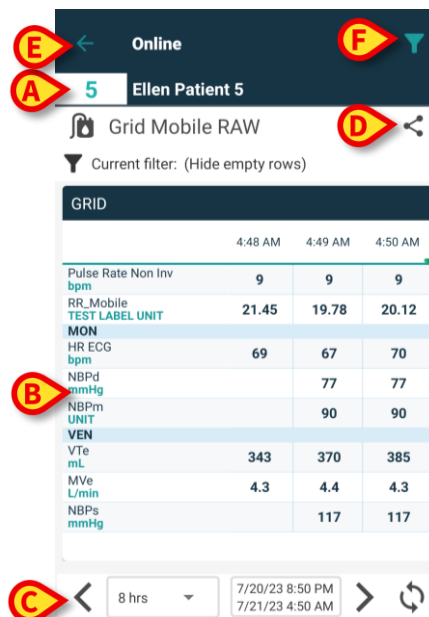

Afb. 13

- Bednummer en naam patiënt worden bovenaan weergegeven (Afb. 13 **A**).
- De rasters worden weergegeven in de paginatekst (Afb. 13 **B** - De rasters worden beschreven in hoofdstuk 7.1.1).
- Met de onderste navigatiebalk (Afb. 13 **C**) kunt u snel heen en weer navigeren doorheen de rasters. De navigatiebalk wordt beschreven in hoofdstuk 7.1.2.
- Met het pictogram , aangeduid in Afb. 13 **D**, kunnen de beschikbare gegevens worden gedeeld.
U doet dit als volgt:

- Klik op het pictogram . Het volgende venster wordt geopend (Afb. 14):

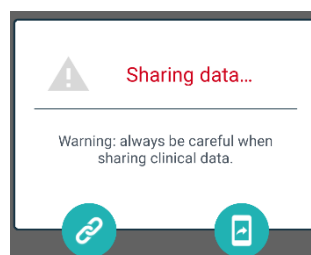

Afb. 14

Met de knop  wordt de Digistat Mobile-link naar de huidige pagina opgeslagen op het klembord en kan deze worden gedeeld via de beschikbare apps op het gebruikte apparaat. Met de knop  kan een screenshot van de huidige pagina worden gedeeld.



De deelfunctie kan al dan niet worden ingeschakeld afhankelijk van de configuratie. Neem contact op met de systeembeheerders voor de beschikbare configuratieopties.

- Tik op het pictogram  (Afb. 13 F) om de gegevens te filteren. Zie hoofdstuk 7.3.2 voor de beschrijving van de filters.
- Druk op de knop **Back** (Terug) (Afb. 5 E) om terug te keren naar het scherm Paginalijst (Afb. 4).

Als er geen rasters zijn geconfigureerd voor de geselecteerde patiënt, dan wordt de gebruiker hierover ingelicht.

Met een bericht wordt de gebruiker meegedeeld wanneer de tijd verandert van wintertijd in zomertijd of omgekeerd.

7.2.1. Beschrijving raster

De waarden van de geconfigureerde parameters worden weergegeven in rasters (Afb. 15).

Current filter: (Hide empty rows)

A GRID

	4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTe mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPs mmHg		117	117

Afb. 15

De rasternaam wordt bovenaan weergegeven (Afb. 15 A). In de eerste kolom wordt de naam van de parameters (Afb. 16 A) weergegeven en vervolgens op dezelfde rij de bijbehorende meeteenheid (Afb. 16 B).

4:48 AM

Pulse Rate Non Inv A bpm	B 9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45
MON	
HR ECG bpm	69
NBPd mmHg	

Afb. 16

De volgende kolommen hebben betrekking op de registratie van een set parameters. De registratiesnelheid bedraagt gewoonlijk één minuut (configureerbaar). De datum en tijd waarop de gegevens zijn verzameld, worden bovenaan de kolom weergegeven (Afb. 17 A). Elke kolom bevat dan ook de waarden van alle parameters die op een bepaald tijdstip geregistreerd werden.

C Current filter: (Hide empty rows)

GRID			
	A 4:48 AM	4:49 AM	4:50 AM
Pulse Rate Non Inv bpm	9	9	9
RR_Mobile TEST LABEL UNIT	21.45	19.78	20.12
MON			
HR ECG bpm	69	67	70
NBPd mmHg		77	77
NBPm UNIT		90	90
VEN			
VTe mL	343	370	385
MVe L/min	4.3	4.4	4.3
NBPs mmHg		117	117

Afb. 17

De waarden van de parameters vindt u in de overeenkomstige rij. Elke rij bevat dan ook de veranderingen van de parameters na verloop van tijd. In Afb. 17 **B** worden de HR ECG-waarden bijvoorbeeld omcirkeld.

Om de gegevens gemakkelijker te kunnen lezen, kunnen de parameters tijdens de configuratie gegroepeerd worden. De namen van groepen kunnen worden afgelezen op verschillend gekleurde rijen (Afb. 18 **A** - in het voorbeeld hieronder staat MON voor Monitor, VEN voor Ventilator).


A	MON			
	HR ECG bpm	69	67	70
	NBPd mmHg		77	77
	NBPm UNIT		90	90
A	VEN			
	VTe mL	343	370	385
	MVe L/min	4.3	4.4	4.3
	NBPs mmHg		117	117

Afb. 18

Als er een filter is ingeschakeld, wordt het huidige filter aangegeven door de tekst naast het pictogram **Y** (Afb. 18 **C**).


7.2.2. De commandobalk

De onderste navigatiebalk (Afb. 19) bevat hulpmiddelen waarmee u doorheen de rasters kunt navigeren.

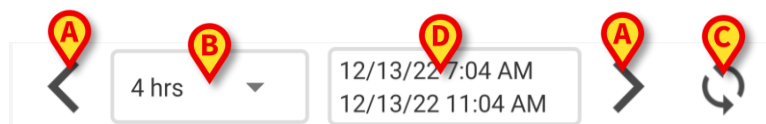

Afb. 19

- Gebruik de pijlknoppen (Afb. 19 **A**) om van links naar rechts of omgekeerd door de scherm inhoud te bladeren.
- Selecteer in het intervalmenu (Afb. 19 **B**) de periode waarvoor gegevens moeten worden weergegeven.
Hieronder ziet u het intervalmenu:

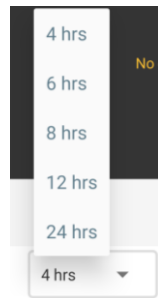


Afb. 20

- Met de knop **Nu opnieuw laden** (Afb. 19 **C**) werkt u de scherm inhoud bij.

Het veld Tijdsduur (Afb. 19 **D**) geeft de tijdsduur aan die momenteel op het raster wordt weergegeven.

7.3. Microbiologie

De microbiologiegegevens worden weergegeven op een speciale pagina. In Afb. 21 ziet u een voorbeeld.

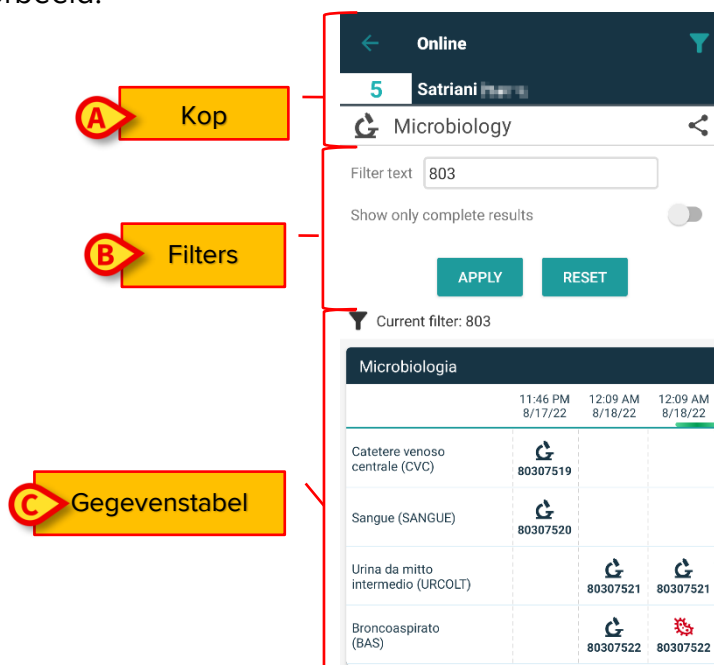

Afb. 21


De pagina is verdeeld in drie secties:

- De kop, beschreven in hoofdstuk 7.3.1.

- De filters, beschreven in hoofdstuk 7.3.2. Gebruik het pictogram  om de filtersectie weer te geven (Afb. 22 **D**). Gebruik de knop **Reset** om ze weer te verbergen (Afb. 24 **D**).
- De gegevenstabel, beschreven in hoofdstuk 7.3.3.

7.3.1. Kop

Afb. 22 toont de kopsectie.

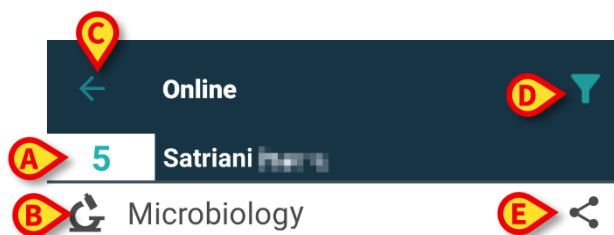

Afb. 22

Bednummer en naam patiënt worden bovenaan weergegeven (Afb. 22 **A**).


De naam van de pagina is aangegeven in Afb. 22 **B**.

Met de knop **Back** (Afb. 22 **C**) kunt u teruggaan naar het scherm met de paginalijst (Afb. 4).

Met het pictogram  (Afb. 22 **D**) wordt de filtersectie weergegeven.

Met het pictogram , aangeduid in Afb. 22 **E**, kunnen de beschikbare gegevens worden gedeeld. U doet dit als volgt:

- Klik op het pictogram . Het volgende venster wordt geopend (Afb. 23):

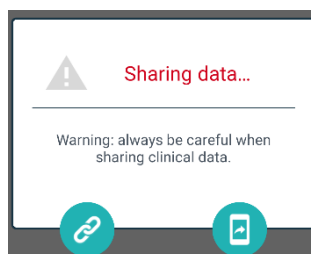

Afb. 23

Met de knop  wordt de Digistat Mobile-link naar de huidige pagina opgeslagen op het klembord en kan deze worden gedeeld via de beschikbare apps op het gebruikte apparaat.


Met de knop  kan een screenshot van de huidige pagina worden gedeeld.



De deelfunctie kan al dan niet worden ingeschakeld afhankelijk van de configuratie. Neem contact op met de systeembeheerders voor de beschikbare configuratieopties.

7.3.2. Filters

Gebruik het pictogram  om de filtersectie weer te geven (Afb. 22 **D**). Gebruik de knop **Reset** om ze weer te verbergen (Afb. 24 **D**). Afb. 24 toont de filtersectie.

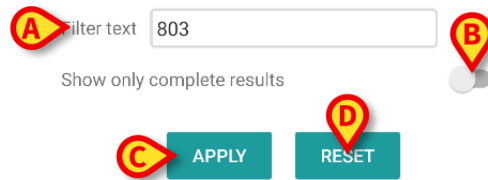

Afb. 24

Er is een tekstfilter beschikbaar (Afb. 24 **A**). Typ hier een zoekterm om alleen de items weer te geven waarvan de naam de gespecificeerde term bevat ("803" in de afbeelding).

Selecteer de schakelaar 'Show only complete results' om alleen de onderzoeken die als voltooid zijn gemarkeerd, in de tabel weer te geven (Afb. 24 **B**).




De gegevenstabel toont ook resultaten met gedeeltelijke gegevens, die verwijzen naar lopende onderzoeken. Sommige onderzoeken vergen tijd: voor deze onderzoeken worden de resultaten geleidelijk toegevoegd wanneer ze beschikbaar zijn. De schakelaar 'Show only complete results' maakt het mogelijk om alleen de voltooide onderzoeken in de tabel weer te geven.

Klik op de knop **Apply** om de filter toe te passen op de gegevens in de tabel. Klik op de knop **Reset** om de filters te wissen en de filtersectie te verbergen (Afb. 24 **C - D**).

7.3.3. Gegevenstabel

Afb. 25 toont de gegevenssectie.

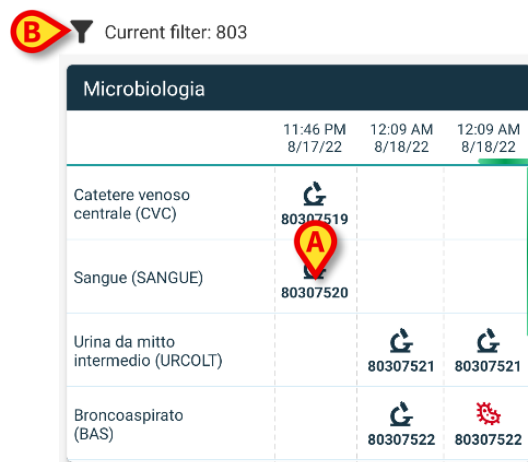

Microbiologia			
	11:46 PM 8/17/22	12:09 AM 8/18/22	12:09 AM 8/18/22
Catetere venoso centrale (CVC)	 80307519		
Sangue (SANGUE)	 80307520		
Urina da mitto intermedio (URCOLT)		 80307521	 80307521
Broncoaspirato (BAS)		 80307522	 80307522

Afb. 25

De microbiologiegegevens worden weergegeven in een tabel. De kolommen geven de datum / het tijdstip van de monsterafname aan. De rijen verwijzen naar de verschillende


soorten onderzoeken. Zo verwijst de cel in Afb. 25 **A** naar de beschikbare resultaten voor een bloedonderzoek die op 17/08/22 om 23.46 uur zijn verkregen.

Als twee verschillende kolommen worden aangeduid met dezelfde datum en tijd, betekent dit dat ze betrekking hebben op verschillende updates van hetzelfde onderzoek. De meest rechtse kolom bevat de recentste update.

Gebruik de schakelaar 'Show only complete results' in de filtersectie om alleen de voltooide onderzoeken in de tabel weer te geven (Afb. 24 **B**).

Het pictogram  verwijst naar resultaten die niet wijzen op de aanwezigheid van ziektekiemen. Het pictogram  verwijst naar resultaten die wel wijzen op de aanwezigheid van ziektekiemen. Het nummer onder het pictogram is het specifieke onderzoeksnummer. De aanduiding "huidige filter" (Afb. 25 **B**) geeft aan dat de momenteel weergegeven resultaten gefilterd zijn (dit wil zeggen dat slechts een deel van de beschikbare resultaten wordt weergegeven).


- Klik op een pictogram om een venster met de gedetailleerde resultaten te openen (Afb. 26).

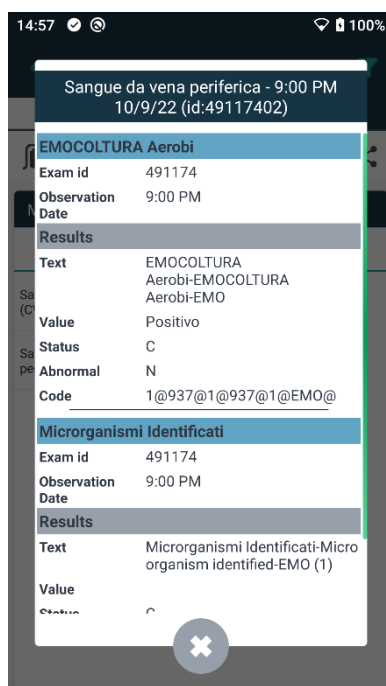

Afb. 26

7.4. Laboratorium

De laboratoriumgegevens worden weergegeven op een speciale pagina. In Afb. 27 ziet u een voorbeeld.

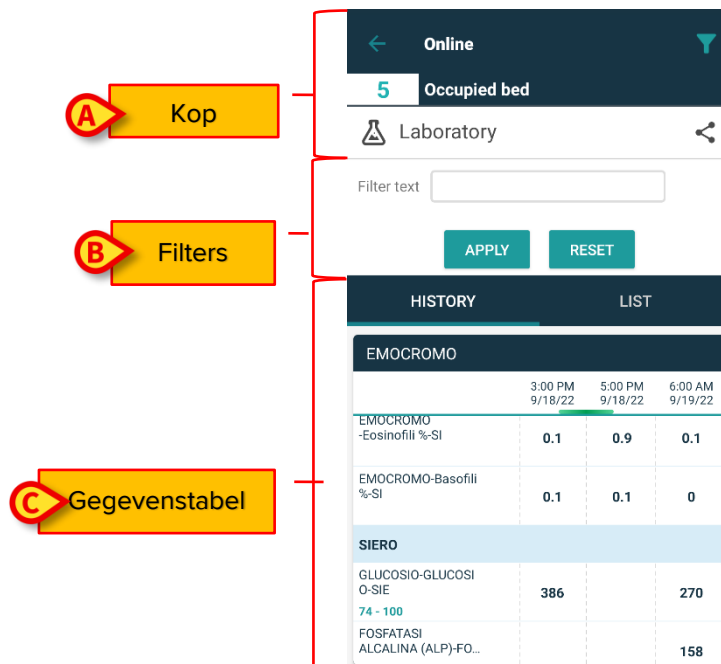

Afb. 27

De pagina is verdeeld in drie secties:

- De kop, beschreven in hoofdstuk 7.3.1.
- De filters, beschreven in hoofdstuk 7.3.2. Gebruik het pictogram  om de filtersectie weer te geven (Afb. 22 **D**). Gebruik de knop **Reset** om ze weer te verbergen (Afb. 24 **D**).
- De gegevenstabel, beschreven in hoofdstuk 7.4.1.

7.4.1. Laboratorium - gegevenstabel

Voor laboratoriumgegevens zijn twee weergavemodi beschikbaar (Afb. 28 **A - B**):

- History (links), beschreven in hoofdstuk 7.4.1.1.
- List (rechts), beschreven in hoofdstuk 7.4.1.2.

Wanneer u naar een laboratoriumpagina gaat, wordt standaard het tabblad 'History' weergegeven.

- Klik op het tabblad History of het tabblad List om over te schakelen naar de gewenste weergavemodus.

A

HISTORY

LIST

EMOCROMO

6:00 AM
9/19/22

6:00 AM
9/19/22

6:00 AM
9/19/22

Sangue intero

EMOCROMO-Neutrofil
i-SI
2 - 8

8.37

10.24

15.07

EMOCROMO-Linfociti
-SI
1.5 - 4

1.75

0.8

0.76

EMOCROMO-Monocit
i-SI
0.1 - 1

1.28

1.04

1.14

EMOCROMO-Eosinofi
li-SI
0.1 - 0.5

0.01

0.25

0.24

EMOCROMO-Basofili-
SI
0 - 0.2

0

0.05

0.02

EMOCROMO-Mielocit
i-SI

?

N V

N V

N V

HISTORY

B

LIST

0

EMOCROMO
8/19/22 6:00 AM

PL.Citrato * T. Celeste*

PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA
PARZIALE)-Ratio-COG
0.8 - 1.2

0.91

?

FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG
150 - 400

621

PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo
di protrombina-COG

14.9

PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di
protrombina-COG
70 - 120

63

PT (TEMPO di
PROTROMBINA)-INR-COG

1.38

?

Sangue intero

EMOCROMO-Neutrofil-SI
2 - 8

23.97

EMOCROMO-Linfociti-SI

Afb. 28

7.4.1.1. Gegevenstabel - History

Afb. 29 toont de 'History'-modus.

HISTORY		LIST	
EMOCROMO			
	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22	6:00 AM 9/19/22
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofi li-SI 2 - 8	8.37	10.24	15.07
EMOCROMO-Linfociti -SI 1.5 - 4	1.75	0.8	0.76
EMOCROMO-Monocit i-SI 0.1 - 1	1.28	1.04	1.14
EMOCROMO-Eosinofi li-SI 0.1 - 0.5	0.01	0.25	0.24
EMOCROMO-Basofili- SI 0 - 0.2	0	0.05	0.02
EMOCROMO-Mielocit i-SI	N.V.	N.V.	N.V.

Afb. 29

De 'History'-modus geeft een chronologisch overzicht van alle resultaten die beschikbaar zijn voor de geselecteerde patiënt in een geconfigureerd tijdsbereik.

Elke kolom stelt een onderzoek voor. Zo bevat de kolom in Afb. 29 **A** de resultaten die op 19/09/22 om 6.00 uur zijn verkregen.

Elke rij verwijst naar een onderzoeksitem. De rij in Afb. 29 **B** bevat bijvoorbeeld alle resultaten die zijn verkregen voor 'Emocromo-Linfociti' (bloedonderzoek - lymfocyten). Onder elk onderzoeksitem wordt het waardebereik weergegeven indien deze informatie beschikbaar is (Afb. 29 **C**).

Een cel bevat dus de waarde van een bepaald item in het kader van een specifiek onderzoek, aangeduid door de datum en het tijdstip van de resultaten. Zo is de waarde 0.8 in Afb. 29 **D** de waarde van 'bloedonderzoek - lymfocyten' in het kader van de resultaten die op 19/09/22 om 6.00 uur zijn verkregen.


De lichtblauwe rijen zijn groepskoppen, die een groep verwante items benoemen. Bijvoorbeeld: 'Sangue intero' (volbloed) aangeduid in Afb. 29 **E**. Alle witte rijen die onder een lichtblauwe rij staan, behoren tot dezelfde groep, waarvan de naam in de lichtblauwe rij wordt getoond.



De samenstelling van groepen kan worden geconfigureerd via de Online Web-configuratietool. Neem contact op met de systeembeheerders voor de beschikbare configuratieopties. Raadpleeg het document CFG ENG Online Validation voor meer informatie.

Alle mogelijke items worden opgesomd in de 'History'-weergave. Als een item niet relevant is voor een onderzoek, is de cel voor dat item in de overeenkomstige rij leeg.

- Klik op een cel om meer gedetailleerde informatie voor een waarde te zien (zie voorbeeld in Afb. 30):

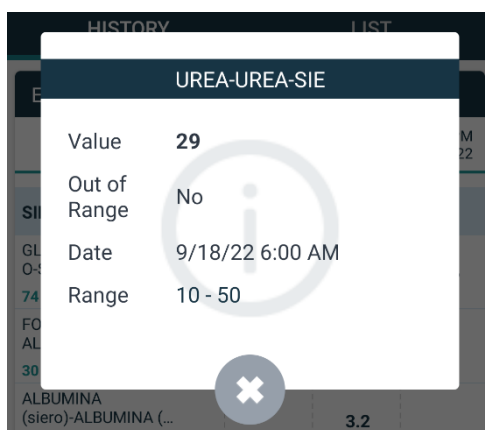

Afb. 30

7.4.1.2. Gegevenstabel - List

Afb. 31 toont de 'List'-modus.

HISTORY	LIST
EMOCROMO 8/19/22 6:00 AM	
PL.Citrato * T. Celeste*	
PTT (TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE)-Ratio-COG 0.8 - 1.2	0.91
FIBRINOGENO-FIBRINOGENO-COG 150 - 400	621
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tempo di protrombina-COG	14.9
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-Tasso di protrombina-COG 70 - 120	63
PT (TEMPO di PROTROMBINA)-INR-COG	1.38
Sangue intero	
EMOCROMO-Neutrofili-SI 2 - 8	23.97
EMOCROMO-I infociti-SI	

Afb. 31

In de 'List'-modus wordt één onderzoek tegelijk weergegeven.

De naam en het tijdstip van het onderzoek worden bovenaan weergegeven (Afb. 31 **A**).

De rijen in de tabel stellen de onderzoeksitems voor (Afb. 31 **B**).

Onder elk onderzoeksitem wordt het waardebereik weergegeven indien deze informatie beschikbaar is (Afb. 31 **C**).

De lichtblauwe rijen zijn groepskoppen, die een groep verwante items benoemen. Bijvoorbeeld: 'Sangue intero' (volbloed) aangeduid in Afb. 31 **D**. Alle witte rijen die onder een lichtblauwe rij staan, behoren tot dezelfde groep, waarvan de naam in de lichtblauwe rij wordt getoond.




De samenstelling van groepen kan worden geconfigureerd via de Online Web-configuratietool. Neem contact op met de systeembeheerders voor de beschikbare configuratieopties. Raadpleeg het document CFG ENG Online Validation voor meer informatie.

De lichtblauwe kolom bevat de resultaatwaarden van de onderzoeksitems (Afb. 31 **E**). Elke waarde verwijst naar het item dat op dezelfde rij staat. De kolom in Afb. 31 **F** bevat, indien beschikbaar, de meeteenheden.

Wanneer de pagina is geselecteerd, wordt standaard het recentste resultaat weergegeven.

- Scroll de lijstweergavepagina naar links en rechts om vorige en volgende onderzoeken weer te geven.
- Klik op een cel om meer gedetailleerde informatie voor een waarde te zien (zie voorbeeld in Afb. 32):

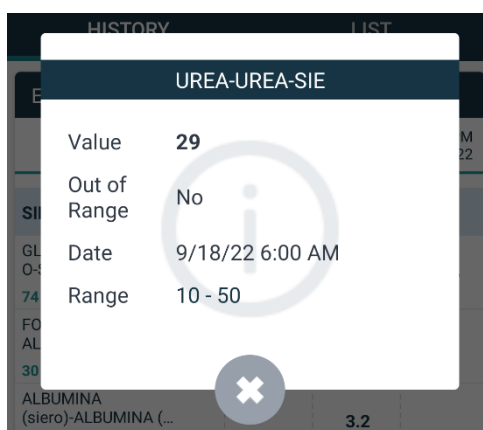

Afb. 32