



Identity Net

Brakerhåndbok

Versjon 1.0

2023-03-30

1 Identity Net



For generell og detaljert informasjon om produktmiljøet og instruksjoner for bruk av Control Bar-programvaren, se spesifikke dokumenter for produktet. Kunnskap om og forståelse av disse dokumentene er obligatorisk for en korrekt og sikker bruk av module Infusion, beskrevet i dette dokumentet.

Identitets-modulen gjør det mulig å tilknytte/frakoble enheter til pasienter både på stasjonære og håndholdte enheter.

MERKNAD: Bare et undersett av de konfigurerte enhetene er kvalifisert for prosessen for rask tilknytning/frakobling. Enhetene som er tilkoblet via en kabel til et stativ/seng og tilknyttet sengen gjennom konfigurasjonsprogrammet til Identity Net, vises ikke på Identitets-modulen.

ADVARSEL: Trådløse infusjonspumper kobles automatisk fra pasienten når de er utenfor Wi-Fi-dekning eller er avslått i mer enn antall sekunder som er angitt i konfigurasjonsalternativet «PatientDeviceAssocTimeout».

ADVARSEL: Det er nødvendig å knytte den trådløse infusjonspumpen til pasienten hver gang en ny infusjon startes.

1.1 Identitet for stasjonære enheter

Får å få tilgang til Identitets-modulen på stasjonære arbeidsstasjoner:

- Klikk på ikonet .

Følgende skjermbilde vises (Fig. 1).



Fig. 1

To faner angitt i Fig. 1 **A**, lar deg enten velge listen over enheter tilordnet en pasient («Tildelt») eller listen over enheter som ikke er tilordnet en pasient («Ikke tildelt»). Standard er «Ikke tildelt».

1.1.1 Tilordningsprosedyre

For å tilordne en enhet til en pasient

- Velg fanen «Ikke tildelt» (hvis ikke allerede valgt).

Listen over ikke tildelte enheter vises. Hver rad tilsvarer én enhet.

- Finn enheten du vil tilordne.

Et søkeverktøy kan benyttes (Fig. 1 **B**). Det er mulig å søke etter enhetens serienummer. Søk med strekkodeskanning kan også benyttes. Skann strekkoden til ønsket enhet for å vise en rad som refererer til den tilknyttede enheten. På raden som tilsvarer ønsket enhet

- Klikk på ikonet angitt i Fig. 1 **C**.

Følgende skjermbilde som krever valg av pasienten som enheten skal tilordnes åpnes (Fig. 2).

Tildele □ ×

Område: ICU ▼

Seng: 4 - John JD Doe - Kode: 34526 ▼

Bekrefter du tilknytningen til pasienten:

John, Doe JD ♂
Kode: 34526 Fødselsdato: 01/01/1954
Innlagt på ICU - Seng 4

Med enhet:

Alaris neXus CC - IP2M12701
0.36 mL/h

✓ Tildele ✕ Avbryt

Fig. 2

- Bruk rullegardinlistene angitt i Fig. 2 **A** for å velge pasienten.

Den valgte pasienten og valgte enhetsdata vises i vinduet (Fig. 2 **B**). Hvis dataene stemmer

- Klikk på knappen angitt i Fig. 2 **C**.

Dette fullfører tilordning av enhet-pasient.

1.1.2 Frakoblingsprosedyre

For å koble en enhet fra en pasient

- Få tilgang til Identitet-modulen.
- Velg kategorien «Tildelt» (Fig. 3 A).

Følgende innhold vises.

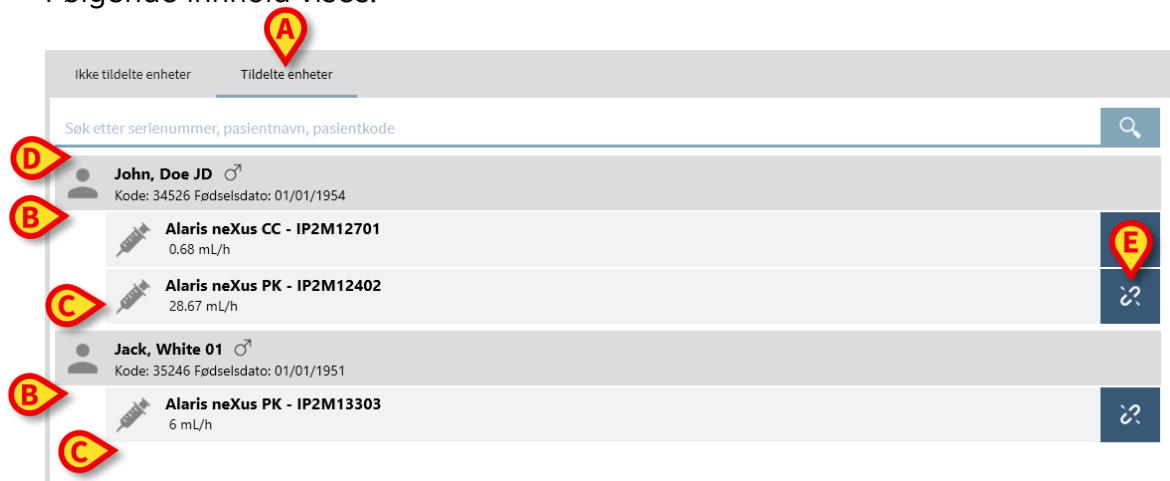


Fig. 3

Mørkegrå rader refererer til pasienter (Fig. 3 B). Lysegrå rader refererer til enheter (Fig. 3 C). Alle innretningene som er tilordnet en pasient er oppført under pasientnavnet.

Et søkeverktøy som gjør det mulig å søke etter en bestemt enhet kan benyttes (Fig. 3 D). En kan søke etter enhetens serienummer/pasientnavn/pasientkode.

- Finn raden som tilsvarer enheten som skal kobles fra.
- Klikk på knappen  (Fig. 3 E).

Følgende vindu åpnes og ber om brukerbekreftelse (Fig. 4).



Fig. 4

- Klikk på knappen angitt i Fig. 4 A for å fullføre frakoblingsprosedyren.