



Identity Net

Instrukcja użytkownika

Wersja 1.0

2023-03-30

Identity Net



Informacje na temat środowiska Produktu, środków ostrożności, ostrzeżeń i przeznaczenia znajdują się w dokumencie *USR POL Digistat Care* (dla pakietu *Digistat Suite EU*) lub *USR ENG Digistat Suite NA* (dla pakietu *Digistat Suite NA*). Znajomość i zrozumienie odpowiedniego dokumentu są obowiązkowe, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z modułu *Identity Net* opisanego w tym dokumencie.

Moduł *Identity* umożliwia tworzenie/usuwanie powiązań urządzeń z pacjentami zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniach przenośnych.

UWAGA: Tylko część skonfigurowanych urządzeń kwalifikuje się do procedury szybkiego tworzenia/usuwania powiązań. Urządzenia podłączone do stojaka/łóżka i powiązane z tym łóżkiem za pomocą aplikacji *Digistat Suite Configuration* nie są wyświetlane w module *Identity*.


OSTRZEŻENIE: Bezprzewodowe pompy infuzyjne są automatycznie odłączane od pacjenta, gdy są poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub są wyłączone przez czas dłuższy niż liczba sekund określona w opcji konfiguracji „*PatientDeviceAssocTimeout*” (Limit czasu powiązania urządzenia pacjenta).

OSTRZEŻENIE: Powiązanie bezprzewodowej pompy infuzyjnej z pacjentem jest konieczne za każdym razem, gdy rozpoczynana jest nowa infuzja.

Aby uzyskać dostęp do modułu *Identity* na komputerowych stacjach roboczych:

- Kliknij ikonę .

Wyświetlony zostanie następujący ekran (Rys. 1).

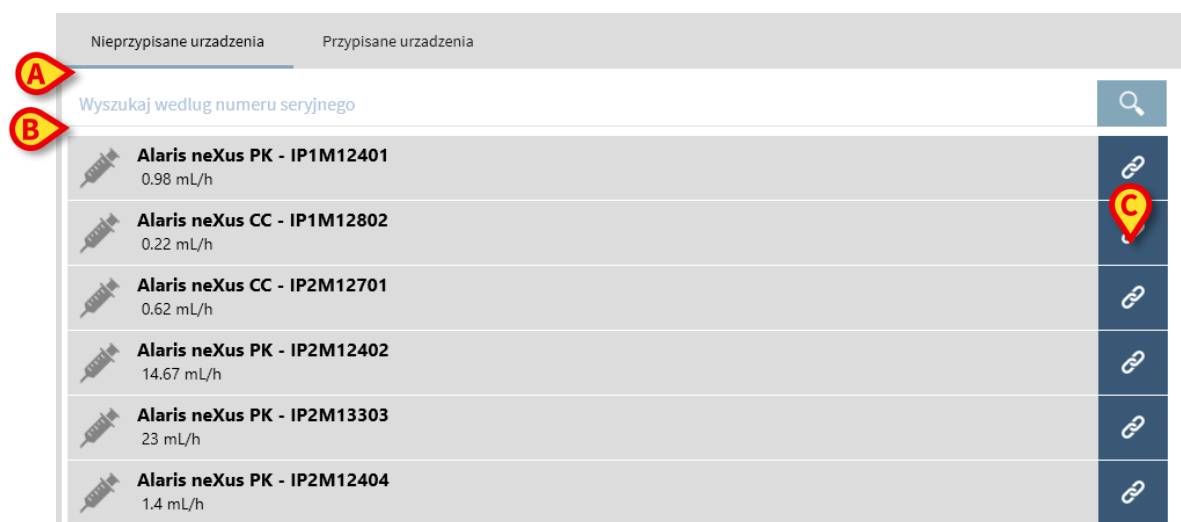

Nieprzypisane urządzenia		Przypisane urządzenia
Wyszukaj według numeru seryjnego		
	Alaris neXus PK - IP1M12401 0.98 mL/h	
	Alaris neXus CC - IP1M12802 0.22 mL/h	
	Alaris neXus CC - IP2M12701 0.62 mL/h	
	Alaris neXus PK - IP2M12402 14.67 mL/h	
	Alaris neXus PK - IP2M13303 23 mL/h	
	Alaris neXus PK - IP2M12404 1.4 mL/h	

Rys. 1

Dwie karty oznaczone na Rys. 1 **A** umożliwiają wybór listy urządzeń powiązanych z pacjentem („Assigned” (Przypisane)) lub listy urządzeń nieprzypisanych do pacjenta („Unassigned” (Nieprzypisane)). Domyślną kartą jest „Unassigned” (Nieprzypisane).

1.1 Procedura powiązania

Aby przypisać urządzenie do pacjenta:

- Wybierz kartę „Unassigned” (Nieprzypisane) (jeśli jeszcze nie została wybrana).

Zostanie wyświetlona lista nieprzypisanych urządzeń. Każdy wiersz odpowiada urządzeniu.

- Znajdź urządzenie, które ma zostać przypisane.

Dostępne jest narzędzie wyszukiwania (Rys. 1 **B**). Można wyszukiwać według numeru seryjnego urządzenia.

Dostępne jest również wyszukiwanie według zeskanowanego kodu kreskowego. Zeskanuj kod kreskowy poszukiwanego urządzenia, aby wyświetlić wiersz odnoszący się do powiązanego urządzenia. W wierszu odpowiadającym żadanemu urządzeniu:

- Kliknij ikonę wskazaną na Rys. 1 **C**.

Zostanie otwarty następujący ekran (Rys. 2), na którym wymagane jest wybranie pacjenta, do którego zostanie przypisane urządzenie.

Przydzielac □ ×

Lokalizacja: ICU ▾

Lóžko: 3 - John 03 Brown - Kod: 35427 ▾

Czy potwierdzasz skojarzenie pacjenta?:

Z urzadzaniem:

Alaris neXus CC - IP2M12701
0.62 mL/h

John, Brown 03 ♂
Kod: 35427 Data urodzenia: 01/01/1953
Przyjęty na ICU - Lóžko 3

✓ Przydzielac × Anuluj

Rys. 2

- Użyj list rozwijanych wskazanych na Rys. 2 **A**, aby wybrać pacjenta.

Dane wybranego pacjenta i wybranego urządzenia są wyświetlane w oknie (Rys. 2 **B**). Jeśli dane są poprawne,

- kliknij przycisk wskazany na Rys. 2 **C**.

Powoduje to utworzenie powiązania między urządzeniem i pacjentem.

1.2 Procedura usuwania powiązania

Aby usunąć powiązanie urządzenia z pacjentem.

- Przejdź do modułu Identity.
- Wybierz kartę „Przypisane” (Rys. 3 A).

Wyświetlana jest następująca treść.

Nieprzypisane urządzenia Przypisane urządzenia

Wyszukaj według numeru seryjnego, nazwiska pacjenta, kodu pacjenta

John, Smith JS ♂
Kod: 45367 Data urodzenia: 01/01/1952

Alaris neXus CC - IP2M12701
0.62 mL/h

Alaris neXus PK - IP2M12402
29.33 mL/h

John, Doe JD ♂
Kod: 34526 Data urodzenia: 01/01/1954

Alaris neXus PK - IP2M12404
1.4 mL/h

Rys. 3

Ciemnoszare wiersze odnoszą się do pacjentów (Rys. 3 B).

Jasnoszare wiersze odnoszą się do urządzeń (Rys. 3 C).

Wszystkie urządzenia przypisane do pacjenta są wymienione poniżej nazwiska pacjenta.

Dostępne jest narzędzie wyszukiwania (Rys. 3 D), które umożliwia wyszukiwanie określonego urządzenia. Wyszukiwanie można przeprowadzić według numeru seryjnego/nazwy pacjenta/kodu pacjenta.

- Znajdź wiersz odpowiadający urządzeniu, którego powiązanie ma zostać usunięte.
- Kliknij przycisk  (Rys. 3 E).

Zostanie otwarte następujące okno z prośbą o potwierdzenie przez użytkownika (Rys. 4).

Odlaczyc

Czy potwierdzasz odłączenie pacjenta?:

John, Smith JS ♂
Kod: 45367 Data urodzenia: 01/01/1952
Przyjęty na ICU - Łóżko 2

Z urządzeniem:

 {{ds:Header.DeviceIdentification.DeviceName}} - {{ds:Header.I{{ds:Params.8003.Value}} {{ds:Params.8009.Value}} {{std:8009.unit}}}

✓ Odlaczyc ✕ Anuluj

Rys. 4

- Kliknij przycisk wskazany na Rys. 4 A, aby zakończyć procedurę usuwania powiązania.