



Control Bar Web Manual de utilizzare

Versiunea 5.0

10/3/2025

Conținut

1. Control Bar Web	3
1.1 Lansarea Control Bar Web.....	3
1.2 Autentificare utilizator	4
1.2.1 Conectare automată.....	6
1.2.2 Deconectați-vă și rămâneți.....	7
1.3 Zona de lucru.....	8
1.3.1 Selectarea unui modul	8
1.4 Control Bar	9
1.5 Meniul principal.....	10
1.5.1 Schimbare parolă	11
1.5.2 Raportarea problemelor utilizatorilor.....	12
1.6 Submodule suplimentare	13
1.6.1 Configurator CDSS	13
1.6.2 Identitate	15

1. Control Bar Web



Pentru informații despre mediul produsului, precauții, avertismente și utilizarea prevăzută, consultați USR ROU Digistat Care și/sau USR ROU Digistat Docs (în funcție de modulele instalate - pentru Digistat Suite EU) sau USR ENG Digistat Suite NA (pentru Digistat Suite NA). Cunoașterea și înțelegerea documentului corespunzător sunt obligatorii pentru utilizarea corectă și sigură a Control Bar Web, descrisă în acest document.

1.1 Lansarea Control Bar Web

Pentru a lansa Control Bar Web:

- Introduceți adresa respectivă în bara de adrese a browserului.

Se deschide următoarea pagină:

Fig 1

1.2 Autentificare utilizator

Autentificarea utilizatorului este necesară pentru a activa funcțiile sistemului.

login

 Username

 Password

 login

Fig 2

Pentru autentificare:

- Introduceți numele dvs. de utilizator în câmpul "Nume utilizator" (Fig 2 **A**).
- Introduceți parola în câmpul "Parolă" (Fig 2 **B**).
- Faceți clic pe butonul **Login** (Fig 2 **C**).

În acest fel, utilizatorul este autentificat.



Numele de utilizator și parola sunt atribuite de către administratorul de sistem. Dacă nu aveți un nume de utilizator și o parolă, nu sunteți autorizat să utilizați Produsul.

După accesarea sistemului, pe butonul **Utilizator** de pe bara de comandă (Control Bar) este afișat un acronim corespunzător utilizatorului logat (acronimul este ADMIN în Fig 3 **A**).



Fig 3

Utilizatorul ale cărui acreditări sunt afișate pe butonul "Utilizator" este responsabil pentru toate acțiunile realizate cu Produsul.



Notă: Sunt posibile unele excepții în funcție de configurația instalării dumneavoastră (de exemplu, funcționalitățile de Autologin sau „Deconectare și a rămâne conectat” – paragrafu 1.2.1 e 1.2.2).

Este recomandat să vă deconectați înainte de a părăsi stația de lucru a Produsului pentru a evita utilizarea necorespunzătoare a sistemului.



Este posibilă configurarea produsului pentru a permite autentificarea printr-un sistem extern (single sign on). În aceste cazuri, un buton dedicat este afișat pe ecranul de conectare.

Pentru a vă deconecta, faceți clic pe butonul **Utilizator** în timpul sesiunii de lucru. Se deschide următorul meniu (Fig 4).



Fig 4

- Faceți clic pe **DECONNECTARE** (Fig 4 **A**).

Este necesară confirmarea utilizatorului. După confirmare, utilizatorul este deconectat. Pentru a vă autentifica din nou, faceți din nou clic pe butonul **Utilizator**. Ecranul prezentat în Fig 2 va fi afișat din nou.

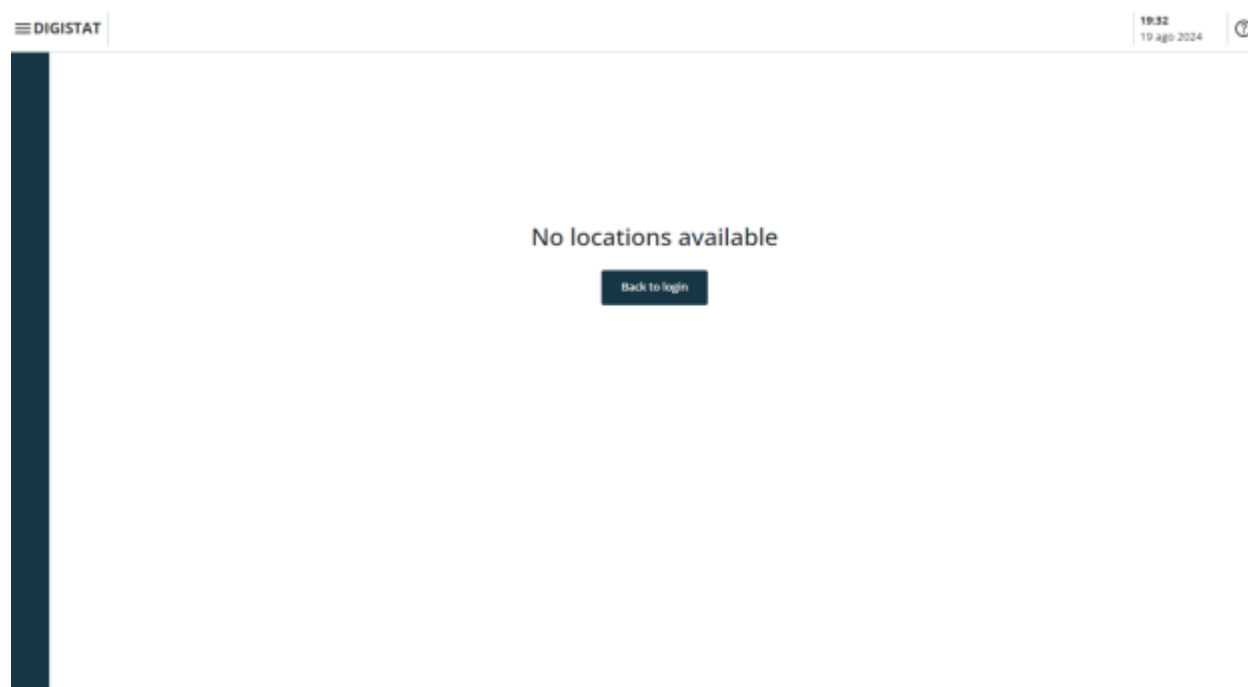


Fig. 5

Dacă utilizatorul nu are o locație asociată anterior (consultați *manualul CGF ENG Digistat Suite MDR* pentru configurarea asocierii utilizator-locație), nu este posibilă conectarea la modul. În acest caz, este afișat mesajul „No location available” (Nicio locație disponibilă) (Fig. 5). În plus, este furnizat un buton **Back to Login** (Înapoi la conectare) pentru a reveni

la pagina de conectare și a încerca din nou conectarea cu un utilizator nou sau cu același utilizator după asocierea utilizator-locăție.



O „Locație” este o entitate de configurare Digistat care corespunde unei anumite zone a structurii de asistență medicală. Poate fi, de exemplu, un departament, o secție, un bloc de operațiuni etc., în funcție de cerințele structurii de asistență medicală. Consultați administratorii de sistem pentru mai multe informații.

1.2.1 Conectare automată

Este posibil să configurați Digistat Web pentru a permite autentificarea automată a utilizatorilor. Aceasta înseamnă că atunci când Digistat Web este pornit, un utilizator configurat este deja conectat. În acest caz, anumite funcționalități configurate sunt disponibile imediat, înainte de efectuarea oricărei proceduri de autentificare.

Pentru a activa autentificarea automată, este necesar să configurați opțiunea de sistem „AutoLoginUsername”. Consultați documentul DSO ENG System Options pentru mai multe informații.

Când autentificarea automată este activă, este în continuare posibil ca un utilizator să se autentifice cu propriile sale credențiale. Pentru a face acest lucru.

- Faceți clic pe butonul **Utilizator** (Fig 6 A).

DIGISTAT Select Patient



John Doe 12:48 PM
Sep 4, 2025



Fig 6

Se va deschide următorul meniu (Fig 7).

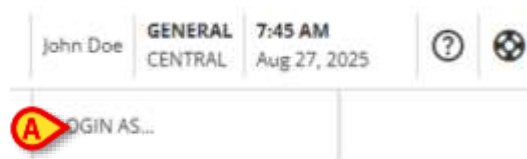


Fig 7

- Faceți clic pe **LOGIN CA...** (Fig 7 A).

Va fi afișat ecranul de conectare (Fig 2). Autentificați-vă așa cum este descris în paragraful 1.2.



Când opțiunea de sistem „AutoLoginUsername” este configurată, funcționalitatea „Deconectare utilizator curent” (descrisă în paragraful 1.2.2) este dezactivată.



Funcționalitățile „Autentificare automată” și „Deconectare și a rămâne conectat” sunt disponibile doar atunci când aplicația rulează în cadrul „Digistat Web Browser”. Consultați manualul de instalare Digistat Suite pentru mai multe informații (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Deconectați-vă și rămâneți

Această funcționalitate permite utilizatorului să se deconecteze, rămânând în același timp autentificat cu un nume de utilizator specificat în timpul configurării. Aceasta înseamnă că, după deconectarea utilizatorului, un utilizator convențional rămâne autentificat. Pentru a activa această funcționalitate, este necesar să configurați opțiunea de sistem „LogoutAndRemainUsername”. Consultați documentul DSO ENG System Options pentru mai multe informații. Atunci când această funcționalitate este disponibilă, opțiunea **Deconectare utilizator curent** este disponibilă în meniul „Utilizator” (Fig 9 A).

Pentru "a vă deconecta și a rămâne"

- Faceți clic pe butonul **Utilizator** (Fig 8 A).

DIGISTAT Select Patient



Fig 8

Se va deschide următorul meniu (Fig 9).



Fig 9

- Faceți clic pe **DECONETARE UTILIZATOR CURENT** (Fig 9 A).

Datele de autentificare ale utilizatorului curent vor dispărea de pe butonul **Utilizator**, iar în schimb vor fi afișate datele de autentificare ale utilizatorului convențional configurat.

1.3 Zona de lucru

După autentificarea utilizatorului, pictogramele corespunzătoare modulelor Digistat Web disponibile sunt afișate pe bara laterală (Fig 10 **A**). Zona de lucru (Fig 10 **B**) afișează ecranele și funcțiile modulului selectat pe bara laterală.



Fig 10

Control Bar (Fig 10 **C**) este descrisă în secțiuni 1.4 și următoarele. Modulul selectat în prezent este evidențiat.

1.3.1 Selectarea unui modul

Pentru a selecta un modul:

- Faceți clic pe pictograma corespunzătoare din bara laterală.

Pictograma va fi evidențiată, iar funcțiile modulului vor fi afișate în zona de lucru.

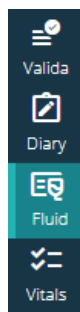


Fig 11

1.4 Control Bar

Control Bar care apare în partea superioară a ecranului este comună tuturor modulelor. Principalele sale caracteristici sunt enumerate mai jos.



Fig 12

- Butonul **Meniu** (Fig 12 **A**) deschide meniul principal Control Bar Web. Vezi Secțiunea 1.5.
- Butonul **Pacient** (Fig 12 **B**). Dacă nu este selectat niciun pacient, se poate face clic pe acest buton pentru a lansa procedura de selecție a pacientului. După selectarea pacientului, sunt afișate numele pacientului și datele principale. Pentru pacienții internați, sunt afișate și numărul patului și numele secției. Dacă sunt disponibile anumite funcționalități suplimentare Control Bar Web pentru pacientul selectat, butonul pacientului poate fi apăsat pentru a afișa un meniu derulant care permite accesul la aceste funcționalități (vezi secțiunea 1.6 pentru mai multe informații).
Dacă lângă numele pacientului este afișată pictograma unui lacăt -  - înseamnă că unele date/funcționalități ale pacientului sunt blocate pentru pacientul respectiv.



Procedura de selecție a pacientului se realizează de obicei pe modulul Digistat Patient Explorer Web. Consultați manualul de utilizare Patient Explorer Web (documentul USR ROU Patient Explorer Web) pentru instrucțiuni privind funcționalitățile de gestionare a pacienților. Alte module pot fi configurate pentru selectarea pacientului în locul Patient Explorer Web. În acest caz, consultați documentația specifică pentru instrucțiuni.

- Zona indicată în Fig 12 **C** poate fi utilizată pentru a semnală că există notificări pentru utilizator.
- Butonul utilizatorului oferă acces la funcțiile de autentificare/ieșire și de modificare a parolei (Fig 12**D**).
- Indicarea datei - orei (Fig 12 **E**).
- Utilizați butonul **Asistență** (Fig 12 **F**) pentru a accesa asistență online.
- Faceți clic pe  pictograma (Fig 12**G**) pentru a crea un raport privind o problemă care va fi trimis la asistența tehnică pentru asistență. Vezi secțiunea 1.5.2.

1.5 Meniul principal

Butonul **Meniu** (Fig 12A) **deschide următorul** meniu (Fig 13).

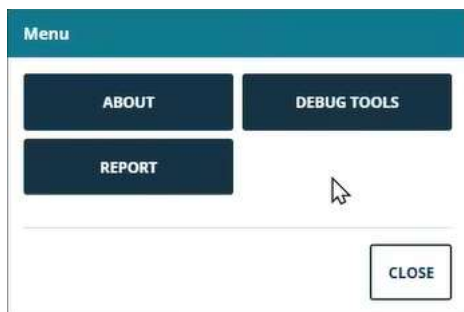


Fig 13

Butonul **Despre** afișează o fereastră care conține informații despre versiunea Digistat Suite instalată și licențele aferente (consultați documentația specifică pentru mai multe informații).

Etichetarea propriu-zisă a produsului este caseta Despre afișată pe stațiile de lucru ale clienților, pe dispozitivele mobile și pe modulele web în care este instalat Digistat Suite.

Butonul **Instrumente de depanare** este rezervat administratorilor de sistem.

Butonul **Rapoarte** deschide o fereastră care afișează lista rapoartelor disponibile (Fig 14).

Butonul **Rapoarte** este prezent atât atunci când este selectat un pacient, cât și atunci când nu este selectat niciun pacient. Dacă este selectat un pacient, rapoartele disponibile sunt cele legate de unitatea spitalicească a pacientului (etichetate ca „Pacient”). Dacă nu este selectat niciun pacient, rapoartele disponibile sunt cele legate de unitatea spitalicească a utilizatorului autentificat (etichetate ca „Generic”).



Fiecare utilizator este asociat, în timpul configurării, cu una sau mai multe unități spitalicești.

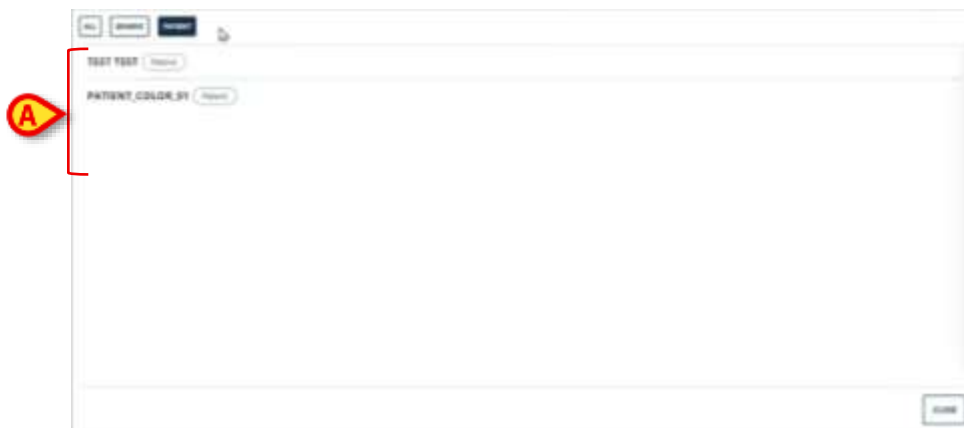


Fig 14

Fiecare rând din fereastră corespunde unui raport pentru tipărire.

- Faceți clic pe un rând pentru a afișa o previzualizare a imprimării.

Fiecare raport poate fi etichetat ca "Raport pacient" sau "Raport generic" (Fig 15 **A**).



Fig 15

Butoanele indicate în Fig 15 **B** permit filtrarea rapoartelor afișate pe fereastră (numai "Rapoarte generice", numai "Rapoarte pacient" sau toate rapoartele disponibile).

1.5.1 Schimbare parolă

Pentru a schimba parola utilizatorului:

- Faceți clic pe butonul **Utilizator** din Control Bar (Fig 16 **A**).



Fig 16

- Se deschide următorul meniu (Fig 17).



Fig 17

- Faceți clic pe **Schimbare parolă** (Fig 17 **A**). Se deschide următorul ecran (Fig 18).

CHANGE PASSWORD



The image shows a 'CHANGE PASSWORD' form. It consists of three input fields and a button. The first input field is labeled 'Old password' and has a red circle with a yellow 'A' next to it. The second input field is labeled 'New Password' and has a red circle with a yellow 'B' next to it. The third input field is labeled 'Confirm new password' and has a red circle with a yellow 'C' next to it. Below the input fields is a dark blue button labeled 'SAVE' with a red circle with a yellow 'D' next to it.

Fig 18

- Introduceți parola curentă în câmpul "Parolă VECHE" (Fig 18 **A**)
- Introduceți parola nouă în câmpul "Parolă nouă" (Fig 18 **B**).
- Introduceți din nou parola nouă în câmpul "Confirmați parola nouă" (Fig 18 **C**).
- Faceți clic pe **Salvare** (Fig 18 **D**).

1.5.2 Raportarea problemelor utilizatorilor

Dacă este prezentă,  pictograma de pe Control Bar (Fig 19 **A**) permite crearea unui raport "problemă" și, în caz de necesitate, obținerea asistenței tehnice.



Fig 19



*Prezența pictogramei depinde de opțiunea de sistem EnableUserIssueReporting.
Pentru mai multe informații, consultați administratorii de sistem.*

Pentru a face acest lucru:

- Faceți clic pe pictograma  (Fig 19 **A**). Se deschide următoarea fereastră (Fig 20).

Fig 20

- Introduceți o descriere a problemei în câmpul "Descriere" (Fig 20 **A**).
- Faceți clic pe **Trimitere** (Fig 20 **B**).

Se furnizează o confirmare, inclusiv un număr de identificare a problemei.

1.6 Submodule suplimentare

Submodulele descrise în această secțiune pot fi prezente sau nu, în funcție de configurația produsului în organizația medicală. Fiecare submodul poate fi deschis făcând clic pe un anumit element de meniu din meniul derulant care este afișat alături de butonul pacientului. Acestea sunt asociate pacientului, adică sunt disponibile numai dacă este deja selectat un pacient.

1.6.1 Configurator CDSS

Submodulul CDSS Configurator poate fi activat prin configurare ca secțiune suplimentară a Control Bar Web. Pentru a deschide submodulul Configurator CDSS:

- Selectați pacientul relevant.



Consultați manualul de utilizare Patient Explorer Web pentru procedura de selecție a pacientului (documentul USR RO Patient Explorer Web).

După selectarea pacientului, dacă sunt disponibile submodule suplimentare Control Bar, pe butonul pacientului (Fig. 21 **A**) este afișată pictograma .



Fig. 21

- Faceți clic pe pictograma .

Este afișată o fereastră derulantă, care listează submodulele (Fig. 22) suplimentare disponibile.

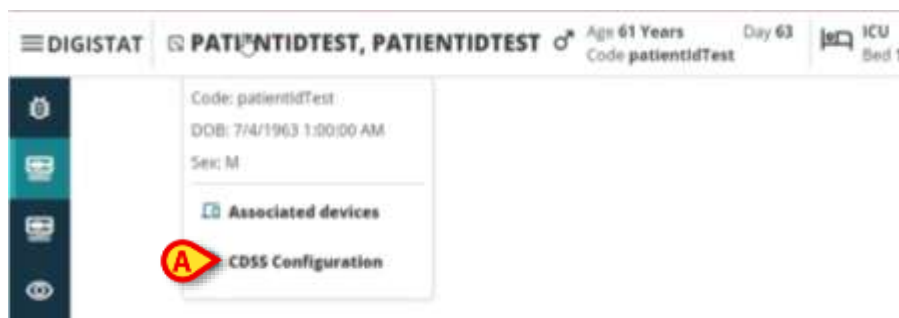


Fig. 22

- Faceți clic pe "Configurare CDSS" (Fig. 22A).

Este afișată următoarea fereastră, care listează regulile asociate pacientului (Fig. 23) selectat în prezent.

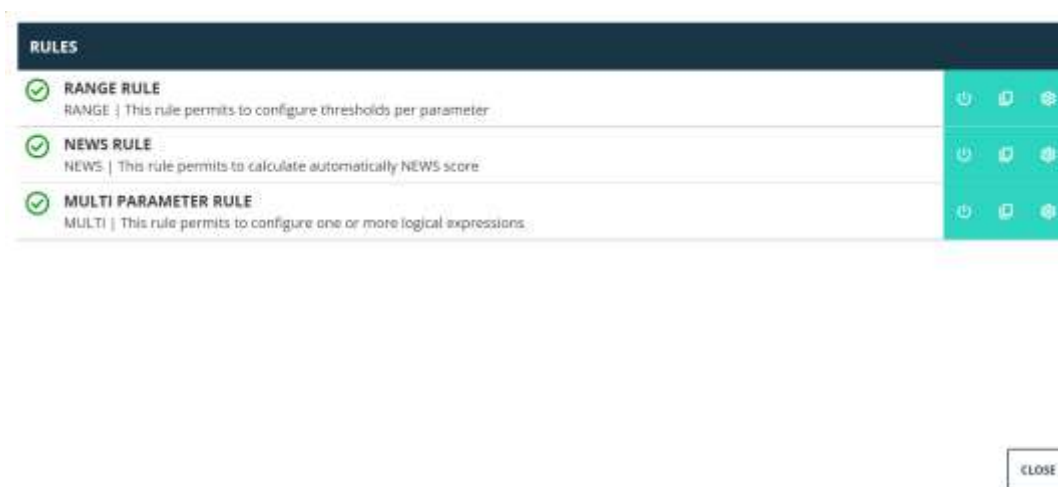


Fig. 23

Consultați manualul de utilizare al CDSS Configurator pentru descrierea completă și instrucțiunile de utilizare a acestui submodul (document USR RO CDSS Web).

1.6.2 Identitate

Submodulul Identity poate fi activat prin configurare ca secțiune suplimentară a Control Bar Web. Pentru a deschide submodulul Identity:

- Selectați pacientul relevant.



Consultați manualul de utilizare Patient Explorer Web pentru procedura de selecție a pacientului (document: USR RO Patient Explorer Web).

După selectarea pacientului, dacă sunt disponibile submodule suplimentare Control Bar, pe butonul Fig. 24 pacientului (**A**) este afișată pictograma .



Fig. 24

- Faceți clic pe pictograma .

Este afișată o fereastră derulantă, care listează secțiunile suplimentare disponibile (Fig. 25).

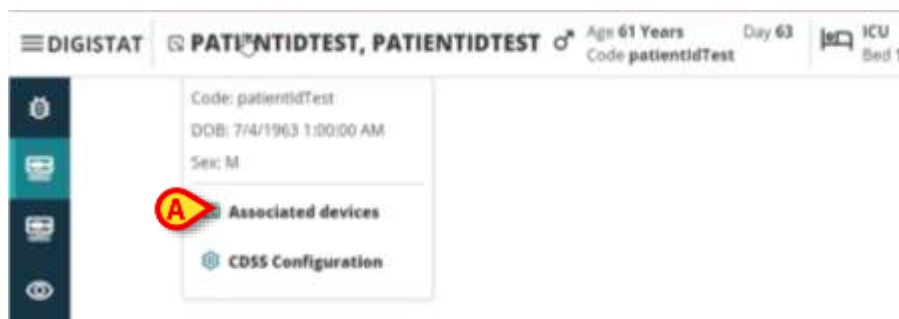


Fig. 25

- Faceți clic pe "Dispozitive asociate" (Fig. 25 **A**).

Este afișată următoarea fereastră, care listează dispozitivele asociate pacientului selectat în prezent (Fig. 26).

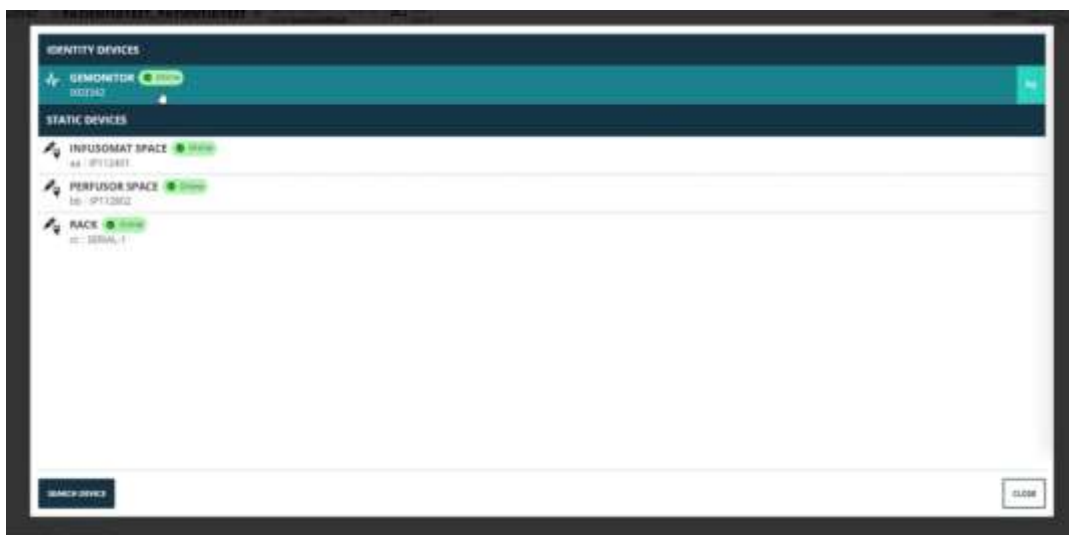


Fig. 26

Consultați manualul de utilizare Identity pentru descrierea completă și instrucțiunile de utilizare a acestui submodul (documentul USR ROU Identity Web).