



# **Identity Web**

# **Manual de utilizare**

**Versiunea 1.0**

**7/8/2025**

# Cuprins

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Identity Web .....                                    | 3  |
| 1. Introducere .....                                  | 3  |
| 2. Selectarea pacientului .....                       | 3  |
| 3. Selectarea „Identity Web” .....                    | 4  |
| 4. Lista dispozitivelor asociate .....                | 5  |
| 5. Procedura de disociere .....                       | 6  |
| 6. Procedura de căutare și asociere.....              | 8  |
| 6.1. Disocierea după căutare .....                    | 10 |
| 6.2. Dispozitive deja asociate .....                  | 11 |
| 7. Căutarea și selectarea după codurile de bare ..... | 12 |

# Identity Web



Pentru informații despre mediul Produsului, precauții, avertismente și utilizarea prevăzută, consultați *USR ROU Digistat Care* și/sau *USR ROU Digistat Docs* (în funcție de modulele instalate - pentru *Digistat Suite EU*) sau *USR ENG Digistat Suite NA* (pentru *Digistat Suite NA*). Cunoașterea și înțelegerea documentului corespunzător sunt obligatorii pentru o utilizare corectă și sigură a „Identity Web”, descris în acest document.

## 1. Introducere



*Identity Web* este un submodul al *Control Bar Web* care poate fi activat sau nu în funcție de configurația utilizată în cadrul organizației medicale specifice. Consultați administratorii de sistem pentru mai multe informații.

„Identity Web” permite asocierea/disocierea rapidă a dispozitivelor medicale cu pacienții în contextul mediului Digistat Web.



Doar un subset de dispozitive configurate este eligibil pentru procedura rapidă de asociere/disociere. De obicei, procedura se aplică dispozitivelor wi-fi care sunt adesea mutate de la un pacient la altul. În toate cazurile, caracteristicile, modul de utilizare și configurația dispozitivului îl fac sau nu eligibil pentru procedura descrisă aici.

## 2. Selectarea pacientului

„Identity Web” poate fi lansat numai după selectarea pacientului. Pentru a selecta un pacient,

- Faceți clic pe butonul **Selectați pacient** indicat în Fig. 1 A.

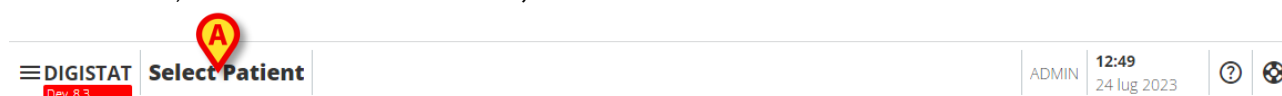


Fig. 1

Se deschide modulul Patient Explorer Web. Consultați manualul de utilizare Digistat® Patient Explorer Web (*USR ROU Patient Explorer Web*) pentru instrucțiuni suplimentare privind funcțiile de gestionare a pacienților.



În funcție de configurație, pentru selectarea pacientului, în locul Patient Explorer Web, pot fi configurate alte module. În acest caz, consultați documentația specifică pentru instrucțiuni.

În urma selectării unui pacient, pe butonul **Patient** (Pacient) (Fig. 2 **A**) sunt afișate numele și datele principale ale pacientului.



Fig. 2

### 3. Selectarea „Identity Web”

Dacă submodulul „Identity Web” este disponibil, pe butonul corespunzător pacientului (Fig. 3 **A**) este afișată pictograma



Fig. 3

Pentru a lansa Identity Web:

- Faceți clic pe pictograma

Se afișează un meniu vertical, care conține date suplimentare despre pacient și aplicațiile disponibile care pot fi lansate pe Control Bar (Fig. 4).

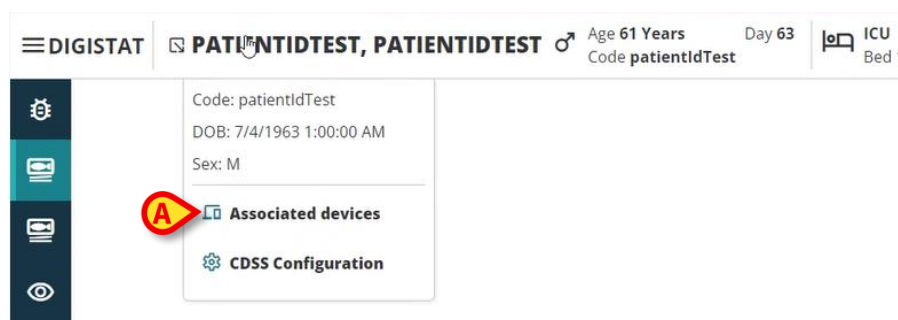


Fig. 4

- Faceți clic pe „Associated Devices” (Dispozitive asociate) (Fig. 4 **A**).

Este afișată următoarea fereastră, care prezintă dispozitivele asociate pacientului selectat în prezent (Fig. 5).

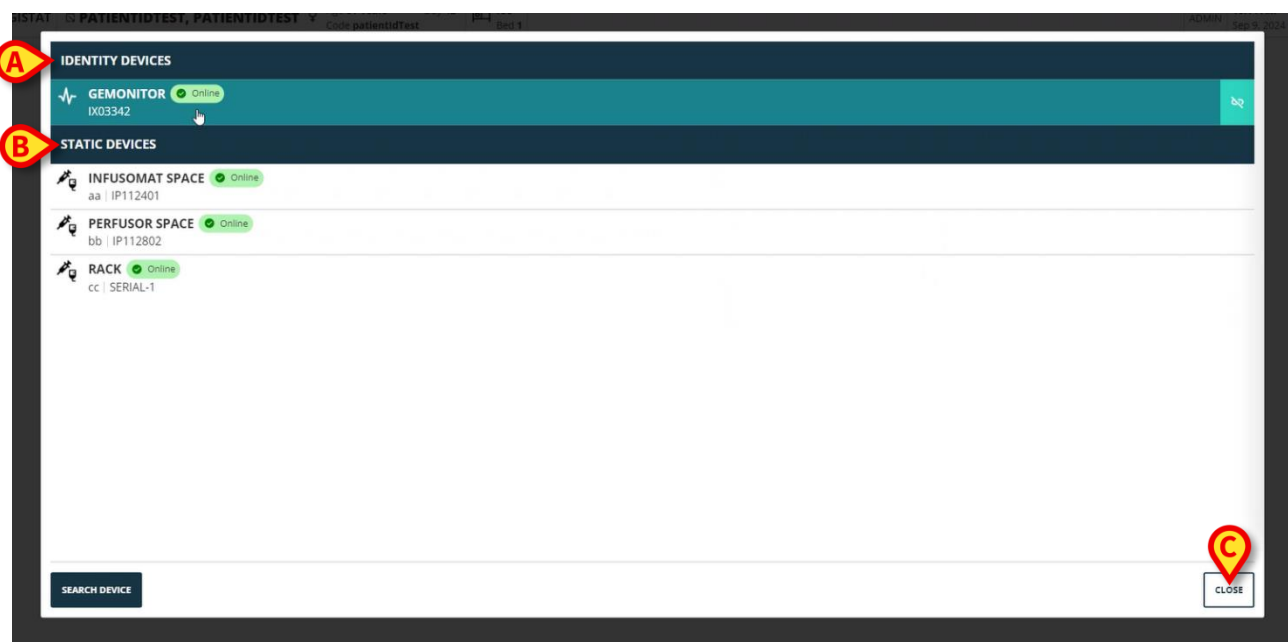


Fig. 5

## 4. Lista dispozitivelor asociate

Fereastra „Associated Devices List” (Lista de dispozitive asociate) (Fig. 5) este împărțită în două secțiuni:

Secțiunea **Identity Devices** (Dispozitive Identity) (Fig. 5 **A**) listează dispozitivele mobile care sunt asociate în prezent pacientului selectat.

Secțiunea **Static Devices** (Dispozitive statice) (Fig. 5 **B**) listează dispozitivele care sunt legate de patul selectat și care nu pot fi mutate.

„Identity Web” funcționează numai pe **Identity Devices** (Dispozitive Identity).

Fiecare rând din fereastră corespunde unui dispozitiv (vedeți Fig. 6, de exemplu).



Fig. 6

Pentru fiecare dispozitiv sunt afișate următoarele informații:



Fig. 7

- O pictogramă care caracterizează tipul de dispozitiv (Fig. 7 **A**)
- Numele dispozitivului (Fig. 7 **B**).
- Indicarea stării dispozitivului (Fig. 7 **C** - fie Online, fie Offline).
- O etichetă, care poate fi asociată dispozitivului în timpul configurării pentru a furniza informații suplimentare (Fig. 7 **D**)
- Numărul de serie al dispozitivului, care identifică în mod unic dispozitivul (Fig. 7 **E**).

Pentru a închide lista de dispozitive asociate:

- Faceți clic pe butonul **Close** (Închidere) indicat în Fig. 5 C.

Este posibil să afișați o fereastră pentru fiecare dispozitiv conectat, listând parametrii înregistrați de dispozitivul specific, cu valorile și unitatea de măsură a acestora. Pentru a face acest lucru:

- Faceți clic pe rândul corespunzător dispozitivului (Fig. 8 A).

Este afișată fereastra indicată în Fig. 8 B .

Această fereastră listează parametrii înregistrați de dispozitiv, indicând numele acestora, cea mai recentă valoare și unitatea de măsură.

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red circle 'A' highlights the GEMONITOR device. A 'Parameters' window is open, showing a table of parameters for the selected device. A red circle 'B' highlights the 'Parameters' window title bar.

| Name             | Value    | Unit of measure |
|------------------|----------|-----------------|
| TH               | 3        | °C              |
| C TH+L           | 58       | mL/cm H2O       |
| RAW              | 34       | cm H2O/L/s      |
| EtO2             | 65       | %               |
| RR CO2           | 71       | bpm             |
| Alarm Silenced   | Audio On |                 |
| Temp Other       | 45       | °C              |
| Temp Other #2    | 37       | °C              |
| Temp Other #3    | 68       | °C              |
| Temp Other #4    | 15       | °C              |
| Temp Blood       | 91       | °C              |
| Temp Blood #2    | 17       | °C              |
| Temp Blood CO    | 37       | °C              |
| Temp Blood PA    | 46       | °C              |
| Temp Blood PA #2 | 43       | °C              |

Fig. 8

## 5. Procedura de disociere

„Identity Web” permite operarea doar pe „Identity Devices” (Dispozitive Identity) (cele mobile, cele asociate pacientului, nelegate de pat).

În dreapta rândurilor corespunzătoare „Identity Devices” (Dispozitivelor Identity) (Fig. 9 A) este afișat un buton de disociere.

The screenshot shows the 'IDENTITY DEVICES' section with a list of devices: GEMONITOR (IX03342), INFUSOMAT SPACE (aa | IP112401), PERFUSOR SPACE (bb | IP112802), and RACK (cc | SERIAL-1). A red circle 'A' highlights the dissociation button (a small icon) next to the GEMONITOR device.

Fig. 9

Pentru a disocia un dispozitiv

- Faceți clic pe butonul  (Fig. 9 A).

Este necesară confirmarea utilizatorului, așa cum se arată în Fig. 10 A.

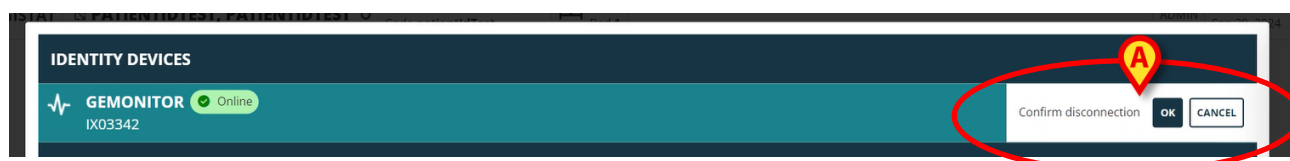


Fig. 10

După confirmare, dispozitivul este disociat dar, din motive de procesare, care necesită o deconectare progresivă, rândul corespunzător dispozitivului disociat este:

- a) afișat pentru prima dată în zona „Static Devices” (Dispozitive statice), în starea „Online” (Fig. 11 A);



Fig. 11

- b) apoi, după un timp configurabil, afișat ca „Offline” (Fig. 12 A);



Fig. 12

- c) apoi, după un timp configurabil, eliminat din listă (Fig. 13).



Fig. 13



A se vedea, de asemenea, secțiunea 6.1 pentru procedura de disociere după căutare.

## 6. Procedura de căutare și asociere

Pentru a căuta un dispozitiv și a-l asocia cu pacientul selectat în prezent:

- Faceți clic pe butonul **Search device** (Căutare dispozitiv) din fereastra „Associated Devices List” (Listă dispozitive asociate) (Fig. 14 **A**).

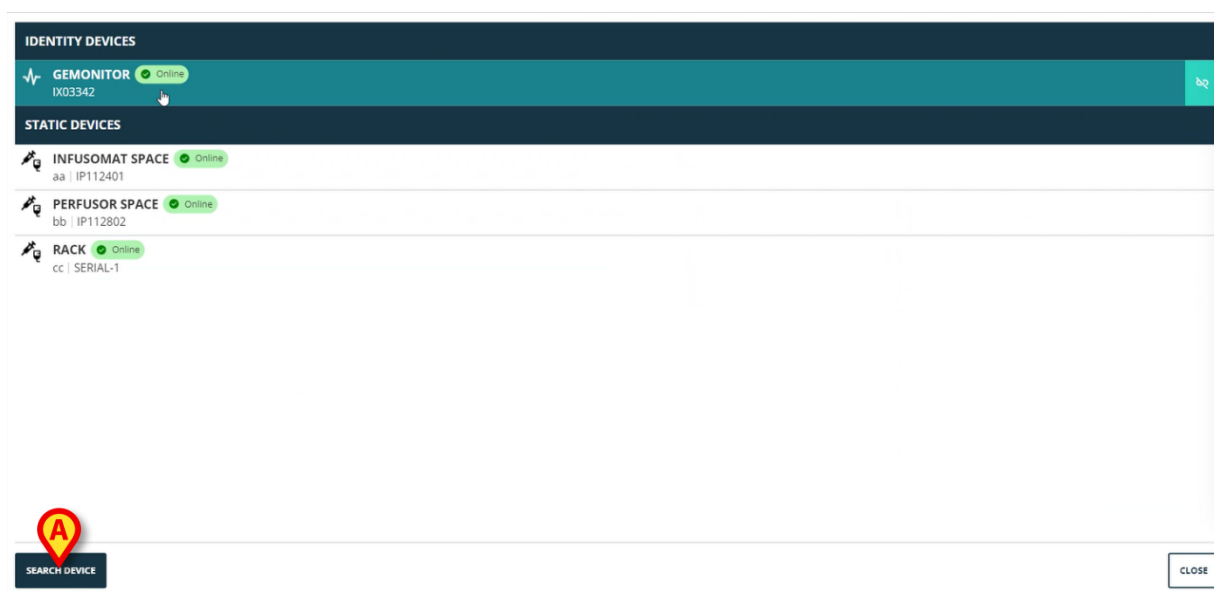


Fig. 14

În dreapta (Fig. 15 **A**) este afișat un instrument de căutare.

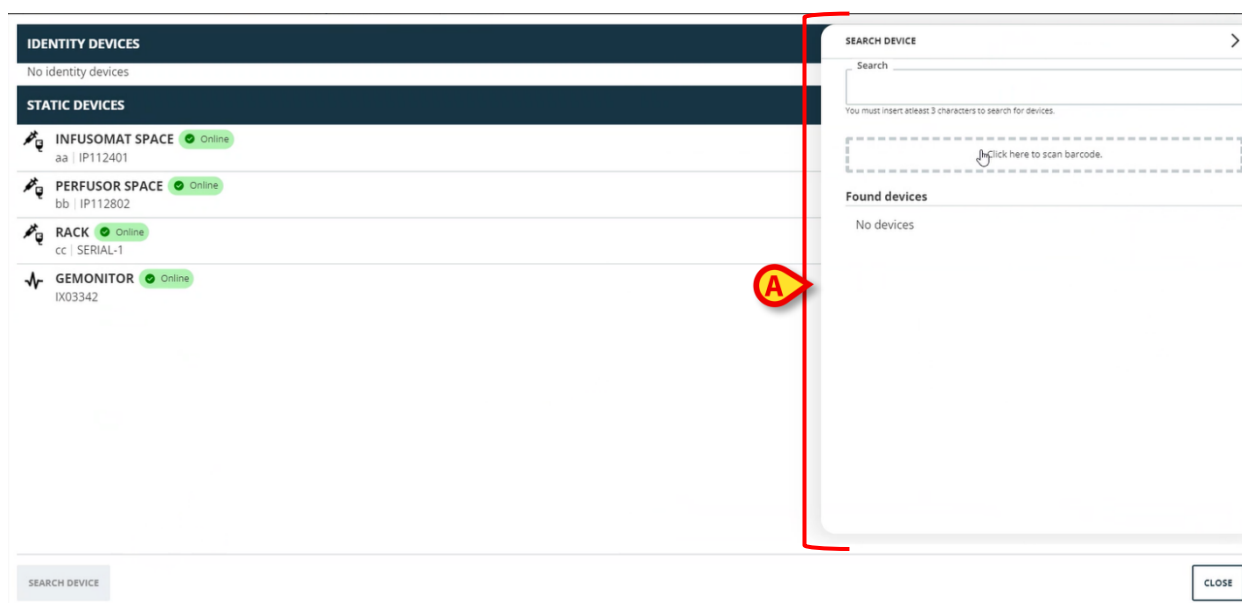


Fig. 15



- Introduceți numele sau numărul de serie al dispozitivului relevant în câmpul indicat în Fig. 16 **A**.

Pentru a afișa rezultatele trebuie specificate cel puțin trei caractere. Lista dispozitivelor care corespund șirului specificat este afișată în zona „Found devices” (Dispozitive găsite) (Fig. 16 **B**).

De asemenea, este activată căutarea după codurilor de bare (consultați secțiunea 7 pentru instrucțiuni).



Fig. 16

- Faceți clic  pe butonul plasat în dreapta dispozitivului de asociat.

Rândul corespunzător se modifică așa cum se arată în Fig. 17 **A**.

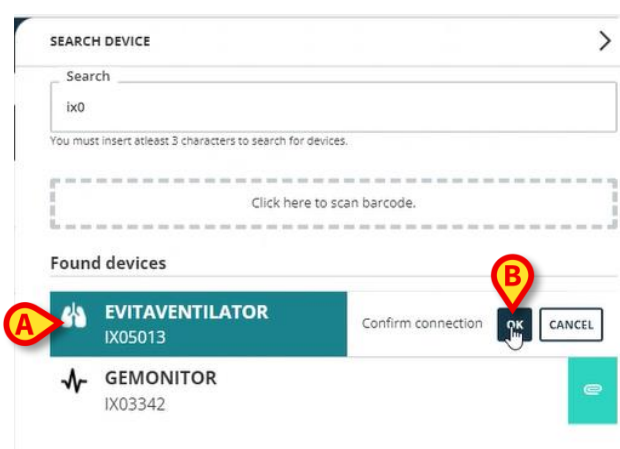


Fig. 17

Pentru a confirma asocierea

- Faceți clic pe butonul **Ok** (Fig. 17 **B**).

Dispozitivul este apoi afișat în lista de dispozitive asociate, în zona „Identity device” (Dispozitiv Identity) (Fig. 18 **A**).

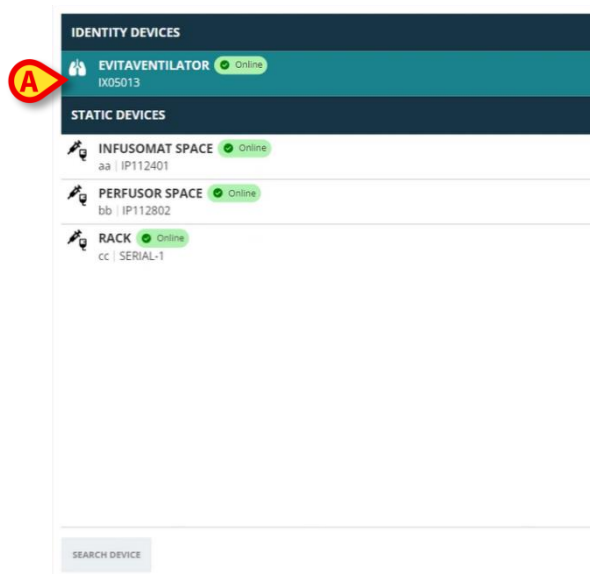


Fig. 18

## 6.1. Disocierea după căutare

Dispozitivele deja atribuite sunt, de asemenea, afișate ca rezultate ale căutării, dar, în dreapta, este afișat un buton  de disociere în locul butonului  de asociere (Fig. 19 **A**).

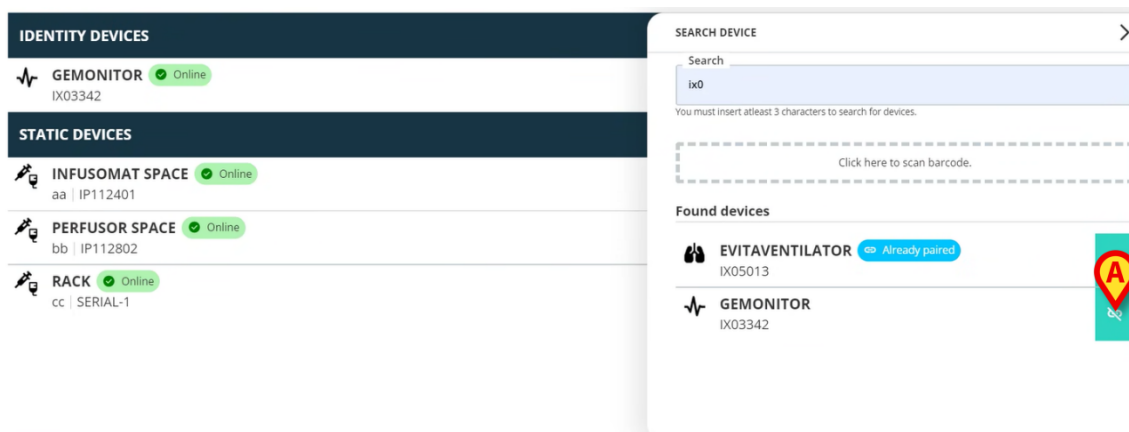


Fig. 19

- Faceți clic pe butonul  pentru a disocia dispozitivul.

Este necesară confirmarea utilizatorului.

- Faceți clic pe butonul **Ok** pentru a confirma disocierea (Fig. 20 **A**).

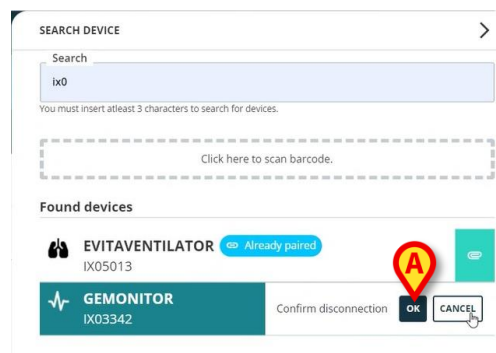


Fig. 20

Dispozitivul disociat dispăre din zona „Identity Devices” (Dispozitive Identity) din lista de dispozitive asociate. Este încă afișat în rezultatele căutării ca dispozitiv „conectabil”.

## 6.2. Dispozitive deja asociate

Dispozitivele care sunt asociate cu alți pacienți sunt afișate în rezultatele căutării ca „Already paired” (Deja asociate) (Fig. 21 A).



Fig. 21

Dispozitivele „Already paired” (Deja asociate) pot fi asociate pacientului selectat în prezent folosind procedura standard descrisă în secțiunea 6. În aceste cazuri este necesară o confirmare specifică a utilizatorului (Fig. 22).

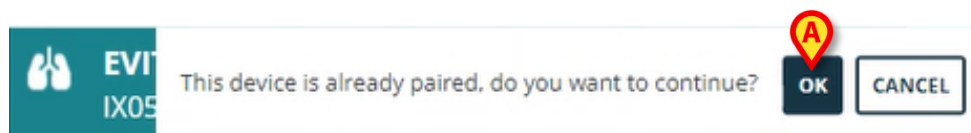


Fig. 22

- Faceți clic pe **Ok** pentru a asocia dispozitivul la pacientul selectat în prezent (Fig. 22 A).

Dispozitivul este astfel deconectat de pacientul anterior și asociat cu cel selectat în prezent.

## 7. Căutarea și selectarea după codurile de bare

În urma căutării după codul de bare, este posibil să selectați un dispozitiv. Pentru a activa selectarea după codul de bare, în fereastra „Search device” (Căutare dispozitiv):

- Faceți clic pe zona indicată în Fig. 23 **A**.



Fig. 23

Se activează camera stației de lucru (Fig. 24 **A**).

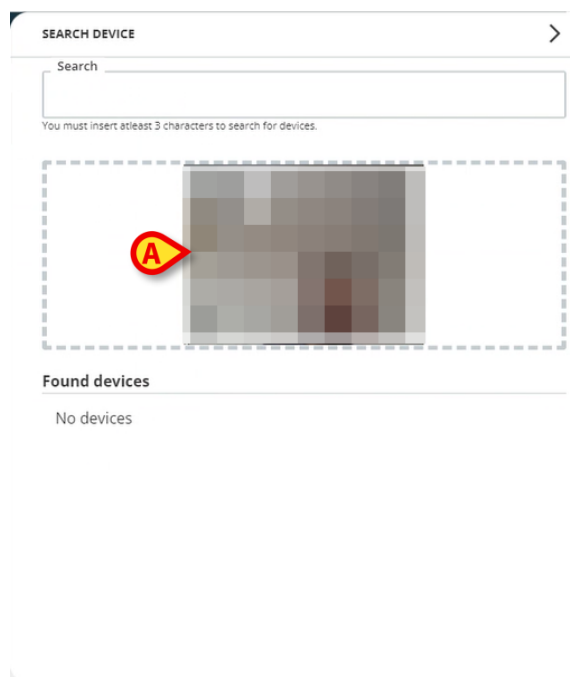


Fig. 24

- Scanați codul de bare al dispozitivului relevant.

Datele dispozitivului sunt afișate în zona „Found devices” (Dispozitive găsite) din fereastra „Search Device” (Căutare dispozitiv) (Fig. 25 **A**).

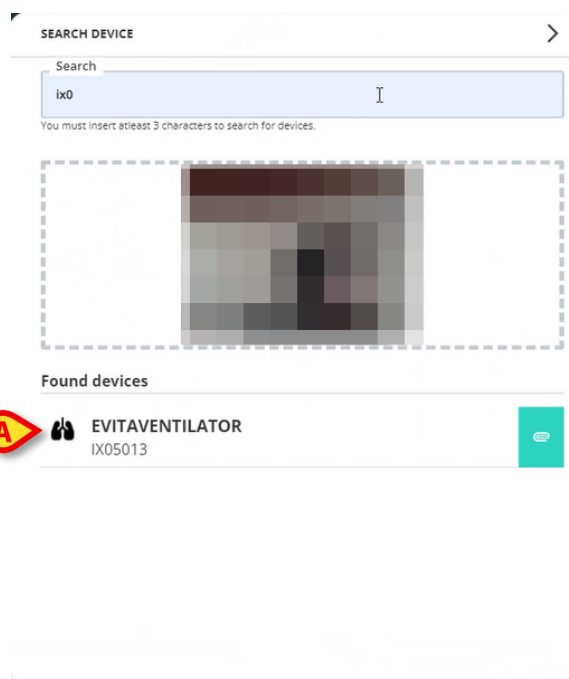


Fig. 25

- Continuați procedura de asociere așa cum este descris în secțiunea 6.

---

Camera care este activată implicit este camera din spate. "Identity Web" poate fi configurat pentru a permite comutarea camerei. În acest caz, un buton dedicat -



- este afișat în zona „Barcode reader” (Cititor de coduri de bare) din fereastra „Search Device” (Căutare dispozitiv) (Fig. 26 **A**). Contactați administratorii de sistem pentru informații suplimentare despre această funcționalitate.

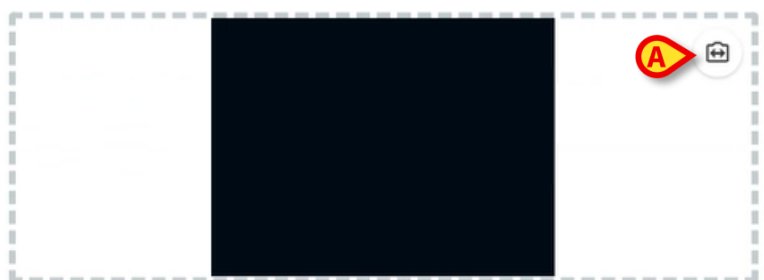


Fig. 26



---

Pentru a urmări dispozitivele selectate prin codul de bare prin adăugarea unui prefix și a unui sufix la numărul de serie al dispozitivului poate fi configurată o opțiune de sistem. Prefixul și sufixul nu sunt afișate pe interfața cu utilizatorul.

---