



Online Web Manual de utilizare

Versiunea 6.0

2024-10-29

Cuprins

Online Web	4
1. Introducere.....	4
1.1. Afișarea datelor.....	4
1.2. Achiziție de date.....	4
1.3. Lansarea On Line Web	4
1.4. Selectarea pacientului.....	5
1.5. Modul de afișare.....	5
2. On Line.....	6
2.1. Structura ecranului.....	6
2.2. Bara de selecție laterală.....	6
2.3. Tabelul parametrilor	7
2.3.1. Caracteristici generale ale tabelelor	7
2.4. Diagrame	10
2.4.1. Structura generală a diagramelor	10
2.5. Bara de comenzi.....	11
2.5.1. Numele aplicației și informații	11
2.5.2. Butoane de derulare.....	12
2.5.3. Selectarea intervalului.....	12
2.5.4. Selectarea intervalului personalizat	13
2.5.5. Sincro.....	13
2.5.6. Selectați ora de reîmprospătare.....	14
2.5.7. Opțiuni suplimentare	14
2.6. Widgeturi	16
2.6.1. Afișarea istoricului notificărilor.....	16
2.6.2. Clinical Diary	17
2.6.3. Perfuzii.....	18
2.6.4. Microbiologie.....	19
2.6.5. Laborator	22
2.6.6. Fluid Balance	24
2.6.7. OranJ	26
2.7. Comutare oră standard - oră de vară.....	28
3. Validation	29
3.1. Tabelul parametrilor (Validation)	30
3.2. Introducerea datelor.....	34
3.3. Procedura de validare.....	36

3.3.1. Istoricul validărilor.....	38
3.4. Bara de comenzi.....	39
3.4.1. Filtre.....	39
3.4.2. Selectare automată.....	41
3.4.3. Adăugare	42
3.4.4. Eliminare.....	43
3.4.5. Validare	44
3.4.6. Anulare	44
3.4.7. Alte opțiuni.....	44

Online Web



Pentru informații despre mediul produsului, precauții, avertismente și utilizarea prevăzută, consultați USR ROU Digistat Care și/sau USR ROU Digistat Docs (în funcție de modulele instalate - pentru Digistat Suite EU) sau USR ENG Digistat Suite NA (pentru Digistat Suite NA). Cunoașterea și înțelegerea documentului corespunzător sunt obligatorii pentru o utilizare corectă și sigură a produsului Online Web, descris în prezentul document.

1. Introducere

On Line Web este o aplicație web care afișează datele primite de la dispozitivele medicale conectate la pacient (de exemplu: monitor, ventilator, laborator etc.).

Datele brute colectate pot fi integrate și validate de utilizator pentru a crea o documentație exactă și lizibilă pentru utilizator.

Aplicația poate fi, de asemenea, configurată pentru a se conecta la alte module Digistat® și pentru a afișa datele acestora (de exemplu Digistat® Diary, Digistat® Connect).

1.1. Afișarea datelor

Datele pot fi vizualizate în tabele și diagrame. Modul în care sunt afișate datele este personalizabil pe scară largă. Consultați administratorii de sistem pentru opțiuni de personalizare. Cifrele incluse în acest manual prezintă un exemplu de configurare.



Parametrii sunt afișați exact așa cum sunt primiți de la dispozitivele medicale conectate. Prin urmare, este posibil ca diferiți parametri să aibă separatori zecimali diferiți, în funcție de separatorii zecimali utilizați de dispozitive.

1.2. Achiziție de date

Datele pot fi achiziționate automat sau introduse manual de utilizatori.

Achiziția automată este pentru parametrii transmiși de echipamente medicale interfațabile (de exemplu: ventilatoare, monitoare pentru pacienți) sau de către un laborator (de exemplu: rezultatele examenelor).

Editarea manuală le permite utilizatorilor să verifice și să valideze datele, să elimine artefacte și date redundante, să introducă valori ori de câte ori, din orice motiv, achiziția automată nu este disponibilă.

Validarea datelor se efectuează pe un ecran separat, descris în secțiunea 3.



Unele configurații prevăd On Line Web fără ecranul Validation. Pentru aceste configurații, procedurile și funcționalitățile de validare nu se aplică.

1.3. Lansarea On Line Web

Pentru a lansa On Line Web:

- Apăsați pe pictograma  de pe bara laterală.

Se afișează un ecran care arată datele pacientului selectat în prezent.

On Line Web necesită selectarea pacientului. Dacă în prezent nu este selectat niciun pacient, este afișat un ecran gol, amintind că „Acest modul necesită un pacient”. Consultați secțiunea 1.4.

1.4. Selectarea pacientului

Pentru a selecta un pacient,

- Faceți clic pe butonul **Select Patient** indicat în Fig 1 A.

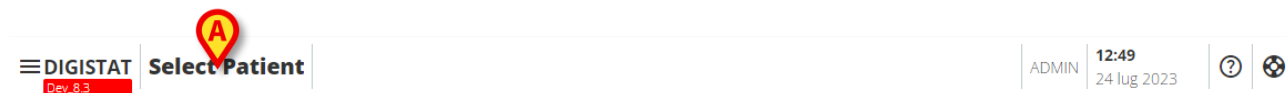


Fig 1

Se deschide modulul Patient Explorer Web. Consultați manualul de utilizare Digistat® Patient Explorer Web (*USR ROU Patient Explorer Web*) pentru instrucțiuni suplimentare despre funcționalitățile de gestionare a pacientului.



Pot fi configurate alte module pentru selecția pacientului în locul Patient Explorer Web, în funcție de configurație. În acest caz, consultați documentația specifică pentru instrucțiuni.

Când este selectat un pacient, modulul afișează datele pacientului selectat.

1.5. Modul de afișare

Sunt disponibile două moduri de afișare, în funcție de configurația aleasă. Un mod „Întunecat” și un mod „Gri”.

2. On Line

2.1. Structura ecranului

Ecranul On Line (Fig 2) afișează în diagramă și tabele datele disponibile pentru pacientul selectat. Ecranul este compus din următoarele elemente:

- 1) bara laterală (Fig 2 **A** – consultați secțiunea 2.2);
- 2) tabelul parametrilor (Fig 2 **B** – consultați secțiunea 2.3);
- 3) diagramele parametrilor (Fig 2 **C** – consultați secțiunea 2.4);
- 4) bara de comenzi (Fig 2 **D** – consultați secțiunea 2.5);
- 5) widgeturile configurate (dacă sunt disponibile – Fig 2 **E**. Adică zonele care afișează date achiziționate de la alte module Digistat® – consultați secțiunea 2.6).

Aceste instrumente sunt disponibile în toate configurațiile On Line Web.

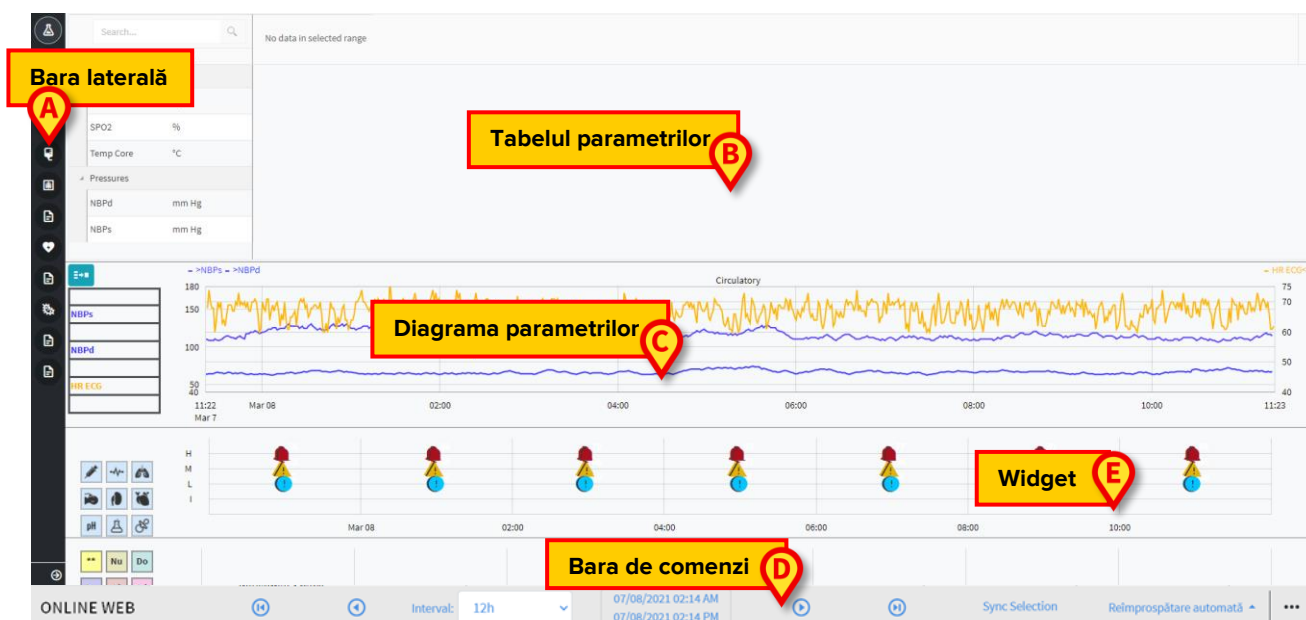


Fig 2

2.2. Bara de selecție laterală

Pentru același pacient pot fi configurate diferite pagini online, fiecare axată pe un subset de parametri. Diferitele pagini pot fi selectate pe bara de selecție laterală (Fig 2 **A**). Pot fi asociate diferite pictograme în timpul configurării pentru a simboliza tipul de date conținute în pagină.

- Faceți clic pe pictogramă pentru a afișa pagina corespunzătoare.



Consultați administratorii de sistem pentru opțiunile de configurare existente.


2.3. Tabelul parametrilor

Tabelele afișează datele achiziționate (fie numerice, fie șiruri, în funcție de tipul de date). Sunt disponibile două moduri de afișare, în funcție de configurația aleasă:

- 1) sunt afișate numai datele validate;
- 2) sunt afișate toate datele brute.

În cazul 1) sunt afișate numai valorile validate în mod explicit de utilizator. Procedura de validare este descrisă în secțiunea 3.3.

În cazul 2) sunt afișate toate datele achiziționate. Rata de achiziție este de obicei de 1 minut.

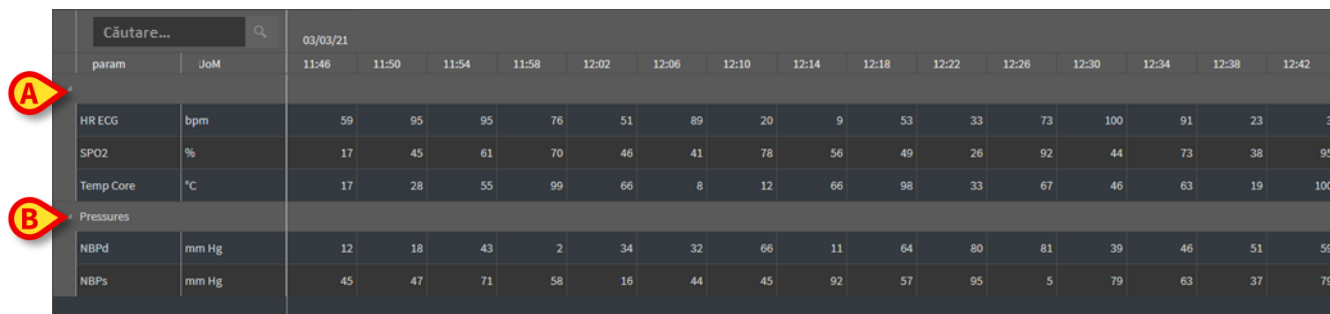

The screenshot shows a table with a search bar at the top left labeled 'Căutare...'. The table has a header row with 'param' and 'JoM' followed by 16 time slots for '03/03/21'. The data rows are grouped by parameter: HR ECG (bpm), SPO2 (%), Temp Core (°C), Pressures (NBPd and NBPs in mm Hg). Callout A points to the 'param' column, and callout B points to the 'JoM' column.


param	JoM	11:46	11:50	11:54	11:58	12:02	12:06	12:10	12:14	12:18	12:22	12:26	12:30	12:34	12:38	12:42
HR ECG	bpm	59	95	95	76	51	89	20	9	53	33	73	100	91	23	3
SPO2	%	17	45	61	70	46	41	78	56	49	26	92	44	73	38	95
Temp Core	°C	17	28	55	99	66	8	12	66	98	33	67	46	63	19	100
Pressures																
NBPd	mm Hg	12	18	43	2	34	32	66	11	64	80	81	39	46	51	59
NBPs	mm Hg	45	47	71	58	16	44	45	92	57	95	5	79	63	37	79

Fig 3

2.3.1. Caracteristici generale ale tabelelor

Parametrii sunt împărțiți în grupuri. Numele grupului este afișat în colțul din stânga sus al fiecărui grup (Fig 3 **A** și **B**).

Prima coloană afișează numele parametrilor (Fig 4 **A**), a doua coloană afișează unitatea de măsură (Fig 4 **B**).

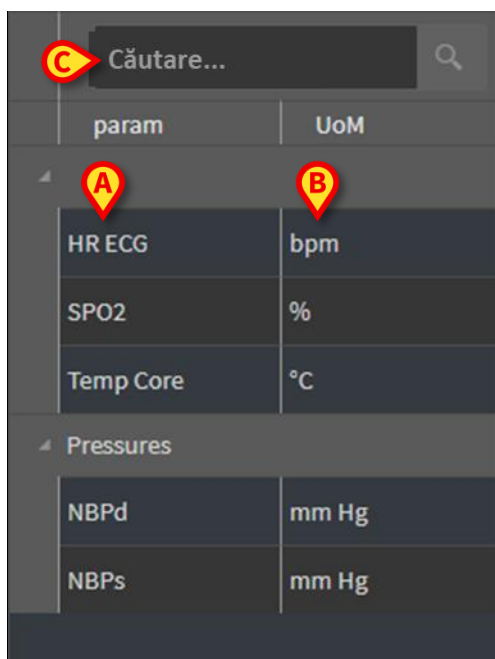

The close-up screenshot shows the top part of the table. Callout C points to the search bar 'Căutare...'. Callout A points to the parameter name 'HR ECG' in the 'param' column. Callout B points to the unit 'bpm' in the 'UoM' column.

param	UoM
HR ECG	bpm
SPO2	%
Temp Core	°C
Pressures	
NBPd	mm Hg
NBPs	mm Hg

Fig 4

Utilizați câmpul de căutare indicat în Fig 4 **C** pentru a căuta un parametru specific.

Valorile unui parametru pot fi citite pe rândul corespunzător. Prin urmare, fiecare rând arată modificările parametrilor în timp. În Fig 5 **A**, de exemplu, valorile SPO2 sunt încercuite.

Căutare...		03/03/21			
param	UoM	11:46	11:50	11:54	11:58
HR ECG	bpm	59	95	95	76
A SPO2	%	17	45	61	70
Temp Core	°C	17	28	55	99
Pressures					
NBPd	mm Hg	12	18	43	2
NBPs	mm Hg	45	47	71	58

Fig 5

Fiecare coloană corespunde achiziționării unui set de parametri. Data și ora la care a fost achiziționat setul de date sunt afișate deasupra. Prin urmare, valorile tuturor parametrilor achiziționați la un anumit moment pot fi citite pe fiecare coloană (Fig 6 **A**).

Căutare...		03/03/21			
param	UoM	11:46	11:50	11:54	11:58
HR ECG	bpm	59	95	95	76
SPO2	%	17	45	61	70
Temp Core	°C	17	28	55	99
Pressures					
NBPd	mm Hg	12	18	43	2
NBPs	mm Hg	45	47	71	58

Fig 6



Numărul de zecimale care pot fi afișate pentru o valoare este definit în timpul configurării parametrului corespunzător.

Folosiți butonul indicat în Fig 7 pentru a minimiza/maximiza un singur grup.

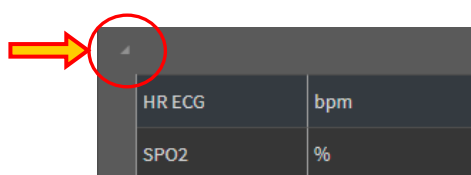


Fig 7

Când un mic triunghi roșu este afișat în colțul din stânga sus al unei celule, înseamnă că valoarea se află în afara unui anumit interval de normalitate (Fig 8, intervalul de normalitate

este setat în configurația parametrului specific). Valorile alarmate sunt indicate numai pentru datele validate. Aceste valori sunt notificate numai pentru datele validate.

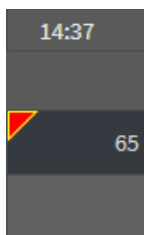


Fig 8

Un triunghi galben în colțul din dreapta sus al unei celule (Fig 9) indică faptul că există o notă textuală asociată datelor specificate în celulă.

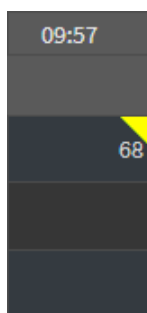


Fig 9 - Notă

- Faceți clic pe triunghi pentru a afișa nota (Fig 10).

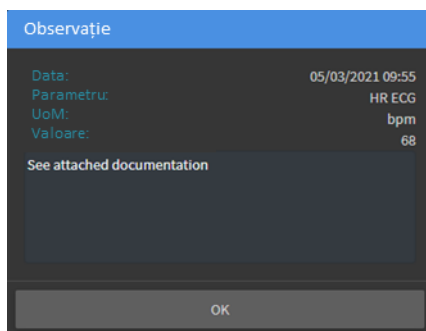


Fig 10

2.4. Diagrame

Tendințele parametrilor configurați pot fi afișate în diagrame.

2.4.1. Structura generală a diagramelor

Axa orizontală reprezintă timpul. Axa verticală indică valoarea parametrilor reprezentați. Pot fi utilizate două scale de valori: una în stânga (în exemplul prezentat în Fig 11 **A**, referindu-se la NBPs și NBPd); una în dreapta (în exemplul prezentat în Fig 11 **B**, referindu-se la HR ECG). Numele parametrilor reprezentați sunt afișați deasupra graficului. Culoarea fontului corespunde culorii folosite în diagramă pentru a trasa tendința parametrului.

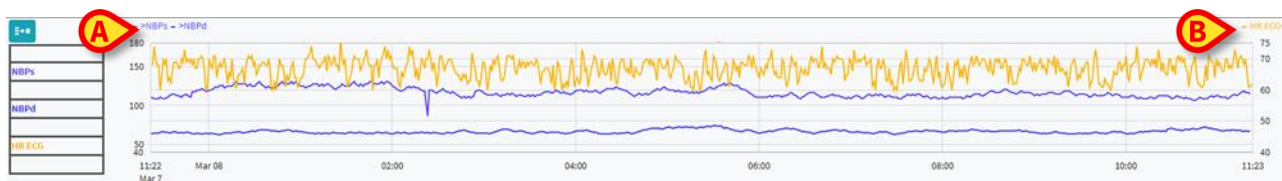


Fig 11

Trageți graficul la stânga sau la dreapta pentru a afișa tendințele referitoare la perioadele care precedă sau urmează cele afișate în prezent.

Trageți diagrama în sus sau în jos pentru a afișa valori deasupra sau dedesubtul celor afișate în prezent.

O legendă pentru parametrii configurați este afișată în stânga (Fig 12).

NBPs
mm Hg
NBPd
mm Hg
HR ECG
bpm

Fig 12

Unitatea de măsură a fiecărui parametru este afișată sub numele parametrului (NBPs -> mm Hg; HR ECG -> bpm).

 Pictograma (Fig 13 **A**) este un filtru de zgomot. Faceți clic pe acesta pentru a crea un grafic trasat pe valoarea de mijloc a fiecărui pachet cu cinci valori.

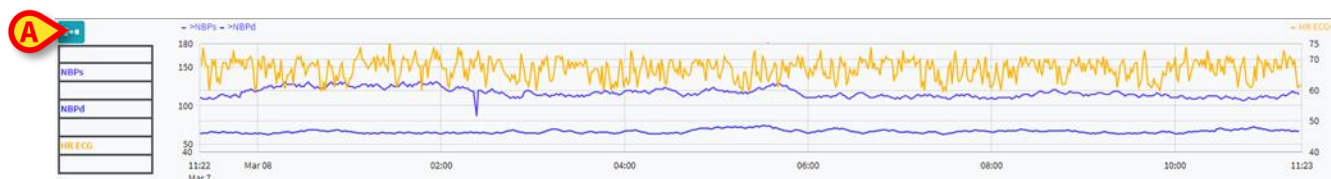


Fig 13

Îndreptați cursorul pe diagramă pentru a afișa dinamic valorile corespunzătoare poziției indicate (Fig 14 **A**).

Faceți clic pe diagramă pentru a trasa o bară verticală a cursorului (Fig 14 **B**). Valorile achiziționate în același timp sunt evidențiate în celelalte zone ale ecranului dacă funcționalitatea de sincronizare **Selectare** este activă (consultați secțiunea 2.5.5).



Fig 14

2.5. Bara de comenzi

Bara de comenzi este afișată în Fig 15. Butoanele de pe bara de comenzi declanșează diferite funcționalități, descrise ulterior.

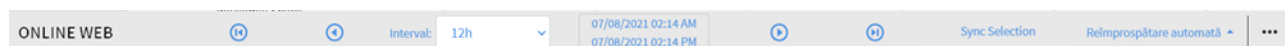


Fig 15

2.5.1. Numele aplicației și informații



Numele și informațiile aplicației sunt disponibile numai pentru administratorii de sistem.



Fig 16

Numele aplicației selectate în prezent este afișat în stânga (Fig 16 **A**).

- Faceți clic pe numele aplicației pentru a afișa informații generale (Fig 17).

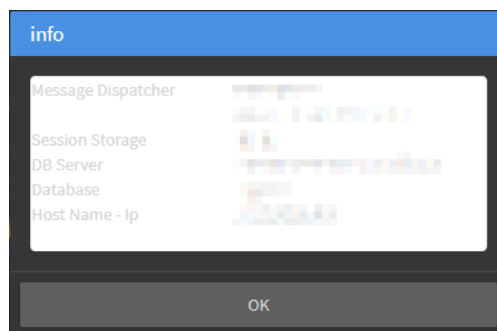


Fig 17

2.5.2. Butoane de derulare



Fig 18

Utilizați butoanele săgeată pentru a derula conținutul ecranului la stânga și la dreapta. Săgețile unice (Fig 18 **A**) afișează un interval de timp anterior (stânga) sau ulterior (dreapta) celui afișat în prezent. Lungimea intervalului de timp este setată în meniul „Interval”. Consultați secțiunea 2.5.3. Săgețile duble (Fig 18 **B**) afișează începutul (stânga) sau sfârșitul (dreapta) achiziției.

2.5.3. Selectarea intervalului



Fig 19

Meniul „Interval” permite selectarea intervalului de timp afișat (Fig 19 **A**).

- Faceți clic pe săgeata plasată lângă câmpul „Interval” pentru a deschide următorul meniu (Fig 20).

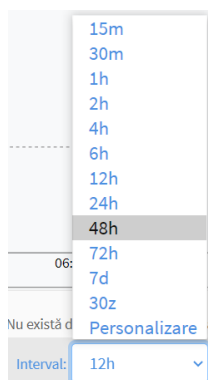


Fig 20

- Faceți clic pe opțiunea necesară.

Ecranul se modifică corespunzător.

2.5.4. Selectarea intervalului personalizat

Zona indicată în Fig 19 **B** arată intervalul de timp afișat în prezent.

- Faceți clic pe această zonă pentru a deschide un selector de dată/oră care vă permite să indicați datele de început și de sfârșit ale unui interval de timp personalizat care trebuie afișat.

Noul interval de timp afișat apare în zonă sub forma „data/ora de începere - data/ora de sfârșit”.

Câmpul „Interval” este setat automat la „Personalizat”.

2.5.5. Sincro



Butonul **Sincro** (Fig 21 **A**) permite activarea funcționalităților de sincronizare a tabelelor și diagramelor.

Butonul **Sincro** este activ în mod implicit.

Când funcționalitatea este activă, diferitele zone ale ecranului sunt sincronizate (diagrame, tabele, widgeturi). Acesta înseamnă că, dacă o porțiune este selectată într-o zonă, porțiunile corespunzătoare din celelalte zone sunt evidențiate.

În Fig 22 **A**, de exemplu, coloana care conține datele achiziționate la 9:27 este selectată pe tabel. Momentul corespunzător din diagramă este indicat automat de bara galbenă a cursorului (Fig 22 **B**). De asemenea, sunt evidențiate zonele corespunzătoare din widgeturile configurate (Fig 22 **C** și **D**). Aceeași funcționalitate de sincronizare se activează și dacă se face clic pe diagramă.



Fig 22

2.5.6. Selectați ora de reîmprospătare



Fig 23

Meniul „Reîmprospătare” permite selectarea intervalului de reîmprospătare automată pentru datele afișate.

- Faceți clic pe butonul **Reîmprospătare automată** (Fig 23) pentru a deschide următorul meniu (Fig 24). Opțiunile disponibile pentru utilizatorul actual depind de permisiunile utilizatorului.

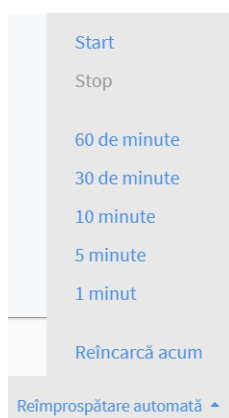


Fig 24

- Faceți clic pe opțiunea necesară.

Timpul de reîmprospătare automată se modifică corespunzător.

Opțiunea **Reîncarcă acum** reîncarcă conținutul ecranului.

Faceți clic pe **Stop** pentru a opri reîmprospătarea automată. Dacă se oprește reîmprospătarea automată, conținutul paginii este static. Acesta este actualizat din nou numai dacă este declanșată o reîncărcare în mod explicit de către utilizator (adică folosind opțiunea **Reîncărcați acum** din acest meniu sau prin repornirea reîmprospătării automate).

Opțiunea **Start** pornește reîmprospătarea automată (dacă este oprită).

2.5.7. Opțiuni suplimentare



Fig 25

- Faceți clic pe butonul indicat în Fig 25 **A** pentru a deschide următorul meniu (Fig 24).

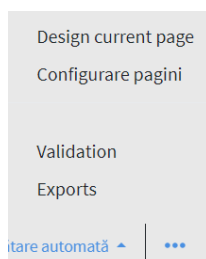


Fig. 26

- Faceți clic pe opțiunea **Validare** pentru a accesa funcționalitățile de validare, descrise în secțiunea 3.
- Faceți clic pe opțiunea **Export** pentru a exporta conținutul paginii într-un raport de imprimare configurat.

Se deschide o fereastră care afișează lista rapoartelor disponibile, definită în timpul configurării.

- Faceți clic pe un element din listă pentru a genera și a descărca raportul.

Opțiunile „Pagina de proiectare” și „Configurarea paginilor” sunt rezervate administratorilor de sistem.

2.6. Widgeturi

Aplicația On Line Web poate fi, de asemenea, configurată pentru a se conecta la alte module Digistat® și pentru a afișa datele acestora (de exemplu Digistat® Diary, Digistat® Connect). Datele sunt afișate în widgeturi. Această secțiune oferă o descriere a widgeturilor disponibile. Widgeturile disponibile în mod real depind de configurația utilizată.



Consultați administratorii de sistem pentru opțiunile de configurare existente.

2.6.1. Afișarea istoricului notificărilor

Aplicația On Line Web poate fi conectată cu Digistat® Connect pentru a afișa istoricul notificărilor provenite de la dispozitivele medicale conectate la pacient.

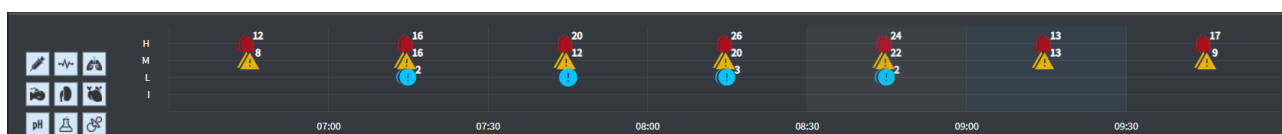


Fig. 27

Notificările sunt afișate într-o grilă. Axa verticală se referă la prioritatea de notificare:

„I” = „Info”

„L” = „Scăzut” =

„M” = „Mediu” =

„H” = „Ridicat” =

Axa orizontală indică ora apariției.

Numărul plasat alături de fiecare pictogramă indică numărul de notificări de același tip care au fost colectate împreună.

- Faceți clic pe orice pictogramă pentru a afișa o fereastră care afișează detalii suplimentare pentru fiecare notificare (Fig 28).



Fig 28

Butoanele din stânga sunt filtre (Fig 29 **A**). Pictogramele sunt aceleași cu cele definite pe Digistat® Connect.

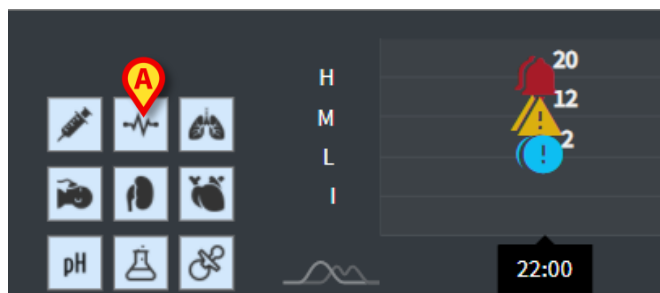


Fig 29

- Selectați unul dintre butoane pentru a exclude notificarea care vine de pe dispozitivul corespunzător.

În mod implicit, toate filtrele sunt dezactivate.

- Plasați indicatorul mouse-ului pe un buton pentru a afișa o descriere care indică dispozitivul corespunzător.



Consultați manualul de utilizare Digistat® Connect pentru informații suplimentare (document: USR ENG Connect).

2.6.2. Clinical Diary

Aplicația On Line Web poate fi conectată cu modulul Digistat® Diary și afișează notele din jurnalul clinic.

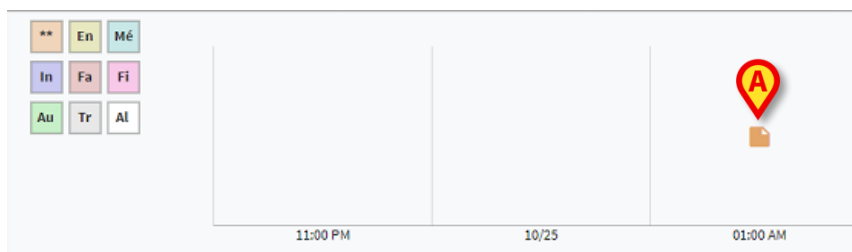


Fig 30

O pictogramă indică prezența notelor la un anumit moment (Fig 30 **A**). Axa orizontală indică ora la care a fost adăugată nota. Un număr plasat alături de fiecare pictogramă indică numărul de note de același tip care sunt grupate împreună pentru a îmbunătăți lizibilitatea.

- Faceți clic pe orice pictogramă pentru a afișa o fereastră care arată notele reale.

Butoanele din stânga sunt filtre.

- Selectați unul dintre butoane pentru a exclude tipul de notă corespunzător. Tipurile sunt aceleași cu cele definite pe modulul Digistat® Clinical Diary.

În mod implicit, toate filtrele sunt dezactivate.

- Plasați indicatorul mouse-ului pe un buton pentru a afișa o descriere care indică tipul corespunzător.



Consultați manualul de utilizare Digistat® Diary pentru informații suplimentare (document: USR ENG Diary).

2.6.3. Perfuzii

Aplicația On Line Web poate fi conectată cu Digistat® Connect pentru a afișa datele provenite de la pompele de perfuzie.



Fig 31

Axa verticală afișează numele terapiilor perfuzabile (fie numele pompei, fie numele medicamentului, în funcție de datele disponibile). Axa orizontală reprezintă timpul. Fiecare terapie perfuzabilă este afișată ca o linie (Fig 32).



Fig 32

Numele terapiei perfuzabile este afișat în stânga (Fig 32 **A**).

Începutul terapiei perfuzabile este indicat în Fig 32 **B**.

Sfârșitul terapiei perfuzabile este indicat în Fig 32 **C**.

Butonul indicat în Fig 31 **A** activează descrieri care afișează ratele perfuziilor într-un anumit moment, așa cum se arată în Fig 33 **A**.



Fig 33

2.6.4. Microbiologie

Datele microbiologice pot fi afișate într-un tip de widget dedicat. Fig 34 prezintă un exemplu.

Search...	Microbiologia																	
Exam (code)	13/08/2022					17/08/2022					18/08/2022		24/08...	29/08...	31/08...	06/09...	09/10/2022	
	15:23	15:23	15:42	15:42	16:03	16:29	08:17	23:42	23:44	23:46	00:09	00:09	08:09	09:29	09:01	09:00	19:00	19:00
Urina da mitto intermedio (URCOLT)																		
Broncoaspirato (BAS)																		
Catetere venoso centrale (CVC)																		
Sangue (SANGUE)																		
vena periferica (VP)																		
Tampone rettale (TAMRE)																		

Fig 34

Datele sunt afișate într-un tabel. Coloanele indică data/ora de achiziție a probei. Rândurile se referă la diferitele tipuri de examene. În Fig 35 este mărită o porțiune din figura anterioară.

Search...	13/08/2022			
Exam (code)	15:23	15:23	15:42	15:42
Urina da mitto intermedio (URCOLT)				
Broncoaspirato (BAS)				
Catetere venoso centrale (CVC)				
Sangue (SANGUE)				
vena periferica (VP)				
Tampone rettale (TAMRE)				

Fig 35

Astfel, de exemplu, celula indicată în Fig 35 **A** se referă la rezultatele disponibile pentru un CVC (cateter venos central) obținute la ora 15:23 în data de 13.08.2022.

În cazul în care două coloane diferite au aceeași dată și oră, înseamnă că acestea se referă la actualizări diferite ale aceluiași examen. Coloana din dreapta conține cea mai recentă actualizare.

Folosiți butonul  indicat în Fig 35 **B** pentru a afișa, în grilă, numai examenele care au fost finalizate.



Grila de date afișează, de asemenea, rezultate cu date parțiale, cu referire la examenele în curs de desfășurare. Pentru unele examene este nevoie de timp pentru a fi finalizate: pentru aceste examene, rezultatele sunt adăugate progresiv, atunci când sunt disponibile. Butonul  permite afișarea, în grilă, doar a examenelor care au fost finalizate.

Utilizați câmpul **Search...** (Căutare...) indicat în Fig 35 **C** pentru a specifica un șir de căutare și pentru a afișa numai rezultatele care corespund șirului specificat (Fig 36). Utilizați pictograma  (Fig 36 **A**) pentru a șterge filtrul.



803071	08/08/2022	10/08/2022		13/08/2022	
Exam (code)	11:45	08:16	08:16	15:23	15:23
Tampone rettale (TAMRE)		 80307116	 80307116		
Tampone nasale (TN)		 80307115	 80307115		

Fig 36

Pictograma  se referă la rezultatele care nu indică prezența germenilor. Pictograma  se referă la rezultatele care indică prezența germenilor. Numărul plasat sub pictogramă este ID-ul specific al examenului.

- Atingeți o pictogramă pentru a deschide o fereastră care conține rezultatele detaliate (Fig 37).

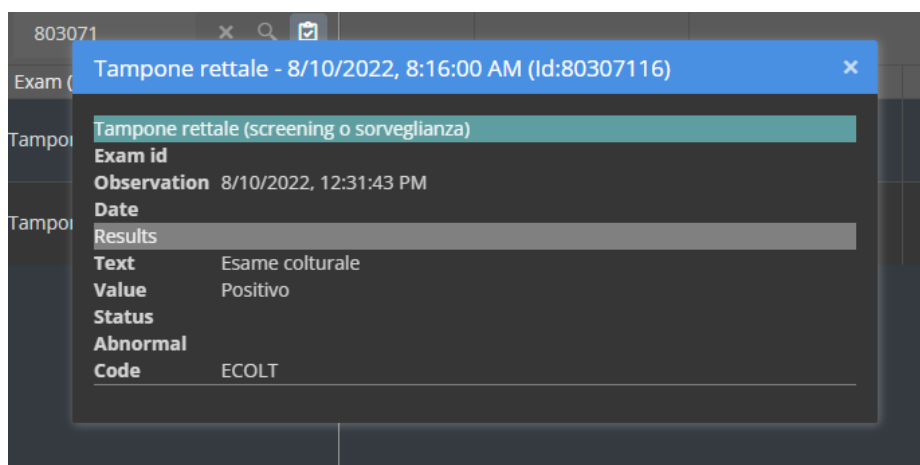


Fig 37

Atunci când este afișată o fereastră „Result detail” (Detaliu rezultat), coloana corespunzătoare este evidențiată pe grilă (a se vedea Fig 38 **A**).

2.6.5. Laborator

Datele de laborator sunt afișate într-un widget dedicat. Fig 40 prezintă un exemplu.



Search...			Laboratorio Agg1							
			18/12/2022				19/12/2022			
param	UoM	Range	05:00	07:00	14:00	16:00	05:00	05:00	05:00	06:00
HC V RNA										
Estrazione acidi Nucleici-Estr...			N.V.							
PL.Citrato * T. Celeste*										
PTT (TEMPO di TROMBOPLAS...	0.8 - 1.2			0.92	0.79	1.07	0.92	0.79	1.07	
FIBRINOGENO-FIBRINOGEN...	150 - 400			67	639	352	678	639	352	
PT (TEMPO di PROTROMBINA...				12.1	15.3	14.8	12.1	15.3	14.8	
PT (TEMPO di PROTROMBINA...	70 - 120			61	86	63	61	86	63	
PT (TEMPO di PROTROMBINA...				1.11	1.41	1.37	1.11	1.41	1.37	
ANTITROMBINA III-ANTITRO...	80 - 120			65	45	43	65	45	43	
PTT (TEMPO di TROMBOPLAS...	26.5 - 37.5			28.7	24.7	33.4	28.7	24.7	33.4	

Fig 40


Widgetul Laborator oferă o prezentare generală, ordonată cronologic, a tuturor rezultatelor disponibile pentru pacientul selectat în prezent, în intervalul de timp specificat.

Fiecare coloană reprezintă un examen. De exemplu, coloana indicată în Fig 40 **A** conține rezultatele obținute la ora 14:00 în data de 18.12.22.

Fiecare rând se referă la un element de examinare. De exemplu, rândul indicat în Fig 40 **B** conține toate rezultatele obținute pentru „Fibrinogeno” (Fibrinogen). Alături de numele fiecărui element de examinare, pe același rând, se afișează unitatea de măsură și intervalul de valori, dacă informațiile sunt disponibile (Fig 40 **C**).

Prin urmare, o celulă reprezintă valoarea unui anumit element în contextul unui anumit examen, indicat de data și ora rezultatelor. De exemplu, valoarea 639 indicată în Fig 40 **D** este valoarea „Fibrinogen” în contextul rezultatelor obținute la ora 14:00 în data de 18.12.22. Dacă un element nu este relevant sau nu este disponibil pentru un examen, atunci, în rândul corespunzător, celula referitoare la acel element este goală.

Rândurile de culoare gri deschis sunt titluri de grup, denumind un grup de elemente asemănătoare.

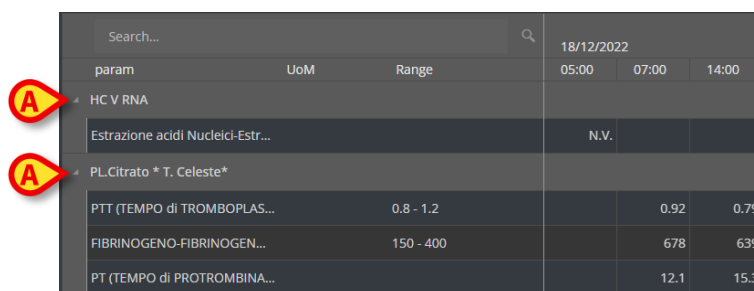

Search...			18/12/2022		
param	UoM	Range	05:00	07:00	14:00
HC V RNA					
Estrazione acidi Nucleici-Estr...			N.V.		
PL.Citrato * T. Celeste*					
PTT (TEMPO di TROMBOPLAS...	0.8 - 1.2			0.92	0.79
FIBRINOGENO-FIBRINOGEN...	150 - 400			678	639
PT (TEMPO di PROTROMBINA...				12.1	15.3

Fig 41

De exemplu: „HC V RNA” și „PL.Citrato”, indicate în Fig 41 **A**, sunt titluri de grup. Toate rândurile de culoare gri închis plasate sub un rând de culoare gri deschis aparțin aceluiași grup, al cărui nume este afișat pe rând.

Folosiți pictograma  din stânga titlului grupului pentru a restrânge/extinde rândurile aparținând grupului respectiv (Fig 42 **A**).

param	UoM	Range	05:00
HC V RNA			
Estrazione acidi Nucleici-Estr...	?		N.V.
PL.Citrato * T. Celeste*			
Sangue intero			
EMOCROMO-Neutrofili-SI		2 - 8	8.06
EMOCROMO-Linfociti-SI		1.5 - 4	1.71

Fig 42



Compoziția grupurilor poate fi configurată cu ajutorul instrumentului de configurare Online Web. Consultați administratorii de sistem pentru opțiunile de configurare existente. Pentru mai multe informații, consultați documentul CFG ENG Online Validation.

Utilizați câmpul **Search...** (Căutare...) indicat în Fig 43 **A** pentru a specifica un șir de căutare și pentru a afișa numai rezultatele care corespund șirului specificat.

A Search...			18/12/2022	
param	UoM	Range	05:00	07:00
HC V RNA				
Estrazione acidi Nucleici-Estr...			N.V.	

Fig 43

Atingeți o celulă pentru a evidenția coloana corespunzătoare. Dacă pe aceeași pagină sunt prezente mai multe tabele, atunci coloanele care se referă la aceeași dată/ora sunt evidențiate în toate tabelele (a se vedea exemplul din Fig 44 **A**).

Search...			18/12/2022		Laboratorio Agg1 19/12/2022			
param	UoM	Range	05:00	07:00	14:00	16:00	05:00	07:00
HC V RNA								
Estrazione acidi Nucleici-Estr... ?			N.V.					
PL.Citrato * T. Celeste*								
Sangue intero								
EMOCROMO-Neutrofili-SI		2 - 8	8.06		9.01	17.89	8.37	
EMOCROMO-Linfociti-SI		1.5 - 4	1.71		0.72	0.77	1.75	
EMOCROMO-Monociti-SI		0.1 - 1	1.13		0.27	0.77	1.28	
EMOCROMO-Eosinofili-SI		0.1 - 0.5	0.33		0.01	0.18	0.01	
EMOCROMO-Basofili-SI		0 - 0.2	0.04		0.01	0.02	0	
EMOCROMO-Mielociti-SI	?		N.V.		N.V.	N.V.	N.V.	

Search...			18/12/22		test no AGREG 19/12/22			
param	UoM	Range	05:00	14:00	05:00	05:00	05:00	07:00
Interpretazione-Interpretazio... ?								
GLUCOSIO-GLUCOSIO-SIE		74 - 100	88	386	270	159	471	
COOMBS DIRETTO-COOMBS ... ?								

Fig 44

În cazul în care o valoare este prea lungă pentru a fi afișată în întregime în interiorul unei celule, în dreapta sunt afișate trei puncte de suspensie. Așezați indicatorul mouse-ului deasupra celulei pentru a afișa valoarea completă într-un tooltip (Fig 45).

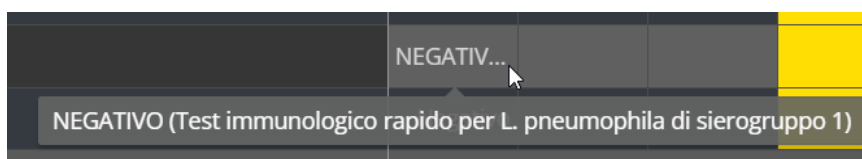


Fig 45

2.6.6. Fluid Balance

Online Web poate fi conectat la modulul Digistat® Fluid Balance pentru a afișa un grafic care să reprezinte cantitățile înregistrate ale echilibrului lichidelor. În funcție de configurația widget-ului, este posibil să se reprezinte fie echilibrul unui singur element (așa cum se arată în Fig. 46), fie echilibrul total al fluidului pentru pacientul selectat.

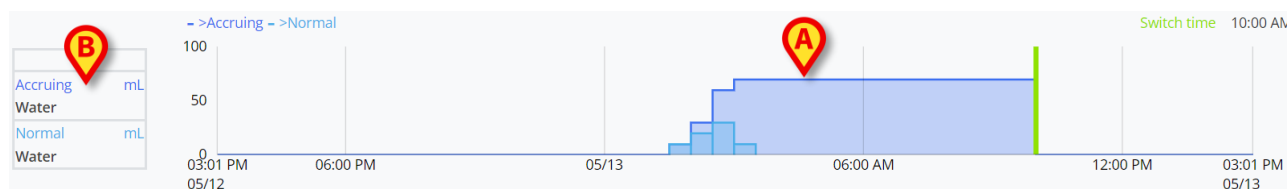


Fig. 46

Axa verticală afișează cantitățile de lichid. Cantitățile pot fi atât pozitive (referindu-se la fluidele "In", așa cum se arată în figură), cât și negative (referindu-se la fluidele "Out"). Axa orizontală se referă la timp. Graficul echilibrului fluidelor este indicat în Fig. 46 **A**. Echilibrul afișat ca exemplu este pentru elementul "apă", după cum se indică în caseta din stânga (Fig. 46 **B**). Caseta afișează numele elementului echilibrului (sau "echilibru total" dacă este configurat astfel) și unitatea de măsură.

Pentru aceeași diagramă sunt disponibile două moduri de afișare:

1 – Normal, pentru care variațiile echilibrului lichidelor sunt afișate separat. Variația este calculată la intervale specifice, definite de setarea "Interval în minute" din Online Web Configurator. În Fig. 47 **A**, o singură coloană se referă la o variație specifică, cu un "Interval în minute" de 30 de minute.

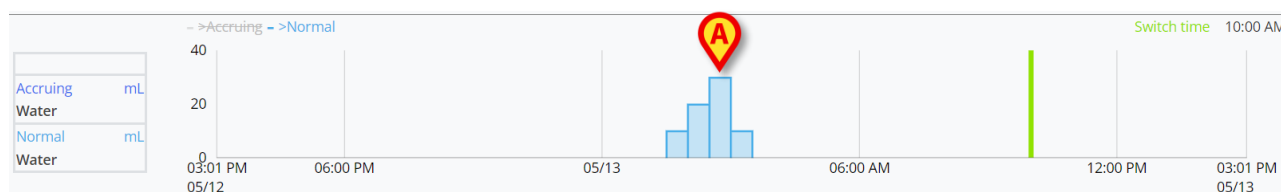


Fig. 47

2 – Cumulare, pentru care variațiile sunt adăugate progresiv la un singur grafic reprezentând suma totală (Fig. 48 **A**). Soldul acumulat este resetat la "Switch Time". Bara "Switch Time" (Fig. 48 **C**) indică ora la care echilibrul zilnic este închis. Consultați manualele de utilizare Fluid Balance sau Fluid Balance Web (*USR ROU Fluid Balance / USR ROU Fluid Balance Web*) pentru explicarea orei de închidere a echilibrului.

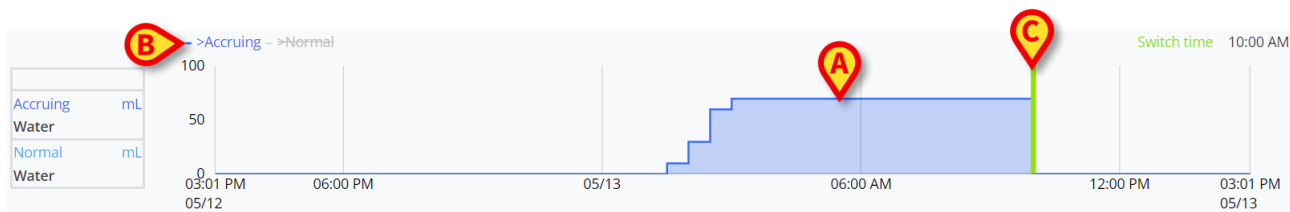


Fig. 48

Ambele diagrame pot fi afișate împreună. Este posibil să ascundeți / afișați una dintre cele două diagrame făcând clic pe etichetele indicate în Fig. 48 **B**.

Variația echilibrului este calculată la sfârșitul fiecărui interval "Interval în minute". Prin urmare, dacă intervalul de timp afișat de modulul Online Web nu include următorul sfârșit al "Intervalului în minute", următoarea variație nu este inclusă în calculul variației și nu este afișată.

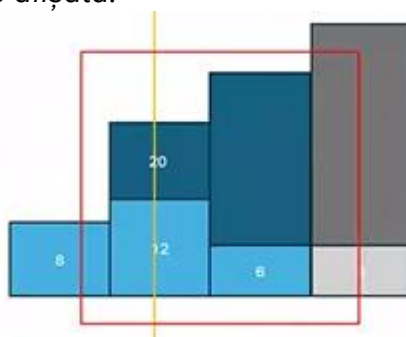


Fig. 49

De exemplu, vezi Fig. 49. Pătratul roșu reprezintă intervalul de timp selectat pe Online Web. Cele patru coloane sunt variațiile echilibrului, calculate la fiecare XX de minute. Coloanele albastre sunt cele incluse în calcul și afișate în grafic. Cea gri nu este calculată și nu este afișată deoarece sfârșitul "Intervalului în minute" este în afara intervalului de timp selectat.

2.6.7. OranJ

Modulul Online web poate fi conectat la sistemul Digistat® OranJ pentru a afișa o diagramă reprezentând un set configurat de evenimente din cameră (de exemplu, markeri pentru operație, medicamente administrate, proceduri chirurgicale etc.). Consultați Fig. 50 pentru un exemplu.

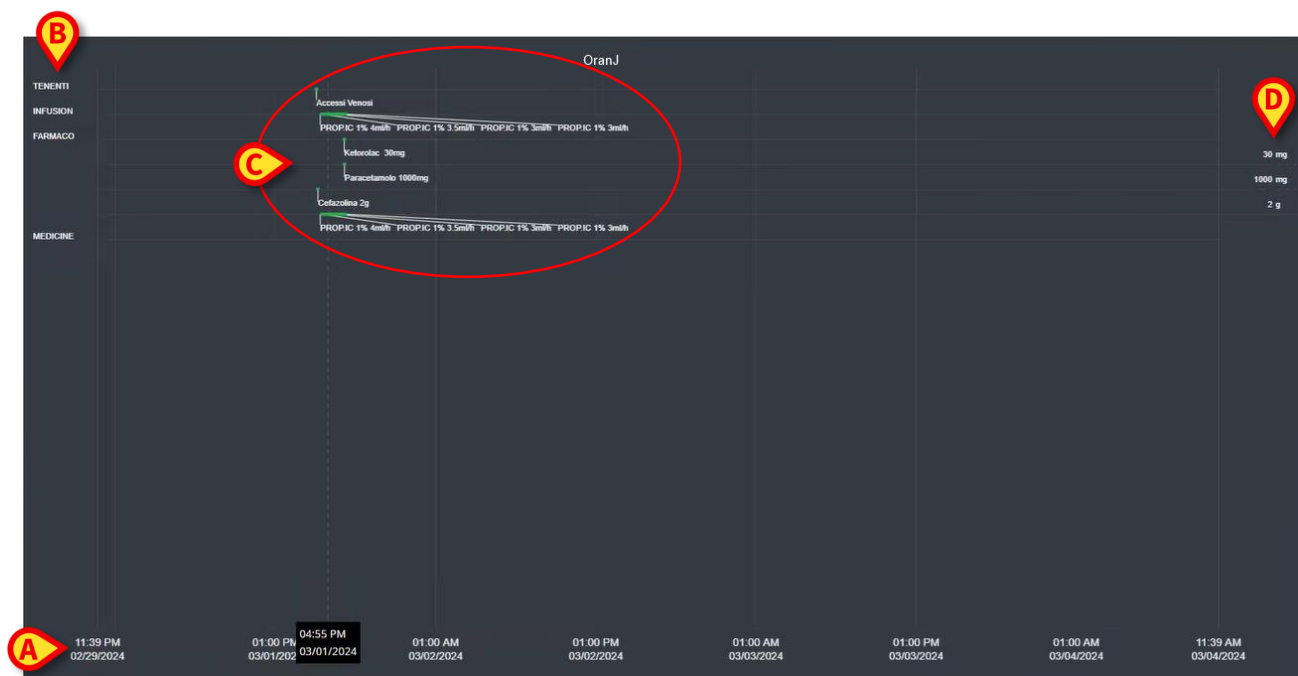


Fig. 50

Axa orizontală reprezintă timpul. Datele/orele la care se referă datele afișate sunt indicate în partea de jos a ecranului (Fig. 50 **A**). În axa verticală sunt indicate grupurile configurate de evenimente OranJ. Grupurile afișate aici sunt un subset al grupurilor existente în sistemul OranJ, alese în timpul configurării.



O opțiune de configurare permite să decideți dacă numele unui grup este afișat chiar și în cazul în care nu există evenimente înregistrate aparținând aceluia grup.

Diagramele indicate în Fig. 50 **C** și mărite în Fig. 51 reprezintă evenimentele OranJ. În dreapta sunt afișate numerele totale de producere a unui anumit eveniment, dacă este relevant (Fig. 50 **D** - acesta este cazul medicamentelor administrate, de exemplu). Prezența/absența numerelor totale depinde de o opțiune de configurare. Dacă sunt afișate totalurile, atunci diferitele evenimente sunt poziționate pe rânduri diferite (acesta este cazul Fig. 51 și Fig. 52).

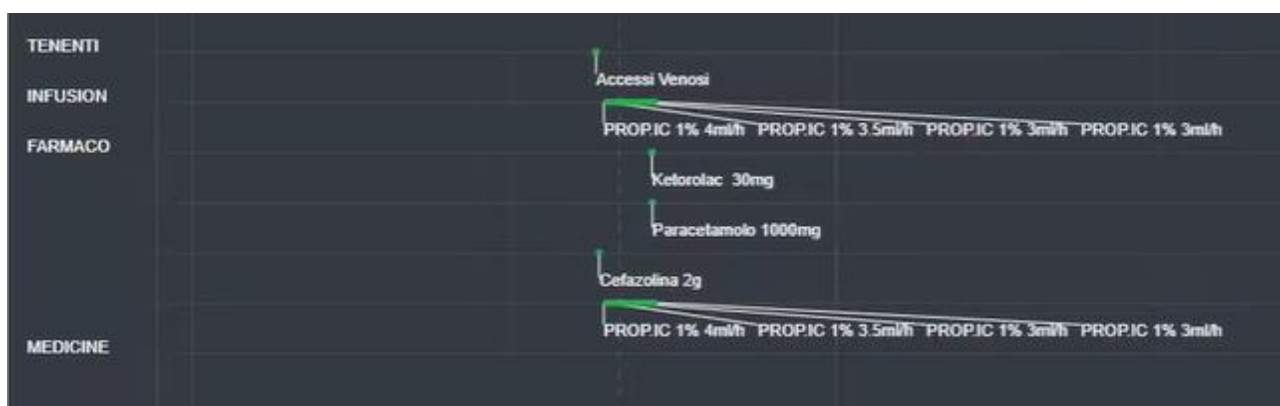


Fig. 51

Există două tipuri de evenimente: punctuale (de exemplu: marcajul „Room in”) și cu o anumită durată (de exemplu: o perfuzie care durează un anumit timp). Pe grafic, evenimentele punctuale sunt indicate ca puncte unice, în timp ce cele cu o anumită durată sunt linii a căror lungime indică durata evenimentului. Culoarea diagramei poate fi personalizată.



Fig. 52

Fig. 52 prezintă două evenimente punctuale (administrarea de Ketorolac și Paracetamol). Punctul verde este poziționat în funcție de timpul de administrare. Sumele sunt indicate alături de numele evenimentului.

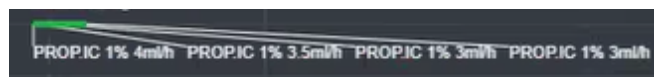


Fig. 53

Fig. 53 prezintă un eveniment cu o anumită durată (administrarea de Propofol prin perfuzie). Linia verde indică durata evenimentului. Orice modificare a parametrilor de administrare (viteză, concentrație etc.) este indicată în grafic.

Dacă un eveniment cu o anumită durată începe sau se termină în afara intervalului de timp afișat în prezent pe ecran, marginile din stânga și/sau din dreapta sunt reprezentate cu linii întrerupte (Fig. 54 A).

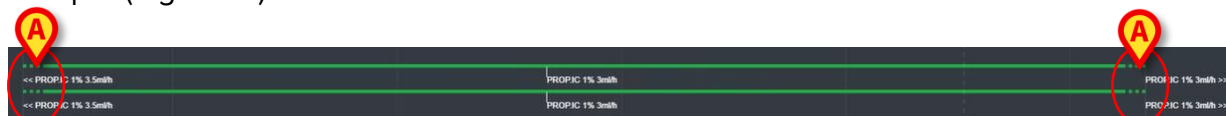


Fig. 54

2.7. Comutare oră standard - oră de vară

Această secțiune explică modul în care sunt afișate informațiile pe On Line Web atunci când se schimbă ora de la cea standard la ora de vară și invers.

În ambele cazuri, este afișată o pictogramă specifică  pentru a marca schimbarea orei, iar culoarea roz evidențiază orele schimbate (Fig 55 A).



Fig 55

Când se trece de la ora de vară la ora standard (ceasul „sare” cu o oră înapoi), ora corespunzătoare orei 02:00 se repetă de două ori.

Când se trece de la ora standard la ora de vară (ceasul „sare” cu o oră înainte), ora corespunzătoare orei 03:00 nu este afișată. Adică: Este afișată ora 02:00 și următoarea oră este ora 04:00

3. Validation

Datele brute achiziționate automat de la dispozitivele medicale pot fi evaluate, editate și validate de către membrii personalului clinic care au permisiuni specifice.



Datele afișate în tabelul de parametri de pe On Line Web, conform configurației, pot afișa fie datele brute, fie datele validate. Pentru validarea datelor, utilizați procedurile descrise în această secțiune.

Există două modalități de a accesa funcționalitățile de validare:

- 1) Faceți clic pe pictograma corespunzătoare  - pe bara laterală.
- 2) Faceți clic pe opțiunea **Validation** din meniul „Opțiuni suplimentare” din bara de comenzi. Consultați secțiunea 2.5.7.

Se va deschide următorul ecran (Fig 56).



Fig 56

Ecranul **Validation** afișează într-un tabel toate datele brute achiziționate de dispozitivele medicale configurate. Rata de eșantionare este de obicei de 1 minut.

Pentru același pacient pot fi configurate diferite pagini, fiecare axată pe un subset de parametri. Diferitele pagini sunt disponibile pe bara de selecție laterală (Fig 56 A). Faceți clic pe numele paginii pentru a afișa datele corespunzătoare.

Parametrii achiziționați sunt afișați într-un tabel (Fig 56 B).

Butoanele de pe bara de comenzi (Fig 56 C) declanșează diferite proceduri, descrise ulterior în acest document (consultați secțiunea 3.4).

3.1. Tabelul parametrilor (Validation)

Tabelul parametrilor, indicat în Fig 56 **B** și mărit în Fig 57, afișează toate datele brute achiziționate pentru parametri configurați.

Display: [A] [B] except display from 11/03/2021 10:57 to 11/03/2021 11:57


Parameter		11/03/2021															
U.o.M.		10:58	10:59	11:00	11:01	11:02	11:03	11:04	11:05	11:06	11:07	11:08	11:09	11:10	11:11	11:12	11:13
Section Multi 1																	
HR ECG	bpm																
HR ECG	bpm		60	64	63	66	66	65	65	63	66	71	69	66	69	67	66
Pulse Rate Non Inv	mm Hg																
NBPs	mm Hg	123	123		121	119		117	117		117	115		113	113		111
NBPs	mm Hg																
NBPd	mm Hg	66	66		66	66		67	66		67	67		67	69		69
NBPd	mm Hg																
NBPm	mm Hg																
ARTs	mm Hg																
ARTd	mm Hg																
ARTm	mm Hg																
PAPs	mm Hg																
PAPd	mm Hg																
PAPm	mm Hg																

Fig 57

Tabelele afișează datele achiziționate fie sub formă numerică, fie ca șiruri.

Prima coloană afișează numele parametrilor (Fig 57 **A**), a doua coloană afișează unitatea de măsură (Fig 57 **B**).

Parametrii pot fi grupați. Numele grupului este afișat în colțul din stânga sus al porțiunii corespunzătoare a tabelului (Fig 58 **A**).

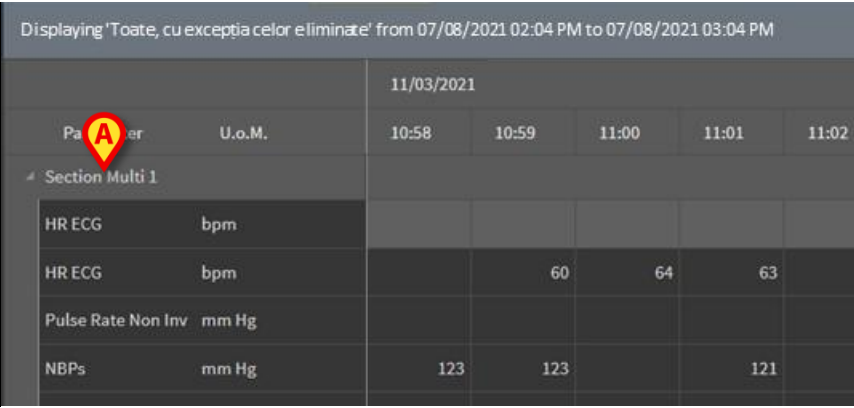

Parameter		11/03/2021				
U.o.M.		10:58	10:59	11:00	11:01	11:02
Section Multi 1						
HR ECG	bpm					
HR ECG	bpm		60	64	63	
Pulse Rate Non Inv	mm Hg					
NBP	mm Hg	123	123		121	

Fig 58

Folosiți butonul indicat în Fig 59 pentru a minimiza/maximiza grupul.

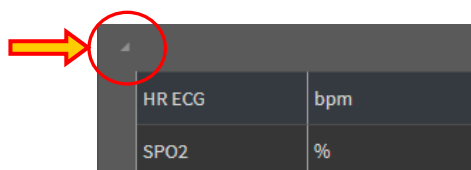


Fig 59

Valorile unui parametru specific pot fi citite pe rândul corespunzător. Prin urmare, fiecare rând arată modificările parametrilor în timp. În Fig 60 **A**, de exemplu, valorile HR ECG sunt încercuite.



		11/03/2021									
Parameter	U.o.M.	10:58	10:59	11:00	11:01	11:02	11:03	11:04	11:05	11:06	11:07
Section Multi 1											
HR ECG	bpm										
HR ECG	bpm		60	64	63	66	66	65	65	63	66
Pulse Rate Non Inv	mm Hg										
NBPs	mm Hg	123	123		121	119		117	117		115

Fig 60

Fiecare coloană corespunde achiziționării unui set de parametri. Datele brute sunt achiziționate la o rată de 1 minut, ca standard. Data și ora achiziției sunt afișate în partea de sus. Prin urmare, valorile tuturor parametrilor achiziționați la un anumit moment pot fi citite pe fiecare coloană (Fig 61).

Celula unică afișează valoarea unui parametru specific la un anumit moment.

Displaying 'Toate, cu excepția celor eliminate' from 07/08/2021 02:04 PM to 07/08/2021 03:04 PM					
		11/03/2021			
Parameter	U.o.M.	10:58	10:59	11:00	11:01
Section Multi 1					
HR ECG	bpm				
HR ECG	bpm		60	64	63
Pulse Rate Non Inv	mm Hg				
NBPs	mm Hg	123	123		121
NBPs	mm Hg				
NBPd	mm Hg	66	66		66

Fig 61

Tipul datelor afișate și intervalul de achiziție sunt indicate în colțul din stânga sus al tabelului (Fig 62 **A**).

A

Displaying "Toate, cu excepția celor eliminate" from 07/08/2021 02:04 PM to 07/08/2021 03:04 PM

		11/03/2021				
Parameter	U.o.M.	10:58	10:59	11:00	11:01	11:02
Section Multi 1						
HR ECG	bpm					
HR ECG	bpm		60	64	63	

Fig 62

Utilizați funcționalitatea **Filtre** pentru a seta tipul datelor și intervalul de achiziție afișat (consultați secțiunea 3.4.1).

Când este afișat un mic triunghi roșu în colțul din stânga sus al unei celule, înseamnă că valoarea este alarmată, adică valoarea se află în afara unui anumit interval de normalitate (Fig 63, intervalul de normalitate este setat în timpul configurației parametrului).

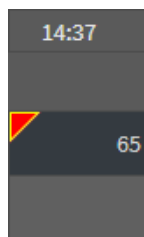


Fig 63

Un triunghi galben în colțul din dreapta sus al unei celule (Fig 64) indică faptul că există o notă textuală asociată datelor specificate în celulă.

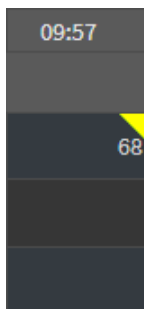


Fig 64

- Faceți clic pe triunghi pentru a afișa nota (Fig 65).

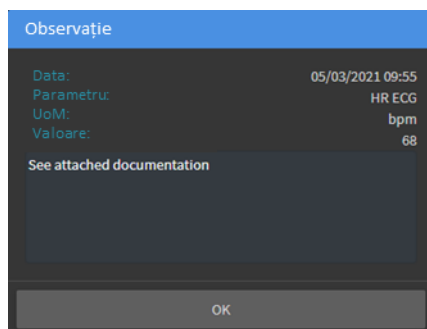


Fig 65

Este afișată o valoare în interiorul unui pătrat, dacă este editat de utilizator. Consultați secțiunea 3.2 pentru procedurile de introducere a datelor (Fig 66).


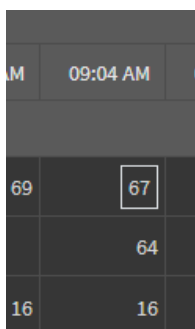


Fig 66


Caseta de selectare plasată în partea de jos a fiecărei coloane (Fig 67 **A**) permite selectarea/deselectarea coloanei. Coloanele selectate sunt evidențiate (trei coloane sunt selectate în Fig 67).

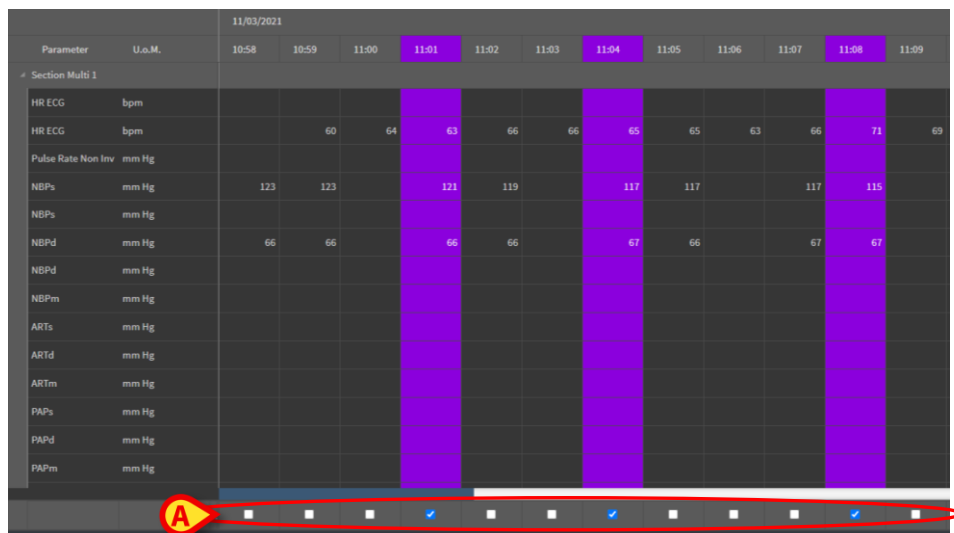

Parameter	U.o.M.	10:58	10:59	11:00	11:01	11:02	11:03	11:04	11:05	11:06	11:07	11:08	11:09
HR ECG	bpm												
HR ECG	bpm		60	64	63	66	66	65	65	63	66	71	69
Pulse Rate Non Inv	mm Hg												
NBP	mm Hg	123	123		121	119		117	117		117	115	
NBP	mm Hg												
NBPd	mm Hg	66	66		66	66		67	66		67	67	
NBPd	mm Hg												
NBPm	mm Hg												
ARTs	mm Hg												
ARTd	mm Hg												
ARTm	mm Hg												
PAPs	mm Hg												
PAPd	mm Hg												
PAPm	mm Hg												

Fig 67

Butoanele plasate în colțul din dreapta sus al tabelului (Fig 68 **A**) permit deplasarea înainte și înapoi în datele disponibile. Deplasarea spre stânga înseamnă afișarea coloanelor achiziționate anterior; deplasarea spre dreapta înseamnă afișarea coloanelor achiziționate ulterior.

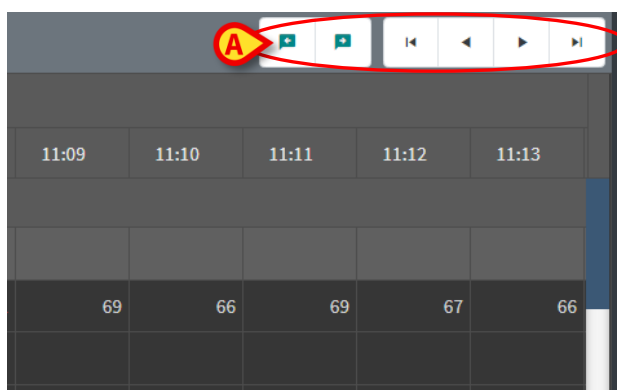

	11:09	11:10	11:11	11:12	11:13
	69	66	69	67	66

Fig 68



- Mergeți la coloana validată anterioară (stânga) sau următoare (dreapta).



- Mergeți la:

- prima coloană;
- coloana anterioară;
- coloana următoare;
- ultima coloană.

Faceți clic pe numele unuia dintre parametrii din stânga tabelului (Fig 69 **A**) pentru a afișa două butoane suplimentare (Fig 69 **B**).

Displaying 'Toate, cu excepția celor eliminate' from 07/08/2021 02:04 PM to 07/08/2021 03:04 PM

Parameter	U.o.M.	10:46	10:47	10:48	10:49	10:50	10:51	10:52	10:53	10:54	10:55	10:56	10:57	10:58	10:59	11:00	11:01
Section Multi 1																	
HR ECG	bpm	61	65	70	70	65	65	68	70	66	71	70	73	67	68	67	69
HR ECG	bpm																
Pulse Rate Non I	bpm																
NBPs	mm Hg	111	113		111	109		109	111		109	111		113	113		115
NBPs	mm Hg																

Fig 69



- Utilizați aceste butoane pentru a selecta valoarea anterioară/următoare achiziționată pentru parametrul selectat.

3.2. Introducerea datelor

Este posibil să introduceți manual date, în funcție de permisiunile utilizatorului.



Permisiunile utilizatorului definesc acțiunile pe care un utilizator este sau nu este autorizat să le efectueze. Exemple: introducerea datelor; adăugarea/eliminarea notificări; validarea/ eliminarea validării etc.. Consultați administratorii de sistem pentru configurarea permisiunilor utilizatorului.



Dacă o coloană este blocată pentru editare pentru utilizatorul conectat în prezent, este afișată pictograma  sub coloană.

Pentru a introduce date:

- Faceți dublu clic pe celula în care trebuie introduse datele.

Se deschide fereastra de introducere a datelor (Fig 70).

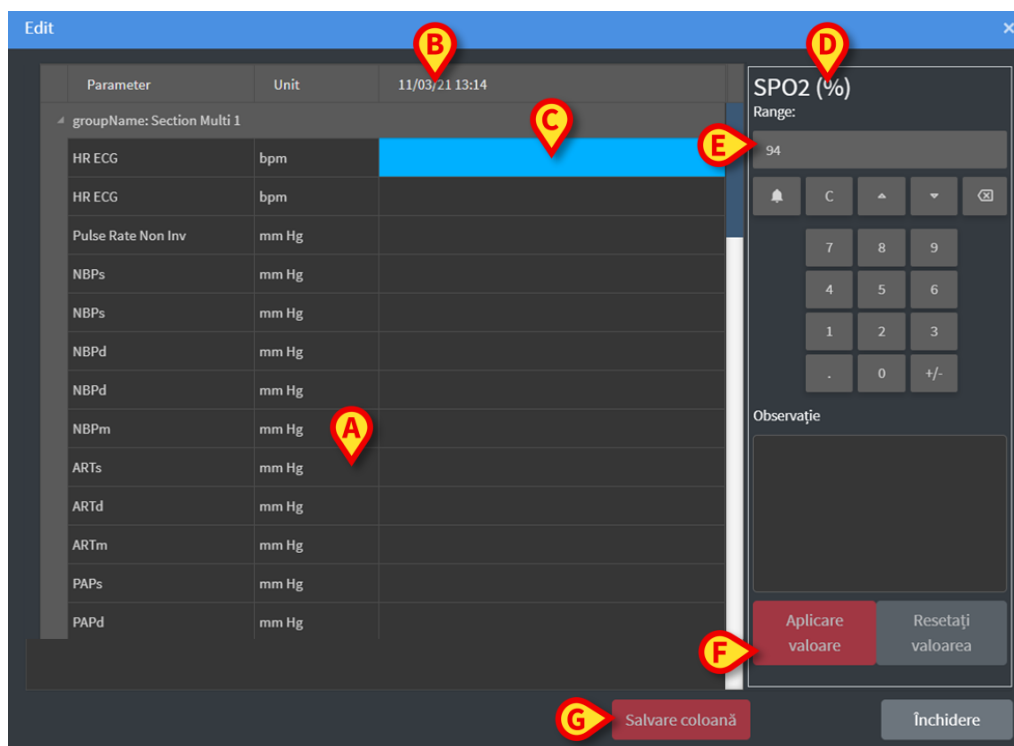


Fig 70

În stânga, un tabel afișează parametrii și valorile coloanei considerate (Fig 70 **A**). Momentul achiziției este afișat deasupra (Fig 70 **B**). Marcajul albastru din tabel (Fig 70 **C**) indică parametrul selectat în prezent. Numele parametrului selectat în prezent este indicat și deasupra câmpului de introducere a datelor (Fig 70 **D**). Dacă este prezentă o valoare pentru parametrul selectat, aceasta este afișată în câmpul de introducere a datelor (Fig 70 **E**). Aici, valoarea poate fi editată dacă este configurată să fie editabilă (unele valori pot fi configurate pentru citire).

- Introduceți date în câmpul de introducere a datelor (Fig 70 **E**).

Pentru introducerea datelor, utilizați fie tastatura numerică virtuală, fie tastatura fizică a stației de lucru.

- Faceți clic pe butonul **Aplicare valoare** (Fig 70 **F**).

Noua valoare este afișată în rândul corespunzător. Datele inserate de utilizatori sunt încercuite (Fig 71 **A**).

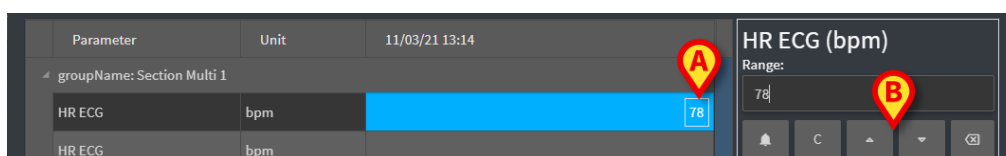


Fig 71

Dacă este necesar,

- Selectați un alt rând pentru a edita un alt parametru pe aceeași coloană.

Pentru selectarea rândurilor, utilizați butoanele săgeată indicate în Fig 71 **B** sau faceți clic pe rândul relevant din tabel (Fig 70 **A**).

Selectați butonul „Clopoșel” (Fig 72 **A**) fie pentru a indica valoarea ca „în afara intervalului”, fie pentru a elimina notificarea dintr-o valoare „în afara intervalului”. Valorile „în afara intervalului” sunt afișate în tabel cu un mic triunghi roșu în colțul celulei (după cum se arată în Fig 63).

Indicarea intervalului (Fig 72 **B**) arată intervalul de normalitate pentru parametrul selectat. Intervalul de normalitate este definit în timpul configurării. O valoare care se află în afara intervalului de normalitate este afișată automat în tabel.

De asemenea, poate fi definit un interval de plauzibilitate pentru un parametru în timpul configurării. Nu se pot introduce valori care se află în afara intervalului de plauzibilitate.

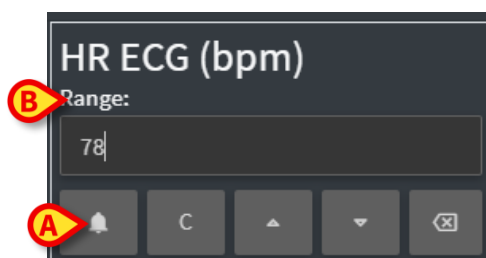


Fig 72

După editarea tuturor valorilor necesare pe aceeași coloană selectată,

- Faceți clic pe butonul **Salvare coloană** (Fig 70 **G**).

Noile valori sunt afișate în tabelul principal de validare (Fig 56 **B**). Datele inserate de utilizatori sunt încercuite.



*Datele inserate se aplică efectiv numai după validarea coloanei corespunzătoare.
Consultați secțiunea 3.3 pentru procedura de validare.*

3.3. Procedura de validare

Pentru a valida unul sau mai multe seturi de date (adică coloane):

- Bifați casetele de selectare corespunzătoare coloanei/coloanelor relevante.

Coloanele sunt evidențiate în tabel (Fig 73 **A**).

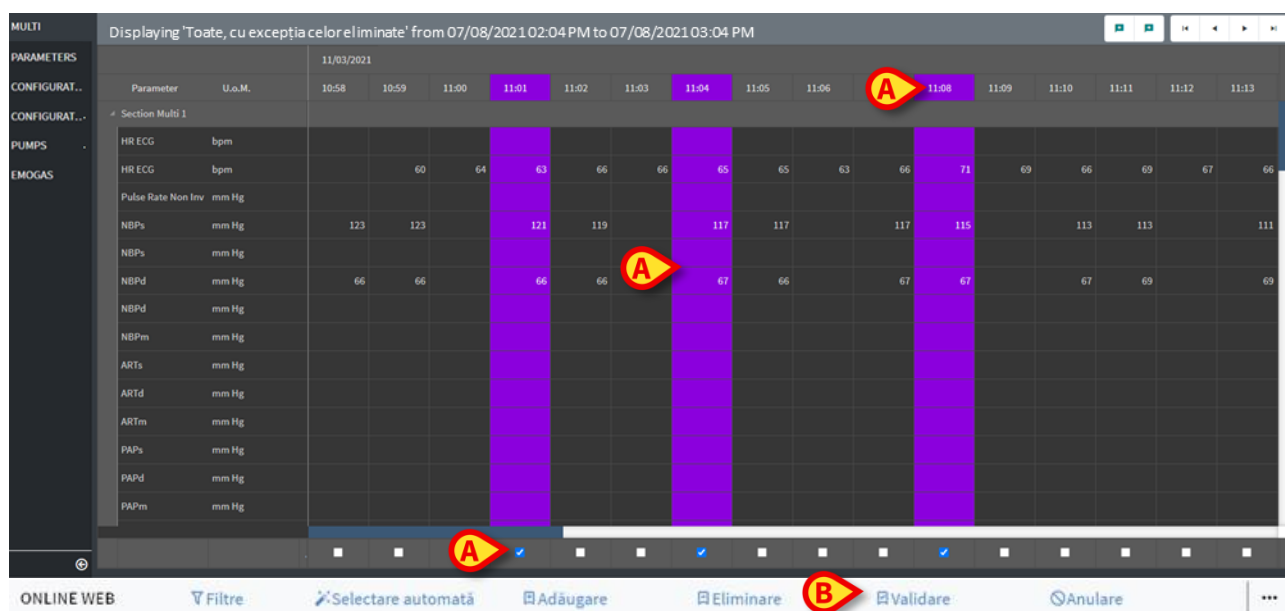


Fig 73

- Faceți clic pe **Validare** în bara de comenzi (Fig 73 B).

Apare notificarea **Validare finalizată**. Coloanele validate sunt evidențiate în albastru, ca în Fig 74.

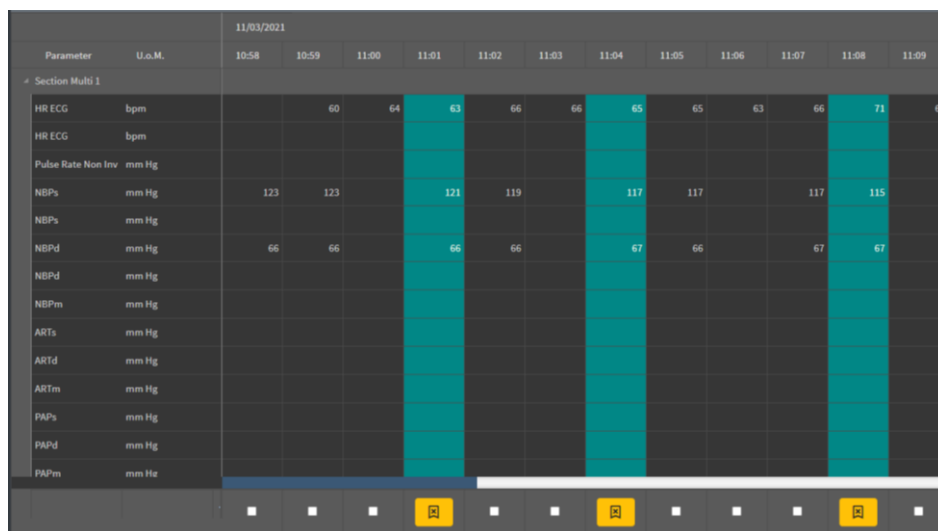


Fig 74

Dacă aplicația On Line Web este configurată să afișeze doar datele validate, atunci coloanele validate sunt singurele afișate în aplicația On Line Web (Fig 75).

Search...		11/03/21		
param	UoM	11:03	11:04	11:08
HR ECG	bpm	63	65	71
SPO2	%			
Temp Core	°C			
Pressures				
NBPd	mm Hg	66	67	67
NBPs	mm Hg	121	117	115

Fig 75

- Apasă pe pictograma  plasată sub coloanele validate (Fig 76) pentru a anula validarea.

		11/03/2021				
Parameter	U.o.M.	10:58	10:59	11:00	11:01	11:02
Section Multi 1						
HR ECG	bpm		60	64	63	66
HR ECG	bpm					
Pulse Rate Non Inv	mm Hg					
NBPs	mm Hg	123	123		121	119
NBPs	mm Hg					
NBPd	mm Hg	66	66		66	66
NBPd	mm Hg					
NBPm	mm Hg					
ARTs	mm Hg					
ARTd	mm Hg					
ARTm	mm Hg					
PAPs	mm Hg					
PAPd	mm Hg					
PAPm	mm Hg					

Fig 76



O expirare a validării poate fi setată în timpul configurării, adică o perioadă de timp după care o coloană validată nu mai poate fi editată sau eliminată. În aceste cazuri, este afișată pictograma  sub coloană.

3.3.1. Istoricul validărilor

Pentru a afișa istoricul validărilor pentru un anumit parametru:

- Faceți clic dreapta pe o coloană validată, pe celula corespunzătoare parametrului respectiv.

Este afișată opțiunea **Istoric** (Fig 77 A).

		18/03/2021							
Parameter	U.o.M.	4	10:05	10:06	10:07	10:08	10:09	10:10	10:11
Section Multi 1									
HR ECG	bpm	71	71	71	70			70	67
HR ECG	bpm								
Pulse Rate Non Inv	mm Hg								
NBPs	mm Hg		123	121		119	111		115
NBPs	mm Hg								
NBPd	mm Hg		66	66		67	67		68

Fig 77

- Faceți clic pe **Istoric**.

Se deschide o fereastră care arată istoricul validărilor parametrului selectat (Fig 78).

Validation history		
Clinical Time: 18/03/2021 10:08	Parameter: HR ECG	UoM:bpm
18/03/2021 09:59	Value: 65	1
Validated by: ADMIN	Note:	

Fig 78

3.4. Bara de comenzi

Utilizați butoanele de pe bara de comenzi (Fig 79) pentru a declanșa diferite proceduri.

ONLINE WEB	Filtre	Selectare automată	Adăugare	Eliminare	Validare	Anulare	...
------------	--------	--------------------	----------	-----------	----------	---------	-----

Fig 79

3.4.1. Filtre

Butonul **Filtre** permite deciderea tipului și momentului achiziției datelor afișate în tabelul de validare.

ONLINE WEB	Filtre	Selectare automată	Adăugare	Eliminare	Validare	Anulare	...
------------	--------	--------------------	----------	-----------	----------	---------	-----

Fig 80

- Faceți clic pe **Filtre** (Fig 80 A).

Se deschide următoarea fereastră (Fig 81):

Fig 81

- Selectați data/ora de început și sfârșit a datelor care vor fi afișate (Fig 81 **A - B**).
- Selectați tipul datelor care trebuie afișate (Fig 81 **C**).

Opțiunile disponibile sunt afișate în Fig 82.

Fig 82

- Faceți clic pe **Aplicare** (Fig 81 **D**).

Opțiunile selectate (interval de timp și tip de date) sunt indicate în colțul din stânga sus al tabelului de validare (Fig 83 **A**).

		11/03/2021			
Parameter	U.o.M.	10:58	10:59	11:00	11:01
Section Multi 1					
HR ECG	bpm				
HR ECG	bpm		60	64	63

Fig 83

3.4.2. Selectare automată

Butonul **Selectare automată** permite selectarea automată a unui subset de coloane predefinit.



Fig 84

- Faceți clic pe caseta de selectare plasată sub coloana de pornire pentru a o selecta.

Coloana selectată este evidențiată.

- Faceți clic pe **Selectare automată** (Fig 84 A).

Se deschide următoarea fereastră (Fig 85):

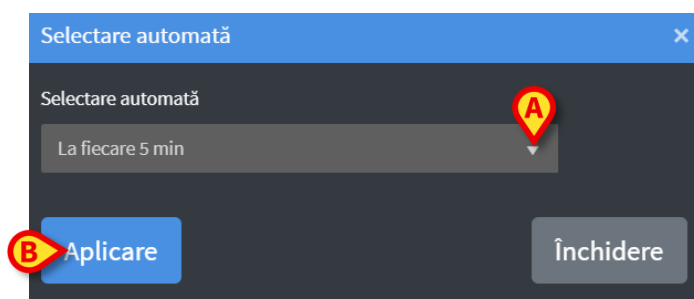


Fig 85

- Deschideți meniul derulant (Fig 85 A) pentru a afișa opțiunile disponibile (Fig 86).

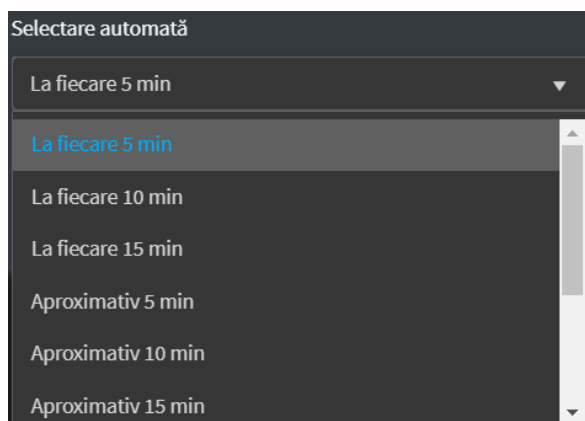


Fig 86

- Faceți clic pe opțiunea dorită.
- Faceți clic pe **Aplicare** (Fig 85 D).

Coloanele corespunzătoare sunt selectate în tabel.

Exemplu: dacă coloana inițială selectată este cea creată la 10:00 și opțiunea selectată este „La fiecare 5 minute”, atunci sunt selectate coloanele de la 10:00, 10:05, 10:10, 10:15 etc.

3.4.3. Adăugare

Butonul **Adăugare** permite adăugarea unui set de date (adică o nouă coloană).



Fig 87

- Faceți clic pe **Adăugare** (Fig 87 **A**).

Se deschide următoarea fereastră (Fig 88):

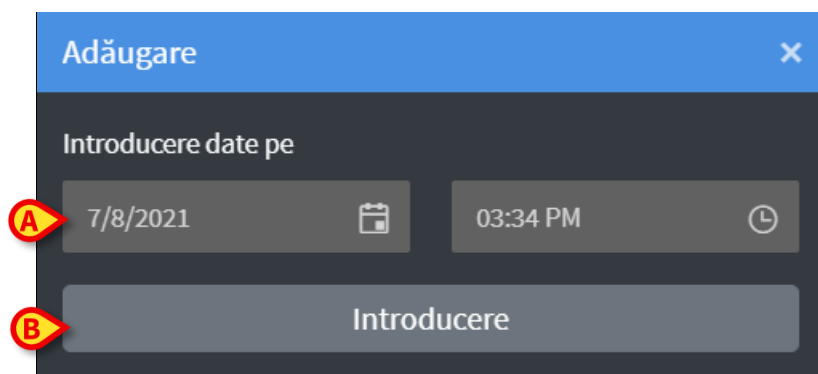


Fig 88

- Folosiți câmpurile pentru dată și oră indicate în Fig 88 **A** pentru a seta data/ora datelor de adăugat.
- Faceți clic pe **Introducere** (Fig 88 **B**).

O nouă coloană goală este adăugată la tabel, la data/ora indicată (Fig 89 **A**).



[illegible]

Fig 89

- Utilizați funcționalitățile de introducere a datelor descrise în secțiunea 3.2 pentru a specifica datele din coloană.

3.4.4. Eliminare

Butonul **Eliminare** permite să renunțati la unul sau mai multe seturi de date.



Fig 90

- Selectați coloana/coloanele care conțin datele de eliminat.

Coloanele selectate sunt evidentiare.

- Faceți clic pe **Anulare** (Fig 90 **A**).

Este necesară confirmarea utilizatorului. După confirmare, datele afișate în coloanele selectate dispar. Coloanele goale rămân. Dacă este necesar, utilizați funcționalitățile de introducere a datelor descrise în secțiunea 3.2 pentru a insera date noi în coloana goală.

3.4.5. Validare

Butonul **Validare** (Fig 91 **A**) permite validarea unuia sau mai multor seturi de date.



Fig 91

- Consultați secțiunea 3.3 pentru procedura de validare.

3.4.6. Anulare

Utilizați butonul **Anulare** (Fig 92 **A**) pentru a reveni la datele originale după editarea datelor.



Fig 92

OBSERVAȚIE: Butonul **Anulare** se aplică procedurilor care nu sunt încă finalizate, pentru a readuce ecranul în starea inițială. După finalizarea unei validări, de exemplu, butonul **Anulare** nu se aplică. Pentru a elimina validarea este însă necesar să efectuați procedura specifică (consultați Fig 76).

3.4.7. Alte opțiuni

Folosiți butonul indicat în Fig 93 **A** pentru a afișa un meniu care oferă opțiuni suplimentare (Fig 94).



Fig 93

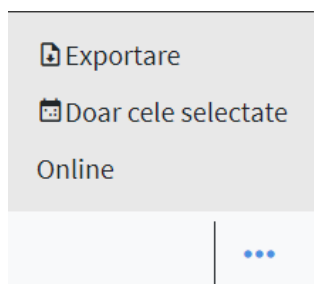


Fig 94

Utilizați opțiunea **Exportare** pentru a exporta datele disponibile într-un fișier Excel.
Utilizați opțiunea **Doar cele selectate** pentru a exporta un subset de date selectate (anterior) într-un fișier Excel.

Utilizați opțiunea **Online** pentru a deschide modulul On Line Web.