



Identity Net

Användarmanual

Version 1.0

2023-03-30

Identity Net



För allmän och detaljerad information om produktmiljön och bruksanvisningen för Control Bar mjukvaran, se specifik dokumentation för produkten. Kunskapen om och förståelsen av dessa dokument är obligatorisk för lämplig och säker användning av Identity Net-modulen som beskrivs i detta dokument.

Identity-modulen gör det möjligt att koppla / koppla från enheter till patienter både på stationära och på handhållna enheter.

ANMÄRKNING: Endast en deluppsättning av de konfigurerade enheterna är kvalificerad för proceduren för snabb koppling / frångkoppling. De enheter som är anslutna till ett räckes / en säng och som är kopplade till den sängen genom Digistat Suite Configuration Application visas inte i Identity-modulen.

WARNING: Trådlösa infusionspumpar kopplas automatiskt bort från patienten när de täcks av Wi-Fi eller stängs av i mer än det antal sekunder som anges i konfigurationsalternativet "PatientDeviceAssocTimeout".

WARNING: Det är nödvändigt att koppla den trådlösa infusionspumpen till patienten varje gång en ny infusion påbörjas.

Så här öppnar du Identity-modulen på stationära arbetsstationer:

- Klicka på  -ikonen.

Följande skärm visas (Fig 1).



Fig 1

Två flikar, angivna i Fig 1 **A**, gör det möjligt att välja antingen en lista över enheter som är kopplade till en patient ("Tilldelad") eller listan över enheter som inte har tilldelats en patient ("Ej tilldelad"). Standard är "Ej tilldelad".

1.1 Procedur för att koppla samman

För att koppla en enhet till en patient,

- Välj fliken "Ej tilldelad" (om den inte redan markerad).

Listan över enheter som inte tilldelats visas på detta sätt. Varje rad motsvarar en enhet.

- Hitta den enhet som ska kopplas.

Ett sökverktyg är tillgängligt (Fig 1 **B**). Du kan söka efter enhetens serienummer.

Sökning med streckkodsskanning är också tillgänglig. Skanna den önskade enhetens streckkod för att visa den rad som hänvisar till den relaterade enheten.

På raden som motsvarar den önskade enheten,

- Klicka på -ikonen som anges i Fig 1 **C**.

Följande skärm öppnas (Fig 2), och ber om att välja den patient som enheten ska kopplas till.

Tilldela

Avdelning: ICU

Bädd: 4 - John JD Doe - Kod: 34526

Bekräfta du föreningen av patienten?:

John, Doe JD
Kod: 34526 Födelsedatum: 01/01/1954
Inlagd på ICU - Bädd 4

Med enhet:

Alaris neXus CC - IP2M12701
0.84 mL/h

✓ Tilldela ✗ Avbryt

Fig 2

- Använd rullgardinslistorna som anges i Fig 2 **A** för att välja patienten.

Den valda patientdata och utvalda enhetsdata visas i fönstret (Fig 2 **B**).
Om datan är korrekt

- klicka då på knappen som anges i Fig 2 **C**.

Kopplingen mellan enhet och patient är nu fullbordad.

1.2 Procedur för att koppla från

För att koppla från en enhet från en patient.

- Öppna Identity-modulen.
- Välj Tilldelad -fliken (Fig 3 **A**).

Följande innehåll visas.

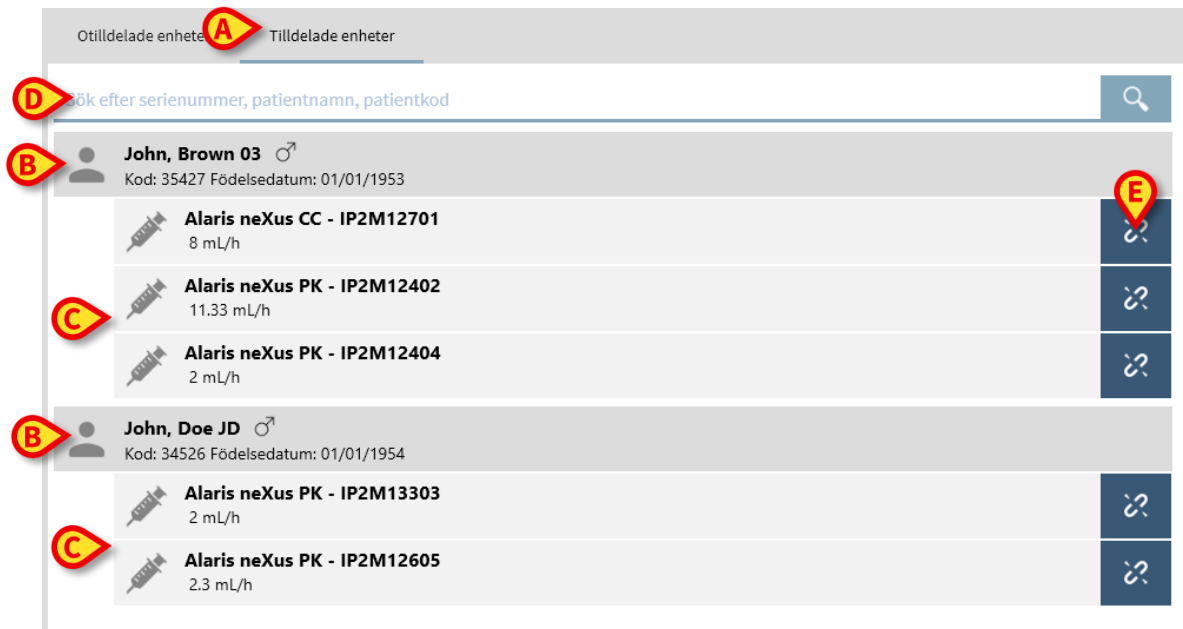


Fig 3

Mörkgrå rader avser patienter (Fig 3 **B**). Ljusgrå rader avser enheter (Fig 3 **C**).

Alla de enheter som är kopplade till en patient listas nedanför patientnamnet.

Ett sökverktyg är tillgängligt (Fig 3 **D**), vilket gör det möjligt att söka efter en specifik enhet. Sökning kan utföras med enhetens serienummer / patientnamn / patientkod.

- Hitta raden som motsvarar enheten som ska kopplas bort.
- Klicka på  knappen (Fig 3 **E**).

Följande fönster öppnas och begär användarbekräftelse (Fig 4).



Fig 4

- Klicka på knappen som anges i Fig 4 **A** för att slutföra proceduren med fränkopplingen