

ascom

Digistat V6.0

PIKAOPAS

Tarkistus 1.0

10/06/2019

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Sisällysluettelo

1. Käynnistys.....	3
1.1 Digistat-järjestelmän asennus	3
1.2 Digistat-järjestelmän käynnistys	4
1.3 Sisäänkirjautuminen.....	5
1.3.1 Viivakoodikirjautuminen	6
1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus -toiminto)	6
1.4 Uloskirjautuminen.....	6
2. Järjestelmän käyttökatkot.....	7
3. Digistat-järjestelmän käyttöohjeet	8
3.1 Verkossa olevat käyttöohjeet	8
4. Digistat-järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö	9
4.1 Painettu käyttöohje	10
5. Yhteystiedot.....	11

1. Käynnistys

1.1 Digistat-järjestelmän asennus

Ainoastaan Ascom UMS -tekniikot tai Ascom UMS:n erityisesti valtuuttamat teknikot saavat asentaa Digistat-järjestelmän. Kun järjestelmä toimitetaan loppukäyttäjälle, se on jo asennettu ja määritetty asianmukaisesti työasemaan.

1.2 Digistat-järjestelmän käynnistys

Digistat-järjestelmän käynnistys:


- Kaksoisklikkaa  -kuvaketta työaseman työpöydällä.

Seuraava ikkuna näytetään järjestelmän latautuessa (Kuva 1).



Kuva 1

Muutaman sekunnin kuluttua DIGISTAT®-työalue näytetään (Kuva 2).

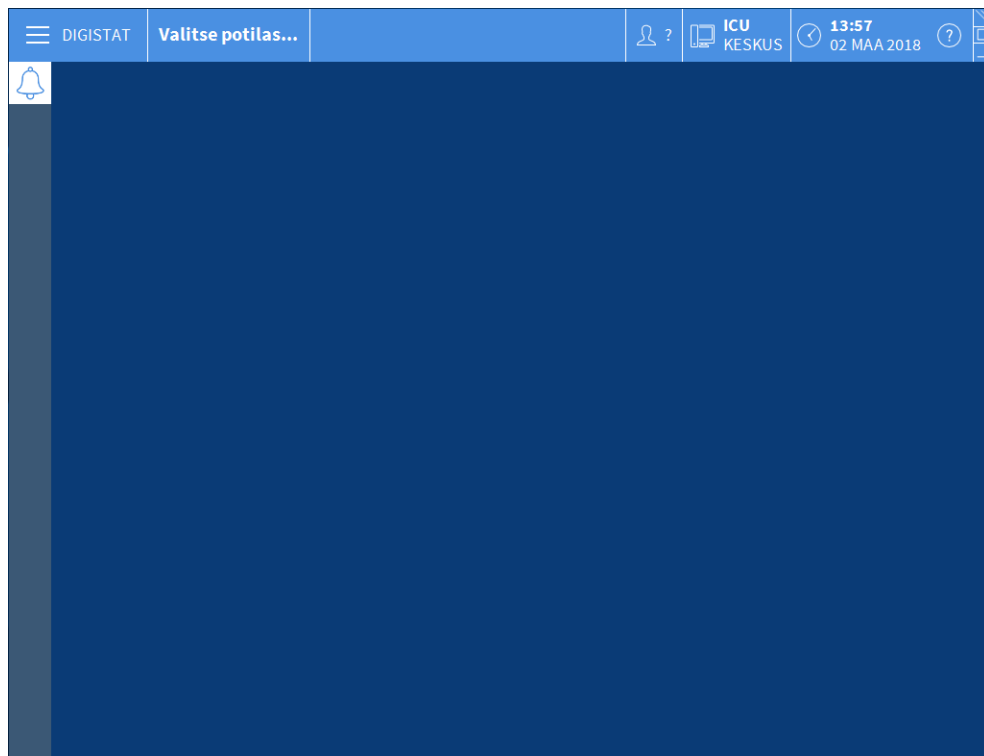

Kuva 2

1.3 Sisäänkirjautuminen

Digistat-järjestelmän käyttö vaatii sisäänkirjautumista. Toisin sanoen käyttäjän täytyy syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasansansa. Kirjaudu sisään työistunnon aluksi seuraavasti:

- Klikkaa **Käyttäjä**-painiketta kohdassa Kuva 3 **A**. Seuraava sivu näytetään.

Kuva 3

Tämän jälkeen:

- Kirjoita käyttäjätunnuksesi Käyttäjätunnus-kenttään (Kuva 3 **B**).
- Kirjoita salasansasi Salasana-kenttään (Kuva 3 **C**).
- Klikkaa **Ok**-painiketta (Kuva 3 **D**).

Olet kirjautunut sisään. Kirjautunutta käyttäjää osoittava lyhenne näytetään tehtäväpalkin **Käyttäjä**-painikkeessa (lyhenne on kuvassa 4 "FFI").



Kuva 4

1.3.1 Viivakoodikirjautuminen

Terveystieteiden tutkimuskeskus on mahdollista ottaa käyttöön sisäänkirjautuminen viivakoodinlukijan avulla.

Käytä toimintoa seuraavasti, kun järjestelmässä näkyy sisäänkirjautumissivu (Kuva 3):

- Lue käyttäjän henkilökohtainen viivakoodi.


Jos viivakoodi tunnistetaan, sinut kirjataan välittömästi sisään.

1.3.2 Automaattisen uloskirjautumisen käytöstä poisto (Käyttäjän lukitus-toiminto)

Jos järjestelmä on käyttämättömänä tietyn (määriteltävän) ajan, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos.

Poista toiminto käytöstä seuraavasti käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittamisen jälkeen mutta ennen kuin klikkaat **Ok**:

- Klikkaa **Lukitse**-painiketta sisäänkirjautumissivun komentopalkissa (Kuva 5 **A**).

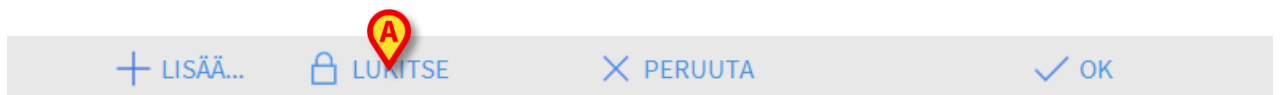

Kuva 5

Jos käyttäjä on lukittu, riippulukko näkyy käyttäjän kuvakkeen alareunassa (Kuva 6).




Kuva 6

1.4 Uloskirjautuminen

Sulkeakseen Digistat-työistunnon käyttäjän tulee kirjautua ulos järjestelmästä.

Uloskirjautuminen:

- Klikkaa komentopalkin **Käyttäjä**-painiketta (Kuva 7 ja Kuva 3 **A**).

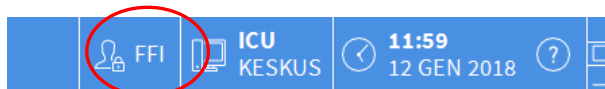

Kuva 7

Käyttäjätunnuksen lyhenne katoaa **Käyttäjä**-painikkeesta.

2. Järjestelmän käyttökatkot

Jos käynnistyksen aikana esiintyy ongelmia yhteyden saamisessa palvelimeen, järjestelmä ilmoittaa siitä Järjestelmän palautus -ikkunalla.

Yhteysongelmat selviävät toisinaan itsekseen hetken kuluttua. Jos eivät, ota yhteyttä Ascom UMS:n tekniseen tukeen. Ascom UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

On olemassa harvinaisia joskin mahdollisia tapauksia, jolloin Digistat-järjestelmän käyttö on mahdotonta (esim. luonnonmullistukset, pitkät sähkökatkot tms.).

Digistat-järjestelmää käyttävien terveydenhoito-organisaatioiden tulee määritellä hätätilannemenettely tällaisten tilanteiden varalta

- 1) sairaalaosastojen toiminnan palauttamiseksi
- 2) järjestelmän palauttamiseksi käyttöön mahdollisimman pian.

Ascom UMS tukee ja auttaa mielellään hätätilannemenettelyn kehittämisessä, mutta sen määrittely ja toteutus on terveydenhoito-organisaation vastuulla.

Ascom UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

3. Digistat-järjestelmän käyttöohjeet

Digistat-järjestelmän käyttöohjeet toimitetaan tuotteen mukana. Ne ovat luettavissa sähköisessä muodossa Digistat-järjestelmässä (ainoastaan tämä pikaopas toimitetaan paperilla). Käyttöohjeiden lukeminen:

- Klikkaa **Ohje**-painiketta komentopalkissa (Kuva 8).



Kuva 8

Näytölle avautuvalta sivulta voidaan avata

- 1) aihekohtaiset Digistat-käyttöohjeet
- 2) mahdollisiin erityisiin toimenpiteisiin liittyvät pikaohjeet.

Sähköiset asiakirjat ovat PDF-muodossa.

3.1 Verkossa olevat käyttöohjeet

Digistat -käyttöohjeet voidaan myös ladata erityiseltä internetsivulta.

Digistat-asiakkaille on pääsy suojatulle alueelle, jolla säilytetään kaikkia käyttöohjeversioita. Käyttäjän on näin mahdollista tarkistaa, onko käyttöohjeista tullut päivitettyjä versioita.

Lataa käyttöohjeet kirjoittamalla seuraava osoite internetselaimesi osoitekenttään:

<https://confluence.ascom-ws.com/display/DIG/DIGISTAT+EU+v6.0>

Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana avataksesi käyttöohjelistan.

Käyttäjätunnus – paikallisen jälleenmyyjän toimittama käyttäjätunnus

Salasana – paikallisen jälleenmyyjän toimittama salasana

Aihekohtaiset käyttöohjeet ovat saatavilla PDF-muodossa.

4. Digistat -järjestelmän Tietoja-ruudun näyttö


Digistat-järjestelmän Tietoja-ruutu asetetaan näytölle seuraavasti:

- Klikkaa tehtäväpalkin **Valikko**-painiketta (Kuva 9 **A**)




Kuva 9

Useita vaihtoehtoja sisältävä valikko avautuu (Kuva 10).

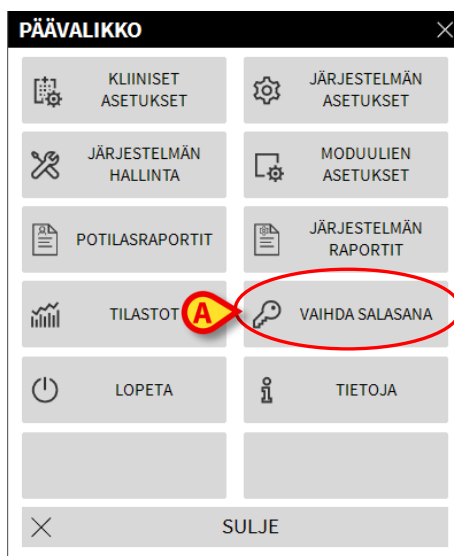

Kuva 10

- Klikkaa valikon **Tietoja**-painiketta (Kuva 10 **A**). Digistat-järjestelmän Tietoja-ruutu avautuu (Kuva 11).

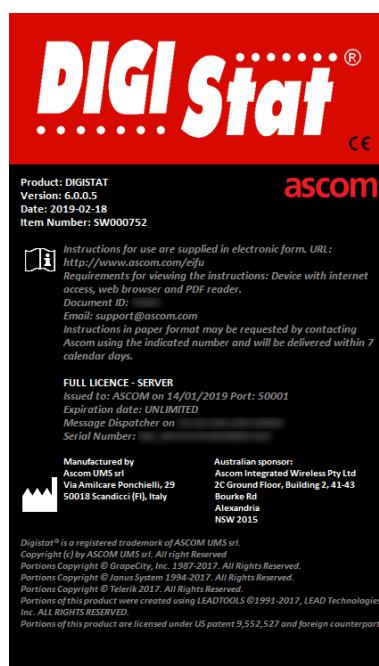

Kuva 11

4.1 Painettu käyttöohje

Asiakas voi pyytää ostamiensa tuotteiden käyttöohjeet painettuina. Ascom UMS toimittaa pyydetyt käyttöohjeet mahdollisimman pian.

Pyyntö tulee osoittaa tekniselle tuelle. Ascom UMS:n yhteystiedot löytyvät kappaleesta 5.

5. Yhteystiedot

Ota kaikissa tilanteissa ensin yhteyttä tuotteen asentaneeseen jälleenmyyjään.

Valmistajan yhteystiedot:

Ascom UMS srl

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161

Fax (+39) 055 8290392

Tekninen tuki

support@unitedms.com

800999715 (maksuton numero, vain Italia)

Myynti ja tuotetietoja

sales@unitedms.com

Yleisiä tietoja

info@unitedms.com