



Collect Mobile

Käyttäjän ohjekirja

Versio 1.0

24/05/2019

ASCOM UMS s.r.l. Unipersonale

Via Amilcare Ponchielli 29, IT-50018 Scandicci (FI), Italia

Puh. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030

www.ascom.com

Sisällysluettelo

1. Ohjekirjan käyttö.....	3
1.1 Tavoitteet.....	3
1.2 Käytetyt merkit ja termit.....	3
1.3 Symbolit.....	4
2. Digistatin Keräily-moduuli	5
2.1 Johdanto.....	5
2.2 Sovelluksen käynnistys.....	5
2.3 Pääsivu	6
2.3.1 Potilasluettelo.....	6
2.3.2 Potilasluettelon potilassivu	7
2.3.3 Potilasvalinnan potilassivu	7
2.4 Potilassivu.....	9
2.4.1 Uuden tiedonkeruun aloittaminen.....	9
2.4.2 Käynnissä olevan tiedonkeruun lopettaminen.....	11
2.4.3 Näytä viimeksi hankitut tiedot.....	11

1. Ohjekirjan käyttö



Tätä käyttöohjetta on käytettävä yhdessä tuotteen käyttöoppaan sekä muiden moduulikohtaisten oppaiden kanssa, jotka on lueteltu osiossa 1

1.1 Tavoitteet

Tämän käyttöoppaan toteuttamisen tavoitteena on tarjota kaikki DIGISTAT®-järjestelmän turvalliseen ja asianmukaiseen käyttöön. Lisäksi asiakirjan tavoitteena on kuvailla kaikki järjestelmän osat. Se toimii myös oppaana käyttäjälle, joka haluaa oppia suorittamaan määrättyjä toimenpiteitä, sekä opastaa järjestelmän asianmukaiseen käyttöön sopimattomien ja mahdollisesti vaarallisten käyttötapojen välttämiseksi.

1.2 Käytetyt merkit ja termit

DIGISTAT®-järjestelmien käyttöön vaaditaan yleisimpien tietotekniikan termien ja käsitteiden perustuntemusta. Myös ohjekirjaan perehtymiseen vaaditaan samojen tietojen tuntemusta.

DIGISTAT®-järjestelmien käyttöoikeus tulee sallia vain asianmukaisesti koulutetulle ammattihenkilökunnalle.

Ohjekirjan verkkoversion viittaukset toimivat hypertekstilinkeinä. Aina, kun vastaan tulee viittaus kuvaan (esim. 1.22) tai kappaleeseen (esim. kappale 4.3.2), voit klikata viittausta siirtyäksesi suoraan kyseiseen kuvaan tai kappaleeseen.

Viittaukset painikkeisiin kirjoitetaan aina **lihavoituna**. Esimerkissä

➤ "Klikkaa **Päivitä**-painiketta"

Päivitä on käsitellyllä sivulla oleva painike. Mahdollisuuksien mukaan se on selkeästi ilmoitettu kuvassa (viitteellä, kuten "Ks. 5.43 **A**").

Merkkiä ➤ käytetään osoittamaan toimintoa, joka käyttäjän tulee suorittaa määrättyä toimenpidettä varten.

Merkkiä ● käytetään osoittamaan listan eri osia.

1.3 Symbolit

Ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja:

Hyödyllistä tietoa



Symbolia käytetään DIGISTAT®-järjestelmän ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvien lisätietojen vieressä. Ne saattavat olla selittäviä esimerkkejä, vaihtoehtoisia toimenpiteitä tai muita lisätietoja, jotka auttavat ymmärtämään tuotteen toimintoja paremmin.

Huomio!



Symbolia käytetään korostamaan tietoja, joiden tarkoituksena on estää ohjelmiston sopimatonta käyttöä tai kiinnittää huomiota kriittisiin toimenpiteisiin, joihin saattaa sisältyä riskejä. Kiinnitä erityistä huomiota ohjeisiin, joissa on tämä symboli.

Seuraavia symboleja käytetään tietojen:



Valmistajan nimi ja osoite



Huomio, katso liitteenä olevia ohjeita

2. Digistatin Keräily-moduuli



Huomaa, että Keräily-moduulin ominaisuudet ja toiminnot ovat täysin käytettävissä silloin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään.

Ponnahdusviesti ilmoittaa sovellusta käyttävälle käyttäjälle, jos hän ei ole kirjautunut sisään.

2.1 Johdanto


Keräily-moduulin avulla käyttäjä voi hankkia tietoja potilaaseen liittyvistä laitteista (jopa väliaikaisesti) ja hän voi valita tietojen toisto- ja kestoajat.

Keräily-moduuli käsittelee potilaiden tietoja, vaikka he eivät olisikaan vuoteessa. Tietojen hankinta- ja toistoajoja voidaan muokata täysin.

2.2 Sovelluksen käynnistys

Keräily-moduulin käynnistäminen:

- Kosketa vastaavaa riviä kädessä pidettävän laitteen näytöltä (Kuva 1).

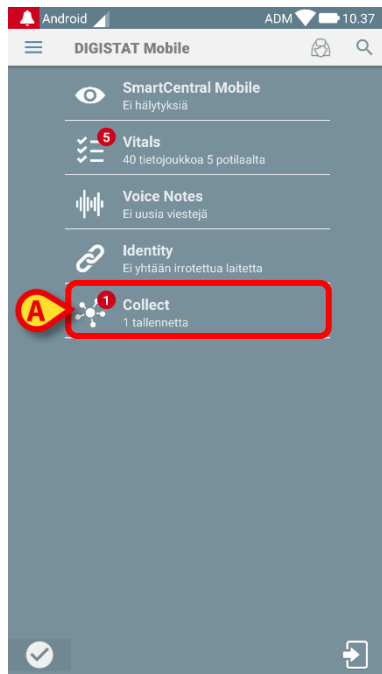

Kuva 1

Käynnissä olevan tiedonkeruun määrä näkyy punaisessa ympyrässä sovelluskuvakkeen yläpuolella (Kuva 1 **A**).

Kun olet koskettanut moduulin kuvaketta, Keräily-pääsivu avautuu (Kuva 2):



Kuva 2

2.3 Pääsivu


Keräily-pääsivulla näkyy potilasluettelonäyttö (Kuva 2). Siinä näkyy luettelo potilaista, jotka kuuluvat kädessä pidettävän laitteen toimialueeseen kuuluviin vuoteisiin. Lisäksi näytetään myös potilaat, joihin liittyvä tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä.

Kun tiedonkeruu on käynnissä, tiedonkeruutyyppi näytetään käyttäjälle. Tiedonkeruutyppejä on kolmenlaisia:

- Jatkuva, jonka kuvake on .
- Käynnistys ja pysäytys, jonka kuvake on .
- Sekoitettu (eli Käynnistä ja pysäytä -keräystyyppi, joka korvaa Jatkuva-keräystyyppin), jonka kuvake on .

2.3.1 Potilasluettelo

Jokaista potilasta edustaa yksi laatikko (Kuva 3).

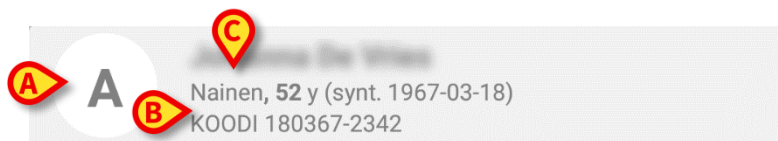


Kuva 3

Laatikossa näkyvät seuraavat tiedot:

- vuoteen numero (jos saatavilla – Kuva 3 **A**)
- potilastiedot (sukupuoli, ikä, syntymäaika, potilastunnus – Kuva 3 **B**)
- kyseisessä vuoteessa olevan potilaan nimi (Kuva 3 **C**)

Käynnissä olevaan tiedonkeruuseen liittyvän potilaan laatikko on väreiltään erilainen (Kuva 4):

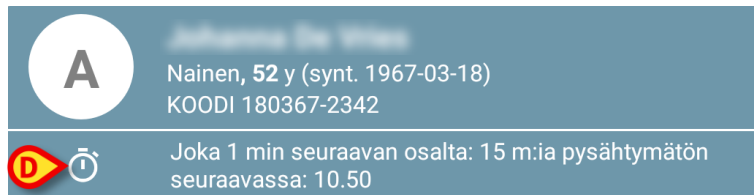

Kuva 4

Jos tietoja kerätään, lisätään rivi, jossa näytetään keräystyyppi sekä keräyksen kesto ja toistoajat (Kuva 4 **D**).

2.3.2 Potilasluettelon potilassivu

Potilassivun käyttäminen:


- Kosketa potilasluettelossa olevaa laatikkoa.

Potilassivulla näkyy luettelo laitteista, jotka voivat kerätä tietoja valitusta potilaasta (Kuva 2).

2.3.3 Potilasvalinnan potilassivu


Keräily-sovellus suorittaa tiedonkeruuta myös sellaisista potilaista, jotka eivät kuulu kädessä pidettävän laitteen toimialueeseen. Se voidaan suorittaa hakemalla ja valitsemalla potilas ennen sovelluksen avaamista. Voit lukea yksityiskohtaisen kuvauksen menettelystä on Digistat Mobilen käyttöoppaasta.

- Voit hakea haluamasi potilaan koskettamalla Digistat Mobile -päänäytöllä hakukuvaketta (Kuva 5 **A**):

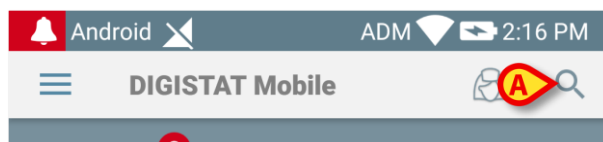

Kuva 5

- Hae haluamasi potilas tekstihaulla tai viivakoodilla (Kuva 6).

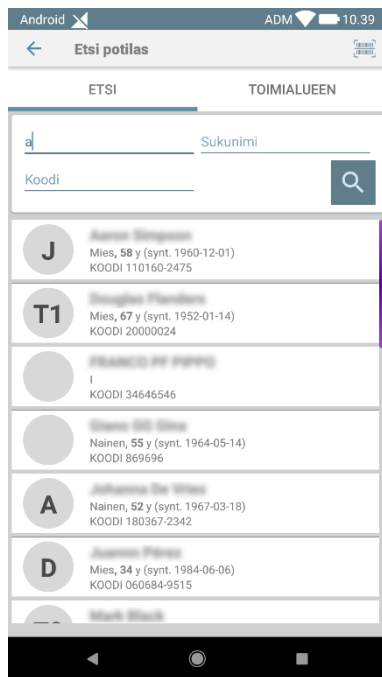

Kuva 6

- Valitse haluamasi potilas. Käyttäjän vahvistuksen jälkeen näkyy mobiilisovelluksen pääsivu (Kuva 7):




Kuva 7

- Kosketa Keräily-sovellusta vastaavaa riviä kädessä pidettävän laitteen näytöllä (Kuva 7)

Potilassivu tulee näkyviin (2.3.1).

2.4 Potilassivu

Potilassivunäyttö koostuu kahdesta alueesta: otsikko-alueesta (Kuva 8 **A**) ja potilaaseen yhdistetystä laiteluettelosta (Kuva 8 **B**):

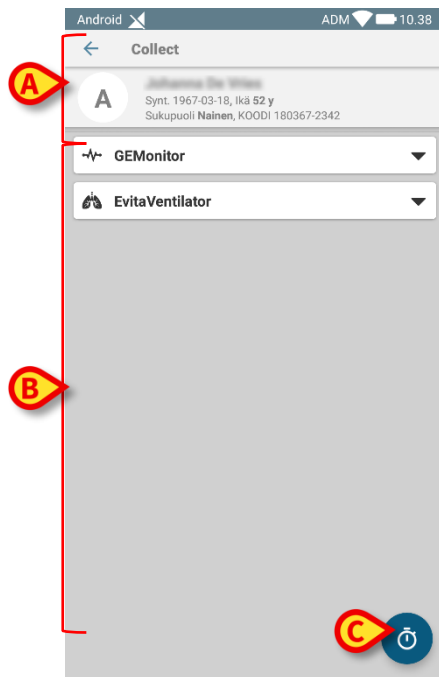

Kuva 8


Otsikkoalueessa näkyvät samat tiedot kuin laatikossa, joka liittyy potilasluettelonäytössä huomioon otettavaan potilaaseen (katso kappale Kuva 9). Laiteluettelossa näkyvät kaikki laitteet, jotka voivat hankkia tietoja potilaalta.

2.4.1 Uuden tiedonkeruun aloittaminen

Uuden tiedonkeruun aloittaminen:

- Kosketa  -kuvaketta potilassivulla (Kuva 8 **C**):


Näyttöön tulee seuraava valintaikkuna, jonka avulla käyttäjä voi valita tiedonkeruun keston ja toistumistiheyden (eli toistoajan) (Kuva 9):

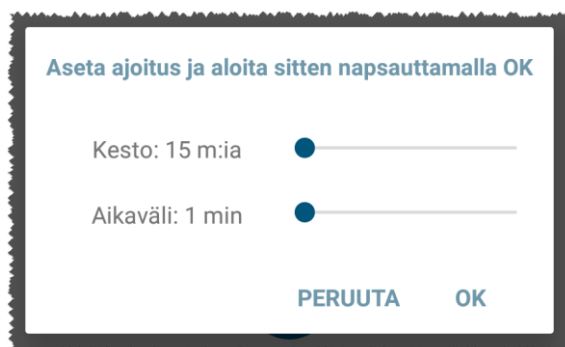

Kuva 9

- Valitse haluamasi kesto ja aikaväli ja paina sitten **OK**.


Potilassivu tulee näkyviin, ja sitä on muutettu hieman seuraavasti (Kuva 10):

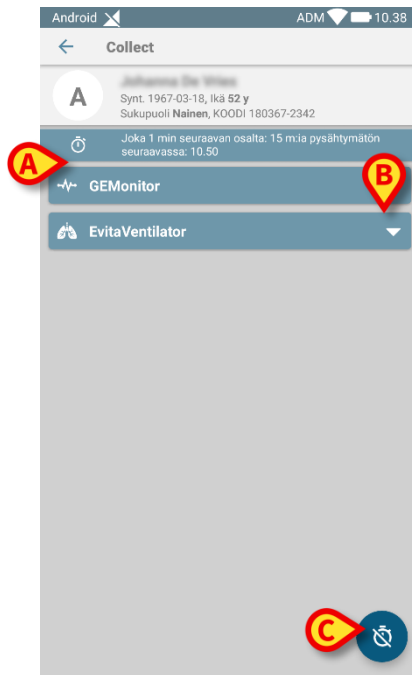

Kuva 10

Nyt lisätään rivi, jossa näkyy käynnissä olevan tiedonkeruun kesto ja toistumisajat (Kuva 10 **A**). Lisäksi tiedonkeruun käynnistävä kuvake korvataan nyt sillä, joka mahdollistaa sen pysäyttämisen (– Kuva 10 **C**).

Kuten aikaisemmin on havaittu, silloin kun tiedonkeruu on aloitettu, potilasluettelon näytössä oleva kyseessä olevaan potilaaseen liittyvä laatikko on myös väriltään erilainen (Kuva 11):

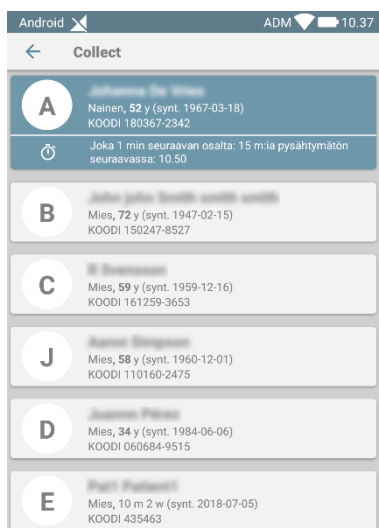


Kuva 11

2.4.2 Käynnissä olevan tiedonkeruun lopettaminen

Käynnissä olevan tiedonkeruun lopettaminen:

- Kosketa  potilassivulla olevaa kuvaketta (Kuva 10 C):

Näyttöön tulee seuraava valintaikkuna, joka pyytää käyttäjän vahvistusta (Kuva 12):

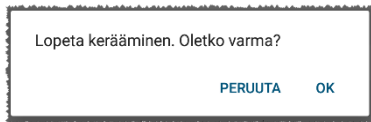


Kuva 12

2.4.3 Näytä viimeksi hankitut tiedot

Nähdäksesi viimeksi hankitut tiedot toimi seuraavalla tavalla riippumatta siitä, onko tiedonkeruu käynnissä vai ei:

- Kosketa liitettyyn laitteeseen liittyvää laatikkoa (Kuva 13):

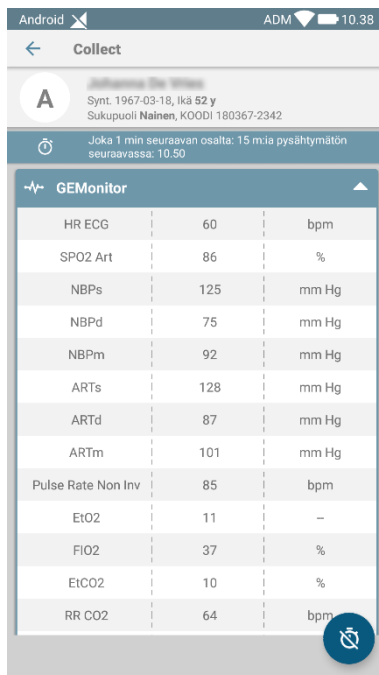

Kuva 13

