

Guida di Riferimento Rapido

Ascom d63 DECT Handset




1. Panoramica dell'handset

1. Panoramica dell'handset

Ascom d63 è un robusto handset DECT progettato per ambienti con un volume medio-alto di attività come ospedali, case di riposo, negozi al dettaglio e aziende. Le sue caratteristiche di messaggistica avanzata ne fanno lo strumento ideale in contesti dove è necessaria una comunicazione bidirezionale o l'interazione con apparecchiature automatizzate. Ascom d63 semplifica la manutenzione/amministrazione e può essere adattato facilmente alle esigenze dinamiche di organizzazioni grandi e diversificate.

NOTA: Per informazioni sulle funzioni e caratteristiche aggiuntive disponibili per ciascuna variante dell'handset, vedere il Manuale di istruzioni.

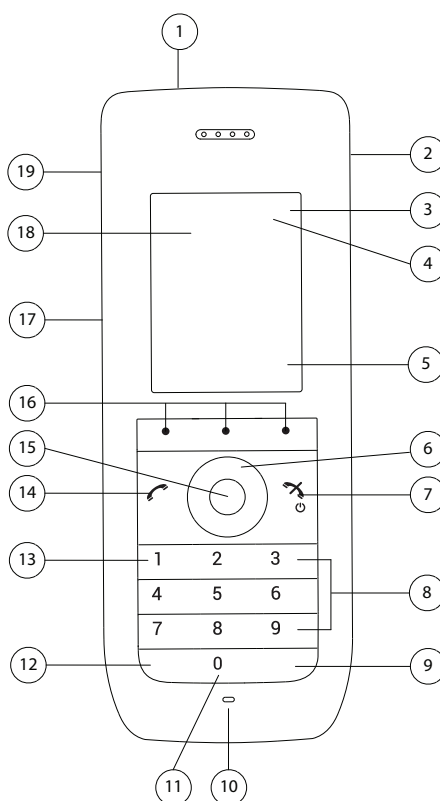

#	Descrizione
1	Pulsante multifunzione/di allarme
2	Connettore cuffia
3	Mostra l'ora e i simboli
4	Mostra la data e i simboli
5	Mostra le funzioni dei tasti dedicati
6	Cinque tasti navigazione.
7	Tasto attivazione/disattivazione, tasto di aggancio
8	Tasti alfanumerici
9	Tasto di disattivazione del suono
10	Microfono

1. Panoramica dell'handset

- 11 Spazio
- 12 Blocco tasti e lettere maiuscole/minuscole
- 13 Messaggio vocale
- 14 Tasto di risposta
- 15 Tasto di conferma
- 16 Tasti dedicati
- 17 Tasto Mute
- 18 Display
- 19 Tasti volume

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Stato delle batterie
	Messaggio vocale
	Microfono disattivato
	Altoparlante acceso
	Altoparlante spento
	Suono disattivato
	Cuffia auricolare collegata
	Bluetooth headset collegato
	Bluetooth
	Nuovo messaggio
	Leggi messaggio
	Chiamata senza risposta
	Chiamata in arrivo
	Chiamata in uscita

2. Guida introduttiva



Collegamento del sistema



Blocco tastiera



Blocco telefono



L'handset è un modello Talker



L'handset è un modello Messenger



L'handset è un modello Protector

2. Guida introduttiva

Spegnimento/accensione dell'handset

Premere il tasto di aggancio finché l'handset non si accende. Per spegnere l'handset, premere il tasto di aggancio fino a quando viene visualizzata la scritta "Spegnere?", quindi premere "Sì".

Caricamento delle batterie

Il caricamento viene effettuato in un caricabatteria da tavolo oppure in un caricabatteria da parete. Quando il caricamento della batteria è completo, viene visualizzata un'icona raffigurante la batteria completamente carica.

Mentre è in un caricabatteria da tavolo, l'handset è completamente operativo. Nel caricatore l'handset non vibra.

La batteria può essere caricata anche in un caricatore separato a pacco.


NOTA: se si carica la batteria a una temperatura inferiore a 5°C si verificano danni alla batteria e se ne riduce la durata.

Sostituzione delle batterie

Se il periodo di stand-by dell'handset diventa eccessivamente ridotto, è consigliabile sostituire la batteria. Contattare l'amministratore del sistema o il fornitore dell'handset per ricevere informazioni riguardo a batterie di ricambio.

3. Menu e tasti dell'handset

Simboli del menu

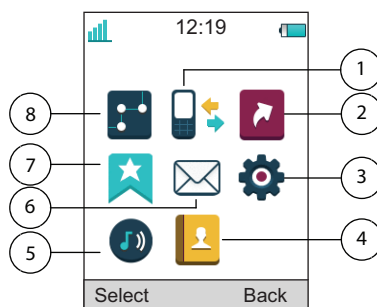

#	Descrizione
1	Chiamate
2	Scorciatoie
3	Impostazioni
4	Contatti
5	Profili
6	Messaggi
7	Servizi
8	Collegamenti

Navigare all'interno del menu

Utilizzare il tasto navig. per spostarsi nel menu. Per selezionare un'opzione, premere il corrispondente tasto dedicato situato sotto allo schermo.

Tasti dedicati, tasti memoria e puls. multifunz.

I tre tasti dedicati al di sotto del display possono essere definiti per funzioni specifiche come la selezione di un numero specifico. Premere a lungo un tasto memoria può avere la stessa funzione di un tasto dedicato e qualsiasi tasto da "2" a "9" può essere programmato come tasto memoria. Il puls. multifunz. può essere programmato anche per funzioni differenti con una pressione prolungata e una doppia pressione.

Per ulteriori informazioni su tasti dedicati, tasti memoria e pulsante multifunzione, vedere il Manuale d'istruzioni.

Attivazione/disattivazione tastiera automatica

Entrare nel menu "Impostazioni" e scegliere "Blocchi". Scegliere "Blocco/sblocco tastiera automatico", scegliere "Attiva/Disattiva" e premere "Indietro". L'icona del blocco tasti indica che la tastiera è bloccata.

Per sbloccarla, premere il tasto *, quindi il tasto dedicato "Sì".

4. Funzioni di base

NOTA: Per una descrizione dettagliata di tutte le funzioni disponibili, vedere il Manuale d'istruzioni dell'handset. Le funzioni disponibili dipendono dal modello e dalla configurazione dell'handset.

Effettuare una chiamata

Per comporre un numero si possono utilizzare i seguenti modi:

- In modalità stand-by, comporre il numero e premere il tasto di risposta o il tasto dedicato "Chiama".
- Premere il tasto di risposta e selezionare un numero dalla lista chiamate.
- Premere un tasto memoria* pre-programmato o il tasto dedicato.
- Comporre un numero dalla rubrica locale. Accedere al menu Contatti, selezionare "Chiama contatto" e selezionare il nome dalla lista, premere "Chiama" o il tasto di risposta.
- Comporre un numero dalla rubrica centrale. Accedere al menu Contatti, selezionare Rubrica centrale > cerca per nome/numero/ultimo risultato e premere cerca. Premere il tasto di risposta o il tasto dedicato "Chiama".

* I tasti alfanumerici possono essere programmati con un numero di telefono .

Rispondere a una chiamata/terminare una chiamata

Quando viene riprodotta la suoneria; premere il tasto di risposta per rispondere alla chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di riaggancio.

Rifiutare una chiamata

Quando viene riprodotta la suoneria; premere il tasto di riaggancio. Le informazioni sulle chiamate sono memorizzate nell'Elenco chiamate.

Controllare i messaggi vocali

I messaggi vocali possono essere controllati premendo il tasto "Chiama" dalla finestra di dialogo. Se "Chiuso" è selezionato, si può comporre il numero della casella vocale premendo a lungo il tasto "1" mentre si è in modalità stand-by.

Seguire le istruzioni della casella vocale.

Se il seguente messaggio viene visualizzato: "Numero di casella vocale non definito", il numero deve essere configurato per il tasto della casella vocale. Contattare l'amministratore di sistema.

Attivazione/disattivazione funzione altoparlante

Durante una chiamata, premere il tasto dedicato sinistro per attivare o disattivare la funzione altoparlante.

Attivazione/disattivazione segnali audio

Premere a lungo il tasto Suono disattivato o Muto mentre si è in modalità stand-by per attivare o disattivare i segnali audio. L'icona "Suono disattivato" indica che l'handset è silenzioso.

Premere brevemente il tasto Suono disattivato o Muto prima di rispondere a una chiamata per silenziare la suoneria.

Attivazione/disattivazione vibrazione

- 1 Nel menu impostazioni, selezionare "Suoni e notifiche", quindi "Vibrazione".
- 2 Selezionare "Attivata", "Attivata se silenzioso" (ovvero la vibrazione è attivata quando l'handset è silenzioso) oppure "Disattivata".
- 3 Premere "Selezionare".

Premere "Indietro" per salvare le impostazioni.

Bloccare/sbloccare manualmente la tastiera

Premere il tasto * per bloccare/sbloccare, quindi il tasto dedicato "Bloccare/Sì". L'icona del blocco tasti indica che la tastiera è bloccata.

Modificare il volume durante una chiamata

Premere il tasto Volume verso l'alto per aumentare il volume, verso il basso per diminuirlo. In alternativa, utilizzare il tasto Navigazione per regolare il volume.

Ricezione di un messaggio di testo

Quando si riceve un messaggio viene riprodotto un segnale acustico. Il messaggio viene visualizzato immediatamente e l'icona "Nuovo messaggio" appare sul display.

In caso di ricezione di un messaggio durante una chiamata, l'utente viene avvertito da un segnale acustico e il messaggio viene visualizzato. Il messaggio viene memorizzato nella lista messaggi.

NOTA: La possibilità di usufruire o meno della messaggistica dipende dal modello dell'handset. Consultare il Manuale di istruzioni dell'handset per ulteriori informazioni sulla messaggistica.

Lettura di un messaggio memorizzato

Aprire la lista Messaggi dal menu di messaggistica o premendo il tasto Navigazione mentre si è in modalità stand-by. Utilizzare il tasto Navigazione per scorrere la lista Messaggi. Selezionare il messaggio e premere il tasto dedicato "Visualizza" per aprirlo.

Invia messaggio

Aprire il menu di messaggistica e selezionare "Scrivi nuovo messaggio". Inserire il testo, premere il tasto dedicato "Invia" e quindi inserire un numero, oppure premere il tasto dedicato centrale per cercare un numero nella rubrica. Premere "Invia"

Cancellazione di un messaggio memorizzato

Per cancellare il messaggio, selezionarlo e premere il tasto dedicato "Altro", selezionare "Canc." e premere il tasto dedicato "Sì".

Controllare i messaggi vocali

Quando viene ricevuto un nuovo messaggio vocale viene visualizzata l'icona "nuovo messaggio vocale" e la notifica automatica della casella vocale. Premere "Chiama" per ascoltare il messaggio vocale.

5. Funzioni di allarme

Mentre il dispositivo è in modalità stand-by, si può chiamare la propria casella vocale premendo a lungo il tasto numerico "1" oppure accedere dal menu di messaggistica; in quest'ultimo, selezionare "Messaggi in arrivo", selezionare l'icona del messaggio vocale, premere il tasto dedicato "Visualizza" e infine il tasto "Chiama".

Se il numero di estensione non è disponibile, viene visualizzata la finestra di dialogo "Numero casella vocale non definito".

NOTA: Tutti i messaggi vocali sono indicati da una singola icona nella lista messaggi.

Utilizzo della rubrica

Per trovare ed effettuare una chiamata: Accedere al menu "Contatti", selezionare "Chiama contatto" e premere "Selezionare". Inserire la prima lettera del nome o il nome per intero (viene visualizzato nel campo Cerca durante l'inserimento del testo), oppure proseguire alla Lista contatti. Selezionare il nome e premere "Chiama".

Per modificare il contatto: Selezionare "Modifica contatto", selezionare il nome e premere "Modifica" due volte. Effettuare le modifiche, premere "OK" e infine "Salva". I contatti della rubrica aziendale sono contrassegnati con il simbolo , che significa che non sono modificabili.

Per aggiungere un contatto, selezionare "Aggiungi contatto", selezionare "Nuovo" oppure "Da lista chiamate". Premere "Aggiungi", inserire il nome e premere "OK". Selezionare "Numero", inserire il numero, premere "OK" e infine "Salva".

Per eliminare un contatto: selezionare "Elimina contatto", selezionare il nome, premere "Elimina" e infine premere "Sì".

Utilizzo della rubrica centrale

La rubrica centrale ricerca contatti nella banca dati centrale della rubrica aziendale. Accedere al menu "Contatti" e selezionare "Rubrica centrale". Selezionare "Cerca per nome", "Cerca per numero" oppure "Ultimo risultato". Inserire la prima lettera del nome e/o la prima lettera del cognome. Premere "Cerca". Verrà effettuata una ricerca nella rubrica centrale e verranno visualizzati i nomi corrispondenti ai criteri di ricerca. È possibile procedere alla voce successiva in ordine alfabetico premendo il tasto Navigazione. Premere "Altro" per aggiungere il contatto oppure "chiama" o il tasto di risposta per effettuare la chiamata.

5. Funzioni di allarme

NOTA: La disponibilità o meno delle funzioni di allarme dipende dal modello di handset e dal luogo di installazione. Consultare il Manuale di istruzioni dell'handset per ulteriori informazioni sulle funzioni di allarme.

Allarme a pulsante

Premere il tasto allarme due volte entro due secondi per attivare l'allarme. Vengono visualizzate delle informazioni testuali, di default viene visualizzato "Allarme personale". L'allarme viene quindi inviato al sistema centrale d'allarme e per essere distribuito ulteriormente. Quindi il sistema ritorna in modalità stand-by. Si noti che l'allarme può essere azionato in qualsiasi momento, anche se si sta parlando, modificando le impostazioni, o se il dispositivo è bloccato.

Segnale acustico di posizione

L'allarme può essere seguito da un Segnale acustico di posizione (ALS). Il segnale acustico di posizione viene emesso dall'handset per un periodo di tempo prestabilito. Il segnale può essere silenziato premendo il tasto Muto sull'handset.

Allarme di prova

Premere il tasto allarme finché non vengono visualizzate le informazioni testuali, di default viene visualizzato "Allarme di prova".

Allarme con dati

I dati dell'allarme, come numero di stanza o di edificio, possono essere inviati insieme ad un allarme. I dati devono essere definiti e memorizzati manualmente dall'utente. Per utilizzare questa funzione, uno dei tasti dedicati/memorizzati/navigazione deve essere impostato come scorciatoia per il menu "Modifica dati allarme". I dati memorizzati vengono aggiunti a tutti i tipi di allarme al momento della trasmissione.

Chiamata automatica in seguito all'allarme

L'handset può essere configurato per chiamare un numero predefinito dopo che è stato inviato un allarme. Questo numero può anche essere composto senza dover inviare l'allarme premendo un tasto a pressione che non è impostato con la funzione allarme.

6. Resistenza chimica

I caratteri alfanumerici stampati all'esterno dell'handset sono stati testati e sono risultati resistenti a scheggiatura, scolorimento o usura quando l'handset è trattato con comuni detergenti e disinfettanti per la traspirazione (non immergere, applicare il prodotto utilizzando un panno inumidito). I seguenti prodotti chimici non hanno mostrato alcun effetto nocivo:

- Etanolo all'85%
- Aseptix, H2O2
- Ipoclorito di sodio al 5%
- Clorexidina al 60% 0.5 mg/ml
- Actichlor plus, 1000 ppm di cloro
- Virkon S 1%

NOTA: L'acetone può essere dannoso per l'involucro esterno in plastica dell'handset e non deve essere utilizzato.

7. Accessori

Per gli accessori aggiuntivi come batterie di riserva, custodie e auricolari, contattare il proprio rivenditore locale.

8. Documenti correlati

Manuale d'istruzioni, Ascom d63 DECT Handset

TD 93119IT