

KORT REFERENCEVEJLEDNING



Ascom d83 DECT Handset

Indhold

1	Oversigt	1
2	Håndsættes brugergrænseflade	4
2.1	Standby-tilstand	4
2.2	Hovedmenu	7
3	Basisfunktioner	9
4	Opkald	11
5	Kontaktpersoner	12
6	Beskeder	14
7	Alarmfunktioner	15
8	Vedligeholdelse	18
9	Kemisk resistens	20
10	Relaterede dokumenter	21

1 Oversigt


Ascom d83 er et robust DECT håndsett, designet for medium til krævende miljøer såsom hospitaler, ældrepleje, kriminalforsorg, psykiatri, detailhandel, og generel virksomhedsbrug. Dets avancerede beskedfunktioner gør det ideelt til anvendelser hvor tovejs-beskeder eller interaktion med automatiseret udstyr er nødvendigt.

Dette dokument beskriver, hvordan Ascom d83 håndsettet fungerer.

Følgende d83-varianter er tilgængelige:

- Talker
- Messenger
- Protector

Se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* for mere information om de funktioner, der er tilgængelige for hver håndsettvariant.

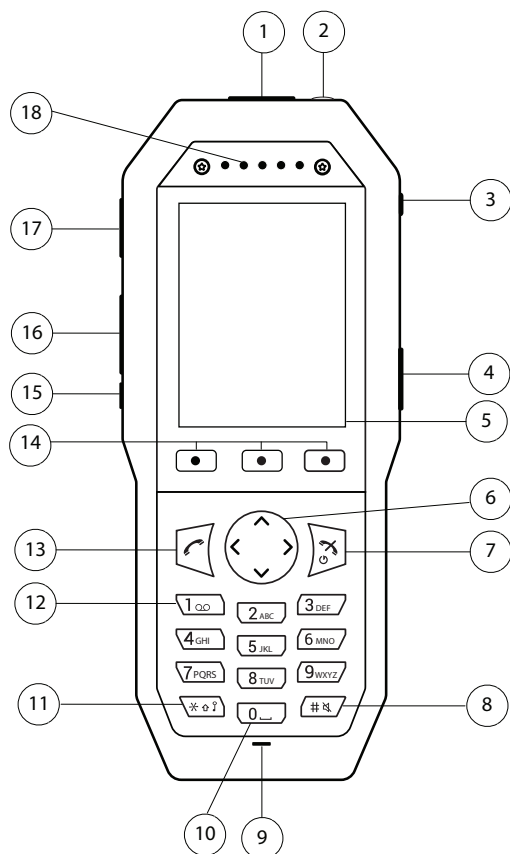

Antal	Ydre egenskaber	Beskrivelse
1	Alarmknap	Kun tilgængelige for Protector, knappen er en tryknap alarm.
2	LED-indikator	LED-indikator med flerfarvet lys. Kun tilgængelig for Messenger og Protector. Talkerlyser kun grønt, rødt og orange.
3	Snoretræk	Kun tilgængelig for Protector, den bruges som alarmfunktion med træksnorsalarm.

4	Multifunktionsknap 2	Knappen kan konfigureres til forskellige funktioner. Funktionen kan bruges både med langt og gentagne tryk. Som standard er gentagne tryk konfigureret til at sætte enheden i dvaletilstand. Bemærk: Hvis den er konfigureret, kan knappen specifikt bruges som en PTT-knap.
5	Farvedisplay	2,4" TFT farveskærm med fuld farvevisning og baggrundsbelysning.
6	Navigationstaster	Navigationstasterne venstre, højre, op og ned. Disse taster kan konfigureres for genveje.
7	Læg røret på Tænd/sluk	Bruges til at afslutte et opkald, vende tilbage til standby-tilstand, og med et langt tryk til at tænde/slukke håndsættet.
8	Lydløstast	Bruges til at tænde/slukke for hørbare signaler i standby-tilstand, slukke for ringesignalet ved indgående opkald og tænde/slukke for mikrofonen under opkald.
9	Mikrofon	Bruges ved talekommunikation.
10	Mellemrumstast	Bruges til tilføjelse af mellemrum mellem ord.
11	Tastaturlås Store/små bogstaver	Kombineret tastaturlås og skift mellem store og små bogstaver.
12	Adgang til telefonsvarer	Hurtig adgang til håndsættets telefonsvarer. Bemærk: Telefonsvareren er en systemafhængig funktion.
13	Løft røret	Bruges til at besvare et opkald og som en genvej til opkaldsliste.
14	Softkeys	De tre softkeys er placeret lige under displayet, og funktionen for hver softkey angivet med tekst i displayet lige over tasterne. I standby-tilstand kan softkeys bruges til bestemte funktioner afhængigt af konfiguration.
15	Multifunktionsknap 1	Som standard bruges den som Lydløstast. Med et langt tryk kan hørbare signaler tændes/slukkes i standby-tilstand. Med et enkelt tryk kan ringesignalet bringes til ophør ved indgående opkald, og mikrofonen kan tændes/slukkes under opkald. Denne knap kan konfigureres med forskellige funktioner. Bemærk: Kun langt tryk i standby-tilstand kan konfigureres til en anden funktion.
16	Lydstyrkeknapper	Bruges til at øge/reducere højttalerens og ringetonens lydstyrke.

17	3,5-mm stik	Standard/skrueforstærket stik, bruges til tilslutning af et headset eller ved opladning af håndsættet. Bemærk: Det er beskyttet mod støv, når det er taget ud af emballagen. Dækslet skal skrues af, for at stikket kan bruges. Bemærk: Stikket er kompatibelt med kablede headset, der er Android kompatible.
18	Højtaler	Bruges ved talekommunikation.

Softkeys, hotkeys og multifunktionstaster

Hot- og softkeys kan konfigureres til at give adgang til hyppigt anvendte funktioner, en genvej i menuen, eller afsendelse af en meddelelse.

Alle knapperne **2–9** kan indstilles som en hotkey. Tryk og hold et vilkårligt nummer nede i standby-tilstand for at bruge en genvej til opkaldslisten¹.

To multifunktionsknapper kan programmeres til forskellige funktioner ved brug af et langt tryk eller dobbelt tryk.



Multifunktionsknap 1 kan kun programmeres til brug af et langt tryk. Se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* for mere information.

Se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* for mere information om softkeys og hotkeys.

1. Denne konfiguration bruges som standard.

2 Håndsættes brugergrænseflade


Håndsættets brugergrænseflade er inddelt i to separate skærme.

- **Standby-tilstand** er håndsættes hovedskærm, hvor du kan finde information om den aktuelle dato og klokkeslæt samt ejer-id. Se [2.1 Standby-tilstand, Side 4](#) for mere information.
- **Hovedmenu** giver adgang til funktioner, såsom beskeder, opkald, kontakter osv. Se [2.2 Hovedmenu, Side 7](#) for mere information.
Se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* for den komplette liste med funktioner og deres anvendelse.

2.1 Standby-tilstand

Dette afsnit giver et overblik over standby-skærmlayoutet sammen med de ikoner og tekster, der vises på skærmen.

Figur 1. Eksempel på skærm i standby-tilstand

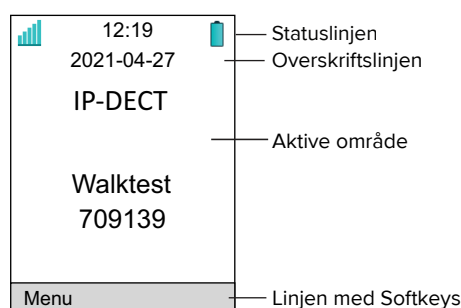

Statuslinjen viser ikoner, der giver brugeren oplysninger om signalstyrke, batteristatus, højttaler fra, ubesvarede opkald, nye beskeder/telefonsvarer, tastaturlås/telefonlås og tid. Denne række er altid synlig på alle skærme.

Overskriftslinjen viser headset-forbindelse, Bluetooth®-forbindelse/Bluetooth headset-forbindelse, ikon for headset med ledning, synkroniseringsikon og dags dato.

Det *Aktive område* viser information, såsom brugeridentitet, der leveres af systemet og/eller et ejer-id, hvis det er konfigureret, samt Man-down- og No-movement funktioner. Dette er også området til tekst i dialogvinduet, for eksempel *Ubesvarede opkald*, eller til bekræftelse af en handling.

Linjen med Softkeys bruges til funktionstaster, der kan anvendes som genveje til funktioner i håndsættet.

Rullepanelet findes til højre i det *Aktive-område*. Bliver synligt, når et menuskærmbillede har mere end seks rækker, eller hvis den fulde tekst i en besked ikke kan vises på skærmen.

Vis ikoner og tekster

Funktioner og indstillinger, der er tilgængelige for brugeren, vises som ikoner og tekst på displayet. I dette afsnit beskrives status- og systemikoner og deres funktioner.

Tabel 1 Beskrivelse af status og systemikoner

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Signalstyrke	Angiver signalstyrke. Ikonet er placeret under statuslinjen.
	Fuldt batteriniveau	Angiver, at batteriet har 75 til 100 % kapacitet tilbage. Alle ikoner, der angiver batterikapacitet, er placeret på statuslinjen.

Tabel 1 Beskrivelse af status og systemikoner (fortsat)

	Højt batteriniveau	Angiver, at batteriet har 50 til 75 % kapacitet tilbage.
	Medium batteriniveau	Angiver, at batteriet har 25 til 50 % kapacitet tilbage.
	Lavt batteriniveau	Angiver, at batteriet har 10 til 25 % kapacitet tilbage.
	Meget lavt batteriniveau	Angiver, at batteriet har 7 til 10 % kapacitet tilbage.
	Advarsel om tomt batteri	Ikonet blinker på statuslinjen og angiver, at batteriet har 7 % eller mindre kapacitet tilbage.
	Opladningen er stoppet	Ikonet vises, når omgivelsestemperaturen er uden for de tilladte grænser. Bemærk: Ikonet vises kun, når håndsættet er slukket under opladning.
	Indgående opkald	Angiver indgående opkald og besvarede opkald. Ikonet vises på opkaldslisten, når opkaldet modtages.
	Ubesvaret opkald	Angiver ubesvarede opkald. Ikonet vises på opkaldslisten og listen med ubesvarede opkald.
	Udgående opkald	Angiver udgående opkald. Ikonet vises på opkaldslisten, når der foretages et opkald.
	Push to talk	Ikonet føjes til alle indgående, udgående, ubesvarede og besvarede PTT-opkald på opkaldslisten/ubesvarede opkald. Bemærk: Ikonet tilføjes, når en PTT-invitation kun administreres som et opkald.
	Ny besked (sendt fra et andet håndsæt)	Angiver, at der er modtaget en ny sms (eller beskeder). Ikonet vises på statuslinjen og i indbakken. Bemærk: Ikonet vises, indtil alle nye beskeder i indbakken er læst. Bemærk: Gælder kun for Messenger og Protector.
	Ny besked (sendt fra systemet)	Angiver, at systemet har sendt en ny besked. Ikonet vises på statuslinjen og i indbakken. Bemærk: Ikonet forbliver på statuslinjen, indtil alle nye beskeder i indbakken er læst. Bemærk: Ikonet for beskeder, der sendes af systemet, har en højere prioritet end ikonet for beskeder, der sendes af et andet håndsæt på statuslinjen. Bemærk: Gælder kun for Messenger og Protector.
	Sendt besked	Angiver, at der er sendt en tekstbesked. Ikonet vises på listen over sendte beskeder. Bemærk: Gælder kun for Messenger og Protector.

Tabel 1 Beskrivelse af status og systemikoner (fortsat)

	Læst besked	Indikerer at en tekstbesked blev læst. Ikonet vises i indbakken. Bemærk: Gælder kun for Messenger og Protector.
	Usendt besked	Angiver, at en besked ikke er sendt. Ikonet vises på listen over usendte beskeder. Bemærk: Gælder kun for Messenger og Protector.
	Ny telefonsvarerbesked.	Angiver, at du har modtaget en ny telefonsvarerbesked. Ikonet vises på statuslinjen. Bemærk: Ikonet forbliver på statuslinjen, indtil telefonsvareren er aflyttet. Bemærk: Adgang til telefonsvareren er en systemafhængig funktion.
	Mikrofon fra	Angiver, at mikrofonen er slået fra. Ikonet vises under det igangværende opkald i det aktive område. Bemærk: Under et PTT-opkald er mikrofonen inaktiv, når PTT-knappen slippes.
	Højttaler til	Angiver, at højttaleren er slået til. Ikonet vises på Softkeys linjen under et opkald.
	Højttaler fra	Angiver, at højttaleren er slået fra. Ikonet vises på Softkeys linjen under et opkald.
	Lydløs	Angiver, at ringsignalerne er slået fra. Ikonet vises på statuslinjen, når knapperne Højttaler fra eller Lydløs trykkes ned og holdes inde.
	Slukket lydsignal	Angiver, at ringesignalet er slået fra. Ikonet vises på statuslinjen, når ringetonen er angivet til <i>Lydløs</i> .
	Bluetooth	Angiver, at Bluetooth er aktiveret. Ikonet vises på overskriftslinjen.
	Bluetooth-headset	Angiver, at der er tilsluttet et Bluetooth-headset til håndsættet. Ikonet vises på overskriftslinjen.
	Headset	Angiver, at der er tilsluttet et headset med ledning til håndsættet. Ikonet vises på overskriftslinjen.
	Tastaturlås	Angiver et låst tastatur. Ikonet vises på statuslinjen.
	Telefonlås	Angiver et låst håndsæt. Ikonet vises på statuslinjen.
	Man-down alarm	Angiver, at Man-down alarmfunktionen er aktiveret. Ikonet vises i området Aktiv. Bemærk: Gælder kun for ProductVersion3Protector.
	No-movement alarm	Angiver, at en No-movement alarmfunktion er aktiveret. Ikonet vises i området Aktiv. Bemærk: Gælder kun for ProductVersion3Protector.

Tabel 1 Beskrivelse af status og systemikoner (fortsat)

	Snoretræk	Angiver, at alarmfunktion med træksnorsalarm er aktiveret. Bemærk: Gælder kun for ProductVersion3Protector.
	Profil aktiv	Angiver, at en profil er aktiv. Ikonet vises i nederste venstre del af området Aktiv. Bemærk: Hvis der vises en fejlmeddelelse eller advarselsmeddelelse på håndsættets display flyttes ikonet til overskriftslinjen.
	PDM-synkronisering	Angiver, at håndsættet kommunikerer med WinPDM/Device Manager via Desktop Programmer.
	Talker-ikon	Angiver, at håndsættet er en Talker-model. Ikonet er placeret i højre del af området Aktiv.
	Messenger-ikon	Angiver, at håndsættet er en Messenger model. Ikonet er placeret i højre del af området Aktiv.
	Protector-ikon	Angiver, at håndsættet er en Protector-model. Ikonet er placeret i højre del af området Aktiv.


2.2 Hovedmenu

Dette afsnit giver et overblik over de funktioner, der er tilgængelige i **Hovedmenuen**, samt instruktioner om, hvordan du får adgang til menuen på dit håndsæt.



De tilgængelige funktioner i **Hovedmenuen** varierer imellem håndsætvarianter. Se [Tabel 2 Oversigt over hovedmenuen, Side 8](#) for en liste med håndsættets tilgængelige funktioner og en kort beskrivelse af dem..

Figur 2. Eksempel på skærbilledet Hovedmenu

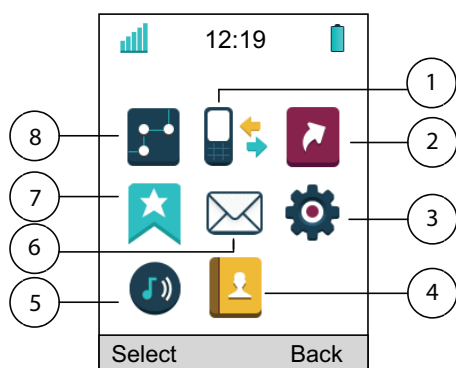

1. Opkald
2. Genvejstaster
3. Indstillinger
4. Kontaktpersoner
5. Profiler
6. Beskeder
7. Tjenester
8. Forbindelser

Tabel 2 Oversigt over hovedmenuen

	Menuen Kontaktpersoner giver adgang til alle navne/numre i de lokale telefonbøger og firmatelefonbøger. Firmaets telefonbog med op til 1.000 poster kan downloades til håndsættet via WinPDM/Device Manager. Der er også adgang til central telefonbog* fra menuen Kontaktpersoner .
	Menuen Tjenester indeholder forprogrammerede funktioner. Bemærk: Tjenester gælder kun for Messenger og Protector.
	Menuen Beskeder indeholder funktioner til håndtering af beskeder, såsom læsning og skrivning af beskeder. Bemærk: Beskeder gælder kun for Messenger og Protector.
	Menuen Opkald indeholder opkaldslist, opkaldstid og opkaldstjenester*. Opkaldstjenester er konfigureret i ManagingSystemsWinPDM/Device Manager.
	Menuen Forbindelser indeholder Bluetooth-forbindelse, valg af headset, netværksvalg og valg af indstillinger ved opladning.
	Menuen Indstillinger indeholder personlige håndsætindstillinger, såsom ændring af lydstyrken på ringetonen, sprogvalg osv.
	Genvejsmenuen indeholder genveje til softkeys, hotkeys, navigationstaster og multifunktionsknapper.
	Menuen Profiler gør det muligt at tilføje op til fire forskellige profiler. Profilen "Normal" er aktiv som standard.

* Denne funktion er systemafhængig.

Navigation i hovedmenuen

Tryk på Softkey **i menuen** i standby-tilstand for at komme ind i menuen.

Brug navigationstasten til at bevæge dig rundt i menuen.

Tryk på den tilsvarende Softkey under displayet for at vælge en indstilling.

3 Basisfunktioner

I det følgende afsnit beskrives, hvordan du bruger de grundlæggende funktioner i Ascom d83-håndsættet. Det anbefales at læse dette afsnit, når du bruger håndsættet for første gang. Se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* for en kort beskrivelse af alle tilgængelige funktioner.

Tænd håndsættet

Når slukket, skal du trykke på og holde knappen **Læg røret på** inde,  til håndsættet vibrerer og displayet lyser.

Sluk håndsættet

1. Tryk **på** Læg røret på i standby-tilstand .
2. Dialogvinduet **Sluk?** vises. Bekræft ved at trykke **Ja**.

Lås/lås op for tastaturet manuelt

Tryk på knappen **Lås**  for at låse tastaturet og tryk så på Softkeyen **Lås**.

Et låst tastatur angives af ikonet **Hængelås** på  statuslinjen.

Tryk på knappen **Lås** for at låse tastaturet op.  Når dialogvindue **Lås op?** vises, trykker du på **Ja**.

Slå den automatiske lås til/fra

1. I menuen **Indstillinger** vælg **Låse** → **Automatisk tastaturlås**.
2. Vælg **Til** eller **Til, undtagen opkald**, eller **Fra**.

Slå højttaleren til/fra

- Tryk på  softkeyen for at slå højttaleren til under opkaldet.
- Tryk på  softkeyen for at slå højttaleren fra under opkaldet.

Slå lydsignaler til/fra

Der er to forskellige metoder til at slå ringetoner og meddelelseslyde til/fra:

- I standby-tilstand trykker du og holder knappen **Højttaler fra** eller  knappen **Lydløs med**. Ikonet **Højttaler fra** vises  på statuslinjen for at vise, at håndsættet er sat på lydløs. Tryk og hold tasten **Højttaler fra** eller knappen **Lydløs** nede igen for at slå signalerne til.
- I standby-tilstand trykker du på knappen **Lydstyrke ned** flere gange, indtil styrken på ringelyden er indstillet til **Lydløs**. Ikonet **Lydløs**  vises på statuslinjen for at vise, at håndsæt er sat på lydløs. Tryk én gang på knappen **Lydstyrke op** en gang for at slå lyden i håndsættet til.

Slå vibratoren til/fra

1. I menuen **Indstillinger** vælg **Lyde og advarsler** og vælg derefter **Vibratorsignal**.
2. Vælg **Til**, **Til ved lydløs** (det betyder, at vibratoren er aktiv, hvis håndsættet er sat til lydløs) eller **Fra**.

Juster lydstyrken

Tryk på knappen **Lydstyrke** for at øge lydstyrken, og på knappen **Lydstyrke ned** for at sænke lydstyrken. Under et opkald kan du bruge enten navigationstasterne op/ned eller lydstyrkeknapperne til justering af lydstyrken.

4 Opkald

I dette afsnit beskrives, hvordan opkaldsfunktionen bruges på Ascom d83-håndsættet.

Foretag et opkald

Opkald kan foretages på forskellige måder, f.eks. ved manuelt at ringe til telefonnummeret ved hjælp af opkaldslisten eller telefonbogen. Gør følgende for at foretage et opkald:

- I standby-tilstand ringer du til nummeret og trykker på **Løft røret**  eller på softkeyen **Opkald**.
- I standby-tilstand trykker du på **Løft røret** , og vælger et nummer på opkaldslisten.
- Tryk på en forprogrammeret hotkey eller en softkey i standby-tilstand.
- Vælg et tal i den lokale telefonbog i **Kontaktpersoner → Ring til kontakt**. Vælg et navn på listen eller brug søgefunktionen, tryk derefter på knappen **Løft røret**, eller  på softkeyen **Opkald**.
- Vælg et nummer i den centrale telefonbog² i **Kontaktpersoner → Central telefonbog**. Søg kontaktpersonen efter navn, nummer eller seneste resultat. Tryk på knappen **Løft røret** eller  på softkeyen **Opkald**.

Besvar opkald

Når opkaldet er modtaget, trykker du på knappen **Løft røret** eller  på softkeyen **Accepter** for at besvare opkaldet.

Afslut opkaldet

Under et opkald skal du trykke på knappen **Læg røret på** eller  på softkeyen **Afslut** for at afslutte opkaldet. Varigheden af opkaldet vises på displayet.

Opkaldsoplysningerne gemmes i **Opkald → Opkaldsliste**.

Afvis opkaldet

Når opkaldet er modtaget, skal du trykke på knappen **Læg røret på** eller softkeyen  **Afvis** for at afvise opkaldet.

2. Denne funktion er systemafhængig

5 Kontaktpersoner

I dette afsnit beskrives, hvordan menuen **Kontaktpersoner** bruges på Ascom d83-håndsættet. Specifikt hvordan du søger, tilføjer, redigerer og sletter kontakter i din lokale telefonbog, og hvordan du bruger den centrale telefonbog.

Søg efter en kontaktperson i den lokale telefonbog

1. I standby-tilstand trykker du navigationstasten ned³, eller gå til **Kontaktpersoner → Ring til kontakt** for at åbne den lokale telefonbog.
2. Vælg en kontaktperson på listen eller søg efter et navn/nummer ved hjælp af feltet **Søg**.
3. Vælg navnet, og tryk på knappen **Løft røret**  eller på softkeyen **Opkald** for at foretage et opkald.

Tilføj en ny kontaktperson til den lokale telefonbog

1. I menuen **Kontaktpersoner**, vælger du **Tilføj kontakt → Ny**.
2. Vælg **Navn** og tryk på softkeyen **Tilføj**.
3. Angiv navnet på kontaktpersonen, og tryk på softkeyen **OK**, når du er færdig.
4. Vælg **Arbejdsnummer**, **Mobilnummer**, eller **Andet nummer** og tryk på softkeyen **Tilføj**.
5. Angiv kontaktpersonens nummer, og tryk på softkeyen **OK**, når du er færdig.
6. Tryk på softkeyen **Gem**.

Tilføje en Ny kontaktperson fra opkaldslisten

1. I menuen **Kontaktpersoner**, vælger du **Tilføj kontakt → På opkaldslisten**.
2. Vælg nummeret på listen, og tryk på softkeyen **Tilføj**.
3. Vælg **arbejdsnummeret**, **mobilnummeret**, eller **Andet nummer** og tryk på softkeyen **Vælg**.
4. Hvis du vil ændre kontaktpersonens navn, skal du markere **Navnet** og trykke på softkeyen **Rediger**. Hvis du vil tilføje navnet på kontaktpersonen, skal du vælge **Navn** og trykke på softkeyen **Tilføj**.
5. Angiv kontaktpersonens navn, og tryk på **OK**, når du er færdig.
6. Tryk på softkeyen **Gem**.

Rediger en kontaktperson i den lokale telefonbog

1. Vælg **Rediger kontaktperson** i menuen **Kontaktpersoner**.
2. Vælg kontaktpersonen, og tryk på softkeyen **Rediger**.
3. Foretag de nødvendige ændringer, og tryk på softkeyen **Gem**.

En kontaktperson i telefonbogen er markeret med symbolet , hvilket betyder, at det ikke er muligt at redigere.

Slet en kontaktperson i den lokale telefonbog

1. Vælg **Slet kontaktperson** i menuen **Kontaktpersoner**.
2. Marker kontaktpersonen, og tryk på softkeyen **Slet**.
3. Tryk på **Ja** for at bekræfte.

3. Hvis navigationstasten ikke er konfigureret til en anden funktion.

Brug den centrale telefonbog

Den centrale telefonbog viser kontakter, der er tilgængelige for alle i den centrale telefonbog.

1. Vælg **Central telefonbog**i menuen **Kontakter**.
2. Vælg **Søg efter navn** eller **Søg efter nummer**, eller **Sidste resultat**⁴.
3. Begynd at indtaste det eller de første bogstaver i fornavn, efternavn, begge dele eller telefonnummeret.
4. Tryk på softkeyen **Søg**. Den centrale telefonbog viser de matchende navne på displayet. Du kan gå til den næste post i alfabetisk rækkefølge ved hjælp af navigationstasterne.
5. Tryk på softkeyen **Mere** for at få vist kontaktpersonen, tilføj denne til listen med kontaktpersoner eller send en meddelelse til den valgte kontaktperson.
Tryk på knappen **Løft røret** eller  på softkeyen **Opkald** for at foretage et opkald.

4. Indstillingen **Seneste resultat** i den **centrale telefonbog** viser de kontakter, der sidst blev søgt efter.

6 Beskeder

I dette afsnit beskrives, hvordan menuen **Beskeder** bruges på Ascom d83-håndsættet. Specifikt hvordan man skriver og sender nye beskeder, læser og sletter de gemte meddelelser samt hvordan man bruger telefonsvarer-funktionen.



Alle funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, gælder kun for Messenger og Protector.

Indgående meddelelser

Når der modtages en ny sms, vises ikonet **Ny meddelelse** og indholdet af meddelelsen vises automatisk på displayet. Ikonet **Ny meddelelse** forbliver på skærmen, indtil alle nye meddelelser læses.

Den indgående meddelelse ledsages normalt af beskedadvarselssignalet og/eller vibrationerne samt blinkende LED.

Hvis du vil åbne og læse den modtagne meddelelse senere, skal du trykke på **Luk**. Meddelelsen gemmes automatisk i **Beskeder → Indbakke**.

Læs den modtagne meddelelse

1. Vælg **Indbakke** i menuen **Beskeder**, eller tryk på navigationstasten op⁵ i standby-tilstand.
2. Vælg beskeden på listen.
3. Tryk på softkeyen **Vis** for at læse beskeden.

Skriv og send beskeden

1. Vælg **Skriv ny besked** i menuen **Beskeder**.
2. Skriv teksten, og tryk på softkeyen **Send**.
3. Angiv nummeret, eller brug indstillingen **Telefonbog**  for at vælge kontaktpersonen på listen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på softkeyen **Send** for at sende beskeden. Dialogboksen **Meddelelse sendt** viser, at beskeden er sendt.

Slet en besked

Du kan slette alle modtagne, ikke sendte og sendte meddelelser.

1. I menuen **Beskeder** vælger du **Indbakke** eller **Ikke sendt**, eller **Sendt**.
2. Vælg den besked, der skal slettes.
3. Tryk på softkeyen **Mere**.
4. Vælg **Slet** eller **Slet alle** i pop op-menuen.
5. Tryk på **Ja** for at bekræfte. Beskeden(erne) er slettet.

Tjek telefonsvareren

En ny besked på telefonsvareren angives af ikonet **Talebesked**,  der vises på statuslinjen.

Hvis ikonet **Talebesked** vises på statuslinjen, skal du holde den numeriske tast **1** nede i standby-tilstand for at lytte til den modtagne besked på telefonsvareren. Hvis lokalnummeret ikke er tilgængeligt, vises et **telefonsvarernummer** i dialogvinduet, der ikke er defineret.

5. Hvis navigationstasten ikke er konfigureret til nogen anden funktion.

7 Alarmfunktioner



Gælder kun for Protector. Tilgængelighed af alarmfunktion afhænger af installationsmiljøet. Se *Ascom d83 User Manual, TD 93434EN* for mere information.

Trykknalarm

Der kan indstilles to forskellige alarmtyper til håndsettets alarmknap. En alarm kan enten være en **Trykknalarm** med en personlig alarmfunktion eller en **Testalarm**, der bruges til test af den personlige alarm. Hver af alarmtyperne bliver aktiveret på en af følgende måder: langt tryk eller flere tryk. Som standard defineres det lange tryk som en testalarm, og flere tryk (dobbeltryk) defineres som en personlig alarm.

Når alarmen sendes, vises dialogboksen *Personlig alarm* (standardtekst til flere tryk) eller *Testalarm* (standardtekst til langt tryk) på displayet. Alarmen sendes til alarmcentralen, der fordeler den videre.

Det er muligt at udløse alarmen under andre aktiviteter såsom tale, redigering af indstillingerne, eller mens håndsettet er låst.



Trykknalarmen kan være lydløs, hvis den konfigureres af en administrator. Lydløse alarmer er beregnet til potentielt farlige miljøer, og de ledsages ikke af signaler eller andre indikationer.

Alarm med træksnor

Håndsettet er udstyret med et stik til træksnor på siden. Der skal fastgøres en træksnor til stikket for at bruge alarmen. En træksnor har en clips til fastgørelse på en beklædningsgenstand. Hvis nogen forsøger at fjerne håndsettet fra brugeren, frigives magnetstikket, og alarmen aktiveres. Ikonet **Træksnor** viser,  at alarmen er aktiveret.

Aktiver alarmen med træksnor

1. I **menuen** vælg **Indstillinger** → **Alarm** → **Aktiver alarm**.
2. Vælg alarmen med træksnor. Ikonet  vises nederst på displayet.

Deaktiver alarmen med træksnor

1. I **menuen** vælg **Indstillinger** → **Alarm** → **Aktiver alarm**.
2. Vælg den alarm med træksnor, der skal deaktiveres.

Nulstil alarm med træksnor

Fastgør træksnoren til stikket på siden af telefonen.

Man-down & No-movement alarm

Håndsettet kan også programmeres til at sende **Man-down** og **No-movement** alarmer til at give personlig sikkerhedsovervågning. Disse alarmer er velegnede til arbejdspladser, hvor der kræves maksimal sikkerhed og tilgængelighed. Hvis der sker en ulykke, informeres kolleger og ledelse inden for få sekunder, og den person, der har brug for hjælp, kan lokaliseres med det samme.

Man-down alarmen udløses, hvis håndsettet vippes (som standard 45°) fra lodret position i en foruddefineret periode (som standard i 7 sekunder). Ikonet **Man-down**  viser, at alarmen er aktiveret.

Alarmen No-movement udløses, hvis der ikke registreres nogen bevægelse i en foruddefineret periode (som standard i 30 sekunder). Ikonet **No-movement** viser  , at alarmen er aktiveret.

I advarselsfasen giver håndsettet en LED-indikation, en lyd og et vibrerende signal (afhængigt af indstillingerne) i en foruddefineret periode (som standard 7 sekunder). Samtidig viser håndsettet advarslen *Man-down*. *Annuller?* eller *No-movement* advarsel. *Annullere?* meddelelse. Håndsettet sender derefter alarmen, medmindre alarmen bliver annulleret.

Håndsettet bekræfter, at alarmen er blevet sendt ved at give et bip, en LED-indikation og vibrerende alarm. Samtidig viser håndsettet den sendte *Man-down* alarm eller meddelelsen *No-movement* alarm sendt.

Alarmfunktionerne *Man-down* og *No-movement* er inaktive under følgende omstændigheder:

- Håndsettet er placeret i en oplader.
- Under opkald (afhængigt af indstillingerne), for at undgå falske alarmer, hvis brugeren vipper håndsettet eller ikke bevæger sig under et opkald.
- I en foruddefineret periode (som standard i 10 minutter), hvis der trykkes på **knappen Lydløs** eller softkeyen **OK** i advarselsfasen i advarselsdialogen.

Aktiver/deaktiver *Man-down*- og/eller *No-movement* alarm

1. I menuen **Indstillinger** vælg **Alarm → Aktiver alarm**.
2. Vælg **Man-down** eller/og **No-movement**. Det eller de tilsvarende ikon(er) vises i området Aktiv.

Følg de samme trin for at deaktivere alarmen.

Annuller *Man-down* og/eller *No-movement* alarm

Når håndsettet går ind i advarselsfasen og *Man-down* advarslen. *Annuller?* eller *No-movement* advarsel. *Annuller?* vises, gør et af følgende for at annullere alarmen:

- Tryk på softkeyen **OK**.
- Tryk på en vilkårlig tast, herunder knappen på et headset med ledning⁶.
- Flyt håndsettet til opretstående stilling (til *Man-down* alarm)⁷

Forsink *Man-down* og/eller *No-movement* alarm midlertidigt

Tryk på knappen **Lydløs** i advarselsfasen, og tryk derefter på **Ja** for at bekræfte, *Forsinkelse af MD/NM-registreringen?* Det tilsvarende display-ikon blinker, indtil alarmen er aktiv igen (standard 10 min.).

Nulstil *Man-down* og/eller *No-movement* alarm

Gå et af følgende for at nulstille alarmfunktionen:

- Flyt håndsettet til oprejst position (efter *Man-down* alarm).
- Flyt håndsettet (efter *No-movement* alarm).
- Tryk på en vilkårlig knap⁸ herunder headset-knappen med ledning.
- Tryk på knappen **Lydløs**, hvis ALS lyder.

6. Undtaget er Bluetooth-headset knapper.

7. Konfigureret af systemadministratoren.

8. Undtagen knappen Alarm.

Akustisk lokaliseringssignal

En alarm kan efterfølges af et akustisk lokaliseringssignal (ALS). ALS er et signal fra håndsættet, der advarer i en foruddefineret periode. Signalet kan gøres lydløst ved at trykke på knappen **Lydløs**.

Alarm med data

Data kan føjes til alle typer alarmer ved transmission. Data skal defineret manuelt og gemmes af brugeren.

Alarmen kan konfigureres under **Indstillinger → Alarm → Rediger alarmdata**.

Automatisk opkald efter alarm

Håndsættet kan konfigureres til at ringe til et foruddefineret nummer, efter at en alarm er blevet sendt.

8 Vedligeholdelse

I dette afsnit beskrives, hvordan du vedligeholder håndsettet med fokus på udskiftning og opladning af batterier.

Håndsettet har et genopladeligt batteri, der kan oplades separat fra håndsettet. Ved opladning af batteri skal du bruge opladeren til batteripakken. Hvis du vil oplade håndsettet sammen med batteriet, skal du gøre det enten med en stationær oplader, en ladereol eller ved hjælp af ledningsopladeren på 3,5 mm.



Tag hensyn til følgende:

- Brug kun opladeren inden for temperaturområdet +5 °C – +40 °C.
- Ledningsopladeren på 3,5 mm fås kun med et EU-stik.
- I en bordoplader eller en ladereol fungerer håndsettet med få undtagelser. For eksempel vibrerer håndsettet ikke, når det placeres i opladeren.

Oplad håndsettet

Opladning af håndsettet sammen med batteriet foretages i en bordoplader eller en ladereol.

1. Placér håndsettet i bordopladeren eller ladereolen og tryk forsigtigt håndsettet ned for at sætte det helt ind (se A på billedet nedenfor).
2. Hvis håndsettet er isæt korrekt, vises meddelelsen **I oplader** på displayet, LED-indikatoren lyser orange, og der vises et animeret batteriikon på skærmen for at angive, at opladningen er startet.

Når LED-indikatoren lyst grønt, og der vises et fuldt opladet ikon, er batteriet fuldt opladet. Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne håndsettet fra opladeren eller ladereolen:

1. Vip håndsettet mod (se B på billedet nedenfor).
2. Løft håndsettet op (se C på billedet nedenfor).



Det anbefales ikke at løfte håndsettet opad, før du vipper det ind mod dig selv.

Figur 3. Eksempel på, hvordan håndsettet indsættes og tages ud af bordopladeren



Oplad batteri

1. Sluk for håndsættet.
2. Skyd låsen på batteridækslet til højre for at frigøre batteridækslet.
3. Når du trykker på og holder den øverste del af clipsen nede, kan du tage batteriet ud af håndsættet.
4. Anbring batteriet i opladeren. Skyd batterilåsen til venstre. Hvis batteriet er korrekt isæt, lys LED-indikatoren på batteriopladeren gul for at vise, at batteriet oplades.
5. Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren lyser grøn.

Udskift batteri

Hvis batteriets kapacitet og ydeevne falder, skal batteriet udskiftes med et nyt. Kontakt systemadministrator eller leverandøren af håndsættet for nye batterier.

Følg nedenstående trin for at udskifte batteriet:

1. Følg trinnene 1-3, der er beskrevet i [Oplad batteri, Side 19](#).
2. Isæt et fuldt opladet/nyt batteri i, mens du trykker på og holder den øverste del af clipsen nede.
3. Skub batteridækslets lås til venstre for at låse det. Håndsættet starter automatisk, når batteriet er isat.

9 Kemisk resistens

De alfanumeriske tegn, der er trykt på ydersiden af håndsættet, er blevet testet og fundet resistente over for krakelering, falmning eller tegn på slid, når håndsættet udsættes for almindelige rengøringsmidler, desinfektionsmidler eller sved. Acetone kan beskadige håndsættets plastkabinet og bør ikke anvendes.

Følgende kemikalier har ikke vist nogen skadelige virkninger:

- 3 % saltsyre
- M-alkohol (70 % methyleret ætanol)
- Klorhexidin 60 %, 0,5 mg/ml

10 Relaterede dokumenter

Ascom d83 User Manual, TD 93434EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom