

Lynvejledning



Ascom Myco 4

ascom



Introduktion

Ascom Myco™ 4 understøtter strømlinede arbejdsgange, hurtige svar og faktabaserede beslutninger. Ascom Myco 4-smartphonen i virksomhedsklassen leverer handlingsrettede, kontekstrige oplysninger til mobilt personale inden for sundhedspleje, produktion og andre krævende miljøer. Håndsettet er baseret på Android™ og indeholder flere Ascom-løsninger, der supplerer Ascoms missionskritiske udvidelser.

Denne lynvejledning (QRG) giver et kort overblik over de mest almindelige funktioner og egenskaber på Ascom Myco 4-håndsettet.

Billederne i lynvejledningen viser et håndsett med en engelsk brugergrænseflade. Nogle af funktionerne i denne lynvejledning kan adskille sig fra dem på dit håndsett afhængigt af systemkonfigurationen. Billederne af skærmen kan derfor også adskille sig fra dem på dit håndsett.

Husk at læse de sikkerhedsinstruktioner, der følger med produktleveringen, før du bruger håndsettet.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Ascom Myco er et varemærke tilhørende Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Indholdsfortegnelse

Oversigt

Håndsæt	1
Håndsettmodeller	2
Knapper	2

Visninger

Håndsettvisninger	3
-------------------	---

Kommunikation

Opkald og meddelelser	4
-----------------------	---

Meddelelser

Oversigt over meddelelser	5
Administration af meddelelser	5
Meddelelsesskuffe	6

Indstillinger

Hurtige indstillinger	7
-----------------------	---

Sikkerhed

Håndsettets sikkerhed	8
-----------------------	---

Batteri

Hot swap-batteri	9
Lavt batteri	9
Udskiftning af batteri	10

SIM-kort

SIM-kort	11
----------	----

Opladning

Opladningsmetoder	12
Bordoplader	12
Laderack til håndsett	13
USB-C-kabel	13
Batteriladerack	14

Håndsæt



- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 Øverste multifunktionsknap | 10 Nærhedssensor | 19 Håndledsrem |
| 2 Stregkodelæser* | 11 Øresnegl-højtaler | 20 Hovedhøjtaler |
| 3 Ascom IR-positionering* | 12 Hovedskærm | 21 Udskifteligt farve mærkat |
| 4 Mikrofon (øverste) | 13 Port til træksnor* | 22 Multifunktionsknap 2 |
| 5 Flerfarvet LED-meddelelseslys | 14 Bagkamera | 23 Strømknap med biometrisk læser |
| 6 Multifunktionsknap 3 | 15 Lommelygte | 24 Ladestik |
| 7 Multifunktionsknap 4 | 16 Klips | 25 USB-C-port |
| 8 Lydstyrkeknapper | 17 Batteri | 26 Mikrofon (nederste) |
| 9 Frontkamera | 18 Lås på batteridæksel | |

* Ikke tilgængelig i Slim-modellen.

Håndsætmodeller

Ascom Myco 4 findes i tre varianter:

	Ascom IR-positionering	Stregkode-læser	Alarm med træksnor	SIM-kortstik*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Nej
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Ja	Ja	Ja	Ja
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	Nej	Nej	Nej	Nej

* SIM-kortstikket er placeret i batterirummet, se side 11.

Knapper

Håndsættet har en strømknap (tænd/sluk), lydstyrkeknapper og fire programmerbare multifunktionsknapper.

Multifunktionsknapper

Afhængigt af programmeringen kan multifunktionsknapperne bruges til forskellige formål. For eksempel at scanne en stregkode, sende en alarm, starte en app eller bruge den som Push-to-Talk-knappen (PTT).

Strømknap (med biometrisk læser)

Tryk og hold knappen nede, indtil strømmenuen vises, for at genstarte eller slukke for håndsættet.

Tryk for at låse og sætte skærmen i dvaletilstand.

Tryk for at vække skærmen fra dvaletilstand, eller tryk for at låse håndsættet op, når der føjes mindst ét fingeraftryk til håndsættet.

Lydstyrkeknapper

Tryk på **+** for at øge og **–** for at sænke lydstyrken.

Håndsætvisninger

Startskærmen er håndsættets hovedvisning med genveje til forskellige apps og funktioner.

Skærmen Alle apps er visningen med alle de apps, der er installeret på håndsættet.

Navigere mellem visninger

For at få adgang til skærmen Alle apps skal du stryge opad fra bunden af startskærmen.

For at komme tilbage til startskærmen skal du stryge ned på skærmen Alle apps eller trykke på Tilbage eller Hjem.

Tryk på Oversigt for at se listen over alle aktuelt aktive apps.

Alternativt kan du trykke to gange på Oversigt for at skifte direkte til den foregående app.


Startskærm

Skærm Alle apps




Opkald og meddelelser

- 1 På skærmen Alle apps skal du trykke på ikonet **Telefon** . Alternativt kan du åbne appen fra genvejspanelet på startskærmen.
- 2 Vælg mellem at ringe til telefonnummeret manuelt eller vælge en kontakt i Hurtigkald , Opkaldshistorik eller Kontaktpersoner .

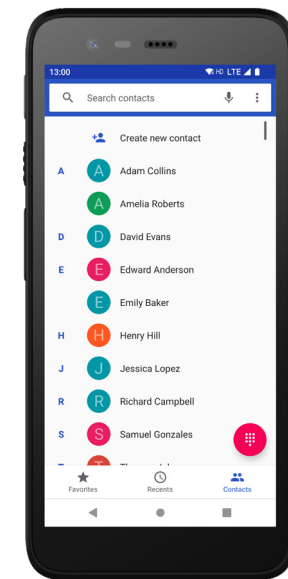

- 1 På skærmen Alle apps skal du trykke på ikonet **Beskeder*** . Alternativt kan du åbne appen fra genvejspanelet på startskærmen.
- 2 Tryk på ikonet **Start chat** for at skrive en ny besked, eller tryk på en eksisterende samtale for at læse og besvare den.


* Ikke tilgængelig på modeller med kun Wi-Fi.

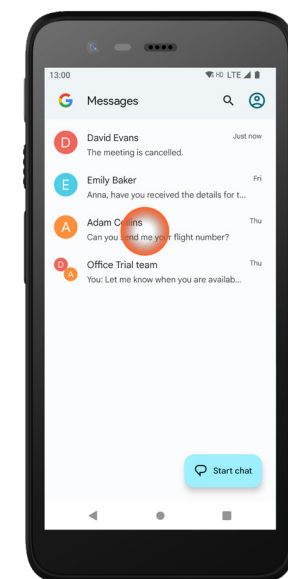

Oversigt over meddelelser

Meddelelser vises forskellige steder og i forskellige formater, f.eks. ikoner på statuslinjen eller som detaljerede tekster i meddelelsesskuffen.

- 1 Ikon/app-ikon
- 2 Titel/overskrift
- 3 App-navn
- 4 Tidsstempel
- 5 Udvidelsesindikator
- 6 Understøttende tekst
- 7 Hurtige handlinger

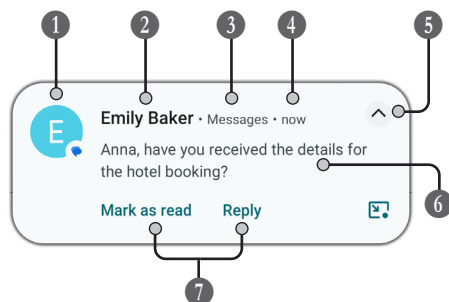




Administration af meddelelser

Der er tre måder at reagere på meddelelser fra den låste skærm:

Tryk på udvidelsesindikatoren , eller stryg meddelelsen ned for at se hele indholdet.

Tryk på meddelelsen for at åbne appen, der sendte den.

Stryg til venstre eller højre for at afvise meddelelsen (hvis tilladt).

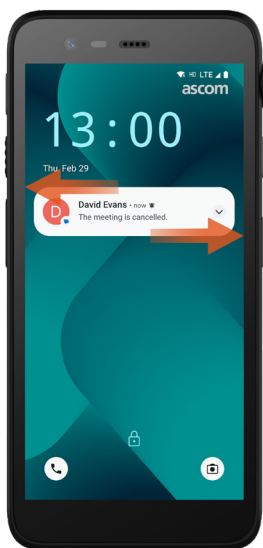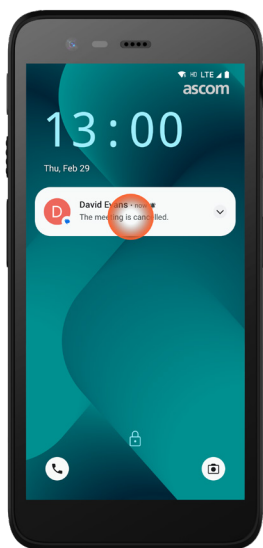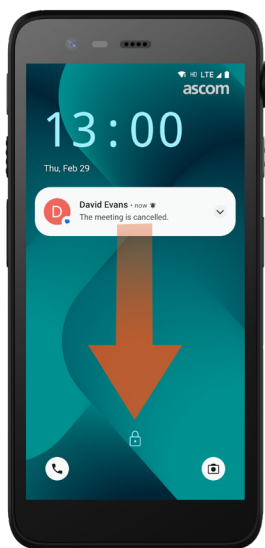

Meddelelsesskuffe

Indgående meddelelser vises først som ikoner på statuslinjen øverst på skærmen for at vise, at der er nye oplysninger i meddelelsesskuffen.





Meddelelsesskuffen viser en liste med alle meddelelser såsom alarmer, samtaler og app-meddelelser.

Du kan åbne meddelelsesskuffen både i ulåst tilstand og på låseskærmen.

Stryg ned fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsesskuffen.

Stryg opad eller tryk uden for meddelelsen for at skjule meddelelsesskuffen.

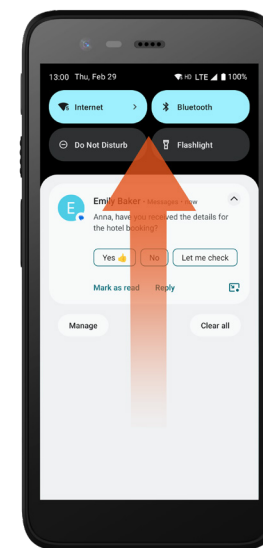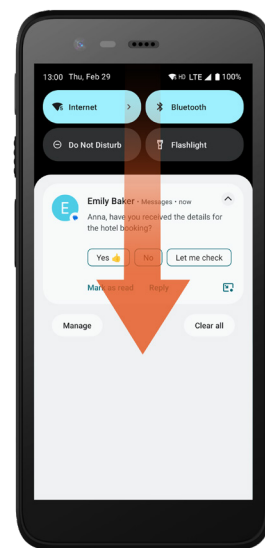

Hurtige indstillinger




Panelet Hurtige indstillinger kan bruges til at foretage nogle hurtige ændringer i Ascom Myco 4, såsom at ændre skærmens lysstyrke eller sætte håndsættet i batterisparetilstand.

Du kan åbne panelet Hurtige indstillinger både i ulåst tilstand og på låseskærmen.

Hvis du vil se et udvalg af indstillinger, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Indstillingerne er over meddelelsesskuffen.

For at åbne hele panelet Hurtige indstillinger skal du stryge ned to gange fra toppen af skærmen.

For at slå en indstilling til/fra skal du trykke på det tilsvarende indstillingsfelt.

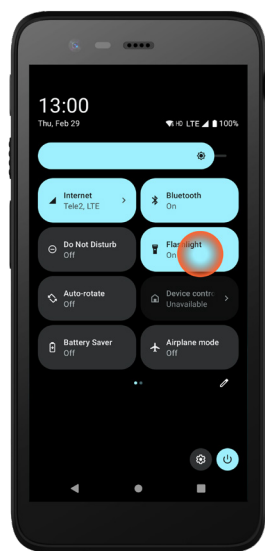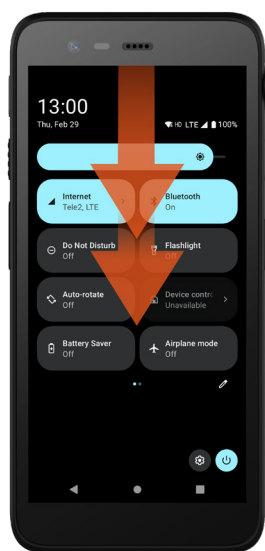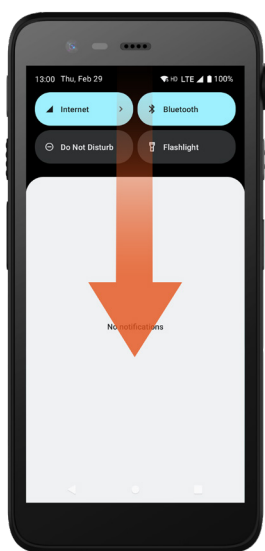

Håndsættets sikkerhed

Følg disse anbefalinger for at sikre, at håndsættet kun er tilgængeligt for det tilsigtede personale:

- Låsenheden (sluk for skærmen), før du efterlader den uden opsyn.
- Undgå ændringer i alle indstillinger, der kan forringe sikkerheden, f.eks. ved at øge skærmens timeout.
- Brug en af følgende metoder til skærmlåsning: mønster, PIN-kode eller adgangskode.

Ændre skærmlåsning

For at ændre metoden for skærmlåsning skal du gå til skærmen Alle apps og trykke på **Indstillinger** . Tryk derefter på **Sikkerhed** → **Skærmlås**. Vælg kun en af følgende:

- **Mønster** til at tegne et mønster for at låse håndsættet op.
- **Pinkode** for at indtaste en PIN-kode for at låse håndsættet op.
- **Adgangskode** for at indtaste en adgangskode for at låse håndsættet op.

Hot swap-batteri

Ascom Myco 4 har et batteri, der nemt kan udskiftes uden at slukke for håndsettet eller forlade dine aktive apps. Med hot-swap-funktionen kan du fortsætte med at arbejde og bruge dine apps, selv når batteriet udskiftes.

- Når du fjerner batteriet, fungerer håndsettet i yderligere 60 sekunder.
- Hvis batteriet ikke udskiftes inden for 60 sekunder, slukkes håndsettet.

Lavt batteri

Hvis batteriniveauet er lavt, skal du oplade batteriet eller skifte det til et fuldt opladet batteri så hurtigt som muligt.


20%	Et lavt batteriniveau er angivet med et advarselssignal og meddelelsen <i>Vil du aktivere Batterisparefunktion?</i> .
10% – 2%	Et meget lavt batteriniveau er angivet med et advarselssignal, der lyder ved hver procent batteriet oplades, og meddelelsen <i>Vil du aktivere Batterisparefunktion?</i> . Tryk på Slå lyden fra for at slå advarselssignalet fra.
1%	Et tomt batteri er angivet med vibrationer og et advarselssignal, der lyder hvert femte sekund, og meddelelsen <i>Vil du aktivere Batterisparefunktion?</i> . Tryk på Slå lyden fra for at slå advarselssignalet fra. BEMÆRK: Vibrationen forbliver tændt, selvom håndsettet er placeret i tilstanden Forstyr ikke/Lydløs.

Udskiftning af batteri

- 1 Skyd låsen på batteridækslet til højre for at frigøre batteridækslet.



- 2 Når du trykker på og holder den øverste del af klipsen nede 1, løfter du batteriet 2 og tager det ud 3.

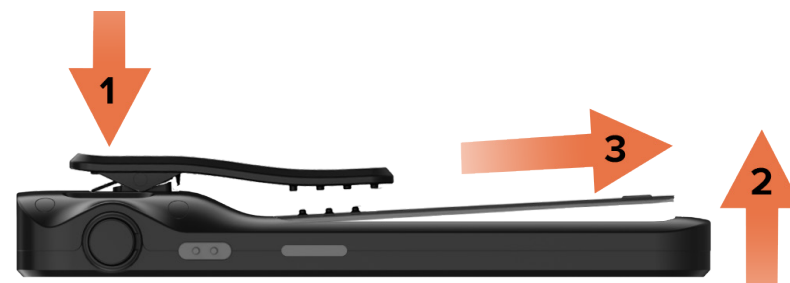

- 3 Tryk på klipsen, og hold den nede igen. Indsæt et fuldt opladet eller nyt batteri, og tryk det på plads.
- 4 Tryk let på batteriet, og skub låsen til batteridækslet til venstre for at låse batteriet.

Batteriet er indsat korrekt, hvis det er helt på linje med håndsettets kabinet.

SIM-kort*

Indsæt SIM-kort

- 1 Sluk for håndsættet, lås derefter op, og fjern batteriet.
- 2 Sæt forsigtigt SIM-kortet i SIM-kortstikket, der er angivet med SIM-kortsymbolet på etiketten i batterirummet.



- 3 Tryk SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, indtil du hører et klik.
SIM-kortet er indsat korrekt, hvis det er helt på linje med siden af batterirummet.
- 4 Indsæt batteriet, og lås det på plads. Håndsættet kan nu tændes.

Fjern SIM-kort

- 1 Sluk for håndsættet, lås derefter op, og fjern batteriet.
- 2 Tryk SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, indtil du hører et klik, og træk derefter SIM-kortet ud for at fjerne det.
- 3 Indsæt batteriet, og lås det på plads. Håndsættet kan nu tændes.

* Ikke tilgængelig på modeller med kun Wi-Fi.

Opladningsmetoder

Brug en af følgende lademetoder for at oplade håndsættet:

- Bordoplader.
- Laderack til håndsæt.
- USB-C-kabel.

Hvis du vil oplade batteriet separat fra håndsættet, skal du bruge et laderack. BEMÆRK: En ladeadapter er påkrævet.

Bordoplader

- 1 Sæt håndsættet i opladningsrillen. Skub håndsættet ind i opladeren for at sætte det helt i. Hvis håndsættet er indsat korrekt, vises opladningsskærmen, der viser batteriopladningsniveauet og ejerens id/navn.
- 2 Når det grønne flueben vises på skærmen, og LED'en lyser grønt, er batteriet fuldt opladet.
- 3 For at frakoble håndsættet skal du vippe håndsættet mod dig selv 1 og derefter løfte håndsættet opad 2 for at fjerne det fra opladeren.



Laderack til håndsæt

- 1 Sæt håndsættet i opladningsrillen. Skub håndsættet ind i opladeren for at sætte det helt i. Hvis håndsættet er indsat korrekt, vises opladningsskærmen, der viser batteriopladningsniveauet og ejerens id/navn.
- 2 Når det grønne flueben vises på skærmen, og LED'en lyser grønt, er batteriet fuldt opladet.
- 3 For at frakoble håndsættet skal du vippe håndsættet mod dig selv ❶ og derefter løfte håndsættet opad ❷ for at fjerne det fra opladeren.



USB-C-kabel

- 1 Åbn dækslet til opladningsstikket nederst på håndsættet.
- 2 Sæt USB-C-kablet i opladningsstikket, og slut USB-strømforsyningen til en stikkontakt.
- 3 Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren lyser grøn.
- 4 Fjern USB-C-kablet, og luk opladningsstikket.



Batteriladerack

Installér batteriadapter

Inden opladning af et Ascom Myco 4-batteri skal du installere opladningsadapteren.

- 1 Placer adapteren i en opladningsrillen på laderacket.
- 2 Skub batteridækslets lås til venstre for at låse det.

Når adapteren er korrekt installeret, er den låst ordentligt på plads.

Opladning af batteriet

- 1 Tag batteriet ud af håndsættet, og anbring det i en batteriladerack med en opladningsadapter.
- 2 Tryk let på batteriet, og skub låsen til batteridækslet til venstre for at låse batteriet. Hvis batteriet er blevet korrekt indsat, bliver LED-indikatoren rød for at vise, at batteriet oplader.
- 3 Batteriet er mindst 80% opladet, når LED-indikatoren lyser grøn.
- 4 Skyd låsen på batteridækslet til højre for at frigøre batteridækslet.
- 5 Løft batteriet, og træk det ud af opladeren.



Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sverige

Telefon: +46 31 55 93 00

www.ascom.com