

Guida di riferimento rapido



Ascom Myco 4

ascom



Introduzione

Ascom Myco™ 4 supporta flussi di lavoro semplificati, risposte rapide e decisioni basate su fatti. Lo smartphone Ascom Myco 4 di livello aziendale fornisce informazioni fruibili e contestuali al personale mobile del settore sanitario, manifatturiero e in altri ambienti difficili. L'handset è basato su Android™ e comprende varie soluzioni Ascom che completano l'offerta Android standard.

Questa Guida di riferimento rapido (QRG) fornisce una breve panoramica delle caratteristiche più comuni dell'handset Ascom Myco 4.

Le immagini all'interno della guida QRG mostrano un handset con interfaccia utente in inglese. Alcune funzioni e screenshot descritti in questa guida QRG possono differire da quelli dell'handset in uso in base alla configurazione del sistema e alla versione dell'handset.

Prima di utilizzare l'handset, ricordarsi di leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al prodotto.

Le informazioni fornite in questo documento sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Ascom Myco è un marchio di fabbrica di Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google Play e altri marchi e loghi correlati sono marchi di fabbrica di Google LLC.

Indice

Panoramica

Handset	1
Modelli di handset	2
Pulsanti	2

Navigazione

Navigazione dell'handset	3
--------------------------	-------------------

Comunicazione

Chiamate e messaggi	4
---------------------	-------------------

Notifiche

Panoramica delle notifiche	5
Gestione delle notifiche	5
Area Notifiche	6

Impostazioni

Riquadro Impostazioni rapide	7
------------------------------	-------------------

Sicurezza

Sicurezza dell'handset	8
------------------------	-------------------

Batteria

Funzione Hot Swap	9
Batteria scarica	9
Sostituzione della batteria	10

Scheda SIM

Scheda SIM	11
------------	--------------------

Carica

Carica dell'handset	12
Carica della batteria	14

Handset



- 1 Pulsante multifunzione superiore

2 Scanner codice a barre professionale*

3 Posizione IR Ascom*

4 Microfono superiore

5 LED multicolore

6 Pulsante multifunzione 3

7 Pulsante multifunzione 4

8 Tasti volume

9 Fotocamera frontale
- 10 Sensore di prossimità

11 Altoparlante auricolare

12 Display principale

13 Porta con cordinella a strappo*

14 Fotocamera posteriore**

15 Torcia

16 Clip

17 Batteria

18 Blocco del coperchio batteria
- 19 Attacco del cinturino da polso***

20 Altoparlante principale

21 Adesivo a colori intercambiabile

22 Pulsante multifunzione 2

23 Pulsante di accensione con lettore biometrico

24 Connettore di carica

25 Porta USB-C con coperchio

26 Microfono inferiore

* Non è disponibile sul modello Slim.
** Si utilizza per la scansione del codice a barre sul modello Slim.
*** Non è disponibile sul modello Slim Cellular.

Modelli di handset

Ascom Myco 4 è disponibile in cinque versioni:

	Posizione IR Ascom	Scanner codice a barre professionale	Porta con cordinella a strappo	Slot per scheda SIM*
Ascom Myco 4, Wi-Fi	Sì	Sì	Sì	No
Ascom Myco 4, Cellular Wi-Fi	Sì	Sì	Sì	Sì
Ascom Myco 4 Slim, Wi-Fi	No	No	No	No
Ascom Myco 4 Slim, Cellular Wi-Fi	No	No	No	Sì
Ascom Myco 4, DECT Wi-Fi	Sì	Sì	Sì	No

* Lo slot per scheda SIM si trova nel vano batteria, vedere a [pag. 11](#).

Pulsanti

L'handset è dotato di un pulsante di accensione, pulsanti del volume e quattro pulsanti multifunzione configurabili.

Pulsanti multifunzione

In base alla configurazione specifica, i pulsanti multifunzione possono essere usati per scopi diversi: ad esempio, per la scansione di un codice a barre, l'invio di un allarme, l'avvio di un'app o l'utilizzo come pulsante PTT (Push-to-Talk).

Pulsante di accensione (con lettore biometrico)

Premere e tenere premuto per accendere l'handset.
Premere per bloccare e mettere lo schermo in modalità sospensione.
Premere per riattivare lo schermo dalla modalità sospensione o, quando viene aggiunta almeno un'impronta digitale all'handset, per sbloccarlo.
Per spegnere l'handset, premere e tenere premuto il pulsante di accensione insieme al pulsante del volume su fino a quando non appare il menu di spegnimento.

Tasti volume

Premere Su + per aumentare o Giù - per diminuire il livello del volume.

Navigazione dell'handset

La schermata Home è la visualizzazione principale dell'handset e presenta i collegamenti a varie app e funzioni.

Per accedere al riquadro dell'app, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata Home. Il riquadro dell'app contiene tutte le app installate sull'handset.

Per tornare alla schermata Home, scorrere verso il basso nel riquadro dell'app oppure toccare **Indietro** o **Home**.

Toccare **Panoramica** per visualizzare l'elenco di tutte le app attualmente attive.


In alternativa, toccare due volte **Panoramica** per passare direttamente all'app precedente.

Schermata Home



Pannello Collegamento

Riquadro dell'app

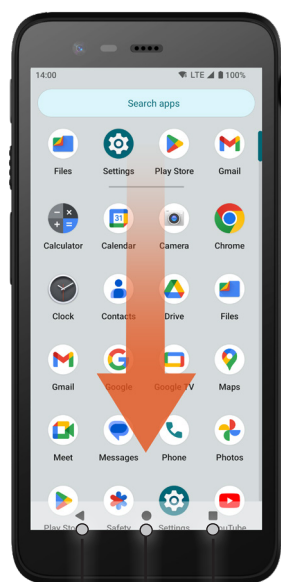


Indietro

Home

Panoramica


Chiamate e messaggi

- 1 Nel riquadro dell'app, toccare **Telefono** . In alternativa, aprire l'app dal riquadro di collegamento nella schermata Home.
- 2 Scegliere tra la composizione manuale del numero di telefono oppure selezionare un contatto da Chiamata rapida , Cronologia o Contatti .

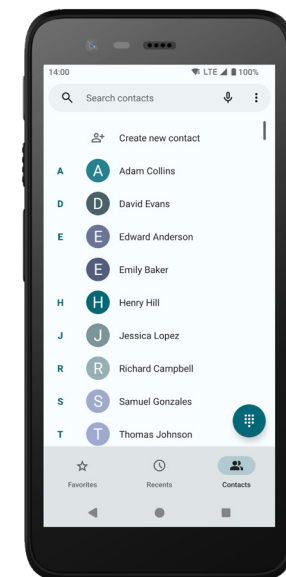

- 1 Nel riquadro dell'app, toccare **Messaggi** . In alternativa, aprire l'app dal riquadro di collegamento nella schermata Home.
- 2 Toccare **Avvia chat** per scrivere un nuovo messaggio oppure toccare una conversazione esistente per leggerla e rispondervi.


* Solo disponibile sui modelli Cellular.

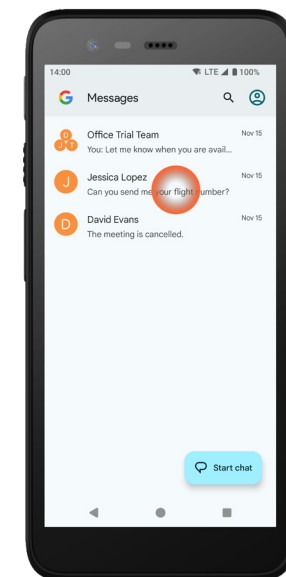

Panoramica delle notifiche

Le notifiche vengono visualizzate in posizioni e formati diversi, ad esempio sotto forma di icone nella barra di stato o testi dettagliati nell'area notifiche.

- 1 Icona/Icona dell'app
- 2 Titolo/Intestazione
- 3 Nome dell'app
- 4 Indicazione dell'ora
- 5 Indicatore di espansione
- 6 Testo di supporto
- 7 Azioni rapide

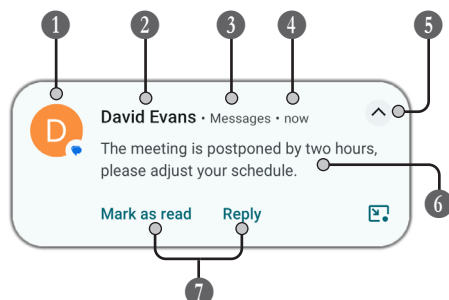




Gestione delle notifiche

Nella schermata di blocco le notifiche possono essere gestite in tre modi:

Toccare l'indicatore di espansione ▼ o far scorrere la notifica verso il basso per visualizzare l'intero contenuto.

Toccare la notifica per aprire l'app che l'ha inviata.

Scorrere verso sinistra o destra per rifiutare la notifica (se consentito).

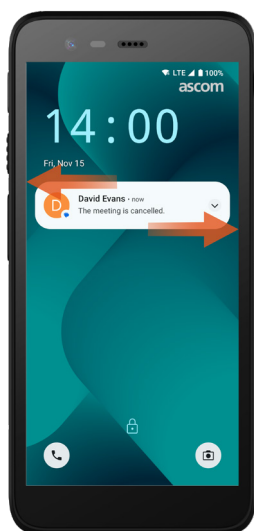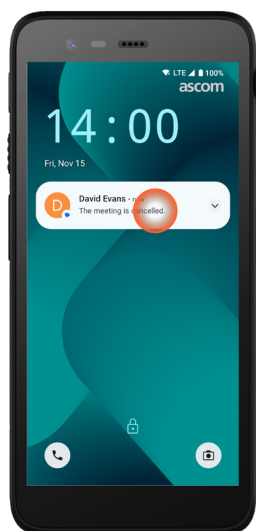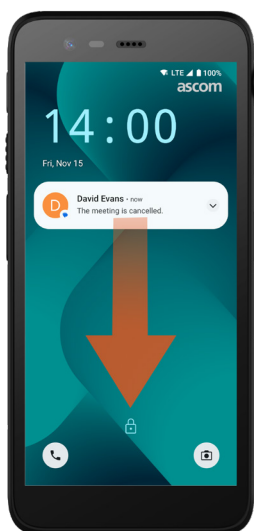

Area Notifiche

Le notifiche appaiono prima come icone nella barra di stato situata nella parte superiore dello schermo, per visualizzare la presenza di nuove informazioni nell'area notifiche.





L'area notifiche mostra un elenco di notifiche, quali chiamate senza risposta, conversazioni, messaggi delle app e del sistema.

L'area notifiche può essere aperta sia in modalità sbloccata che nella schermata di blocco.

Per aprire l'area notifiche, scorrere verso il basso partendo dall'alto della schermata.

Per nascondere l'area notifiche, scorrere verso l'alto o toccare all'esterno della notifica.

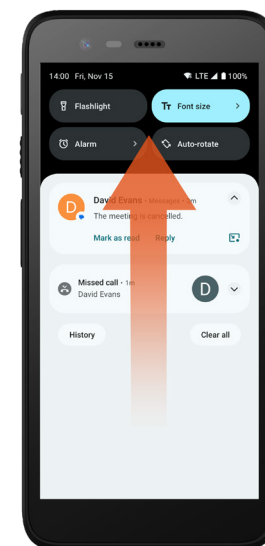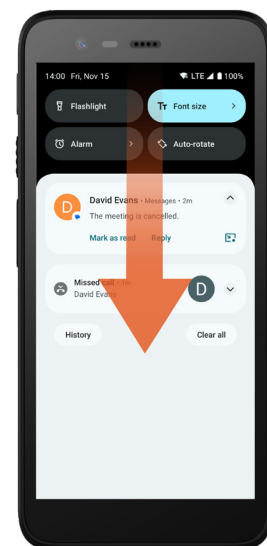

Riquadro Impostazioni rapide


Il riquadro Impostazioni rapide può essere utilizzato per apportare alcune modifiche rapide al dispositivo Ascom Myco 4 in uso, come modificare la luminosità dello schermo o impostare l'handset in modalità di risparmio energetico.

Il riquadro Impostazioni rapide può essere aperto sia in modalità sbloccata che nella schermata di blocco.

Per visualizzare una serie di impostazioni, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Le impostazioni si trovano al di sopra dell'area notifiche.

Per aprire l'intero riquadro Impostazioni rapide, scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Per attivare/disattivare un'impostazione, toccare il riquadro corrispondente.

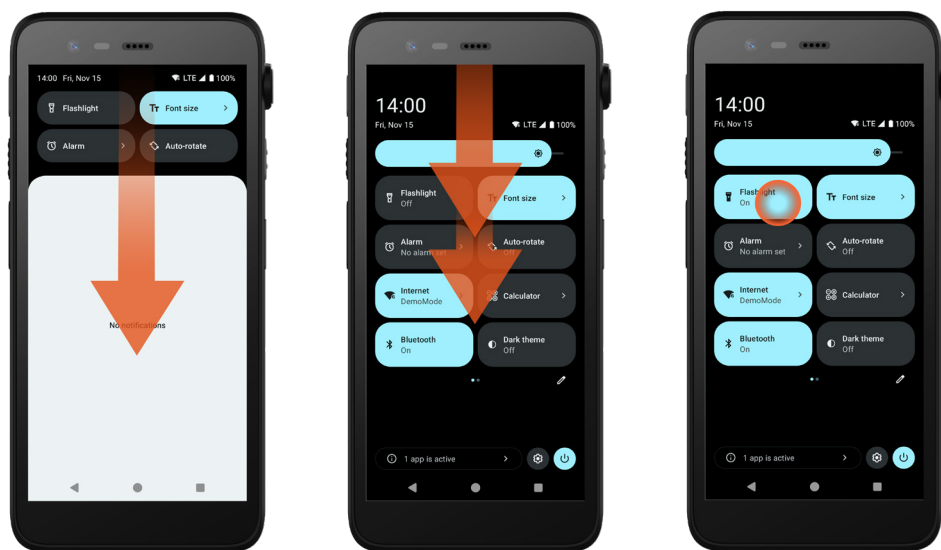

Sicurezza dell'handset

Seguire queste raccomandazioni per assicurarsi che l'handset risulti accessibile soltanto al personale autorizzato:

- Bloccare il dispositivo (spegnere lo schermo) prima di lasciarlo incustodito.
- Non modificare eventuali impostazioni che potrebbero comprometterne la sicurezza, ad esempio aumentando il timeout dello schermo.
- Utilizzare uno dei seguenti metodi di blocco schermo: sequenza, PIN o password.

Modifica del blocco schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, nel riquadro dell'app tocca **Impostazioni** .

Quindi toccare **Sicurezza e privacy** → **Sblocco dispositivo** → **Blocco schermo**.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Sequenza** per disegnare una sequenza di sblocco dell'handset.
- **PIN** per inserire un codice PIN di sblocco dell'handset.
- **Password** per immettere una password di sblocco dell'handset.

Funzione Hot Swap

Ascom Myco 4 è dotato di una batteria che può essere sostituita facilmente senza dover spegnere l'handset o uscire dalle app attive. Grazie alla funzionalità Hot Swap è possibile continuare a lavorare e utilizzare le app anche durante la sostituzione della batteria.

- Quando si rimuove la batteria, l'handset rimane funzionante per altri 60 secondi.
- Se la batteria non viene sostituita entro 60 secondi, l'handset si spegne.

Batteria scarica

Se il livello della batteria è basso, caricarla o sostituirla con una completamente carica il prima possibile.

- | | |
|----------|---|
| 20% | Un livello batteria basso viene indicato da un segnale di avviso e dalla notifica Attivare il risparmio energetico? . |
| 10% – 2% | Un livello batteria molto basso viene indicato da un segnale di avviso che emette un suono a ogni cambio di percentuale della batteria e dalla notifica Attivare il risparmio energetico? .

Toccare Disattiva suoneria per silenziare il segnale di avviso. |
| 1% | Una batteria scarica viene indicata da una vibrazione e da un segnale di avviso che emette un suono ogni cinque secondi e dalla notifica Attivare il risparmio energetico? .

Toccare Disattiva suoneria per silenziare il segnale di avviso.


NOTA: la vibrazione rimarrà attiva anche quando sull'handset è attiva la modalità Non disturbare o la modalità silenziosa. |

Sostituzione della batteria

- 1 Far scorrere il blocco del coperchio batteria verso destra per rimuovere la batteria.



- 2 Tenendo premuta la parte superiore della clip 1, sollevare la batteria 2 per estrarla 3.

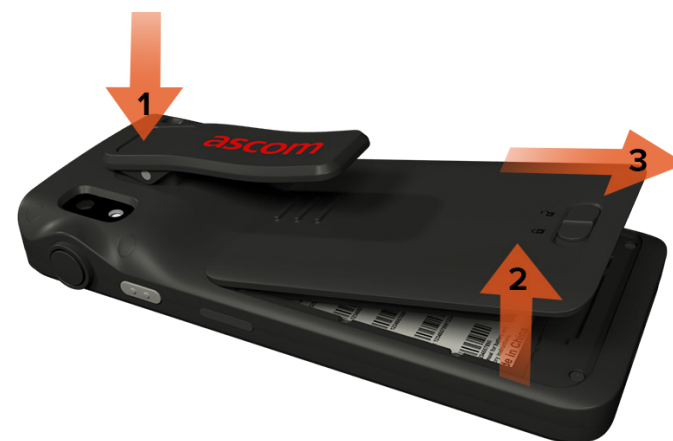

- 3 Tenere premuta ancora una volta la clip. Inserire una batteria completamente carica o nuova esercitando una certa pressione.
- 4 Premere leggermente sulla batteria e far scorrere il blocco del coperchio della batteria verso sinistra per bloccare la batteria.

Per essere inserita in modo corretto, la batteria deve essere completamente allineata al corpo dell'handset.

Scheda SIM*

Inserimento della scheda SIM

- 1 Spegnere l'handset, quindi sbloccare e rimuovere la batteria.
- 2 Procedendo con attenzione, inserire la scheda SIM nell'apposito slot indicato dal simbolo della scheda SIM sull'etichetta presente nel vano batteria.



- 3 Spingere la scheda SIM nello slot fino a sentire uno scatto.
Per essere inserita in modo corretto, la scheda SIM deve essere completamente allineata al lato del vano batteria.
- 4 Inserire la batteria e bloccarla in sede. A questo punto è possibile accendere l'handset.

Rimozione della scheda SIM

- 1 Spegnere l'handset, quindi sbloccare e rimuovere la batteria.
- 2 Spingere la scheda SIM nello slot fino a sentire uno scatto, quindi estrarre la scheda SIM per rimuoverla.
- 3 Inserire la batteria e bloccarla in sede. A questo punto è possibile accendere l'handset.

* Solo disponibile sui modelli Cellular.


Carica dell'handset

- 1 Inserire l'handset nel modulo caricabatteria. Spingere l'handset nel caricabatteria per inserirlo a fondo. Una volta inserito correttamente, l'handset inizia a caricarsi emettendo un apposito segnale acustico.
- 2 Quando sia il simbolo della batteria sulla videata di caricamento e il LED diventano verdi, l'handset è completamente carico e mostra il livello di carica della batteria del 95% - 100%.
- 3 Per scollegare l'handset, inclinarlo verso di sé, quindi sollevarlo verso l'alto per rimuoverlo dal modulo caricabatteria.

Modulo caricabatteria singolo



Modulo caricabatteria sul caricabatteria a parete

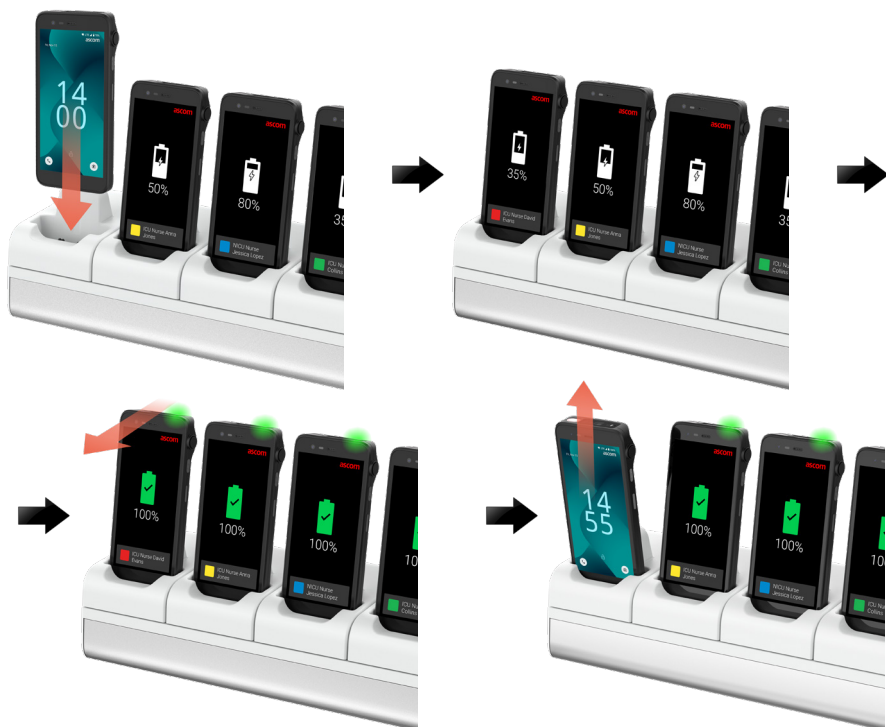

Cavo USB-C


- 1 Aprire il coperchio della porta di carica sul fondo dell'handset.
- 2 Collegare il cavo USB-C alla porta di carica e collegare l'alimentatore di corrente USB a una presa di corrente.
- 3 Quando il LED diventa verde, l'handset è completamente carico.
- 4 Scollegare il cavo USB-C e chiudere la porta di carica.




Carica della batteria

- 1 Rimuovere la batteria dall'handset e posizionarla nel modulo caricabatteria.
- 2 Spingere leggermente la batteria per bloccarla con uno scatto. Se la batteria è stata inserita correttamente, il LED diventa di colore arancione a indicare che la batteria si sta ricaricando.
- 3 Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.
- 4 Per scollegare la batteria, inclinarla verso di sé, quindi sollevarla verso l'alto per rimuoverla dal modulo caricabatteria.

Modulo caricabatteria singolo

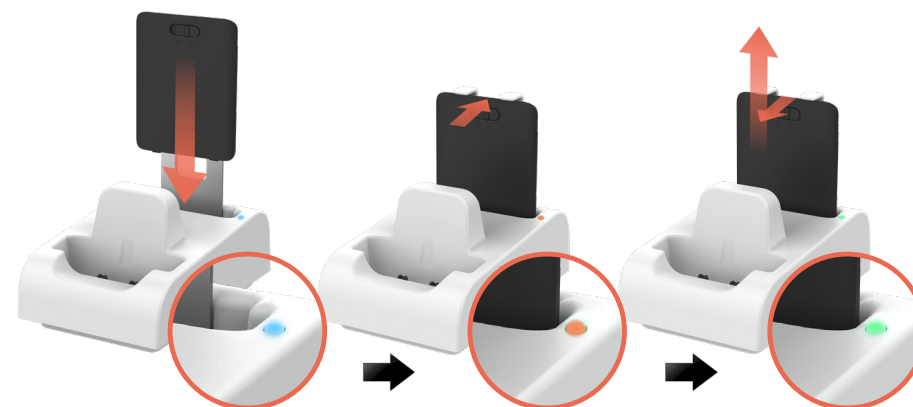

Modulo caricabatteria sul caricabatteria a parete

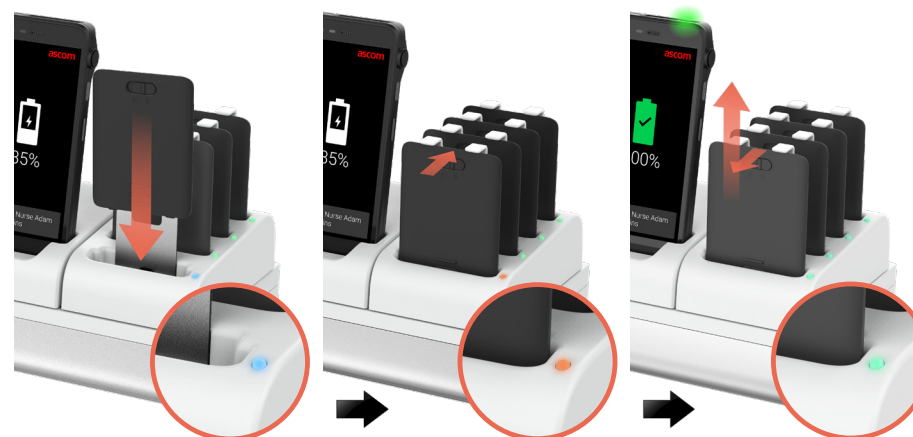

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Svezia

Telefono: +46 31 55 93 00

www.ascom.com