



Pikaopas

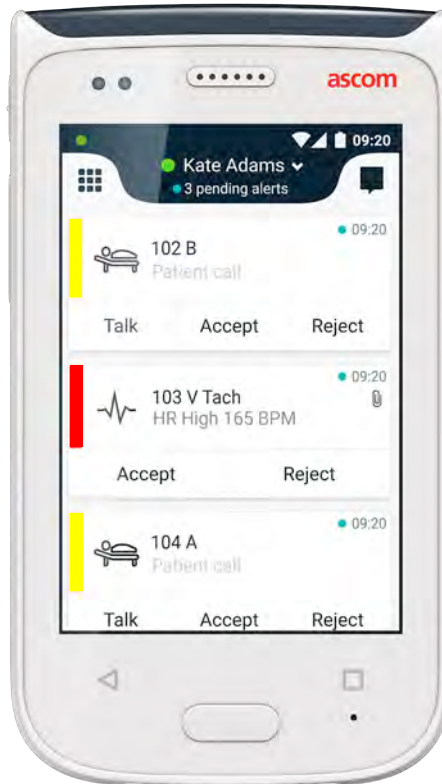

Ascom Myco 2

ascom

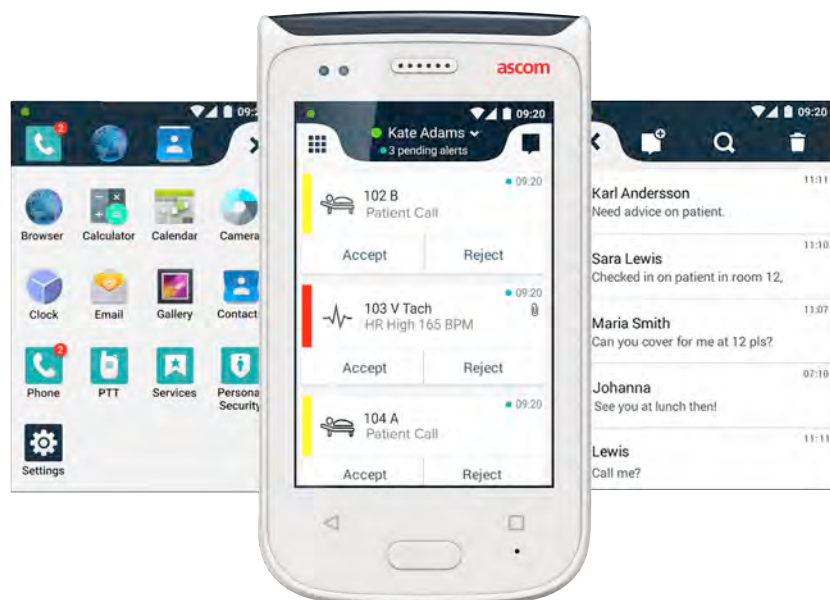

Esittely

Tämä pikaopas sisältää Ascom Myco 2 -laitteen yleisimpien toimintojen ja ominaisuuksien lyhyen yhteenvedon.

Pikaoppaan kuvissa on esillä englanninkielinen käyttöliittymä. Jotkin tässä pikaoppaassa esitellyistä toiminnoista voivat olla erilaisia kuin omassa laitteessasi riippuen järjestelmän määrittämisestä. Myös näytön kuvat voivat sen vuoksi olla erilaisia kuin oman laitteesi näytössä.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätietoja Ascom Myco 2 -laitteesta on käyttöohjeessa (vain englanninkielinen versio):

<https://www.ascom.com/MycoUserDoc>

Sisällysluettelo

Yhteenveto

Laite	1
Painikkeet	2

Näkymät

Etunäyttö	3
Näkymien välillä siirtyminen	4
Ylänäyttö	4
Imoitusruutu	5
Pikavalintaruutu	6

Kirjaudu sisään

Kirjautuminen sisään laitteeseen	7
Kirjautuminen ulos laitteesta	8

Hälytykset

Hälytysten yhteenveto	9
Hälytysten värit	9
Hälytyskuvakkeet	10
Tulevat hälytykset	11
Hälytykseen reagoiminen	12
Kriisihälytykset	12

Varoitukset

Varoitukset	13
Varoitus alhaisesta akun varaustasosta	14

Yhteydenpito

Soittaminen	15
Viestit	15

Lataaminen

Laitteen akku	16
Laitteen lataaminen	17

Laite

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Virtapainike (päälle / pois) | 10. Mikrofoni |
| 2. Äänenvoimakkuus (ylös / alas) | 11. Yhteenvetopainike |
| 3. Monitoimi- / hälytyspainike | 12. Pidikkeen vaihtuvanvärinen palkki |
| 4. Ylänäyttö | 13. Kamera/viivakoodinlukija |
| 5. Ascom IR Location (Infrapunapaikannus) | 14. Pidike |
| 6. LED-merkkivalo | 15. Akkupaketti |
| 7. Etunäyttö | 16. Akun suojakansi |
| 8. Takaisin-painike | 17. Mikro-USB-latausliitäntä |
| 9. Kotipainike | |



Painikkeet

Laitteessa on kuusi painiketta: virtapainike, äänenvoimakkuus, takaisin-painike, monitoimi- / hälytyspainike, kotipainike, yhteenvetopainike.

3 Monitoimi- / hälytyspainike

- Laitteen määrittämisestä riippuen tätä painiketta voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Voit esimerkiksi lähettää sillä henkilökohtaisen hälytyksen tai soittaa puhelun kaiutintilassa.

1 Virtapainike (päälle / pois)

- Kytke laite päälle ja pois päältä painamalla tätä painiketta pitkään.
- Herätä näyttö lepotilasta painamalla tätä painiketta.
- Lukitse ja aseta laite lepotilaan painamalla tätä painiketta.

2 Äänenvoimakkuus (ylös / alas)

- Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla tätä painiketta ylös, ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla alas.
- Aseta laite äänettömälle painamalla tätä painiketta ja pitämällä se painettuna.

8 Takaisin-painike

- Siirry taaksepäin edelliseen näkymään painamalla tätä painiketta.

9 Kotipainike

- Herätä näyttö lepotilasta painamalla tätä painiketta.
- Siirry mistä tahansa näkymästä hälytysnäkymään painamalla tätä painiketta lukitsemattomassa tilassa.

11 Yhteenvetopainike

- Katso luettelo kaikista aktiivisista sovelluksista painamalla tätä painiketta.

Etunäyttö


Etunäyttö on laitteen päänäyttö, jossa voit käyttää asennettuja sovelluksia, käsitellä hälytyksiä ja viestiä kollegojesi kanssa.

Käyttöliittymä on jaettu kolmeen erilliseen näkymään:

Hälytysnäkymä **II** on laitteen päänäkymä. Siinä näkyvät kaikki hälytykset ja niiden nykyinen tila.

Sovellusnäkymässä **I** näkyvät kaikki laitteeseen asennetut sovellukset.

Keskustelunäkymässä **III** voit lukea viestejä ja lähettää niitä kollegoillesi.

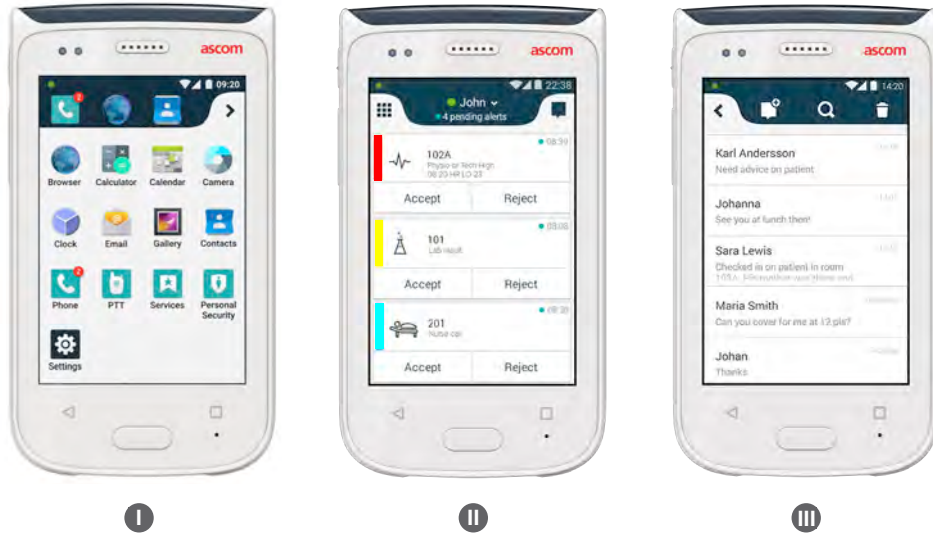

Näkymien välillä siirtyminen

Hälytysnäkymä **II** on laitteen keskellä.

Avaa Sovellusnäkymä **I** pyyhkäisemällä oikealle hälytysnäkymästä tai napauttamalla **ruudukkokuvaketta** vasemmassa yläreunassa.

Avaa Keskustelunäkymä **III** pyyhkäisemällä vasemmalle tai napauttamalla **keskustelukuvaketta** näytön oikeassa yläreunassa.

Palaa takaisin Hälytysnäkymään pyyhkäisemällä nykyisen näkymän vastakkaiseen suuntaan tai painamalla kotipainiketta.



Ylänäyttö

Kun kannat laitetta taskussasi tai kun laite on kiinnitettynä vaatteisiisi, saat yleisnäkymän tulevista hälytyksistä, viesteistä ja puheluista käyttämällä ylänäyttöä.

Jos sinulla on useita käsittelemättömiä hälytyksiä, ylänäytössä näet nopeasti tulevat hälytykset lajiteltuna niiden prioriteetin mukaan. Kun kaikki hälytykset on näytetty kerran, vanhin hälytys, jolla on korkein prioriteetti, näytetään uudelleen.



Ilmoitusruutu

Ilmoitusvalikossa on luettelo kaikista ilmoituksista, kuten hälytyksistä, keskusteluviesteistä ja varoituksista. Ilmoitukset näkyvät sekä ilmoitusvalikossa että lukitusnäytössä.

Avaa ilmoitusvalikko pyyhkäisemällä alaspäin etunäytön yläreunasta. Voit avata ilmoitusvalikon mistä tahansa näkymästä.

Piilota ilmoitusvalikko pyyhkäisemällä ylöspäin, napsauttamalla valikon ulkopuolella tai painamalla paluu- **A** tai kotipainiketta **B**.




Pikavalintaruutu

Pikavalintavalikko voidaan määrittää niin, että se sisältää enintään neljä pikavalintaa ja mahdollistaa nopean pääsyn sovelluksiin ja ominaisuuksiin.

Avaa pikavalintavalikko pyyhkäisemällä ylöspäin etunäytön alareunasta. Voit avata pikavalintavalikon mistä tahansa näkymästä.

Piilota pikavalintavalikko pyyhkäisemällä alaspäin, napsauttamalla valikon ulkopuolella tai painamalla paluu- **A** tai kotipainiketta **B**.


HUOMAA: Pikavalintavalikossa olevat pikavalinnat riippuvat järjestelmän määrityksistä. Jos et löydä pikavalintavalikkoa tai haluat muuttaa pikavalintoja, ota yhteyttä järjestelmäsi ylläpitäjään.

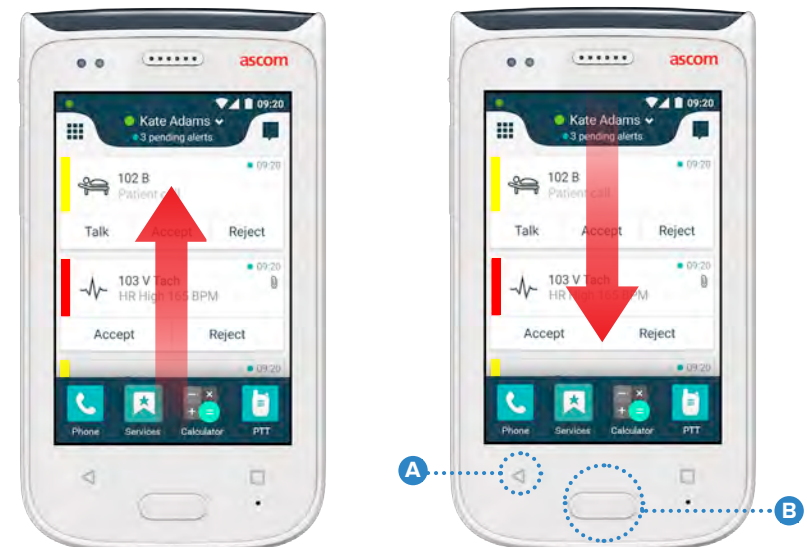

Kirjautuminen sisään laitteeseen

Järjestelmän määryksistä riippuen joidenkin toimintojen, kuten viestinvälityksen ja hälytysten hallinnan käyttö, voi vaatia sisäänkirjautumisen.

- 1 Pyyhkäise tällöin lukitusnäytössä ylöspäin näytön alareunasta, tai kaksoinapsauta sisäänkirjautumisilmoitusta. Syötä tarvittaessa PIN tai salasana.

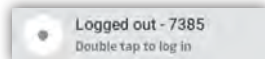

HUOMAA: Siirry hälytysnäkymään lukitsemattomassa tilassa painamalla kotipainiketta **A**.

- 2 Napsauta avoimessa hälytysnäkyssä **Log in**.
- 3 Kirjoita käyttäjänimi ja salasana niille tarkoitettuihin kohtiin ja napsauta **Log in**.



Kirjautuminen ulos laitteesta


Kirjautuminen ulos hälytysnäkyästä:

- 1 Napsauta yläpalkissa näkyvää käyttäjänimeä.
- 2 Napsauta Set your status -valikossa **Log out**.
- 3 Vahvista napsauttamalla **Log out**.



Kirjautuminen ulos ilmoitusvalikosta:


- 1 Avaa ilmoitusvalikko pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta.
- 2 Kaksoinapsauta kohtaa **Change status or log out**.
- 3 Vahvista napsauttamalla **Log out**.

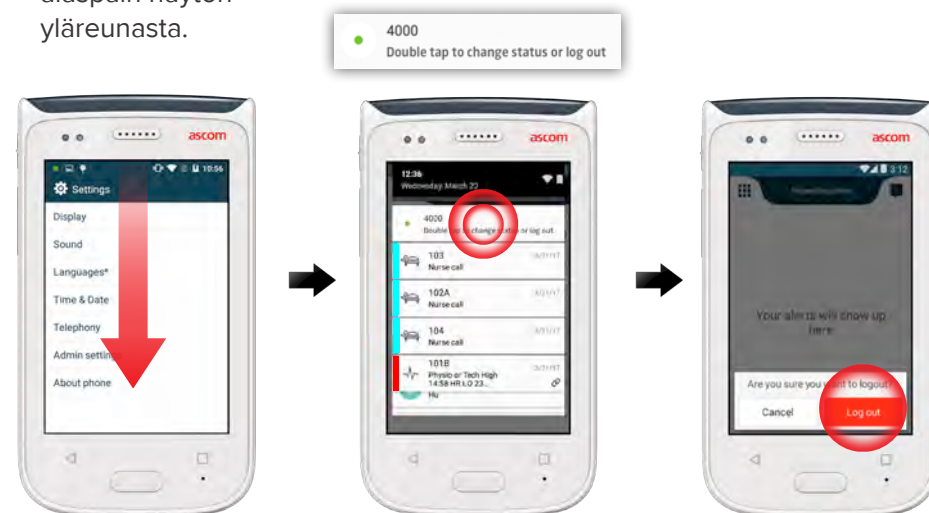

Hälytysten yhteenveto

Hälytyksillä voi olla eri prioriteetteja, luokkia ja tyyppejä. Väripalkki ilmaisee hälytyksen prioriteetin tai luokan, ja hälytyskuvake ilmaisee hälytyksen tyyppin.

1. Luokan / prioriteetin väri
2. Aihe (esim. sijainti)
3. Tapahtuman tiedot
4. Käsittelemätön hälytys
5. Aikaleima
6. Valinnat
7. Hälytyskuvake

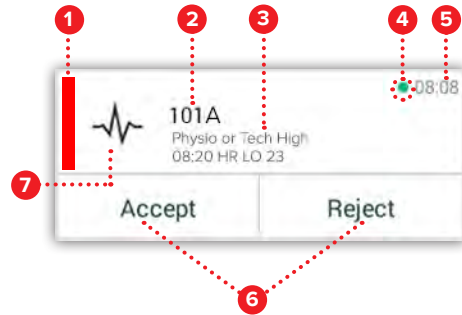


Hälytysten värit

Värejä voidaan käyttää ilmaisemaan hälytysten luokkia tai prioriteetteja. Hälytyksen värin ilmaisee kunkin hälytyksen vasemmalla puolella näkyvä väripalkki. Tulevien hälytysten osalta väri näkyy myös laitteen yläosassa olevana värillisenä LED-merkkivalona.

HUOMAA: Värien käyttö riippuu määrittämisestä, ja se voi olla erilaista eri järjestelmäasetuksissa.

Luokan / prioriteetin väri	Punainen	■
Prioriteetin	Korkean	
Luokan / prioriteetin väri	Keltainen	■
Prioriteetin	Keskitason	
Luokan / prioriteetin väri	Syaani	■
Prioriteetin	Matalan	

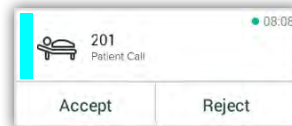

Hälytyskuvakkeet

Hälytyskuvakkeita käytetään ilmaisemaan hälytyksen tyyppiä.

HUOMAA: Kuvakkeet riippuvat määrittämisestä, ja ne voivat olla erilaista eri järjestelmäasetuksissa.

	Anestesiayksikkö		Sydän-keuhkokone
	Avustuskutsu		Inkubaattori
	Verisuodatin		Infuusiopumppu
	Verikaasuanalyysiaattori		Laboratoriotulos
	Category A		WC-kutsu
	Category B		Lääkärin kutsu
	Category C		Valvonta
	Category D		Potilaskutsu
	Category E		Huoltokutsu
CODE A	Code A		Tehtävä
CODE B	Code B		Tekninen hälytys
	Hätäkutsu		Ilmanvaihto
	Virhe		Röntgentulos
	Tulipalo		Yleinen oletus

Tulevat hälytykset

Laitteen ollessa lukittuna **I** tuleva hälytys näkyy sekä ylänäytössä että etunäytössä värillisenä hälytysilmoituksena. Hälytyksestä ilmoitetaan myös LED-merkkivalon **A** värin mukaisesti sekä äänimerkillä ja värinällä.



Hälytysnäkyssä tulevat hälytykset **II** lajitellaan ajan mukaan niin, että viimeisin hälytys näkyy ylimpänä.



Laitteen ollessa lukitsemattomassa tilassa hälytysilmoitukset tulevat näkyviin näytön yläosaan. Jos lyhyen ajan kuluessa tulee useita hälytyksiä, viimeisin hälytys näkyy muiden yläpuolella.

Pyyhkäise ylöspäin tai ilmoituksen jommallekummalle puolelle, tai piilota ilmoitus napsauttamalla kuvaketta **X**.

Avaa ilmoitus napsauttamalla sitä.

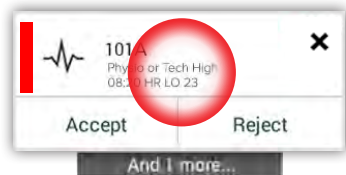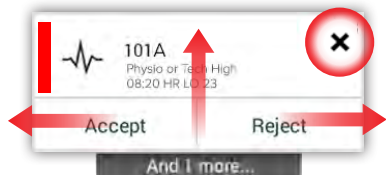


Hälytykseen reagoiminen

Lukitusnäytössä hälytyksiin voidaan vastata kolmella tavalla:

Avaa valintapainikkeet pyyhkäisemällä hälytysilmoitusta alaspäin.

Kaksoisnapsauta hälytysilmoitusta.

Avaa laitteen lukitus ja siirry hälytysnäkyyn.

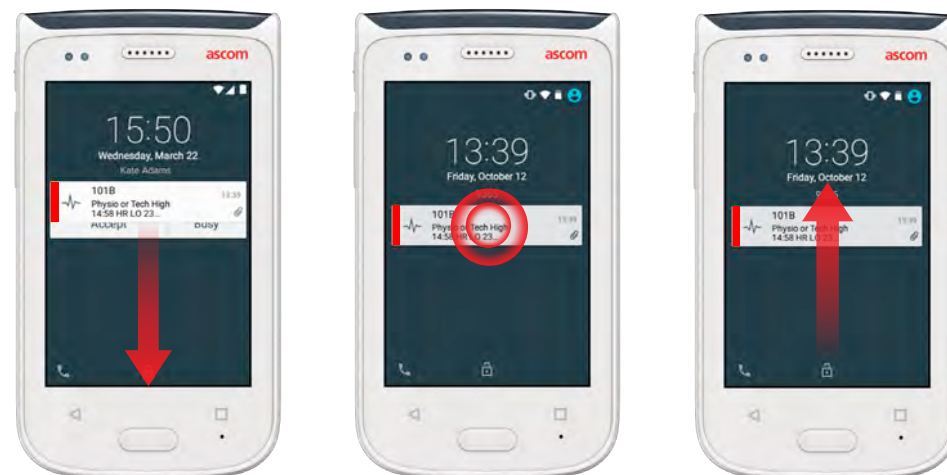

Kriisihälytykset

Kriisihälytyksillä on korkein prioriteetti, ja ne ilmaisevat välitöntä vaaraa tai hätätilannetta.

"Code Blue" on esimerkki kriisihälytyksestä, josta ilmoittavat:

- Voimakkaalla merkkiäänellä
- Sinisellä ja punaisella vilkkuvalla LED-merkkivalolla
- CODE B -kuvakkeella
- Hälytyksen ympärillä on punainen kehys.
- Värinällä




Varoitukset


Varoitusviestit tulevat näkyviin etunäyttöön värillisinä ilmoituksina. Varoitukset näkyvät myös silloin, kun näyttö on lukittu.

HUOMAA: Varoitusviesti säilyy laitteessa, kunnes ongelma on ratkennut.

Napsauta varoitusilmoitusta nähdäksesi koko varoitusviestin näytössä, jonka lukitus on avattu.

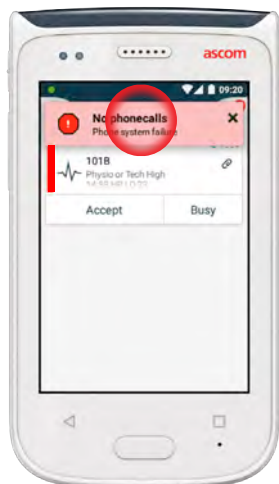


Avaa ilmoitus uudelleen napsauttamalla hälytysnäkyssä olevaa **varoituskuvaketta**

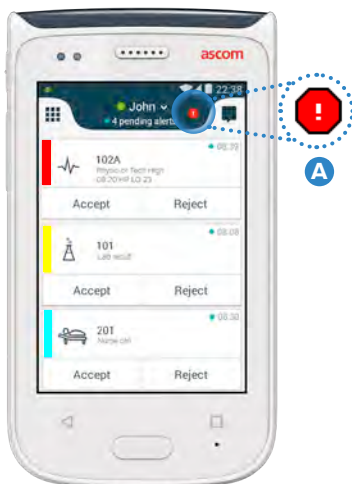

Esimerkkejä varoitusviesteistä

Ohessa on esimerkkejä varoitusviesteistä, joita laitteessa voi esiintyä ja joiden ilmoittamien ongelmien ratkaiseminen vaatii yleensä järjestelmän ylläpitäjän apua.

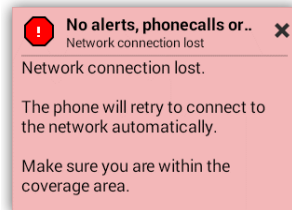

Varoitus alhaisesta akun varaustasosta

Jos akun varaustaso on **15 % tai vähemmän**, lataa akku mahdollisimman pian.

Kun akun varaustaso 15 % tai vähemmän, laite ilmoittaa siitä seuraavasti:


- Laite piippaa kerran
- LED-valo vilkkuu oranssina
- Akun matalan varaustason kuvake
- Akun matalan varaustason ilmoitus
- Laite värisee kerran



Jos akun varaustaso on **5 % tai vähemmän**, lataa akku välittömästi.

Kun akun varaustaso 5 % tai vähemmän, laite ilmoittaa siitä seuraavasti:

- Laite piippaa kerran kahden minuutin välein
- LED-valo vilkkuu punaisena
- Tyhjän akun kuvake
- Akun matalan varaustason ilmoitus
- Laite värisee kerran kahden minuutin välein

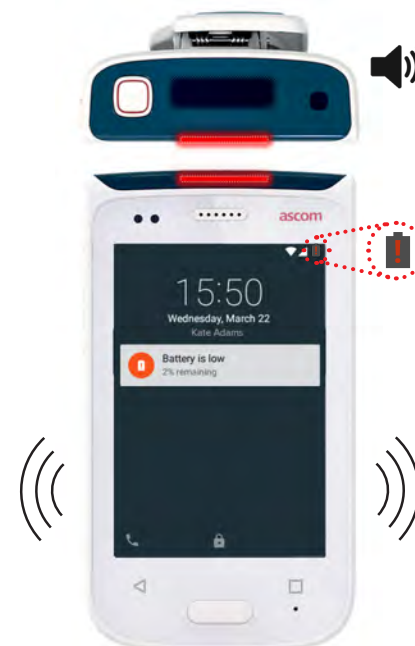

Soittaminen

- 1 Pyyhkäise lukitusnäytön vasemmassa alakulmassa näkyvää **puhelinkuvaketta** **A** oikealle.


HUOMAA: Napsauta lukitsemattomassa tilassa sovellusnäkylässä olevaa **puhelinsovelluksen**  kuvaketta.

- 2 Voit valita puhelinnumeron manuaalisesti, napsauttamalla viimeisimpien puhelujen luettelossa näkyviä yhteystietoja **B** tai etsimällä numeron puhelinmuistiosta **C**.



Viestit

Kirjoita uusi viesti napsauttamalla keskustelunäkymässä **uuden viestin** **D** kuvaketta, tai lue viesti ja vastaa siihen napsauttamalla viestiä.

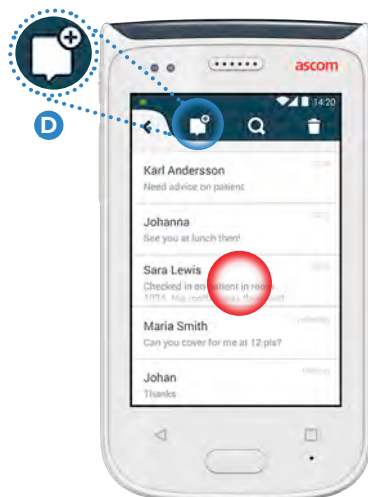

Laitteen akku

Laitteessa on ladattava akku. Lataa se käyttämällä akunlataustelinettä.

Akun lataus telinettä

- 1 Poista akun suojakansi **A** liu'uttamalla sitä oikealle.
- 2 Poista akku laitteesta.
- 3 Aseta akku latauskoloon. Liu'uta akun suojakansi vasemmalle. Jos akku on asetettu oikein paikalleen, LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi **B** ilmaisten sen, että akku latautuu.
- 4 Akku on ladattu täyteen, kun lataustelineen LED-merkkivalo palaa vihreänä.




Laitteen lataaminen

Laite voidaan ladata kahdella tavalla: joko laitteen lataustelineessä tai mikro-USB-kaapelilla.

Luurin latausteline

- 1 Aseta laite latauskoloon **A** . Jos laite on asetettu oikein paikalleen, näkyviin tulee latausnäyttö, jossa näkyvät akun lataustaso ja omistajan tunniste /nimi **B** .
- 2 Akku on ladattu täyteen, kun lataustelineen LED-merkkivalo palaa vihreänä.

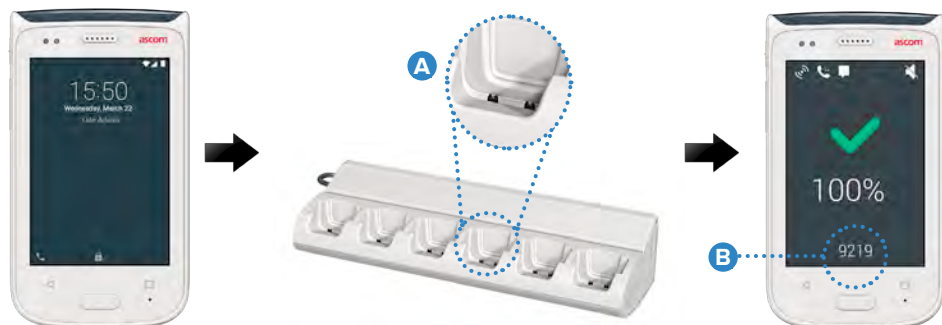

Mikro-USB-kaapelilla

- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva latausliitännän kansi **C** .
- 2 Kytke mikro-USB-kaapeli **D** laitteen latausliitäntään.
- 3 Kytke USB-virtalähde pistorasiaan.
- 4 Akku on ladattu täyteen, kun lataustelineen LED-merkkivalo palaa vihreänä.





Manufacturer

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

40276 Gothenburg

Sweden

Phone: +46 31 55 93 00

ascom.com

ascom