


Краткое руководство пользователя

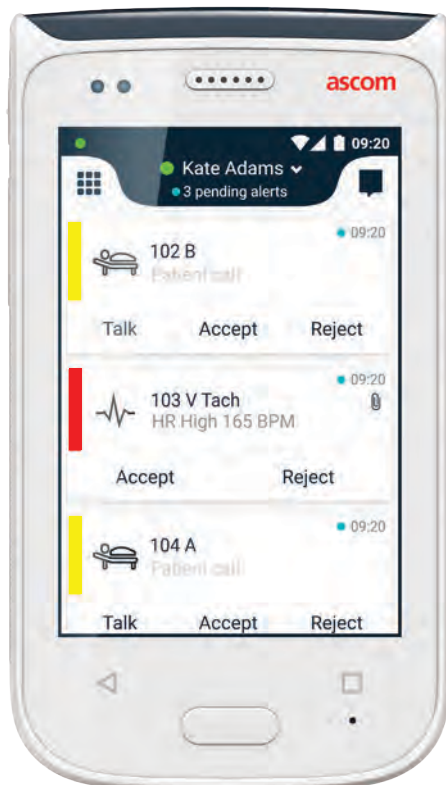

Ascom Myco 2

ascom



Введение

В настоящем кратком руководстве пользователя приведен обзор наиболее значимых особенностей телефона Ascom Myco 2.

Изображения, использованные в данном руководстве, получены с телефона с английским интерфейсом пользователя. Некоторые описанные в документе функции могут отличаться от функций вашего телефона в зависимости от конфигурации системы. Поэтому использованные в данном документе изображения экрана также могут отличаться от вида экрана вашего телефона.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей.

Более подробную информацию об Ascom Myco 2 вы можете найти в руководстве пользователя (версия только на английском языке):

<https://www.ascom.com/MycoUserDoc>

Содержание

Общий Обзор

Телефон	1
Кнопки	2

Вид

Передний дисплей	3
Переход между видами	4
Верхний дисплей	4
Панель уведомлений	5
Панель приложений	6

Аутентификация

Вход в систему	7
Выход из системы	8

Предупреждения

Общая информация	9
Значение цветов	9
Значение иконок	10
Входящие предупреждения	11
Ответ на предупреждения	12
Экстренные предупреждения	12

Уведомления

Уведомления	13
Уведомления о низком заряде батареи	14

Связь

Звонки	15
Сообщения	15

Подзарядка

Подзарядка батареи	16
Подзарядка устройства	17

Телефон

- | | |
|---|--|
| 1. Кнопка питания (вкл. / выкл.) | 9. Кнопка "Домой" |
| 2. Кнопка регулировки громкости (громче / тише) | 10. Микрофон |
| 3. Тревожная / Многофункциональная кнопка | 11. Кнопка "Обзор" |
| 4. Верхний дисплей | 12. Сменная цветная накладка на клипсу |
| 5. Инфракрасный датчик движения (Ascom IR Location) | 13. Камера / Сканер штрихкодов |
| 6. Светодиодный маячок | 14. Клипса |
| 7. Передний дисплей | 15. Аккумулятор |
| 8. Кнопка "Назад" | 16. Замок-защелка крышки аккумулятора |
| | 17. Зарядный разъем Micro-USB |



Кнопки

Телефон снабжен шестью кнопками: кнопкой питания, кнопкой регулировки громкости, тревожной / многофункциональной кнопкой, кнопками "Назад", "Домой" и "Обзор".

3 Тревожная / Многофункциональная кнопка

- Эта кнопка может выполнять различные функции в зависимости от ее конфигурации. Например, с ее помощью вы можете отправить персональное предупреждение или позвонить по громкой связи.

1 Кнопка питания (вкл. / выкл.)

- Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить телефон.
- Нажмите для выхода телефона из "Спящего режима".
- Нажмите для блокировки и перевода телефона в "Спящий режим".

2 Кнопка регулировки громкости (громче / тише)

- Нажмите в верхней части для повышения громкости или в нижней части для понижения громкости динамика или громкоговорителя.
- Нажмите и удерживайте для перехода в беззвучный режим.

8 Кнопка "Назад"

- Нажимайте для перехода на предыдущий экран.

9 Кнопка "Домой"

- Нажмите для выхода телефона из "Спящего режима".
- Нажмите в разблокированном режиме для перехода в вид предупреждений. Переход осуществляется из любого приложения или вида.

11 Кнопка "Обзор"

- Нажмите для отображения списка всех активных приложений.

Передний дисплей

Передний дисплей является основным дисплеем телефона, с помощью которого вы можете использовать установленные приложения, обрабатывать предупреждения и поддерживать связь с коллегами.

Интерфейс дисплея состоит из трех отдельных видов:

Главным видом является вид "Предупреждения" **II**. Здесь отображаются все активные предупреждения, а также их текущее состояние.

Откройте вид "Приложения" **I**, чтобы увидеть все программы, установленные на вашем телефоне.

Используйте вид "Беседа" **III** для чтения и отправки сообщений своим коллегам.



Переход между видами

Вид "Предупреждения" **II** расположен по центру. Из него вы можете перейти в два других вида.

Чтобы перейти в вид "Приложения" **I**, смахните вправо или коснитесь значка "Все приложения" в левом верхнем углу.

Чтобы перейти в вид "Беседа" **III**, смахните влево или коснитесь значка "Сообщения" в правом верхнем углу экрана.

Чтобы вернуть вид "Предупреждения", смахните в противоположном направлении или нажмите кнопку "Домой".



Верхний дисплей

Если ваш телефон находится в нагрудном кармане или пристегнут к одежде, используйте верхний дисплей для получения кратких сведений о входящих предупреждениях, сообщениях и телефонных вызовах.

Если имеется несколько необработанных предупреждений, они отобразятся в порядке приоритета. После отображения всех предупреждений повторно появится старейшее необработанное предупреждение с высшим приоритетом.



Панель уведомлений

В панели уведомлений отображаются все уведомления, такие как предупреждения, оповещения и сообщения. Уведомления отображаются как в самой панели, так и на заблокированном экране.

Чтобы открыть панель уведомлений, смахните вниз от верхней части переднего дисплея.

Чтобы скрыть панель уведомлений, смахните вверх, коснитесь экрана за пределами панели, либо нажмите кнопку "Назад" **A** или "Домой" **B**.



Панель приложений

Панель приложений можно настроить так, чтобы она содержала до четырех ярлыков, обеспечивающих быстрый доступ к приложениям и функциям.

Чтобы открыть панель приложений, смахните вниз от верхней части переднего дисплея. Данную панель можно открыть только в разблокированном режиме (в любом приложении или виде).

Чтобы скрыть панель приложений, смахните вниз, коснитесь экрана за пределами панели, либо нажмите кнопку "Назад" **A** или "Домой" **B**.


Содержимое панели приложений зависит от конфигурации системы. Если на вашем телефоне отсутствует данная панель или вам необходимо сменить ярлыки, обратитесь к своему системному администратору за поддержкой.



Вход в систему

В зависимости от конфигурации системы для доступа к таким функциям, как обработка предупреждений и сообщений, вам может потребоваться вход в систему.

- 1 На заблокированном экране смахните вверх от нижней части дисплея или дважды коснитесь уведомления о входе в систему. При необходимости введите PIN-код или пароль.

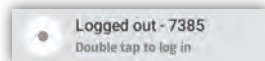

ПРИМЕЧАНИЕ: В разблокированном режиме нажмите кнопку "Домой" A для перехода к виду "Предупреждения".

- 2 В отрывшемся виде "Предупреждения" нажмите **"Вход"**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля и нажмите **"Вход"**.



Выход из системы

Выход из системы через вид "Предупреждения":

- 1 Коснитесь имени пользователя в верхней панели.
- 2 Нажмите **"Выход"** в меню "Изменить свой статус".
- 3 Нажмите **"Выход"** для подтверждения.



Выход из системы через панель уведомлений:


- 1 Смахнув вниз от верхней части экрана, откройте панель уведомлений.
- 2 Дважды коснитесь уведомления **"Изменить свой статус или выйти"**.
- 3 Нажмите **"Выход"** для подтверждения.



Общая информация

Существуют различные приоритеты, категории и типы предупреждений. Цвет в столбце используется для обозначения категории или приоритета предупреждения, иконки – для обозначения типа предупреждения.

1. Цвет категории / приоритета
2. Тема, например, местонахождение
3. Информация о событии
4. Необработанное предупреждение
5. Метка времени
6. Опции
7. Изображение

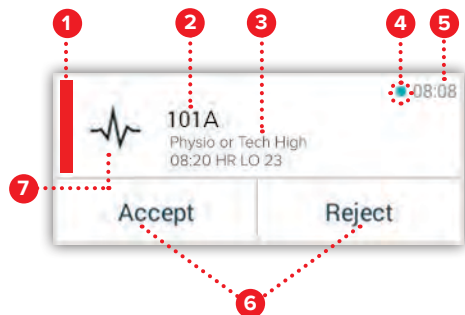


Значение цветов

Цвет в столбцах слева от каждого предупреждения, как и в светодиодном индикаторе в верхней части телефона, используется для обозначения категорий или приоритетов входящих предупреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения цветов могут отличаться в зависимости от настройки системы.

Цвет категории / приоритета Красный

Приоритет Высокий

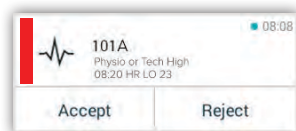


Цвет категории / приоритета Жёлтый

Приоритет Средний



Цвет категории / приоритета Голубой

Приоритет Низкий

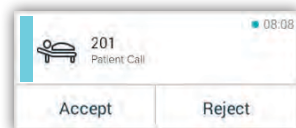

Значение иконок

Для отображения типа предупреждения используются специальные иконки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование иконок, а также их назначение, могут различаться в зависимости от настройки системы.



Аппарат ингаляционной анестезии



Аппарат искусственного кровообращения



Вызов помощи



Инкубатор



Трансфузионная система



Инфузионный насос



Анализатор газов крови



Результаты анализов



Категория А



Медицинский вызов



Категория В



Система мониторинга



Категория С



Вызов медсестры



Категория D



Служебный вызов



Категория E



Задача

CODE A

Код А



Техническое предупреждение

CODE B

Код В



Результаты рентгенографии



Экстренный вызов



Вентиляция



Сбой / Ошибка



Общий (по умолчанию)



Пожар



Общий (по умолчанию)



Вызов персонала из туалета

Входящие предупреждения

В "Спящем режиме" **I** входящие предупреждения отображаются одновременно на верхнем и переднем дисплеях. О предупреждении также сигнализирует мигающий светодиодный маячок **A**, выработка и звуковой сигнал.



В виде "Предупреждения" **II** все предупреждения сортируются по времени, с самым новым предупреждением вверху.



В разблокированном режиме предупреждения появляются в верхней части экрана в виде уведомлений. Если в течение короткого времени поступает несколько предупреждений, самое новое предупреждение отображается поверх остальных.

Смахните уведомление вверх или вбок, либо коснитесь значка **x**, чтобы скрыть его.

Коснитесь уведомления, чтобы открыть его.

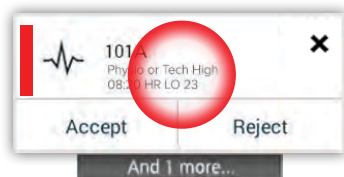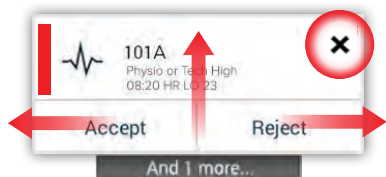

Ответ на предупреждения

Существуют три способа, как ответить на предупреждения на заблокированном экране:

Разблокируйте телефон и перейдите в вид "Предупреждения".

Дважды коснитесь уведомления.

Смахните вниз уведомление, чтобы открыть опции.



Экстренные предупреждения

Экстренные предупреждения имеют высший приоритет и сигнализируют о непосредственной опасности или чрезвычайной ситуации. **"Код синий"** служит примером экстренного предупреждения и сопровождается:

- Громкой сиреной
- Мерцанием светодиодного маячка красным и синим цветов
- Code B иконкой
- Красной рамкой вокруг предупреждения
- Вибрацией




Уведомления

Уведомления могут отображаться как на заблокированном экране телефона, так и в разблокированном режиме. Уведомления поступают на экран в виде цветных сообщений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уведомление остается на телефоне до тех пор, пока проблема не будет решена.




Чтобы просмотреть сообщение целиком на разблокированном экране, коснитесь уведомления.

Для повторного открытия уведомления коснитесь значка  в виде "Предупреждения".

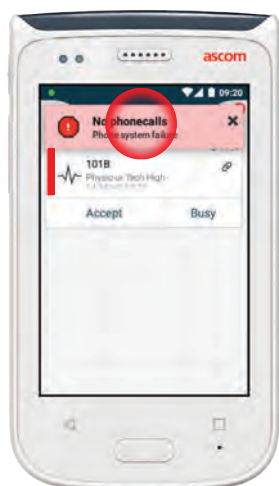

Примеры уведомлений

Ниже приведены примеры уведомлений, которые могут отображаться на экране телефона и обычно требуют вмешательства системного администратора для устранения неполадок.

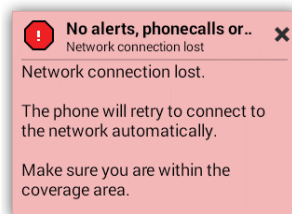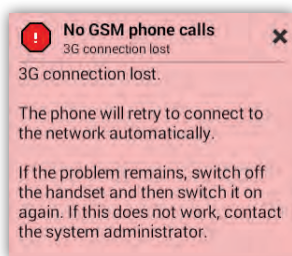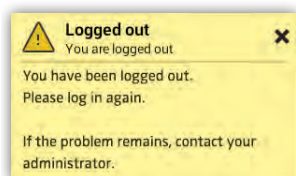

Уведомление о низком заряде батареи

Если уровень заряда батареи 15 % или ниже, зарядите ваш телефон при первой же возможности.

О низком заряде батареи (15 % или ниже) сигнализируют:

- Вибрация (один раз)
- Светодиодный маячок мигает оранжевым цветом
- Иконка слабого заряда батареи
- Уведомление "Батарея почти разряжена"
- Звуковой сигнал (один раз)



Если уровень заряда батареи 5 % или ниже, немедленно зарядите ваш телефон.

О низком заряде батареи (5 % или ниже) сигнализируют:

- Вибрация (один раз в две минуты)
- Светодиодный маячок мигает красным цветом
- Иконка разряженной батареи
- Уведомление "Батарея почти разряжена"
- Звуковой сигнал (один раз в две минуты)



Звонки

- 1 На заблокированном экране смахните вправо значок **"Телефон"** **A**, расположенный в левом нижнем углу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В разблокированном режиме коснитесь значка **"Телефон"** **B** в виде "Приложения".

- 2 Введите номер телефона, выберите контакт в списке последних вызовов **B** или в телефонной книге **C**.



Сообщения

В виде "Беседа" коснитесь значка **"Новое сообщение"** **D**, чтобы написать новое сообщение.

Коснитесь самого сообщения, чтобы прочесть его и написать ответ.



Подзарядка батареи

Ваш телефон снабжен аккумуляторной батареей. Чтобы его зарядить, воспользуйтесь зарядной станцией для батарей.

Зарядная станция для батарей

- 1 Освободите крышку аккумулятора, сдвинув замок-защёлку **A** вправо.
- 2 Извлеките аккумулятор из телефона.
- 3 Вставьте аккумулятор в зарядный слот. Сдвиньте замок-защёлку крышки аккумулятора влево. Если аккумулятор вставлен правильно, загорится красный светодиодный индикатор **B**, сигнализирующий о процессе зарядки.
- 4 Батарея полностью заряжена, если светодиодный индикатор загорелся зелёным цветом.




Подзарядка телефона

Существуют два способа подзарядки телефона: с помощью зарядной станции для телефонов или кабеля Micro-USB.


Зарядная станция для телефонов

- 1 Вставьте телефон в зарядный слот **A**. Если телефон вставлен правильно, отобразится экран подзарядки, на котором будет показан уровень заряда аккумулятора и код / имя пользователя **B**.
- 2 Телефон полностью заряжен, если светодиодный индикатор загорелся зелёным цветом.

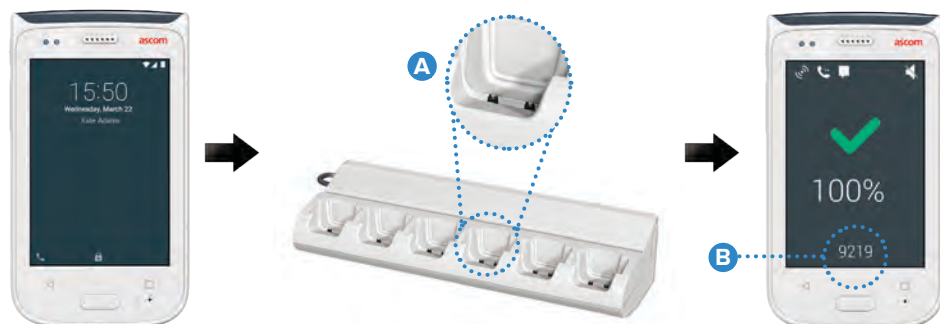

Кабель Micro-USB

- 1 Откройте крышку зарядного разъема в нижней части телефона **C**.
- 2 Вставьте кабель Micro-USB **D** в зарядный разъем телефона.
- 3 Подключите зарядное устройство USB к сетевой розетке.
- 4 Телефон полностью заряжен, если светодиодный индикатор загорелся зелёным цветом.

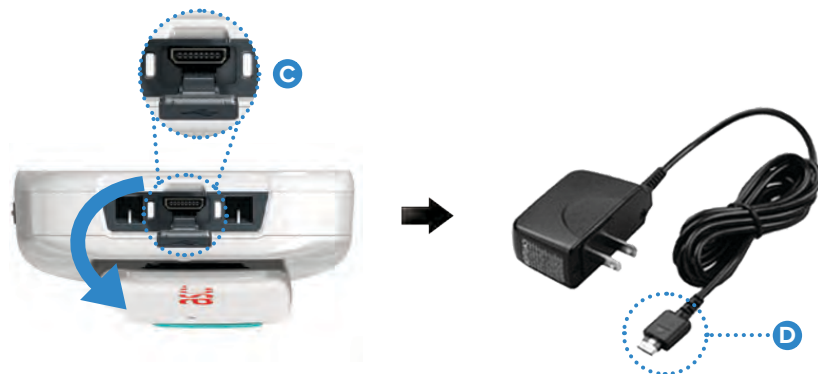

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

40276 Gothenburg

Sweden

Phone: +46 31 55 93 00

ascom.com

ascom