

KÄYTTÖOHJE

Ascom Unite Axess for Smart Devices

ascom

Tietoja tästä asiakirjasta

Tässä asiakirjassa kuvataan Ascom Unite Axess for Smart Devices -sovellus. Tämä asiakirja on tarkoitettu Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen käyttäjille.



Valmistaja

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Puhelin +46 31 55 94 00

www.ascom.com

Sisällysluettelo

1	Esittely	1
1.1	Huomio ja huomautukset	1
2	Käyttötarkoitus	2
3	Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen asettelu	3
3.1	Asettelu Android-laitteissa	3
3.2	Asettelu iOS-laitteissa	4
3.3	Kuvakkeet	4
3.4	Unite Axess -ohje	5
4	Yhdistä Unite-järjestelmään	6
4.1	Sisään- ja uloskirjautuminen Android-laitteissa	6
4.2	Sisään- ja uloskirjautuminen iOS-laitteissa	7
5	Hälytysten käsittely	8
5.1	Hälytysten vastaanottaminen	8
5.1.1	Hälytysten käsittely Android-laitteissa	8
5.1.2	Hälytysten käsittely iOS-laitteissa	8
5.1.3	Hälytyskuvakkeet	8
5.2	Lajittele hälytyksiä	10
5.3	Hälytysten suodattaminen	11
5.4	Hälytyksen välittäminen (vain iOS)	11
5.5	Poista hälytyksiä	11
6	Viestien käsittely (vain iOS)	12
6.1	Viestien vastaanottaminen	12
6.2	Viestien lähettäminen	12
6.3	Viestien hakeminen	12
6.4	Viestien poistaminen	12
7	Varallaolotila Android-laitteissa	13
8	Varallaolotila iOS-laitteissa	14
9	Varoitusviestit	15
10	Asetukset	16
10.1	Asetukset Android-laitteissa	16
10.2	Asetukset iOS-laitteissa	17
11	Tietoja sovelluksista	18
11.1	Unite Axess älylaitteisiin	18
11.2	Ascom Login (vain Android)	19
12	Aiheeseen liittyvät asiakirjat	20
13	Asiakirjahistoria	21

1 Esittely

Unite Axess for Smart Devices sovellus näyttää hälytyksiä älylaitteiden käyttäjille. Sovellus voidaan integroida täydellisesti Unite-järjestelmään, joten potilastyötä tekevät saavat interaktiiviset viestit potilastapahtumista varmasti milloin ja missä tahansa.



Kuvat on otettu älylaitteesta, jossa on englanninkielinen käyttöliittymä, joten kieli voi poiketa näytössäsi näkyvästä kielestä.

1.1 Huomio ja huomautukset

Lue kaikki tässä oppaassa luetellut varoitukset ja huomautukset, ja noudata niitä.

VAROITUS koskee seikkoja, jotka voivat suoraan tai välillisesti aiheuttaa vaarallisen tilanteen tai myötävai-
kuttaa sen syntymiseen ja josta voi olla seurauksena huomattavia fyysisiä vammoja tai vahinkoa ihmisten
terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle.

HUOMIO tarkoittaa, että käyttäjän tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta laitteen turvallisen ja tehokkaan
käytön varmistamiseksi.

HUOMAUTUS tarkoittaa, että asiasta on saatavilla täydentäviä yleistietoja.



Varoitus

Vain iOS-laitteet

Viestinvälitystä ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan potilaiden hoitoon. Toimintoa tulisi käyttää
vain yleiseen viestinvälitykseen.



Huomio

Hälytysten ja varoitusten tunnistaminen voidaan estää, jos ilmaisujen äänenvoimakkuus on
pienempi kuin ympäristön äänitasot.

Tietoja hälytysäänistä

Hälytysviestien äänenpainetasoa voidaan säätää käytettävän laitteen ääniasetuksista.

Hälytysääniin käytettävät oletusäänitiedostot on suunniteltu sopiviksi hälytysilmoitustarkoituksiin.

2 Käyttötarkoitus

Axess for Smart Devices -sovelluksen tarkoitus on näyttää elektronisesti Ascomin lääkinnällisten laitteiden kautta terveydenhuollon ammattilaisille hälytysviestit (hälytykset) ja muu tieto, joka on peräisin yhdistetyistä lääkinnällisistä laitteista potilaiden valvomisen helpottamiseksi.

Axess for Smart Devices -tuote on tarkoitettu käytettäväksi toissijaisena keinona näyttää hälytykset, ts. hälytysviestit ja muu lääkinnällisen laitteen tieto. Sen ei ole tarkoitus korvata yhdistettyjen laitteiden tietojen suoraa tarkastelua.

Axess for Smart Devices -tuotetta ei ole tarkoitettu diagnosointiin eikä käytettäväksi aktiivisessa potilasvalvonnassa päätettäessä välittömistä kliinistä toimista. Axess for Smart Devices -tuotetta ei myöskään ole tarkoitettu valvomaan tai muuttamaan liitettyjen lääkinnällisten laitteiden toimintoja tai parametreja.

Axess for Smart Devices on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön, ja sen toiminta perustuu sekä terveydenhoitolaitoksen viestintäinfrastruktuuriin että käytettävien näyttölaitteiden asianmukaiseen käyttöön ja toimintaan.

Axess for Smart Devices -tuotteen komponentit on asennettava määritettyyn laitteistoon ja käyttöjärjestelmään, ja sen toiminta perustuu siihen, että terveydenhoitolaitos tarjoaa määritetyn lääkinnällisen tietotekniikkaverkon ja viestintäinfrastruktuuriin.

Käyttötarkoitus luokan IIb Connect for Clinical System -järjestelmän kanssa EU-/EFTA-maissa

Jos Unite Axess for Smart Devices -sovellusta käytetään osana Connect for Clinical System -järjestelmää EU-/EFTA-maissa, käyttötarkoitus on seuraavanlainen:

Unite Axess for Smart Devices -sovellus on osa järjestelmää näyttölaitteena.

Ascom Unite Connect for Clinical Systems on tarkoitettu käytettäväksi kliinisten järjestelmien käyttöliittymänä tiettyihin tapahtumiin liittyvien tietojen välittämiseksi, mukaan lukien elintärkeät fysiologiset parametrit, määrättyihin näyttölaitteisiin potilasvalvonnan tueksi. Näyttölaitteet ilmaisee hälytyksen vastaanottamisen näkyvällä ja/tai kuuluvalla merkillä ja/tai äärisemällä.

Connect for Clinical Systemsin ansiosta tapahtumailmoituksia voidaan käsitellä ja suodattaa niin, että niiden esiintymistiheys ja määrä vähenevät. Näin terveydenhuoltohenkilöstö saa selkeämmin tietoja, jotka vaativat kliinisiä toimenpiteitä.

Lähes reaaliaikaisten lääkintälaitteiden hälytysten osalta Connect for Clinical Systems on tarkoitettu käytettäväksi toissijaisena hälytyksenä, ts. rinnakkaisena, ylimääräisenä, edelleenlähettävänä mekanismina ilmoittamaan terveydenhuoltohenkilöstölle tietyistä hoitoon liittyvistä tapahtumista. Se ei korvaa ensisijaisten lääkinnällisten laitteiden hälytystä, eikä se muuta niiden toimintaa ja hälytysilmoituksia.

Connect for Clinical Systems on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten lääkinnällisten laitteiden kanssa, kun potilaiden fysiologisia parametreja tarvitsee valvoa. Potilasjoukko ja potilaiden tila määritetään yhdistetyillä lääkinnällisillä laitteilla.

Tuote asennetaan määritettyyn laitteistoon terveydenhoitolaitosten tehohoitoyksiköissä, puoli-intensiivisissä yksiköissä, vuodeosastoilla ja muilla osastoilla, ja sen toiminta perustuu siihen yhdistettyjen lääkinnällisten laitteiden, järjestelmien, näyttölaitteiden ja lääkinnällisen tietotekniikkaverkon asianmukaiseen käyttöön ja toimintaan.




3 Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen asettelu

Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen oletusversio koostuu seuraavista:

- **Hälytys**-sivu: Tämä on oletussivu, kun kirjaudut sisään.
- **Valikko**: Siirry valikkoon napsauttamalla **Valikko**-kuvaketta  tai pyyhkäisemällä oikealle.


3.1 Asettelu Android-laitteissa

Kuva 1. Oletusasettelu

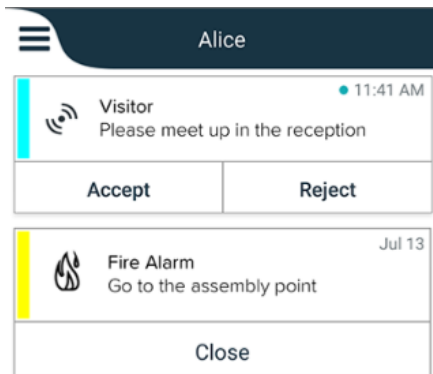

Kun Ascom Login on asennettu ja sinulla on käytössäsi vähintään yksi sovellus Unite Axess for Smart Devices-sovelluksen lisäksi, näytön alareunassa on **navigointipalkki** nopeaa navigointia varten.

Kuva 2. Alanavigointipalkki

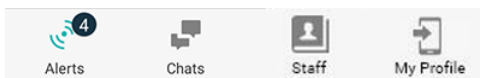


Lisäksi **Sovellukset**-sivu saattaa olla mukana. Pääset **Sovellukset**-sivulle napsauttamalla **Sovellukset**-kuvaketta  tai pyyhkäisemällä oikealle. Sen jälkeen **valikkoon** pääsee **Sovellukset**-sivulta.

Kuva 3. Sovellusversio




3.2 Asettelu iOS-laitteissa

Kuva 4. Asettelu, jossa on keskustelu ja varallaolotila, on käytössä

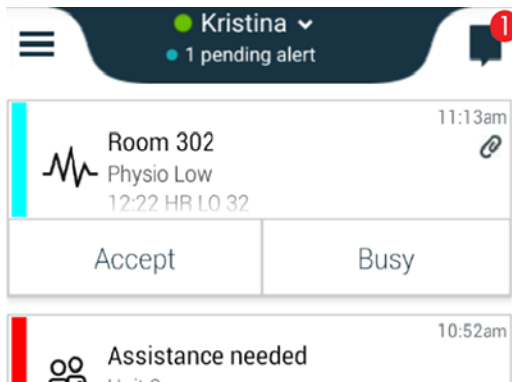

Sovelluksesi voi sisältää myös **Keskustelu**-sivun. Siirry keskustelusivulle napsauttamalla **Keskustelu**-kuvaketta tai pyyhkäisemällä vasemmalle. Jos järjestelmä on määritetty varallaolotilaa varten, yläpalkin merkinnät muuttuvat.

Kuva 5. Asettelu, jossa on keskustelu ja varallaolotila, on poissa käytöstä

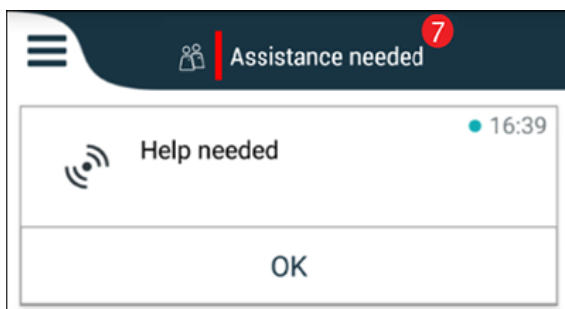

Lisäksi **Sovellukset**-sivu saattaa olla mukana. Pääset **Sovellukset**-sivulle napsauttamalla **Sovellukset**-kuvaketta tai pyyhkäisemällä oikealle. Sen jälkeen **valikkoon** pääsee **Sovellukset**-sivulta.

Kuva 6. Sovellusversio



3.3 Kuvakkeet

Tässä näet sovelluksen jokaisen kuvakkeen merkityksen:



Valikkokuvake



Hälytyksen vastaanottamisaika. Sininen piste ajan edessä osoittaa, että hälytystä ei ole käsitelty.



Liitetty lisäsisältö



Sovelluskuvake (valinnainen)



Hälytyskuvake, jossa käsittelemättömien hälytysten määrä. Vain Android.



Oma profiili -kuvake (käytettävissä, kun napsautat **Lisää**, jos navigointipalkissa on enemmän kuin neljä syöttöä). Vain Android.



Keskustelukuvake (valinnainen). Vain iOS.



Lukemattomien viestien määrä. Vain iOS.



(Oletusasettelu) Käsittelemättömien hälytysten kokonaismäärä, joka näkyy yläpalkissa, kun varallaolotila ei ole käytössä järjestelmässä. Vain iOS.



Käsittelemättömien hälytysten kokonaismäärä, joka näkyy yläpalkissa, kun varallaolotila on käytössä järjestelmässä. Vain iOS.

3.4 Unite Axess -ohje

Unite Axess for Smart Devices -sovelluksessa on ohjeikkuna, jossa on sovelluksen toimintojen käyttöä koskevia ohjeita.

1. Avaa ohjeteksti napsauttamalla **Valikko**-kuvaketta
2. Napsauta sitten **Ohje**-painiketta.
3. Palaa valikkosivulle napsauttamalla **Takaisin**-painiketta tai **Sulje**-kuvaketta

4 Yhdistä Unite-järjestelmään

Jotta voit muodostaa yhteyden Unite-järjestelmään, tarvitaan Unite Axess -palvelimen URL-osoite. URL-osoite voi olla linkkinä tai se voidaan syöttää manuaalisesti tai tarjota paikallisen verkkotunnusjärjestelmän kautta.

Jos osoite on linkkinä, käyttäjän tarvitsee vain napsauttaa älylaitteessa olevaa linkkiä. Jos käyttäjä on jo kirjautunut sisään sivustoon, joka poikkeaa linkin kautta avautuvasta sivustosta, käyttäjä kirjataan ensin ulos, minkä jälkeen sovellus yrittää lisätä linkin kautta tarjotun sivuston. Jos sivusto löytyy, näkyviin tulee sisäänkirjautumisikkuna. Jos sivustoa ei löydy, käyttäjä saa virheviestin ja hän voi syöttää URL-osoitteen manuaalisesti.

Jos sinun on syötettävä URL manuaalisesti, URL sisältää seuraavat:

- Julkinen FQDN- tai IP-osoite sen julkaistun verkkosivuston käyttämiseksi, joka toimii isäntänä Axess for Smart Devices -sovellukselle (esimerkiksi `uniteaxess.company.com`)
- Asennuksen aikana määritetty virtuaalinen hakemistopolku (esimerkiksi "Axess")

Tässä esimerkissä palvelimen URL on `https://uniteaxess.company.com/Axess`.

Jos URL-osoite tarjotaan paikallisen verkkotunnusjärjestelmän kautta ja jos Unite Axess for Smart Devices-sovelluksella ei ole aiemmin käytettyä sivustoa aloitettaessa, se yrittää automaattisesti löytää kyseisen isäntänimen verkkotunnusjärjestelmästä. Kun vastaus saadaan, käytetään oikeaa URL-osoitetta.


4.1 Sisään- ja uloskirjautuminen Android-laitteissa

Kirjautuminen sisään Android-laitteelle ja ulos laitteesta tapahtuu Ascom Login -sovelluksesta. Ascom Login on yleinen sisäänkirjautumiskäyttöliittymä monille Android-pohjaisille sovelluksille. Tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee syöttää pääsytietosi vain yhden kerran voidaksesi käyttää sovelluksia laitteellasi.

Sama koskee uloskirjautumista: sinut kirjataan ulos kaikista sovelluksista, joita Ascom Login -sovellus tukee.

Kirjaudu sisään

1. Napsauta laitteellasi **Ascom Login** -sovelluksen kuvaketta  tai **Ascom Axess**-kuvaketta , joka ohjaa sinut uudelleen Ascom Login -sovellukseen.
2. Syötä **Username** (käyttäjänimesi) ja **Password** (salasanasi).

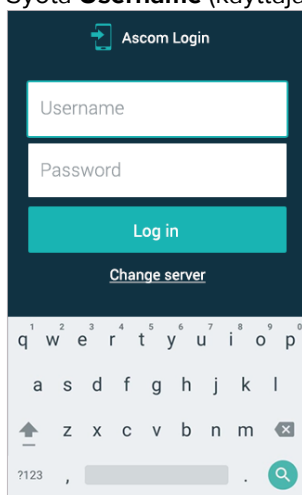

3. Napsauta **Log in** (Kirjaudu sisään) -painiketta.


Kirjaudu ulos

1. Napsauta alanavigointipalkin **Oma profiili**-kuvaketta  tai **Ascom Login** -sovelluskuvaketta .
2. Napsauta **Kirjaudu ulos**-painiketta.

4.2 Sisään- ja uloskirjautuminen iOS-laitteissa

Kirjaudu sisään

1. Napsauta laitteessa **Unite Axess** -sovelluskuvaketta . Sisäänkirjautumissivu avautuu.

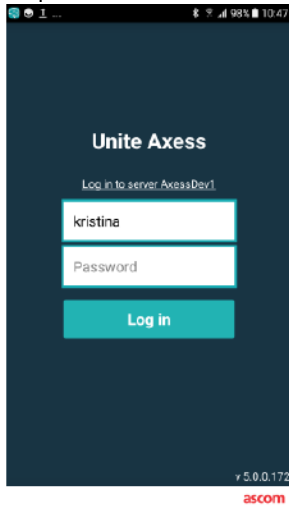

2. Syötä **Username** (käyttäjänimesi) ja **Password** (salasanasi).
3. Napsauta **Log in** (Kirjaudu sisään) -painiketta.

Kirjaudu ulos

1. Napsauta **Valikko**-kuvaketta  tai pyyhkäise oikealle. Jos sinulla on valinnainen **Sovellukset**-sivu, sinun on ensin napsautettava **Sovellukset**-kuvaketta .
2. Napsauta **Log out** (Kirjaudu ulos) -painiketta.

5 Hälytysten käsittely

Tässä osassa kuvataan, miten hälytyksiä käsitellään Unite Axess for Smart Devices:ssa.


5.1 Hälytysten vastaanottaminen

Saat ilmoituksen tulevasta hälytyksestä ennalta määritellyllä hälytysäänellä. Älylaite näyttää hälytyksen **Hälytykset**-sivulla.

Jos saat hälytyksen, jossa on vastausvaihtoehdot, napsauta vastausvaihtoehtoa (esimerkiksi **Hyväksy** tai **Hylkää**). Kun olet vastannut, hälytys päivitetään vastausviestin kanssa.

5.1.1 Hälytysten käsittely Android-laitteissa

Hyrräkuvake ilmaisee, että hälytyksiä päivitetään. Päivitys DECT-kanavan kautta (vain Ascom Myco 3 -laitteet) voi kestää useita sekunteja.

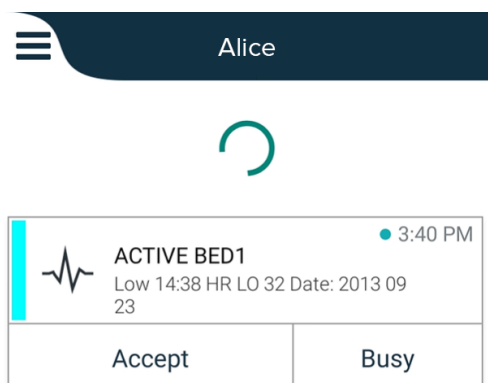

Käsitlemättömien hälytysten määrä näkyy alanavigointipalkissa.

Jos haluat lukea hälytyksen koko näytössä, napsauta viestin tekstiä. Palaa normaalinäyttöön napsauttamalla **Sulje**-kuvaketta  tai **Sulje**-vaihtoehtoa, joka tulee näkyviin viestin tekstin alapuolelle hälytyksissä, joissa ei ole vastausvaihtoehtoja ja hälytyksissä, joihin olet vastannut.

Oletusarvoisesti hälytykset lajitellaan aikajärjestyksessä viimeisin hälytys ylimpänä.

5.1.2 Hälytysten käsittely iOS-laitteissa

Käsitlemättömien hälytysten määrä näkyy yläpalkissa.

Jos haluat lukea hälytyksen koko näytössä, napsauta viestin tekstiä. Palaa normaalinäyttöön napsauttamalla **Sulje**-kuvaketta  tai **Sulje**-vaihtoehtoa, joka tulee näkyviin viestin tekstin alapuolelle hälytyksissä, joissa ei ole vastausvaihtoehtoja ja hälytyksissä, joihin olet vastannut.

Oletusarvoisesti hälytykset lajitellaan aikajärjestyksessä viimeisin hälytys ylimpänä.

5.1.3 Hälytyskuvakkeet

Hälytyksiin käytettävät kuvakkeet ilmaisevat hälytysluokan, esim. hoitajakutsu tai laboratoriotulos.

Käytettävissä ovat seuraavat kuvakkeet Unite Axess for Smart Devices:ssa:

Kuvake	Kuvaus
	Anestesiajärjestelmäyksikkö
	Apukutsu
	Verisuodatin
	Verikaasuanalyysilaite
	Luokka A
	Luokka B
	Luokka C
	Luokka D
	Luokka E
CODE A	Code A
CODE B	Code B
	Hätäkutsu
	Virhe
	Tulipalo

	Sydän-keuhkokone
	Lämpökaappi
	Infuusiopumppu
	Laboratoriotulos
	WC-kutsu
	Lääkintälaittekutsu
	Valvonta
	Hoitajakutsu
	Huoltokutsu
	Tehtävä
	Tekninen hälytys
	Hengityslaite
	Röntgentulos

5.2 Lajittele hälytyksiä

Pieni kuvake **Lajittele**-tekstin yläpuolella **Hälytykset**-sivun lopussa ilmaisee, miten hälytykset tällä hetkellä lajitellaan.

1. Napsauta **Hälytykset**-sivulla **Lajittele**-kuvaketta .
2. Valitse, miten haluat lajitella hälytykset. Hälytykset näytetään sen mukaisesti.



Hälytykset lajitellaan aikajärjestyksessä viimeisin hälytys ylimpänä.



Hälytykset lajitellaan prioriteetin mukaan tärkein hälytys ylimpänä. Saman prioriteetin hälytykset lajitellaan aikajärjestyksessä viimeisin hälytys ylimpänä.



Hälytykset ryhmitellään luokittain.

5.3 Hälytysten suodattaminen

1. Napsauta **Suodatin**-kuvaketta  **Hälytykset**-sivulla.
2. Valitse, miten haluat suodattaa hälytykset valitsemalla vaihtoehto jostakin luettelosta.



Prioriteetti-luettelossa on suodatusvaihtoehdot **Hälytys**, **Korkea**, **Normaali** ja **Matala**.



Vastauksen tila -luettelossa on suodatusvaihtoehdot **Odottaa vastausta** ja **Vastattu**.



Luokka-luettelossa voit suodattaa kaikki hälytysluettelossa olevat luokat, kuten **Koodikutsu**, **Laboratorio** ja **Valvonta**.

Kun olet valinnut vaihtoehdon, **Hälytykset**-sivun tausta himmenee ja vain suodatetut hälytykset tulevat näkyviin.

3. Poista suodatin napsauttamalla **Peruuta**-kuvaketta .

5.4 Hälytyksen välittäminen (vain iOS)

1. Kosketa pitkään hälytystä, jonka haluat välittää eteenpäin. Näkyviin tulee alavalikko.
2. Napsauta **Forward as conversation** (Välitä keskusteluna).
3. Kirjoita **Kenelle**-tekstikenttään sen yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi tai puhelinnumero, jolle haluat välittää hälytyksen, tai hae yhteyshenkilö napsauttamalla **Yhteyshenkilöt**-kuvaketta . Nimen tai numeron alku näyttää luettelon mahdollisista osumista.
4. Napsauta sen yhteyshenkilön nimeä, jolle haluat välittää hälytyksen.
5. Lisää hälytykseen viesti napsauttamalla tekstin sisältöosaa ja lisäämällä teksti.
6. Lähetä hälytys napsauttamalla **Lähetä**-kuvaketta .

5.5 Poista hälytyksiä

1. Kosketa pitkään hälytystä, jonka haluat poistaa. Näkyviin tulee alavalikko.
2. Napsauta **Poista hälytys** tai **Poista kaikki hälytykset**, jos haluat poistaa kaikki hälytykset.
3. Näkyviin tulee varoitusviesti. Vahvista poisto napsauttamalla **Delete** (Poista).

6 Viestien käsittely (vain iOS)

6.1 Viestien vastaanottaminen

Viestit näkyvät keskustelusivulla. Lukemattomien viestien määrä näkyy keskustelukuvakkeen oikeassa yläkulmassa.

1. Lue uusia viestejä napsauttamalla **Keskustelu**-kuvaketta  tai pyyhkäisemällä vasemmalle. Uuden viestin sisältävän keskusteluketjun kohdalla näkyy sininen ympyrä.
2. Lue uusi viesti napsauttamalla keskusteluketjua.
3. Palaa **Keskustelu**-sivulle napsauttamalla **Takaisin**-painiketta tai **Sulje**-kuvaketta .

6.2 Viestien lähettäminen

1. Napsauta **Keskustelu**-kuvaketta  tai pyyhkäise vasemmalle.
2. Napsauta **Kirjoita**-kuvaketta .
3. Kirjoita **Kenelle**-tekstikenttään yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi tai puhelinnumero, tai hae yhteyshenkilö napsauttamalla **Yhteyshenkilöt**-kuvaketta . Nimen tai numeron alku näyttää luettelon yhteensopivista tuloksista.
4. Napsauta sen yhteyshenkilön nimeä, jonka kanssa haluat keskustella.
5. Napsauta **Kirjoita viesti** -tekstikenttää ja kirjoita viesti.
6. Lähetä viesti napsauttamalla **Lähetä**-kuvaketta .
7. Palaa **Keskustelu**-sivulle napsauttamalla paluupainiketta tai **Sulje**-kuvaketta .
8. Palaa **Häilytykset**-sivulle napsauttamalla **Takaisin**-kuvaketta  tai pyyhkäisemällä oikealle.

6.3 Viestien hakeminen

1. Napsauta **Keskustelu**-kuvaketta  tai pyyhkäise vasemmalle.
2. Napsauta **Hae**-kuvaketta .
3. Kirjoita **Hae** -tekstikenttään viestin lähettäneen yhteyshenkilön etu- tai sukunimi. Nimen alku näyttää luettelon mahdollisista osumista.
4. Palaa **Keskustelu**-sivulle napsauttamalla paluupainiketta tai **Sulje**-kuvaketta .
5. Palaa **Häilytykset**-sivulle napsauttamalla **Takaisin**-kuvaketta  tai pyyhkäisemällä oikealle.

6.4 Viestien poistaminen

1. Napsauta **Keskustelu**-kuvaketta  tai pyyhkäise vasemmalle.
2. Napsauta keskustelusivulla **Poista**-kuvaketta . Keskusteluketjujen viereen tulevat näkyviin valintaruudut.
3. Napsauta niiden keskusteluketjujen valintaruutuja, jotka haluat poistaa, tai napsauta **Valitse kaikki**, jos haluat poistaa kaikki keskustelut.
4. Napauta **Poista**. Näkyviin tulee varoitusviesti.
5. Vahvista poisto napsauttamalla **Delete** (Poista).

7 Varallaolotila Android-laitteissa

Oma profiili -kohdassa voit määrittää tilaksi **Varattu** tai **Käytettävissä**.

Pääset **Oma profiili** -kohtaan joko alanavigointipalkista tai napsauttamalla näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta.

Tavoitettavuuden tilan ilmaisu

Tavoitettavuuden tilan ilmaisemiseen käytetään seuraavia kuvakkeita:



Käytettävissä



Varattu



Kirjautunut ulos tai ei yhteydessä

Tilan muuttaminen

Napsauta **Oma profiili** -kohdassa  -kuvaketta ja valitse joko **Käytettävissä** tai **Varattu**.



Alice Martinez

@mobile3

Available 

8 Varallaolotila iOS-laitteissa

Jos se on konfiguroitu järjestelmään, käyttäjät voivat valita tavoitettavuuden tilansa laitteesta. Järjestelmä voi käyttää tätä tavoitettavuuden tilaa esimerkiksi kun päätetään, mille laitteille hälytys lähetetään.


Joissakin tapauksissa järjestelmäsovellukset voivat muuttaa laitteen tavoitettavuuden tilaa automaattisesti, esimerkiksi kun hälytysviesti on hyväksytty.

Tavoitettavuuden tilan ilmaisu


Vihreä	=	Käytettävissä
Punainen	=	Varattu
Harmaa	=	Kirjautunut ulos tai ei yhteydessä

Tilan muuttaminen

1. Napsauta **Hälytys**-näkylässä yläpalkkia.

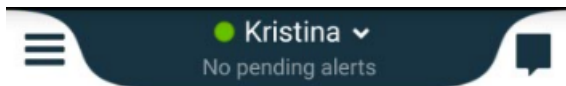


2. Muut varallaolotila napsauttamalla kyseistä kohtaa **Aseta oma tila** -valikossa, tai kirjaudu ulos napsauttamalla **Kirjaudu ulos**.

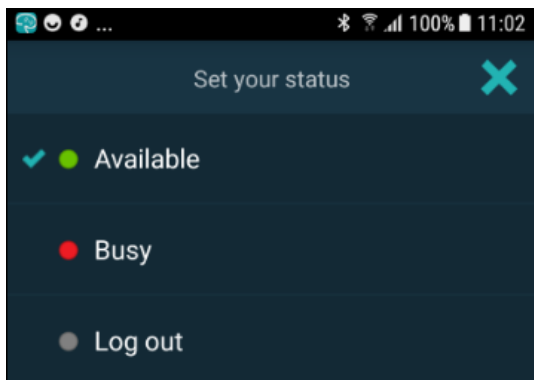


9 Varoitusviestit

Tässä on esimerkkejä varoitusviesteistä, joita laitteessa voi esiintyä. Napsauta varoitusilmoitusta nähdäksesi koko varoitusviestin laitteessa, jonka lukitus on avattu. Verkkoyhteyden katoamista lukuun ottamatta kaikkien varoitusten selvittäminen vaatii yleensä ylläpitäjän apua.

Kuva 7. Rajoitettu pääsy -viesti Android-laitteissa

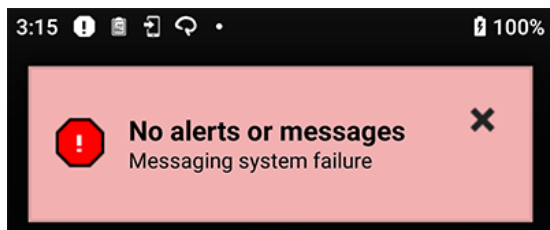

Kuva 8. Rajoitettu pääsy -viesti iOS-laitteissa

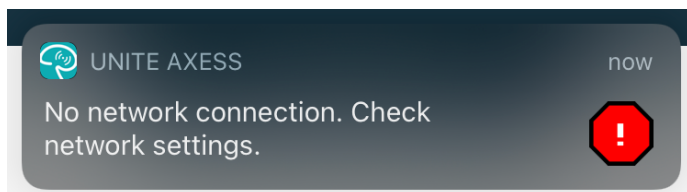


10 Asetukset

10.1 Asetukset Android-laitteissa

Android-laitteissa jotkin asetukset suoritetaan **Unite Axess for Smart Devices** -sovelluksessa ja toiset **Ascom Login** -sovelluksessa.

Asetukset Unite Axess for Smart Devices:ssa

1. Napsauta Unite Axess for Smart Devices:ssa **Valikko** -kuvaketta tai pyyhkäise oikealle ja napsauta sitten **Asetukset**.

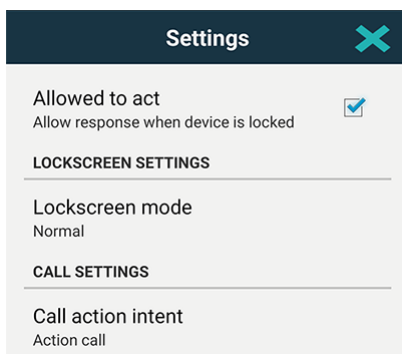


- Kun **Salli toiminta** -vaihtoehto on valittuna, pystyt vastaamaan hälytyksiin laitteella, joka on lukittu. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla valintaruutua.
- **Lukitusnäytön tilassa "Normaali"** Unite Axess for Smart Devices -sovellus toimii kuten muutkin sovellukset. **Sovellus**-tilassa Unite Axess for Smart Devices -sovelluksen sallitaan toimia lukitusnäytön päällä. Jos haluat muuttaa lukitusnäytön toimintaa, napsauta **Lukitusnäytön tila** ja valitse **Normaali** tai **Sovellus**.
- **Kutsutoiminnon tarkoitus** määrittää, miten laite yhdistää kutsun sen jälkeen, kun olet valinnut tämäntyyppisen vastauksen saapuvassa puhelussa. Laite voi joko kutsua välittömästi, kun vaihtoehto valitaan, tai näyttää numeron, minkä jälkeen sinun on käynnistettävä kutsu manuaalisesti. Kutsu-vaihtoehto on suositeltavampi, mutta vaihda numeron valintaan, jos sovelluksesi versio ei tue välittömiä kutsuja. Jos haluat muuttaa kutsun toimintaa, napsauta **Kutsutoiminnon tarkoitus** ja valitse **Toiminnon kutsu** tai **Toiminnon valinta**.

2. Palaa **Valikko**-sivulle napsauttamalla paluupainiketta tai **Sulje**-kuvaketta .

Ascom Login -sovelluksen asetukset

1. Napsauta laitteen **Ascom Login** -kuvaketta .
2. Napsauta sitten **Lisätietoja**-kuvaketta  näytön oikeassa yläkulmassa, ja napsauta **Asetukset**.
Palvelimen konfiguroinnista riippuen seuraavat asetukset ovat joko konfiguroitavissa laitteella tai lukittu:

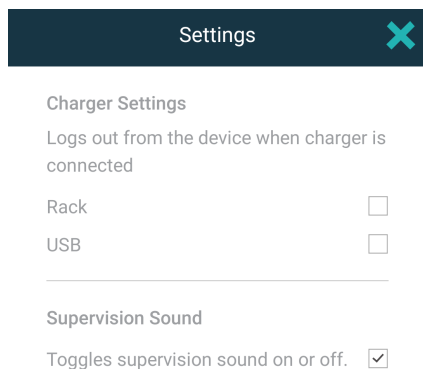

- Napsauta **Laturin asetukset** -kohdassa **Teline-** tai **USB-**valintaruutu, jos haluat aktivoida sen, että laite kirjautuu automaattisesti ulos latauksen aikana.
- Jos **Valvontäääni** on aktivoitu, laitteesta kuuluu äänimerkki kerran minuutissa, jos yhteys järjestelmään katkeaa.

3. Palaa aloitussivulle napsauttamalla **Takaisin**-painiketta tai **Sulje**-kuvaketta .

10.2 Asetukset iOS-laitteissa

Jos valvottu laite menettää yhteyden järjestelmään, saat siitä ilmoituksen viestillä ja äänimerkillä.

Äänivalinta on oletusarvoisesti **päällä** ja lukittu muokkausta varten, mutta se voidaan kytkeä **pois päältä**, jos asetuksen lukitus avataan.

Vaihda kytkimen asento kytkemään valvontäääni päälle ja pois päältä.

11 Tietoja sovelluksista

Tietoja asennetuista sovelluksista on kunkin sovelluksen Tietoja-näkymässä.

11.1 Unite Axxess älylaitteisiin

Tietoja-näkymässä näet Unite Axxess for Smart Devices-sovelluksen version, palvelimen nimen ja version, ohjelmistoversion ja älylaitteesi mallin, käyttäjänimesi ja viestinumerosi, tiedot valmistajasta sekä vastuuvapauslausekkeen.

Kun napsautat **Privacy Policy** (Yksityisyyden suojaa koskeva politiikka) -linkkiä, avautuu Ascom Unite -tuotteita koskevien tietosuojaperiaatteiden lisäys. Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa lisäyksessä käsitellään Ascomin Unite Axxess for Smart Devices -sovelluksen käyttöönottoa ja käyttöä yrityksesi mobiililaitteissa.

Näkymässä on myös ohjeet siitä, miten löydät lisätietoja Unite Axxess for Smart Devices sovelluksesta.

Ohjelmiston Tietoja- tiedostossa	Symbolin nimi	Kuvaus
	CE-merkintä	Osoittaa, että laite on yhteensopiva Euroopan neuvoston 14. kesäkuuta 1993 antaman lääkinällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY säännösten kanssa, jolloin laitetta voidaan siirrellä vapaasti Euroopan yhteisön alueella ja se voidaan ottaa käyttöön käyttötarkoituksensa mukaisesti.
	Valmistaja	Ilmaisee lääkinällisen laitteen valmistajan sekä tämän osoitteen ja puhelinnumeron.
	Valmistuspäivämäärä	Ilmaisee lääkinällisen laitteen valmistuspäivämäärän.
	Katso käyttöohjeita	Ilmaisee, että käyttäjän on katsottava käyttöohjeita.
	Luettelonumero	Ilmaisee valmistajan luettelonumeron lääkinällisen laitteen tunnistamiseksi.
	Huomio	Ilmaisee, että käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeissa oleviin tärkeisiin varoittaviin tietoihin, kuten varoituksiin ja varotoimiin, joita ei eri syistä voida esittää itse lääkinällisessä laitteessa.
UDI	Laitteen yksilöllinen tunniste (Unique Device Identifier)	Ilmaisee laitteen yksilöllisen tunnisteen, josta laite voidaan asianmukaisesti tunnistaa sen jakelun ja käytön kautta.

1. Napsauta valikkokuvaketta  tai pyyhkäise oikealle.
2. Napsauta **About** (Tietoja) -painiketta.
3. Palaa valikkosivulle napsauttamalla paluupainiketta tai sulkemiskuvaketta .

11.2 Ascom Login (vain Android)

Saat lisätietoja Ascom Login -sovelluksesta napsauttamalla laitteesi Ascom Login -kuvaketta . Napsauta Lisätietoja-kuvaketta  näytön oikeassa yläkulmassa, ja napsauta sitten **Tietoja**.

Tietoja-näkymästä löydät sovellusversion, ohjelmistotunnisteen ja tietoja valmistajasta.

Kun napsautat **License** (Lisenssi) -linkkiä, avautuu lisenssitietoja sisältävä näkymä.

Palaa aloitussivulle napsauttamalla paluupainiketta tai Sulje-kuvaketta .

12 Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Online-ohje Unite Axess for Smart Devices-sovelluksessa

13 Asiakirjahistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
A	23. maaliskuuta 2018	Ensimmäinen julkaistu versio
B	21. syyskuuta 2018	Lisätty 3.1.1 Kuvakkeet, sivu 6
C	1. marraskuuta 2018	Lisätty CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.
D	10. kesäkuuta 2019	Lisätty "Käyttötarkoitus Connect for Clinical System -järjestelmän luokan IIIb kanssa EU/EFTA:ssa" lukuun 2 Käyttötarkoitus, sivu 2 ja luku 9.1 Kirjautu sisään / kirjautu ulos Ascom Loginin kautta, sivu 15.
E	7. lokakuuta 2020	3.1 Asettelu Android-laitteissa, sivulla 3: Uusi. 3.2 Asettelu iOS-laitteissa, sivulla 4: Uusi. 3.3 Kuvakkeet, sivulla 4: Lisätty kuvakkeet.4.1 Sisään- ja uloskirjautuminen Android-laitteissa, sivulla 6: Uusi". 4.2 Sisään- ja uloskirjautuminen iOS-laitteissa, sivulla 7: Uusi. 5.1.1 Hälytysten käsittely Android-laitteissa, sivulla 8: Uusi. 5.1.2 Hälytysten käsittely iOS-laitteissa, sivulla 8: Uusi. 5.4 Hälytyksen välittäminen (vain iOS), sivulla 11: Lisätty vain iOS. 6 Viestien käsittely (vain iOS), sivulla 12: Lisätty huomautus "Koskee vain iOS-laitteita". 7 Varallaolotila Android-laitteissa, sivulla 13: Uusi 8 Varallaolotila iOS-laitteissa, sivulla 14: Uusi. 9 Varoitusviestit, sivulla 15: Vaihdettu kuvat.

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Puhelin +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom