

用户手册

Ascom Unite View

ascom

关于此文档

此文档介绍 Ascom Unite View 应用程序。此文档适用于 Unite View 应用程序的用户。

HIPAA 免责声明

本文档中的所有个人信息或受保护的健康信息均为虚构。如有雷同，纯属巧合。本产品的所有者和用户全权负责遵守所有受保护健康信息方面的隐私权法。用户使用本产品即同意针对因侵犯受保护健康信息而产生的所有索赔、诉讼而赔偿本产品的制造商或销售商。



地址

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

电话 +46 31 55 93 00

www.ascom.com

内容

1 关于 Unite View	1
1.1 显示患者信息的 Unite View	1
1.2 警示和注意事项	1
1.2.1 有关警报声音的信息	2
2 Unite View 用户界面	3
2.1 在软件的“关于”文件中	3
2.2 警报视图	4
2.2.1 警报列表的手动和自动模式	5
2.2.2 警报状况概述	5
2.3 提醒视图	6
2.4 患者视图	6
2.5 任务视图	6
2.6 员工列表	6
2.6.1 折叠/展开员工列表	7
3 处理警报	8
3.1 登录	8
3.2 打开警报列表	8
3.3 升级警报优先级或清除警报	10
3.3.1 升级警报优先级	10
3.3.2 清除警报	10
3.4 创建任务	11
3.4.1 编辑任务	11
3.4.2 清除任务	11
3.5 发送带有警报的消息或/和将警报转发给另一收件人	11
3.6 解除警报	12
3.6.1 撤销已解除的警报	12
3.7 退出	13
4 查看提醒	14
5 使用任务	15
5.1 编辑任务	15
5.2 清除任务	15
6 处理患者信息	16
6.1 获取患者概况	17
6.2 显示有关特定患者的详细信息	17
6.3 添加患者	18
6.4 编辑患者信息	18
6.5 移动患者	18
6.6 移除患者	19
7 使用消息	20
7.1 发送消息	20
8 呼叫工作人员	21
9 获取警报和位置概况	22
10 设置	24
10.1 更改操作员模式	26
10.2 排序顺序	26
10.2.1 警报排序	26
10.2.2 在患者床位视图为患者排序	26

10.2.3	在患者列表视图中筛选患者	26
10.3	警报筛选	27
10.3.1	按优先级筛选	27
10.3.2	按类别筛选	27
10.3.3	按位置筛选	28
10.4	列出位置标志	28
10.5	激活/取消激活警报声音	29
10.6	不同集成中的默认警报特性	29
11	相关文档	30
12	文档历史记录	31
附录 A	警报详细信息	32
A.1	自动模式下的警报详细信息	32
A.2	登录后的警报详细信息，以及在手动模式中设置	32
A.3	Unite View 图标	33
附录 B	中央监测设备 (CMU) 高级调度	38

1 关于 Unite View

欢迎使用 Ascom Unite View 应用程序，该应用程序专门用于帮助护理人员进行日常工作。

Unite View 应用程序提供系统中事件和警报的概览。将向您通知需要帮助的患者以及患者检测设备发出的任何警报。为了帮助您快速了解当前情况，Unite View 应用程序将显示警报发生位置、时间以及警报类型。

您还可以将信息发送给已分配的工作人员。

您将可以根据系统提供的状态图标，查找携带低电量设备的工作人员的位置。



该应用程序不能替代主要监测系统和护理呼叫系统，只能作为冗余并行通知的方法使用。

产品预期用途

Unite View 旨在用于提供患者监测系统中的警报通知、护理呼叫系统中的事件以及来自其他非医疗设备的事件，以便向医疗保健专业人员提供辅助视觉指示手段。

收到患者监测系统中的警报通知时，操作员可将通知重新发送至显示设备。如果操作员在收到警报通知时未执行操作，Unite Connect for Patient Monitoring 配置将用作反馈。

Unite View 不会修改患者监测系统中报警设备的行为，也不用于取代或更改报警设备中的主要警报功能。

收到护理呼叫系统的事件通知时，操作员可以在与患者交流后，在护理呼叫系统为特定角色创建任务。

收到护理呼叫系统发出的事件通知时，Unite View 操作员可以在与患者交流后提升事件的优先级。通过护理呼叫系统的配置来确定在 Unite View 中是否可提升事件，以及可将事件提升为哪些优先级。

如果护理呼叫系统显示是事件的取消状态，Unite View 可以向护理呼叫系统发送取消事件的请求。

Unite View 可以根据患者信息循环处理特定患者或一群患者的工作流程。如果未在预设的时间范围内完成循环工作流程，Unite View 将请求护理呼叫系统为特定角色创建任务。

Unite View 可以在 Unite Connect for EHR 中更新患者信息。Unite View 不会更改所连接临床信息系统中的信息。

Unite View 适合专业临床人员使用，并且依赖于正确使用放在医疗设备中某个位置的通信基础设备和显示设备。

Unite View 是安装在与患者接触不到的设备上的计算机软件。

1.1 显示患者信息的 Unite View

如果您的系统中包含有关患者的信息，Unite View 应用程序可以显示患者的姓名、性别、年龄等。



小心

在使用产品显示受保护患者信息的产品时，应小心谨慎，防止未经授权的用户获取信息。

1.2 警示和注意事项

请阅读并遵守本手册中列出的所有注意事项。

“警告”用于介绍可能直接或间接引起或导致危险情况的物品，这些情况可能造成严重的人身伤害、损坏人体健康或损害财产或环境。

“小心”用于提醒用户保持谨慎，以安全和有效地使用设备。

“注意”用于表示其他可用的一般信息。

**警告**

任务并不用于指导患者护理。该功能只能用于服务，例如为患者提供额外的毯子或一杯水。

**警告**

消息传送并不用于指导患者护理。该功能只能用于一般消息传送。

**警告**

患者信息并不用于指导患者护理。该功能只能用于有关患者的一般信息。

**重要**

Unite View 是为在 1 米的操作范围内便于工作人员而设计。

1.2.1 有关警报声音的信息

声音警报通知的声压级可使用在安装 Unite View PC 来调整，也可在使用的任何外置扬声器上调整。

包含警报声音的默认声音文件是专为用于警报通知而设计。

**警告**

低于环境声级的声压级，会妨碍用户识别警报通知。

在其他 Ascom 显示设备上测试的声压级

	中优先级警报 (1 声哔哔声)	高优先级警报 (汽笛)
最低：	43.51 dB	43.24 dB
最高：	70.72 dB	67.24 dB



可调节音频信号的声压级范围：43.24 db - 70.72 dB。



如果将 Unite View 与外置扬声器配合使用，请确保扬声器能够重现上表所述的音量范围。

2 Unite View 用户界面

Ascom Unite View 包含三个主要视图，一个用于接收 警报，另一个用于 患者 相关信息，第三个用于处理任务。如果您的设备使用提醒，例如对未禁用的警报，则应用程序中可能还存在 提醒 视图。


Unite View 应用程序中可用的视图以及警报信息的显示方式取决于您的系统以及应用程序的配置方式。

导航栏允许您在可用视图之间切换。您的选择将高亮显示。

导航栏中，警报和任务旁边的圆圈中的数字分别显示警报和任务的数量。例如，如果您使用“任务”视图并收到新警报，则会在警报旁边的圆圈中以红色通知您。如果您处理警报并收到新任务，情况也是如此。

导航栏中的图标表示不同的设置（如手动模式、筛选、已禁用警报声音、警报数量等）。手动模式表示您可以覆盖预先设置的转发链，例如快速在发送给收件人的警报之前添加一条消息。筛选用于显示所有位置子集发出的警报或设备中的警报类型。

图 1. 用户界面

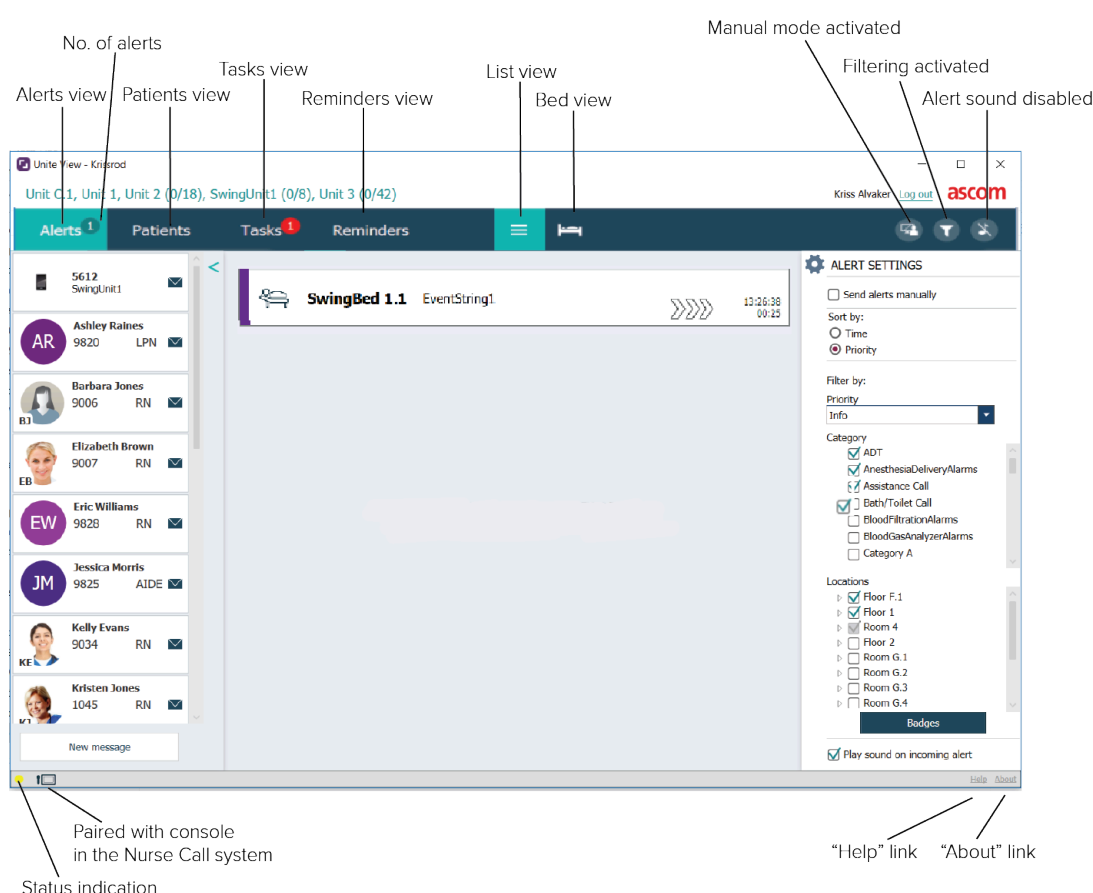

底部的状态栏在状态指示旁边有一个控制台图标，表示您的 Unite View 应用程序已与护理呼叫系统的控制台配对。通过单击控制台图标，您将了解应用程序与哪个控制台配对。

单击“帮助”链接将打开一个窗口，其中包含有关 Unite View 应用程序的工作说明和其他信息。

有关制造商 Ascom 的地址、软件版本等信息，请单击“关于”链接。

2.1 在软件的“关于”文件中

以下信息可在软件的“关于”文件中找到。

在软件的“关于”文件中	符号标题	说明
	CE 标记	表示设备符合 1993 年 6 月 14 日关于医疗设备的理事会指令 93/42/EEC 的规定，使其能够在欧洲共同体内自由移动并按照其预期用途投入使用。
	制造商	表示医疗设备制造商，包括地址和电话号码。
	制造日期	表示医疗设备的制造日期。
	查阅使用说明	表示用户需要查阅使用说明。
	目录编号	表示制造商的目录编号，以便识别医疗设备。
	小心	表示用户需要查阅使用说明，以便了解重要的警示信息，例如出于各种原因医疗设备本身无法提供的警告和预防措施。
UDI	唯一设备标识符	表示足以在分发和使用中充分识别设备的唯一设备标识符。


2.2 警报视图

在警报视图中，接收的警报显示在列表中。警报可以是患者呼叫一杯水或另加一条毯子，也可以是监测患者的设备触发警报。

所有警报按照类别/优先级或按时间顺序列出。这意味着拥有最高优先级的警报或最新的警报都位于顶部。

如果应用程序启动时主工作区为空，则表示当前设备中不存在警报。当前排班的所有员工都列在左侧窗格中。

图 2. 接收警报

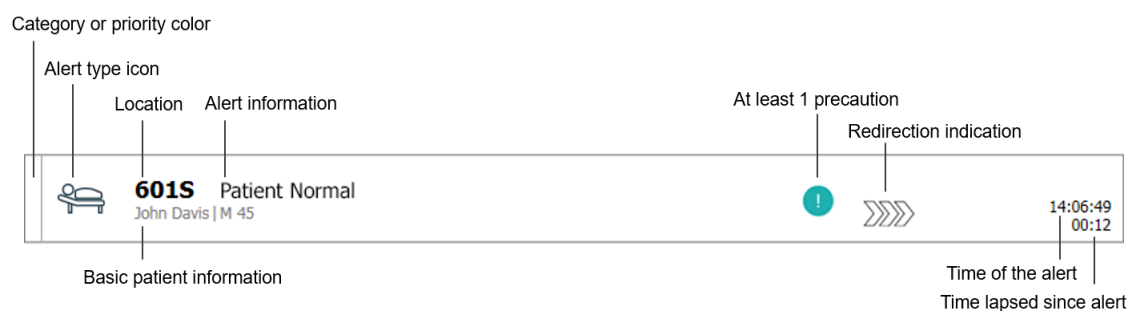


警报可以显示以下信息：

- 类别或优先级：警报的 或优先级通过彩色条纹表示。颜色是设备预先设定的。如果彩色条纹的下部与条纹的其余部分颜色不同，则表示警报的优先级在监测患者的 中发生了变化。下部显示先前的优先级状态。
- 警报类型：参见 [附录 A 警报详细信息, 第 页 32](#)。
- 发出警报的位置以及有关警报的简短信息。
- 如果您的系统中包含有关患者的信息，Unite View 可以显示患者姓名、性别和年龄等信息。患者是否拥有任何可以显示的注意事项信息，例如，正在节食、过敏等

- 警报时间和警报发布后经过的时间。
- 转发链中警报的当前位置。例如，如果第一个收件人在预设时间内未接受警报，则 Unite View 应用程序将直观地显示该警报已重新发送至第二个收件人。
它还显示当前正在接收警报的工作人员的姓名和照片。图片根据转发链中的步骤不断更新。当用户接收警报时，工作人员旁边会显示绿色复选标记。

图 3. 转发链

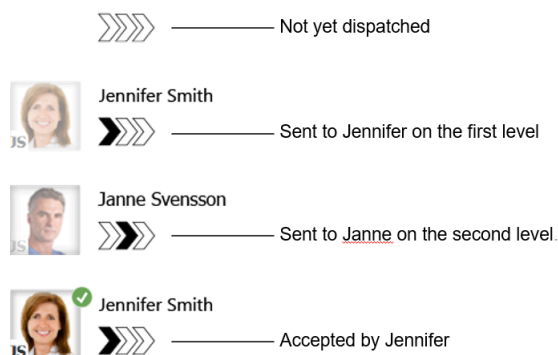

- 正在与患者进行的通话以“正在进行通话”的图标表示。

图 4. 正在进行通话



- 如果工作人员位于警报开始的位置，则通过高亮显示部分警报并添加此工作人员的角色和图片或首字母缩写进行指示。

图 5. 员工在场



2.2.1 警报列表的手动和自动模式

警报列表视图可针对警报流程分别设置两种不同的模式，即手动模式和自动模式。

手动模式

手动模式意味着用户可以在向转发链中的收件人发送警报之前添加消息和/或升级优先级。

此外，手动模式还允许用户覆盖预设设置，例如加速警报、将警报转发给另一收件人，甚至在用户发现警报不正确时停止发送警报。

自动模式

自动表示着警报遵循预设的转发链。

2.2.2 警报状况概述

警报也可以以床位为中心显示，其中提供了警报情况的快速概览。它用于提供警报和事件信息的图形概览，最适合放置在适当位置的大屏幕上。以床位为中心的视图不允许用户覆盖预先设置的事件序列。有关更多详细信息，请参见 [9 获取警报和位置概况, 第 22 页](#)。

2.3 提醒视图

如果提醒适用于您的系统，则在提醒视图中显示未清除的警报。提醒视图在收到第一条接收的提醒时出现，并在 **Unite View** 应用程序关闭之前保持可见状态。

2.4 患者视图

患者视图显示关于患者的信息、来自 EHR 系统的信息或手动输入的信息。单击一行将显示关于患者的更多详细信息。在这个视图中可以添加 EHR 系统中未提供的患者信息。它还显示分配给患者/位置的工作人员。

患者视图使用两种不同的方式来显示关于患者和位置的信息，分别是以列表和床位/位置为中心的视图。

- 在 列表 视图中，列出了该设备中的所有患者/已占用位置。
- 在 床位 视图中，关于患者/位置的信息以床位为中心显示，可以快速浏览整个设备。同时显示设备中已占用和未占用的位置 (床位)。

2.5 任务视图



只有当系统配备 **Telligence** 护理呼叫系统时才能创建任务。

在 任务 视图中，可以创建任务并将其发送给工作人员，例如与患者交谈后的操作。任务也可以在警报视图中接收的护理呼叫警报中创建。


2.6 员工列表

Unite View 应用程序将显示一个列表，其中包含所有分配给该排班的工作人员。该列表显示员工信息，如姓名、电话号码、姓名缩写和照片。如果没有照片，则使用首字母缩写。分配给该排班的电话也将在列表中可见。

如果系统配有实时定位系统 (RTLS)，则该列表也可以显示工作人员的实际位置。

工作人员名单包括消息传递设备，请参见 [7 使用消息](#), 第 页 20。

图 6. 工作人员

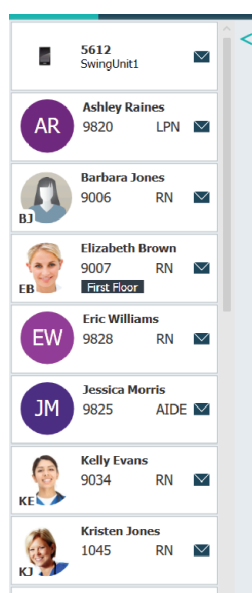

2.6.1 折叠/展开员工列表

如果需要放大主工作区，可以通过单击顶部的箭头  (员工列表右侧) 来折叠员工列表。单击箭头  可将其再次展开。

3 处理警报



用户只有拥有合法的访问权限才能覆盖 Unite View 应用程序中的预设转发链，并且必须为应用程序启用“手动发送警报”设置。该设置可以预先设置，但也可以在应用程序中设置。该设置可以预先设置，但也可以在应用程序中设置，请参见 [10.1 更改操作员模式](#), 第 页 26。




本文介绍的所有功能可能不支持您的 Unite View 应用程序。

3.1 登录

1. 单击 Ascom Unite View 桌面图标。登录窗口将打开。
2. 在文本字段中输入您的 用户名 和 密码 文字区域，然后单击登录。
Unite View 应用程序中打开的视图以及警报信息的显示方式取决于 Unite View 应用程序的配置方式。


3.2 打开警报列表

1. 在导航栏中，单击警报，然后单击列表图标 。如果已预先设置，此视图将在登录时打开。所有警报都显示在列表中。
为了引起对新接收警报的注意，警报将使用指示优先级或分类级别的颜色填充。约 1 秒后填充颜色消失，只剩下左侧所示的彩色条纹。出现在警报上的类别图标向您提供有关警报的其他信息。参见 [A.3.2 接收警报图标](#), 第 页 36。

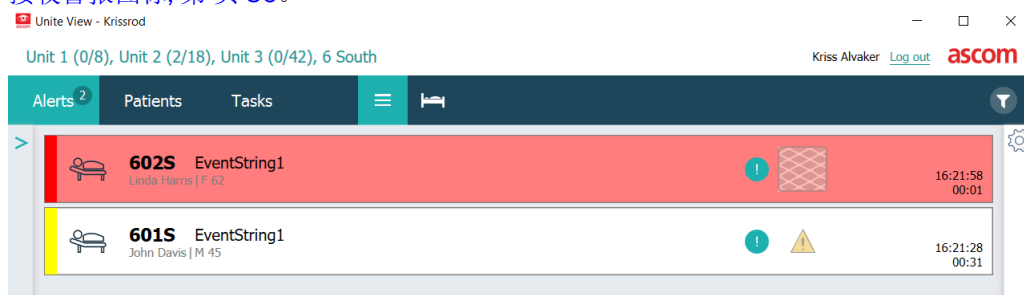

如果应用程序启动时主工作区为空，则表示当前设备中不存在警报。

2. 在列表中，单击警报以展开并查看详细信息。

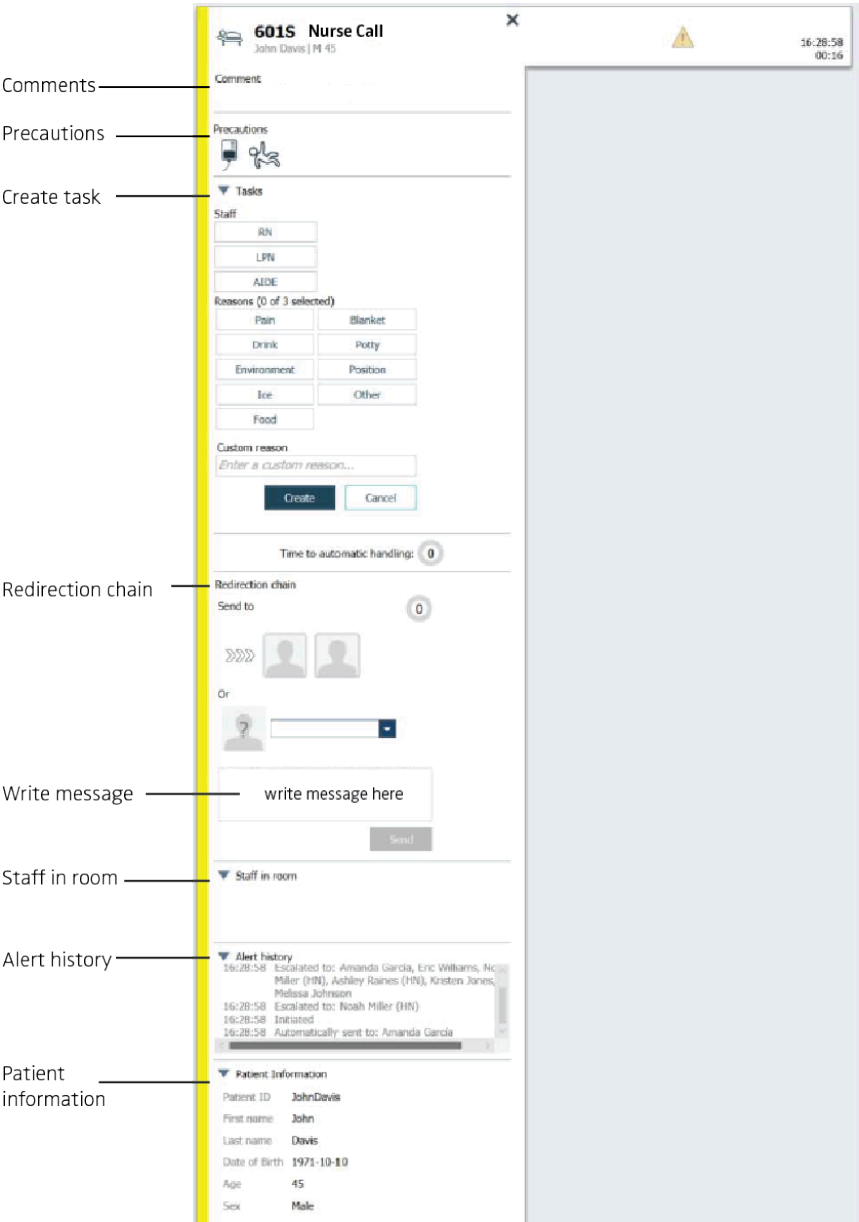

如果您的系统支持，您现在可以覆盖预设的转发链。请注意，所有已列出的可能性可能未得到允许。


- 升级警报优先级，请参见 [3.3 升级警报优先级或清除警报](#), 第 页 10。
- 清除警报，请参见 [3.3.2 清除警报](#), 第 页 10。
- 创建服务任务，请参见 [3.4 创建任务](#), 第 页 11。
- 将消息添加到接收警报或/和转发警报，请参见 [3.5 发送带有警报的消息或/和将警报转发给另一收件人](#)。
- 解除警报，请参见 [3.6 解除警报](#), 第 页 12。

如果您不在预设时间内 (默认为 45 秒) 进行互动，则警报将自动转发给指定的收件人。

3.3 升级警报优先级或清除警报




只有在护理呼叫系统支持并且允许特定警报类型的情况下才可行。

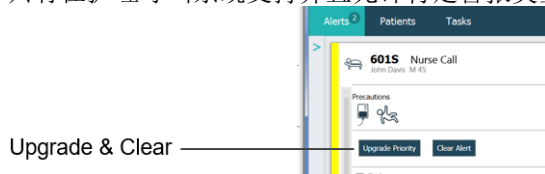

3.3.1 升级警报优先级

在接收护理呼叫时，正在进行语音呼叫期间或在与患者通话之后，您可以升级警报的优先级。例如，患者按下按钮呼叫护士。在您与患者交谈中，如果您认为情况比较严重时，可以升级到更高优先级。

1. 在通话期间或通话结束后，单击列表中的护理呼叫警报以展开并查看详细信息。
2. 单击升级优先级。
3. 当前优先级显示在左侧。在提升优先级至列表中选择新的优先级。

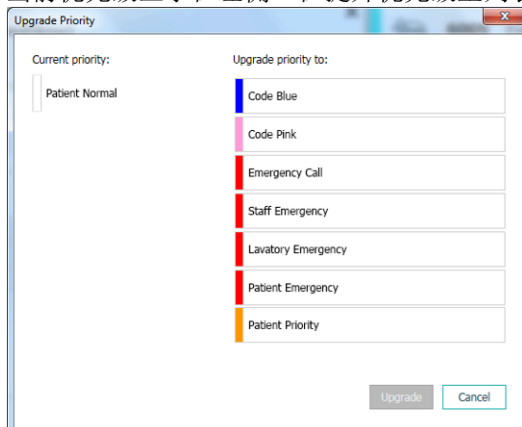

4. 单击升级。
升级后的呼叫将作为新的护理呼叫警报发送。

3.3.2 清除警报



重要

“清除”功能还将清除来自当前设备发出的呼叫。

在接收护理呼叫时，正在进行语音呼叫期间或在与患者通话之后，您可以清除警报。

例如；患者错误地按下按钮，并发送拥有正常优先级的护理呼叫。当您与患者交谈并了解无需采取进一步行动时，您可以清除警报。

1. 在通话期间或通话结束后，单击列表中的护理呼叫警报以展开并查看详细信息。
2. 单击清除。确认窗口打开。
3. 单击确定以确认。
警报被清除后，折叠警报可使其从列表中消失。

3.4 创建任务



只有护理呼叫系统支持该功能时才可执行。

任务可以通过接收的护理呼叫警报创建。当您发现患者有需要时，您可以创建一项任务并发送给适当的工作人员。

1. 在列表中，单击警报以展开并查看详细信息。
2. 如果尚未展开，则单击任务。
3. 选择您要接收任务的员工角色。
4. 选择原因，可以是预定义的原因，也可以在自定义原因文本字段中输入原因。任务最多可以添加三个原因。
5. 单击创建。

任务创建后，将被添加到任务列表中。

3.4.1 编辑任务

1. 在警报列表中，单击警报以展开并查看详细信息。
2. 单击任务（如果尚未展开）。
3. 单击编辑。
4. 执行更改并单击创建。

3.4.2 清除任务

1. 在列表中，单击警报以展开并查看详细信息。
2. 单击任务（如果尚未展开）。
3. 单击清除，确认窗口打开。
4. 单击确定以确认。

3.5 发送带有警报的消息或/和将警报转发给另一收件人




只有当您的系统支持该功能时才执行。

您可以将警报转发给另一收件人，例如，在您知道另一工作人员离患者更近或更适合处理特定类型的警报时。您还可以发送带有消息的警报，例如，添加更多关于患者的信息。

1. 在列表中，单击警报以展开并查看详细信息。
2. 您可以覆盖预设的转发链并将警报发送给另一收件人。
您可以在预设转发链中选择一个收件人，或者在下拉列表中选择转发链外的某个人。该列表将为您提供分配给该排班的所有可用收件人。

3. 您可以在文本框中添加一条消息

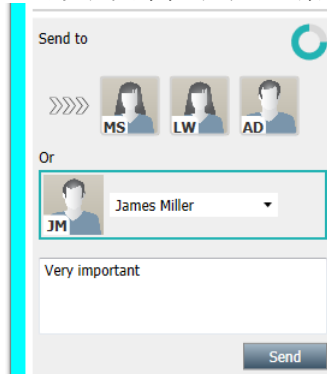

4. 准备就绪后，单击发送。将警报和任何消息一起发送给预设的转发链中的工作人员，或发送给您选择的人员。

如果收件人拒绝，警报将被发送回 **View** 应用程序，您可以发送警报至另一收件人。

3.6 解除警报



只有当您的系统支持该功能并且您拥有解除警报的合法访问权限时才执行。


如果发送警报的设备支持解除功能，则您可以停止将警报发送给指定的收件人。必须选择解除警报的理由。解除警报的原因是预配置的。

已解除的警报不会发送给指定的收件人，但它在主工作区中仍保持可见。



“解除”功能不会解除来源处的警报。


1. 在列表中，单击警报以展开并查看详细信息。
2. 在选择原因下拉列表中，选择您要解除警报的原因。
3. 单击解除。

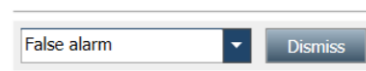

3.6.1 撤销已解除的警报

解除警报时，解除按钮将替换为撤销按钮。此按钮可用于重新启用警报。

1. 在列表中，单击警报以展开并查看详细信息。
2. 单击已解除的警报即可展开并查看详细信息。

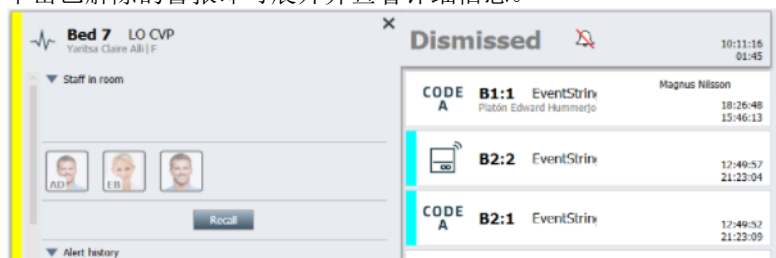

3. 单击撤销。
将再次启用警报，并且您将拥有与警报解除前相同的选项，即，在警报自动发送到指定收件人之前，可以在预设时间内（默认 45 秒）进行交互。

3.7 退出

单击右上角的退出。

4 查看提醒



提醒视图仅在提醒应用于您的系统后才会显示。

当在员工控制台或护理呼叫系统的报警器中设置提醒时，它也会出现在 **Unite View** 应用程序的提醒视图中。提醒是针对无法立即处理的呼叫设置的。

1. 登录到 **Unite View**，请参见 [3.1 登录, 第 页 8](#)。
提醒视图在接收到第一条提醒出现。
2. 要查看提醒，请单击导航栏中的提醒。
通话取消时提醒消失。根据警报的优先级和消耗的时间来列出提醒。
即使没有提醒，提醒视图也将保持可见状态，直到 **Unite View** 应用程序关闭。下一次，登录到应用程序后，提醒视图将隐藏，直到收到第一条提醒。

5 使用任务

在与患者交谈之后，可以创建任务。只有当您的系统可以创建任务时，任务视图才能在 Unite View 应用程序中显示。



用户需要拥有合法的访问权限才能覆盖 Unite View 应用程序中的预设转发链，并且必须为应用程序启用“手动发送警报”设置。该设置可以预先设置，但也可以在应用程序中设置，请参见 [10.1 更改操作员模式](#), 第 页 26。

1. 登录到 Unite View，请参见 [3.1 登录](#), 第 页 8。
2. 单击导航栏中的任务。
3. 在任务视图中，单击创建任务。
4. 在位置文本字段中，输入位置名称，或从列表选择一个位置。输入名称中的第一个字符将会显示包含这个字符的匹配列表。
5. 在员工列表中，选择要将任务发送到哪个角色。
6. 在原因列表中，选择预定义的原因并/或在自定义原因文本字段中输入原因。任务最多可以添加三个原因。
7. 单击创建。

任务创建后，将被添加到任务列表中。

5.1 编辑任务

1. 在任务列表中，选择任务并单击编辑。
2. 执行更改并单击创建。

5.2 清除任务

1. 在任务列表中，选择任务并单击清除。
2. 打开一个对话框，单击确定。

6 处理患者信息



用户需要拥有合法的访问权限才能查看信息并更新或添加信息。

如果连接到 EHR 系统，用户可以查看患者的健康信息，例如患者姓名、年龄和性别。用户也可拥有访问权限来添加新患者并更新有关患者的信息。

如果您没有为您提供患者信息的 EHR 系统，则可以使用患者视图并在其入院时添加有关新患者的信息。



来自 EHR 系统的患者信息不能在 Unite View 应用程序中更改。只能添加和/或编辑非 EHR 系统提供的信息。

患者列表视图显示设备中的所有患者。

图 7. 患者列表视图

Patient name	Admitted location	Status	Doctor	Nurse	Aide 1	Aide 2	Notes	Precautions
John Davis	601S	Routine		Amanda Gar...	Noah Miller			
Linda Harris	602S	Routine		Amanda Gar...	Noah Miller			
Lisa Jones	603S	Routine		Amanda Gar...	Noah Miller			

该列表可以显示以下信息：

- 患者的姓名
- 位置
- 患者的状态
- 责任医生
- 已分配的员工
- 任何有关患者的备注和注意事项

以床位/位置为中心的患者视图在设备中显示患者的概况以及未占用的床位。患者/位置由位置卡来表示。

图 8. 患者床位视图


601S John Davis Male 45 Amanda Garcia AIDE Noah Miller LPN EventString1	605S Karen Williams Female 49 Amanda Garcia AIDE Noah Miller LPN
602S Linda Harris Female 62 Amanda Garcia AIDE Noah Miller LPN	603S Lisa Jones Female 59 Amanda Garcia AIDE Noah Miller LPN

地点卡可以显示以下信息：

- 患者视图还包括消息传递设备，请参见 [7 使用消息](#), 第 页 20。

1. 登录到 Unite View，请参见 [3.1 登录](#)，第 页 8。
2. 在导航栏中，单击患者。
3. 在导航栏中，单击床位图标 。

1. 登录到 **Unite View**，请参见 [3.1 登录, 第 页 8](#)。
2. 在导航栏中，单击患者。该窗格默认以列表视图打开，但 **Unite View** 应用程序可能已预设为在床位视图中打开。
3. 如果要更改视图，请选择列表图标  或床位图标 。
详细信息可以显示在任意一个视图中。
4. 选择您的患者。您可以在主工作区域上方的搜索字段中搜索患者。筛选患者姓名，请在搜索字段中输入姓名或姓名的一部分。
5. 双击患者。将显示关于患者的详细信息。
6. 关闭详细信息视图，请单击关闭。

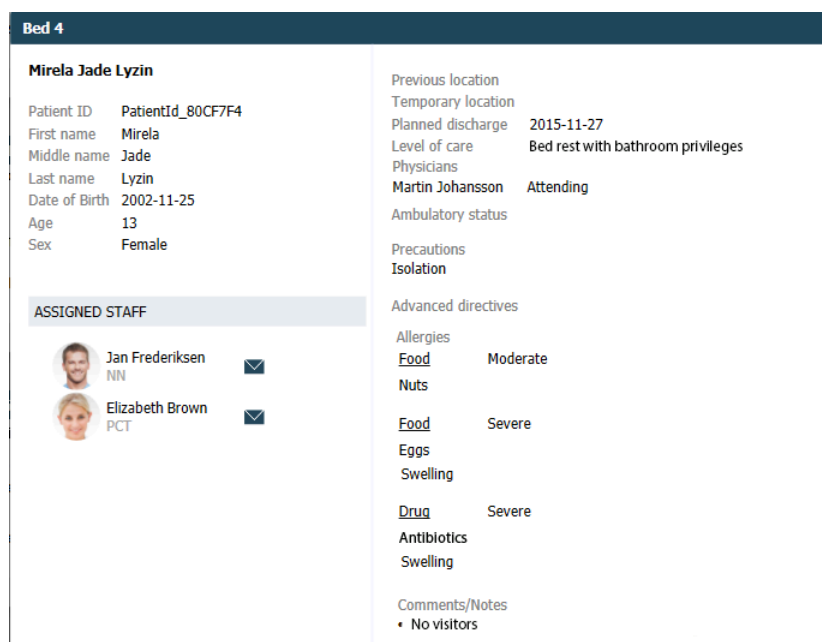

6.3 添加患者

患者可以由拥有合法访问权限的用户添加。

1. 在导航栏中，单击患者。该窗格默认以列表视图打开，但 **Unite View** 应用程序可能已预设为在床位视图中打开。
2. 如果它在床位视图中打开，请选择列表图标 。
3. 单击添加患者。此时将打开 添加患者 窗口。
4. 可以添加以下信息：

患者 ID*：	必填
名：	输入名字
中间名：	输入名字
姓氏：	输入名字
出生日期：	在下拉列表中选择日期或输入日期。
性别：	选择 男性、女性、其他 或 不明确（在下拉列表中）。
位置*：	必填。在下拉列表中选择位置。
注意事项：	单击添加并在列表中选择注意事项。
患者状态*：	必填。选择 常规、加急 或 紧急（在下拉列表中）。
医生：	输入名字
注释/备注：	如果您想添加一些关于患者的信息。

5. 准备就绪后，单击添加。

6.4 编辑患者信息

拥有合法访问权限的用户可以进行更改在 **Unite View** 应用程序中手动添加的患者信息。

1. 登录到 **Unite View**，请参见 [3.1 登录, 第 页 8](#)。
2. 在导航栏中，单击患者。该窗格默认以列表视图打开，但 **Unite View** 应用程序可能已预设为在床位视图中打开。
3. 如果需要更改视图，请选择列表图标  或床位图标 。编辑可以任何一个视图中完成。
4. 选择您的患者。您可以在主工作区域上方的搜索字段中搜索患者。要筛选患者姓名，请在搜索字段中输入姓名或姓名的一部分。
5. 双击患者。将显示关于患者的详细信息。
6. 在详细信息视图中，单击编辑。
7. 执行更改并单击保存。
8. 关闭详细信息视图，请单击关闭。

6.5 移动患者

如果您需要将患者从设备中的一个位置（床位）移动到另一个位置，您可以在 **Unite View** 应用程序中更新信息。

1. 登录到 **Unite View**，请参见 [3.1 登录, 第 页 8](#)。

2. 在导航栏中，单击患者。该窗格将默认以列表视图打开，但 Unite View 应用程序可能已预设为在床位视图中打开。
3. 如果要更改视图，请选择列表图标  或床位图标 。编辑可以任何一个视图中完成。
4. 选择您的患者。您可以在主工作区域上方的搜索字段中搜索患者。筛选患者姓名，请在搜索字段中输入姓名或姓名的一部分。
5. 双击患者。将显示关于患者的详细信息。
6. 在详细信息视图中，单击移动患者。
7. 在下拉列表中，为患者选择一个新位置。
8. 关闭详细信息视图，请单击关闭。

6.6 移除患者

当患者从医院出院或被转移到另一医疗机构（如康复医院或疗养院）时，您可以在 Unite View 应用程序中移除手动添加的患者信息。


请注意，您不能移除来自 EHR 系统的患者信息，只有在 EHR 系统更新后才能移除。


1. 登录到 Unite View，请参见 [3.1 登录, 第 8 页](#)。
2. 在导航栏中，单击患者。该窗格将默认以列表视图打开，但 Unite View 应用程序可能已预设为在床位视图中打开。
3. 如果要更改视图，请选择列表图标  或床位图标 。编辑可以任何一个视图中完成。
4. 选择您的患者。您可以在主工作区域上方的搜索字段中搜索患者。筛选患者姓名，请在搜索字段中输入姓名或姓名的一部分。
5. 双击患者。将显示关于患者的详细信息。
6. 在详细信息视图中，单击移除。
7. 打开一个对话框，单击是。

7 使用消息


给工作人员的消息可以通过 Unite View 应用程序发送。收件人无法回复该消息。

7.1 发送消息

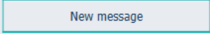
1. 单击员工列表或患者床位视图中的信封图标，或者单击员工列表下方的“”按钮。如果您通过员工列表发送消息，则会预先选择工作人员的姓名，如果您从患者床位视图中的特定位置发送消息，则还可以在主题文本字段添加位置名称以及患者姓名（如果可用）

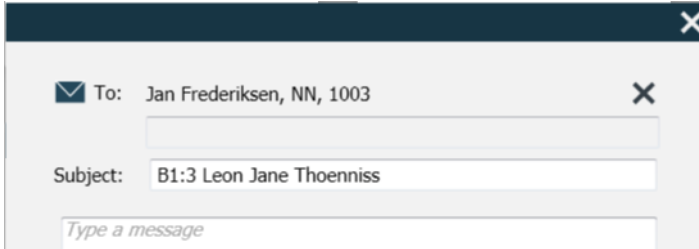

2. 添加收件人，请输入姓名中的第一个字母或编号中的数字。将显示含匹配结果的列表。

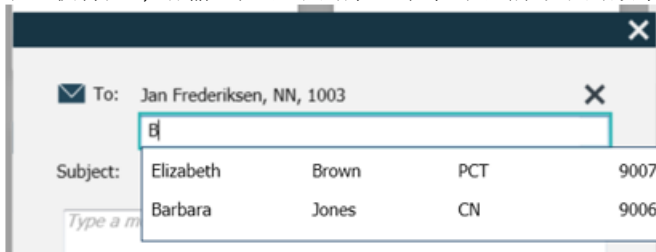


3. 选择收件人。通过单击姓名右侧的 × 标记可以移除选定的收件人。

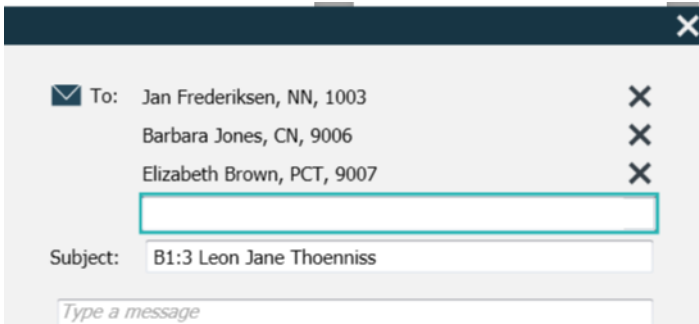

4. 在主题文本字段中添加主题，并在消息文本字段中添加您的消息。预定义的主题可以编辑。文本字段不能为空。
5. 单击发送。

如果消息无法发送，您将收到一个摘要反馈对话框，其中包含错误原因。如果有多个收件人，则在所有单个邮件的状态为已知时显示此反馈对话框。

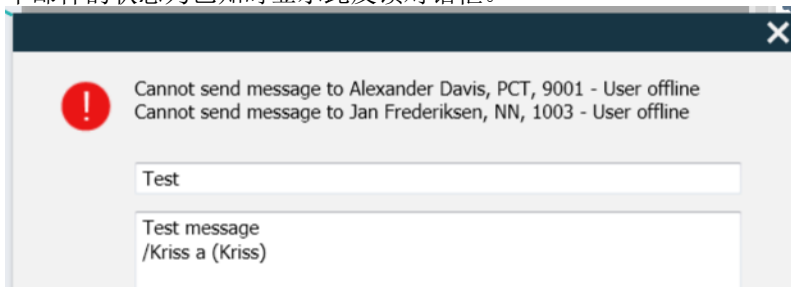


8 呼叫工作人员





需要 Unite View 操作员访问权限，且必须针对应用程序启用“显示呼叫按钮”设置。

如果您的系统支持，操作员可以将呼叫分配给班次的任何工作人员。可以从员工列表中建立呼叫，也可以从警报中的转发链建立呼叫。

1. 登录到 Unite View，请参见 [3.1 登录, 第 8 页](#)。
2. 单击导航栏中的警报。
3. 在员工列表中选择工作人员，或者右键单击警报中含收件人的圆圈。
右键单击转发链中含收件人的圆圈将显示呼叫按钮和呼叫图标，以及收件人的姓名和呼叫号码。

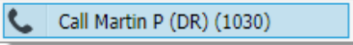4. 建立通话，请单击员工列表中的呼叫图标  或“呼叫”按钮 。

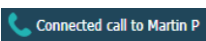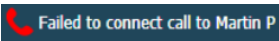导航栏中将表示成功的呼叫连接 。导航栏中还将表示失败的连接 。

9 获取警报和位置概况

在床位视图中，除非 Unite View 应用程序已自定义为仅显示特定位置，否则主工作区会显示设备中所有位置的可视视图。


配置为仅显示床位视图的 Unite View 应用程序的主要用例是无人操作（无用户登录）。

例如，位置可以是床位、房间或走廊。设备上分配的所有工作人员都在位置窗格旁边的窗格中列出。

每个位置都由带边框的位置名称表示，并带有位置类型的符号。如果所有位置都有简称，则会以圆圈框起；但如果任何位置的名称较长，则所有框架都将因适应较长的位置名而变长变宽。

1. 登录到 Unite View，请参见 [3.1 登录, 第 8 页](#)。
2. 在导航栏中，单击警报，然后单击床位图标 。如果已预先设置，此视图将在登录时打开。

图 10. 床位视图概览

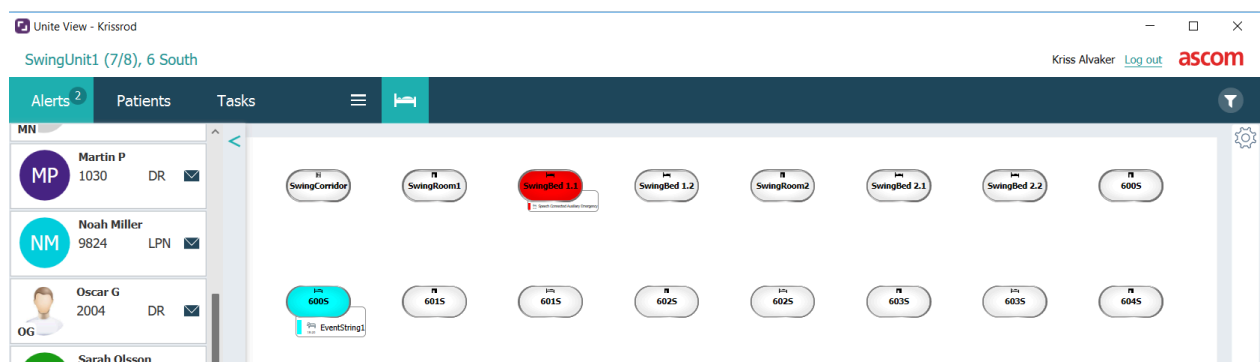

在上图中，操作员使用了筛选功能。筛选表示方式是菜单栏中的筛选图标 。所选设备中警报的数量显示在菜单栏的圆圈内，此圆圈附有 警报。

可以显示以下信息：

- 位置：警报将显示在其所属的位置。警报图标在 [A.3.2 接收警报图标, 第 36 页](#) 中列出。

表1 床位视图中的位置图标

床位	
病房	
走廊	
地板	

- 优先级：框架位置符号中的颜色表示属于该位置的所有警报中的最高优先级。颜色取决于已连接网关中的设置。

- 在位置下方添加警报描述以及警报时间。如果在该位置有协助呼叫、紧急呼叫或其他类型的警报，则该位置旁边会出现相应的图标。如果在同一位置有多个术语这些类别的警报，则最高优先级的警报会显示在带边框的泡泡中。

表2 床位视图图标

正在进行通话： 与该位置建立通话时出现此图标	
员工在场： 在床位视图中，当工作人员在场时，在带边框的位置名称右上角出现四分之一圆圈。	


- 特定的警报类型
- 正在进行通话
- 在场指示

图 11. 在场员工正在进行通话



在场员工图标  表明工作人员在场，而正在进行通话图标  表明已与该位置建立通话。

图 12. 来自床位的警报数量

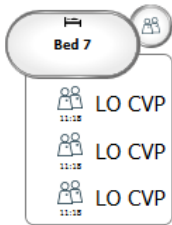

来自该位置的警报是协助呼叫，由强调气泡中的对应图标  指示。

10 设置




设置仅适用于已登录用户。

在设置中，您可以修改 **Unite View** 应用程序的行为。您可以筛选接收的警报，如果您有适当的访问权限，也可以切换到手动模式。

- 打开警报设置视图，请单击主工作区右侧的设置图标 。关闭设置视图，方法是再次单击设置图标 。

图 13. 警报设置

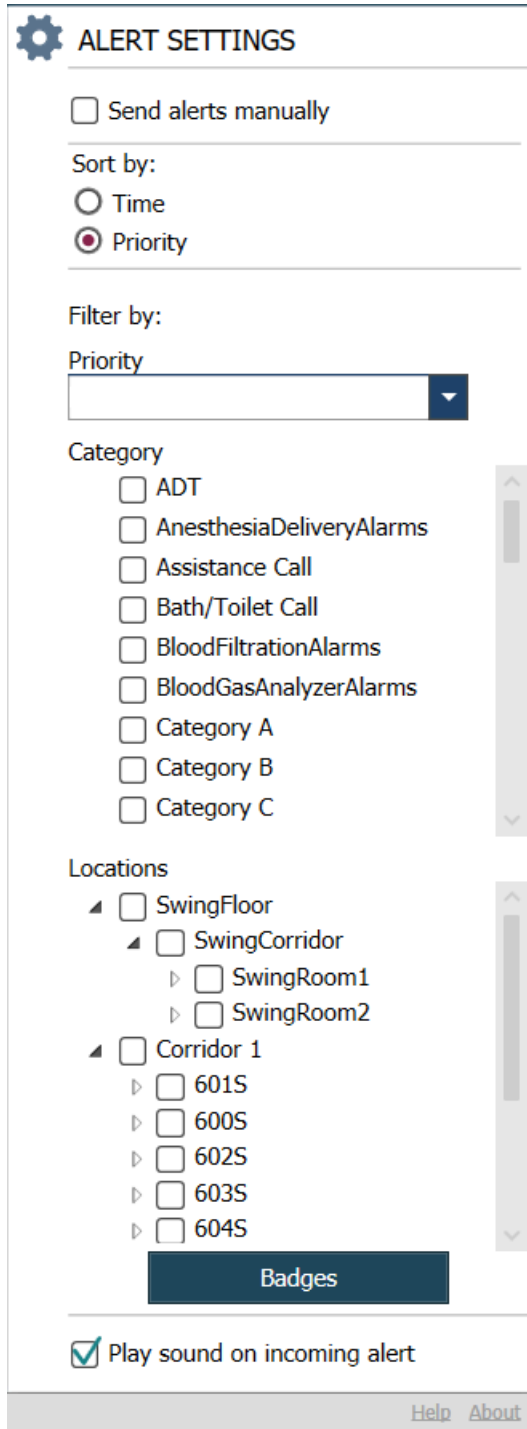

The image shows a software window titled "ALERT SETTINGS" with a gear icon in the top-left corner. The window contains several sections: "Send alerts manually" with an unchecked checkbox; "Sort by:" with radio buttons for "Time" and "Priority" (the latter is selected); "Filter by:" with a "Priority" label and a dropdown menu; "Category" with a list of checkboxes including ADT, AnesthesiaDeliveryAlarms, Assistance Call, Bath/Toilet Call, BloodFiltrationAlarms, BloodGasAnalyzerAlarms, Category A, Category B, and Category C; "Locations" with a tree structure showing "SwingFloor" (containing "SwingCorridor" with sub-items "SwingRoom1" and "SwingRoom2") and "Corridor 1" (containing "601S", "600S", "602S", "603S", and "604S"); a "Badges" button; and a checkbox for "Play sound on incoming alert" which is checked. At the bottom right, there are links for "Help" and "About".

ALERT SETTINGS

☐ Send alerts manually

Sort by:

☐ Time

☒ Priority

Filter by:

Priority

Category

- ☐ ADT
- ☐ AnesthesiaDeliveryAlarms
- ☐ Assistance Call
- ☐ Bath/Toilet Call
- ☐ BloodFiltrationAlarms
- ☐ BloodGasAnalyzerAlarms
- ☐ Category A
- ☐ Category B
- ☐ Category C

Locations

- ▲ ☐ SwingFloor
 - ▲ ☐ SwingCorridor
 - ▷ ☐ SwingRoom1
 - ▷ ☐ SwingRoom2
- ▲ ☐ Corridor 1
 - ▷ ☐ 601S
 - ▷ ☐ 600S
 - ▷ ☐ 602S
 - ▷ ☐ 603S
 - ▷ ☐ 604S

Badges

☒ Play sound on incoming alert


[Help](#) [About](#)

10.1 更改操作员模式



需要 Unite View 操作员访问权限。

在自动模式下（默认），应用预设收件人和转发设置，但如果您已获得 Unite View 操作员的访问权限，则可以更改为手动模式。

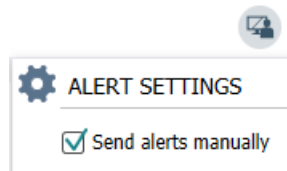


1. 通过选择手动发送警报复选框来激活手动模式。该设置将影响应用程序收到的下一个警报。通过启用“手动发送警报”，用户可以在发送警报之前向警报添加消息。用户也可能会影响预设的转发链。发起警报时，用户可以通过选择（转发链中或之外的）任何收件人来向其发送警报。
2. 通过清除手动发送警报复选框来取消激活手动模式并激活自动模式。该设置将影响应用程序收到的下一个警报。

10.2 排序顺序

10.2.1 警报排序


警报可以按时间顺序或优先级顺序排序。

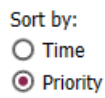

1. 在设置视图中，通过选择所需的时间或优先级来进行排序顺序。

10.2.2 在患者床位视图为患者排序

患者可按位置名称顺序、患者姓名顺序或已占用/未占用床位顺序进行排序。

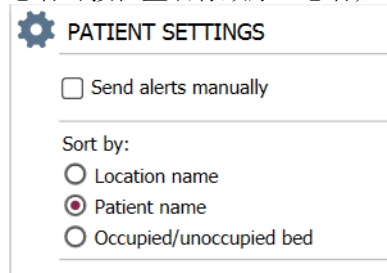

1. 在患者设置视图中，通过启用位置名称、患者姓名或已占用/未占用床位来选择所需的排序顺序。

10.2.3 在患者列表视图中筛选患者

列表可以按注意事项或位置进行筛选。

1. 在患者设置视图中，选择注意事项和/或位置。

Filter by:

Precautions

- ☐ IV
- ☐ FallRisk
- ☐ Diet
- ☐ Touch
- ☐ NPO
- ☐ Isolation
- ☐ Allergy
- ☐ IO
- ☐ NINP
- ☐ Other

Locations

- ▲ ☐ SwingFloor
 - ▷ ☐ SwingCorridor
- ▲ ☐ Corridor 1
 - ▷ ☐ 601S
 - ▷ ☐ 600S
 - ▷ ☐ 602S

10.3 警报筛选

默认情况下，所有接收警报均显示在 Unite View 应用程序中，但您可以筛选并选择要在应用程序中显示的警报类型。请注意，警报也可以在 Unite Admin 的 Unite View 配置中筛选。


10.3.1 按优先级筛选

默认情况下，Unite View 应用程序中会显示所有优先级类型的警报。通过使用筛选程序选项，您可以选择想要在应用程序中显示的最低优先级类型。将显示程度高于所选优先级的所有优先级类型。

1. 在设置视图中，单击优先级下拉列表。
2. 选择您希望在 Unite View 应用程序中显示的最低优先级。

Filter by:

Priority

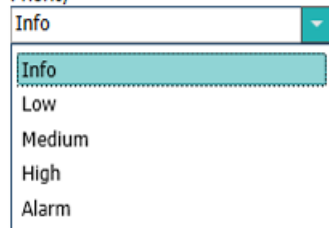

10.3.2 按类别筛选

默认情况下，Unite View 应用程序中会显示所有类别类型的警报。通过使用筛选选项，您可以选择想要在应用程序中显示的类别类型。

1. 在设置视图的类别列表中，选择要在 Unite View 应用程序中显示的类别类型。

- Category
- ☐ ADT
 - ☐ Assistance Call
 - ☐ Bath/Toilet Call
 - ☐ Category A
 - ☐ Category B
 - ☐ Category C
 - ☐ Category D
 - ☐ Category E
 - ☐ CodeA
 - ☐ CodeB
 - ☐ Emergency Call
 - ☐ Location Update
 - ☐ Medical
 - ☐ Nurse Call
 - ☐ Patient Monitor
 - ☐ PM Technical
 - ☐ Push Button 1
 - ☐ Push Button 2
 - ☐ RTLS Alarm
 - ☐ Service Call
 - ☐ Technical Call
 - ☐ Temperature Alarm
 - ☐ Workflow 1
 - ☐ Workflow 2
 - ☐ Workflow 3
 - ☐ Workflow 4
 - ☐ Workflow 5
 - ☐ Zone Alarm

所列的类别取决于您的系统所连接的第三方设备的类型。

10.3.3 按位置筛选

默认情况下，Unite View 应用程序中会显示来自所有位置的警报。通过使用筛选程序选项，您可以选择仅显示来自特定位置的警报。

如果选择的位置太多，那么位置显示将会太小以致视图无法阅读。拥有更高分辨率的较大显示器将能够显示更多位置，而且不会导致其无法读取。位置的数量可以由服务器端的管理员筛选，如果允许，也可以由客户端的用户筛选。

1. 在设置视图的位置列表中，选择要在 Unite View 应用程序中显示的位置。

- Locations
- ☐ First Floor
 - ☐ Corridor West
 - ☒ Room1
 - ☒ Room2
 - ☒ LAB
 - ☐ Room3

10.4 列出位置标志

默认情况下，系统中的所有位置标志都在 Unite View 应用程序中列出，但您可以根据标志 ID、角色和设备筛选您的搜索。您也可以搜索拥有低电池电量状态的位置标志。

1. 打开位置标志页面，请单击标志按钮。
 - 搜索工作人员，请输入标志 ID，选择特定设备和/或特定角色，以筛选搜索条件。

- 搜索持有低电量状态设备的位置标志，请选择仅显示低电量标志复选框。

10.5 激活/取消激活警报声音

接收警报的声音可以打开或关闭。

1. 在设置视图中激活警报声音，请选择在接收警报时播放声音复选框。
2. 取消激活声音，请清除在接收警报时播放声音复选框

☐ Play sound on incoming alert

左上角的“声音关闭”图标  显示声音已停用。

10.6 不同集成中的默认警报特性

Unite View 中的警报特性取决于 Unite Application Manager 中配置的集成。对于某些集成系统，在指定位置清除警报后，警报将从应用程序中消失。在其他情况下，当用户接收手机中的警报时，警报将从应用程序中消失。如果用户拒绝警报，则将警报转发给转发链中的下一个人员。如果转发链中没有人响应警报，警报也会消失。对于使用 Unite Connect 进行护理呼叫的 teleCARE IP，在这种情况下将重新发送至警报。下表总结了警报的特性。

表3 警报从 Unite View 中消失的情况

护理呼叫系统	用户清除警报位置的警报 n	用户接受手机中的警报	转发链中的任何人都可以处理的警报
Rauland Borg		X	X
Ascom Telligence (TAP)		X	X
Hill-Rom		X	X
Ascom teleCARE IP		X	X
使用 Unite Connect 进行 护理呼叫的 teleCARE IP	X		
Ascom Telligence			
患者监测系统	当警报原因得到纠正时， 监测器将删除警报	用户接收手机中的警报	转发链中的任何人都可以处理的警报
Philips	X		X
GE Carescape	X		X
Mindray		X	X
Spacelabs		X	X
Nihon Kohden		X	X

11 相关文档

数据表，Ascom Unite View	TD 93045EN
安装指南，Ascom Unite View	TD 93068EN
Ascom Unite Admin 用户界面的在线帮助	

12 文档历史记录

有关最新版本的详细信息，请参见文档中的更改栏。

版本	日期	说明
A	2013 年 9 月 25 日	首次发布版本
B	2014 年 6 月 17 日	新章节：查看警报详细信息，自动模式下的警报详细信息，手动模式设置中的警报详细信息。新的图标
C	2014 年 9 月 3 日	增加了类别 A - E
D	2014 年 11 月 27 日	新功能：员工在场和正在进行通话。 • 新图标
E	2015 年 5 月 13 日	新功能：工作人员位置信息，解除警报和支持心电波形图像的可能性。新章节：员工列表和解除警报 • 新图标
F	2015 年 7 月 1 日	增加了 HIPAA 的兼容性。
G	2015 年 12 月 15 日	新章节和分章节：添加或编辑患者信息，消息传送，菜单栏图标，折叠/展开员工列表和相关文档。
H	2017 年 1 月 19 日	文档重新编写。 添加了任务视图、预期用途以及警示和注意事项。
I	2017 年 10 月 27 日	在 1.2 警示和注意事项 , 第 1 页 和 1.2.1 有关警报声音的信息 , 第 2 页 中添加了重要说明。 添加了 2.1 在软件的“关于”文件中, 第 3 页 和 附录 B 中央监测设备 (CMU) 高级调度 , 第 38 页

附录 A 警报详细信息

A.1 自动模式下的警报详细信息

单击警报列表中的警报以展开并查看详细信息。您可以看到的警报详细信息取决于您是否登录到应用程序，或者应用程序是否无需登录而自动打开。


您将始终可以查看事件历史记录，即警报何时启动、向谁发送、是否转发、何时被接受。如果工作人员在场，您将看到工作人员在组织中的角色，如果建立通话，您会看到通话何时开始以及何时结束。

如果系统中配备 Ascom IPS (图像演示服务器)，也可以显示心电波形图像。

如果系统配备实时定位 (RTLS) 系统，并且应用程序已配置为从 RTLS 系统接收信息，那么您将看到房间中的所有工作人员。

如果没有登录，您可以看到转发链中的所有收件人，但您无法以任何方式影响预设的转发链。

图 14. 自动模式下的警报详细信息

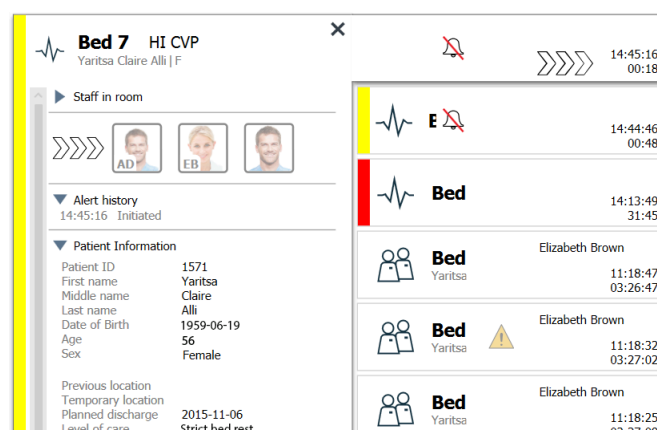

A.2 登录后的警报详细信息，以及在手动模式中设置




需要 Unite View 操作员访问权限。

当您登录到应用程序并启用了“手动发送警报”时，您可以影响事件流程。

如果系统连接到 EHR 系统并且您有权读取该信息，Unite View 应用程序可以显示患者信息 (PHI)，前提是该警报源自单个患者的位置。您可以查看患者的姓名、性别和年龄。还可以显示关于患者的其他信息，例如评论和注意事项。

如果警报发出的设备支持解除功能的集成，则您可以停止将警报发送给指定的收件人。必须选择解除警报的理由。解除警报的原因是预配置的。

图 15. 手动模式下警报详细信息

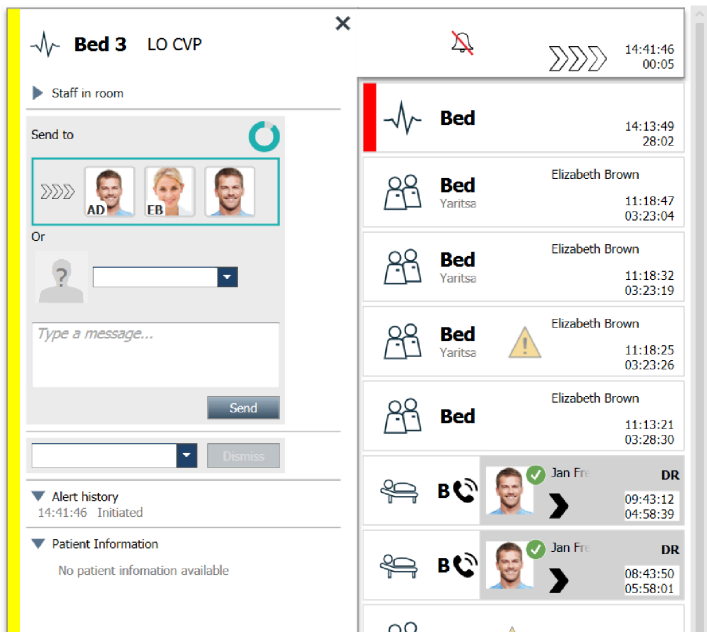

如有需要，您可以将消息发送给收件人，并可以选择添加消息。计数器从预设时间开始倒计时，显示在指定的收件人上方。

您也可以升级优先级、清除警报、创建服务任务并解除警报。

A.3 Unite View 图标

自动模式下的警报详细信息

单击警报列表中的警报以展开并查看详细信息。您可以看到的警报详细信息取决于您是否登录到应用程序，或者应用程序是否无需登录而自动打开。


您将始终可以查看事件历史记录，即警报何时启动、向谁发送、是否转发、何时被接受。如果工作人员在场，您将看到工作人员在组织中的角色，如果建立通话，您会看到通话何时开始以及何时结束。

如果系统中配备 Ascom IPS (图像演示服务器)，也可以显示心电波形图像。

如果系统配备实时定位 (RTLS) 系统，并且应用程序已配置为从 RTLS 系统接收信息，那么您将看到房间中的所有工作人员。

如果没有登录，您可以看到转发链中的所有收件人，但您无法以任何方式影响预设的转发链。

图 16. 自动模式下的警报详细信息

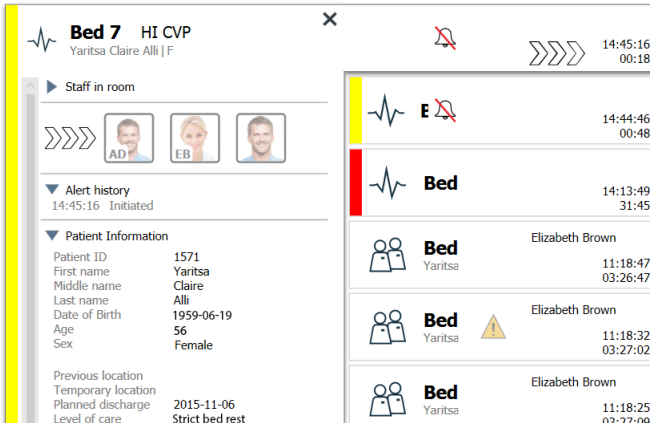

登录后的警报详细信息，以及在手动模式中设置




需要 Unite View 操作员访问权限。

当您登录到应用程序并启用了“手动发送警报”时，您可以影响事件流程。

如果系统连接到 EHR 系统并且您有权读取该信息，Unite View 应用程序可以显示患者信息 (PHI)，前提是该警报源自单个患者的位置。你可以查看患者的姓名、性别和年龄。还可以显示关于患者的其他信息，例如评论和注意事项。

如果警报发送端的设备支持解除功能，则您可以停止将警报发送给指定的收件人。必须选择解除警报的理由。解除警报的原因是预配置的。

图 17. 手动模式下警报详细信息

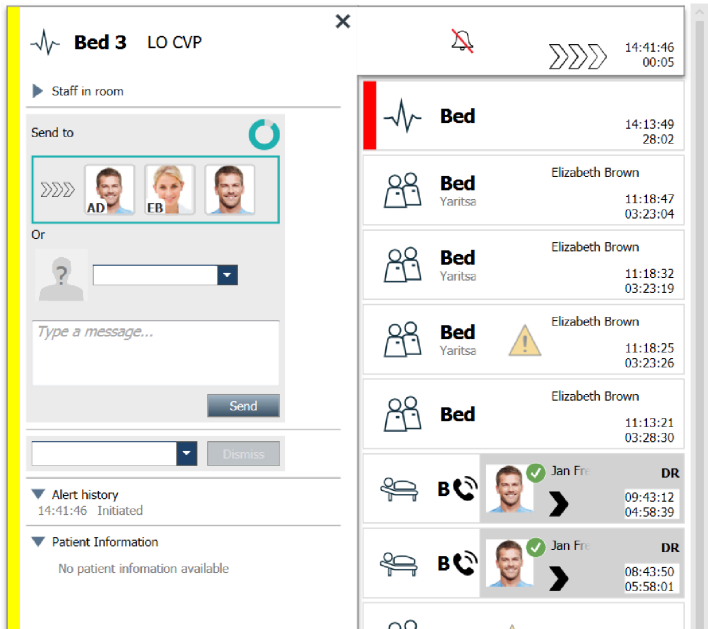

如有需要，您可以将消息发送给收件人，并可以选择添加消息。计数器从预设时间开始倒计时，显示在指定的收件人上方。

您也可以升级优先级、清除警报、创建服务任务并解除警报。

A.3.1 警报类型图标

以下警报类别图标可在 Unite View 中显示：

协助呼叫	
洗手间/卫生间呼叫	
类别 A	
类别 B	
类别 C	
类别 D	
类别 E	
代码 A	CODE A
代码 B	CODE B
紧急呼叫	
医疗警报	
护理呼叫	
患者监测器	
按钮 (1&2) 警报	
RTLS 警报	
服务呼叫	
技术呼叫	
温度警报	
工作流程图标	
区域警报	

A.3.2 接收警报图标

以下图标可以显示在警报中：

警报来自静音的监测器	
转发位置：	
- 警报正在等待处理	
- 第一个转发位置	
- 第二个转发位置	
- 第三个转发位置	
提醒： 当带有提醒设置的事件尚未清除时，此图标将出现在“提醒”列表中的警报上。	
计数器： 该图标显示警报自动发送给转发链中的收件人之前用户停止警报的剩余时间。最后 10 秒钟，剩余时间将以数字显示。	
已确认警报： 绿色复选标记表示警报已被确认。	
保护网： 当出现此图标时，没有人接受警报，并且警报已由 Unite Admin 应用程序中配置的保护网功能处理。	
未处理警报：此图标表示没有人处理警报。	
注意事项： 此图标表示适用于患者的一些注意事项。	
正在进行通话： 当与发起警报的位置建立通话时，会出现此图标。	
员工在场： 当工作人员在发起警报的位置时，背景将更改为灰色。为在场工作人员设置的职位也将显示在右上角。如果没有设置职位，则只显示“在场”。	

根据为应用程序设置的模式（自动或手动），将会出现不同的可能性。

A.3.3 注意事项图标

可显示以下注意事项图标：

饮食： 患者正在节食。	
过敏： 患者有过敏史。	
跌倒风险： 患者有跌倒的风险。	

I/O : 摄入和排出。必须测量摄入和派出的食物和液体量 (粪便和尿液) 。	
NPO : 禁止患者食用或饮用任何东西。	
IV : 静脉。通过将针插入静脉将流体和/或药物输送到血流中。	
隔离 : 患者已被隔离。	
NINP : 无信息，未公开。	
触碰 : 禁止触摸患者。	触碰
也可能显示称为“其他”的一般注意事项。	其他

A.3.4 与控制台配对图标

与控制台配对 : 此图标出现在应用程序的左下角时，意味着 Unite View 应用程序已与护理呼叫系统中的控制台配对。	
---	---

附录 B 中央监测设备 (CMU) 高级调度


Unite View 与移动监测网关 (MMG) 配合使用能够支持各种不同的工作流程情景。一个特定于中央监测设备 (CMU) 工作流程的相关工作流程包括增强的操作员调度功能，以便更好地支持瞬态或短时警报。


这些类型的短时警报通常会自我校正，而且拥有迅速出现和消失的趋势，有时会在操作员确定正确的操作过程之前就已消失。

在利用其中一个针对 MMG (附带 Unite Admin 3.5.0 和更高版本) 的 CMU 工作流程模板时，与 Unite View 结合使用的产品 MMG 的备选配置将提供警报显示更长时间的功能，从而让技术人员有更多时间决定需要执行的操作，甚至已在患者监测位置解决警报状况之后。


CMU 工作流程模板提供移动监测网关工作流程操作树的必要修改 (通过各个设置)。这些设置又会反过来利用各种现有的计时器，以便支持自定义警报在 Unite View 中保持可见和可操作的时长。

计时器	说明
调度时间	警报保持可见且可供调度的时间段，甚至是在清除警报后。(默认值 45 秒，最长可配置 999 秒)
确认前时间	在收件人可确认警报前警报已消失的时间段。如果此计时器在收件人接收前过期，则将在调度计时器的整个时间内将警报返回给操作员。 此值在与操作员调度操作树关联的第一个成功/失败条件内定义。
确认后时间	收件人接受警报后，警报在 Unite View 中保持可见的时间 (默认值 10 秒，最长可配置为 120 秒) 此值在与操作员调度操作树关联的第二个成功/失败条件内定义。

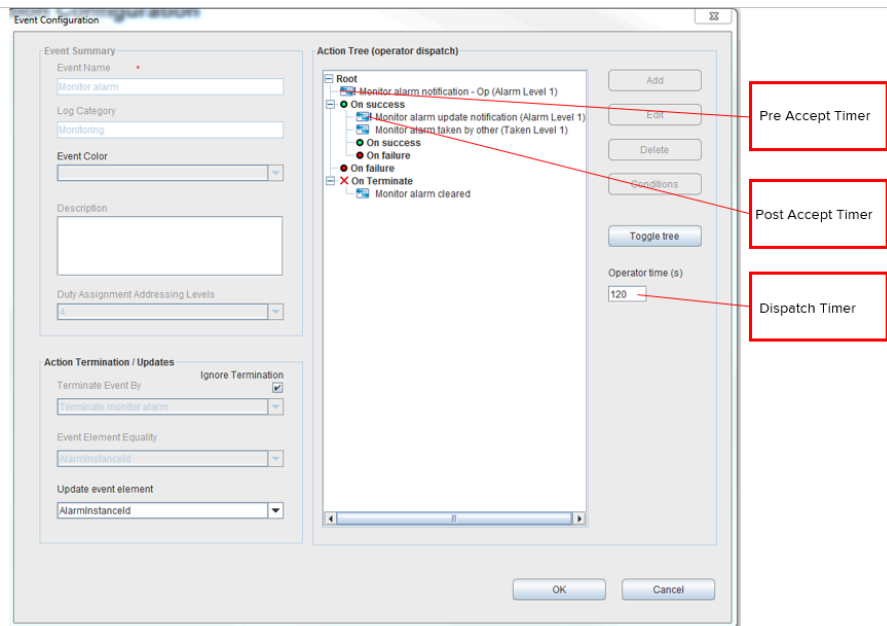

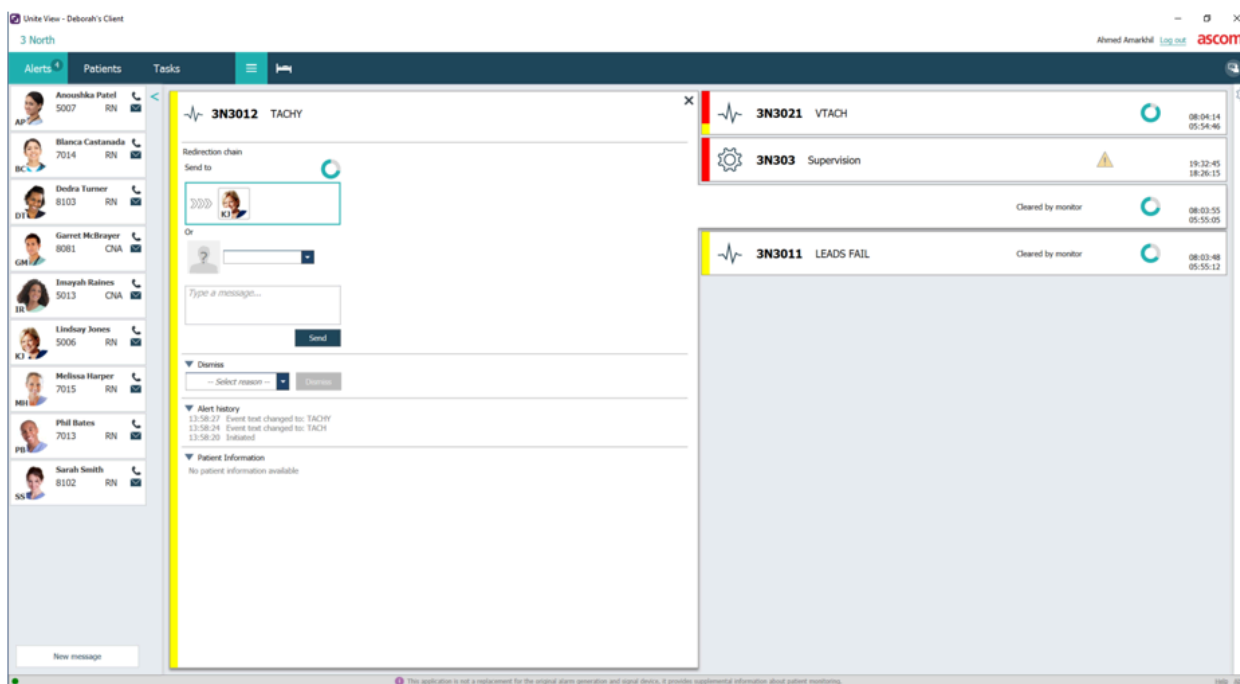

示例：1 报警生成、警报自行解决过快，导致技术人员无法评估问题或准确确定生成警报的起始位置。在此情景中，*Unite View* 会将与已清除报警相关的警报在显示屏上显示更长时间，以便技术人员有更多时间来决定是否应该执行操作。警报将在屏幕上保持可见，直至调度计时器过期。这些警报可以调度，就像活动警报那样。

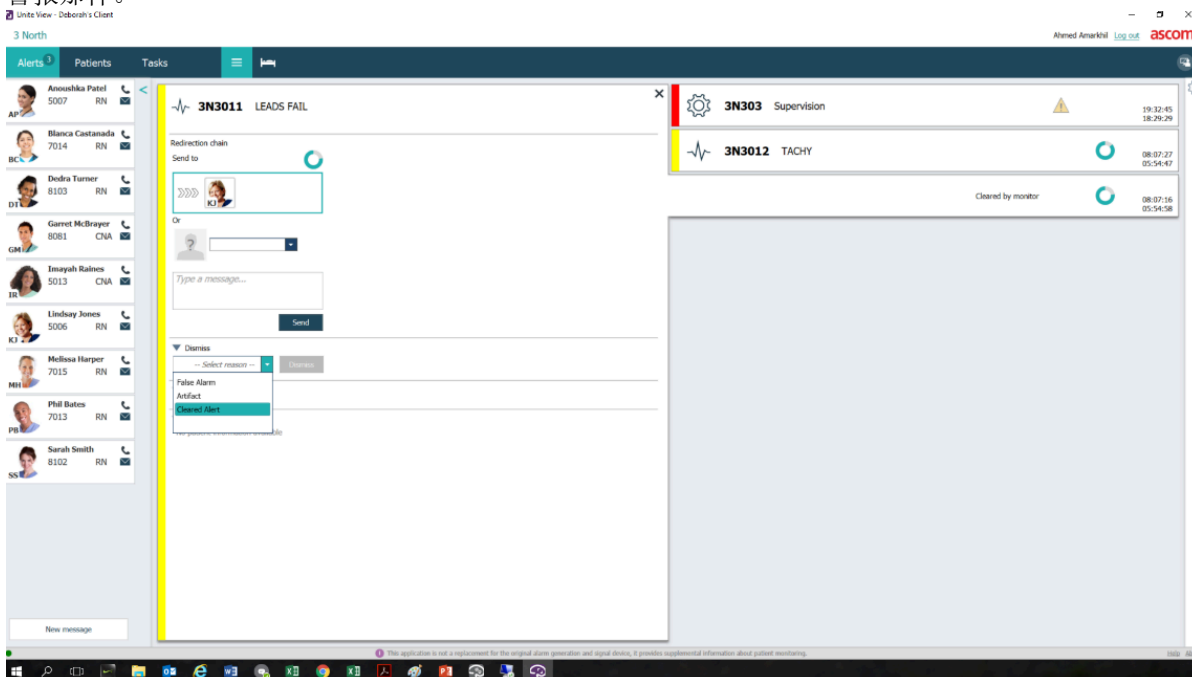

示例：2 无需任何操作，可以通过“解除”功能从屏幕中移除这些警报。解除已清除警报的方式与解除活动警报的方式相同，只是将从列表中移除解除的已清除警报，因此不能撤销。

