

KORT REFERENCEVEJLEDNING



Ascom i63 VoWiFi Handset

Om dette dokument

Dette dokument beskriver, hvordan Ascom i63 VoWiFi Handset basisfunktioner benyttes.


Indhold

1	Oversigt.....	1
2	Sådan kommer du i gang.....	4
3	Menu og taster	5
4	Basisfunktioner.....	6
5	Alarmfunktioner.....	9
6	Kemisk modstandsdygtighed.....	11
7	Relaterede dokumenter	12

1 Oversigt

Ascom i63 VoWiFi Handset har en lang række funktioner herunder telefoni og alarmfunktioner. Den er konstrueret til brug i medium krævende omgivelser.

Yderligere oplysninger om andre egenskaber og -funktioner, der findes i hver enkelt variant kan findes i Ascom i63 VoWiFi Handset brugervejledning, TD 93289EN.

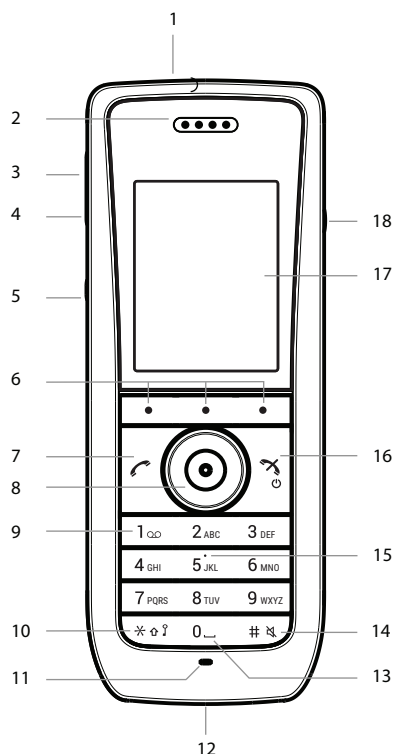

1. Multifunktion/PTT/Alarm-knap — I tilfælde af Messenger eller Talker kan den konfigureres til forskellige funktioner. I tilfælde af Protector benyttes den som trykknappalarm. Brug af knappen som PTT (Push-to-Talk - Tryk for at tale) kræver et Messenger håndsat.
2. Højtaler
3. Lydstyrkeknap (op) — Bruges til at skrue op for højtalerens lydstyrke.
4. Lydstyrkeknap (ned) — Bruges til at skrue ned for højtalerens lydstyrke.
5. Lydløs/ PTT-knap
 - Lydløsknappen bruges til at tænde/slukke for lydsignaler i standbytilstand, slå ringetonen ved indgående opkald fra og til at tænde/slukke mikrofonen under opkald.
 - PTT-knappen bruges til at tænde for mikrofonen under et PTT-gruppeopkald.¹ Mikrofonen er tændt, så længe der trykkes på knappen.
6. Softkeys — De tre softkeys kan forhåndskonfigureres og bruges med brugergrænsefladen.
7. Opkaldstast — Bruges til besvarelse af et opkald, som opkald til et forud programmeret nummer og som en genvej til opkaldslisten.
8. Femvejs navigationstast — Navigationstast med venstre, højre, op, ned og bekræftelse (i midten). Disse taster kan, undtagen den midterste tast, konfigureres til genveje.
9. Adgang til telefonsvarer — Hurtig adgang til håndsettets telefonsvarer.²

1. Kræver et Messenger eller Protector håndsat.

2. Denne funktion er systemafhængig.

10. Tastaturlås og store/små bogstaver — Kombineret tastaturlås og skift mellem store og små bogstaver.
11. Mikrofon
12. Mellemrum — Bruges til at lave mellemrum imellem ord.
13. Lydløs tast — Bruges til at tænde/slukke for lydssignaler i standbytilstand, slå ringetonen ved indgående opkald fra og til at tænde/slukke mikrofonen under opkald.
14. Taktil indikator — Angiver midten af tastaturet.
15. Afslut og tænd/sluk-tast — Bruges til at afslutte et opkald, vende tilbage til standbytilstand og med et langt tryk til at tænde og slukke for håndsættet.
16. Farvedisplay — 2,0-tommers TFT-farvedisplay med baggrundsbelysning.
17. Headsetstik — 3,5 mm stik til tilslutning af et headset.³ Det beskyttes mod støv ved at bruge headsetstikdækslet.

Ikone	Navn	Beskrivelse
	Signalstyrke	Synlig i øverste venstre hjørne. Ikonet viser signalstyrken.
	Fuldt batteri	Ikonet med batterikapaciteten ses i øverste venstre hjørne. Viser når batteriet har mellem 75 og 100 % resterende kapacitet.
	Højt batteriniveau	Vises når batteriet har mellem 50 og 75 % resterende kapacitet.
	Mellem batteriniveau	Vises når batteriet har mellem 25 og 50 % resterende kapacitet.
	Lavt batteriniveau advarsel	Vises når batteriet har mellem 10 og 25 % resterende kapacitet.
	Meget lavt batteriniveau	Vises når batteriet har mellem 7 og 10 % resterende kapacitet.
	Advarsel om tomt batteri	Blinker når batteriet har 7 % eller mindre resterende opladning.
	Indgående opkald	Viser indgående opkald og besvarede opkald i opkaldslisten.
	Ubesvaret opkald	Viser ubesvaret opkald i opkaldslisten.
	Ubesvaret opkald	Viser ubesvaret opkald i statuslinjen.
	Udgående opkald	Viser udgående opkald i opkaldslisten og når der foretages et opkald.
	Ny besked sendt af et andet håndsæt	Viser, at en ny tekstbesked (eller beskeder) er modtaget. Ikonet forbliver i statuslinjen indtil alle nye beskeder i indbakken er læst.
	Ny besked sendt af systemet	Viser, at en ny besked (eller beskeder), der blev sendt af systemet, er modtaget. Ikonet forbliver i statuslinjen indtil alle nye beskeder i indbakken er læst.
	Sendt besked	Viser, at en tekstbesked er blevet sendt.

3. Kompatibelt med headsets med ledning brugt til Android.

	Læs besked sendt af et andet håndsæt	Viser, at denne tekstbesked er blevet læst.
	Ikke sendt besked	Viser, at en ikke sendt tekstbesked (eller beskeder) er i udbakken.
	Telefonsvarerbesked	Ikonet forbliver i statuslinjen indtil der er lyttet til telefonsvareren.
	Mikrofon fra	Viser, at lyden er slået fra mikrofonen Den bliver aktiv efter at have givet et langt tryk på tasten Lydløs eller Lydløsknappen under et opkald. Under et PTT-opkald er mikrofonen inaktiv, når PTT -knappen er sluppet.
	Højtaler (aktiveret)	Vises i softkeylinjen under et opkald.
	Højtaler (deaktiveret)	Vises i softkeylinjen under et opkald.
	Lydløs	Vises, når der er trykket på tasten Lydløs eller Lydløsknappen .
	Lav lydstyrke	Vises, når lydstyrken er indstillet til Lav .
	Bluetooth	Viser, at Bluetooth er slået til.
	Bluetooth-headset	Viser, at et Bluetooth-headset er forbundet til håndsættet.
	Headset	Viser, at et headset med ledning er forbundet til håndsættet.
	Tastaturlås	Viser et låst tastatur.
	Telefonlås	Viser et låst håndsæt.
	Profil aktiv	Viser, at en profil er aktiv.
	Håndsæt variant Talker	Viser, at håndsættet er et Talker.
	Håndsæt variant Messenger	Viser, at håndsættet er et Messenger.
	Håndsæt variant Protector	Viser, at håndsættet er et Protector.
	Man-down alarm	Viser, at man-down alarmen er aktiveret.
	No-movement alarm	Viser, at no-movement alarmen er aktiveret.

2 Sådan kommer du i gang

Tænde for håndsættet

1. Tryk på afslutningstasten og hold den nede  indtil håndsættet tænder.

Slukke for håndsættet

1. Tryk på afslutningstasten og hold den nede  indtil **Sluk?** vises.
2. Tryk på **Ja**.

Udskifte batteriet

Håndsættet oplades i en bordoplader eller en ladereol.

1. Anbring håndsættet i bordopladeren eller ladereolen og skub det forsigtigt ned, indtil meddelelsen **I oplader** vises på displayet.
2. Når håndsættet er helt oplades, kan det udtages ved at vippe det fremad.

Batteriet kan også oplades i en separat batterioplader.


I en bordoplader er håndsættet i funktion med undtagelser. Håndsættet vibrerer ikke, når det er i opladeren.



Opladning i omgivelser under 5 °C vil skade batteriet og forkorte levetiden.

3 Menu og taster

Menuikoner

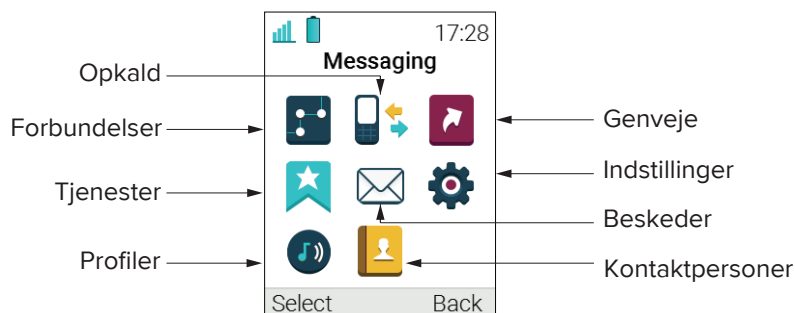

Softkeys, genvejstaster og multifunktionsknappen

De tre softkeys sidder lige neden under displayet, og hver softkeys funktion er vist med teksten i displayet lige over tasterne.

Enhver af tasterne **0** og **2 - 9** kan indstilles som en genvejstast. En genvejstast kan konfigureres til at give adgang til ofte anvendte funktioner, såsom opkald til et specifikt nummer, en genvej i menuen eller afsendelse af en besked. Et langt tryk på et af disse numre i standbytilstand er som standard en genvej til listen over **opkaldskontakter**. Multifunktionsknappen kan også programmeres til forskellige funktioner med et langt tryk eller dobbelt tryk.

Yderligere oplysninger om softkeys, genvejstaster og multifunktionsknappen kan findes i Ascom i63 VoWiFi Handset brugervejledning, TD 93289EN.

Navigere i menuen

Gå ind i menuen ved at trykke på softkeyen **Menu** eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.

Brug navigationstasten til at bevæge dig rundt i menustrukturen.

For at vælge en mulighed skal du trykke på den tilsvarende softkey eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.

4 Basisfunktioner



De tilgængelige funktioner afhænger af håndsætvarianten og konfigurationen.

En detaljeret beskrivelse af alle tilgængelige funktioner kan findes i Ascom i63 VoWiFi Handset brugervejledning, TD 93289EN.

Foretage et opkald

Gør et af følgende for at foretage et opkald:

- I standbytilstand, indtast nummeret og tryk på opkaldstasten  eller softkeyen **Opkald**.
- Tryk på opkaldstasten  og vælg et nummer fra opkaldslisten.
- Tryk på en forprogrammeret genvejstast (de alfanumeriske taster kan programmeres med et telefonnummer) eller en softkey.
- Ring til et nummer fra den lokale telefonbog i **Kontakter → Ring til kontakt**. Vælg et navn fra listen og tryk på opkaldstasten  eller softkeyen **Opkald**.
- Vælg et nummer fra **Kontakter → Central telefonbog**. Søg efter navn/nummer/seneste resultat og tryk på **Søg**. Tryk på opkaldstasten  eller softkeyen **Opkald**.

Besvar og afslut et opkald

1. Når håndsættet ringer, tryk på opkaldstasten  eller softkeyen **Accepter**.
2. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet .

Opkaldsoplysningerne gemmes i **opkaldslisten**.

Afvise et opkald

1. Når håndsættet ringer, tryk på afslutningstasten  eller softkeyen **Afvis**.

Søg efter en kontakt i den lokale telefonbog

1. I **Menuen**, vælg **Kontakter → Ring til kontakt** og tryk på **Vælg** eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.
2. Begynd at indtaste det eller de første bogstaver i fornavnet eller efternavnet. Tryk på **Søg** eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.
Telefonbogen viser matchende navne på displayet. Du kan gå til den næste post i alfabetisk rækkefølge ved at trykke på navigationstasten.
3. Vælg navnet og tryk på **Opkald**.

Rediger efter en kontakt i den lokale telefonbog

1. I **Menuen**, gå til **Kontakter → Rediger kontakt**, vælg et navn og tryk to gange på **Rediger**.
2. Foretag ændringerne og tryk på **OK → Gem**.
En kontakt fra telefonbogen er mærket med symbolet , som betyder, at den ikke kan redigeres.

Tilføj en kontakt i den lokale telefonbog

1. I **Menuen**, gå til **Kontakter → Tilføj kontakt**.
2. Vælg en af følgende:

- a. **Ny** — Tryk på **Tilføj**, indtast navnet og tryk på **OK**. Tilføj et **Arbejdsnummer**, **Mobilnummer** eller **Andet nummer** og vælg **OK → Gem**.
- b. **Fra kaldeliste** — Vælg et nummer, vælg om det er et **Arbejdsnummer**, **Mobilnummer** eller **Andet nummer**. Vælg **Rediger** for at indtaste et navn og tryk på **OK**.

Slette en kontakt i den lokale telefonbog

1. I **Menuen**, gå til **Kontakter → Slet kontakt** og vælg et navn.
2. Tryk på **Slet** og derefter på softkeyen **Ja**.

Brug af den centrale telefonbog

Den centrale telefonbog viser kontakter, der er tilgængelige i virksomhedens centrale telefonbogdatabase.

1. I **Menuen**, vælg **Kontakter → Central telefonbog**.
2. Vælg **Søg efter navne** eller **Søg efter nummer**.
3. Begynd at indtaste det eller de første bogstaver i fornavnet eller efternavnet eller nummeret. Tryk på **Søg** eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.
Den central telefonbog viser matchende navne på displayet. Du kan gå til den næste post i alfabetisk rækkefølge ved at trykke på navigationstasten.
4. Tryk på **Mere** for at se kontakten, tilføj den til kontaktlisten eller send en besked til den valgte kontakt. Tryk på opkaldstasten eller softkeyen **Opkald** for at foretag et opkald.

Muligheden **Seneste resultat** i den **Centrale telefonbog** anfører kontakterne, der sidst blev søgt efter.

Tjekke telefonsvareren

En ny telefonsvarerbesked indikeres med telefonsvarerikonet .

1. For at ringe til telefonsvareren i standbytilstand skal du give et langt tryk på tasten **1**.

Hvis det interne nummer ikke er tilgængeligt, vises dialogvinduet **Telefonsvarernummer ikke defineret**.

Slå højttaleren til/fra

1. Under et opkald, tryk på venstre softkey  for at tænde for højttaleren.
2. Tryk på softkeyen  for at slukke for den.

Tænd/sluk for lydsignaler

1. Hvis i standbytilstand skal du give et langt tryk på tasten **Lydløs** eller **Lydløsknappen** for at tænde og slukke for lydsignalet. Ikonet **Lydløs**  i statuslinjen viser, at håndsettet er lydløst.

Et kort tryk på tasten **Lydløs** eller et tryk på **Lydløsknappen**, inden et opkald besvares, skruer helt ned for ringetonen.

Slå vibratoradvarslen til/fra

1. I **Menuen**, vælg **Indstillinger → Lyde og Advarsler → Vibrerende advarsel**.
2. Vælg **Til**, **Til ved lydløs** (det betyder, at den vibrerende advarsel er aktiv, hvis håndsettet er sat til lydløs), eller **Fra**.
3. Tryk på **Vælg**.

Ændre lydstyrken under et opkald

1. Tryk på den øverste lydstyrkeknop for at øge lydstyrken, og den nederste for at reducere den, eller tryk på navigationstasten op eller ned for at justere lydstyrken.

Slå den automatiske tastaturlås til/fra

1. I **Menuen**, vælg **Indstillinger → Låse**.
2. Vælg **Lås/Lås op → for automatisk tastaturlås**.
Et låst tastatur indikeres med ikonet Tastaturlås .
For at låse tastaturet op, tryk på stjernetasten * og derefter på softkeyen **Ja**.

Modtage en besked

En beskedtone angiver en ny tekstbesked. Beskeden vises med det samme og ikonet Ny besked  vises på displayet.

Hvis der modtages en besked under et opkald, underrettes brugeren med et bip, og beskeden vises. Beskeder gemmes i **indbakken**.



Muligheden for at sende beskeder afhænger af håndsætvarianten. Yderligere oplysninger kan findes i Ascom i63 VoWiFi Handset brugervejledning, TD 93289EN.

Læse en gemt besked

1. I **Menuen**, vælg **Beskeder → Indbakke**.
2. Ved at bruge navigationstasten, gå til beskeden fra beskedlisten og vælg **Vis**.

Sende en besked

1. I **Menuen**, vælg **Beskeder → Skriv ny besked**.
2. Indtast teksten og vælg **Send** eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.
3. Indtast et nummer, eller tryk på den midterste softkey for at slå op i telefonbogen.
4. Tryk på **Send** eller bekræftelsesknappen på navigationstasten.

Slette en gemt besked

1. Vælg en besked og tryk på softkeyen **Mere**.
2. Vælg **Slet** og tryk derefter på softkeyen **Ja**.

Skifte batteriet

Hvis batteriets kapacitet og ydeevne falder, skal du udskifte det med et nyt. Kontakt systemadministratoren eller leverandøren af håndsættet for nye batterier.

5 Alarmfunktioner



Alarmfunktionens tilgængelighed afhænger af håndsætvarianten og installationsmiljøet. Yderligere oplysninger kan findes i Ascom i63 VoWiFi Handset brugervejledning, TD 93289EN.

Trykknalarm

Trykknappen kan konfigureres til at sende en alarm med et langt tryk eller et dobbelt tryk. Som standard defineres det lange tryk som en testalarm, og dobbelttrykket defineres som en personalarm. Alarmen sendes til alarmcentralen, der videresender den yderligere, hvorefter håndsættet vender tilbage til standbytilstand.

Det er muligt at udløse alarmen under andre aktiviteter, såsom at tale, redigere indstillingerne, eller mens håndsættet er låst.

Man-down- og No-movement-alarm

Man-down-alarmen udløses, hvis håndsættet er vippet (standard 45°) fra lodret position i en foruddefineret periode (standard er 7 sekunder). Man-down-ikonet  viser, at alarmen er aktiveret.

No-movement-alarmen udløses, hvis der ikke registreres bevægelse i løbet af en foruddefineret periode (standard er 30 sekunder). No-movement-ikonet  viser, at alarmen er aktiveret.

Under advarselsfasen afgiver håndsættet en lyd og et vibrerende signal (afhængigt af indstillingerne) i et foruddefineret tidsrum (standard er 7 sekunder). Samtidig viser håndsættet meddelelsen **Man-down-advarsel. Fortryd?** eller **No-movement-advarsel. Fortryd?**.

Håndsættet sender derefter alarm, medmindre alarmen bliver annulleret. Håndsættet bekræfter, at alarmen er sendt ved hjælp af et bip og en vibrerende advarsel. Samtidig viser håndsættet meddelelsen **Man-down alarm sendt** eller **No-movement alarm sendt**.

Alarmfunktionerne Man-down og No-movement er inaktive under følgende omstændigheder:

- Håndsættet er placeret i en oplader.
- Under opkald (afhængigt af indstillingerne), for at undgå falske alarmer, hvis brugeren vipper håndsættet eller står stille under et opkald.
- For en foruddefineret periode (standard er 10 minutter), hvis Lydløsknappen er brugt i løbet af alarmsignalet.

Aktivisering af alarmerne Man-down og No-movement

1. I **Menuen**, vælg **Indstillinger** → **Alarm** → **Aktiver alarm**.
2. Vælg den eller de ønskede alarmer. Det eller de tilsvarende ikoner vises i overskriftslinjen.

Deaktivering af alarmerne Man-down og No-movement

1. I **Menuen**, vælg **Indstillinger** → **Alarm** → **Deaktiver alarm**.
2. Vælg den eller de alarmer, der skal deaktiveres.

Annullering af Man-down og No-movement alarm

1. Tryk på en vilkårlig tast eller softkeyen **OK** for at bekræfte **Man-down-advarsel. Fortryd?** eller **No-movement-advarsel. Fortryd?**, som vises på displayet under advarselsfasen.

Forsink Man-down- og No-movement alarm midlertidigt

1. Tryk på Lydløsknappen , mens alarmsignalet er i gang og tryk derefter på **Ja** for at bekræfte beskeden Forsink MD/NM- detektering?.
Det tilsvarende displayikon blinker, indtil alarmen er aktiv igen (standard er 10 minutter).

For at nulstille alarmfunktionen efter at en alarm er blevet sendt

Gør et af følgende for at nulstille alarmfunktionen:

- Tryk på en vilkårlig tast på håndsettet.
- Flyt håndsettet til en oprejst position (efter Man-down).
- Flyt håndsettet (efter No-movement).
- Tryk på Lydløsknappen hvis ALS viser en advarsel.

Akustisk lokaliseringssignal

En alarm kan efterfølges af et akustisk lokaliseringssignal (ALS). ALS'et er et signal fra håndsettet, der afspilles i et på forhånd defineret tidsrum. Lyden kan slås fra signalet ved at trykke på Lydløsknappen på håndsettet.

6 Kemisk modstandsdygtighed

De alfanumeriske tegn, der er trykt på håndsættet, er blevet testet og fundet resistente over for krakelering, falmning eller tegn på slid, når håndsættet udsættes for almindelige rengøringsmidler, desinfektionsmidler eller sved. Acetone kan beskadige håndsættets plastindkapsling, og bør ikke anvendes.

Følgende kemikalier har ikke vist nogen skadelig virkninger:

- 3 % saltsyre
- M-alkohol (70 % methyleret ætanol)
- 60 % klorhexidin 0,5 mg/ml

7 Relaterede dokumenter

Ascom i63 VoWiFi Handset brugervejledning, TD 93289EN

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Telefon +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom