



Comment nettoyer et désinfecter les périphériques d'appels infirmières Ascom



Les systèmes d'appels infirmières Ascom, Telligence, teleCARE IP, sont conçus et adaptés aux environnements exigeants des secteurs hospitaliers et établissements de soins pour personnes âgées. Ces périphériques sont testés avec différents produits de nettoyage et de désinfection. Ci-dessous, une liste de solutions qui ne les endommageront pas tout en respectant des procédures de nettoyage rigoureuses.

Instructions de nettoyage

- 1.** Avant de nettoyer le périphérique, vos mains doivent être lavées.
- 2.** Vous pouvez utiliser des solutions de désinfection liquides ou des lingettes nettoyantes.
- 3.** Pré-nettoyez le périphérique pour enlever la saleté à l'aide d'un chiffon humidifié (non trempé) mélangé avec un détergent doux avant de le désinfecter.
- 4.** Évitez les solutions de nettoyage et de désinfection contenant des composants hydratants ou corrosifs pour la peau.



Nettoyage des écrans tactiles

Avant de nettoyer un écran tactile, utilisez un chiffon doux non pelucheux pour lunettes ou un chiffon en microfibre. Les fibres de tissu ordinaires peuvent faire des rayures microscopiques sur l'écran tactile et peuvent l'endommager au fil du temps.

- Ne pas utiliser de serviettes en papier, de mouchoirs en papier ou de papiers pour objectifs d'appareils photos car ils sont trop abrasifs pour l'écran tactile.
- Ne pas vaporiser de liquide sur l'écran tactile. L'électronique peut être endommagée si des gouttes d'humidité s'infiltrent dans le boîtier.

Fréquence de nettoyage

Nettoyez l'appareil lorsque vous le jugez nécessaire. Le résultat final dépend des procédures internes et propres à chaque utilisateur, pour lesquelles la société Ascom n'est pas responsable.

Nettoyage avec une solution de désinfection

Appliquer la solution de désinfection liquide avec précaution, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux légèrement humidifié ou d'un chiffon doux en microfibre.

Les solutions de désinfection liquides suivantes peuvent être utilisées:

SOLUTION DÉSINFECTANTE LIQUIDE <small>(MARQUE INTERNATIONALE)</small>	Ascom teleCARE Modules	Ascom Telligence Modules	Ascom Telligence Unité TelliConnect	Tous les manipulateurs Ascom et leurs câbles
<i>Cidex</i>	X	X	X	X
<i>Medtrol Gluco-Chlor Bleach</i> (solution eau de javel)	X	X	X	X
Solution eau de javel à 10%	X	X	X	X

Nettoyage avec des lingettes

Appliquez la solution de désinfection avec soin. Un frottement important pendant le nettoyage, peut endommager la surface du périphérique.

Les lingettes nettoyantes suivantes peuvent être utilisées:

LINGETTES DE NETTOYAGE (MARGUES INTERNATIONALES)	Ascom teleCARE Modules	Ascom Telligence Modules	Ascom Telligence Unité TelliConnect	Tous les manipulateurs Ascom et leurs câbles
<i>PDI Sani-Cloth Plus (Rouge)</i>	X	X	X	X
<i>PDI Sani-Cloth Bleach (Orange)</i>	X	X	X	X
<i>PDI Sani-Cloth HB (Vert/bleuâtre)</i>	X	X	X	X
<i>PDI Sani-Cloth AF3 (Gris)</i>	X	X	X	X
<i>PDI Sani-Cloth AF (Blanc)</i>	X	X	X	X
<i>Clorox Disinfecting Wipes (Lingettes désinfectantes Clorox, sans javel)</i>	X	X	X	X
<i>Lingettes germicides Clorox</i>	X	X	X	X
<i>CaviWipes et CaviWipes XL</i>	X	X	X	X
<i>Dispatch Disinfectant Wipes (Lingettes désinfectantes, Dispatch)</i>	X	X	X	X
<i>ECOLAB Asepti-Wipe II</i>	X	X	X	X

Attention: Ne pas immerger ni utiliser de jet d'eau pour nettoyer les équipements.

Ascom (France) S.A.
48, rue Carnot
92150 Suresnes
Tel: +33 1 47 69 64 64
Fax: +33 1 47 69 64 52
www.ascom.com/fr

Toutes les solutions de nettoyage et de désinfection préconisées par Ascom, peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.